

DESCRIPCIÓN

ESENTA™ Spray (50 mL) para remover adhesivos, apósitos, materiales y dispositivos que se usan sobre la piel.

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

99% Hexamethyldisiloxane HMDSO
1% Octamethyltrisiloxane

**FABRICANTE AUTORIZADO EN EL REGISTRO**

Convatec Limited – Reino Unido

Sitio de manufactura: HYDROKEM AEROSOLS LTD – Reino Unido

Sitio de manufactura: WALTERS HOUGHTON LTD – Reino Unido

INSTRUCCIONES DE USO

1. Pulverice alrededor del borde del adhesivo y espere unos segundos.
2. Despegue suavemente el adhesivo de la piel con más vaporizador para facilitar la extracción, si es necesario.

CARACTERÍSTICAS Y ACCIONES DEL PRODUCTO

- Sistema Bag-on-Valve (BoV): Diseñado para no obstruirse cuando se utiliza boca abajo o invertido. Rocía en cualquier ángulo. La nueva tapa puede girar en cualquier dirección para mejorar su uso.
- No causa un choque de frío en la piel de los usuarios.
- Formulación 100% silicona, sedosa y suave al tacto.
- Ayuda a minimizar el desprendimiento de la piel.
- Seca rápidamente (en 30 segundos) sin dejar residuos.
- Libera rápidamente los accesorios o apósitos adheridos a la piel.
- No causa escozor.
- Protege la piel de los efectos nocivos de los adhesivos: irritación, enrojecimiento, acumulación de residuos.
- Elimina rápidamente los residuos de adhesivos.
- No se fabrica con látex de caucho natural
- No contiene siloxanos D5.
- Amigable con el medio ambiente.

PRECAUCIONES

- Evite el uso directo en lechos de heridas.
- Evitar su uso sobre superficies cutáneas delicadas o sensibles (ojos, boca, oídos, nariz, vagina).
- En caso de duda, haga una prueba en un área pequeña antes de su uso.
- Si se produce irritación cutánea, interrumpa su uso y consulte a un profesional de la salud.
- Evite la inhalación.
- Solo para uso externo.
- Si sucede algún incidente grave mientras se usa este producto o tras su uso, comuníquelo al fabricante y a la autoridad nacional pertinente

ADVERTENCIAS

- Usar solo según las indicaciones.
- Recipiente presurizado: puede explotar si se calienta. Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas expuestas y otras fuentes de ignición.
- No fumar.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

MUY INFLAMABLE**USOS**

Eliminación de adhesivos, apósitos, materiales y dispositivos que se usan sobre la piel.

VIDA ÚTIL

4 años

ESTERILIDAD

Producto no estéril

REGISTRO SANITARIOINVIMA 2021DM-0024336
VIGENCIA: 1 de octubre de 2031**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO**

- No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
 - Proteger de la luz solar.
- No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.

PRESENTACIONES

ICC	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRESENTACIÓN (UND/CAJA)
423289	ESENTA™ Sting Free Adhesive Remover	Spray 50ml