




**División Médicos**  
**Indicador Químico**  
**Comply**  
**1250**

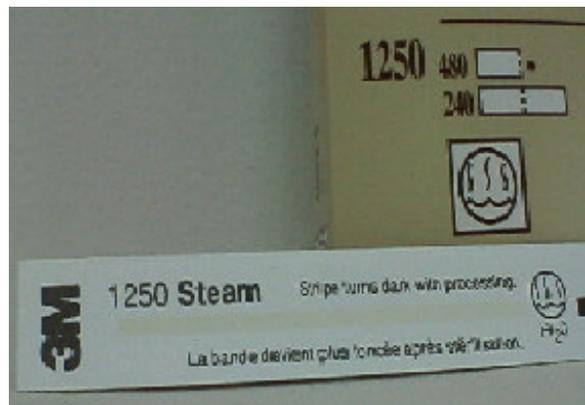

Fecha Digitación

30/03/2000

Fecha Actualización

01/10/2003

### Descripción

El indicador químico Comply 1250 está diseñado para indicar si el vapor ha penetrado hasta el centro del paquete. Deberá ser colocado un indicador químico interno dentro de cada paquete que va a ser esterilizado.

### Construcción (Composición)

El indicador químico Comply 1250 es una tinta de papel aproximadamente de 1,5 centímetros de ancho por 20 centímetros de largo, impresa con una tinta de indicador químico que cambia de color blancuzco a marrón oscuro/negro, después de la exposición al vapor.

### Especificaciones (Características Técnicas)

#### Usos (Aplicaciones)

El indicador químico Comply está diseñado para ser utilizado en todo tipo de esterilizadores de vapor. No emplee los indicadores Comply 1250 para esterilizadores con óxido de etileno, o en esterilizadores por calor seco. Cada tira está perforada en la parte central por si prefiere un indicador químico más corto.

#### Instrucciones de Uso

1. Coloque una tira de indicador químico Comply 1250 dentro de cada paquete, bolsa o bandeja que van a ser esterilizados por vapor.
2. En recipientes rígidos coloque una tira de indicador químico Comply 1250 en cada esquina, o por lo menos en dos esquinas puestos o en diagonal, en el sitio que representa el mayor reto.
3. Después de terminado el proceso, la línea de contraste en el indicador químico se volverá tan oscura o más que la referencia.

#### Precauciones y Primeros Auxilios

No coloque la tira de indicador en contacto directo con metal, pues en condiciones de esterilización (por ejemplo, vapor húmedo) podría producir la delaminación de la tinta del indicador. No use instrumentos contaminados con la tinta transferida.

#### Vida Útil del Producto

Las tiras de indicador químico Comply 1250 tienen una vida de 2 años.

## Notas Especiales

Conservese en condiciones ambientales (15-30°C. y 50% de humedad) y proteger de la luz.

## Condiciones de Transporte

## Concepto Técnico (Div. Medica):

## Presentaciones comerciales :

STOCKNUMBER	CODIGO DE BARRAS	DESCRIPCION	UNIDAD DE EMPAQUE
70-2006-1479-3		Indicador quimico 1250 multiparametro vapor	caja x 240 tirillas de 1.5 x 20 cms.

<b>NOTAS:</b>	<b>Datos Técnicos :</b>	Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran representativas, sin embargo, no implican garantía alguna.
	<b>Uso del Producto :</b>	El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación, 3M DESCONOCE CUALQUIER GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA O AJUSTES PARA PROPOSITOS PARTICULARES.
	<b>Indemnizaciones :</b>	Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se compromete únicamente a reemplazar la cantidad de producto que se comprueba defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra.
	<b>Limite de Responsabilidad :</b>	3M no se hace responsable por daños directos , indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso indebido, negligencia, estricta responsabilidad o cualquier otra teoría legal Las anteriores responsabilidades no podrán ser cambiadas excepto mediante algún acuerdo escrito, firmado por alguna persona de 3M

<b>3M BOGOTA</b> Avenida El Dorado No. 78A-93 Tel: 4161666 - 4161655 Fax: 4161677	<b>3M BARRANQUILLA</b> Carrera 55 No. 72 - 109 Ofc. 401B Tel: 095 - 3560722 Fax: 095- 3457432
<b>3M MEDELLIN</b> Calle 5A No. 39 - 194 Ofc. 502 Torre Cocasa Tel: 094 - 3118282 Fax: 094 - 3116292	<b>3M CALI</b> Carrera 100 No. 16 - 20 Piso 7 Tel: 092 - 3161414 Fax: 092 - 3322330

Nit: **860.002.693-3**

Consulte Más Información en Nuestro Web Site <http://www.mmm.com>

Si desea Enviar información a Nuestro E\_Mail: [servicioalcliente@mmm.com](mailto:servicioalcliente@mmm.com)

Tambien puede contactarnos a través de Nuestro PBX : **4108555**

Desde fuera de Bogotá totalmente gratis a la línea: **018000113636** o **018000113M3M**