

Ficha Técnica

Apósito Elect[◇] Hydro Border Apósito Elect[◇] Hydro Delgado Apósito hidrocoloide para heridas



Descripción

ELECT HYDRO son apósitos hidrocoloides absorbentes estériles, no irritantes, que consisten en una sola capa autoadhesiva recubierta con una película de carboximetilcelulosa. Están disponibles en dos variantes, Border y Thin, para heridas que tienen un exudado de ligero a moderado.

Indicaciones

- Úlceras por presión
- Úlceras en las piernas
- Úlceras en los pies por diabetes
- Heridas quirúrgicas
- Sitios de donantes
- Úlceras de pie diabético, incluyendo pequeñas quemaduras, abrasiones, cortes, laceraciones y granulaciones de heridas.

Contraindicaciones

- Heridas causada por quemaduras de espesor total
- Heridas infectadas clínicamente
- Pacientes con alergia conocida a los apósitos hidrocoloides

Características

- Proporciona un ambiente húmedo para curar las heridas
- La película superior de poliuretano es una barrera bacteriana
- La película superior de poliuretano es resistente al agua
- Los apósitos son fáciles de aplicar y de quitar
- No es sensibilizante ni irritante
- Autoadhesivo
- Los apósitos se pueden utilizar hasta por 7 días, dependiendo del exudado del paciente
- Adaptable

Instrucciones de uso

Los apósitos ELECT Hydro son fáciles de aplicar y de quitar.


- Limpie la herida con una solución salina o con un limpiador de heridas apropiado.
- Elija un vendaje lo suficientemente grande como para cubrir la herida con 2 cm de superposición en todos los lados de la herida.

Beneficios

- Fomenta la curación de las heridas
- Evita la contaminación externa o secundaria
- Permite ducharse al paciente
- Evita el trauma en el lecho de la herida y en los tejidos de granulación
- Adecuado para pacientes con piel sensible
- No se necesita fijación secundaria
- Lo que se traduce en menos cambios de apósito
- Fácil de utilizar y mejora la comodidad del paciente

Composición

Poliuretano y carboximetilcelulosa

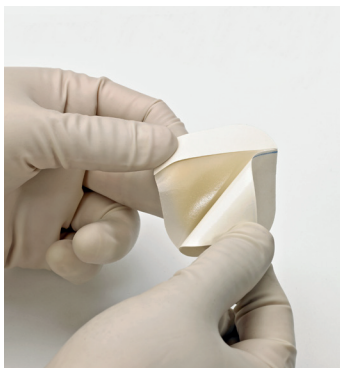

Retire el papel del respaldo para exponer la superficie adhesiva



Centre el apósito sobre la herida, presione suavemente el lado adhesivo hacia abajo y presione desde el centro hacia afuera



Apósito Elect[◇] Hydro Borde

Apósito Elect[◇] Hydro Delgado

Para retirarlo:

1. Presione hacia abajo sobre la piel y levante con cuidado el apósito empezando en un borde.
2. Remueva hacia el centro de la herida hasta que retire el apósito.
3. Limpie la herida con solución salina o con un limpiador de heridas apropiado, si es necesario.

Presentación

Apósitos ELECT HYDRO Border

Código Producto	Medida	Unidades / Envase
53HYB0505	5x5 cm	20
53HYB1010	10 cm x 10 cm	10
53HYB0812	8 cm x 12 cm	10
53HYB1515	15 cm x 15 cm	10
53HYB2020	20 cm X 20 cm	10

Apósitos ELECT HYDRO Thin

Código Producto	Medida	Unidades / Envase
53HYT0505	5 cm x 5 cm	20
53HYT1010	10 cm x 10 cm	10
53HYT1515	15 cm x 15 cm	10
53HYT2020	20 cm X 20 cm	10

Re. San.: INVIMA 2018DM- 0017702