

FICHA TECNICA
NOMBRE DEL PRODUCTO: Equipo para Administración de Soluciones IV
MARCA: Global Healthcare

DESCRIPCION: Equipo descartable para la administración de soluciones intravenosas que fluyen desde una bolsa, frasco o contenedor al sistema vascular del paciente por medio de una aguja o un catéter introducido en una vena.

CARACTERISTICAS: tienen cámara de ventilación con filtro antibacterial, filtro de soluciones en la cámara, la referencia 81-019 viene con un puerto en Y de bioseguridad.

COMPOSICION:

Tubo de extensión	PVC grado medico	101, 152, 213 cm.
Conector	resina 100%	3.0cm. Luer Lok, Luer Slip
Puerto Y	PVC grado medico	3.2x1.5 cm.
Regulador de Flujo	PVC grado medico	5.7x1.8x3.2 cm.
Cámara de Goteo	PVC transparente g. m.	5.5 cm.x1.8 diam
Filtro	resina 100% suave	15 micrón
Ventilación – Air Vent	Plástico	2.0x1.2 cm.
Punzón Universal	plástico hueco	3.5 cm.

PRESENTACIONES COMERCIALES: Por unidad en bolsa plástica sellada de 15 x 22 cm. 100 y 400 en caja de cartón corrugado. El empaque individual asegura la esterilidad del equipo.

Ítem	Descripción	Empaque	Medidas	Kg.	Código UCC-12
81-011	Equipo para A. de S. IV LS 10g /101 cm, sin aguja	100und/caja	33x25x42	2.7	872237005253
81-012	Equipo para A. de S. IV LS 10g /152 cm, sin aguja	100und/caja	33x25x42	3.4	872237005260
81-014	Equipo para A. de S. IV LS 60g /152 cm, sin aguja	100und/caja	33x25x42	3.4	872237005277
81-016	Equipo para A. de S. IV LS 10g /213 cm, sin aguja	100und/caja	33x25x42	3.4	872237005284
81-017	Equipo para A. de S. IV LL 10g /213 cm, sin aguja	100und/caja	33x25x42	3.4	872237005291
81-019	IV Set de Bioseguridad LL 10g /152 cm, sin aguja	100und/caja	33x25x42	3.4	872237007059
81-20G	Equipo para A. de S. IV LL aguja 20G	400und/caja	64x37x38	14.0	872237002986
81-21G	Equipo para A. de S. IV LL aguja 21G	400und/caja	64x37x38	14.0	872237003020
81-22G	Equipo para A. de S. IV LL aguja 22G	400und/caja	64x37x38	14.0	872237003068
81-20GLS	Equipo para A. de S. IV LS aguja 20G	400und/caja	64x37x38	14.0	872237003006
81-21GLS	Equipo para A. de S. IV LS aguja 21G	400und/caja	64x37x38	14.0	872237003044
81-22GLS	Equipo para A. de S. IV LS aguja 22G	400und/caja	64x37x38	14.0	872237003082


TIPO DE CONSERVACION: Almacenar en ambiente seco, evitar la luz solar directa, temperaturas extremas y gran humedad

TIPO DE TRATAMIENTO: Para administración de soluciones intravenosas que fluyen desde una bolsa, frasco o contenedor al sistema vascular del paciente por medio de una aguja o un catéter introducido en una vena.

INDICACIONES: 1) Preparar la bolsa, frasco contenedor con la solución a administrar 2) Cerrar la llave se paso del equipo 3) quitar el protector del conector y conector el perforador 4) Bombear la cámara de goteo hasta llenarla al nivel requerido 5) Si el equipo es de dos vías con filtro de aire: con bolsas flexibles cerrar el tapón y con bolsas rígidas abrir el tapón 6) Llenar el equipo y eliminar las burbujas de aire 7) Asegurarse que la aguja este bien conectada o sacar el tapón y conectar la aguja o catéter 8) Abrir la llave de paso del equipo y regular el flujo con el dispositivo de regulación 9) No permita que quede aire atrapado en el set.

OBSERVACIONES: Producto para uso único, deséchelo después de usarlo, reemplazar el equipo cada 24 horas como máximo, no utilice este producto si el empaque esta roto o dañado.


EQUIPO PARA ADMINISTRACION IV

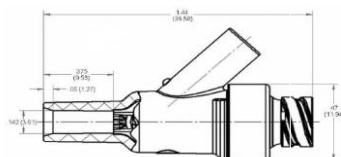

PUERTO EN Y DE BIOSEGURIDAD

PUERTO EN Y DE BIOSEGURIDAD

- No posee componentes metálicos
- Cumple con especificaciones ISO
- Libre de Látex
- Asegura el cierre después de la desconexión del conector Luer
- Compatible con los conectores Luer que cumplan normas ISO

Global Healthcare
ghc-colombia@globalhealthcare.net
www.ghc-salud.com