

Ficha Técnica

RENASYS[◇] -Foam con Soft Port, kits de espuma para la aplicación de terapia de presión negativa.



Descripción

• Los kits de drenaje contienen:

- RENASYS[◇] Soft Port con sistema de sellado, de doble lumen, resistente a la flexión y a la compresión.
- Espuma de poliuretano (Foam) de 400-600 μ , no genera residuo al cortar la esponja.
- Film transparente de poliuretano.

Estos kits han sido diseñados para utilizarse con las consolas RENASYS[◇]EZ y RENASYS[◇]EZ PLUS, RENASYS[◇] GO y EZCARE de Smith & Nephew.

Indicaciones

Los kits de apósitos para heridas Renasys[◇]-F/P están diseñados para utilizarlos conjuntamente con los sistemas de tratamiento de heridas con Presión negativa (NPWT) de Smith & Nephew con el objetivo de aplicar presión negativa a la herida. Los sistemas de terapia con presión negativa de Smith & Nephew pueden favorecer la cicatrización de las heridas.

Indicaciones

Los kits de apósitos para heridas RENASYS[◇] -F están diseñados para utilizarlos conjuntamente con los sistemas de tratamiento de heridas con presión negativa (TPN) de Smith & Nephew con el objetivo de aplicar presión negativa a la herida. Los sistemas de terapia con presión negativa de Smith & Nephew pueden favorecer la cicatrización de las heridas.

La TPN es un sistema apropiado para los siguientes tipos de heridas:

- Úlceras por presión.
- Úlceras diabéticas/neuropáticas.
- Úlceras por insuficiencia venosa.
- Heridas traumáticas.
- Heridas quirúrgicas postoperatorias y por dehiscencia.
- Fístulas exploradas.
- Injertos y colgajos cutáneos.
- Heridas resistentes a tratamiento convencional o que se prevé sean de larga duración.
- Heridas profundas y/o con gran cantidad de exudado.
- Como tratamiento coadyuvante a otras intervenciones o técnicas o en la preparación del lecho de la herida para otras intervenciones.

Contraindicaciones

Contraindicado en pacientes con:

- Tejido necrótico (escaras).
- Osteomielitis no tratada.
- Heridas malignas (excepto para mejorar la calidad de vida).
- Órganos o vasos expuestos.
- Fístulas no exploradas.

Precauciones

Deben tomarse precauciones en pacientes con:

- Tratamiento anticoagulante.
- Problemas de hemostasia.
- Mala disposición o agresividad del paciente
- Malnutrición no tratada.

Composición

<p>Soft Port con sistema de sellado: Lámina de poliuretano, filtro de polietersulfona sobre poliéster no tejido con adhesivo, inserto de espuma de poliuretano, tejido de poliéster y conectores de polipropileno, termoplástico y nylon.</p>	
<p>Film Transparente: Poliuretano de adhesivo acrílico Permeabilidad vapor de agua a 37°C (g/m²/24hrs): 600 mínimo. Adhesión al acero (kgf/cm): 250- 500. Resistencia a la tracción (kgf/cm): 0,75 mínimo. Extensibilidad (kgf/cm): 0,2 máximo. Alargamientos y rotura (%): 500 mínimo.</p>	
<p>Espuma (Foam): Poliuretano 400-600μ, no genera residuo al cortar la esponja -600</p>	

RENASYS[◊] -Foam con Soft Port, kits de espuma para la aplicación de terapia de presión negativa.

Contenido del Kit

	Pequeño	Mediano	Grande	Extra Grande
Drenaje y Sistema de Sellado	Sí	Sí	Sí	Sí
Film Transparente	1 film de 20 cm x 30 cm	2 films de 20 cm x 30 cm	3 films de 20 cm x 30 cm	6 films de 20 cm x 30 cm
Espuma Foam	10 cm x 8 cm x 3 cm	20 cm x 12,5 cm x 3 cm	25 cm x 15 cm x 3 cm	48 cm x 41 cm x 1,5 cm

Presentación

Código de Producto	Descripción	Unidades envase	Unidades de embalaje	Código EAN envase 
66800794	RENASYS [◊] -F Pequeño	1	5	0040565125916
66800795	RENASYS [◊] -F Mediano	1	5	0040565125923
66800796	RENASYS [◊] -F Grande	1	5	0040565125930
66800797	RENASYS [◊] -F Extra Grande	1	5	0040565125947

Re. San.: INVIMA 2011DM-0007065

Certificación 	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante 
ON n° 0297 CE n° 404394 MRZ Clase CE IIb Smith & Nephew, S.A.U ISO 9001:2008 			 12 meses   	 Smith & Nephew, Inc. 970 Lake Carillon Drive. Suite 110 ST. Petersburg, FL 33716.  Smith & Nephew Medica Limited Hull HU3 2BN, England UK. Distribuidor Smith & Nephew, S.A.U

Leyenda símbolos

 No contiene látex	 Producto esterilizado con óxido de etileno
 Caducidad	 No reutilizar
 Manténgase en lugar seco	 Temperatura de almacenamiento
 No utilizar si el envase está abierto o dañado	 Representante autorizado
 Fabricante	

Smith&Nephew Colombia SAS

Calle 100 N° 7-33 Torre 1 Piso 3, Bogotá

Tel: 57 (1) 605 7373

www.smith-nephew.com

◊ Marca registrada de Smith&Nephew