

## ALLEVYN<sup>◇</sup> Life apósito multilobular con indicador de cambio y capa enmascaradora para el tratamiento de heridas exudativas.



### Descripción

El apósito adhesivo de gel de silicona ALLEVYN Life proporciona una cura en ambiente húmedo que favorece el proceso de cicatrización de heridas con niveles de exudado de moderados a altos. El apósito está compuesto por una almohadilla absorbente con una capa de espuma y una sección central de retención del exudado fabricadas con un material altamente absorbente y una capa enmascaradora sobre el centro que disimula la mancha de exudado. La capa adhesiva de silicona es suave incluso para la piel frágil y facilita la colocación, reaplicación y retirada del apósito. El film exterior transpirable evita la contaminación bacteriana y es impermeable.

### Modo de Acción

El apósito LIFE tiene una estructura de capas, de diseño avanzado, que facilita una gestión dinámica de los fluidos. Proporciona la humedad óptima, en el lecho de la herida, que promueve la cicatrización y que puede contribuir a reducir el riesgo de maceración. La superficie de contacto de ALLEVYN LIFE con la herida está recubierta con una capa adhesiva de silicona suave que asegura una retirada atraumática en los cambios de apósito. ALLEVYN LIFE puede retirarse y colocarse sin perder sus propiedades adherentes, aunque sigue siendo necesario comprobar que no se arrugue o estire. ALLEVYN LIFE puede permanecer in-situ sin necesidad de utilizar sujeción secundaria, lo que facilita la colocación y retirada del apósito.

### Indicaciones

Cicatrización de heridas poco profundas por segunda intención, en proceso de granulación, crónicas y agudas con alto nivel de exudado, heridas de espesor parcial y total, como: úlceras por presión, úlceras de pierna, úlceras de pie diabético, heridas quirúrgicas, quemaduras de primer y segundo grado, zonas donantes, desgarros de la piel, úlceras fúngicas. Puede utilizarse en combinación con el GEL INTRASITE™ para el tratamiento de heridas necróticas o con tejido esfacelado. También indicado para la prevención de úlceras por presión en piel sana como parte del protocolo de prevención de úlceras por presión.

### Características

- Exclusivo diseño con lengüetas, permite una adaptación más segura que los apósitos tradicionales, incluso en áreas difíciles.
- Capa opaca que reduce el impacto visual del exudado y proporciona un indicador visual para los cambios de apósito.
- Capa central que bloquea el exudado en su interior.
- Capa de espuma de poliuretano con una elevada capacidad de absorción que retiene el exudado, incluso bajo presión.
- Película exterior impermeable que actúa como barrera bacteriana, previniendo la contaminación de la lesión.
- No se adhiere al lecho de la lesión, minimizando el trauma durante los cambios de apósito.
- Puede retirarse y colocarse sin perder sus propiedades adherentes.
- Minimiza el riesgo de maceración de la piel.

### Instrucciones de uso

1. Limpie la herida conforme a los procedimientos normales.
2. Seleccione el tamaño de apósito adecuado.
3. Prepare y limpie la piel alrededor de la herida, eliminando el exceso de humedad. El vello sobrante debería recortarse para asegurar un contacto estrecho con la herida.
4. Retire una parte del material protector de ALLEVYN LIFE y coloque el lado adhesivo del apósito sobre la piel. Alise el apósito sobre la herida comprobando que no queden arrugas.
5. Retire el resto del material protector y alise el apósito. Asegúrese de que solamente la zona de la almohadilla este colocada sobre el lecho de herida.
6. ALLEVYN LIFE puede utilizarse para la cicatrización de heridas en zonas difíciles como talones y codos. Las lengüetas en las esquinas del apósito pueden solaparse durante la colocación del apósito asegurando que no queden arrugas o que el apósito se estire.

### Contraindicaciones

- No cortar la almohadilla absorbente ya que los componentes internos del apósito podrían contaminar la herida retrasando la cicatrización de la misma.
- No sumergir el apósito en agua.
- No utilizar el apósito en combinación con agentes oxidantes como soluciones de hipoclorito (p.ej., EUSOL) o peróxido de hidrógeno, ya que estos pueden reducir las propiedades absorbentes del apósito.
- Si se observa enrojecimiento o sensibilización, interrumpir el uso.
- El uso del apósito como parte de una terapia profiláctica para la prevención de úlceras por presión no debería excluir que se utilice y siga un protocolo exhaustivo para la prevención de úlceras por presión (p.ej., cambiar la posición del paciente regularmente, utilizar un colchón y realizar un cuidado de la piel adecuados).
- Para un solo uso, si se utiliza en más de un paciente puede dar lugar a contaminaciones o infecciones cruzadas).
  - Después de abrir el envase, los apósitos no utilizados no deben guardarse para su posterior aplicación.
  - Cuando se utilice en heridas infectadas, estas deben inspeccionarse y tratarse según el protocolo clínico local.

# ALLEVYN <sup>◇</sup> Life apósito combinado de espuma hidrocélular con adhesivo de silicona.

## Composición

Película exterior: Film de poliuretano.

Capa central trilaminar:

- Capa de Espuma hidrocélular de poliuretano.
- Capa de Fibra de celulosa y partículas de poliacrilato
- Capa opaca de Tejido de poliéster hidrófilo.
- Capa de contacto: Film de poliuretano con adhesivo de gel de Silicona

## Retirada del apósito

Para retirar el apósito ALLEVYN LIFE, levante una de las esquinas de la lengüeta del apósito y despéguelo despacio hasta retirarlo por completo de la herida.

## Especificaciones técnicas

Capacidad de absorción: mín. 94 g/100 cm<sup>2</sup>.

Capacidad de retención de fluidos tras compresión: 77%

Permeabilidad al vapor de agua (apósito): máx. 3.500 g/m<sup>2</sup> 24h.

Permeabilidad al vapor de agua (bordes): máx. 600 g/m<sup>2</sup> 24h.

Capacidad total de manipulación de líquidos: mín. 110 g/100 cm<sup>2</sup> 24h.

## Frecuencia de cambio

Durante las primeras etapas de cicatrización de la herida, los apósitos

ALLEVYN LIFE deberían inspeccionarse con frecuencia. Cuando se Utilice en heridas infectadas, la infección debería inspeccionarse y Tratarse conforme al protocolo clínico local.

Los apósitos pueden permanecer colocados hasta 7 días, excepto en la región sacra que son 5 días, dependiendo del estado de la herida

y de la piel de alrededor o hasta que el exudado cubra más de la mitad

de la almohadilla absorbente, fuera de la malla central.



## Presentación

Código Producto	Descripción	Unidades / Envase	Código EAN
66801067	Allevyn Life Pequeño 10,3 CM X 10,3 CM	10	5000223477998
66801068	Allevyn Life Mediano 12,9CM X 12,9 CM	10	5000223478025
66801069	Allevyn Life Grande 15,4CM X 15,4 CM	10	5000223478056
66801070	Allevyn Life Extra grande 21 CM X 21 CM	10	5000223478087
66801304	Allevyn Life Talón (heel) 25CM X 25,2 CM	5	5000223482510
66801306	Allevyn Life Sacro pequeño 17,2CM X 17,5 CM	10	5000223482438
66801307	Allevyn Life Sacro grande 21,6 CM X 23 CM	10	5000223481476

Re. San.: INVIMA 2012DM-001719-R2

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON n° 0086 CE n° CE 00356 Clase CE III, estéril Smith & Nephew, S.A.U ISO 9001:2008 			   	  Distribuidor Smith & Nephew, SAU

### Leyenda símbolos



No contiene látex



Caducidad



Manténgase en lugar seco



No exponer el producto a la radiación solar



Fabricante



Producto esterilizado por irradiación



No reutilizar



Temperatura de almacenamiento



No utilizar si el envase está abierto o dañado

Smith&Nephew Colombia SAS  
Calle 100 N° 7-33 Torre 1 Piso 3,  
Bogotá  
Tel: 57 (1) 605 7373  
www.smith-nephew.com

◇ Marca registrada  
Smith&Nephew