

Berater-Handbuch Bandagen & Orthesen

Standardversorgung

Ellenbogenbandage



Ellenbogen-Kompressionsbandagen mit Pelotten Anforderungen laut GKV-Spitzenverband:

- Zweizugmaterial, flach- oder rundgestrickt
- Druckverstärkende Pelotte aus elastischen Materialien
- Reinigungsmöglichkeit bei mindestens 30°C

Wichtiger Hinweis zur Erstattungsfähigkeit:

§12 Sozialgesetzbuch V

(1) Die Leistungen müssen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein; sie dürfen **das Maß des Notwendigen** nicht übersteigen.

Medizinische Wirkungsweise

KOMPRESSION DES GESTRICKS

- Entlastung und Stabilisierung des Ellenbogengelenks
- Schmerzlinderung

ZWEI STRUKTURIERTE GENOPPTE SILIKONPELOTTEN

- Intermittierende Friktionsmassage:
Beschleunigte Resorption von
Ergüssen durch Hyperämisierung

ZIRKULÄRES STABILO-BAND

- Erhöht den Druck auf den Muskelbauch
und sorgt für eine zusätzliche Entlastung
am Sehnenansatz

Qualitätsmerkmale und Kundenvorteile

ABGEKETTELTER, EXTRA-WEICHER ABSCHLUSSRAND

Druckreduktion für erhöhten Tragekomfort


INNOVATIV: STABILO®-BAND MIT EASYCLICK-SYSTEM

- Komfortables Verschluss-System mit einfacher Fixierung und Längeneinstellung des Stabilo-Bandes; schnelles und einfaches Anlegen
- Individuell zu dosierender Pelottendruck

SOFTFLEX PLUS-FUNKTIONSGESTRICK

Besonders weiche, der Haut zugewandte Oberflächenstruktur

BREEZE Komfort-Faser mit kühlendem Effekt:
mehr Wohlgefühl durch Wärmeaustausch

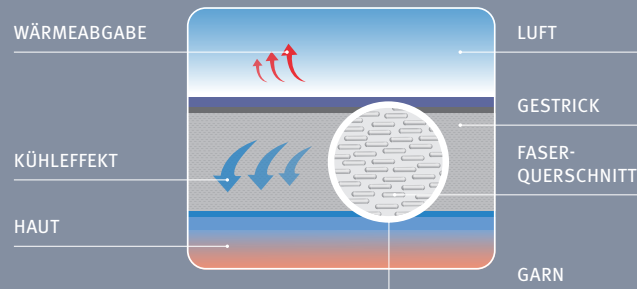

ZWEI STRUKTURIERTE SILIKONPELOTEN

FORMGESTRICT

Mit druckverminderter Zone über Olecranon

LÄNGSELASTISCHE DEHNUNGSZONE IM ELLENBOGENBEREICH

Sorgt für optimalen Sitz in allen Beugewinkeln

COMFORT

Ellenbogenbandage plus



REF 141 720

Pos.Nr. 05.08.01.1065

Standardversorgung

Handgelenkbandage



Handgelenk-Kompressionsbandagen Anforderungen laut GKV-Spitzenverband:

- Zweizugelastisches Material
- Druckverstärkende Pelotten aus elastischen Materialien
- Individuelle An- und Nachpassungsmöglichkeit
- Reinigungsmöglichkeit bei mindestens 30°C

Wichtiger Hinweis zur Erstattungsfähigkeit:

§12 Sozialgesetzbuch V

(1) Die Leistungen müssen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein; sie dürfen **das Maß des Notwendigen** nicht übersteigen.

Medizinische Wirkungsweise

KOMPRESSION DES GESTRICKS

- Verbesserte Resorption von Gelenkergüssen durch verbesserte Durchblutung
- Schmerzlinderung

VOLARE ALU-SCHIENE UND ZIRKULÄRES STABILO-BAND

- Entlastung und Stabilisierung des Handgelenks in Funktionsstellung
- Minderung von Belastungen der Handwurzelknochen, der Gelenkkapsel und der Bänder

INTEGRIERTE SILIKONPELOTTE

- Entlastung des Ulnarköpfchens



Qualitätsmerkmale und Kundenvorteile

ABGEKETTELTER, EXTRA-WEICHER ABSCHLUSSRAND

Druckreduktion für erhöhten Tragekomfort


FREI POSITIONIERBARES STABILO®-BAND

Zur individuellen Fixierung der Bandage

SOFTFLEX PLUS-FUNKTIONSGESTRIK

Besonders weiche, der Haut zugewandte Oberflächenstruktur

BREEZE Komfort-Faser mit kühlendem Effekt:
mehr Wohlgefühl durch Wärmeaustausch

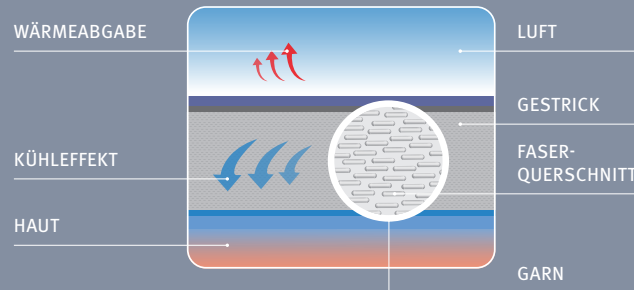

EXTRA ELASTISCH IM BEREICH DES HANDGELENKS UND
DES UNTERARMS

Besonders leichtes Anlegen

SILIKONPELOTTE MIT AUSSPARUNG AM
PROCESSUS STYLOIDEUS ULNARIS

Zur intermittierenden Massage

COMFORT

Handgelenkbandage



REF 141 100

Pos.Nr. 05.07.02.0155

Standardversorgung

Rückenbandage



Stabilisierungsothese der LWS mit Rückenpelotte Anforderungen laut GKV-Spitzenverband:

- Dosierbarer Druck
- Stabilisierende oder selbsttragende Elemente
- Individuelle An- und Nachpassungsmöglichkeiten
- Positionierbare und/oder indiv. anpassbare Rückenpelotte
- Regulierbarer Verschluss
- Verstärkungselemente
- Reinigungsmöglichkeit bei mind. 30°C

Wichtiger Hinweis zur Erstattungsfähigkeit:


§12 Sozialgesetzbuch V

(1) Die Leistungen müssen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein; sie dürfen **das Maß des Notwendigen** nicht übersteigen.

Medizinische Wirkungsweise

BANDAGENMANTEL MIT VERSTÄRKUNGSSTÄBEN

- Entlastung und Stabilisierung der Lendenwirbel
- Aktivierung von Muskelarbeit und Druckaufbau im Bauchraum unterstützt die Entlordosierung
- Aufweitung des Spinalkanals
- Schmerzlinderung

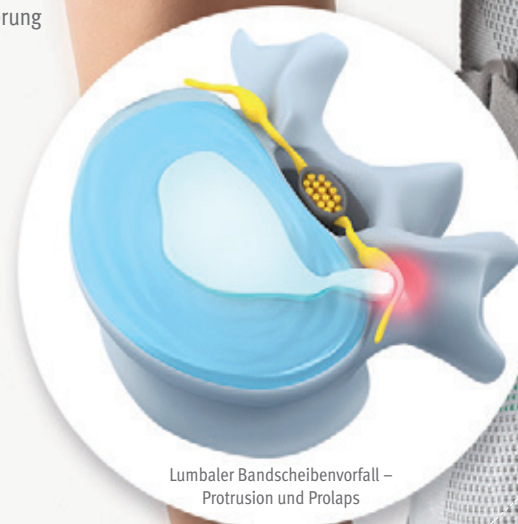

Lumbaler Bandscheibenvorfall –
Protrusion und Prolaps

GENOPPTE KREUZBEIN-SILIKONPELOTTE

- Friktionsmassage durch Körperbewegung im Lendenwirbelbereich zur Lösung von Verspannungen und Schmerzlinderung

Qualitätsmerkmale und Kundenvorteile

WEICHER ABSCHLUSSRAND

Druckreduktion für erhöhten Tragekomfort

DREI ANATOMISCH VORGEFORMTE STÄBE

Zusätzliche Verstärkung zur Stabilisierung der LWS

HANDSCHLAUFEN

Kraftsparendes, komfortables Anlegen

TAILLIERTER SCHNITT (DAMENVARIANTE)

Speziell für Damen optimierte Passform

VISCOELASTISCHE KREUZBEIN-PELOTTE, VARIABLE POSITIONIERBAR

Massiert sanft rund um das Kreuzbein betroffene Bereiche. Dies unterstützt das Lösen von Verspannungen und kann Schmerzen lindern.

COMFORT

Rückenbandage plus / Lady Rückenbandage plus



REF 141 810

Pos.Nr. 23.14.03.3080



REF 141 840

Pos.Nr. 23.14.03.3081

Standardversorgung

Kniebandage



Kniebandagen zur Weichteilkompression Anforderungen laut GKV-Spitzenverband:

- Zweizugelastisches Trägermaterial
- Medizinischer Kompressionsverlauf entsprechend der KKL II
- Anatomisch geformt und/oder konstruiert
- Abgeschwächte Kompression an den Bandagenrändern, kein unzutraglicher Druck
- Druckverstärkende Pelotten aus elastischem Material

Wichtiger Hinweis zur Erstattungsfähigkeit:

§12 Sozialgesetzbuch V

(1) Die Leistungen müssen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein; sie dürfen **das Maß des Notwendigen** nicht übersteigen.


Medizinische Wirkungsweise

KOMPRESSION DES GESTRICKS

- Unterstützung der Haltefunktion des Kapsel-Band-Apparats (z.B. Innen- und Außenband) und damit Entlastung des Kniegelenks
- Verbessertes Stabilitätsgefühl mit mehr Sicherheit für ein physiologisches Gangbild

PELOTTE

- Massageeffekt zur Reduktion und rascheren Rückbildung von Schwellungen oder Schwellneigung
- Positionierung und Führung der Patella im normalen Bewegungsablauf und damit weitgehende Vermeidung von Fehlbewegungen
- Pelottendruck auf das Kniescheibenband kann zur Schmerzlinderung/ -vermeidung und zu einer verbesserten muskulären Führung des Kniegelenks führen (Gate-Control)

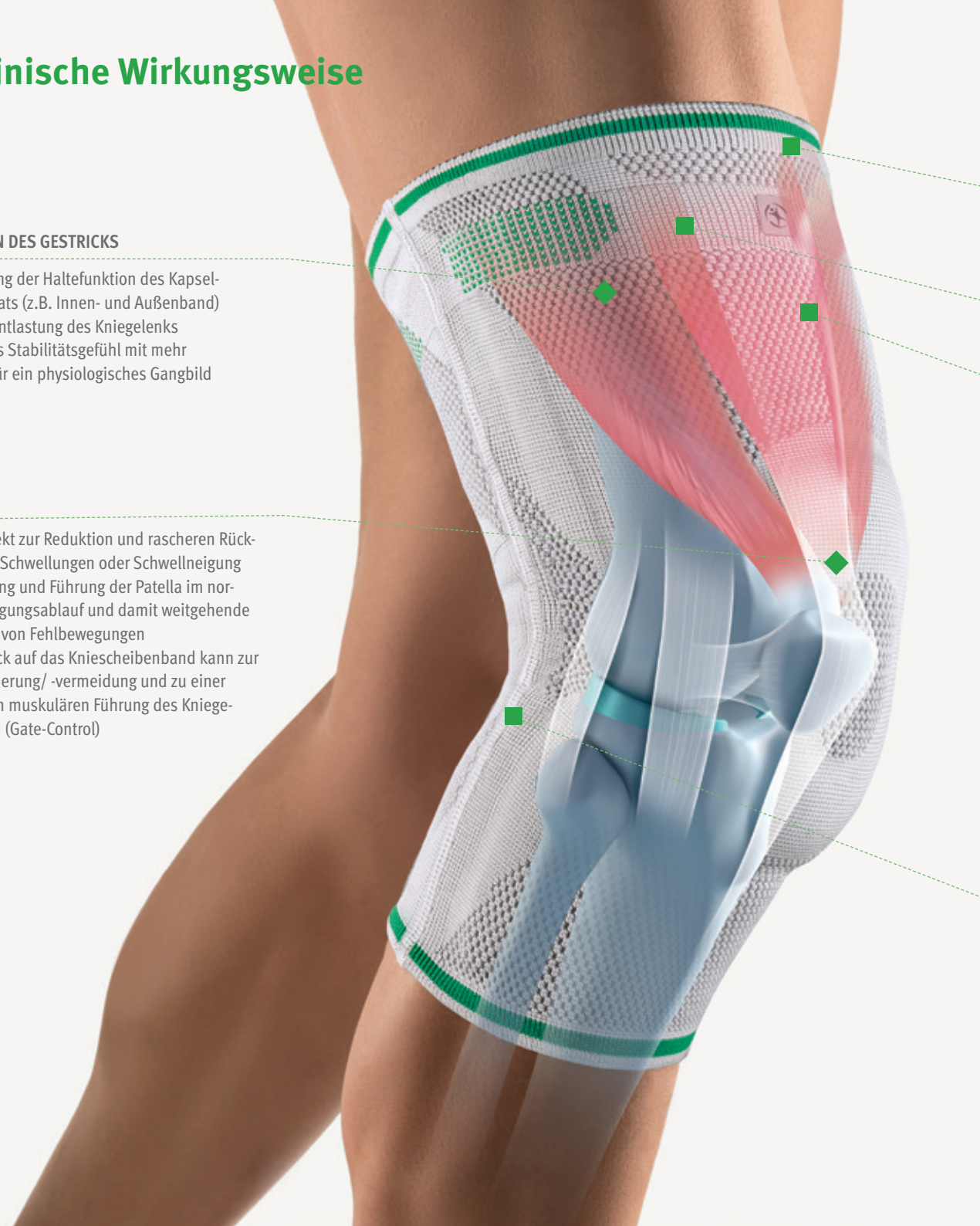

Qualitätsmerkmale und Kundenvorteile

ABGEKETTELTER, EXTRA-WEICHER ABSCHLUSSRAND

Druckreduktion für erhöhten Tragekomfort


INGESTRICKTE SILIKON-HAFTZONE IM BEREICH DES OBERSCHENKELS

Vermindert das Rutschen der Bandage nach unten

SOFTFLEX PLUS-FUNKTIONSGESTRICK

Besonders weiche, der Haut zugewandte Oberflächenstruktur

BREEZE Komfort-Faser mit kühlendem Effekt:
mehr Wohlgefühl durch Wärmeaustausch

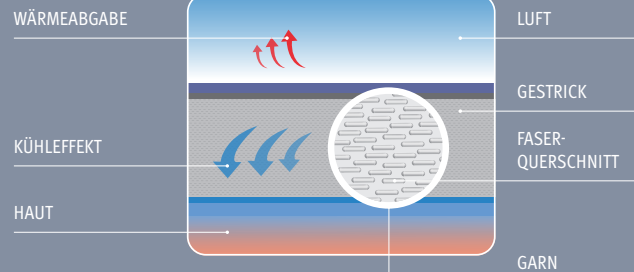

HOCHWERTIGE SILIKONPELOTTE

Zur Druckentlastung und intermittierenden Massage

EXTRA-WEICH GESTRICKTE KNIEKEHLE

Kein Einschnüren der Kniekehle

PLUS-GRÖSSEN-SYSTEM

Sehr gute Passform

COMFORT

Kniebandage



REF 141 400

Pos.Nr. 05.04.01.0127

Standardversorgung

Knöchelbandage



Knöchelbandagen zur Sprunggelenk-Weichteilkompression mit zusätzlichen Funktionselementen

Anforderungen laut GKV-Spitzenverband:

- Zweizugkompressionsbandagen
- Lokale Druck-/Zusatzpolster aus elastischem Material
- Zusätzliches Funktionselement, das mindestens eine Bewegungsrichtung einschränkt

Wichtiger Hinweis zur Erstattungsfähigkeit:

§12 Sozialgesetzbuch V

(1) Die Leistungen müssen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein; sie dürfen das Maß des Notwendigen nicht übersteigen.

Medizinische Wirkungsweise

KOMPRESSION DES GESTRICKS

- Stabilisierung, Komprimierung und Entlastung des Sprunggelenks
- Schmerzlinderung

ZWEI STRUKTURIERTE SILIKONPELOTTEN (INNEN-UND AUSSENKNÖCHEL)

- Friktionsmassage beschleunigt durch die Aktivierung der Durchblutung die Resorption von Ödemen und Ergüssen



Qualitätsmerkmale und Kundenvorteile


ABGEKETTELTER, EXTRA-WEICHER ABSCHLUSSRAND

Druckreduktion für erhöhten Tragekomfort

SOFTFLEX PLUS-FUNKTIONSGESTRICK

Besonders weiche, der Haut zugewandte Oberflächenstruktur

BREEZE Komfort-Faser mit kühlendem Effekt:
mehr Wohlgefühlqualität durch Wärmeaustausch

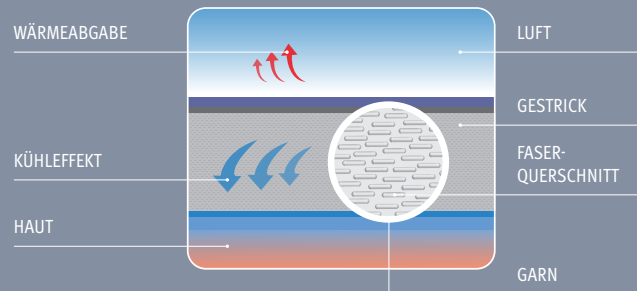

ZWEI SILIKONPELOTEN

Zur intermittierenden Massage

FORMGESTRICT

Druckminderung im Fesselabschluss

COMFORT

Knöchelbandage



REF 141 600

Pos.Nr. 05.02.01.0085



Vertrieb durch / *distributed by:*

VPS Medical Ltd.

Thomas-Mann-Straße 69

90471 Nürnberg

Tel.: +49 911 2402999 55

Fax.: +49 911 2402999 66

www.vps-medical.com



Hersteller / Manufacturer:

BORT GmbH | Am Schweizerbach 1 | 71384 Weinstadt-Benzach | Germany