


# Manuel d'utilisation



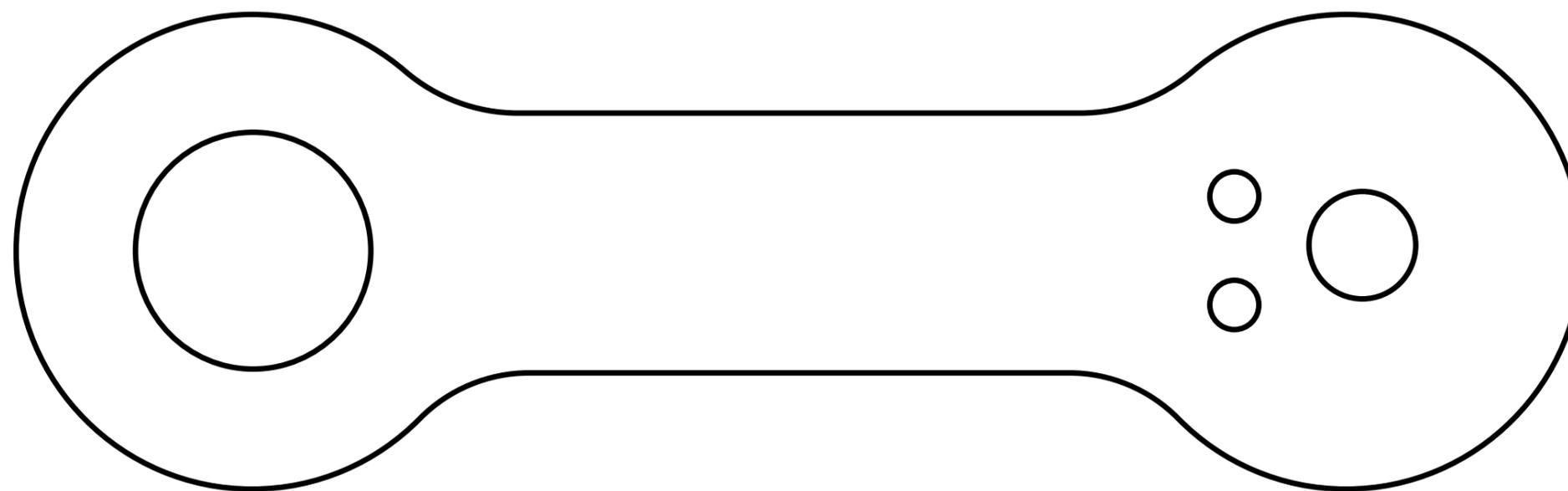

Mettre le **CardioPod**  
dans ce sens.  
(coté main droite)



2

1 pression longue  
(> 4 secondes)  
enclenche/  
déclenche le  
CardioPod



3

**5 pressions  
courtes et  
successives sur le  
bouton mettent  
le CardioPod  
en mode de  
configuration.**

4

1 pression longue  
(> 12 secondes)  
pour redémarrer  
le CardioPod  
et **réinitialise**  
**les paramètres**  
**utilisateur et**  
**l'horloge interne.**

5

Dans le cas où la batterie est déchargée (<5%). Le CardioPod fait clignoter la LED rouge rapidement, et cela pendant 20 minutes avant de se mettre en veille profonde.



# 6

Lorsque le CardioPod est posé sur le chargeur, la LED rouge se met à clignoter pour indiquer la recharge.

Pendant la recharge, la LED rouge clignote d'abord rapidement (tant que la batterie est <5%), puis lentement (dès que >5%), pour finalement s'allumer en continu lorsque la recharge est complète (100% au max. après 3 heures). Le CardioPod peut alors être enlevé du chargeur.



7

Lors d'un allumage depuis le mode de veille profonde ou un reset (pression longue sur le bouton poussoir > 12 secondes).

Les 2 LED clignotent 4 fois simultanément pour indiquer le redémarrage.

