



SARS-COV-2 ANTIGEN SCHNELLTEST

DIE ANWENDUNGSFREUNDLICHE UND VERLÄSSLICHE LÖSUNG FÜR IHREN POINT OF CARE

In-Vitro-Test zum direkten und qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2 Antigenen



EINFACH

- Vereinfachte, flexible Handhabung durch Einzelportionierung der Pufferlösung
- Nasen- und Rachenabstrich möglich
- Direkte Auswertung vor Ort, kein Labor nötig



SCHNELL

- Einwirkzeit in Extraktionspuffer nur 15 Sekunden
- Testergebnis in 15 Minuten



SICHER


- Hohe Hygienestandards durch Einzelportionierung der Pufferlösung
- Sensitivität: 96,5%, Spezifität: 99,7%
- BfArM-Liste der zugelassenen Antigentests (Test-ID: AT074/20)



PACKUNGSINHALT

- 20 Testkassetten
- 20 sterile Abstrichtupfer
- 20 Extraktionsröhrchen und Kappen
- 20 Pufferlösungen
- 1 Probenhalter
- 1 Gebrauchsanleitung

PROBENAHEME UND VERFAHREN

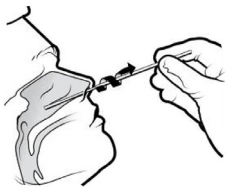


Kopf des Patienten um 70 Grad kippen. Tupfer in Nasenloch einführen und einige Sekunden belassen, um Sekrete aufzunehmen. Tupfer in Drehbewegung entfernen.



Für den Abstrich im Rachenraum einen Tupfer in den Mund einführen, den hinteren Rachenraum und die Tonsillarbereiche abtupfen.



1

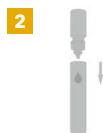


2



3

15 Sekunden

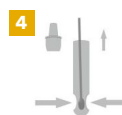

4



5



6

Portionierte Pufferlösung in Extraktionsröhrchen geben. Abstrich 15 Sekunden einwirken lassen und rotieren. Anschließend Abstrichtupfer unter Druck entfernen.

Mit Kappe Extraktionsröhrchen schließen und anschließend 2-3 Tropfen der zu testenden Probe auf die vorgesehene Probenaufnahme füllen.

ERGEBNISINTERPRETATION

Positives Ergebnis

Farbige Linien erscheinen sowohl an der Testlinie (T) als auch an der Kontrolllinie (C).

Negatives Ergebnis


Farbige Linie erscheint nur an der Kontrolllinie (C).

Ungültiges Ergebnis


Nach dem Test wird keine sichtbare farbige Linie an der Kontrolllinie angezeigt.



positiv

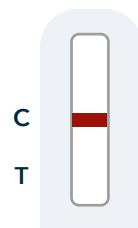

negativ

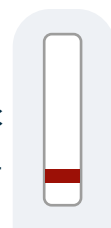


ungültig



ungültig

Sensitivität	96,5 %
Spezifität	99,7 %
Packungsgröße	20 Tests inkl. aller Verbrauchsmaterialien
Pharmazentralnummer	PZN 16951430
Hersteller	Beijing Beier Bioengineering Co., Ltd.
Europäischer Bevollmächtigter	MedNet EC-REP GmbH

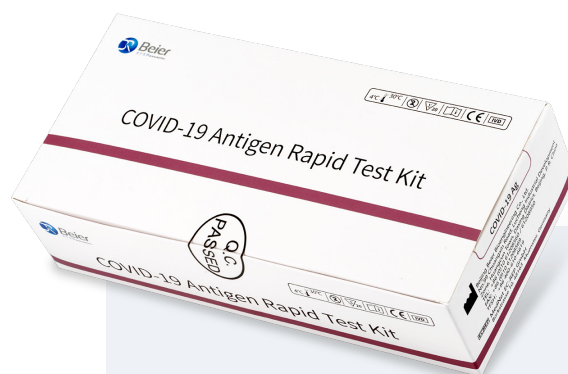

BESTELLEN SIE HIER:

WWW.RAPIDCARE-WEBSHOP.COM

FAX:

+49 241 400 723 02

FÜR TELEFONISCHE RÜCKFRAGEN:

+49 241 400 723 01