



ESSENTIALS COMFORT



BEDIENUNGSANLEITUNG



SOS-Uhr



GPS-Ortung



Indoor-/Outdoor-
Konnektivität



2-Wege-
Kommunikation

zembro.com

Zembro Essentials Comfort

Zembro Essentials Comfort ist eine SOS-Uhr zur Auslösung eines Notrufs.

MERKMALE

- Notruf in Innenräumen und im Freien per Knopfdruck
- Anrufknopf, Mikrofon und Lautsprecher eingebaut
- Klare Sprachqualität
- Sichere Verbindung durch integrierte SIM-Karte mit europaweiter Abdeckung.

Ihre Zembro Essentials Comfort ist eine aufladbare Notruf-Uhr, die über eine integrierte SIM-Karte verfügt, sodass die Uhr immer mit Zembro verbunden ist, egal ob Sie sich drinnen oder draußen aufhalten.

Ihre Zembro Essentials Comfort wurde in erster Linie als Uhr und ein äußerst zuverlässiges Notrufgerät entwickelt, das Sie immer begleitet.

Sie funktioniert drinnen und draußen überall dort, wo ein Handy- und GPS-Netz verfügbar ist.

Ihre Uhr kennenlernen

VORDERSEITE



Ihre Uhr kennenlernen

RÜCKSEITE



Ihre Uhr kennenlernen

SEITE

SIM-Karten-Halter

Es ist verboten,
die SIM-Karte zu
entfernen



Lautsprecher



Zubehör




USB-Kabel



Silikonarmband



Ladestation

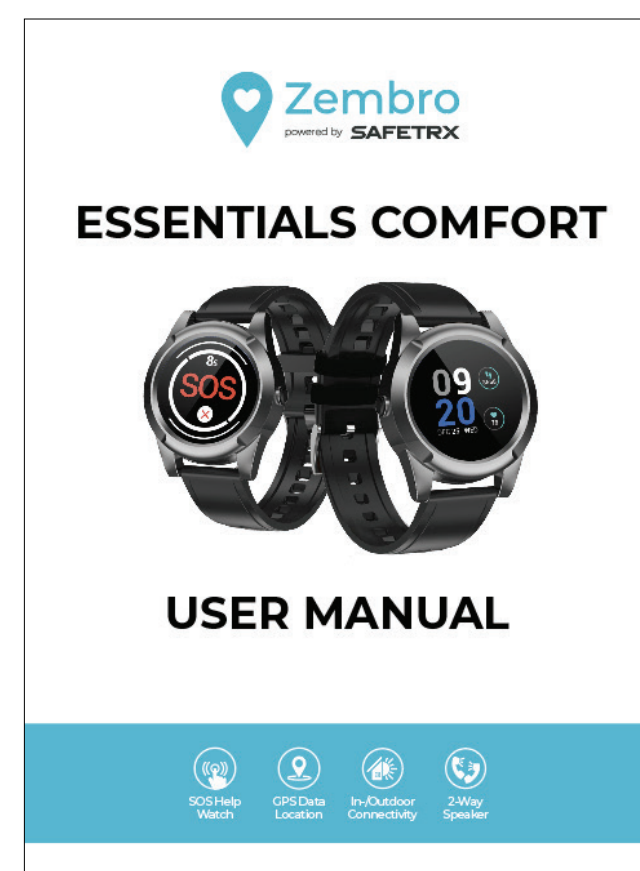


Englische
Bedienungsanleitung

Bitte konsultieren Sie unsere Website für die neueste Bedienungsanleitung auf Niederländisch, Englisch, Französisch und Deutsch.

Ihre Uhr aufladen



- Verbinden Sie das USB-Kabel von der Ladestation mit dem Netzadapter
- Legen Sie die Uhr richtig in die Ladestation; Sie hören die Bestätigung „Ihre Uhr wird geladen“.
- Bitte laden Sie die Batterie täglich ca. 2 Stunden lang vollständig auf, oder wenn die Batterie fast leer ist.
- Zusätzlich zum täglichen Aufladen empfehlen wir nachdrücklich, Ihr Gerät nach Verwendung der SOS-Funktion aufzuladen.

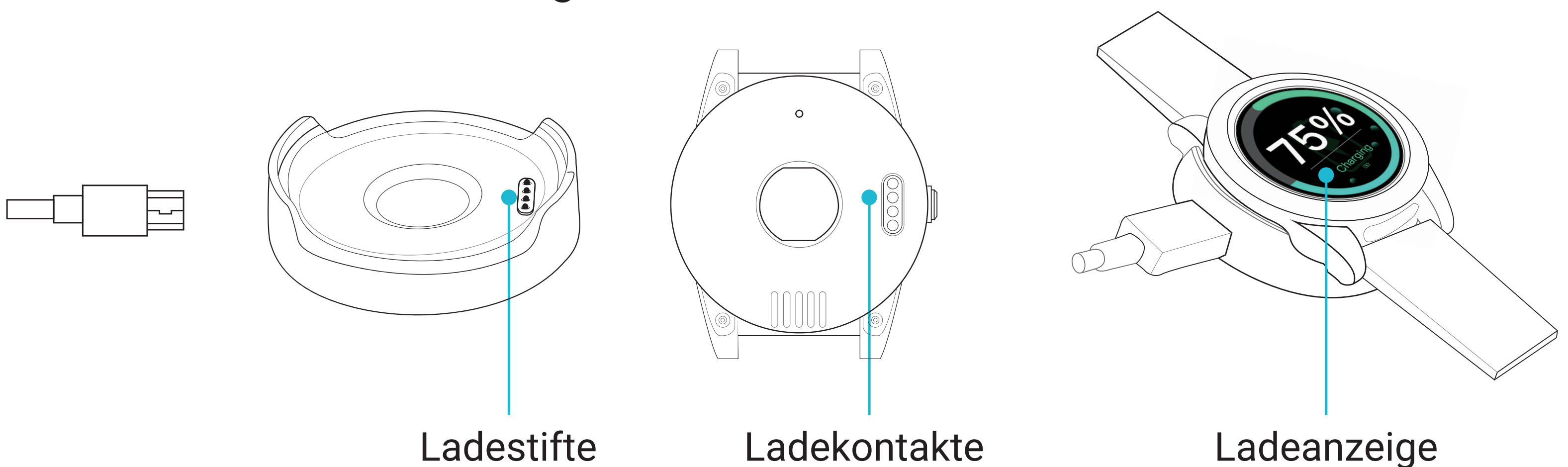


TIPP Die Batterie der Uhr ist nicht herausnehmbar. Nach längerer Inaktivität kann es vorkommen, dass sich die Uhr aufgrund einer schwachen Batterie nicht mehr einschalten lässt. Bitte laden Sie sie jeden Tag auf, um sicherzustellen, dass die Uhr normal funktioniert.

Die Batterielaufzeit variiert je nach Verwendung und Konfiguration Ihrer Zembro Essentials Comfort; die tatsächlichen Ergebnisse können abweichen.

Funktionen und Grundeinstellungen

Wenn die Uhr eingeschaltet ist, aktivieren Sie den Touchscreen, indem Sie kurz auf den seitlichen Knopf drücken und dann nach links wischen, um alle Funktionen anzuzeigen.

Das digitale Display, die Herzfrequenz und die Schritte werden angezeigt.

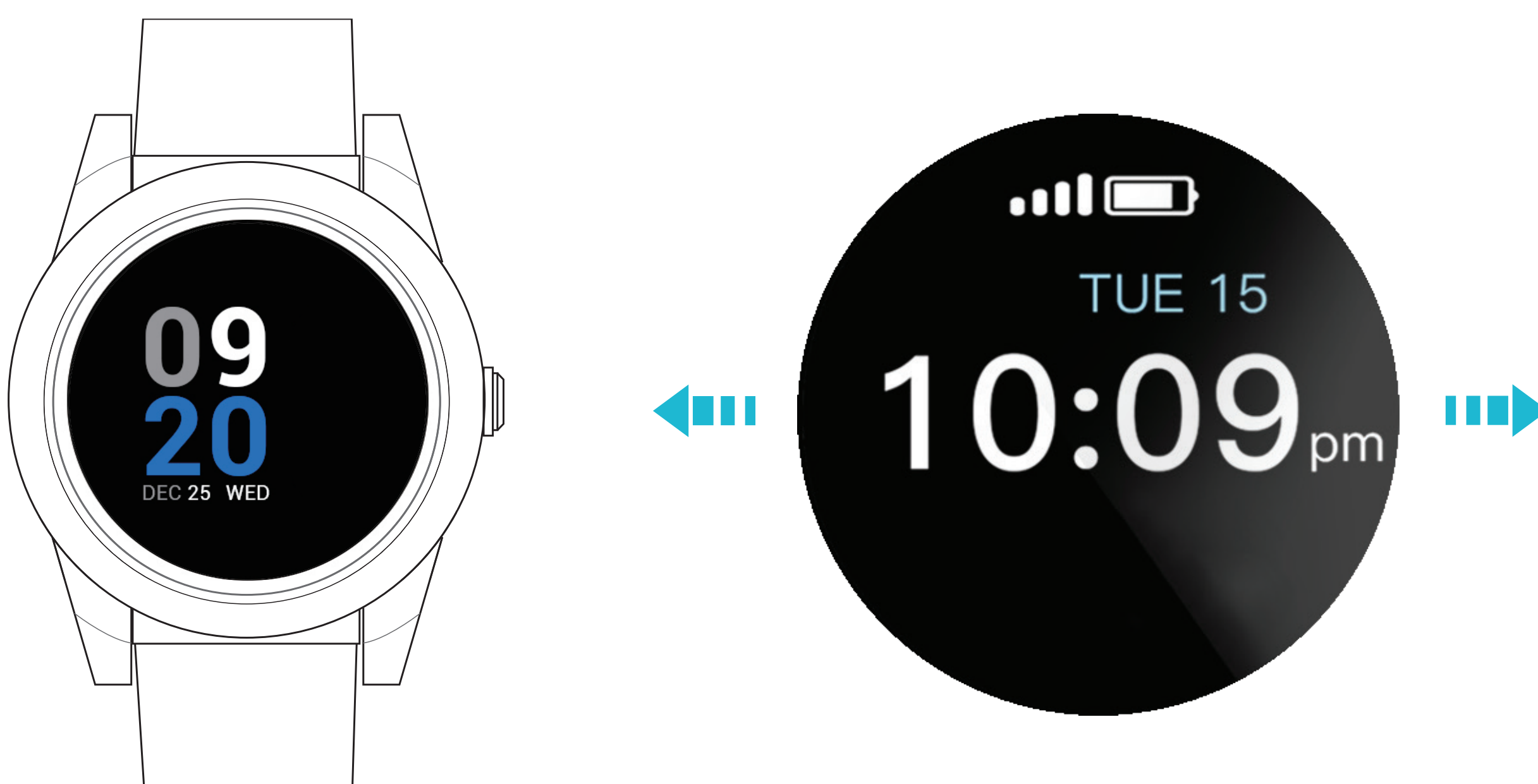

- Auf dem digitale Display, werden Uhrzeit, Datum, Batteriestand, Herzfrequenz und Schritte angezeigt.
- Der Batteriestand Ihrer Uhr ist über das Symbol oben auf dem digitalen Display ersichtlich.
- Fällt der Batteriestand unter 20 %, erhält der Benutzer eine Sprachmeldung der Uhr sowie eine SMS. Die benannten Notfallkontakte können ebenfalls wählen, eine Mitteilung über einen niedrigen Batteriestand per SMS und/oder E-Mail zu erhalten.
- In Zukunft wird der Batteriestand auch in der Zembro-SafeTrx-App angezeigt.

Auslösen eines SOS-Alarms

Um einen SOS-Alarm zu aktivieren, drücken Sie lange den Knopf an der Seite der Uhr.



Drücken Sie den seitlichen Knopf 3 Sekunden lang, bis Sie spüren, dass die Uhr vibriert.

Auslösen eines SOS-Alarms

Nachdem ein SOS-Alarm ausgelöst wurde, hören Sie eine Sprachmeldung, die die Aktivierung des Alarms bestätigt. Sie beenden den Alarm, indem Sie auf den seitlichen Knopf Ihrer Uhr drücken, bis der Alarm abgebrochen ist. Dies wird durch eine Sprachmeldung bestätigt.

Wird der Alarm nicht rechtzeitig abgebrochen, wird umgehend eine Alarm-SMS an die hinterlegten Notrufnummern gesendet, gefolgt von den ausgehenden Anrufen.

Wenn die Uhr keine Verbindung zur ersten Notrufnummer aufbauen kann, ruft sie mit einer Verzögerung von 10 Sekunden die zweite Nummer an.

Falls auch die zweite Nummer nicht erreichbar ist, ruft das System die dritte Nummer an usw.

Zwischen den einzelnen Anrufen wartet das System 10 Sekunden lang. Während dieser Zeit kann der Benutzer die Anrufsequenz stoppen oder einen eventuellen falschen Alarm verhindern, indem er den seitlichen SOS-Knopf drückt.

Voicemail-Leitlinien

Wir raten Notfallkontakten, die Voicemail-Funktion Ihres Telefons auszuschalten, um Verzögerungen bei der Hilfeleistung zu vermeiden.

Die folgenden Sicherheitsvorkehrungen werden jedoch verwendet, wenn ein Voicemail-Dienst erreicht wird:

- Der Träger kann das laufende Gespräch durch Anklicken des SOS-Knopfes beenden, der auf dem Touchscreen angezeigt wird, oder die Anrufsequenz wird fortgesetzt, wenn die Voicemail automatisch getrennt wird.


Wie können Ihre Kontakte Ihr Gerät anrufen?

Ein Notfallkontakt kann die Uhr zurückrufen, wenn sie sich nicht im Alarmmodus befindet.

Wählen Sie einfach die Kontaktnummer des Geräts (beginnt mit der schwedischen Vorwahl +46).

Einen GPS-Standort ermitteln

Um einen ersten Standort über die GPS-Funktion zu erhalten, gehen Sie ins Freie oder in die Nähe eines Fensters, damit die Uhr einen Fix (initiales GPS-Signal) von den Satelliten bekommen kann. Je nach Umgebung kann es beim ersten Mal einige Minuten dauern.

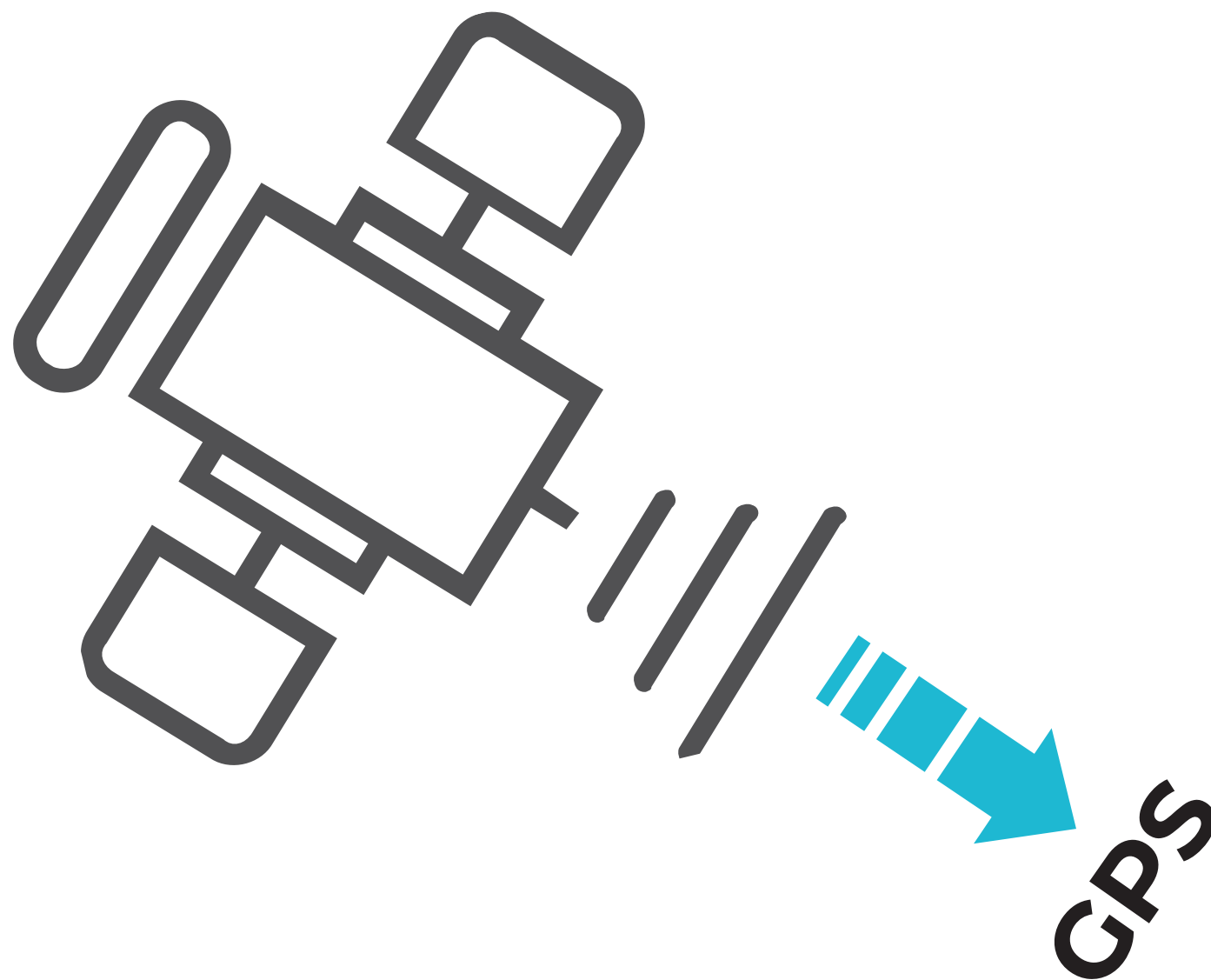

TIPP Die GPS-Funktionalität kann an manchen Orten nicht verfügbar oder ungenau sein (z. B. innerhalb von Gebäuden, in der Nähe von hohen Bauwerken oder in Tiefgaragen usw.).

Die Uhr bietet auch WLAN- und LBS-Ortung. Wenn GPS nicht verfügbar ist, schaltet sie zur Ortung auf WLAN und LBS um.

WLAN und Beacons zu Hause liefern zusätzliche Positionsdaten und optimieren die Batterielaufzeit der Uhr.

Bitte beachten Sie, dass die WLAN- und LBS-Ortungsdienste nicht 100 % genau sind. Sie können nur zur ungefähren Bestimmung Ihres Standorts verwendet werden.

Indoor-Tracking ist nur in Kombination mit einem BLE Beacon (Bluetooth) verfügbar.

Empfang eines Alarms

Wenn Sie der Notfallkontakt einer Person sind, die eine Zembro-Essentials-Comfort-Uhr trägt, beschreibt der folgende Abschnitt, wie Sie Alarme empfangen und darauf reagieren können.

Sie erhalten einen Anruf von der Person, die den Alarm sendet, sowie eine SMS-Nachricht und/oder eine E-Mail des Zembro-SafeTrx-Service, die Informationen zum Alarm und einen anklickbaren Link enthält.

Wenn Sie auf diesen Link klicken, öffnet sich Ihr Telefon- oder PC-Browser und Sie gelangen auf eine Seite, auf der Sie die Details des Alarms und den aktuellen Standort der Person, die den Alarm ausgelöst hat, finden.

Als benannter Notfallkontakt können Sie den Alarm auch über diesen Link bestätigen und schließen. Wenn einer der Kontakte den Alarm nicht über den Link schließt, wird er automatisch innerhalb von 48 Stunden geschlossen.

Diese Alarmseite wird einmal pro Minute aktualisiert und zeigt die Position der Person zum Zeitpunkt der Alarmierung an.


Wir empfehlen Ihnen, den Alarmdienst bei der ersten Verwendung einer neuen Zembro-Essentials-Comfort-Uhr zu testen und die Nummer, die Sie anruft und Ihnen eine SMS schickt, in Ihren Favoriten zu speichern, um sicherzustellen, dass der Alarmdienst einen eventuell auf Ihrem Telefon eingestellten „Nicht stören“- oder „Lautlos“-Modus (z. B. während der Nacht) außer Kraft setzen kann.

Einzelheiten dazu finden Sie in den Einstellungen Ihres Telefons.

Das Armband Ihres Gerätes wechseln



Band entfernen

1. Drehen Sie Ihre Zembro Comfort mit der Rückseite nach oben und finden Sie die Bandverschlüsse.

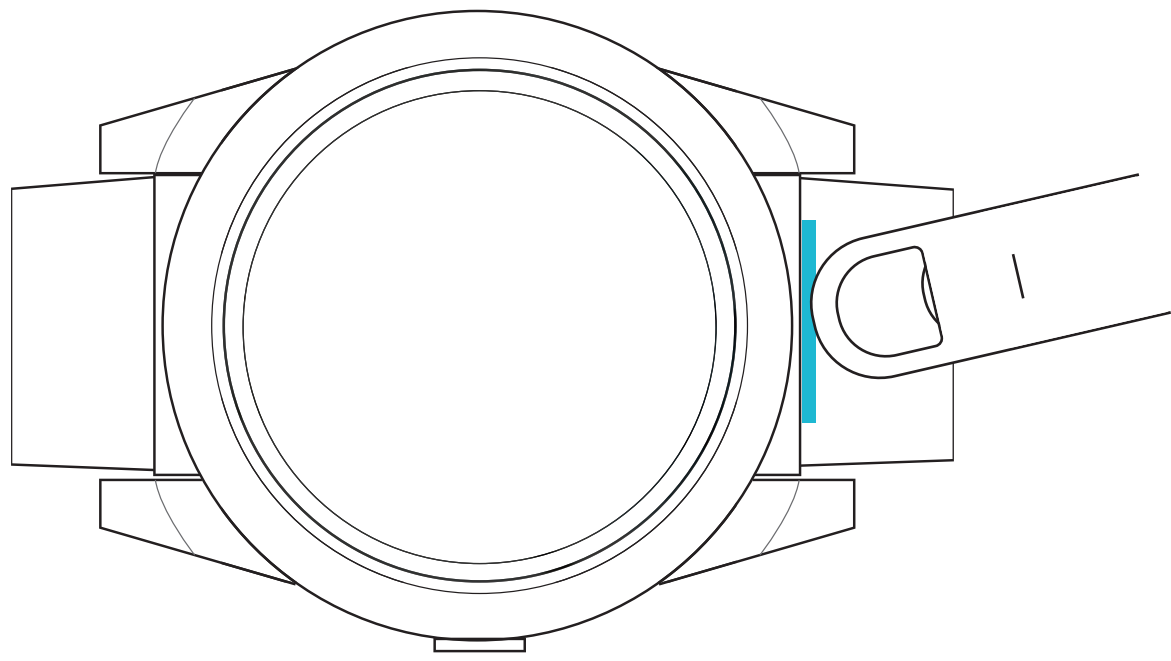

2. Zum Lösen des Verschlusses schieben Sie den flachen Knopf zum Band.

3. Ziehen Sie das Band vorsichtig von der Uhr weg, um es zu lösen.

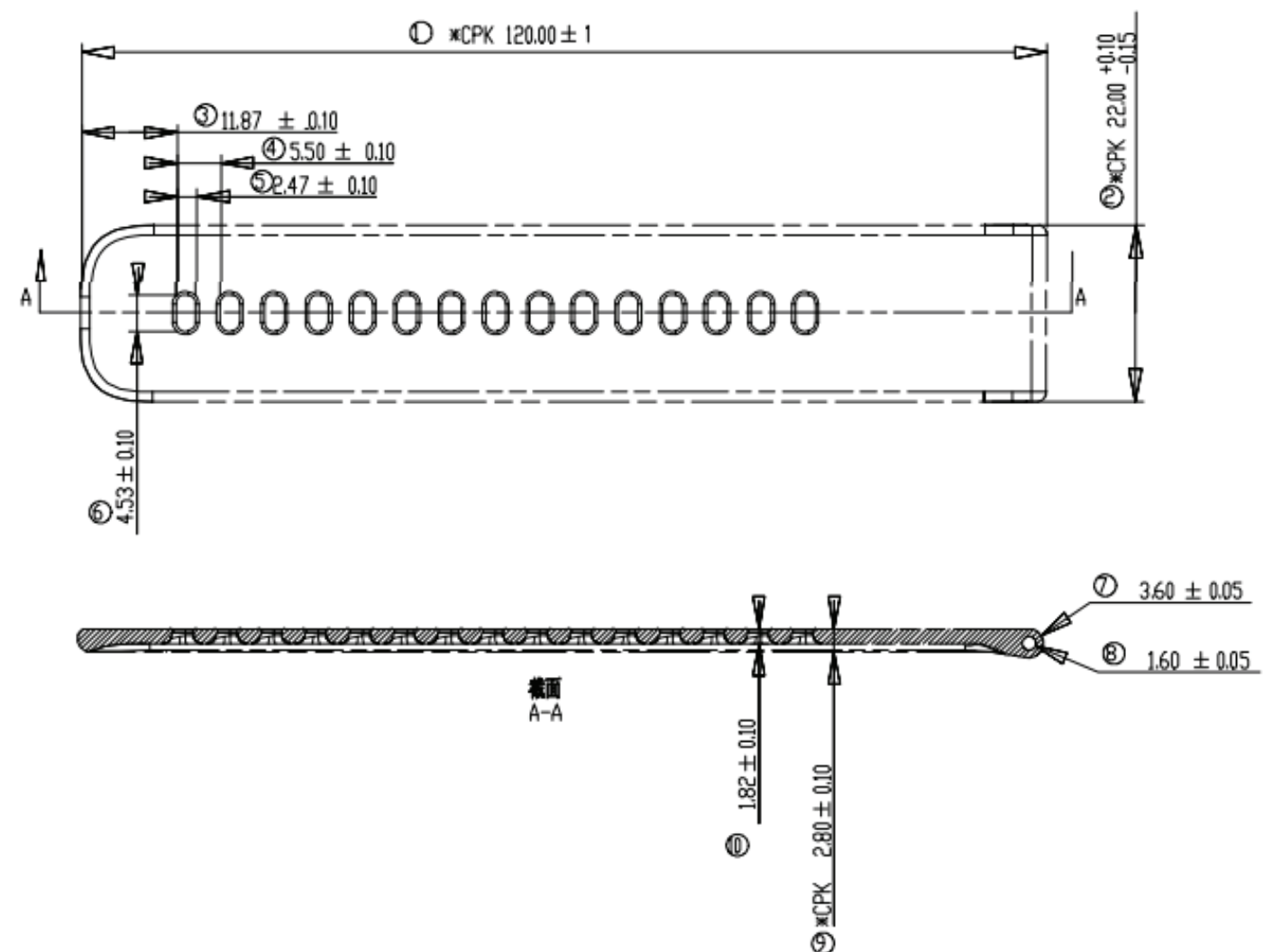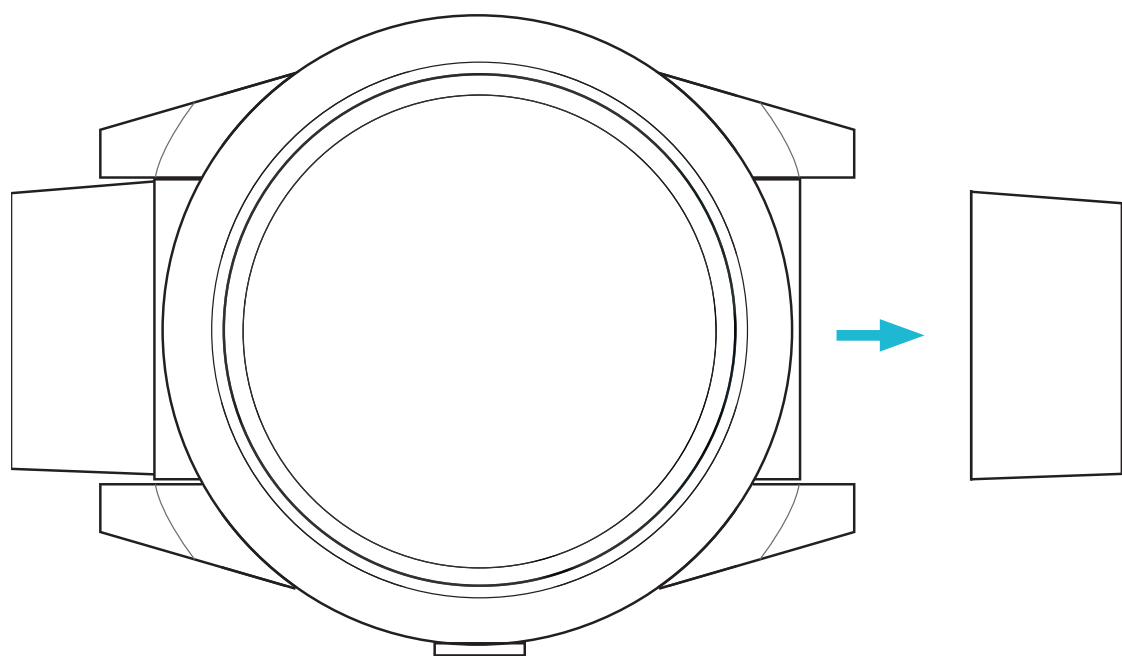

4. Wiederholen Sie das auf der anderen Seite.

Band anbringen

Um ein Band anzubringen, drücken Sie es in das Ende der Uhr und schieben Sie den Bandverschluss ein.

Änderung Ihrer Kontaktnummern

Wenn Sie einen Kontakt ändern, eine Kontaktnummer hinzufügen oder löschen möchten, wenden Sie sich bitte an den Zembro-Kundendienst. Sie können diese Aktualisierungen in Zukunft über die Zembro-SafeTrx-App vornehmen (in Kürze verfügbar).

Vielen Dank, dass Sie sich für die Zembro-Essentials-Comfort-Uhr entschieden haben.

Wir wünschen Ihnen viele sichere Jahre mithilfe des zuverlässigen Schutzes unserer Uhr.

Zögern Sie nicht, unseren Kundendienst zu kontaktieren, wenn Sie Fragen oder Probleme haben.

**Sorgenfrei leben dank vernetzter
Gesundheit und Sicherheit**

zembro.com

Wasserbeständigkeit

Essentials Comfort und Mini sind spritzwasser- und wasserbeständig, aber nicht wasserdicht. Sie können das Gerät z. B. beim Sport, im Regen und beim Händewaschen tragen und benutzen, aber ein Untertauchen Ihres Geräts wird nicht empfohlen.

Comfort und Mini haben eine Wasserbeständigkeit gemäß IPX7 nach IEC-Norm 60529.

Wasserbeständigkeit ist kein Dauerzustand und kann im Laufe der Zeit nachlassen. Die Essentials-Comfort-Uhr kann nicht erneut auf Wasserbeständigkeit geprüft oder versiegelt werden.

Folgende Faktoren können die Wasserbeständigkeit Ihrer Essentials-Comfort-Uhr beeinträchtigen und sollten daher vermieden werden.

- Fallenlassen Ihrer Essentials-Comfort-Uhr oder Einwirkung anderer Stöße
- Kontakt Ihrer Essentials-Comfort-Uhr mit Seife oder Seifenwasser (zum Beispiel beim Duschen oder Baden)
- Kontakt Ihrer Essentials-Comfort-Uhr mit Desinfektionsmitteln, Parfüm, Lösungsmitteln, Chlor, Reinigungsmitteln, Säuren oder säurehaltigen Lebensmittel, Insektenschutzmittel, Lotionen, Sonnenschutzmittel, Öl oder Haarfärbemittel
- Kontakt Ihrer Essentials-Comfort-Uhr mit stark beschleunigtem Wasser
- Tragen Ihrer Essentials-Comfort-Uhr in einem Dampfbad
- Tragen Ihrer Essentials-Comfort-Uhr in einer Sauna

Die oben genannten Punkte sollten zwar vermieden werden, aber falls Ihre Essentials-Comfort-Uhr versehentlich mit Seifen, Shampoos, Haarspülungen, Lotionen, Desinfektionsmitteln, Parfüms, Lösungsmitteln, Reinigungsmitteln, Säuren oder säurehaltigen Lebensmittel, Insektenschutzmittel, Sonnenschutzmittel, Öl, Haarfärbemittel, Chlor oder anderen Substanzen als Wasser in Berührung kommt, sollten Sie sie mit lauwarmem Trinkwasser reinigen und mit einem fusselfreien Tuch abtrocknen. Chemikalien, die in diesen Flüssigkeiten enthalten sind, können die Wasserdichtungen und Akustikmembranen beeinträchtigen.

Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Abmessungen: | 47,5 mm x 16,9 mm |
| Gewicht: | 65 g |
| Batterie: | Wiederaufladbar, 3,7 V, 580 mAh |
| Ladespannung: | 5 V Gleichstrom |
| Wasserdichtigkeit: | IPX7 (IEC-Norm 60529) |
| Ortungstechnologien: | GPS, BLE, WiFi, LBS |

Vorsichtsmaßnahmen

Halten Sie sich bitte an die Anweisungen, um die Lebensdauer der Uhr zu verlängern:

- Sie sollten Ihre Uhr nicht in staubigen, heißen, kalten, elektrischen oder chemischen Bereichen verwenden oder aufbewahren. Bitte halten Sie die Uhr und das Zubehör immer trocken.
- Lassen Sie die Uhr nicht fallen, schütteln oder stoßen Sie sie nicht. Grobe Behandlung kann sie beschädigen.
- Reinigen Sie die Uhr mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie keine chemischen Mittel oder Reinigungsmittel.
- Zerlegen Sie die Uhr nicht und bauen Sie sie nicht um, da sonst die Garantie erlischt.
- Die Verwendung anderer Batterien kann zu unerwünschten Situationen führen.
- Spielen Sie niemals beim Autofahren mit der Uhr, um Unfälle zu vermeiden.
- Bitte schalten Sie die Uhr in Flugzeugen aus und befolgen Sie die Anweisungen. Kabellose Geräte können bei Flugzeugen Störungen verursachen.
- Die eingebaute Nano-SIM-Karte kann nur innerhalb der Europäischen Union (EU 28) verwendet werden.