

GUÍA PARA EL PACIENTE

Cómo usar Wesper.

¿QUÉ CONTIENE SU KIT?

Cada kit de Wesper viene con dos parches biométricos, un cargador, dos cables de carga, un manual de instrucciones, un oxímetro de pulso y adhesivos de repuesto.




COMPLETAR DURANTE EL DÍA [3-5 mins]

PASO 1: DESCARGUE LA APLICACIÓN

Descargue la aplicación desde la tienda de aplicaciones y cree su cuenta Wesper. Utilice el código que le fue proporcionado por su médico o que recibió a través del correo de bienvenida, ó elija "Sync with the patches" para completar el registro utilizando los parches.


Descargue la [app](#) aquí:

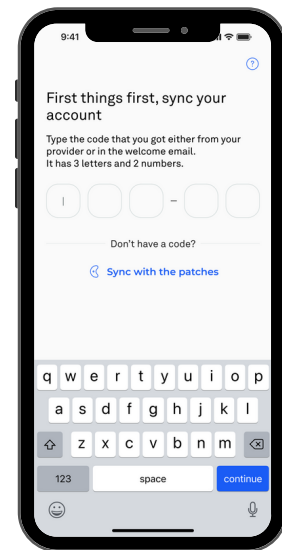

PASO 2: COMPLETE SUS DATOS BÁSICOS

Ingrese su fecha de nacimiento, sexo, altura, peso, ciudad, estado y número de teléfono. Luego presione Continuar.

En la siguiente pantalla, verá dos botones. Presione el botón azul que dice GO TO HOMEPAGE. No complete el historial de sueño.

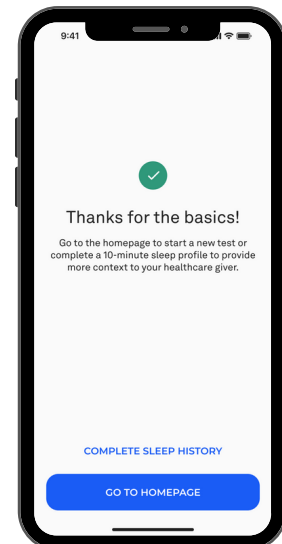


PASO 1: COMIENZE LA PRUEBA

Desde la pantalla de inicio, presione START TEST.

Lea atentamente las sugerencias para comenzar la prueba y presione continuar.


No conecte ni aplique los parches hasta que la aplicación se lo indique. Asegúrese de tener Bluetooth activado.

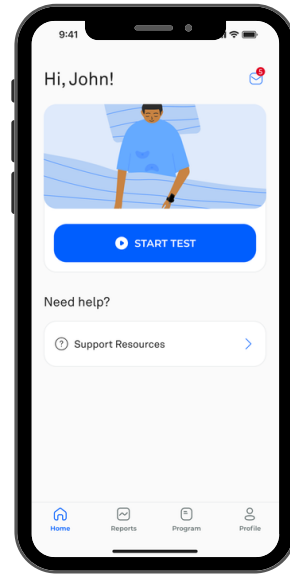

PASO 2: CONECTE EL PRIMER PARCHES


Encienda el primer parche presionando el ícono de la media luna que está en el centro del parche. Manténgalo presionado hasta que en la pantalla diga "Conectado".

Debe escuchar y sentir un clic cuando se presiona el botón.

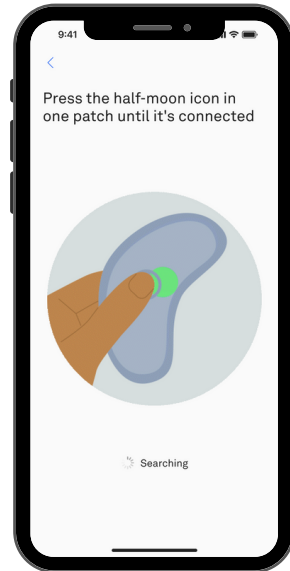

PASO 3: APLIQUE EL PRIMER PARCHES


Despegue el adhesivo y coloque el parche debajo del pecho derecho.

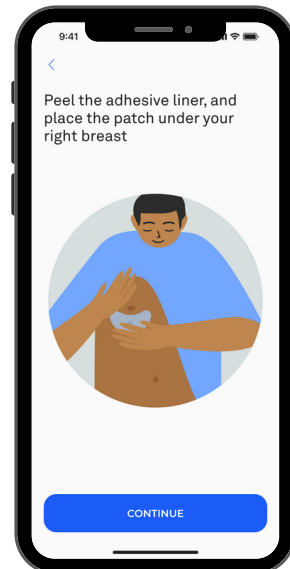

PASO 4: CONECTE EL SEGUNDO PARCHÉ


Encienda el segundo parche presionando el ícono de la media luna que está en el centro del parche. Manténgalo presionado hasta que en la pantalla diga "Conectado".

Debe escuchar y sentir un clic cuando se presiona el botón.

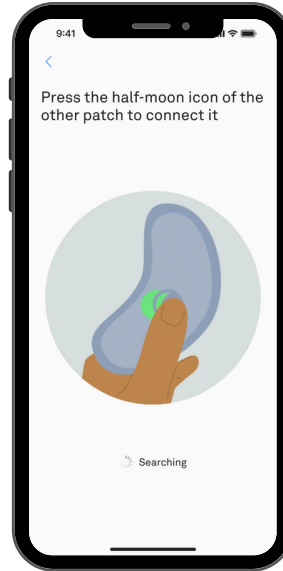


PASO 5: APLIQUE EL SEGUNDO PARCHÉ

Despegue el adhesivo del otro parche y colóquese sobre el ombligo en dirección hacia abajo como si fuera un arcoíris.

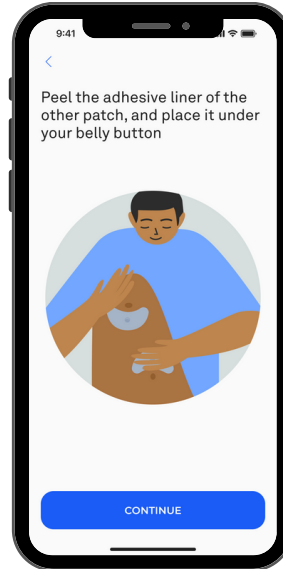

PASO 6: APLIQUE EL OXÍMETRO DE PULSO


Colóque el Checkme en su mano y presione el botón de encendido.

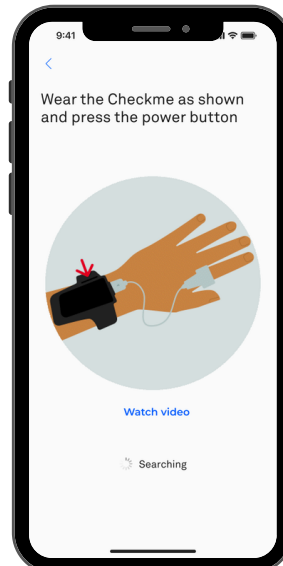

PASO 7: HABILITE EL MICRÓFONO Y COMIENZE LA PRUEBA

Conceda permiso al micrófono para evaluar sus ronquidos.

Cuando esté listo, presione "Start Test" para comenzar la prueba.


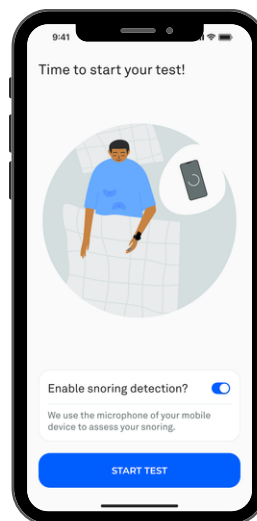


COMPLETAR AL DESPERTAR [4-5 mins]

PASO 1: DETENGA LA PRUEBA

Presione "Stop Test" cuando haya terminado de realizar la prueba. Siga las instrucciones y quítese los dispositivos cuando la aplicación se lo indique.

Mantenga los dispositivos cerca de su teléfono hasta que se complete el proceso.

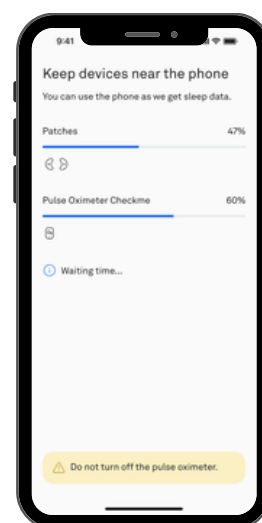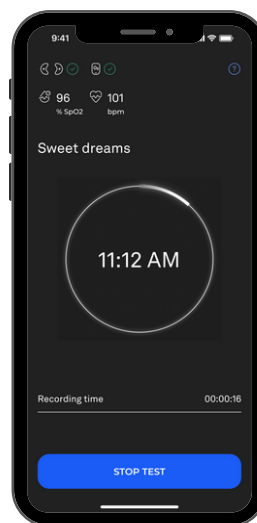

LA MISIÓN DE WESPER ES BRINDAR UN SUEÑO DE CALIDAD Y UNA VIDA PLENA A TODAS LAS PESONAS.

¿NECESITA AYUDA?

Escriba a support@wesper.co, nuestro equipo está listo para responder a todas sus preguntas.