

peroxyde d'hydrogène à 3% et 6%

peroxyde d'urée à 10% et 16%

Haute technologie dans le
blanchiment des dents

MODE D'EMPLOI POUR LE DENTISTE ET LE PATIENT

Pola Day et Pola Night sont des gels de blanchiment des dents ambulatoires au pH neutre à viscosité élevée. Ils sont agréables au goût et contiennent un mélange unique d'agents désensibilisants, de conditionneurs et d'eau à teneur suffisamment élevée pour réduire une éventuelle sensibilité dentinaire.

INDICATIONS D'UTILISATION:

- Blanchiment des dents vitales colorées
- Blanchiment des dents non-vitales colorées

INGRÉDIENTS:

Pola Day: Glycérine, Aqua, PEG-12, Peroxyde d'hydrogène, Carbomer, Sodium, Arôme, Fluoride de Sodium

Pola Night: Glycérine, Aqua, PEG-12, Peroxyde de Carbamide, Carbomer, Sodium, Arôme, Fluoride de Sodium

POIDS NET:

En fonction du coffret acheté, seringues de 1.3g ou de 3g

Voir description sur la boîte.

ÉQUIVALENCE AVEC LE PÉROXYDE D'HYDROGENE:


- Pola Night 10% de Peroxyde de Carbamide = 3.6% de Peroxyde d'Hydrogène
- Pola Night 16% de Peroxyde de Carbamide = 5.7% de Peroxyde d'Hydrogène

GUIDE DE TRAITEMENT

	3%	6%
Pola Day	2 ou 3 x 30 minutes / jour ou 1 x 60 minutes / jour	1 ou 2 x 30 minutes / jour ou 1x45 minutes / jour
	10%	16%
Pola Night	1x2heures / jour pendant la nuit	1x90 minutes / jour pendant la nuit

INSTRUCTIONS:

1. Placer une petite goutte de gel dans chaque réservoir de la gouttière pour les dents sous traitement.
2. Placer la gouttière avec du gel.
3. Éliminer le gel excédentaire dans la bouche avec une serviette ou une brosse sèche.
4. Une fois le traitement terminé, retirer la gouttière. Rincer la gouttière et la bouche avec de l'eau tiède.
5. Se brosser les dents.

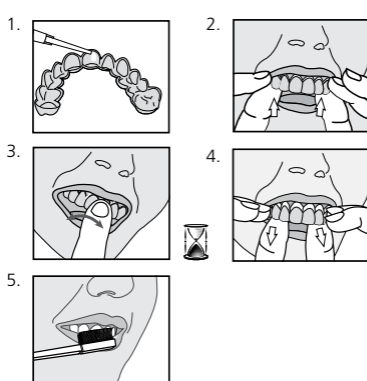

POUR UN RESULTAT OPTIMAL:

- Ne pas manger ou boire durant le traitement.
- Ne pas fumer immédiatement après le traitement – attendre au moins deux heures.
- Les aliments & les boissons fortement colorés doivent être évités pendant au moins 48 heures après le traitement ou consommer avec modération.
- Utiliser le gel à la température de la pièce.

STOCKAGE ET MANIPULATION :

- Conserver au frais et à l'abri de la lumière du soleil à une température comprise entre (2°-25°C / 35°-77°F).
- Ne pas utiliser après la date d'expiration.

PRÉCAUTIONS:

- **Ne peut être vendu qu'à un praticien dentaire.** Pour chaque cycle d'utilisation, la première application doit être faite par un praticien dentaire ou sous contrôle direct si un niveau de sécurité équivalent peut être assuré. Le produit est alors remis au patient qui terminera lui même le traitement.
- Ne pas utiliser chez la femme enceinte ou en période d'allaitement ni chez le mineur de 18 ans.
- Maintenir hors de portée des enfants ou des animaux de compagnie
- Il est conseillé aux patients ayant déjà présenté des allergies chimiques de demander à un spécialiste de procéder à de nouveau test avant d'utiliser ces produits.
- Interrompre le traitement en cas de sensibilité ou réactions inhabituelles
- Les Fiches de Données de Sécurité (MSDS) sont disponibles sur notre site www.sdi.com.au ou contacter votre représentant.

PREMIERS SOINS:

- **Yeux (contact):** Eviter tout contact avec le yeux. Rincer immédiatement si le produit entrait en contact avec l'œil. Consulter si les symptômes persistent.
- **Peau (contact):** Laver soigneusement avec de l'eau et consulter un médecin si les symptômes persistent.
- **Ingestion (grande quantité):** Boire beaucoup de lait ou l'eau et consulter un médecin.

Made in Australia by SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia 1 800 337 003
Austria 00800 022 55 734
Brazil 0800 770 1735
France 00800 022 55 734
Germany 0800 100 5759
Ireland 01 886 9577
Italy 800 780625
New Zealand 0800 734 034
Spain 00800 022 55 734
United Kingdom 00800 022 55 734
USA & Canada 1 800 228 5166
www.sdi.com.au
www.polawhite.com.au

EC REP

SDI Dental Limited
Block 8, St Johns Court
Swords Road, Santry
Dublin 9, Ireland
Tel +353 1 886 9577

