

Conformité à la
directive UE :
 $\leq 6\% \text{H}_2\text{O}_2$



Perfect Bleach®

Perfect Bleach®

SYSTÈME POUR LE BLANCHIMENT DES DENTS
COLORÉES

Perfect Bleach®

LE BLANC NATUREL

L'aspect esthétique des dents est de plus en plus important pour beaucoup de personnes. Les colorations n'ont pas seulement une influence négative sur l'esthétique, mais également sur l'aspect général et suscitent le désir d'un traitement adapté pour éclaircir les dents. L'éclaircissement des dents avec un gel de blanchiment propose une possibilité non-agressive et efficace pour regagner l'esthétique.

Dépendant de votre préférence, vous pouvez choisir la version avec une concentration de 10 % ou de 16 % de peroxyde de carbamide (correspond à 3,5 % ou 6 % H₂O₂). Si vous optez pour Perfect Bleach vous recevez un système avec la qualité habituelle de VOCO qui répond à vos exigences ainsi qu'aux exigences esthétiques de vos patients.

Colorations

En général, on peut faire la distinction entre les colorations intrinsèques et extrinsèques. Si la raison des colorations est connue, l'équipe du cabinet peut présenter au patient un traitement adéquat.

Les colorations extrinsèques peuvent être causées par des colorants présents dans les aliments et les boissons, comme par ex. le curry, le café, le vin rouge et le thé, la consommation de nicotine, les dépôts de pigments dans les fissures de l'émail et les colorations liées à l'âge. Les colorations intrinsèques se produisent souvent au cours du développement des dents. Les raisons peuvent être causées par des effets secondaires dus aux médicaments, comme par ex. la tétracycline, ou par une nécrose pulpaire. Ces colorations se trouvent dans la dent ou dans la dentine et ne peuvent donc pas être éliminées mécaniquement, par ex. par un nettoyage professionnel.

Dans ces cas, la solution est l'éclaircissement avec un gel de blanchiment.

Perfect Bleach® 10 % / 16 % – en coffrets pratiques

Perfect Bleach est un matériau pour le blanchiment ambulatoire à base de peroxyde de carbamide. Dépendant du type de la coloration, on peut choisir une concentration de 10 % ou de 16 % (correspond à 3,5 % ou 6 % H₂O₂). Après une première utilisation au cabinet dentaire, le patient peut continuer à utiliser Perfect Bleach au domicile.

Perfect Bleach est, entre-autres, disponible en deux coffrets différents. Le coffret mini contient les seringues avec le peroxyde de carbamide, un étui pour les gouttières ainsi qu'une trousse pratique. Le coffret par contre contient les seringues

avec le peroxyde de carbamide, un teintier pour vérifier le succès du traitement ainsi que l'étui pour les gouttières. En plus des ustensiles pour le patient vous trouverez dans ce coffret tous les matériaux nécessaires pour la fabrication des gouttières, y compris deux plaques souples thermoformables, le Block Out Gel LC ainsi que le mode d'emploi pour le technicien et pour le praticien.

Perfect Bleach® – Non-agressif et efficace en même temps

De nombreuses études confirment que le résultat d'éclaircissement n'est pas plus rapide ou meilleur si on utilise un gel de blanchiment avec une concentration élevée [A. Braun et al, Dent Mater 2007; 23: 165 - 169]. Des résultats d'éclaircissement nettement visibles peuvent également être réalisés avec des gels de blanchiment à concentration inférieure, tout en ménageant les tissus dentaires. La concentration de peroxyde de carbamide de Perfect Bleach est assez élevée pour éliminer les colorations de manière efficace, mais de manière non-agressive pour le patient. Perfect Bleach contient du potassium et des fluorures contre les hypersensibilités éventuelles pendant et après le traitement.

Les avantages pour vos clients

L'utilisation de Perfect Bleach est très simple et facile à effectuer. La consistance du gel évite des irritations de la gencive, car il ne coule pas de la gouttière. Un autre avantage est que la gouttière ne doit être portée que peu de temps. Pendant les premières deux heures après l'insertion de la gouttière, l'effet du gel arrive au maximum. Les premiers résultats visibles d'éclaircissement peuvent déjà être constatés à partir de la deuxième utilisation. Également le goût de menthe frais est agréable pour le patient.

Perfect Bleach®

APPLICATION CLINIQUE



Dentiste Doreen Knebel, Berlin : « Nous utilisons le Perfect Bleach de VOCO depuis plus de sept années dans notre cabinet et nous sommes très contents. Les patients adorent l'effet d'éclaircissement visible et se réjouissent de l'utilisation simple. Il est également facile pour nous au cabinet d'expliquer l'utilisation. Nous demandons toujours aux patients de revenir après deux semaines, pour faire une comparaison des teintes. Grâce à l'utilisation d'une gouttière préparée au laboratoire, des problèmes gingivaux n'apparaissent presque jamais. De plus, le traitement de blanchiment complet est régulièrement contrôlé par le dentiste ».



Avant



Après



Avant



Après

Source : Dr. Felix Krause, université de Bonn



Dr. med. dent Franz Bschorer, Dinkelsbühl : « Pour moi, le blanchiment ambulatoire est la seule méthode qui permet de faire participer les patients au traitement. Avec Perfect Bleach, nous faisons de très bonnes expériences depuis 5 années déjà. Même avec une concentration de 10 % seulement, Perfect Bleach convainc, les résultats d'éclaircissement sont nettement visibles. En même temps, les tissus dentaires sont ménagés. Grâce aux gouttières préparées individuellement, la gencive est protégée. Lors de l'utilisation de Perfect Bleach à 10 %, des hypersensibilités ne sont jamais apparues. L'utilisation du coffret est simple, soit pour le personnel du cabinet, soit pour les patients. Les plaques souples thermoformables pour la préparation des gouttières peuvent facilement être travaillées, adaptées et remplies avec le gel de blanchiment. Ainsi, les patients peuvent aussi porter les gouttières sans problèmes à la maison. »

Perfect Bleach®

SYSTÈME POUR LE BLANCHIMENT DES DENTS COLORÉES

Indications

Eclaircissement non-agressif et durable de dents vivantes et dévitalisées, par ex. en cas de colorations dues aux médicaments ou à la fluorose, de dépôts liés à l'alimentation, de traumatismes, des colorations liées à l'âge, etc.



Avantages

- Deux concentrations de 10 % et de 16 % de peroxyde de carbamide (correspond à 3,5 % ou 6 % H₂O₂)
- Utilisation facile et confortable
- Le coffret complet contient tous les matériaux :
 - deux plaques souples thermoformables et le Block Out Gel LC pour la préparation des gouttières individuelles
 - 6 × 2,4 ml gel de blanchiment
 - étui pour les gouttières
 - teintier pour contrôler le résultat du traitement
 - pictogramme et mode d'emploi pour les patients
- Goût agréable de menthe

Présentations 10 %

- REF 1658 Coffret mini 10 % – gel de blanchiment seringue 4 × 2,4 ml à base de peroxyde de carbamide à 10 %, étui, trousse
- REF 1660 Coffret 10 % – gel de blanchiment seringue 6 × 2,4 ml à base de peroxyde de carbamide à 10 %, Block Out Gel LC seringue 1,2 ml, 2 plaques souples thermoformables, étui, trousse, teintier
- REF 1662 Gel de blanchiment seringue 3 × 2,4 ml à base de peroxyde de carbamide à 10 %

Présentations 16 %

- REF 1659 Coffret mini 16 % – gel de blanchiment seringue 4 × 2,4 ml à base de peroxyde de carbamide à 16 %, étui, trousse
- REF 1664 Coffret 16 % – gel de blanchiment seringue 6 × 2,4 ml à base de peroxyde de carbamide à 16 %, Block Out Gel LC seringue 1,2 ml, 2 plaques souples thermoformables, étui, trousse, teintier
- REF 1665 Gel de blanchiment seringue 3 × 2,4 ml à base de peroxyde de carbamide à 16 %

Directive UE pour l'utilisation de produits de blanchiment (2011 / 84 / EU)

La directive de l'UE précise que les gels de blanchiment dont la concentration en peroxyde d'hydrogène est supérieure à 0,1 % et inférieure ou égale à 6 % ne doivent être vendus qu'aux praticiens. Pour chaque cycle d'utilisation de ces produits, la première utilisation devrait être limitée aux praticiens ou être effectuée sous leur supervision directe. Ensuite ces produits peuvent être remis au patient pour l'utilisation au domicile. Ces produits ne doivent pas être utilisés chez les patients âgés de moins de dix-huit ans.

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Allemagne

Tel. : +49 (0) 4721-719-0
Fax : +49 (0) 4721-719-140

info@voco.com
www.voco.fr

Distributeur :