

6 DINGE, DIE BEI DER ANWENDUNG ZU BEACHTEN SIND

P

WINKEL

Richten Sie Tritemp direkt (**P**erpendikulär) auf die Stirn aus.

F

ENTFERNUNG

Ent**F**ernung zur Stirn:
2 finger breit
(3 – 5 cm).

L

HEIZKÖRPER

Verwenden Sie Tritemp nicht nahe bei Heizkörpern, Ventilatoren und direktem **L**uftzug.

E

KALIBRATION

Versichern Sie sich, dass Trit**E**mp an die Raumtemperatur angepasst ist.

G

ENTFERNEN

Entfernen Sie Hindernisse wie Kopfbedeckun**G**en und Bandagen.

E

WISCHEN

Wisch**E**n Sie Schweiß oder Cremen von der Stirn.


WIE MISST MAN MIT TRITEMP

Kurzanleitung

1

EIN/AUS TASTE

Kurz drücken und loslassen.

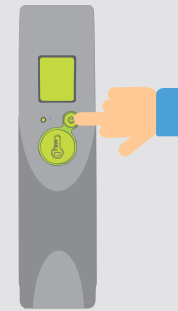

2

GERADE & ZENTRIERT

2 Finger Abstand; Wischen Sie Schweiß und Cremen von der Stirn.



3

LESE TASTE

Kurz drücken.



4


MESSERGEBNISSE

NORMAL



≤ 37.3°C
(99.1°F)

LEICHTES FIEBER

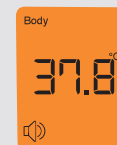

37.4 – 37.9°C
(100-100.2°F)

FIEBRIG*



> 38°C
(100.4°F)

*Hohe Temp. akustischer Alarm