



X Series™ Bedienerhandbuch



Die Drucklegung dieses X Series Bedienerhandbuchs (**REF** 9650-001355-08 Rev. C) erfolgte im **Mai 2012**.

Wenn dieses Datum mehr als 3 Jahre zurückliegt, fragen Sie bei ZOLL Medical Corporation an, ob weitere aktualisierte Produktinformationen zur Verfügung stehen.

Copyright © 2012 ZOLL Medical Corporation. Alle Rechte vorbehalten. CPR-D-padz, pedi-padz, OneStep, Real CPR Help, Rectilinear Biphasic, RescueNet, See-Thru CPR, stat-padz, SurePower, X Series und ZOLL sind Marken oder eingetragene Marken von ZOLL Medical Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Masimo, Rainbow, SET, SpCO, und SpMet sind Marken oder eingetragene Marken von Masimo Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

IC Model: XSCP-1



ZOLL Medical Corporation

269 Mill Road
Chelmsford, MA USA
01824-4105



ZOLL International Holding B.V.

Newtonweg 18
6662 PV ELST
The Netherlands



0123

Inhalt

Kapitel 1 Allgemeine Hinweise

Produktbeschreibung	1-1
Optionale Funktionsmerkmale des X Series Geräts	1-3
Praktischer Umgang mit diesem Handbuch	1-3
Aktualisierungen des Bedienerhandbuchs	1-3
Auspacken	1-3
Verwendete Symbole	1-4
Typografische Konventionen und Warnhinweise	1-7
Indikationen für die Anwendung des X Series Gerät	1-7
Manuelle Defibrillation	1-8
Halbautomatischer Betrieb (AED-Betrieb)	1-8
EKG-Überwachung	1-9
Wiederbelebungsüberwachung	1-9
Externe transkutane Stimulation	1-9
Überwachung des nichtinvasiven Blutdrucks	1-10
Temperaturüberwachung	1-10
SpO ₂ -Überwachung	1-10
Atmungsüberwachung	1-10
CO ₂ -Überwachung	1-10
Invasive Überwachung von Drücken	1-11
12-Kanal-EKG-Analyse	1-11
Funktionsmerkmale des X Series Geräts	1-11
Defibrillatorfunktion	1-11
Ausgangsenergie des Defibrillators	1-11
Externer Schrittmacher	1-11
EKG-Überwachung	1-12
Elektroden	1-12
Akkus	1-13
Betriebsbereitschaftsanzeige	1-14
Sicherheitsvorkehrungen	1-15

Warnungen	1-15
Allgemeines	1-15
EKG-Überwachung	1-17
Defibrillation	1-18
Stimulation	1-19
HLW	1-20
Pulsoxymetrie	1-20
Nichtinvasive Blutdruckmessung (NIBD)	1-21
Invasive Blutdruckmessung (IBD)	1-22
CO2	1-22
Respiration	1-22
Ferromagnetische Objekte	1-23
Akku	1-23
Bedienersicherheit	1-23
Patientensicherheit	1-24
Vorsichtshinweise	1-26
Neustart des Defibrillators.....	1-27
Nachverfolgbarkeit des Geräts	1-27
Meldung von Nebenwirkungen	1-28
Software-Lizenzvereinbarung	1-28
Kundendienst.....	1-29
Die ZOLL Seriennummer	1-30

Kapitel 2 Das Gerät im Überblick

Bedienelemente und Anzeigen des Defibrillators	2-1
Gerätefront	2-2
Display	2-4
Anzeigen für Akkuladestand und externes Netzteil	2-6
Patientenkabel und Anschlüsse	2-7
Externe Paddles	2-9
Externes Netzteil	2-11
Bildschirmnavigation	2-12
Schnellzugriffstasten	2-12
Navigationstasten	2-15
Displayhelligkeit	2-15
Routineaufgaben	2-16
Ändern der Displayhelligkeit	2-16
Auswechseln des Akkus im X Series Gerät	2-16
Die Behandlungstasten	2-17

Kapitel 3 Überwachung – Übersicht

Überwachungsfunktionen des X Series Geräts	3-1
EKG	3-2
Herzfrequenz	3-2
Atemfrequenz	3-2
Temperatur	3-2
Invasiver Blutdruck (IBD)	3-2
Nichtinvasiver Blutdruck (NIBD)	3-2
Kapnografie (CO ₂)	3-3
Pulsoxymetrie (SpO ₂)	3-3
Überwachung – Anzeigeoptionen	3-3
Konfigurieren der Kurvenanzeige	3-7

Kapitel 4 Trends

Anzeigen des Trendstatus-Fensters	4-1
Anzeigen und Drucken der Trenddaten	4-2
Ändern der Anzeige des Trendstatus-Fensters	4-3

Kapitel 5 Alarmer

Optische Alarmanzeigen	5-2
Akustische Alarmanzeigen	5-2
Selbsttest der Alarmanzeigen	5-2
Patientenalarm-Anzeige	5-3
Alarmer bei lebensbedrohlichen Rhythmen	5-4
Gerätealarm-Anzeige	5-4
Reagieren auf aktive Alarmer – Stummschalten des Alarms	5-5
Reaktivieren eines Alarms	5-5
Unterdrücken von Alarmen	5-5
Timer für die Alarmunterdrückung	5-6
Alarmeroptionen	5-7
Auswählen der Standardalarmgrenzwerte	5-8
Einstellen der Alarmgrenzwerte relativ zum Patienten – Option „Stat.“ (Schnelleinstellung)	5-8

Kapitel 6 EKG-Überwachung

Einrichten der EKG-Überwachung	6-2
Vorbereiten des Patienten auf das Anlegen der Elektroden	6-3
Anlegen der Elektroden am Patienten	6-3
Anschließen des EKG-Kabels an das X Series Gerät	6-6
Auswählen der anzuzeigenden EKG-Kurven	6-6
Auswählen der Kurvengröße	6-8
EKG-Überwachung und Schrittmacher	6-9
EKG-Systemmeldungen	6-9

Kapitel 7 Überwachung von Atmung (Resp) und Herzfrequenz (HF)

Atemfrequenzanzeige	7-2
Atemfrequenzmessung mittels Impedanzpneumografie	7-2
Konfigurieren der Alarme und Einstellungen für die Atemüberwachung (RR/BR).....	7-3
Aktivieren/Deaktivieren des RR/BR-Alarmes und Einstellen der Alarmgrenzwerte	7-3
Verwendung des Parameterbedienfelds „Resp“	7-4
Herzfrequenzanzeige.....	7-5
Konfigurieren der Alarme der Herzfrequenzanzeige (HF)	7-5
Aktivieren/Deaktivieren von Herzfrequenzalarmen und Einstellen der Alarmgrenzwerte	7-5
Verwendung des Parameterbedienfelds „HF/PF“	7-6

Kapitel 8 Nichtinvasive Blutdruck-Überwachung (NIBD)

Funktionsweise der NIBD-Option	8-2
Die numerische NIBD-Anzeige	8-3
NIBD – Einrichtung und Verwendung	8-3
Wahl der NIBD-Manschette	8-4
Anschließen der NIBD-Manschette	8-5
Anlegen der Manschette am Patienten.....	8-7
Sicherstellen korrekter Manschettendruckeinstellungen	8-9
Konfigurieren der NIBD-Alarme und -Einstellungen	8-10
Aktivieren/Deaktivieren der NIBD-Alarme und Einstellen der Alarmgrenzwerte	8-10
Verwendung des Parameterbedienfelds „NIBP“	8-12
NIBD-Systemmeldungen	8-15

Kapitel 9 CO₂-Überwachung

Überblick	9-1
Einrichtung und Verwendung der CO ₂ -Überwachung	9-2
Auswählen der CO ₂ -Messleitung	9-3
Anschließen von CO ₂ -Messleitungen	9-4
Anschließen eines FilterLine-Sets	9-5
Anlegen einer Smart CapnoLine Nasal- oder Nasal-/Oralkanüle	9-6
CO ₂ -Messung.....	9-7
Einstellen der CO ₂ - und Atemfrequenz-Alarme	9-8
Aktivieren/Deaktivieren von Alarmen und Einstellen der CO ₂ -Alarmgrenzwerte	9-8
Verwendung des Parameterbedienfelds „CO ₂ “	9-10
Systemmeldungen	9-11
Patente	9-12

Kapitel 10 Puls-CO-Oxymetrie (SpO₂, SpCO und SpMet)

Warnungen – SpO ₂ , Allgemeines	10-2
Warnungen –SpO ₂ , Oxymetrie-Sensor	10-3
SpO ₂ – Einrichtung und Verwendung	10-4
Wahl des SpO ₂ -Sensors	10-4
Anlegen des SpO ₂ -Sensors	10-4
Anlegen eines zweiteiligen Einmalsensors/-kabels	10-5
Anbringen eines zweiteiligen wiederverwendbaren SpO ₂ -Sensors/-Kabels	10-7
Reinigen und Wiederverwenden von Sensoren	10-8
Anschließen des SpO ₂ -Sensors	10-8
Anzeige der SpO ₂ -, SpCO- und SpMet-Messwerte	10-9
Aktivieren/Deaktivieren der SpO ₂ -Alarmer und Einstellen der Alarmgrenzwerte	10-9
Einstellen des oberen und des unteren Alarmgrenzwerts für den SpO ₂ -Alarm	10-10
Einstellen des oberen und des unteren SpCO- und SpMet-Alarmgrenzwerts	10-10
Verwendung des Parameterbedienfelds „SpO ₂ “	10-11
Aktivieren/Deaktivieren der SpCO- und SpMet-Überwachung	10-11
Festlegen der SpO ₂ -Mittelungszeit	10-11
Auswahl der SpO ₂ -Empfindlichkeit	10-11
Auswählen des Herzfrequenz-/Pulsfrequenz-(HF/PF)-Tons	10-12
SpO ₂ -Systemmeldungen	10-12
Funktionsprüfgeräte und Patientensimulatoren	10-13

Kapitel 11 Invasive Drucküberwachung (IBD)

Invasive Druckwandler	11-1
IBD-Einrichtung	11-2
Anschließen des invasiven Druckwandlers	11-2
Nullabgleich des Messwandlers	11-3
Erneutes Nullen eines Wandlers	11-4
Anzeigen von IBD-Messwerten	11-5
Bedingungen, die IBD-Messungen beeinträchtigen	11-5
Aktivieren/Deaktivieren von IBD-Alarmen und Einstellen der Alarmgrenzwerte	11-6
Einstellen des oberen und des unteren systolischen (SYS) Alarmgrenzwerts	11-6
Einstellen des oberen und des unteren diastolischen (DIA) Alarmgrenzwerts	11-7
Einstellen des oberen und des unteren Alarmgrenzwerts für den mittleren arteriellen Druck (MITTEL)	11-7
Einstellen der IBD-Quellenbezeichnung	11-8
IBD-Systemmeldungen	11-9

Kapitel 12 Temperaturüberwachung

Einrichtung der Temperaturüberwachung	12-1
Auswählen und Anlegen von Temperatursonden	12-1
Anschließen der Temperatursonde	12-2
Anzeigen der Temperatur	12-2
Aktivieren/Deaktivieren von Temperaturalarmen und Einstellen der Alarmgrenzwerte	12-3
Einstellen des oberen und des unteren Temperatur-Alarmgrenzwerts	12-3
Einstellen des oberen und des unteren Temperatur-Alarmgrenzwerts	12-4
Auswahl der Temperaturbezeichnung	12-5
Temperatur-Systemmeldungen	12-6

Kapitel 13 Automatische externe Defibrillation (AED)

AED-Betrieb	13-2
Bestimmen des Patientenzustands gemäß den medizinischen Protokollen	13-2
Aufnahme der HLW gemäß den medizinischen Protokollen	13-2
Vorbereitung des Patienten	13-2
1 – Einschalten des Geräts	13-4
2 – Analyse	13-5
3 – Drücken der Taste SCHOCK	13-7
Betriebsmeldungen	13-8
Audio- und Textmeldungen	13-8
Wechsel in den manuellen Modus	13-10

Kapitel 14 12-Kanal-EKG-Interpretationsanalyse

Eingeben der Patientendaten	14-3
Eingeben des Patientennamens und der Patienten-ID	14-3
Eingeben von Alter und Geschlecht des Patienten	14-4
Einrichten der 12-Kanal-EKG-Überwachung	14-4
Vorbereiten des Patienten auf das Anlegen der Elektroden	14-5
Anlegen der Elektroden am Patienten	14-5
Anschließen des 12-Kanal-EKG-Kabels	14-7
Anzeigen der 12-Kanal-EKG-Kurven	14-8
12-Kanal-EKG-Interpretationsanalyse	14-8
Fehlerzustände mit Auswirkungen auf die 12-Kanal-EKG-Interpretationsanalyse .	14-11
Drucken des 12-Kanal-EKGs	14-12
Druck- und Anzeigooptionen für 12-Kanal-EKGs	14-13
Aktivieren der Signalerfassung für das 12-Kanal-EKG	14-13
Festlegen der Anzahl der Exemplare des 12-Kanal-EKG-Berichts	14-13
Festlegen des Druckformats für das 12-Kanal-EKG	14-13
Drucken einer 10-sekündigen Kurve von Ableitung II	14-14
Festlegen des Frequenzgangs für das 12-Kanal-EKG	14-14

Kapitel 15 Manuelle Defibrillation

Notfalldefibrillation mit Paddles	15-1
Bestimmen des Patientenzustands gemäß den lokalen medizinischen Protokollen	15-2
Aufnahme der HLW gemäß den medizinischen Protokollen	15-2
Einschalten des Geräts	15-2
1 – Auswählen der Energiestufe	15-2
2 – Laden des Defibrillators	15-3
3 – Abgabe des Schocks	15-5
Notfalldefibrillation mit Freihand-Therapieelektroden	15-6
Bestimmen des Patientenzustands gemäß den lokalen medizinischen Protokollen	15-6
Aufnahme der HLW gemäß den medizinischen Protokollen	15-6
Vorbereitung des Patienten	15-6
Einschalten des Geräts	15-7
1 – Auswählen der Energiestufe	15-7
2 – Laden des Defibrillators	15-8
3 – Abgabe des Schocks	15-9
Interne Paddles	15-9
Überprüfung vor der Verwendung	15-10
Synchronisierte Kardioversion	15-11
Verfahrensanleitung für die synchronisierte Kardioversion	15-12
Bestimmen des Patientenzustands und Versorgung gemäß den lokalen medizinischen Protokollen	15-12
Vorbereitung des Patienten	15-12
Einschalten des Geräts	15-12
Drücken der Taste „Sync“	15-12
1 – Auswählen der Energiestufe	15-13
2 – Laden des Defibrillators	15-13
3 – Abgabe des Schocks	15-14

Kapitel 16 Defibrillation im beratenden Modus

Defibrillation im beratenden Modus – Vorgehensweise	16-2
Bestimmen des Patientenzustands gemäß den lokalen medizinischen Protokollen	16-2
Aufnahme der HLW gemäß den medizinischen Protokollen	16-2
Vorbereitung des Patienten	16-2
1 – Einschalten des Geräts	16-2
2 – Drücken der Taste ANALYSE	16-3
3 – Drücken der Taste SCHOCK	16-5

Kapitel 17 Defibrillation im Beratungs-/CPR-Protokoll-Modus

Defibrillation im Beratungs-/CPR-Protokoll-Modus – Vorgehensweise.....	17-3
Bestimmen des Patientenzustands gemäß den lokalen medizinischen Protokollen	17-3
Aufnahme der HLW gemäß den medizinischen Protokollen	17-3
Vorbereitung des Patienten	17-3
1 – Einschalten des Geräts	17-4
2 – Drücken der Taste ANALYSE	17-5
3 – Drücken der Taste SCHOCK	17-6

Kapitel 18 Externe Stimulation

Externe Stimulation.....	18-2
Schrittmachermodi	18-2
Stimulation im Bedarfs-Modus	18-2
Bestimmen des Patientenzustands und Versorgung gemäß den lokalen medizinischen Protokollen	18-2
Vorbereitung des Patienten	18-2
1 – Einschalten des Geräts	18-2
2 – Anlegen der EKG-Elektroden/Freihand-Therapieelektroden	18-3
3 – Drücken der Taste „SCHRITTM.“	18-3
4 – Einstellen des Modus	18-4
5 – Einstellen der Stimulationsfrequenz	18-4
6 – Einschalten des Schrittmachers	18-4
7 – Einstellen der Schrittmacher-Stromstärke	18-4
8 – Bestimmen der Erregungsauslösung (Capture)	18-5
9 – Bestimmen der optimalen Reizschwelle	18-5
Stimulation im Festfrequenzmodus.....	18-6
1 – Einschalten des Geräts	18-6
2 – Anlegen der EKG-Elektroden/Freihand-Therapieelektroden	18-6
3 – Drücken der Taste „SCHRITTM.“	18-7
4 – Einstellen des Modus	18-7
5 – Einstellen der Stimulationsfrequenz	18-7
6 – Einschalten des Schrittmachers	18-7
7 – Einstellen der Schrittmacher-Stromstärke	18-8
8 – Bestimmen der Erregungsauslösung (Capture)	18-8
9 – Bestimmen der optimalen Reizschwelle	18-9
Stimulation bei Kindern	18-9

Kapitel 19 Real CPR Help

CPR-Dashboard	19-2
Frequenz- und Tiefenmesswerte	19-2
CPR-Entlastungsanzeige	19-2
Thoraxkompressionsanzeige	19-2
CPR-Taktvorgabe	19-3
Aufforderung GANZ ENTLAST.	19-3
CPR-Sprachaufforderungen (optional).....	19-3

CPR-Pausendaueranzeige	19-4
CPR-Countdown-Timer	19-4
CPR-Kompressionen-Balkendiagramm	19-4

Kapitel 20 See-Thru CPR (optional)

Verwendung von See-Thru CPR	20-2
Beispiele	20-2

Kapitel 21 Patientendaten

Speichern von Daten	21-1
Erfassen eines Daten-Snapshots	21-2
Überprüfen und Drucken von Snapshots	21-2
Behandlungsübersichtsbericht.....	21-2
Drucken eines Behandlungsübersichtsberichts	21-3
Übertragen von Daten auf ein USB-Gerät	21-3
Löschen des Protokolls	21-4

Kapitel 22 Drahtlose Kommunikation

Wireless-Verbindungs-Symbol.....	22-2
Das Menü „Wireless“	22-3
Auswählen und Erstellen eines temporären Zugriffspunktprofils	22-3
Einrichten und Anzeigen gekoppelter Geräte	22-7
Einrichten der Kommunikation im Supervisor-Menü.....	22-9
WiFi-Zugriffspunktprofile	22-10
Einrichten der Mobilfunkkommunikation	22-14
Konfigurieren der Berichtübertragung	22-17
Versenden eines 12-Kanal-EKG-Berichts.....	22-18
Meldungen des Kommunikationssystems	22-19

Kapitel 23 Drucken

Drucken von Patientendaten	23-1
Druckereinrichtung	23-2
Automatische Ausdrücke	23-2
Drucken von Kurven	23-2
Drucken von Berichten	23-3
Drucken von Trends	23-4

Kapitel 24 Wartung

Täglich/bei jedem Schichtwechsel durchzuführendes Prüfverfahren	24-2
Inspektion	24-2
Defibrillator-/Schrittmachertest mit Freihand-Therapieelektroden	24-3

Defibrillatortest mit externen Paddles	24-6
Empfohlener präventiver Mindestwartungsplan.....	24-8
Jährlich	24-8
Richtlinien zur Unterstützung der optimalen Akkuleistung.....	24-8
Reinigungsanweisungen.....	24-9
Reinigen des X Series Geräts	24-9
Reinigen der NIBD-Blutdruckmanschette	24-9
Reinigen der SpO2-Sensoren	24-10
Reinigen von Kabeln und Zubehör	24-10
Einlegen von Druckerpapier	24-10
Reinigen des Druckkopfs	24-11

Anhang A Technische Daten

Defibrillator.....	A-2
Monitor/Display	A-14
Impedanzpneumographie	A-15
Alarmer	A-15
Registrierer	A-16
Akku.....	A-17
Allgemeines	A-17
Schrittmacher.....	A-18
CO2	A-18
Pulsoxymetrie	A-19
Nichtinvasive Blutdruckmessung	A-22
Invasive Drücke	A-23
Temperatur.....	A-24
Ergebnisse klinischer Studien zur biphasischen Kurvenform	A-25
Randomisierte multizentrische klinische Studie zur Defibrillation von Kammerflimmern (VF) und ventrikulärer Tachykardie (VT)	A-25
Randomisierte multizentrische klinische Studie zur Kardioversion von Vorhofflimmern (AF)	A-27
Synchronisierte Kardioversion von Vorhofflimmern	A-29
Informationen und Herstellererklärung zur elektromagnetischen Verträglichkeit.....	A-30
Genauigkeit des Algorithmus für die EKG-Analyse	A-35
Klinische Leistungsfähigkeitsergebnisse	A-35
Informationen und Herstellererklärung zur Wireless-Verbindung	A-36
Ausgestrahlte HF-Emissionen (IEC 60601-1-2)	A-36
FCC-Hinweis	A-36
IC-(Industry Canada)-Hinweise	A-37

Anhang B Zubehör

Kapitel 1

Allgemeine Hinweise

Produktbeschreibung

Das ZOLL® X Series™ Gerät ist ein anwenderfreundlicher, tragbarer Defibrillator, der neben Defibrillation und externer Stimulation die Überwachung der folgenden Parameter ermöglicht: EKG, CO-Oxymetrie, nicht invasiver Blutdruck (NIBD), invasiver Blutdruck (IBD), CO₂, Temperatur und Atmung. Das Gerät wurde für verschiedenste Reanimationsbedingungen entwickelt. Durch das robuste, kompakte und leichte Design ist es ideal für Transportsituationen geeignet. Das Gerät wird mit einem externen Netzteil oder mit einem leicht austauschbaren Akku betrieben, der schnell im Gerät aufgeladen werden kann, wenn es am Netz angeschlossen ist. Der Akku des Geräts kann außerdem mit der ZOLL *SurePower™ Ladestation* geladen und getestet werden.

Hinweis: Das X Series Gerät verfügt neben Defibrillations- und Stimulationsfunktionen auch über Überwachungsfunktionen, von denen einige optional sind. Eine vollständige Liste der Optionen finden Sie in Abb. 1-1. Optionale Funktionsmerkmale werden in diesem Handbuch als „optional“ bezeichnet.

Das Produkt wurde sowohl für den Einsatz im Krankenhaus als auch in der rauen Welt des Rettungsdiensts entwickelt. Bei diesem Gerät handelt es sich um einen flexiblen, automatisierten externen Defibrillator mit manuellen Bedienungsmöglichkeiten; es kann für den Betrieb im manuellen, beratenden oder halbautomatischen Modus konfiguriert werden. Der Start erfolgt wahlweise im halbautomatischen Modus (AED-Modus) oder im manuellen Modus (konfigurierbar).

Im manuellen Modus funktioniert das Gerät als konventioneller Defibrillator, wobei das Laden und Entladen vollständig durch den Bediener kontrolliert wird. Im beratenden und im AED-Modus sind einige Funktionen des Geräts automatisiert und ein aufwändiger Erkennungsalgorithmus wird eingesetzt, um ein Kammerflimmern und die Angemessenheit einer Defibrillator-Schockverabreichung festzustellen. Geräte können für das automatische Laden, Analysieren und Wiederaufladen konfiguriert werden und den Bediener mit der Meldung „SCHOCK DRÜCKEN“ anleiten (abhängig von lokalen Protokollen). Für die erweiterten Maßnahmen der Herzlungenwiederbelebung (Advanced Cardiac Life Support, ACLS) wird das Gerät durch Drücken der entsprechenden Funktionstaste auf der Vorderseite vom AED-Modus in den manuellen Modus umgeschaltet.

Das X Series Gerät liefert Hilfeleistenden bei der Herzlungenwiederbelebung (HLW oder CPR, Cardio-Pulmonale Reanimation) mit der Bewertung der Frequenz und Tiefe der Brustkorbkompressionen wertvolle Informationen. Real CPR Help[®] erfordert die Verwendung von ZOLL OneStep[™] CPR-Elektroden, OneStep[™] Complete-Elektroden oder CPR-D-padz[®]-Elektroden. Bei Verwendung dieser Elektroden können die angezeigten EKG-Kurven durch die Funktion See-Thru CPR[®] adaptiv gefiltert werden, um die durch die Brustkorbkompressionen hervorgerufenen Artefakte zu reduzieren.

Das Gerät zeigt die Zahlenwerte und Kurven auf einem farbigen LCD-Display an, das quer durch den Raum und aus unterschiedlichsten Blickwinkeln gut abzulesen ist. EKG-, Plethysmografie- und Atmungskurven können gleichzeitig angezeigt werden, um alle Patientenüberwachungsdaten problemlos auf einen Blick zu erkennen. Der Bildschirm ist konfigurierbar. Sie können ein visuelles Layout wählen, das Ihren Überwachungsanforderungen am besten gerecht wird. Das X Series Gerät ist mit einem transkutanen Schrittmacher ausgestattet, der aus einem Impulsgenerator und einer Elektronik für die EKG-Messung besteht. Diese Option unterstützt die nichtinvasive Stimulation von Erwachsenen, Jugendlichen, Kindern und Säuglingen im Festfrequenz- wie auch im Bedarfs-Modus.

Das X Series Gerät verfügt über ein System für die Erfassung und Durchsicht von Patientendaten, mit dem Sie Patientendaten anzeigen, speichern und übertragen können. Über den Drucker und den USB-Anschluss, mit denen das X Series Gerät ausgestattet ist, können Sie die Daten drucken und auf einen PC übertragen.

Das X Series Gerät verfügt über ein Modul für die drahtlose Übertragung von Daten. Über einen ZOLL Server kann das X Series Gerät 12-Kanal-EKG-Snapshotberichte (einschließlich Trenddaten) an einen Empfänger versenden. Mithilfe von ZOLL RescueNet oder der ePCR Software können auch die ausführlichen Fallinformationen (einschließlich Trenddaten) automatisch vom X Series Gerät abgerufen werden.

Optionale Funktionsmerkmale des X Series Geräts

Das X Series Gerät verfügt über die nachstehend aufgeführten optionalen Funktionsmerkmale.

Tabelle 1-1 Optionale Funktionsmerkmale des X Series Geräts

Optionales Funktionsmerkmal
12-Kanal-EKG mit Interpretation
SpO ₂ (Masimo [®]) mit SpCO [®] und SpMet [®]
NIBD (mit Smartcuf [®] und SureBP [™])
EtCO ₂ (Oridion [®] Microstream [®])
Temperatur
Invasive Drücke (3 Kanäle)
Advanced CPR Help
Stimulation

Praktischer Umgang mit diesem Handbuch

Das X Series Bedienerhandbuch enthält Informationen für die sichere und effiziente Verwendung und Pflege der X Series Produkte. Es ist wichtig, dass alle Geräteanwender sämtliche im Handbuch enthaltenen Informationen lesen und verstehen.

Bitte lesen Sie die Abschnitte zu den Sicherheitsvorkehrungen und Warnhinweisen.

Kapitel 24, „Wartung“ enthält die Verfahren für die tägliche Prüfung und die Pflege des Geräts.

Aktualisierungen des Bedienerhandbuchs

Das Ausgabe- oder Revisionsdatum für dieses Handbuch ist auf der Vorderseite angegeben. Wenn dieses Datum mehr als drei Jahre zurückliegt, fragen Sie bei ZOLL Medical Corporation an, ob weitere aktualisierte Produktinformationen zur Verfügung stehen.

Alle Anwender müssen jede Aktualisierung sorgfältig durchlesen, um sich hinsichtlich des Umgangs mit dem Gerät und seinem Zubehör auf den jeweils neuesten Stand zu bringen, und die Aktualisierung anschließend in den entsprechenden Abschnitt des Handbuchs einfügen, damit sie später als Referenzmaterial verfügbar ist.


Die Produktdokumentation steht auf der ZOLL Website (www.zoll.com) zur Verfügung. Wählen Sie im Menü „Products“ (Produkte) die Option „Product Manuals“ (Produkt Handbücher).

Auspacken

Untersuchen Sie alle Behälter auf Beschädigungen. Bewahren Sie beschädigtes Verpackungs- und Polstermaterial auf, bis die darin transportierten Teile auf Vollständigkeit und das Gerät auf seine mechanische und elektrische Unversehrtheit überprüft wurden. Falls Komponenten fehlen oder beschädigt sind bzw. falls der Defibrillator den elektrischen Selbsttest nicht besteht, wenden sich Kunden in den USA bitte an ZOLL Medical Corporation (1-800-348-9011). Kunden außerhalb der USA sollten sich mit dem nächsten autorisierten Vertreter von ZOLL in Verbindung setzen. Bei beschädigter Transportverpackung ist auch der Frachtführer zu benachrichtigen.

Verwendete Symbole

In diesem Handbuch und auf dem Gerät können die folgenden Symbole erscheinen:

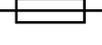Symbol	Beschreibung
	Gefährliche Spannung!
	Achtung: Mitgelieferte Dokumentation beachten!
	Vorsicht, zerbrechlich!
	Vor Nässe schützen!
	Diese Seite nach oben!
	Temperaturbeschränkungen beachten!
	CE-Kennzeichen – Das Produkt entspricht der Europäischen Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG.
	Patientenanschluss Typ B
	Patientenanschluss Typ BF
	Patientenanschluss Typ CF
	Defibrillatorsicherer Patientenanschluss Typ BF
	Defibrillatorsicherer Patientenanschluss Typ CF
	Schmelzsicherung
	Potenzialausgleich

Symbol	Beschreibung
	Wechselstrom (~)
	Gleichstrom (=)
	Betrieb mit externem Netzteil
	Vorsicht, Hochspannung
	Erdung
	Eingangsklemme (-)
	Eingangsklemme (+)
	Gerät ein/aus
	Schutzerde
	Enthält Lithium. Sachgemäß wiederaufbereiten oder entsorgen.
	Von offenen Flammen und großer Hitze fernhalten.
	Nicht öffnen, zerlegen oder absichtlich beschädigen!
	Nicht zerschlagen.
	Nicht im Hausmüll entsorgen! Sachgemäß wiederaufbereiten oder entsorgen.

Symbol	Beschreibung
	Entsorgung durch Abgabe bei einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Nicht im Hausmüll entsorgen!
	Herstellungsdatum
	Haltbarkeitsdatum
	Latexfrei
	Nicht wiederverwenden!
	Nicht knicken!
	Nicht steril
	Hersteller
	Autorisierter EU-Repräsentant
	Seriennummer
	Katalognummer
	Bedienerhandbuch beachten!
	Nur auf Verordnung
	Batterieladestand

Typografische Konventionen und Warnhinweise

In diesem Handbuch finden die folgenden typografischen Konventionen und Arten von Warnhinweisen Verwendung:

Im Text sind die Namen und Beschriftungen von Gerätetasten und Funktionstasten **fett** formatiert (z. B. „Drücken Sie die Taste **Laden** oder drücken Sie die Taste **Schrittm.**“).

In diesem Handbuch werden Audio-Aufforderungen und im Display angezeigte Textmeldungen in Großbuchstaben und kursiv formatiert dargestellt (z. B. *LEAD-FEHLER*).

Warnung! **Warnungen (durch „Warnung“ hervorgehoben) weisen Sie auf Situationen oder Handlungen hin, die zu gravierenden Verletzungen bis hin zum Tod führen können.**

Vorsicht Hinweise (durch „Vorsicht“ hervorgehoben) weisen Sie auf Situationen oder Handlungen hin, die zu Schäden am Gerät führen können.

Indikationen für die Anwendung des X Series Gerät

Das X Series Gerät muss durch medizinisches Fachpersonal bedient werden, das mit den Grundlagen der Überwachung, der Beurteilung der Vitalfunktionen, kardiologischer Intensivtherapie und dem Einsatz des X Series Geräts vertraut ist. Das X Series Gerät ist zudem für den Einsatz durch Ärzte (oder durch von ihnen beauftragte Dritte) vor Ort bei einem Notfall oder in der Notaufnahme eines Krankenhauses, auf der Intensivstation, kardiologischen Wachstation oder in ähnlichen Bereichen eines Krankenhauses gedacht. Der Einsatzort kann ein Krankenwagen oder der Ort eines Notfalls sein. Das Gerät ist auch zur Verwendung während des Transports von Patienten vorgesehen. Das X Series Gerät wird hauptsächlich bei Patienten eingesetzt, die Symptome eines Herzstillstands zeigen oder sich in einer posttraumatischen Situation befinden. Es kann zudem auch immer dann eingesetzt werden, wenn eine oder mehrere der (als Option) im Gerät integrierten Funktionen überwacht werden müssen. Das X Series Gerät kann für pädiatrische (wie in der folgenden Tabelle beschrieben) wie für erwachsene Patienten (21 Jahre und älter) mit und ohne kardiale Dysfunktion verwendet werden.

Pädiatrische Patienten	Altersbereich (ca.)
Neugeborenes (Neonat)	0 bis 1 Monat
Säugling	1 Monat bis 2 Jahre
Kind	2 bis 12 Jahre
Jugendlicher	12 bis 21 Jahre

Bei pädiatrischen Patienten unter 8 Jahren bzw. mit einem Körpergewicht unter 25 kg müssen ZOLL pedi-padz[®] Defibrillationselektroden für Kinder verwendet werden. Die Behandlung darf nicht verzögert werden, um das genaue Alter oder Gewicht des Patienten festzustellen.

Manuelle Defibrillation

Die Anwendung des X Series Geräts im manuellen Modus für eine externe oder interne Defibrillation ist bei Betroffenen mit Herzstillstand angezeigt, bei denen offensichtlich ein Kreislaufstillstand vorliegt. Mögliche Anzeichen hierfür sind:

- Bewusstlosigkeit
- Atemstillstand
- Kein tastbarer Puls

Dieses Produkt darf nur von geschultem medizinischem Personal verwendet werden, um Kammerflimmern und schnelle ventrikuläre Tachykardien wieder zu einem Sinusrhythmus bzw. einem anderen hämodynamisch wirksamen Herzschlag zu konvertieren.

Das Gerät kann außerdem für die synchronisierte Kardioversion bestimmter atrialer oder ventrikulärer Arrhythmien verwendet werden. Ob eine synchronisierte Kardioversion angebracht ist, muss von qualifiziertem medizinischem Personal entschieden werden.

Die Patientenpopulation reicht von Neugeborenen (Neonaten) bis zu Erwachsenen.

Halbautomatischer Betrieb (AED-Betrieb)

X Series Geräte dürfen nur von entsprechend ausgebildetem medizinischem Personal verwendet werden, das einen entsprechenden Schulungskurs zur Verwendung des Defibrillators, bei dem der Anwender die Schockabgabe an den Patienten selbst steuert, erfolgreich abgeschlossen hat.

Sie sind speziell für die Anwendung im Rahmen von Frühdefibrillationsprogrammen ausgelegt, bei denen die Abgabe von Defibrillationsschocks im Rahmen der Herzlungenwiederbelebung, der Transport und die klinische Versorgung in ein medizinisch abgesichertes Versorgungskonzept eingebettet sind.

Die Anwendung des X Series Geräts im halbautomatischen Modus ist bei Betroffenen mit Herzstillstand angezeigt, bei denen offensichtlich ein Kreislaufstillstand vorliegt. Mögliche Anzeichen hierfür sind:

- Bewusstlosigkeit
- Atemstillstand
- Kein tastbarer Puls

Die Spezifikationen für die EKG-Rhythmusanalysefunktion sind im Abschnitt „Genauigkeit des Algorithmus für die EKG-Analyse“ auf Seite A-35 zu finden.

Bei Patienten unter 8 Jahren bzw. mit einem Körpergewicht unter 25 kg müssen ZOLL Defibrillationselektroden für Kinder verwendet werden. Die Behandlung darf nicht verzögert werden, um das genaue Alter oder Gewicht des Patienten festzustellen.

EKG-Überwachung

Das X Series Gerät ist für die Überwachung und/oder Aufzeichnung von 3-, 5- und 12-Kanal-EKGs und der Herzfrequenz vorgesehen, außerdem für die Auslösung von Alarmen, wenn die Herzfrequenz vom Bediener festgelegte Grenzwerte über- oder unterschreitet. Die Patientenpopulation reicht von Neugeborenen (Neonaten) bis zu Erwachsenen, mit oder ohne kardiale Dysfunktion.

Wiederbelebungsüberwachung

Die Wiederbelebungsüberwachungsfunktion liefert ein audiovisuelles Feedback, das dem Hilfeleistenden den Rhythmus bei der Herzdruckmassage vorgibt. Der Takt entspricht der AHA/ERC-Empfehlung von 100 Thoraxkompressionen pro Minute. Audio- und Textaufforderungen fordern dazu auf, bei Erwachsenen eine Kompressionstiefe von mindestens 3,8 cm bzw. 5,0 cm (je nach Konfiguration) zu erzielen. Die Wiederbelebungsüberwachungsfunktion ist nicht für die Verwendung bei Patienten unter 8 Jahren vorgesehen. Die Wiederbelebungsüberwachungsfunktion ist nicht für die Verwendung bei Patienten unter 8 Jahren vorgesehen.

Externe transkutane Stimulation

Als Alternative zur endokardialen Stimulation kann dieses Produkt für eine temporäre externe Stimulation bei Patienten (bewusstseinsklar oder bewusstlos) eingesetzt werden.

Die Stimulation verfolgt u. a. die folgenden Zwecke:

- Reanimation nach Herzstillstand oder Bradykardie beliebiger Ätiologie:

Die nichtinvasive Stimulation wurde zur Reanimation bei Herzstillstand, Vagusreflex-Stillstand, medikamentenbedingtem Stillstand (verursacht durch Procainamid, Chinidin, Digitalis, Betablocker, Verapamil usw.) sowie bei unerwartetem Kreislaufstillstand (verursacht durch Anästhesie, chirurgischen Eingriff, Angiografie und andere therapeutische oder diagnostische Verfahren) eingesetzt. Weiterhin wurde sie zur kurzzeitigen Beschleunigung einer Bradykardie bei Adams-Stokes- und Sick-Sinus-Syndrom eingesetzt. Dieses Verfahren ist sicherer, zuverlässiger und in Notfällen schneller verfügbar als die Verwendung endokardialer oder anderer temporärer Elektroden.

- Als Standby-Maßnahme, wenn Stillstand oder Bradykardie zu erwarten sind:

Die nichtinvasive Stimulation kann als Standby-Maßnahme nützlich sein, wenn die Möglichkeit eines Herzstillstands oder einer symptomatischen Bradykardie aufgrund eines akuten Myokardinfarkts, einer Arzneimittelvergiftung, einer Anästhesie oder eines operativen Eingriffs besteht. Darüber hinaus eignet sich diese Methode zur temporären Behandlung von Patienten, die auf eine Schrittmacherimplantation oder die Einleitung einer transvenösen Therapie warten. Als Standby-Anwendung kann die nichtinvasive Stimulation eine Alternative zur transvenösen Therapie darstellen, da hierbei Risiken wie Elektrodendislokation, Infektion, Blutung, Embolisation, Perforation, Phlebitis sowie die mechanische bzw. elektrische Auslösung einer mit der endokardialen Stimulation verbundenen ventrikulären Tachykardie oder Fibrillation vermieden werden.

- Unterdrückung von Tachykardien:

Erhöhte Herzfrequenzen aufgrund externer Stimulation unterdrücken häufig die ventrikuläre ektopische Aktivität und tragen möglicherweise dazu bei, Tachykardien zu verhindern.

- Stimulation bei Kindern:

Bei Kindern mit maximal 15 kg Körpergewicht kann eine Stimulation mit den ZOLL Freihand-Elektroden für Kinder erfolgen. Eine längere Stimulation (mehr als 30 Minuten) kann besonders bei Neugeborenen Verbrennungen verursachen. Die betroffenen Hautflächen sollten in regelmäßigen Abständen kontrolliert werden.

Überwachung des nichtinvasiven Blutdrucks

Das X Series Gerät ist für die nichtinvasive Messung des arteriellen Blutdrucks und der Herzfrequenz vorgesehen, außerdem für die Auslösung von Alarmen, wenn einer der Parameter vom Bediener festgelegte Grenzwerte über- oder unterschreitet. Messungen werden mittels einer aufblasbaren Manschette am Arm oder Bein vorgenommen. Die Patientenpopulation reicht von Neugeborenen (Neonaten) bis zu Erwachsenen.

Temperaturüberwachung

Das X Series Gerät ist für die kontinuierliche Messung der Rektal-, Ösophagus- oder Oberflächentemperatur vorgesehen, außerdem für die Auslösung von Alarmen, wenn die Temperatur vom Bediener festgelegte Grenzwerte über- oder unterschreitet. Die Patientenpopulation reicht von Neugeborenen (Neonaten) bis zu Erwachsenen.

SpO₂-Überwachung

Das Puls-CO-Oxymeter (mit Masimo Rainbow[®]-SET[®]-Technologie und Rainbow-Sensoren) des X Series Geräts ist für die kontinuierliche nichtinvasive Überwachung der funktionellen Sauerstoffsättigung des arteriellen Hämoglobins (SpO₂), der Pulsfrequenz, der Carboxyhämoglobinsättigung (SpCO) und/oder der Methämoglobinsättigung (SpMet) vorgesehen. Das Puls-CO-Oxymeter und die Zubehörteile eignen sich für den Einsatz an Erwachsenen, Kindern und Neugeborenen in Ruhe oder in Bewegung sowie für Patienten mit guter oder schlechter Perfusion in Krankenhäusern, medizinischen Einrichtungen und in mobilen Umgebungen.

Atmungsüberwachung

Das X Series Gerät ist für die kontinuierliche Überwachung der Atemfrequenz vorgesehen, außerdem für die Auslösung von Alarmen, wenn die Atemfrequenz vom Bediener festgelegte Grenzwerte über- oder unterschreitet. Da mit der Messmethode im Grunde die Atemanstrengung gemessen wird, werden Apnoe-Episoden mit fortgesetzter Atemanstrengung (wie z. B. obstruktive Apnoe) nicht erfasst. Das Gerät ist nicht für die Verwendung als Apnoe-Monitor vorgesehen. Die Patientenpopulation reicht von Neugeborenen (Neonaten) bis zu Erwachsenen.

CO₂-Überwachung

Das X Series Gerät ist für die kontinuierliche nichtinvasive Messung und Überwachung der Kohlendioxid-Konzentration der aus- und der eingeatmeten Luft sowie der Atemfrequenz vorgesehen. Die Patientenpopulation reicht von Neugeborenen (Neonaten) bis zu Erwachsenen.

Invasive Überwachung von Drücken

Das X Series Gerät ist für die Durchführung kontinuierlicher invasiver Druckmessungen mittels beliebiger kompatibler Druckwandler und die Anzeige der entsprechenden Messwerte vorgesehen. Die Hauptanwendungsgebiete sind die Überwachung des arteriellen Blutdrucks, des zentralen Venendrucks und des Hirndrucks. Es gelten alle Kontraindikationen des betreffenden vom Anwender ausgewählten Druckwandlers. Die Patientenpopulation reicht von Neugeborenen (Neonaten) bis zu Erwachsenen.

12-Kanal-EKG-Analyse

Die 12-Kanal-EKG-Analyse unterstützt die Diagnose und Behandlung von Patienten mit akutem Myokardinfarkt (AMI). Außerdem ist die 12-Kanal-EKG-Analyse für die Auswertung und Dokumentation von möglicherweise auftretenden anderen transienten Herzrhythmusstörungen geeignet. Bei präklinischer Anwendung kann die 12-Kanal-EKG-Analyse nach Ankunft in der Notaufnahme zu treffende Diagnose- und Behandlungsentscheidungen unterstützen.

Funktionsmerkmale des X Series Geräts

Defibrillatorfunktion

Das X Series Gerät enthält einen Gleichstrom-Defibrillator, der bis zu 200 Joule abgeben kann. Er kann im synchronisierten Betrieb verwendet werden, um eine mit der R-Zacke synchronisierte Kardioversion durchzuführen. Die Defibrillation erfolgt mit Hilfe von Paddles oder vorgegelten Einmal-Defibrillationselektroden.

Ausgangsenergie des Defibrillators

X Series Defibrillatoren können eine biphasische Energie von 1 bis 200 Joule abgeben. Die durch die Brustwand abgegebene Energie richtet sich jedoch nach der transthorakalen Impedanz des Patienten. Es muss eine ausreichende Menge Elektrolytgel auf die Paddles gebracht und auf jedes Paddle eine Kraft von 10 bis 12 Kilogramm ausgeübt werden, um diese Impedanz zu minimieren. Bei Verwendung von Freihand-Therapieelektroden müssen diese richtig angebracht werden (siehe Anweisungen auf der Elektrodenverpackung).

Externer Schrittmacher

X Series Defibrillatoren sind mit einem transkutanen Schrittmacher ausgestattet, der aus einem Impulsgenerator und einer Elektronik für die EKG-Messung besteht. Die nichtinvasive transkutane Stimulation (Non-invasive Transcutaneous Pacing, NTP) ist eine etablierte und bewährte Methode. Diese Therapie kann einfach und schnell sowohl in Notfall- wie auch in anderen Situationen angewendet werden, wenn eine temporäre kardiale Stimulation indiziert ist.

Der Ausgangsstrom des Schrittmachers lässt sich kontinuierlich zwischen 10 und 140 mA einstellen (bei unterbrochenem Betrieb beträgt der Ausgangsstrom 0 mA). Die Frequenz lässt sich kontinuierlich zwischen 30 und 180 Impulsen je Minute (ppm) einstellen, die Schrittweite beträgt 5 ppm (bis 100 ppm) bzw. 10 ppm (über 100 ppm).

Die Abgabe der Stimulationsimpulse an das Herz erfolgt über ZOLL Freihand-Defibrillations-/Stimulationselektroden, die auf dem Rücken und präkordial auf der Brust des Patienten platziert werden.

Die ordnungsgemäße Bedienung des Geräts und die korrekte Platzierung der Elektroden sind für optimale Ergebnisse entscheidend. Alle Anwender müssen mit diesen Bedienungsanweisungen eingehend vertraut sein.

EKG-Überwachung

Für die Überwachung des Patienten-EKGs wird der Patient über ein 3-, 5- bzw. 12-Kanal-Kabel oder über Freihand-Therapieelektroden mit dem Gerät verbunden. Die EKG-Kurve wird im Display zusammen mit den folgenden Daten angezeigt:

- durchschnittliche Herzfrequenz, ermittelt durch Messung der RR-Intervalle
- Ableitungsauswahl – I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 (mit EKG-Kabel), PADDLES oder PADS
- EKG-Verstärkung – 0,125, 0,25, 0,50, 1,0, 2,0, 4,0 cm/mV, AUTO
- Statusmeldungen

Die EKG-Bandbreite ist durch den Anwender wählbar.

Elektroden

Defibrillation, Kardioversion und EKG-Überwachung können bei dem X Series Gerät mit Freihand-Therapieelektroden erfolgen. Für die Schrittmacherfunktion des X Series Gerät kommen ZOLL Freihand-Therapieelektroden zum Einsatz.

Die Bedienelemente **Energiewahl**, **Laden** und **Schock** befinden sich an den Paddles und an der Vorderseite des Geräts. Bei Verwendung von Freihand-Therapieelektroden müssen Sie die Einstellungen mit den Bedienelementen an der Vorderseite des Geräts vornehmen. Wenn Sie zwischen Paddles und Freihand-Therapieelektroden wechseln möchten, ziehen Sie das Multifunktionskabel vom Apex-Paddle ab und verbinden Sie die Freihand-Therapieelektroden mit dem Kabel.

Sie sollten immer das Verfallsdatum auf der Elektrodenpackung überprüfen. Verwenden Sie keine Elektroden, deren Verfallsdatum bereits überschritten ist. Andernfalls könnten sich falsche Patientenimpedanz-Messwerte ergeben, was die abgegebene Energie beeinflussen oder Verbrennungen verursachen kann.



Das Verfallsdatum finden Sie neben diesem Symbol auf der Elektrodenverpackung. Bei stat-padz® II-Elektroden wird dieses Symbol nicht verwendet, das Ablaufdatum befindet sich hier unten rechts auf dem Etikett, unterhalb der Chargennummer.

Hinweis: ZOLL Elektroden enthalten keine gefährlichen Materialien und können mit dem normalen Abfall entsorgt werden, sofern sie nicht durch Krankheitserreger verunreinigt sind. Beim Entsorgen verunreinigter Elektroden müssen Sie die üblichen Vorsichtsmaßnahmen berücksichtigen.

Akkus

X Series Geräte sind mit einem leicht zu wechselnden, wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku (*SurePower II*) ausgestattet. Ein neuer, vollständig geladener Akku reicht normalerweise für mehr als 6 Stunden EKG-Überwachung. Wenn weitere Funktionen genutzt werden (z. B. Defibrillator, Drucker oder Schrittmacher), verkürzt sich diese Zeit.

Wenn das Symbol *BATTERIE SCHWACH* im Display angezeigt wird und das Gerät zugleich drei Signaltöne ausgibt, müssen Sie den Akku ersetzen und wiederaufladen.

Der Akku kann folgendermaßen geladen werden:

- **Internes Laden** – Schließen Sie das X Series Gerät an das externe Netzteil an. Der in das Gerät eingesetzte Akku wird automatisch geladen. Die Akkuanzeige an der Vorderseite liefert folgende Informationen:

Status der Akkuanzeige	Bedeutung
Gelbes Dauerleuchten	Akku wird geladen.
Grünes Dauerleuchten	Akku ist geladen.
Abwechselnd Gelb und Grün	Der Ladestand kann nicht bestimmt werden oder beim Laden des Akkus ist eine Störung aufgetreten.
Erlöschen	

Hinweis: Nach dem Einschalten dauert es ungefähr 45 Sekunden, bis die LEDs am Akku die verbleibende Betriebszeit richtig anzeigen.

- **Externes Laden** – Verwenden Sie zum Laden des Akkus und Prüfen der Akkukapazität das ZOLL SurePower™ Akkuladegerät mit dem X Series Akku-Adapter. Weitere Einzelheiten finden Sie im *SurePower II Battery Pack Guide (Bedienungsanleitung für den SurePower II Akku)*.

Muss der Akku rekaliert werden, leuchtet die Rekalibrierungs-LED (☐) nach Betätigung der Statusanzeigetaste ca. 10 Sekunden lang auf. Wenn die Rekalibrierungs-LED leuchtet, zeigt die Betriebszeitanzeige nicht die tatsächliche Betriebszeit dieses Akkus an. Im Interesse einer optimalen Leistung des Akkus müssen Sie diesen so schnell wie möglich rekaliert.

Um eine manuelle Rekalibrierung des SurePower-Akkus vorzunehmen, können Sie diesen in die SurePower Ladestation einsetzen und einen manuellen Test durchführen (detaillierte Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung für die ZOLL *SurePower Ladestation*).

Nach erfolgter Rekalibrierung leuchtet die Rekalibrierungs-LED nach Betätigung der Statusanzeigetaste nur kurz auf.

Betriebsbereitschaftsanzeige

An der Vorderseite des X Series Geräts befindet sich eine Betriebsbereitschaftsanzeige, die anzeigt, ob das Gerät betriebsbereit ist. Die Betriebsbereitschaftsanzeige kann sich in einem der drei in der folgenden Tabelle beschriebenen Zustände befinden.

Zustand	Beschreibung	Maßnahme
Betriebsbereit 	Das Gerät ist einsatzbereit. Die Parameter der Patientenüberwachung, Defibrillation und Stimulation sind betriebsbereit und der Ladestand des Akkus liegt über dem „Batterie schwach“-Grenzwert. Hinweis: Ist das Gerät an das externe Netzteil angeschlossen, zeigt die Betriebsbereitschaftsanzeige möglicherweise den Zustand „Betriebsbereit“ an, auch wenn der Akku erschöpft ist. Überprüfen Sie den Ladestand des Akkus, bevor Sie das Gerät vom externen Netzteil trennen.	Keine erforderlich.
Blinkend	Einer oder mehrere der folgenden Umstände liegt vor: <ul style="list-style-type: none"> • Der Akku ist nicht richtig eingesetzt. • Der Ladestand des eingesetzten Akkus ist niedrig. • Es ist ein Akkufehler aufgetreten. • Bei Stromversorgung über das externe Netzteil ist kein Akku eingesetzt. • Einer oder mehrere Parameter der Patientenüberwachung (NIBD, SpO2, CO2, IBD oder Temp) haben den Selbsttest nicht bestanden. • Fehler beim Selbsttest der Gerätetasten. • Fehler beim Selbsttest der Audio-Aufforderungen-Datenbank. 	Setzen Sie einen vollständig geladenen Akku in das Gerät ein. Überprüfen Sie die Betriebsbereitschaftsanzeige erneut. Bei weiterhin blinkender Betriebsbereitschaftsanzeige nehmen Sie das Gerät außer Betrieb und wenden Sie sich an das zuständige technische Personal oder an den Technischen Kundendienst von ZOLL.
Nicht verwenden 	Einer oder mehrere der folgenden Umstände liegt vor: <ul style="list-style-type: none"> • Der Akku ist nicht richtig eingesetzt. • Es ist kein Akku eingesetzt und kein externes Netzteil angeschlossen. • Es wurde ein Akku mit sehr geringem Ladestand (unterhalb des Grenzwerts für die softwaregesteuerte Geräteabschaltung) eingesetzt. • Fehler beim EKG-, Defibrillator- oder Schrittmacher-Selbsttest oder anderen kritischen Selbsttests. 	Setzen Sie einen vollständig geladenen Akku in das Gerät ein. Überprüfen Sie die Betriebsbereitschaftsanzeige erneut. Zeigt die Betriebsbereitschaftsanzeige weiterhin das Symbol „Nicht verwenden“, so nehmen Sie das Gerät außer Betrieb und wenden Sie sich an das zuständige technische Personal oder an den Technischen Kundendienst von ZOLL.

Sicherheitsvorkehrungen



Alle Bediener sollten sich mit diesen Sicherheitsvorkehrungen vertraut machen, bevor sie das X Series Gerät einsetzen.

X Series Geräte sind Hochenergie-Defibrillatoren und können eine Energie von 200 Joule abgeben. Zur vollständigen Deaktivierung des Geräts drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um das Gerät auszuschalten.

Zum manuellen Entladen eines geladenen (oder ladenden) Defibrillators können Sie eine der folgenden Vorgehensweisen wählen:

- Drücken Sie die Schnellzugriffstaste **Entladen**.
- Ändern Sie die Energieeinstellung.
- Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um das Gerät auszuschalten.

Aus Sicherheitsgründen entlädt sich das X Series Gerät selbsttätig, wenn in geladenem Zustand nicht innerhalb von 60 Sekunden die Schocktaste (Ⓢ) gedrückt wird.

Warnungen

Allgemeines

Gemäß US-amerikanischem Recht darf dieses Gerät nur von einem Arzt oder auf dessen Anordnung hin erworben werden.

Die Notfalldefibrillation sollte nur durch entsprechend geschultes und qualifiziertes Personal erfolgen, das mit der Bedienung des Geräts vertraut ist. Der verordnende Arzt sollte festlegen, welcher Ausbildungsstand (z. B. Abschluss einer Ausbildung in den Basismaßnahmen (BLS) oder den erweiterten Maßnahmen (ACLS) der Herzlungenwiederbelebung) angemessen ist.

Eine synchronisierte Kardioversion sollte nur von Personen, die in den erweiterten Maßnahmen (ACLS) der Herzlungenwiederbelebung geschult und mit der Bedienung des Geräts vertraut sind, durchgeführt werden. Vor der Defibrillation muss genau abgeklärt werden, um welche Art von kardialer Arrhythmie es sich handelt.

Diese Bedienungsanweisungen beschreiben die Funktionen und die korrekte Bedienung der X Series Geräte. Sie stellen keinen Ersatz für eine formale Ausbildung in der Patientenversorgung dar. Die Bediener sollten sich einer formalen Ausbildung an einer zugelassenen Ausbildungsstätte unterziehen, bevor sie diesen Defibrillator in der Patientenversorgung einsetzen.

Die ordnungsgemäße Bedienung des Geräts und die korrekte Platzierung der Elektroden sind für optimale Ergebnisse entscheidend. Alle Bediener müssen mit diesen Bedienungsanweisungen eingehend vertraut sein.

Der Einsatz von externen Stimulations-/Defibrillationselektroden, Zubehörteilen oder Adaptern anderer Hersteller als ZOLL wird nicht empfohlen. ZOLL übernimmt hinsichtlich der Leistungsfähigkeit oder Wirksamkeit seiner Produkte keinerlei Gewährleistung oder Garantie, wenn diese zusammen mit Stimulations-/Defibrillationselektroden oder Adaptern anderer Hersteller verwendet werden. Defibrillatorstörungen, die auf die Verwendung von Stimulations-/Defibrillationselektroden oder Adaptern zurückzuführen sind, die nicht von ZOLL hergestellt wurden, können zum Erlöschen der von ZOLL eingeräumten Garantie führen.

Überprüfen Sie bei Eingang der Lieferung die Stimulations-/Defibrillationselektroden, um ihre Kompatibilität sicherzustellen.

Achten Sie auf ausreichend Spiel der Kabel, damit sie nicht an den Elektroden ziehen.

Öffnen oder zerlegen Sie das Gerät nicht. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Teilen Sie alle Probleme dem qualifizierten Kundendienstpersonal mit.

Befolgen Sie alle empfohlenen Wartungsanweisungen. Wenden Sie sich bei Problemen unverzüglich an den Kundendienst. Verwenden Sie den Defibrillator erst, nachdem er durch qualifiziertes Personal überprüft worden ist.

Das X Series Gerät arbeitet möglicherweise nicht innerhalb seiner Spezifikationen, wenn es bei der zulässigen Höchst- bzw. Tiefsttemperatur gelagert wurde und dann sofort in Betrieb genommen wird. Das X Series Gerät sollte nicht außerhalb der in Anhang A dieses Handbuchs festgelegten Umgebungsbedingungen gelagert oder betrieben werden.

Stellen Sie das X Series Gerät nach Möglichkeit nicht unmittelbar neben oder auf anderen Geräten auf. Falls sich dies nicht vermeiden lässt, muss vor dem klinischen Einsatz sichergestellt sein, dass das Gerät in dieser Konfiguration normal arbeitet.

Das X Series Gerät sollte entsprechend den in Anhang A dieses Handbuchs enthaltenen Hinweisen zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) installiert und in Betrieb genommen werden.

Verwenden Sie keinesfalls interne Paddles, wenn das externe Netzteil des X Series Geräts an das 400-Hz-Wechselstromnetz eines Flugzeugs angeschlossen ist.

Die Verwendung von Zubehör, Wandlern und Kabeln, die nicht in diesem Handbuch und den zugehörigen Handbuchergänzungen zu X Series Optionen aufgeführt sind, kann zu erhöhten Emissionen oder geringerer elektromagnetischer Störfestigkeit des X Series Geräts führen.

Führen Sie vor Verwendung einen Funktionstest der internen Paddles durch.

Verwenden Sie das Gerät nicht und nehmen Sie es nicht in Betrieb, wenn die Betriebsbereitschaftsanzeige (rechts oben an der Gerätevorderseite) einen durchgestrichenen roten Kreis anzeigt.

Die Patientenkelble müssen sorgfältig geführt werden, damit niemand darüber stolpert und das Gerät nicht durch versehentlichen Zug an den Kabeln auf den Patienten fällt.

Ist das Gerät heruntergefallen, muss es sofort auf Schäden überprüft werden.

Die Supervisor-Menüs sollten nur von qualifiziertem Personal verwendet werden.

Wenn die Genauigkeit eines Messwerts fraglich ist, prüfen Sie zuerst die Vitalfunktionen des Patienten mit anderen Mitteln. Prüfen Sie dann den Monitor auf einwandfreien Betrieb.

EKG-Überwachung

Bei implantierten Herzschrittmachern kann es vorkommen, dass das Gerät bei Herzstillstand oder anderen Arrhythmien die Schrittmacherfrequenz misst. Selbst die spezielle Geräteelektronik zur Erkennung eines Herzschrittmachers erkennt möglicherweise nicht alle Impulse des implantierten Schrittmachers. Prüfen Sie den Puls des Patienten, und verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf die Herzfrequenzanzeige. Anamnese und körperliche Untersuchung liefern wichtige Hinweise, ob ein Herzschrittmacher implantiert ist. Schrittmacherpatienten sollten sorgfältig beobachtet werden. Unter „Schrittmacherimpulsunterdrückung:“ auf Seite A-15 dieses Handbuchs finden Sie ausführliche Informationen zur Schrittmacherimpulsunterdrückung dieses Geräts.

Verwenden Sie nur EKG-Elektroden, die der AAMI-Norm für Elektroden (AAMI EC-12) entsprechen. Bei Verwendung von Elektroden, die dieser AAMI-Norm nicht entsprechen, könnte die Wiederherstellung der EKG-Kurve nach einer Defibrillation deutlich verzögert erfolgen.

Achten Sie darauf, dass das EKG-Signal eine ausreichende Qualität besitzt und dass über jedem QRS-Komplex Synchronisations-Markierungen angezeigt werden, bevor Sie versuchen, eine synchronisierte Kardioversion durchzuführen.

Die Elektroden dürfen niemals direkt über einen implantierten Herzschrittmacher appliziert werden.

Das X Series Gerät erkennt nur elektrische EKG-Signale. Der Pulsschlag (d. h. die effektive Kreislaufperfusion) wird nicht erkannt. Kontrollieren Sie Pulsschlag und Herzfrequenz stets direkt am Patienten. Verlassen Sie sich niemals darauf, dass eine angezeigte Herzfrequenz größer Null auch tatsächlich bedeutet, dass der Patient einen Pulsschlag hat.

Eine unzureichende Vorbereitung der Haut an den Elektrodenstellen kann zu übermäßigen Artefakten führen. Befolgen Sie die Anweisungen zur Hautvorbereitung in Kapitel 6, „EKG-Überwachung“.

Betreiben Sie das X Series Gerät nicht zusammen mit Elektrokauter- oder Diathermiegeräten. Diese Geräte wie auch starke Radiofrequenzsignale abstrahlende Geräte können elektrische Störungen hervorrufen und das vom Monitor angezeigte EKG-Signal verzerren, was die Analyse des Herzrhythmus beeinträchtigt.

Stromschlaggefahr: Wird anderes als das in diesen Bedienungsanweisungen angegebene Zubehör verwendet, kann sich dies negativ auf Patienten-Leckströme auswirken.

Bestimmte Isolationsüberwachungsgeräte können die EKG-Anzeige stören und den Herzfrequenz-Alarm unterdrücken.

EKG-Überwachung über die Paddles kann infolge von Artefakten zu einer ungenauen Herzfrequenzanzeige führen.

Defibrillation

Das ZOLL X Series Gerät kann 200 Joule an elektrischer Energie abgeben. Wird diese elektrische Energie nicht wie in diesem Handbuch beschrieben sachgerecht entladen, kann dies beim Bediener oder in der Nähe befindlichen Personen zu Verletzungen bis hin zum Tod führen.

Schalten Sie die Stimulationsfunktion des X Series Geräts ab, bevor Sie den Patienten mit einem zweiten Defibrillator behandeln. Andernfalls könnte das X Series Gerät beschädigt werden.

Nach einer synchronisierten Kardioversion wird der SYNC-Modus möglicherweise nach jedem Schock oder jeder Entladung deaktiviert. Der Anwender muss möglicherweise nach jedem einem Patienten verabreichten synchronisierten Kardioversionsschock die Taste „Sync“ erneut betätigen. Über die Standardeinstellungen „Defib./Stim.“ im Menü „Einrichten“ > „Supervisor“ kann das X Series Gerät so konfiguriert werden, dass es nach jeder synchronisierten Kardioversion im SYNC-Modus verbleibt.

Die synchronisierte Kardioversion kann im Paddle-Überwachungsmodus durchgeführt werden. Durch die sich bewegenden Paddles können jedoch Artefakte entstehen, durch die der Defibrillator ausgelöst werden könnte. Es wird empfohlen, während der synchronisierten Kardioversion die Ableitungen I, II oder III für die Überwachung zu verwenden. Paddle-Überwachung sollte für elektive Kardioversionen nicht verwendet werden.

Um den Defibrillator oder das Testgerät nicht zu stark zu belasten, sollte der Defibrillator unter keinen Umständen schnell hintereinander wiederholt geladen und entladen werden. Muss wiederholt getestet werden, sollten Sie nach jeder dritten Entladung mindestens 2 Minuten warten.

Im SYNC-Modus wird der Defibrillator nur dann entladen, wenn er vom EKG-Monitor ein entsprechendes Befehlssignal (R-Zacken-Erkennung) erhält; dieses ist durch die SYNC-Markierung in der Kurve und an der blinkenden SYNC-Anzeige zu erkennen.

Falls das Elektrodengel eine direkte elektrische Verbindung zwischen den Defibrillator-Elektroden bildet, kann die abgegebene Energie deutlich bis auf Null reduziert werden. Vor einer weiteren Schockabgabe müssen Sie die Elektroden neu positionieren, um so den Kurzschluss zu unterbrechen.

Eine unsachgemäße Vorgehensweise bei der Defibrillation kann zu Hautverbrennungen führen. Um möglichen Hautverbrennungen entgegenzuwirken, sollten Sie ausschließlich Defibrillatorgel von ZOLL auf den Paddles verwenden; achten Sie auch darauf, dass das Gel die gesamte Paddle-Fläche bedeckt, und drücken Sie die Paddles fest auf den Brustkorb des Patienten.

Wird nach Drücken der Taste LADEN eine neue Energiestufe gewählt, während das Gerät noch lädt oder bereits geladen ist, entlädt sich der Defibrillator zunächst. Die Taste LADEN muss erneut gedrückt werden, damit der Defibrillator auf die neue Energiestufe geladen wird.

Trennen Sie vor der Defibrillation alle elektronischen Geräte vom Körper des Patienten, die nicht speziell gegen Defibrillation geschützt und entsprechend gekennzeichnet sind.

Kontrollieren Sie vor dem Laden des Defibrillators, dass die im Display ausgewählte Energiestufe der gewünschten Abgabeenergie entspricht.

Die Defibrillation hat Vorrang vor der externen Stimulation. Sollte der Defibrillator bei laufender externer Stimulation geladen werden, wird der Schrittmacher ausgeschaltet und der Defibrillator auf die ausgewählte Energiestufe geladen.

Stimulation

Kammerflimmern reagiert nicht auf Stimulation und erfordert eine sofortige Defibrillation. Daher muss die Arrhythmie des Patienten sofort bestimmt werden, um ihm die angemessene Therapie zukommen zu lassen. Befindet sich der Patient im Kammerflimmern und liegt nach erfolgreicher Defibrillation ein Herzstillstand (Asystolie) vor, sollten Sie den Schrittmacher verwenden.

Eine ventrikuläre oder supraventrikuläre Tachykardie kann durch Schrittmacherbehandlung unterbrochen werden, jedoch ist die synchronisierte Kardioversion in einer Notfallsituation oder bei einem Kreislaufkollaps schneller und sicherer.

Nach längerem Herzstillstand oder bei anderen Erkrankungszuständen mit Myokarddepression kann eine pulslose elektrische Aktivität (PEA) auftreten. Eine Stimulation kann dann EKG-Reaktionen ohne effektive mechanische Kontraktionen hervorrufen, was eine andere wirksame Behandlung erforderlich macht.

Bei generalisierter Hypoxie, Myokardischämie, Toxizität von Herzmedikamenten, Elektrolytverschiebungen und anderen kardialen Erkrankungen kann die Stimulation unerwünschte Wiederholungsreaktionen, Tachykardie oder Kammerflimmern hervorrufen.

Stimulation neigt ungeachtet der angewandten Methode dazu, den Herzeigenrhythmus zu inhibieren. Das plötzliche Abbrechen der Stimulation, vor allem bei hohen Frequenzen, kann einen ventrikulären Stillstand verursachen und sollte vermieden werden.

Die vorübergehende nichtinvasive Stimulation kann Schmerzen unterschiedlicher Intensität hervorrufen, die teilweise so stark sind, dass sich eine längere Stimulation bei bewusstseinsklaren Patienten verbietet.

In ähnlicher Weise kann die unvermeidliche Kontraktion von Skelettmuskeln bei Schwerkranken Probleme verursachen und dadurch die kontinuierliche Behandlung auf wenige Stunden beschränken. Unter den Freihand-Therapieelektroden kommt es häufig zu Hautrötungen oder Hyperämie. Dieser Effekt tritt in der Regel verstärkt an den Rändern der Elektroden auf. Diese Rötungen sollten innerhalb von 72 Stunden weitgehend abklingen.

Bei der Stimulation von erwachsenen Patienten mit deutlich eingeschränkter Hautdurchblutung wurden Verbrennungen unter der ventralen Elektrode beschrieben. In diesen Fällen sollte eine längere Stimulation vermieden und die Haut unter den Elektroden regelmäßig kontrolliert werden.

Bei früheren Gerätemodellen konnte es bei bewusstlosen Patienten zu einer vorübergehenden Hemmung der Spontanatmung kommen, wenn die ventrale Elektrode zu weit kaudal am Abdomen platziert wurde.

Die Bestimmung der Stimulationsfrequenz kann durch Artefakte beeinträchtigt werden. Weichen die für den Patienten angezeigten Puls- und Herzfrequenzen stark voneinander ab, werden die externen Stimulationsimpulse möglicherweise nicht zum vorgesehenen Zeitpunkt abgegeben.

Artefakte und EKG-Rauschen können die Zuverlässigkeit der R-Zacken-Erkennung und somit die Herzfrequenzanzeige und die Stimulationsfrequenz im Bedarfs-Modus beeinträchtigen. Der Patient muss während einer Stimulation immer engmaschig überwacht werden. Falls keine zuverlässige EKG-Kurve erzielbar ist, empfiehlt sich die Verwendung des asynchronen Stimulationsmodus.

Transkutane Stimulation ist nicht zur Behandlung von ventrikulärer Fibrillation (Kammerflimmern) geeignet. Bei Kammerflimmern wird eine sofortige Defibrillation empfohlen.

Transkutane Stimulation kann je nach Toleranz des Patienten, Muskelkontraktionen und Elektrodenplatzierung leichte bis starke Schmerzen verursachen. In bestimmten Fällen lassen sich die Schmerzen durch eine geringfügige Änderung der Position der Stimulationselektroden verringern.

Es ist wichtig, den Patienten engmaschig zu überwachen, um sich von der mechanischen und elektrischen Reizantwort (Capture) zu überzeugen. Die elektrische Reizantwort manifestiert sich durch einen starken ektopischen Herzschlag nach Abgabe des Stimulationsimpulses. Größe und Morphologie des Herzschlags hängen vom Patienten ab. In manchen Fällen kann sich der Herzschlag als relativ normal erscheinender QRS-Komplex darstellen. Die mechanische Reizantwort bestätigt sich durch verstärkte Durchblutung, d. h. Rötung der Haut, tastbarer Puls, erhöhter Blutdruck usw. Der Patient muss während der Stimulation ständig überwacht werden, um zu kontrollieren, dass die Reizantwort fortbesteht. Der Patient darf während der Behandlung mit einem externen Schrittmacher nicht unbeaufsichtigt gelassen werden.

Warnung! Dieses Gerät darf nur für die externe Stimulation bei Patienten verwendet werden. Eine interne Stimulation mit diesem Gerät ist nicht zulässig. Schließen Sie keine internen Stimulationselektroden an den X Series Defibrillator an.

HLW

Die Wiederbelebungüberwachungsfunktion ist nicht für die Verwendung bei Patienten unter 8 Jahren vorgesehen.

Platzieren Sie den Patienten vor Aufnahme der Herzlungenwiederbelebung auf eine stabile Unterlage.

Der Patient muss sich während der Herzlungenwiederbelebung in Ruhe befinden, um exakte CPR-Messungen zu ermöglichen.

Pulsoxymetrie

Halten Sie die ZOLL Fingersonde sauber und trocken.

Bestimmte Erkrankungen des Patienten (z. B. schwere Rechtsherzinsuffizienz, Trikuspidalregurgitation oder eingeschränkter venöser Rückstrom) können die Genauigkeit der SpO₂-Messungen beeinträchtigen.

Die Genauigkeit der SpO₂-Messungen wird möglicherweise durch den Einsatz intravaskulärer Farbstoffe, ausgeprägte Vasokonstriktion oder Hypovolämie sowie durch Bedingungen, bei denen kein pulsierendes arterielles Gefäßbett vorliegt, beeinträchtigt.

Mit Beeinträchtigungen der SpO₂-Messungen ist auch bei starken EMI-Feldern, elektrochirurgischen Geräten, IR-Lampen, hellen Lichtern, falsch angelegten Sensoren oder Verwendung von Sensoren anderer Hersteller zu rechnen, außerdem bei defekten Sensoren sowie bei Rauchgasinhalation, Kohlenmonoxidvergiftung oder Bewegungen des Patienten.

Falsche Applikation oder eine übermäßig lange Applikation der Sensoren an derselben Stelle kann zu Gewebeschäden führen. Legen Sie den Sensor alle 4 Stunden an einer anderen Stelle an, um die Gefahr von Gewebeschäden zu reduzieren.

Verwenden Sie während MRT-Untersuchungen (Magnetresonanztomografie) keine Oxymetriesensoren. MRT-Verfahren können dazu führen, dass Strom in die Sensoren induziert wird, was zu Verbrennungen führen kann.

Legen Sie den SpO₂-Sensor nicht an einer Extremität an, an der sich eine NIBD-Manschette befindet. Wenn der arterielle Blutstrom bei NIBD-Messungen blockiert wird, wird möglicherweise der SpO₂-Alarm ausgelöst; auch kann die Genauigkeit der SpO₂-Messungen beeinträchtigt werden.

In manchen Fällen, z. B. bei blockierten Atemwegen, führen die Atemversuche des Patienten möglicherweise nicht zu einem Luftaustausch. Diese Atemversuche können weiterhin zu Brustkorbmodulationen und damit zu Impedanzänderungen führen, die von dem Respirationsdetektor erkannt werden können. Am besten ist es, bei der Überwachung der Atemfrequenz die Pulsoxymetrie einzusetzen, um den Atemzustand akkurat darzustellen.

Nichtinvasive Blutdruckmessung (NIBD)

Nur ein Arzt kann die Blutdruckmesswerte auswerten.

Die Lage des Patienten, sein körperlicher Zustand und andere Faktoren können sich auf die Blutdruckmesswerte auswirken.

Werden statt der von ZOLL gelieferten Komponenten (z. B. Manschette, Schläuche usw.) andere Komponenten verwendet, kann dies zu Messfehlern führen. Verwenden Sie nur von ZOLL freigegebene Manschetten und Schläuche. Um das Risiko eines fälschlichen Anschlusses einer intravenösen Leitung und eines möglichen Lufteintritts in das Blut des Patienten auszuschließen, dürfen das NIBD-System und die Schläuche nicht mit Luerlock-Adaptern abgeändert werden.

Legen Sie die Blutdruckmanschette nicht an einer Extremität an, die für eine intravenöse Infusion oder die SpO₂-Überwachung verwendet wird.

Bei Patienten, die unter Arrhythmien, Zittern, Krämpfen oder Krampfanfällen leiden, sind möglicherweise keine genauen Druckmessungen durchführbar. Medikamente können sich ebenfalls auf die Druckmessungen auswirken. Die korrekte Manschettengröße ist für genaue Blutdruckmessungen von entscheidender Bedeutung.

Blutdruckschläuche dürfen nicht verstopft oder abgeknickt sein.

Befindet sich die Manschette des Patienten nicht auf Herzhöhe, kann dies zu Messfehlern führen.

Wird der Blutdruck in kurzen Abständen gemessen, muss die Extremität mit der angelegten Manschette auf Anzeichen einer eingeschränkten Durchblutung kontrolliert werden.

Niemals gleichzeitig den NIBD eines Patienten und das EKG eines anderen Patienten überwachen.

Blutdruckmessungen beim Beschleunigen oder Abbremsen in einem fahrenden Fahrzeug können fehlerhaft sein.

Wenn ein NIBD-Messwert fragwürdig ist oder „Bewegung“ angezeigt wird, wiederholen Sie die Messung. Ist das Ergebnis der Wiederholungsmessung weiterhin fragwürdig, so wenden Sie eine andere Methode für die Bestimmung des Blutdrucks an.

Bei Patienten mit kardiopulmonalem Bypass darf keine NIBD-Messung durchgeführt werden.

Invasive Blutdruckmessung (IBD)

Aus Gründen der Kompatibilität und elektrischen Sicherheit sollte das Drucksensorzubehör den Normen ANSI/AAMI BP-22 und IEC 60601-2-34 (invasiver Blutdruck) bzw. der Norm ANSI/AAMI NS28 (Hirndruck) entsprechen.

Beachten Sie hinsichtlich Kalibrierung und Entlüftung die dem Drucksensorzubehör beiliegenden Anweisungen.

Während der Messwandler sich in Kontakt mit dem Patienten befindet, darf keines seiner Metallteile berührt werden.

Als Einmalprodukte gekennzeichnete Komponenten dürfen keinesfalls wiederverwendet werden.

Messwandler sollten in einem versehentlichen Fall aus einer Höhe von mindestens einem Meter auf eine harte Oberfläche standhalten.

Messwandler, die in Flüssigkeiten eingetaucht werden, müssen als wasserdicht eingestuft sein.

CO₂

Während MRT-Untersuchungen (Magnetresonanztomografie) muss der Monitor außerhalb des MRT-Untersuchungsraums platziert werden. Befindet sich der Monitor außerhalb des MRT-Untersuchungsraums, kann mithilfe eines langen FilterLine[®]-Schlauchs eine EtCO₂-Überwachung realisiert werden.

Falls der Monitor mit Anästhetika, Lachgas oder hohen Sauerstoffkonzentrationen verwendet wird, schließen Sie den Gasausgang an eine Abgasleitung an.

Verwenden Sie nur Oridion Microstream CO₂-Probenleitungen.

Microstream CO₂-Probenleitungen sind zur Verwendung bei nur einem Patienten vorgesehen. Probenleitungen dürfen nicht wiederverwendet werden.

Kommt der CO₂-Monitor längerfristig intensivmedizinisch zum Einsatz, so ersetzen Sie den Atemwegadapter alle 24 Stunden, spätestens aber, wenn er verstopft.

Eine fehlerhafte Anbringung des Sensors, bestimmte Umgebungsbedingungen und bestimmte körperliche Zustände des Patienten können sich auf die CO₂-Messwerte und die Messung der Atemfrequenz auswirken.

Respiration

Neben dem X Series Gerät darf kein weiterer Monitor mit Respirationmessungen am selben Patienten betrieben werden. Die beiden Geräte könnten die Genauigkeit der Atemfrequenzmessung beeinträchtigen.

Das Gerät sollte nicht als Apnoe-Monitor verwendet werden.

Ferromagnetische Objekte

Biomedizinische Geräte und Zubehör wie EKG-Elektroden, Kabel und Oxymetersonden enthalten ferromagnetische Werkstoffe. Ferromagnetische Objekte dürfen nicht in der Nähe starker Magnetfelder eingesetzt werden, wie sie beispielsweise durch Magnetresonanztomografen (MRT) erzeugt werden.

Die von einem Magnetresonanztomografen erzeugten starken Magnetfelder können ferromagnetische Objekte mit einer solch extremen Kraft anziehen, dass dies bei Personen, die zwischen den Objekten und dem Magnetresonanztomografen stehen, zu schwerwiegenden Verletzungen bis hin zum Tod führen könnte.

Akku

Obwohl das Gerät auch nur mit dem externen Netzteil betrieben werden kann, empfiehlt ZOLL ausdrücklich, das Gerät immer mit eingesetztem Akku zu betreiben. Der Betrieb mit eingesetztem Akku bietet Funktionssicherheit bei Stromausfall und führt zu kürzeren Ladezeiten. Im Gerät kann der Akku automatisch geladen werden. Wir empfehlen, stets einen vollständig geladenen Ersatzakku mit dem Defibrillator bereitzuhalten.

Testen Sie die Akkus regelmäßig. Wird ein Akku verwendet, der die Kapazitätsprüfung des ZOLL Ladegeräts nicht bestanden hat, besteht die Gefahr, dass sich das X Series Gerät unerwartet ausschaltet.

Wenn zu einem beliebigen Zeitpunkt während des Betriebs die Batteriestatusanzeige „Batterie schwach“ erscheint, muss der Akku sofort ausgetauscht werden.

Wenn das Symbol *BATTERIE SCHWACH* erscheint, schließen Sie das X Series Gerät an das externe Netzteil an oder setzen Sie einen vollständig geladenen Akku ein. Wenn die Aufforderung zum Herunterfahren aufgrund einer schwachen Batterie angezeigt wird, tauschen Sie den Akku sofort gegen einen vollständig geladenen Akku aus oder schließen Sie das X Series Gerät an das externe Netzteil an, da in dieser Situation das Ausschalten des Geräts kurz bevorsteht.

Bei unsachgemäßer Handhabung kann es zur Explosion der Akkus kommen. Akkus dürfen keinesfalls zerlegt oder thermisch entsorgt werden.

Bedienersicherheit



Das X Series Gerät kann 200 Joule an elektrischer Energie abgeben. Wird diese elektrische Energie nicht wie in diesem Handbuch beschrieben sachgerecht entladen, kann dies beim Bediener oder in der Nähe befindlichen Personen zu Verletzungen bis hin zum Tod führen.

Betreiben Sie das X Series Gerät nicht in mit Sauerstoff, leicht entzündlichen Narkosemitteln oder anderen entflammaren Substanzen (z. B. Benzin) angereicherten Atmosphären. Wenn das Gerät in einer solchen Umgebung betrieben wird, besteht Explosionsgefahr.

Verwenden Sie das Gerät nicht in oder in der Nähe von stehendem Wasser. Die elektrische Sicherheit ist möglicherweise nicht mehr gegeben, wenn der Defibrillator feucht wird.

Entladen Sie das Gerät niemals mit kurzgeschlossenen oder freiliegenden Defibrillationselektroden oder Paddles.

Entladen Sie den Defibrillator ausschließlich entsprechend den Anweisungen. Entladen Sie den Defibrillator nur dann, wenn die Defibrillationselektroden oder Paddles ordnungsgemäß am Patienten angebracht wurden.

Um das Risiko eines elektrischen Schocks auszuschließen, berühren Sie während der Stimulation oder Defibrillation nicht den mit Gel bedeckten Bereich der Freihand-Therapieelektroden.

Um das Risiko eines elektrischen Schocks auszuschließen, vermeiden Sie überschüssiges Elektrolytgel an Händen oder Paddle-Griffen.

Um das Risiko eines elektrischen Schocks auszuschließen, bringen Sie die Patientenanschlüsse nicht in Kontakt mit anderen leitenden Teilen, auch nicht mit dem elektrischem Erdpotenzial.

Verwenden Sie für Defibrillations-Paddles nur Elektrolytgel mit hoher Leitfähigkeit, das vom Hersteller ausdrücklich für solche Zwecke vorgesehen ist.

Wenn für die Defibrillation Paddles verwendet werden, betätigen Sie die **SCHOCK**-Tasten mit den Daumen. Auf diese Weise wird eine unbeabsichtigte Schockabgabe an den Bediener vermieden.

Die Verwendung von Zubehör, das nicht den entsprechenden Sicherheitsanforderungen des X Series Defibrillators entspricht, kann zu einer eingeschränkten Betriebssicherheit des kombinierten Systems führen. Bei der Auswahl des Zubehörs müssen folgende Gesichtspunkte berücksichtigt werden:

- Verwendung des Zubehörs in Patientennähe.
- Der Nachweis, dass die Zertifizierung der Sicherheit des Zubehörs in Übereinstimmung den entsprechenden harmonisierten nationalen Normen IEC (EN) 60601-1 und/oder IEC (EN) 60601-1-1 durchgeführt wurde.

Überprüfen Sie vor der Verwendung des Geräts stets seine einwandfreie Funktion und seinen einwandfreien Zustand.

Entfernen Sie vor der Defibrillation alle elektromedizinischen Geräte vom Körper des Patienten, die nicht speziell gegen Defibrillation geschützt sind.

Fordern Sie vor dem Entladen des Defibrillators alle anwesenden Personen auf, vom Patienten zurückzutreten.

Berühren Sie während der Defibrillation weder das Bett noch den Patienten noch Geräte, die an den Patienten angeschlossen sind. Es besteht Elektroschockgefahr! Um zu verhindern, dass gefährliche Pfade für den Defibrillationsstrom entstehen, dürfen entblößte Körperteile des Patienten nicht mit Metallteilen (z. B. Bettrahmen) in Berührung stehen.

Um das Risiko eines elektrischen Schocks auszuschließen, darf der Drucker nicht in Kontakt mit anderen leitenden Teilen (z. B. am USB-Anschluss angeschlossene Geräte) stehen.

Patientensicherheit



Unangebrachte Defibrillation oder Kardioversion von Patienten (z. B. ohne maligne Arrhythmie) kann Kammerflimmern, Asystolie oder andere gefährliche Arrhythmien herbeiführen.

Defibrillation ohne sachgerecht angebrachte Elektroden oder ordnungsgemäß auf die Paddles aufgetragenes Elektrolytgel kann wirkungslos bleiben und zu Verbrennungen führen, speziell dann, wenn wiederholte Schocks erforderlich sind. Unter den Paddles oder Elektroden kommt es häufig zu Hautrötungen oder Hyperämie. Dieser Effekt tritt in der Regel verstärkt an den Rändern der Paddles oder Elektroden auf. Diese Rötungen sollten innerhalb von 72 Stunden weitgehend abklingen.

Dieses Gerät darf immer nur an jeweils einen Patienten angeschlossen werden.

Die Defibrillations-Energiestufen für Neugeborene und Kinder sollten auf den standortspezifischen klinischen Protokollen basieren.

Um die Sicherheit des Patienten zu gewährleisten, muss der Monitor so aufgestellt werden, dass er nicht auf den Patienten stürzen kann.

Um die Sicherheit der Patienten zu gewährleisten, darf das X Series Gerät nur mit elektrisch isolierten Geräten verbunden werden.

Verwenden Sie ausschließlich qualitativ hochwertige EKG-Elektroden. Die EKG-Elektroden sind nur für die Erfassung des Herzrhythmus vorgesehen und können nicht für eine Defibrillation oder Stimulation verwendet werden.

Verwenden Sie keine Therapie- oder EKG-Elektroden, deren Gelschicht ausgetrocknet oder beschädigt ist oder sich von der Folie gelöst hat. Die Verwendung solcher Elektroden kann beim Patienten zu Verbrennungen führen. Schlechte Haftung und/oder Lufteinschlüsse unter den Therapieelektroden können zu Lichtbogenbildung und Hautverbrennungen führen.

Prüfen Sie das Verfallsdatum auf der Elektrodenpackung. Verwenden Sie keine Elektroden mit abgelaufenem Verfallsdatum.

Starke Körperbehaarung oder nasse, schwitzende Haut kann das Anhaften der Elektroden an der Haut verhindern. Rasieren und trocknen Sie gegebenenfalls die Hautpartie, an der die Elektrode angebracht werden soll.

Bei Dauerstimulation müssen die Therapieelektroden regelmäßig ausgetauscht werden. Beachten Sie diesbezüglich die Gebrauchsanweisung für die Elektroden.

Längere Stimulation (über 30 Minuten) kann besonders bei Neugeborenen oder Erwachsenen mit stark eingeschränkter Durchblutung zu Verbrennungen führen. Untersuchen Sie in regelmäßigen Abständen die Haut unter den Elektroden.

Führen Sie die Verkabelung so vom Hals des Patienten weg, dass sich der Patient darin weder verfangen noch strangulieren kann.

Um zu verhindern, dass Elektrochirurgiegeräte Verbrennungen an den Stellen verursachen, an denen die Elektroden des Monitors angebracht sind oder sich Sonden des Monitors befinden, ist darauf zu achten, dass die indifferente Elektrode des Elektrochirurgiegeräts einwandfrei angebracht und angeschlossen ist. Auf diese Weise wird verhindert, dass der vom Elektrochirurgiegerät abgegebene Strom durch die Überwachungselektroden oder -sonden zurückfließt.

Beachten Sie während der Elektrochirurgie die folgenden Richtlinien, um ESU-Interferenzen (ESU = Electrosurgical Unit, Elektrochirurgiegerät) zu minimieren und ein Maximum an Bediener- und Patientensicherheit zu gewährleisten:

- Achten Sie darauf, dass Patientenüberwachungskabel keinen Kontakt mit der Erdung, elektrischen Skalpellens und den Rückführleitungen des Elektrochirurgiegeräts haben.
- Verwenden Sie indifferente Elektroden mit größtmöglicher praktikabler Kontaktfläche.

Achten Sie stets darauf, dass die indifferente Elektrode gut am Patienten haftet.

Prüfen Sie vor der Verwendung die Leckstrompegel. Wenn mehr als ein Monitor oder ein Gerät mit dem Patienten verbunden ist, kann es zu übermäßigen Leckströmen kommen.

Vorsichtshinweise

Wenn das Gerät länger als 90 Tage gelagert werden soll, entnehmen Sie den Akku.

Der Defibrillator selbst darf nicht sterilisiert werden. Sterilisieren Sie Zubehör nur dann, wenn dieses als sterilisierbar gekennzeichnet ist.

Der Defibrillator darf weder ganz noch teilweise in Wasser getaucht werden.

Der Defibrillator darf nicht verwendet werden, wenn übermäßige Kondensation am Gerät zu sehen ist. Wischen Sie nur die Außenseite mit einem feuchten Tuch ab.

Für die Reinigung des Defibrillators dürfen keine Ketone (wie Aceton oder Methylethylketon) verwendet werden.

Verwenden Sie zum Reinigen des Displayfensters keine Scheuermittel oder rauen Materialien (z. B. Papierhandtücher).

Um den angegebenen Schutzgrad gegen verschüttete oder verspritzte Flüssigkeiten zu erreichen, trocknen Sie sorgfältig alle freiliegenden Flächen dieses Geräts, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen oder mit dem externen Netzteil betreiben.

Falls Flüssigkeit in die Geräteanschlüsse gelangt, entfernen Sie die gesamte Flüssigkeit von den Anschlüssen und lassen Sie das Gerät vor der Verwendung gründlich trocknen.

Der Erdungsschutz ist nur dann gewährleistet, wenn das Gerät an einer geeigneten Steckdose mit der Kennzeichnung „NUR FÜR KRANKENHAUSGEBRAUCH“ oder „HOSPITAL GRADE“ angeschlossen ist. Wenn die Erdung des Netzkabels oder der Netzsteckdose fragwürdig ist, betreiben Sie den Defibrillator nur im Akkubetrieb.

Schließen Sie das Gerät nicht an eine Steckdose an, die über einen Wandschalter oder Dimmer gesteuert wird.

Verwenden Sie ausschließlich die von ZOLL angegebenen oder gelieferten EKG-Kabel mit interner Strombegrenzung, um das Gerät vor Beschädigung durch Defibrillation zu schützen, die Genauigkeit der EKG-Signale zu gewährleisten und Rauschsignale und andere Störungen zu unterdrücken.

Damit die Sicherheit und die elektromagnetische Störfestigkeit gewährleistet sind, verwenden Sie nur das von ZOLL gelieferte Netzkabel.

Die elektrische Installation des Raums oder des Gebäudes, in dem der Monitor verwendet werden soll, muss den Vorschriften des Landes entsprechen, in dem das Gerät verwendet werden soll.

Akkus müssen entsprechend den geltenden staatlichen und kommunalen Bestimmungen entsorgt werden. Im Rahmen der nachhaltigen Abfallwirtschaft für Metall- und Kunststoffbestandteile sollten die Akkus in einer Aufbereitungsanlage entsorgt werden.

Das Gerät darf nicht so aufgestellt werden, dass der Patient die Einstellung der Bedienelemente ändern kann.

Neustart des Defibrillators

Unter bestimmten Umständen muss das X Series Gerät nach einer Funktionsstörung oder nach selbstständiger Abschaltung neu gestartet werden. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn der Akku vollständig entladen ist und das Gerät sich abgeschaltet hat.

Versuchen Sie in einem solchen Fall auf die folgende Weise, den Defibrillatorbetrieb wiederherzustellen:

1. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste oben am Gerät, um das Gerät auszuschalten.
2. Falls erforderlich, ersetzen Sie den leeren Akku durch einen vollständig geladenen Akku oder schließen Sie den Defibrillator an das externe Netzteil an.
3. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste oben am Gerät, um das Gerät wieder einzuschalten.

Diese Abfolge ist erforderlich, um den Defibrillator neu zu starten, und kann auch verwendet werden, um bestimmte Fehlermeldungen zu löschen, wenn der sofortige Einsatz des Defibrillators erforderlich ist.

Wird das X Series Gerät für weniger als 2 Minuten ausgeschaltet, werden alle Einstellungen der Patientenüberwachungsparameter beibehalten. War das Gerät mindestens zwei Minuten lang ausgeschaltet, wird ein neuer Patient angenommen. Alle patientenspezifischen Parameter (Alarmgrenzwerte, Defibrillatorenergie usw.) werden auf die entsprechenden Standardwerte zurückgesetzt.

Nachverfolgbarkeit des Geräts

US-Bundesrecht (Federal Law 21 CFR 821) verlangt die Nachverfolgbarkeit von Defibrillatoren. Nach diesem Gesetz müssen die Eigentümer dieses Defibrillators ZOLL Medical Corporation benachrichtigen, wenn

- sie dieses Gerät erhalten,
- dieses Gerät verloren, gestohlen oder zerstört wurde, oder
- dieses Gerät durch Schenkung, Verkauf oder anderweitige Überlassung an eine andere Einrichtung übertragen wurde.

Tritt eines der oben genannten Ereignisse ein, so teilen Sie ZOLL Medical Corporation schriftlich die folgenden Informationen mit:

1. Herkunft – Bezeichnung und Adresse der Einrichtung, die im Besitz des Geräts ist, Name und Telefonnummer des Ansprechpartners
2. Modellnummer und Seriennummer des Defibrillators
3. Art der Transaktion (z. B.: Defibrillator wurde in Empfang genommen, ging verloren, wurde gestohlen, zerstört, einer anderen Einrichtung überlassen), neuer Standort bzw. Einrichtung (sofern die Angaben von der Herkunftsangabe abweichen) – Bezeichnung der Einrichtung, Adresse, Name und Telefonnummer des Ansprechpartners
4. Datum der Transaktion

Bitte senden Sie diese Informationen an:

ZOLL Medical Corporation
Attn: Tracking Coordinator
269 Mill Road
Chelmsford, MA 01824-4105, USA

Fax: +1 978 421 0025

Telefon: +1 978 421 9655

Meldung von Nebenwirkungen

Als medizinische Einrichtung bzw. als im Gesundheitswesen Tätiger sind Sie gemäß Safe Medical Devices Act (SMDA) möglicherweise verpflichtet, ZOLL Medical Corporation sowie möglicherweise auch die FDA über das Auftreten bestimmter Ereignisse zu unterrichten.

Diese Ereignisse sind im US-Gesetz 21 CFR Part 803 definiert und umfassen u. a. Todesfälle, schwerwiegende Verletzungen oder Erkrankungen, die mit dem Gerät in Verbindung stehen. Tritt ein meldepflichtiges Ereignis ein, müssen Sie – im Rahmen unseres Qualitätssicherungsprogramms – ZOLL Medical Corporation über jeglichen Mangel am Gerät, Fehlfunktionen und Defekte unterrichten. Diese Informationen sind erforderlich, damit ZOLL Medical Corporation auch weiterhin Produkte anbieten kann, die den höchsten Qualitätsansprüchen genügen.

Software-Lizenzvereinbarung

Hinweis: Lesen Sie das Bedienerhandbuch und die Lizenzvereinbarung für alle X Series Geräte vor deren Verwendung sorgfältig durch.

Die in das System integrierte Software unterliegt dem Urheberrecht und internationalen Abkommen über Urheberrechte sowie anderen Gesetzen und Abkommen zum Schutz des geistigen Eigentums. Diese Software wird lizenziert, nicht verkauft. Durch Annahme und Verwendung dieses Systems erklärt der Käufer, dass er mit der Vereinbarung und den folgenden Bedingungen einverstanden ist:

1. **Lizenzerteilung:** Als Gegenleistung für die Bezahlung der Lizenzvereinbarungsgebühr, die im Kaufpreis dieses Produkts enthalten ist, gewährt ZOLL Medical Corporation dem Käufer eine nicht exklusive Lizenz, jedoch nicht das Recht der Vergabe einer Unterlizenz, zur Verwendung der Systemsoftware ausschließlich in Objektcodeform.
2. **Eigentümer der Software/Firmware:** Rechtstitel, Eigentumsrechte und alle Rechte und Anteile an der Systemsoftware sowie allen Kopien dieser Software verbleiben beim Hersteller und den Lizenzgebern von ZOLL Medical Corporation und gehen nicht auf den Käufer über.
3. **Übertragung:** Der Käufer erklärt sich damit einverstanden, seine durch die Lizenzvereinbarung auf ihn übertragenen Rechte nicht ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von ZOLL Medical Corporation an Dritte zu übertragen oder abzutreten oder Dritten eine Unterlizenz zu gewähren.
4. **Verwendungsbeschränkungen:** Als Käufer sind Sie berechtigt, dieses Produkt von einem Ort an einen anderen zu transportieren, vorausgesetzt, dass die Software/Firmware nicht kopiert wird. Sie sind nicht berechtigt, Kopien dieser Software/Firmware frei- oder weiterzugeben, zu veröffentlichen, zu übersetzen oder an Dritte zu verteilen. Weiterhin sind Sie nicht berechtigt, diese Software/Firmware zu modifizieren oder anzupassen, Übersetzungen oder Produktfunktionsuntersuchungen, Dekompilierungen, Fremdkompilierungen, Demontagen oder Weiterentwicklungen vorzunehmen.

KEINE STILLSCHWEIGENDE LIZENZGABE

Der Besitz oder Kauf dieses Geräts führt zu keiner ausdrücklichen oder stillschweigenden Lizenz zur Verwendung dieses Geräts mit Ersatzteilen, die, allein oder in Verbindung mit diesem Gerät, in den Geltungsbereich eines oder mehrerer mit diesem Gerät verbundenen Patente fallen.

Kundendienst

Das X Series Gerät benötigt nur eine Rekalibrierung des CO₂-Moduls. Service ist nach 20.000 Betriebsstunden des CO₂-Moduls erforderlich. Der Defibrillator sollte jedoch regelmäßig durch entsprechend geschultes und qualifiziertes Personal getestet werden, um seine einwandfreie Funktion zu verifizieren.

Wenn bei einem Gerät Wartungsbedarf auftritt, nehmen Sie Kontakt mit dem technischen Kundendienst von ZOLL auf.

Kunden in den USA		Kunden außerhalb der USA
Telefon:	1-800-348-9011 1-978-421-9655	Wenden Sie sich an den nächsten autorisierten Vertreter von ZOLL Medical Corporation.
Fax:	1-978-421-0010	Die Adresse des nächstgelegenen autorisierten Service-Centers erhalten Sie von der internationalen Vertriebsabteilung: ZOLL Medical Corporation 269 Mill Road Chelmsford, MA 01824-4105, USA Telefon: +1 978 421 9655

Halten Sie die folgenden Informationen bereit, wenn Sie den Kundendienst verständigen:

- Seriennummer des Geräts
- Beschreibung des Problems
- Abteilung, in der das Gerät eingesetzt wird, und Name des Ansprechpartners
- Bestellschein zur Nachverfolgung von Leihgeräten
- Bestellschein für Geräte mit abgelaufener Garantie
- Muster eines EKGs oder anderen Streifenausdrucks, an dem das Problem zu erkennen ist (falls verfügbar und relevant). Vertrauliche Patientendaten müssen vorher unkenntlich gemacht werden.

Einschicken eines Geräts zum Kundendienst

Bevor Sie ein Gerät zur Reparatur an den Technischen Kundendienst von ZOLL einschicken, müssen Sie beim Kundendienstvertreter eine Serviceauftragsnummer (SR-Nummer) beantragen.

Entnehmen Sie den Akku aus dem Gerät. Verpacken Sie das Gerät zusammen mit dem Akku und den zugehörigen Kabeln in der Originalverpackung (sofern noch vorhanden) bzw. in einer gleichwertigen Verpackung. Achten Sie darauf, dass die zugewiesene Serviceauftragsnummer (SR-Nummer) auf jedem Paket aufgeführt ist.

Für Kunden	Gerät einsenden an
in den USA	ZOLL Medical Corporation 269 Mill Road Chelmsford, MA 01824-4105, USA Attention: Technical Service Department (<i>Serviceauftragsnummer</i>) Telefon: 1-800-348-9011
in Kanada	ZOLL Medical Canada Inc. 1750 Sismet Road, Unit #1 Mississauga, ON L4W 1R6, Kanada Attention: Technical Service Department (<i>Serviceauftragsnummer</i>) Telefon: 1-866-442-1011
in anderen Ländern	Nächstgelegener autorisierter Repräsentant von ZOLL Medical Corporation Die Adresse des nächstgelegenen autorisierten Service-Centers erhalten Sie von der internationalen Vertriebsabteilung: ZOLL Medical Corporation 269 Mill Road Chelmsford, MA 01824-4105, USA Telefon: +1 978 421 9655

Die ZOLL Seriennummer

Jedes Produkt von ZOLL trägt eine Seriennummer, die Informationen zu dem jeweiligen Produkt enthält. ZOLL Seriennummern sind folgendermaßen aufgebaut (von links beginnend):

- Produkt-Code (zwei Zeichen)
- Herstellungsdatum-Code (drei Zeichen)
- Produkt-Seriennummer (sechs oder mehr alphanumerische Zeichen)

Die ersten beiden Zeichen des Herstellungsdatum-Codes bezeichnen die beiden letzten Ziffern des Produktionsjahrs („06“ beispielsweise kennzeichnet im Jahr 2006 gefertigte Produkte). Das letzte Zeichen des Herstellungsdatum-Codes bezeichnet den Produktionsmonat. Dabei steht der Buchstabe „A“ für den Monat Januar, „B“ für Februar, „C“ für März usw. bis „L“ für Dezember.

Bei der Produkt-Seriennummer handelt es sich um eine eindeutige alphanumerische Zeichenfolge, die ZOLL jedem einzelnen Gerät individuell zuweist.

Kapitel 2

Das Gerät im Überblick

Bedienelemente und Anzeigen des Defibrillators

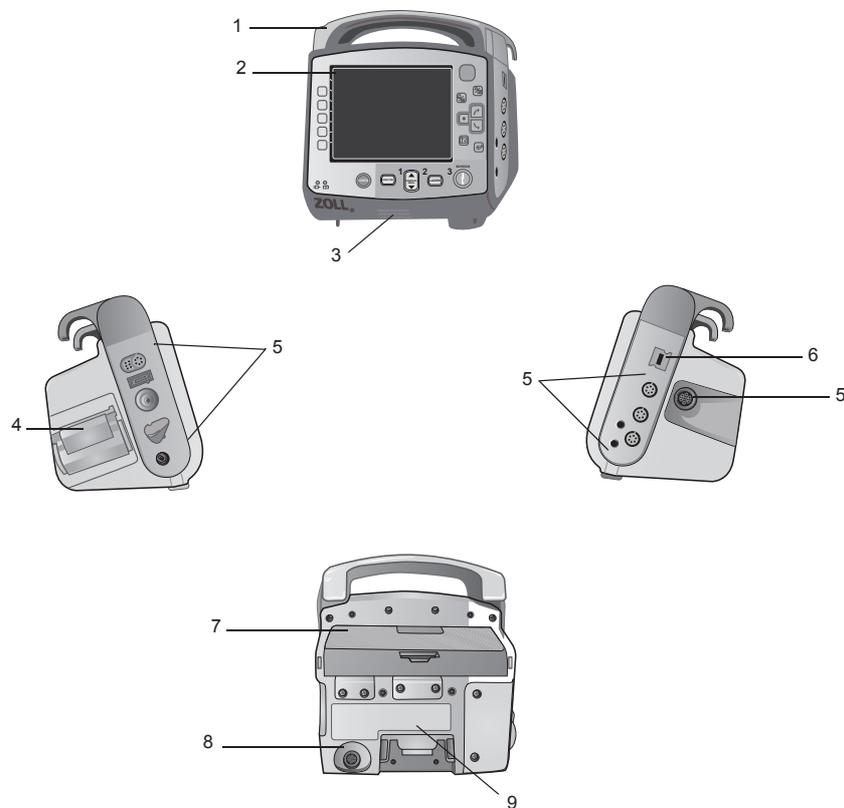


Tabelle 2-1. Komponenten des X Series Geräts

	Komponente	Beschreibung
1	Griff	Integrierter Tragegriff
2	Gerätefront	Umfasst das Display und die wichtigsten Bedienelemente
3	Lautsprecher	Gibt Signaltöne für die Erkennung von R-Zacken und für Alarme aus
4	Papierfach	Enthält das Papier für den Drucker
5	Patientenanschlüsse	Details hierzu finden Sie im Abschnitt „Patientenkabel und Anschlüsse“ auf Seite 2-7
6	USB-Geräteanschluss	Für den Anschluss von USB-Geräten an den X Series Defibrillator (Details hierzu finden Sie im Abschnitt „Übertragen von Daten auf ein USB-Gerät“ auf Seite 21-3)
7	Akkufach	Nimmt einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku auf
8	Anschluss für externes Netzteil	Für den Anschluss des Geräts an ein externes Netzteil
9	Dock-Anschluss	Für den Anschluss des Geräts an eine Docking-Station

Gerätefront

Die Gerätefront des X Series Geräts enthält das Display, Schnellzugriffstasten, Akku- und Netzteil-Anzeigen, die Betriebsbereitschaftsanzeige und die frontseitigen Defibrillator-Tasten: **Schritt.**, **Analyse**, **Energiewahl**, **Laden** und **Schock** (⚡) (siehe Abbildung 2-1). Tabelle 2-2 auf Seite 2-3 enthält Informationen zu den Bedienelementen und Anzeigen.

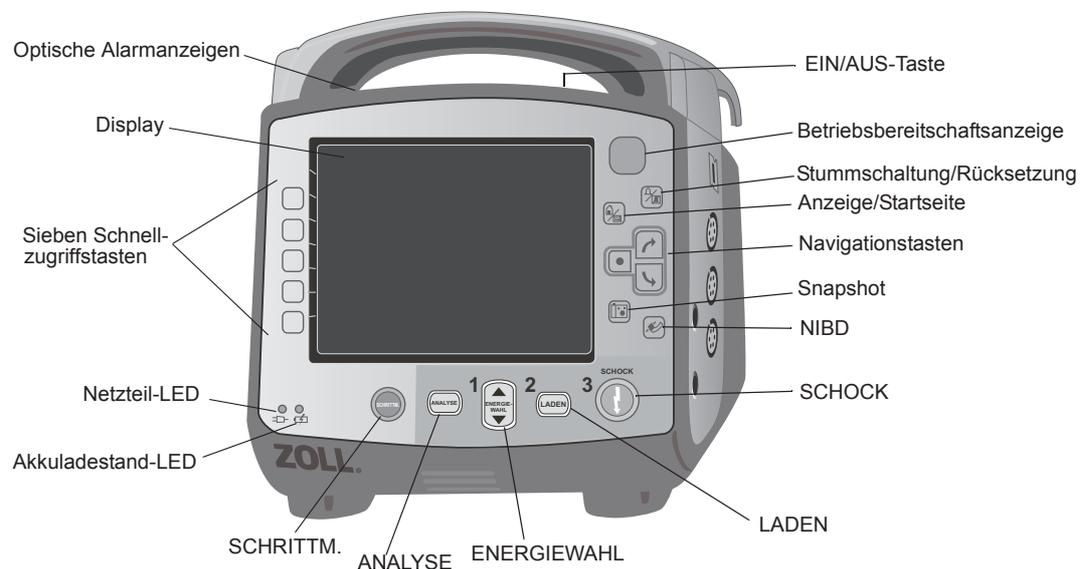


Abbildung 2-1. Front des X Series Geräts

Tabelle 2-2. Bedienelemente und Anzeigen des X Series Geräts

Bedienelement/ Anzeige	Beschreibung
Display	Zeigt Behandlungseinstellungen, physiologische Kurven und weitere Informationen zu den überwachten Parametern an, außerdem Meldungen, die Uhrzeit und die Bezeichnungen der Schnellzugriffstasten.
Schnellzugriffstasten	Sieben Tasten steuern die verschiedenen Funktionen des Geräts. Die Bezeichnungen der Schnellzugriffstasten stehen im Display rechts neben der jeweiligen Taste.
Netzteil-LED	Leuchtet, während das Gerät an ein externes Netzteil angeschlossen ist.
Akkuladestand-LED	Zeigt den Ladestand des Akkus an: Gelbes Dauerleuchten: Akku wird geladen Grünes Dauerleuchten: Akku ist geladen Abwechselnd grünes und gelbes Leuchten: Der Ladestand kann nicht bestimmt werden oder beim Laden des Akkus ist eine Störung aufgetreten Erloschen: Es ist kein Akku in das Gerät eingesetzt
Optische Alarmanzeigen	Rote, gelbe und grüne LEDs an der Geräteoberseite, die blinken, wenn das Gerät eingeschaltet wird, und die auf Patienten- und Gerätealarme sowie auf laufende Datenübertragungen hinweisen.
Taste SCHRITTM. 	Ruft das Fenster „Stim.Einst.“ auf, von dem aus die Stimulation gestartet und gestoppt wird und in dem die Einstellungen „Frequ.“, „Ausgang“ und „Modus“ geändert werden können.
Taste ANALYSE 	Nur im manuellen Modus: Leitet die EKG-Analyse zur Bestimmung, ob ein schockbarer Rhythmus vorliegt oder nicht, ein.
Tasten ENERGIEWAHL 	Zwei Paare von Aufwärts-/Abwärtspfeiltasten dienen zur Einstellung der Defibrillationsenergie: Ein Paar befindet sich an der Gerätefront, das andere am Sternum-Paddle.
Taste LADEN 	Lädt den Defibrillator auf die eingestellte Energiestufe. Neben der Taste LADEN an der Gerätevorderseite findet sich eine weitere solche Taste auch am Griff des APEX-Paddles.
Schock-Taste 	Die Schock-Taste an der Gerätefront ist nur dann aktiviert, wenn Freihand-Therapieelektroden oder interne Defibrillations-Paddles ohne Entladungstaste verwendet werden. Die Schock-Taste leuchtet auf, wenn das Gerät geladen und betriebsbereit ist. Um bei Verwendung von internen oder externen Paddles mit Schock-Tasten einen Schock abzugeben, müssen die Schock -Tasten an den Paddles gedrückt und gedrückt gehalten werden.
NIBD-Taste 	Startet/stoppt eine NIBD-Messung.
Snapshot-Taste 	Zeichnet numerische und Kurvendaten über einen Zeitraum von 24 Sekunden auf.

Tabelle 2-2. Bedienelemente und Anzeigen des X Series Geräts (Fortsetzung)

Bedienelement/ Anzeige	Beschreibung
Navigationstasten 	 <p>Der Auf-Pfeil (im Uhrzeigersinn) bewegt den Cursor nach oben, wenn mit dem Cursor durch eine senkrechte Liste, bzw. im Uhrzeigersinn, wenn mit dem Cursor im ganzen Bildschirm navigiert wird. Dementsprechend bewegt der Ab-Pfeil (entgegen dem Uhrzeigersinn) den Cursor nach unten, wenn mit dem Cursor durch eine senkrechte Liste, bzw. entgegen dem Uhrzeigersinn, wenn mit dem Cursor im ganzen Bildschirm navigiert wird. Mit den Auf- und Ab-Tasten (im bzw. entgegen dem Uhrzeigersinn) lassen sich zudem Parametereinstellungen ändern.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Die Funktion der Auswahltaste richtet sich nach der jeweils gerade hervorgehobenen Option.</p>
Anzeige/Startseite-Taste 	Wechselt durch die drei verfügbaren Anzeigemodi oder fungiert in einem Menü als Startseite-Taste.
Stummschaltungs-/ Rücksetzungs-Taste 	Schaltet den aktuellen Alarmton 90 Sekunden lang stumm oder setzt einen stummgeschalteten Alarmton zurück.
Betriebsbereitschafts- anzeige  Bereit Nicht verwenden	Zeigt den Status des Geräts an (basierend auf dem letzten Bereitschaftstest). Ein durchgestrichener roter Kreis zeigt an, dass das Gerät nur eingeschränkt betriebsbereit ist und möglicherweise nicht für therapeutische Maßnahmen eingesetzt werden kann.
EIN/AUS-Taste 	Mit dieser Taste auf der Geräteoberseite wird das Gerät ein- bzw. ausgeschaltet.
Ladezustand-LED (nicht abgebildet)	Diese LED am APEX-Paddle leuchtet auf, wenn der Defibrillator geladen und einsatzbereit ist.

Display

An der Gerätefront befindet sich ein Farbdisplay, das die folgenden Informationen anzeigt:

- Datum und Uhrzeit
- Patientenmodus
- Akkuladestand-Anzeige
- Betriebsdauer (nach Einschalten des Geräts)
- Schnellzugriffstasten
- Kurvenquelle
- Farbcodierte Kurven und EKG-Ableitungskennzeichnungen
- Numerische SpO₂-Daten
- Numerische Herzfrequenzdaten

- Numerische Atemfrequenzdaten
- Numerische Temperaturdaten
- Numerische NIBD-Daten
- Numerische EtCO₂-Daten
- Numerische IBD-Daten
- Eingestellte Energie, Ladestatus und abgegebene Energie (Defibrillation und synchronisierte Kardioversion)
- Ausgangsstrom und Stimulationsfrequenz (Schrittmacher)
- Meldungen und Aufforderungen

Abbildung 2-2 zeigt die Anordnung der Parameterwerte, Kurven, Systemdaten und Bezeichnungen der Schnellzugriffstasten.

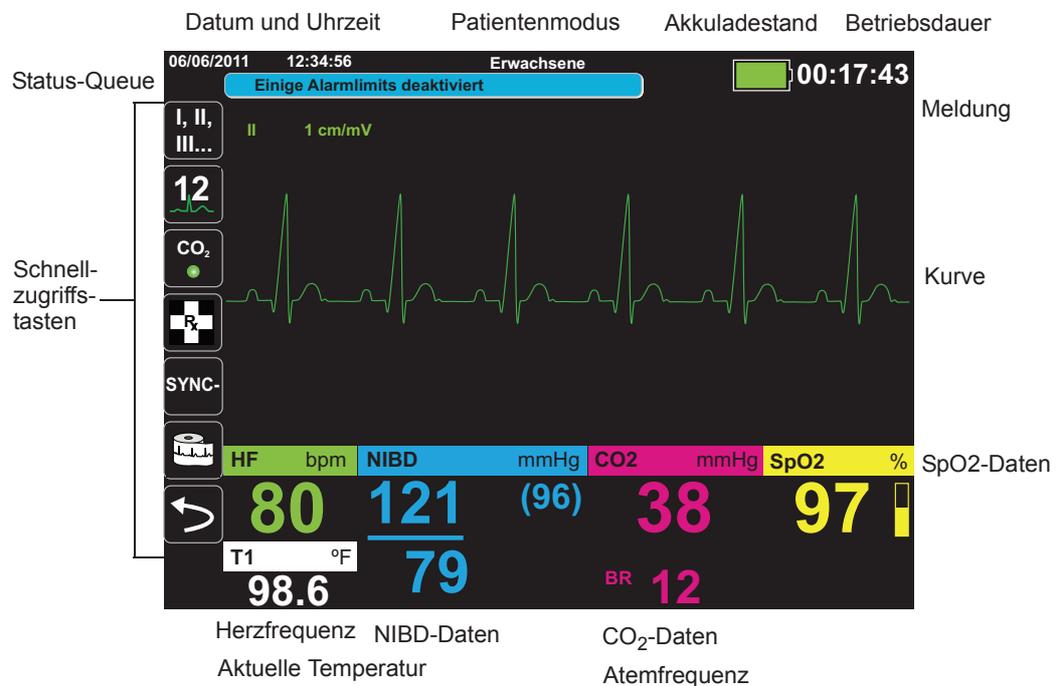


Abbildung 2-2. Display des X Series Geräts

Farbcodierung

Zur Abgrenzung der Informationen der diversen Parameter zeigt das Gerät jede Informationsart in einer vom Anwender konfigurierbaren Farbe an.

Anzeigen für Akkuladestand und externes Netzteil

Die Akkuladestandanzeige gibt mit verschiedenen Batteriesymbolen Auskunft über die beim aktuellen Akkuladestand ungefähr verbleibende Betriebszeit. Außerdem geben diese Symbole Aufschluss über den Status der Akkuverbindung und des Datenaustauschs mit dem Gerät. Die Netzteil-Anzeige zeigt an, dass das Gerät durch das externe Netzteil gespeist wird.

Hinweis: Die Akkukapazität wird normalerweise innerhalb von ca. 15 Sekunden nach Einschalten des X Series Geräts angezeigt. Unter bestimmten Umständen – beispielsweise wenn der Defibrillator sofort nach dem Einschalten des Geräts aktiviert wird – zeigt das Batteriesymbol nach Beenden des Defibrillatormodus möglicherweise bis zu zwei Minuten lang eine Batteriekapazität von weniger als einer Stunde an.

Symbol	Status	Bedeutung/Aktion
	Externes Netzteil angeschlossen	Das Gerät wird durch das externe Netzteil gespeist.
	Kein Akku erkannt	Entweder befindet sich kein Akku im Gerät, während es durch das externe Netzteil gespeist wird, oder das Gerät kann nicht erkennen, dass der Akku eingesetzt ist.
	Niedriger Ladestand	Ersetzen Sie den Akku sobald als möglich.
	Datenübertragungsstörung	Das Gerät kann keinen Datenaustausch mit dem Akku aufbauen und der Ladestand ist daher nicht bekannt. Überprüfen Sie die Kontakte des Akkus.
	Akkufehler	Es wurde ein Akkufehler festgestellt. Ersetzen Sie den Akku.
	Akkuladestand 1	Der Ladestand des Akkus reicht für weniger als eine Stunde aus.
	Akkuladestand 2	Der Ladestand des Akkus reicht für mehr als eine Stunde aus.
	Akkuladestand 3	Der Ladestand des Akkus reicht für mehr als zwei Stunden aus.
	Akkuladestand 4	Der Ladestand des Akkus reicht für mehr als drei Stunden aus.
	Akkuladestand 5	Der Akku ist vollständig aufgeladen.

Patientenkabel und Anschlüsse

An der linken und rechten Seite des Geräts befinden sich verschiedene Anschlüsse für Patientenkabel.

Hinweis: Die Funktionsmerkmale SPO₂, NIBD, CO₂, Temperatur und IBD sind optional. Verfügt Ihr Gerät nicht über diese Optionen, weist es auch nicht die betreffenden Anschlüsse auf.

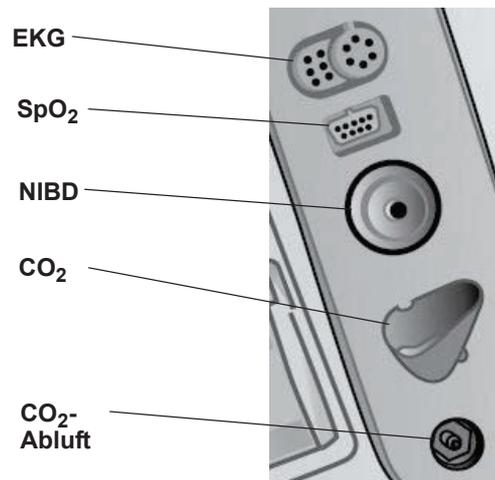


Abbildung 2-3. Patientenanschluss an der linken Seite des Geräts

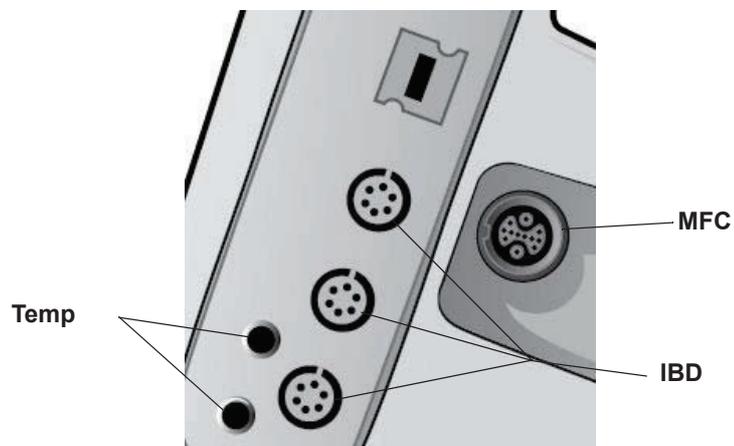


Abbildung 2-4. Patientenanschluss an der rechten Seite des Geräts

Anschluss	Beschreibung
EKG	Für den Anschluss eines 3- oder 5-Kanal-EKG-Kabels (12-Kanal-EKG-Kabel optional)
SpO ₂	Für den Anschluss eines Masimo SpO ₂ /CO-Kabels
NIBD	Für den Anschluss eines NIBD-Schlauchs
CO ₂	Für den Anschluss einer CO ₂ -Messleitung
Temp	Für den Anschluss einer oder mehrerer Temperatursonden
Multifunktionskabel (MFC)	Für den Anschluss von Paddles oder von ZOLL Freihand-Therapie- und Stimulationselektroden
IBD	Für den Anschluss eines oder mehrerer IBD-Kabel

Multifunktionskabel (MFC)

Das Gerät wird mit einem Multifunktionskabel (MFC) geliefert, das für die Defibrillation des Patienten eingesetzt wird. Je nach den von Ihnen erworbenen Optionen liegen dem Gerät weitere Kabel bei.

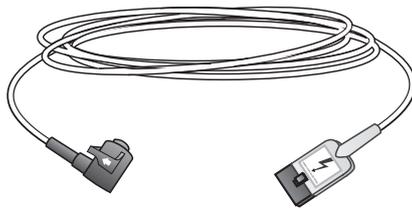


Abbildung 2-5. Multifunktionskabel (MFC)

Anschließen des Multifunktionskabels an das Gerät

Stecken Sie den Anschlussstecker des Multifunktionskabels in den MFC-Anschluss an der rechten Seite des Geräts. Richten Sie dazu die Pfeile aneinander aus, und drücken Sie den Stecker in den Anschluss. Der Stecker rastet hörbar ein.



Entfernen des Multifunktionskabels vom Gerät

Drehen Sie den MFC-Stecker nach links, um ihn zu entriegeln, und ziehen Sie ihn aus dem MFC-Anschluss.



Externe Paddles



Bei den Paddles handelt es sich um defibrillationssichere Medizinprodukte Typ BF.

Die externen Paddles des X Series Geräts werden für die Defibrillation und die synchronisierte Kardioversion eingesetzt.

Vorsicht Die Paddles sind nicht für die externe transkutane Stimulation vorgesehen.

Schließen Sie das vom X Series Gerät kommende Multifunktionskabel an der Basis des APEX-Paddles an.

1. Das MFC wie abgebildet ausrichten.

2. Das MFC am Griff des APEX-Paddles anschließen.



Abbildung 2-6. Anschließen des MFCs am APEX-Paddle

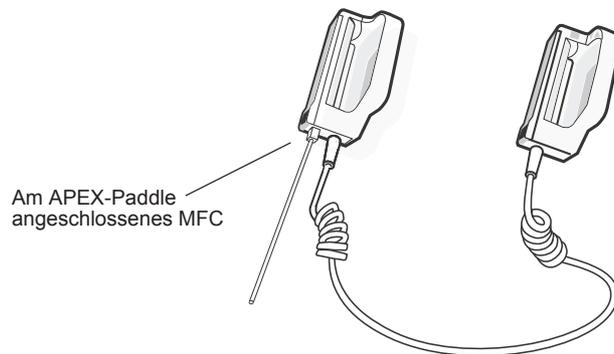


Abbildung 2-7. Am APEX-Paddle angeschlossenes MFC

Zum Lösen des Multifunktionskabels von dem APEX-Paddle drücken Sie die Taste **RELEASE** (ENTRIEGELUNG) (siehe Abbildung 2-8) in Pfeilrichtung und ziehen das Multifunktionskabel ab.

Beachten Sie die Hinweise in Kapitel 14, „Manuelle Defibrillation“, bevor Sie Paddles für die Defibrillation einsetzen. An den Paddles befinden sich Bedienelemente für die Einstellung der Defibrillationsenergie, zum Laden und für die Abgabe eines Schocks.

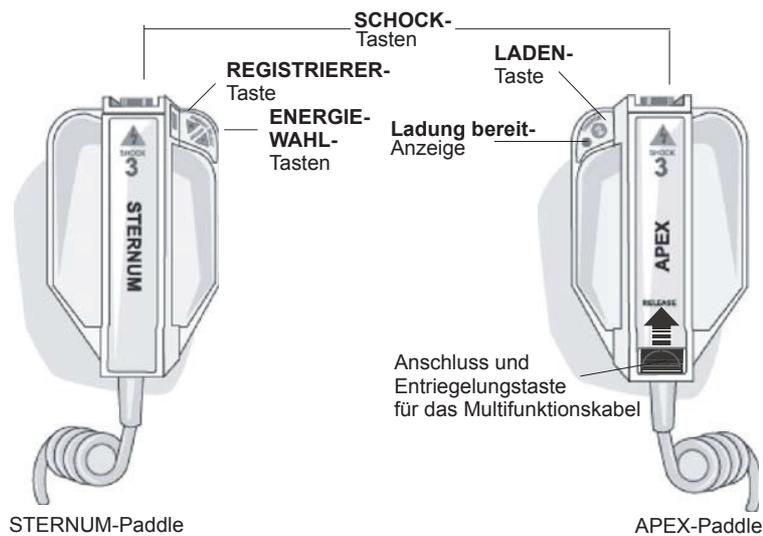


Abbildung 2-8. Externe Paddles

In die Paddles sind Elektroden für Kinder integriert. Diese liegen direkt unter den Standardelektrodenplatten. Der Anwender muss die Energieeinstellungen manuell an die für Kinder geeigneten Pegel (entsprechend den Protokollen der betreffenden Einrichtung) anpassen.



Um die für Kinder geeignete Platte freizulegen, drücken Sie die Taste an der Unterseite der Paddles und ziehen die Erwachsenenplatte nach oben ab.

Bevor Sie die Erwachsenenplatte wieder anbringen, reinigen Sie die für Kinder vorgesehene Platte und den umgebenden Bereich sorgfältig.

Schieben Sie die Erwachsenenplatte wieder auf das Paddle, bis sie einrastet.

Abbildung 2-9. Platte für Kinder

Hinweis: Der X Series Defibrillator kann auch mit den von ZOLL angebotenen autoklavierbaren internen Griffen für die Defibrillation am offenen Herzen verwendet werden.

Externes Netzteil

Das externe Netzteil ermöglicht den Betrieb des X Series Geräts mit Netzspannung. Ist es an das Gerät angeschlossen, versorgt es das Gerät mit Strom und lädt den in das Gerät eingesetzten Akku auf. Wenn das Netzkabel an der Netzsteckdose und der Stecker des externen Netzteils an der Rückseite des X Series Geräts angeschlossen ist, leuchtet die Netzteil-LED an der Gerätevorderseite und oben im Display erscheint das Netzteil-Symbol.

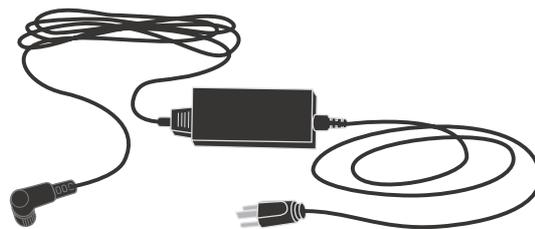


Abbildung 2-10. Externes Netzteil

Zum Anschluss des externen Netzteils stecken Sie den Stecker des Netzteils in die schwarze Eingangsbuchse an der Geräterückseite. Zum Trennen des externen Netzteils vom Gerät drehen Sie den Steckerkragen nach links und ziehen den Stecker heraus.

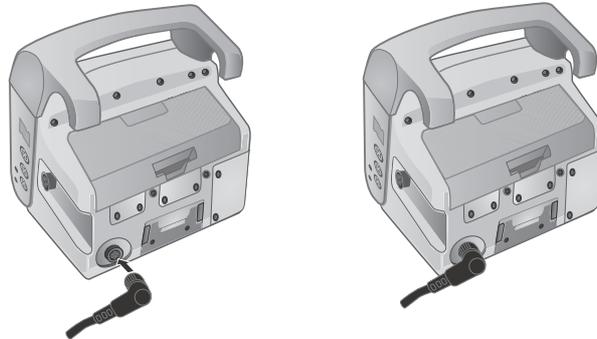


Abbildung 2-11. Anschließen des externen Netzteils

Bildschirmnavigation

Mit den Schnellzugriffstasten links neben dem Display und den Navigationstasten rechts an der Gerätefront können Sie auf die Funktionen des X Series Geräts zugreifen.

Schnellzugriffstasten

Die sieben Schnellzugriffstasten links neben dem Display ermöglichen den einfachen Zugriff auf die Funktionen des X Series Geräts. Wenn Sie die letzte Taste (Linkspfeil) drücken, werden fünf weitere Tasten angezeigt.

Erste Tastenebene Zweite Tastenebene

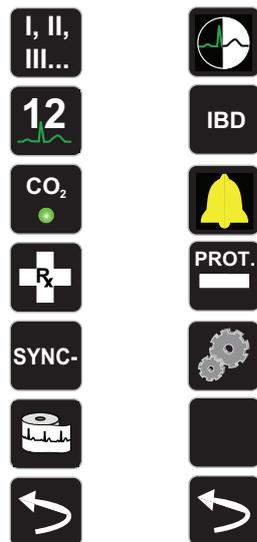


Tabelle 2-3. Schnellzugriffstasten des X Series Geräts

Schnellzugriffstaste	Beschreibung
Ableitung 	Wählt die EKG-Eingangsquelle für die erste Kurve aus.
12-Kanal 	Zeigt die 12-Kanal-Überwachung an.
CO ₂ 	Schaltet CO ₂ ein und aus.
Behandlung 	Zeigt die aktuellen klinischen Behandlungsoptionen an.
Sync 	Aktiviert den Modus für die synchronisierte Kardioversion.
Drucken 	Startet oder stoppt den kontinuierlichen Kurvenausdruck.
Weiter/Zurück 	Wechselt zur nächsten bzw. vorherigen Tastenebene.
Helligkeit 	Ändert die Helligkeitseinstellung – durchläuft die kontrastreiche Anzeige (weißer Hintergrund), Farbanzeige (schwarzer Hintergrund) und die für Nachtsichtgeräte (NVG) geeignete Anzeige.
IBD 	Zeigt IBD-Einrichtungstasten und -Nullabgleichstasten an.
Alarmer 	Zeigt die Option „Grenz.“ an, über die der Anwender alle Alarmgrenzwerte für die Parameter und die Alarmunterdrückungstaste anzeigen/einstellen kann.
Prot. 	Öffnet das Protokoll-Bedienfeld.
Einrichten 	Zeigt das Menü „Setup“ (Einrichten) an, mit dem der Anwender die Einstellungen für EKG, Anzeige/Lautstärke, Drucker, Trends, Betriebsfähigkeits-Prüfliste und Supervisor konfigurieren kann.
Behandlungsübersicht 	Zeigt fallweise Behandlungsübersichten an, die ausgedruckt werden können.
Man. Betr. 	Ermöglicht dem Anwender den Wechsel vom AED-Modus in den manuellen Modus.
Pause 	Ermöglicht dem Anwender das Anhalten des Reanimationszyklus.
Trends drucken 	Druckt die im Fenster „Trend-Übersicht“ angezeigten Trends.

Tabelle 2-3. Schnellzugriffstasten des X Series Geräts

Schnellzugriffstaste	Beschreibung
Trend-Einstellungen 	Zeigt die Einstellungen für Trend-Anzeigeformat, Intervalltrend und Alarmtrend an.
Protokoll übertragen 	Überträgt die aktuellen Daten im Protokoll auf ein USB-Laufwerk.
Protokoll löschen 	Löscht die aktuellen Daten im Protokoll.
Erfassen 	10 Sekunden Erfassung von 12-Kanal-EKG-Daten zum Ausdrucken.
Erfassung stoppen 	Stoppt die Erfassung der 12-Kanal-EKG-Daten.
Patientendaten 	Ermöglicht die Eingabe von Zusatzinformationen für die 12-Kanal-EKG-Daten: Patientename, Alter, Geschlecht und ID.
Zeile nach oben 	Ermöglicht bei der Eingabe von Patientendaten den Wechsel in die vorherige Zeile.
Zeile nach unten 	Ermöglicht bei der Eingabe von Patientendaten den Wechsel in die nächste Zeile.
Überpr. 12 Abl. 	Gibt Ihre gesamten erfassten 12-Kanal-EKG-Daten zu Kontrollzwecken aus.
Überpr. 12 Abl. Nächst. 	Wechselt zur nächsten Seite des gerade angezeigten 12-Kanal-EKG-Snapshots.
Senden 	Sendet 12-Kanal-EKG-Daten.
12-Kanal-EKG beenden 	Beendet Bildschirmanzeige für das 12-Kanal-EKG.
Stat. 	Legt alle Alarmgrenzwerte relativ zu den derzeitigen Vitalfunktionmesswerten des Patienten fest.
Alarmunterdrückung 	Unterdrückt den derzeitigen Alarm.
Grenzwerte 	Zeigt die derzeitigen Alarmeinstellungen an.
Entladen 	Dient zum sicheren internen Entladen des Defibrillators. Es wird keine Energie an den Patienten abgegeben.

Tabelle 2-3. Schnellzugriffstasten des X Series Geräts

Schnellzugriffstaste	Beschreibung
IBD-Einrichtung 	Ruft das IBD-Parameterbedienfeld für den jeweiligen Kanal (P1, P2 oder P3) auf.
IBD-Nullabgleich 	Führt bei dem IBD-Messwandler des jeweiligen Kanals (P1, P2 oder P3) einen Nullabgleich durch.

Navigationstasten

Mithilfe der Navigationstasten (Pfeil hoch/im Uhrzeigersinn, Pfeil ab/entgegen dem Uhrzeigersinn und Auswahltaste) können Sie durch die Fenster navigieren und Optionen aufrufen.

Pfeil auf/im Uhrzeigersinn und Pfeil ab/entgegen dem Uhrzeigersinn

Die Pfeiltasten (auf/ab bzw. im/entgegen dem Uhrzeigersinn) ermöglichen Folgendes:

- Navigieren im und entgegen dem Uhrzeigersinn durch die Hauptanzeigefenster
- Navigieren innerhalb eines Fensters nach oben oder nach unten
- Ändern von Parametereinstellungen

Die Auswahltaste

Die Auswahltaste ermöglicht Folgendes:

- Anzeigen des Einstellungsfensters, wenn ein Parameter im Hauptfenster ausgewählt ist
- Auswählen der Optionen aus einem Fenster

Displayhelligkeit

Das Display kann in zwei unterschiedlichen Helligkeitsmodi betrieben werden:

- kontrastreich mit weißem Hintergrund (optimale Anzeige bei hellem Sonnenlicht)
- Farbe mit schwarzem Hintergrund (Zahlen und Kurven sind leicht zu erkennen)

Routineaufgaben

Dieser Abschnitt enthält Verfahren für die folgenden Aufgaben:

- „Ändern der Displayhelligkeit“ auf Seite 2-16
- „Auswechseln des Akkus im X Series Gerät“ auf Seite 2-16
- „Die Behandlungstasten“ auf Seite 2-17

Ändern der Displayhelligkeit

Nachstehend wird die Auswahl der verschiedenen Helligkeitsoptionen veranschaulicht.

1. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um das Gerät einzuschalten.
2. Drücken Sie wiederholt die Schnellzugriffstaste „Helligkeit“ (☀️), um die Helligkeitsoptionen zu durchlaufen, bis Sie die gewünschte Option finden.

Hinweis: Wird eine größere Helligkeit eingestellt (z. B. 70 %), entlädt sich der Akku schneller als bei einer niedrigeren Helligkeitseinstellung (z. B. 30 %). Zum Auswählen der Helligkeitseinstellung rufen Sie das Menü „Einrichten“ > „Anz./Lautst.“ > „Displayhelligkeit“ auf, um die Helligkeit (in Prozent) anzupassen.

Auswechseln des Akkus im X Series Gerät

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie der Akku im X Series Gerät ausgewechselt wird.

Auswechseln des Akkus im X Series Gerät

Zum Entnehmen des Akkus ziehen Sie die Klinke mit den Fingern nach oben und ziehen den Akku aus dem Fach.

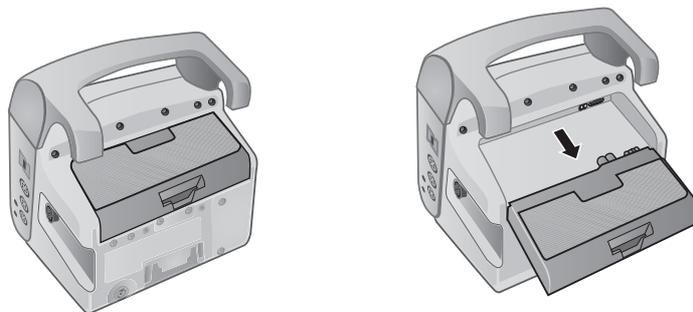


Abbildung 2-12. Entfernen des Akkus

So setzen Sie einen Akku ein:

1. Richten Sie den Akku so aus, dass er sich widerstandslos in das Fach schieben lässt.
2. Schieben Sie den Akku hinein.

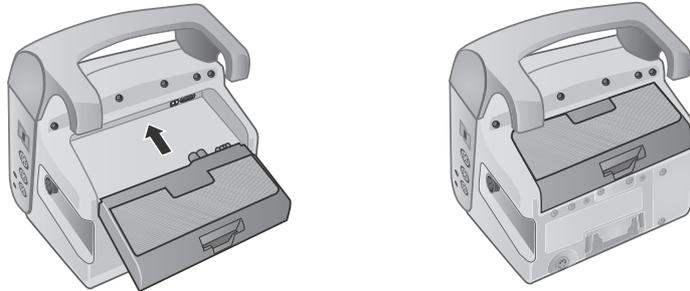


Abbildung 2-13. Einsetzen eines Akkus

Die Behandlungstasten

Bei Betätigung der Schnellzugriffstaste „Behandlung“ (☒) zeigt das Gerät vorkonfigurierte Tasten für klinische Maßnahmen an. Mit diesen Tasten können Sie einen Behandlungs-Snapshot (mit den einem Patienten verabreichten Medikamenten oder Behandlungen) zum Behandlungsübersichtsbericht hinzufügen. Wählen Sie hierfür die Menüoption **Bei Behndl.-Snapshot drucken** aus dem Menü „Einrichten“ > „Supervisor“ > „Drucker“. Nachstehend werden die vorkonfigurierten Behandlungstasten aufgelistet:

- O2
- ASA
- Nitro
- Morphin
- IV
- B-Bl.
- Lido
- MgSO4
- Valium
- Sedierung

Individuelle Anpassung der Behandlungstasten

Es ist auch möglich, bis zu 9 Behandlungstasten anwenderspezifisch anzupassen. Dazu drücken Sie die Schnellzugriffstaste „Einrichten“ (☒) und wählen „Supervisor“ > „Prot.“ > „Behandlungsoptionen“. Markieren Sie die Option **Indiv. Beschr. defin.**. Sie können nun bis zu 9 Tasten individuell anpassen.

Kapitel 3

Überwachung – Übersicht

Dieses Kapitel bietet eine Übersicht über die Überwachungsfunktionen des X Series Geräts. Es beschreibt, welche Arten von Vitalfunktionen das X Series Gerät überwachen kann und welche Flexibilität Ihnen das X Series Gerät bei der Anzeige der Vitalfunktionen des Patienten bietet.

Überwachungsfunktionen des X Series Geräts

Das X Series Gerät bietet eine Reihe von Standard- und optionalen Überwachungsfunktionen und ermöglicht die Anzeige der mit diesen Funktionen gemessenen Vitalfunktionen in einer Vielzahl von Formaten. Das X Series Gerät ermöglicht Ihnen außerdem, für jede Überwachungsfunktion Alarmgrenzwerte festzulegen. Sollten die gemessenen Vitalfunktionen eines Patienten außerhalb dieser Grenzwerte liegen, alarmiert das X Series Gerät Sie sowohl akustisch als auch optisch.

Wird das X Series Gerät für weniger als 2 Minuten ausgeschaltet, bleiben alle Einstellungen der Patientenüberwachungsparameter erhalten. War das X Series Gerät mindestens 2 Minuten lang ausgeschaltet, nimmt das Gerät einen neuen Patienten an. Sämtliche patientenspezifischen Parameter (Alarmgrenzwerte, Defibrillatorenergie usw.) werden auf den jeweiligen Standardwert zurückgesetzt.

Mit dem X Series Gerät können die folgenden Vitalfunktionen eines Patienten überwacht werden:

- EKG
- Herzfrequenz
- Atemfrequenz
- Temperatur
- Invasiver Blutdruck (IBD)
- Nichtinvasiver Blutdruck (NIBD)
- Kapnografie (CO₂)
- Pulsoxymetrie (SpO₂)

EKG

Oben im Anzeigebereich wird eine EKG-Kurve angezeigt. Sie können festlegen, dass das Gerät in diesem Bereich die EKG-Kurve beliebiger verfügbarer EKG-Quellen anzeigt, beispielsweise **Elektroden**, EKG-Ableitungen **I, II** oder **III** usw. Das X Series Gerät kann für die Anzeige von bis zu vier EKG-Kurven konfiguriert werden. Sie können nicht nur die Quelle für jede EKG-Kurve festlegen, sondern diese Kurven auch so skalieren, dass sie besser zu erkennen sind.

Herzfrequenz

Die Herzfrequenzanzeige gibt die Herzfrequenz des Patienten in Schlägen pro Minute (**bpm**) an. Das X Series Gerät leitet die Herzfrequenz standardmäßig aus dem EKG des Patienten ab, kann jedoch so konfiguriert werden, dass andere Überwachungsfunktionen für die Ableitung der Herzfrequenz herangezogen werden.

Atemfrequenz

Die Atemfrequenzanzeige gibt die Atemfrequenz des Patienten in Atemzügen pro Minute (**br/min**) an. Das X Series Gerät kann so konfiguriert werden, dass die Atemfrequenz aus dem EKG des Patienten oder aus der optionalen CO₂-Überwachungsfunktion abgeleitet wird.

Temperatur

Die Temperaturanzeige (**Temp**) kann die Messwerte von bis zu zwei Temperatursonden anzeigen. Das X Series Gerät verfügt über zwei getrennte Kanäle für die Temperaturüberwachung. Bei Verwendung beider Kanäle werden die überwachten Temperaturen (in °F oder °C) nacheinander angezeigt, gefolgt von der Differenz zwischen diesen beiden Temperaturen.

Invasiver Blutdruck (IBD)

Das X Series Gerät verfügt über drei separate Kanäle für die Überwachung des arteriellen, venösen oder intrakranialen Drucks mittels interner Sonden. Die Druckmesswerte der einzelnen Druckkanäle erscheinen in einer entsprechend beschrifteten (**P1, P2, P3**) numerischen Anzeige.

Nichtinvasiver Blutdruck (NIBD)

Das X Series Gerät nutzt für die NIBD-Überwachung die patentierte bewegungstolerante Smartcuf-Technologie. Bei der NIBD-Überwachung werden der systolische, der diastolische und der mittlere Blutdruck mittels einer aufblasbaren Blutdruckmanschette gemessen, die das X Series Gerät selbstständig aufbläst und entleert. NIBD-Messungen können automatisch oder bei Bedarf durch Drücken der NIBD-Taste (☞) an der Front des X Series Geräts durchgeführt werden. Die Blutdruckmesswerte erscheinen in einer entsprechend beschrifteten (**NIBD**) numerischen Anzeige. Das X Series Gerät kann zudem auf die Anzeige nichtinvasiver Druckkurven im Kurvenbereich eingestellt werden.

Kapnografie (CO₂)

Bei der CO₂-Überwachung wird die CO₂-Konzentration in der Ausatemluft des Patienten (endexpiratorische Kohlendioxidfraktion – EtCO₂) gemessen. Die CO₂-Überwachung kann zudem zur Messung der Atemfrequenz eines Patienten und der CO₂-Konzentration der einem intubierten Patienten zugeführten Gase (inspiratorische Kohlendioxidfraktion – FiCO₂) genutzt werden. Da FiCO₂ der Menge des während der Inspiration vorhandenen CO₂ entspricht, kann dieser Wert bei nicht intubierten Patienten als Hinweis auf die Rückatmung dienen. Die CO₂-Überwachung kann bei intubierten und bei nicht intubierten Patienten eingesetzt werden.

Die Messwerte für EtCO₂, Atemfrequenz und FiCO₂ erscheinen in einer entsprechend beschrifteten (**EtCO₂**) numerischen Anzeige. Die EtCO₂- und FiCO₂-Messwerte werden in mmHg (Millimeter Quecksilbersäule) angezeigt. Das X Series Gerät kann zudem für die Anzeige eines CO₂-Kapnogramms im Kurvenanzeigebereich konfiguriert werden.

Pulsoxymetrie (SpO₂)

Bei der Pulsoxymetrie-Überwachung wird die Sauerstoffsättigung (SpO₂) des peripheren arteriellen Bluts (z. B. am Finger oder Zeh) gemessen. Sind die optionalen Funktionsmerkmale SpCO und SpMet installiert, überwacht das Gerät auch die Carboxyhämoglobinsättigung (SpCO) sowie die Methämoglobinsättigung (SpMet). Die SpO₂-Überwachung bestimmt den Quotienten aus oxygeniertem Hämoglobin und Gesamthämoglobin im arteriellen Blut und zeigt diesen als prozentualen SpO₂-Wert in einer entsprechend beschrifteten (**SpO₂**) numerischen Anzeige an. Sind die optionalen Funktionsmerkmale SpCO und SpMet installiert, werden diese Messwerte abwechselnd als **SpCO** bzw. als **SpMet** im SpO₂-Anzeigebereich angezeigt. Das X Series Gerät kann zudem für die Anzeige eines SpO₂-Plethysmogramms im Kurvenanzeigebereich konfiguriert werden.


Überwachung – Anzeigeoptionen

Das X Series Gerät kann die Daten der Vitalfunktionen eines Patienten sehr flexibel anzeigen.

Durch Drücken der Anzeige/Startseite-Taste () an der Gerätefront wechseln Sie sukzessive durch die folgenden drei Fenster für die Anzeige der Vitalfunktionen des Patienten:


- **Kurvenanzeige-Fenster**, in dem anfänglich eine EKG-Kurve und numerische Anzeigebereiche für jede Überwachungsfunktion angezeigt werden.
- **Trendstatus-Fenster**, in dem ein Bericht mit den Messwerten der Vitalfunktionen, die das X Series Gerät automatisch protokolliert, und die primäre EKG-Kurve angezeigt werden.
- **Fenster mit großer Ziffernanzeige**, in dem die Messwerte aller gemessenen Vitalfunktionen in großen Ziffern angezeigt werden.

Nach dem Einschalten des X Series Geräts ist das Kurvenanzeige-Fenster zu sehen. Anfänglich zeigt das Kurvenanzeige-Fenster eine einzelne EKG-Kurve an. Alle anderen überwachten Werte erscheinen in numerischen Anzeigebereichen unten im Display:

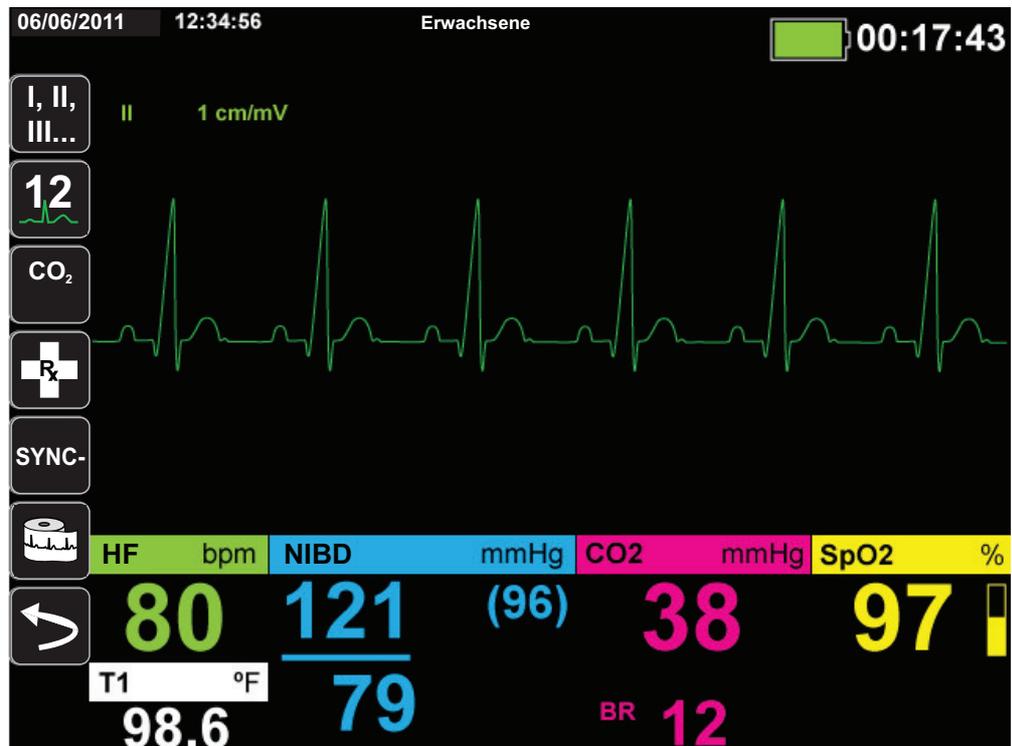


Sie können bis zu vier Kurven anzeigen, die im Kurvenanzeige-Fenster festgelegt werden. Weiter unten in diesem Kapitel wird beschrieben, wie diesem Fenster Kurven hinzugefügt werden.

Durch Drücken der Anzeige/Startseite-Taste bei angezeigtem Kurvenanzeige-Fenster wechselt das Gerät zum Trendstatus-Fenster. Das Trendstatus-Fenster zeigt die Messwerte der gemessenen Vitalfunktionen an, die das X Series Gerät automatisch über ein konfigurierbares Zeitintervall protokolliert (weitere Informationen zum Trendstatus-Fenster finden Sie im folgenden Kapitel, „Trends“). Oberhalb der Trends wird die primäre EKG-Kurve angezeigt.

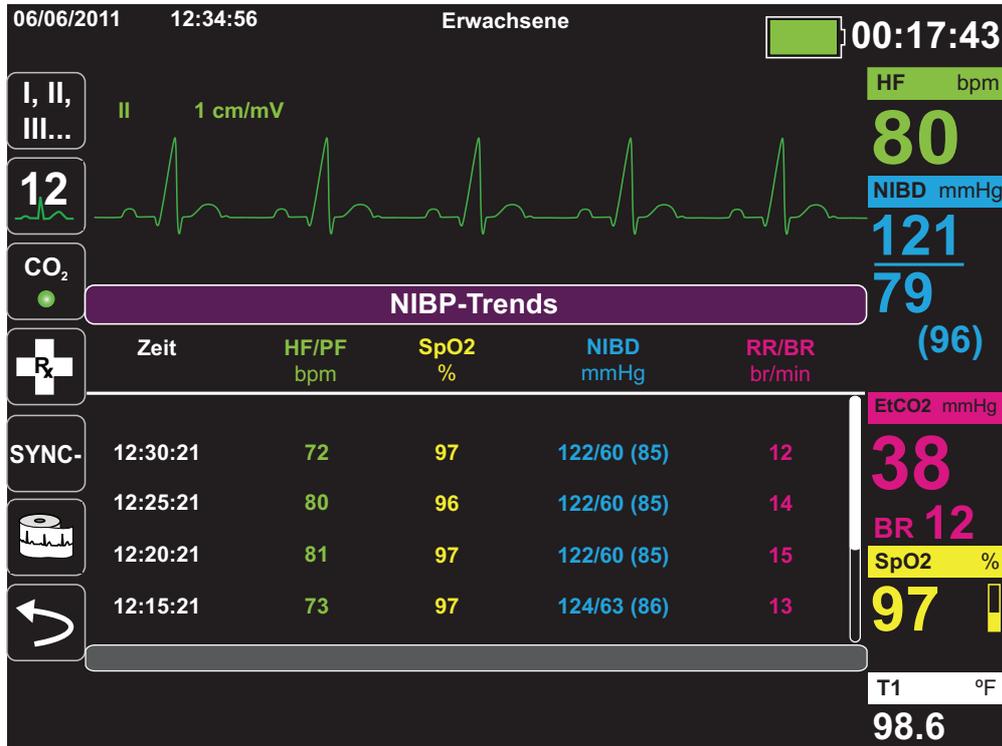

Durch Drücken der Anzeige/Startseite-Taste bei angezeigtem Trendstatus-Fenster wechselt das Gerät zum Fenster mit großer Ziffernanzeige. Die Messwerte der gemessenen Vitalfunktionen werden in numerischen Anzeigebereichen in großen Ziffern angezeigt. Dieses Fenster enthält keine Kurve:

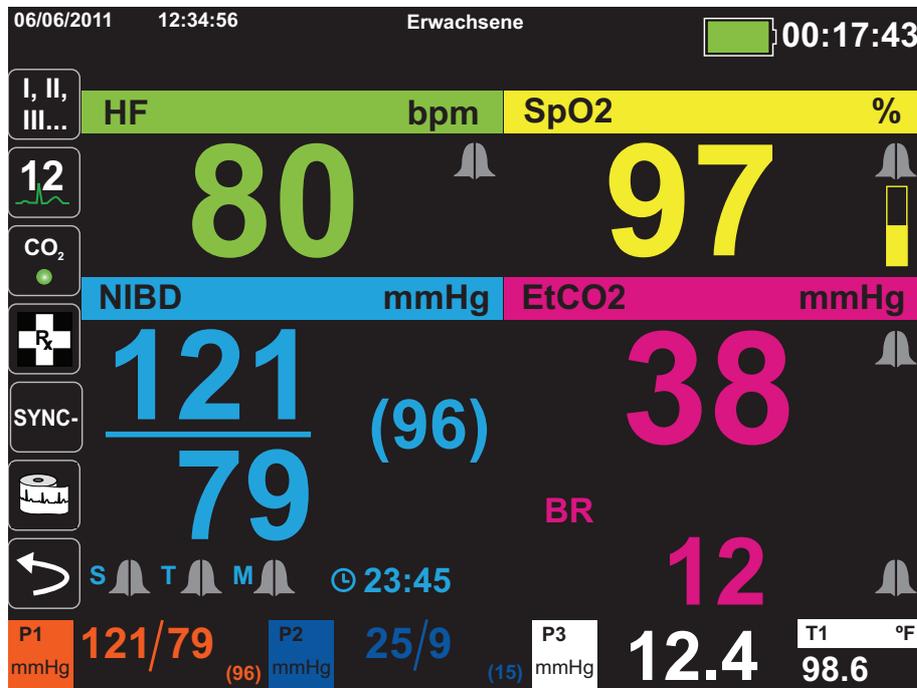

Durch Drücken der Anzeige/Startseite-Taste wechselt das Gerät wieder zum Kurvenanzeige-Fenster.


Hinweis: Während das X Series Gerät das Defibrillations- oder Stimulations-Bedienfeld anzeigt, kann nicht zum Fenster mit großer Ziffernanzeige gewechselt werden.

Konfigurieren der Kurvenanzeige

Im Kurvenanzeige-Fenster können bis zu vier Kurven angezeigt werden. Die erste Kurve verwendet als Quelle immer eine EKG-Ableitung (z. B. **Elektroden**, die Ableitungen **I**, **II** oder **III** usw.). Beim Einfügen der drei restlichen Kurven können Sie festlegen, dass die Kurven eine EKG-Ableitung als Quelle verwenden oder von anderen verfügbaren Überwachungsfunktionen (z. B. **Resp**, **CO₂**, **SpO₂** oder den IBD-Kanälen **P1**, **P2** oder **P3**) abgeleitet werden.


Das X Series Gerät kann zudem eine Kurve in den angrenzenden Kurvenbereich erweitern und somit die Dauer der Kurvenanzeige verdoppeln.

Um im Kurvenanzeige-Fenster eine neue Kurve einzufügen (**Einschieben**) oder eine angezeigte Kurve zu erweitern (**Kaskade**), markieren Sie die Kurvenbezeichnung über der Kurve und rufen Sie sie auf. Im folgenden Beispiel wird das Gerät so konfiguriert, dass die Kurve von EKG-Ableitung 1 in den nächsten Kurvenbereich erweitert (kaskadiert) wird:

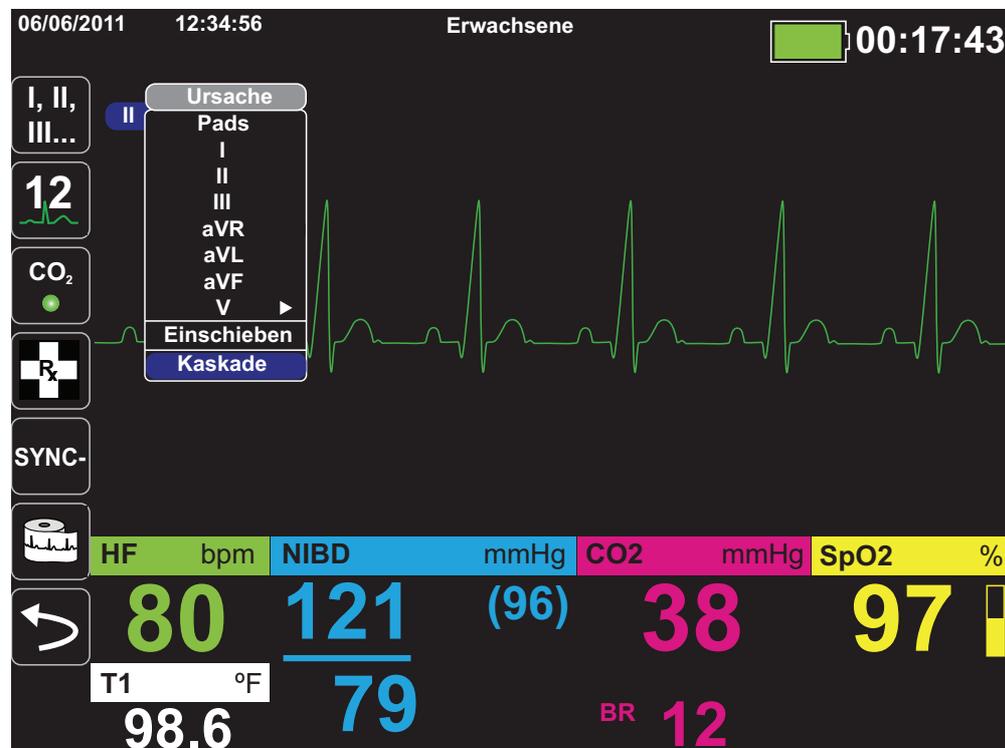



Hinweis: Das X Series Gerät fügt automatisch eine neue Kurve ein, sobald ein Parameter (CO₂) aktiviert wird oder ein neues Sensorsignal (SPO₂, IBD) anliegt. Das X Series Gerät entfernt automatisch eine Kurve, sobald ein Parameter ausgeschaltet oder ein Sensor entfernt wird und das Gerät den daraus resultierenden Gerätealarm anzeigt.

Wird die Kurve der EKG-Ableitung II kaskadiert, sieht das Kurvenanzeige-Fenster folgendermaßen aus:


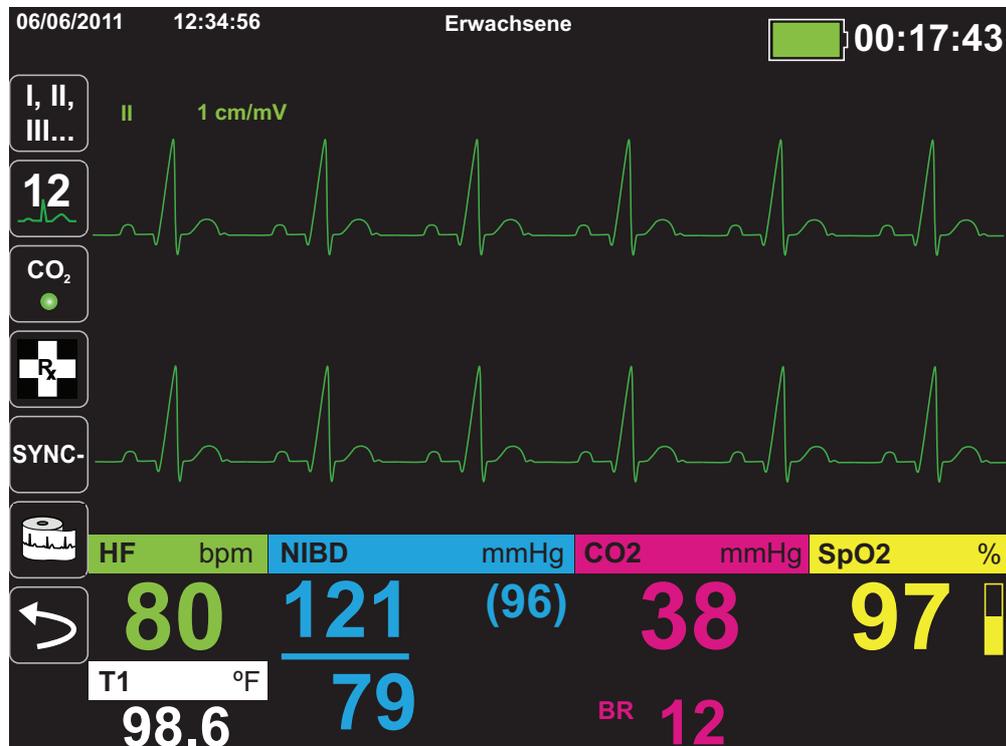


Die folgenden Abbildungen veranschaulichen, wie zwei weitere Kurven in das Fenster eingefügt werden. Als dritte Kurve wird die EKG-Ableitung **aVR** und als vierte Kurve **EtCO₂** (ein Kapnogramm) eingefügt. Beim Einfügen der dritten Kurve ist zu sehen, wie die numerischen Anzeigebereiche zur rechten Fensterseite verschoben werden, um mehr Platz für die Kurven zu schaffen.

Einfügen einer dritten Kurve für die EKG-Ableitung **aVR**:

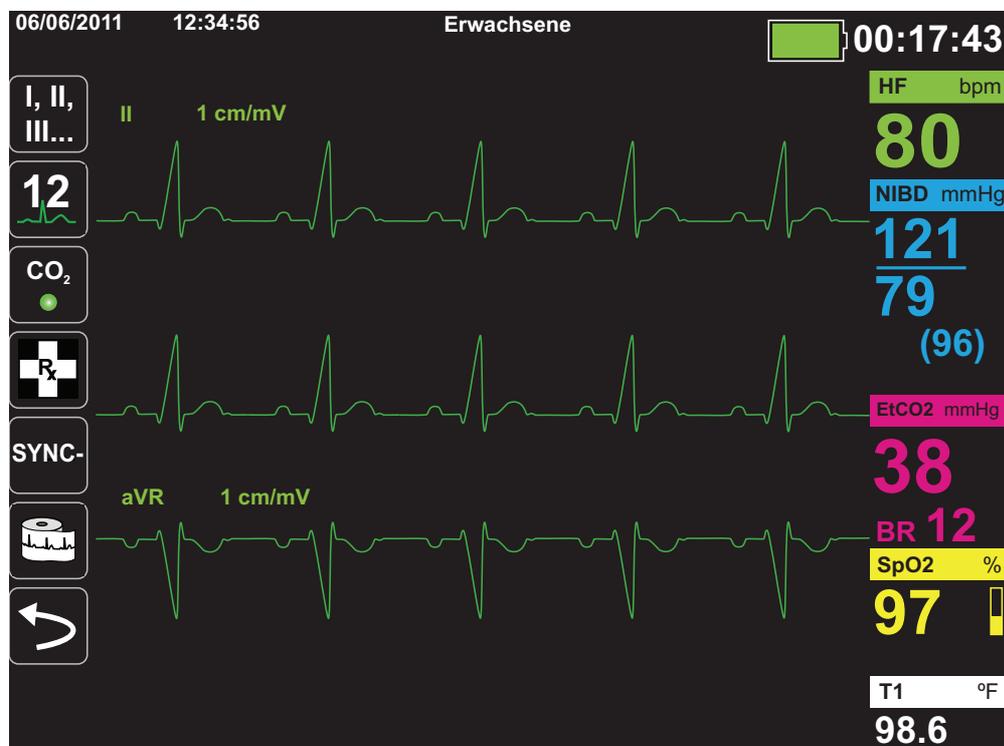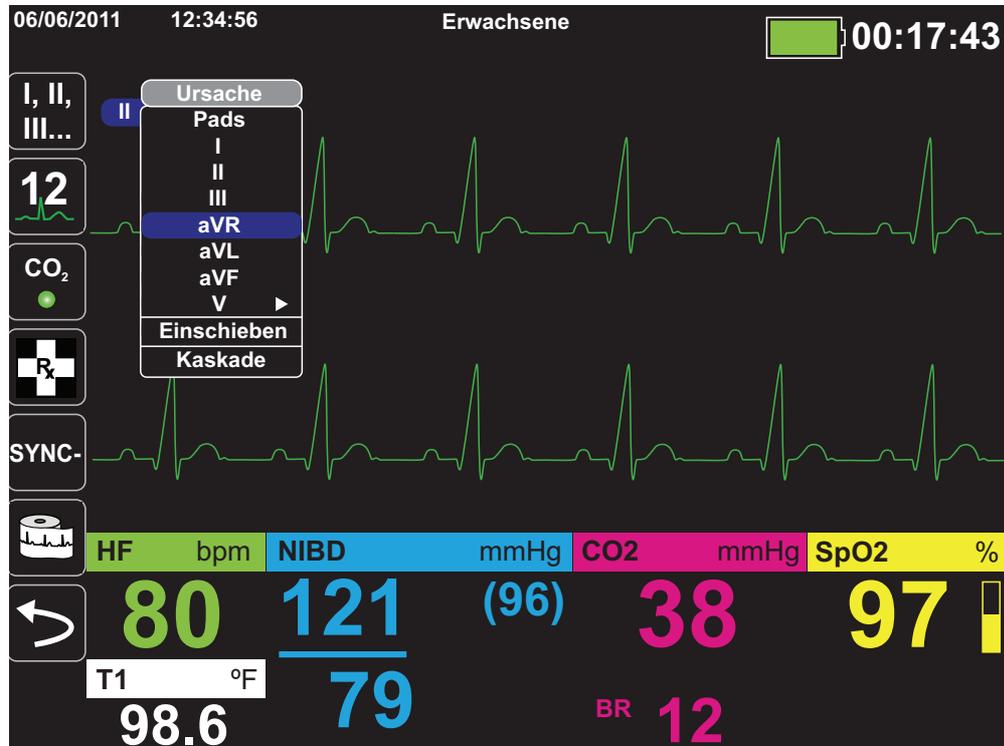

Einfügen eines Kapnogramms (CO₂) als vierte Kurve:

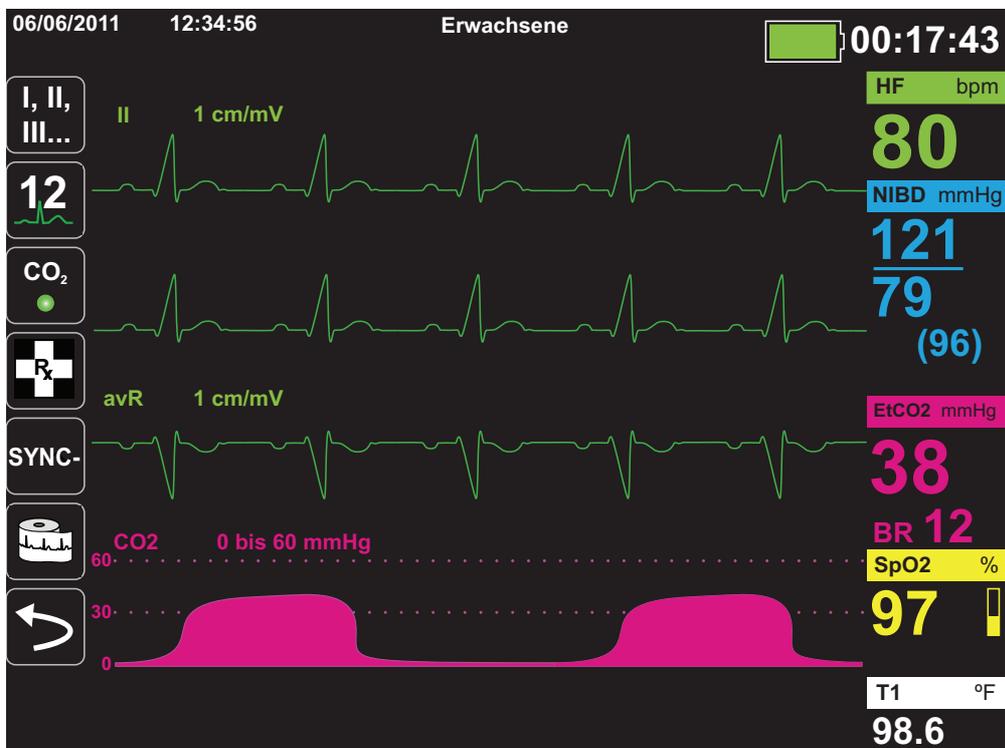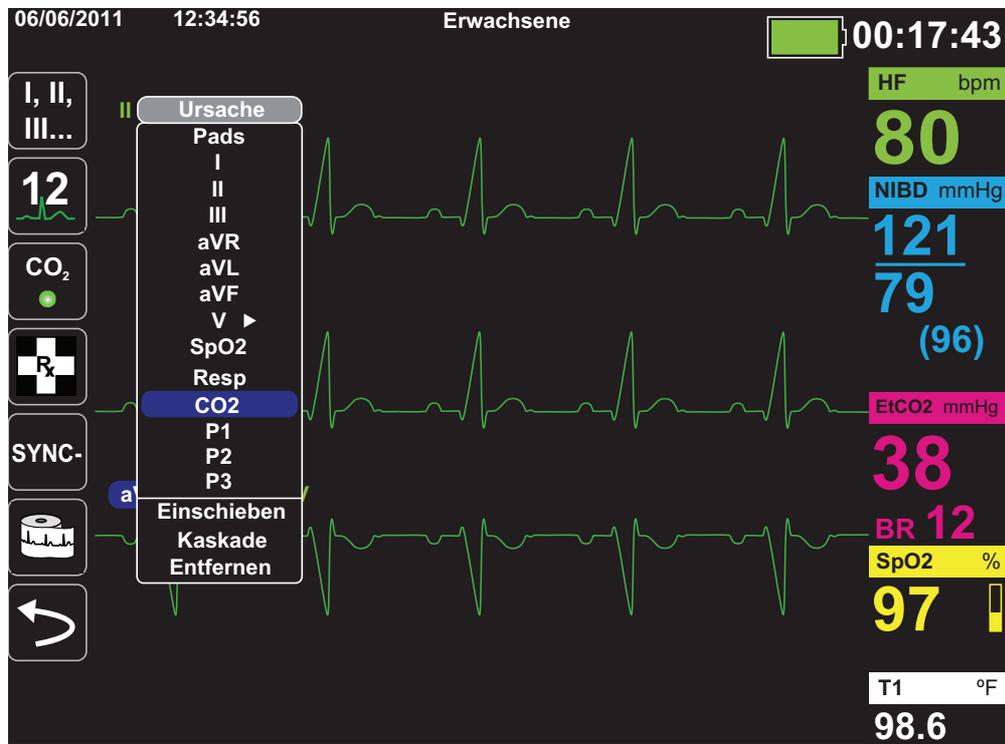

Kapitel 4

Trends

Das X Series Gerät kann für einen Patienten Trendinformationen sammeln. Hierzu protokolliert es innerhalb eines vom Anwender konfigurierbaren Intervalls die Messwerte aller überwachten Vitalfunktionen im Speicher. Die Messwerte *aller* überwachten Vitalfunktionen werden zudem in folgenden Situationen protokolliert:

- Beim Durchführen einer NIBD-Messung ist die Option **NIBD-Trend** eingeschaltet.
- Sie betätigen die Snapshot-Taste () auf der Gerätefront.
- Bei Vorliegen eines Patientenalarms ist die Option **Trend bei Alarm** eingeschaltet.

Bei einem Trendintervall von 1 Minute kann das X Series Gerät die protokollierten Trenddaten für einen Erfassungszeitraum von mindestens 24 Stunden speichern. Alle protokollierten Trenddaten können angezeigt, ausgedruckt oder auf externen Speichermedien archiviert werden.

Anzeigen des Trendstatus-Fensters

Das X Series Gerät zeigt die protokollierten Trenddaten im Trendstatus-Fenster an. Drücken Sie die Anzeige/Startseite-Taste () , um das Trendstatus-Fenster, die primäre EKG-Kurve und für alle Überwachungsfunktionen die kleinen numerischen Anzeigen anzuzeigen:

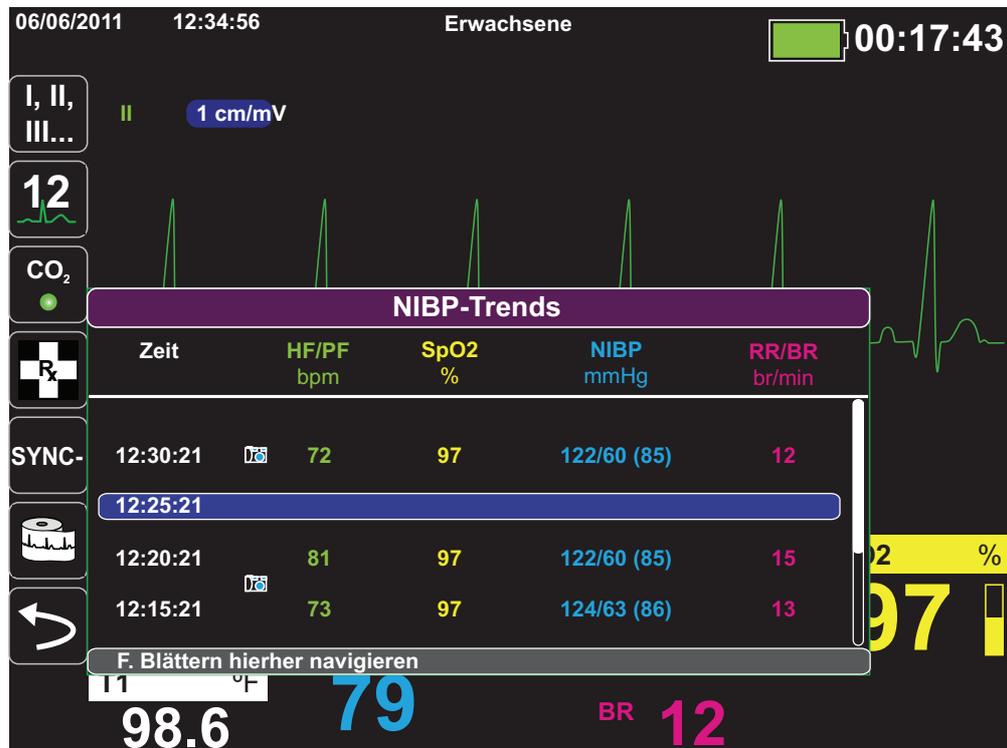


Abbildung 4-1 Trendstatus-Fenster

Das Trendstatus-Fenster zeigt die protokollierten Trenddaten zusammen mit der Uhrzeit an, zu der die Trendmessungen protokolliert wurden. Während die Trendmessungen in einem anwenderkonfigurierbaren Intervall im Speicher protokolliert werden, können die protokollierten Daten auch in einem unabhängig davon festgelegten Intervall im Trendstatus-Fenster angezeigt werden. Dies gilt nicht für die NIBD-Werte, die zum Zeitpunkt ihrer Messung protokolliert und angezeigt werden. Das Trendstatus-Fenster meldet die Trenddaten alle 5 Minuten.

Anzeigen und Drucken der Trenddaten

So navigieren Sie im Trendstatus-Fenster:

1. Wählen Sie mithilfe der Navigationstasten die Leiste **F. Blättern hierher navigieren** und drücken Sie die **Auswahl**taste.
2. Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten ( / ) blättern Sie durch die Trenddaten.
3. Sollen alle Trends für den derzeitigen Patienten gedruckt werden, markieren Sie das Feld **NIBD-Trends** und drücken Sie die **Auswahl**taste. Drücken Sie die Taste **Trendübersicht drucken** im Menü Trend-Einstellungen.
4. Zum Auswählen der Trends, die für den derzeitigen Patienten gedruckt werden sollen, drücken Sie die Schnellzugriffstaste „Prot.“ () und anschließend die Taste **Trends drucken** ().

Ändern der Anzeige des Trendstatus-Fensters

Standardmäßig werden im Trendstatus-Fenster alle protokollierten Trenddaten angezeigt. Dies gilt für die numerischen Informationen aller Überwachungsfunktionen, die das Gerät in einem anwenderkonfigurierbaren Intervall protokolliert, sowie die NIBD-Werte zum Zeitpunkt ihrer Messung, Patientenalarme zum Zeitpunkt ihres Auftretens und sobald  betätigt wurde.

Wenn Sie die Anzeige des Trendstatus-Fensters konfigurieren möchten, drücken Sie  und dann die Schnellzugriffstaste „Trend-Einstellungen“ () , um das Bedienfeld „Trend-Einstellungen“ aufzurufen. Wählen Sie im Bedienfeld „Trend-Einstellungen“ die Option **Trend-Anzeigeformat**, um die folgenden überwachten Vitalfunktionen festzulegen, die im Trendstatus-Fenster erscheinen sollen:

Trend-Anzeigeformat	Angezeigte Vitalfunktionen
Resp	HF, SpO2, RR, EtCO2, FiCO2
NIBD	HF, SpO2, NIBD, RR
IBP1	HF, SpO2, IBP1, RR
IBP2	HF, SpO2, IBP2, RR
IBP3	HF, SpO2, IBP3, RR
Temp	HF, SpO2, T1, T2, ΔT

Kapitel 5

Alarmer

Das X Series Gerät unterstützt die Erfassung und Meldung von *Patientenalarmer* wie auch von *technischen Alarmer*.

Patientenalarmer werden durch überwachte Patientenparameter (z. B. gemessene Vitalfunktionen) ausgelöst, wenn der Messwert die festgelegten Alarmgrenzwerte unter- bzw. überschreitet. *Sie können zu jeder physiologischen Überwachungsfunktion Grenzwerte für den Patientenalarm festlegen.*

Ein technischer Alarm ist ein überwachter Geräteparameter, den das X Series Gerät ermitteln kann, beispielsweise ein nicht angeschlossener Messfühler, interner Diagnosefehler usw. *Technische Alarmer sind immer aktiviert und nicht vom Anwender konfigurierbar.*

Patientenalarmer werden immer als Alarmer hoher Priorität eingestuft. Technische Alarmer werden als Alarmer mittlerer oder geringer Priorität eingestuft.

Die auslösenden Bedingungen der Patienten- und technischen Alarmer werden im Ereignisprotokoll gespeichert, das beim normalem Herunterfahren des Geräts und auch bei Stromausfall erhalten bleibt.

Optische Alarmanzeigen

Zusätzlich zu den angezeigten Statusmeldungen leuchten an der Front des X Series Geräts auch die rote oder die gelbe LED auf, um die Prioritätsstufe des aktiven Alarms mit der höchsten Priorität zu melden. Die Prioritätsstufe des aktiven Alarms mit der höchsten Priorität wird von den X Series LEDs entsprechend der folgenden Tabelle angezeigt.

Priorität des aktiven Alarms	Optische Alarmanzeige
Hohe Priorität – Patientenalarm	Rot blinkende LED
Mittlere Priorität – Technischer Alarm	Blinkende gelbe LED
Niedrige Priorität – Technischer Alarm	Dauerhaft leuchtende gelbe LED

Akustische Alarmanzeigen

Das X Series Gerät signalisiert durch seinen Alarmton, welche Prioritätsstufe der aktive Alarm mit der derzeit höchsten Priorität hat. Das X Series Gerät meldet die Prioritätsstufe des aktiven Alarms mit der derzeit höchsten Priorität laut der folgenden Alarmtontabelle.

Priorität des aktiven Alarms	Akustische Alarmanzeige	Alarm-Lautstärke
Hohe Priorität – Patientenalarm	Zweimal je fünf kurze Pieptöne, die alle 15 Sekunden wiederholt werden.	Die Lautstärke ist bis zu einem maximalen Schalldruck von mindestens 70 dBA (in 1 m Abstand) einstellbar.
Mittlere Priorität – Technischer Alarm	Jeweils drei längere Pieptöne, die alle 30 Sekunden wiederholt werden.	Die Lautstärke ist 3 bis 12 dBA leiser als ein Alarm hoher Priorität.
Niedrige Priorität – Technischer Alarm	Ein kurzer einzelner Piepton, der nicht wiederholt wird.	Die Lautstärke ist 3 bis 6 dBA leiser als ein Alarm mittlerer Priorität.

Akustische Alarmer können stummgeschaltet oder unterdrückt werden. Weitere Einzelheiten zum Stummschalten und Unterdrücken akustischer Alarmer sind weiter unten in diesem Kapitel zu finden.


Selbsttest der Alarmanzeigen

Das X Series Gerät führt beim Einschalten einen Selbsttest der akustischen und optischen Alarmanzeigen durch. Zur Kontrolle der ordnungsgemäßen Funktionsfähigkeit der Alarmer müssen beim Einschalten des Geräts zwei Alarmtöne zu hören sein und die grüne, die gelbe und die rote LED aufleuchten.

Patientenalarm-Anzeige

Wenn die Messungen der Vitalfunktionen eines Patienten einen Alarm auslösen, ertönt nicht nur der akustische Patientenalarm, sondern am X Series Gerät erscheint auch eine Alarmmeldung. Außerdem ändern sich die Darstellungseigenschaften der numerischen Anzeige für die Überwachungsfunktionen (der den Alarm auslösende Parameter erscheint rot auf weißem Hintergrund).

Im folgenden Beispiel ist der EtCO₂-Messwert (**22 mmHg**) unter den unteren Alarmgrenzwert (**EtCO₂-Alarm gering**) abgefallen:

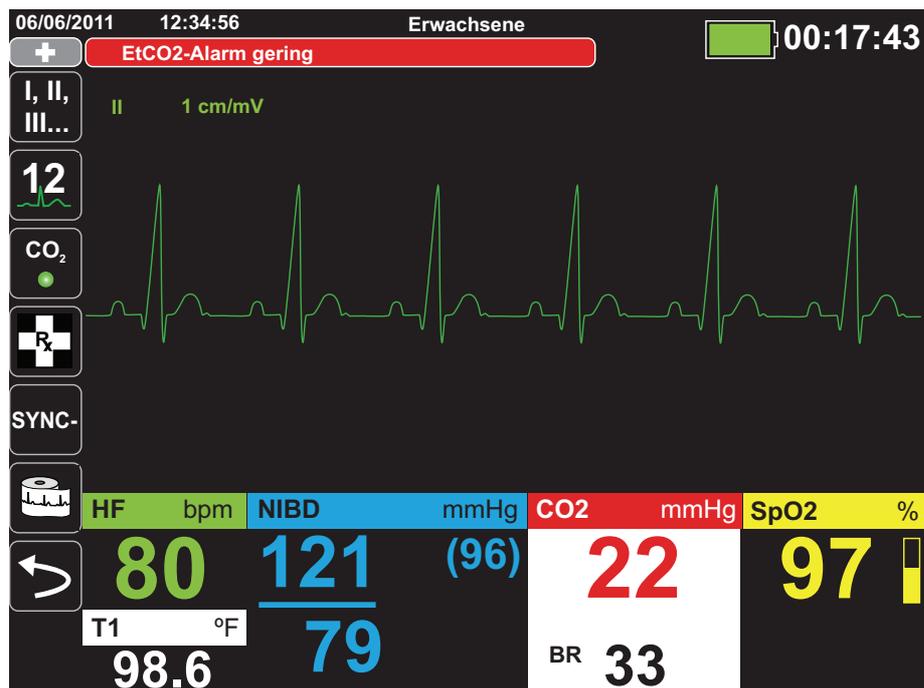

Alarmer bei lebensbedrohlichen Rhythmen

Wenn die LTA-Überwachung (Life Threatening Rhythm, lebensbedrohlicher Rhythmus) aktiviert ist, überwacht das X Series Gerät das EKG auf die folgenden lebensbedrohlichen Rhythmen: Asystolie, Kammerflimmern (VF), ventrikuläre Tachykardie (VT), extreme Bradykardie und extreme Tachykardie.

Je nach Konfiguration gibt das Gerät ggf. optische und akustische Alarmmeldungen aus.


Hinweis: Im AED-Modus steht die LTA-Überwachung nicht zur Verfügung.

Gerätealarm-Anzeige

Wenn durch eine Störung des X Series Geräts oder eines angeschlossenen Messfühlers ein Alarm ausgelöst wird, ertönt nicht nur ein akustischer Gerätealarm, sondern das X Series Gerät gibt auch eine Alarmmeldung (schwarzer Text auf gelbem Hintergrund) aus.

Warnung! Reagieren Sie immer sofort auf Systemalarmer, da der Patient während bestimmter Alarmzustände möglicherweise nicht überwacht wird.

Im folgenden Beispiel weist eine Geräte-Alarmmeldung darauf hin, dass der SpO₂-Sensor vom Gerät getrennt wurde (**SpO₂ - Sensor prüfen**):

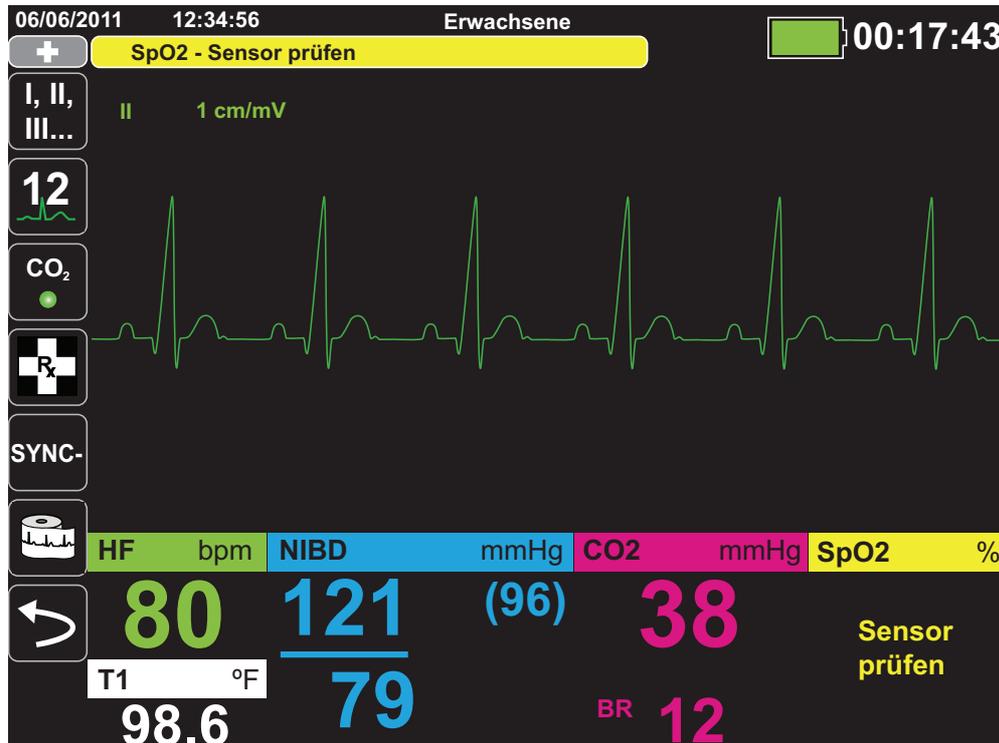

Reagieren auf aktive Alarmer – Stummschalten des Alarms

Wenn ein Patientenalarm ausgelöst wird und der Alarm ertönt

1. Kontrollieren Sie den Patienten und versorgen Sie ihn entsprechend.
2. Drücken Sie die Taste „Stummschaltung/Rücksetzung“ () an der Front des X Series Geräts, um den Alarm kurzzeitig (90 s) stummzuschalten.
3. Nachdem Sie den Patienten versorgt haben, müssen Sie kontrollieren, dass die gewünschten Alarmer eingestellt sind (weitere Hinweise zum Einstellen und Aktivieren von Alarmen finden Sie in den betreffenden Überwachungskapiteln weiter hinten in diesem Handbuch).

Hinweis: Durch Drücken von  wird der Alarmton für alle aktiven Alarmer unterdrückt. Wenn die Messungen der Vitalfunktionen des Patienten einen weiteren, diesmal aber anderen Alarm auslösen, ertönt der Alarm auch dann, wenn der Zeitraum, für den der erste Alarm stummgeschaltet wurde, noch nicht abgelaufen ist.

Reaktivieren eines Alarms

Möchten Sie einen Alarm vor Ablauf des Stummschaltungszeitraums wieder aktivieren, drücken Sie die Taste **Stummschaltung/Rücksetzung**.

Warnung! Schalten Sie den akustischen Alarm nicht stumm, wenn dadurch die Patientensicherheit gefährdet werden könnte.

Unterdrücken von Alarmen

Während Sie einen Patienten versorgen, möchten Sie vielleicht aktuelle oder zukünftige Patienten- und Gerätealarmer eine Zeit lang unterdrücken. Vorgehensweise zum Unterdrücken von Patientenalarmen

1. Drücken Sie die Schnellzugriffstaste „Weiter/Zurück“ () , um auf die zweite Gruppe der Schnellzugriffstasten zuzugreifen. Drücken Sie dann die Schnellzugriffstaste „Alarmer“.
2. Drücken Sie die Schnellzugriffstaste „Alarmunterdrückung“ () .

Während der Alarmunterdrückung sind keine Alarmtöne zu hören. Sollten während des Unterdrückungszeitraums jedoch Alarmer auftreten, gibt dies das X Series Gerät im Meldungsbereich optisch an (weißer Text auf rotem Hintergrund und rote Zahlen auf weißem Hintergrund).


Die Alarmer lassen sich 2, 4 sowie 15 Minuten oder auch unbegrenzt unterdrücken. Die Funktion der Alarmunterdrückung kann zudem deaktiviert werden.

Warnung! Bei Deaktivierung der Alarmtöne muss der Patient engmaschig überwacht werden.

Timer für die Alarmunterdrückung

Bei aktivierter Alarmunterdrückung läuft oben im Display neben dem Meldungsbereich ein Timer:

Timer für die Alarmunterdrückung

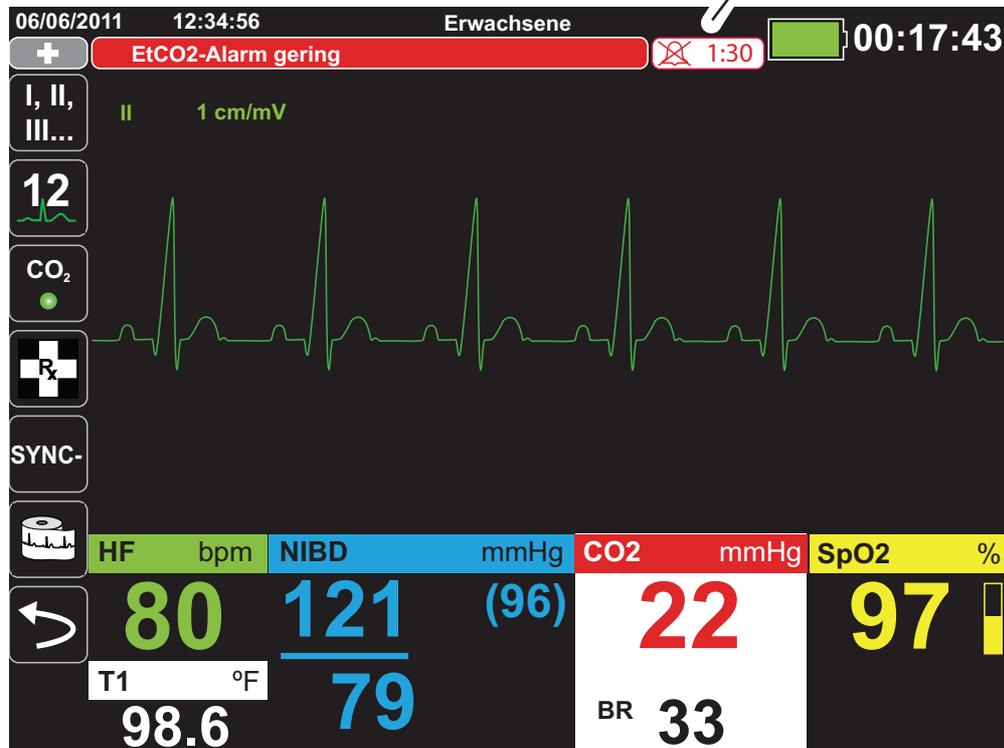

Alarmoptionen

Das X Series Gerät verfügt über Alarmoptionen, die über das Parameterbedienfeld auf Supervisor-Ebene festgelegt werden. (Der Zugriff auf die Supervisor-Ebene ist durch einen Passcode geschützt.)

Drücken Sie die Schnellzugriffstaste „Weiter/Zurück“ (↩), drücken Sie die Schnellzugriffstaste „Einrichten“ (⚙) und wählen Sie **Supervisor**. Wählen Sie mithilfe der Navigationstasten die vier Ziffern des Supervisor-Passcodes aus. Drücken Sie **SPEICHERN**, sobald Sie die Eingabe abgeschlossen haben. Nach Eingabe Ihres Supervisor-Passcodes haben Sie Zugriff auf die konfigurierbaren Optionen im Supervisor-Menü.

Wählen Sie **Alarmer**, um das Parameterbedienfeld für die Alarmer anzuzeigen:

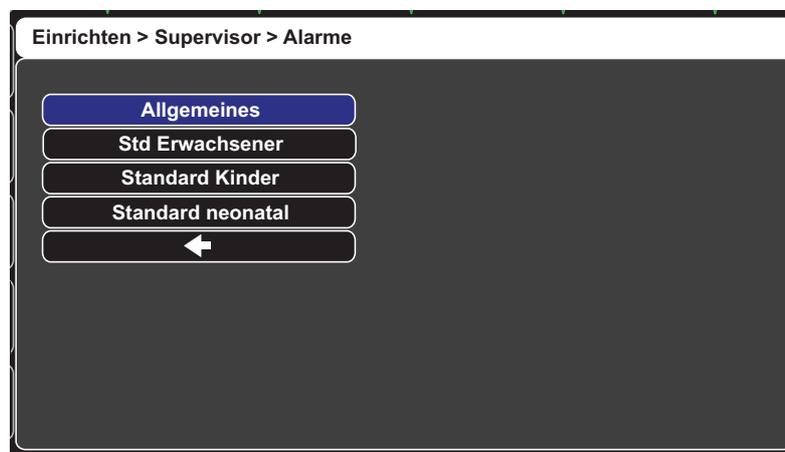


Abbildung 5-1 Parameterbedienfeld für die Alarmer

Auswählen der Standardalarmgrenzwerte

Mit den ersten drei Optionen – **Std Erwachsene**, **Standard Kinder** und **Standard neonatal** – können Sie *alle* Alarmgrenzwerte nach Patiententyp auf die werksseitigen Standardwerte des X Series Geräts festlegen.

- Warnung!**
- **Es besteht ein mögliches Risiko, falls für das gleiche oder ähnliche Geräte in ein und demselben Behandlungsbereich unterschiedliche Alarmgrenzwerte festgelegt werden.**
 - **Kontrollieren Sie bei jedem neuen Patienten, dass die derzeitigen Alarmgrenzwerte weiterhin angemessen sind.**
 - **Legen Sie als Alarmgrenzwerte keine solchen Extremwerte fest, dass das Alarmsystem überhaupt nicht mehr anspricht.**

Einstellen der Alarmgrenzwerte relativ zum Patienten – Option „Stat.“ (Schnelleinstellung)

Bei dem X Series Gerät können alle Alarmgrenzwerte relativ zu den derzeitigen Messwerten der Vitalfunktionen des Patienten eingestellt werden. Verfahren Sie dazu wie folgt:

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie die Schnellzugriffstaste „Alarm“ (.
3. Drücken Sie die Schnellzugriffstaste **Stat.** (). Das X Series Gerät stellt alle Parameter auf Basis der aktuellen Messwerte wie folgt auf einen neuen Wert ein:

Parameter (Einheit)	Bereich	Berechnung des oberen Alarmgrenzwerts	Berechnung des unteren Alarmgrenzwerts
HF/PF (bpm)	Messwert < 26	Grenzwert unverändert	Grenzwert = 25
	$26 \leq \text{Messwert} \leq 99$	Grenzwert = Messwert x 1,2	Grenzwert = Messwert x 0,8
	$100 \leq \text{Messwert} \leq 250$	Grenzwert = Messwert + 20	Grenzwert = Messwert – 20
	Messwert > 250	Grenzwert = 250	Grenzwert unverändert
IBD (mmHg)	Messwert < 26	Grenzwert = Messwert + 5	Grenzwert = Messwert – 5
	$26 \leq \text{Messwert} \leq 99$	Grenzwert = Messwert x 1,2	Grenzwert = Messwert x 0,8
	Messwert > 99	Grenzwert = Messwert + 20	Grenzwert = Messwert – 20
NIBD (mmHg)	Messwert < 26	Grenzwert = Messwert + 5	Grenzwert = Messwert – 5
	$26 \leq \text{Messwert} \leq 99$	Grenzwert = Messwert x 1,2	Grenzwert = Messwert x 0,8
	Messwert > 99	Grenzwert = Messwert + 20	Grenzwert = Messwert – 20

RR/BR (1/min.)	Messwert < 26	Grenzwert = Messwert + 5	Grenzwert = Messwert – 5
	$26 \leq \text{Messwert} \leq 99$	Grenzwert = Messwert x 1,2	Grenzwert = Messwert x 0,8
	Messwert > 99	Grenzwert = Messwert + 20	Grenzwert = Messwert – 20
SpO₂ (%)	Gesamter Bereich	Grenzwert = 100 (Erwachsene und Kinder) Grenzwert = Messwert + 5 (Neugeborene)	Grenzwert = Messwert – 5
SpCO (%)	Gesamter Bereich	Grenzwert = Messwert + 2 (Maximum: 40)	Grenzwert = Messwert – 2 (Minimum: 0)
SpMet (%)	Gesamter Bereich	Grenzwert = Messwert + 2 (Maximum: 15)	Grenzwert = Messwert – 2 (Minimum: 0)
EtCO₂ (mmHg)	Gesamter Bereich	Grenzwert = Messwert + 10	Grenzwert = Messwert – 5 mmHg <i>es sei denn</i> , der Messwert liegt unterhalb des kleinsten zulässigen unteren Alarmgrenzwerts. In diesem Fall setzt „Stat.“ den unteren Alarmgrenzwert auf 15 mmHg.
FiCO₂ (mmHg)	Gesamter Bereich	Grenzwert = Messwert + 5	---
Temp (°C)	Gesamter Bereich	Grenzwert = Messwert + 0,5	Grenzwert = Messwert – 0,5
Temp (°F)	Gesamter Bereich	Grenzwert = Messwert + 0,9	Grenzwert = Messwert – 0,9

Kapitel 6

EKG-Überwachung

Dieses Kapitel beschreibt die Verwendung des X Series Geräts für die EKG-Überwachung.

X Series Geräte können das EKG über 3-, 5- oder 12-Kanal-Kabel, Multifunktions-Pads oder Standard-Defibrillations-Paddles überwachen. Die EKG-Überwachung bei laufender Stimulation erfordert jedoch EKG-Patientenkabel und Elektroden.

Die EKG-Überwachung ist über eine Kabelkonfiguration mit 3, 5 oder 12 Ableitungen möglich. Hinweise zur 12-Kanal-Überwachung finden Sie in Kapitel 13, *12-Kanal-EKG-Überwachung*.

- Warnung!**
- **Übermäßige Körperbehaarung oder nasse, verschwitzte Haut kann die Elektrodenhaftung beeinträchtigen. Rasieren und trocknen Sie gegebenenfalls die Hautpartie, in der die Elektrode angebracht werden soll.**
 - **Verwenden Sie nur Elektroden, deren Mindesthaltbarkeitsdatum noch nicht abgelaufen ist.**
 - **Nehmen Sie die EKG-Elektroden erst unmittelbar vor dem Gebrauch aus der versiegelten Verpackung. Bereits verwendete bzw. abgelaufene Elektroden könnten die Qualität des EKG-Signals beeinträchtigen.**
 - **Überwachungselektroden können bei einer Defibrillatorentladung polarisiert werden, wodurch die EKG-Kurve kurzzeitig vom Bildschirm verschwindet. Um diesen Effekt zu minimieren, empfiehlt ZOLL Medical Corporation die Verwendung hochwertiger Silber/Silberchlorid-(Ag/AgCl)-Elektroden. Die Elektronik des Geräts sorgt dafür, dass die EKG-Kurve innerhalb weniger Sekunden wieder erscheint.**
 - **Setzen Sie ausschließlich von ZOLL zugelassenes Zubehör ein, um die Gefahr eines Stromschlags bei der Defibrillatorentladung zu vermeiden.**

- **Damit es zu keinem Stromschlag oder Störungen kommt, die von elektrischen Geräten in der näheren Umgebung stammen, müssen die Elektroden und Patientenkabel von geerdeten Metallteilen und anderen elektrischen Geräten ferngehalten werden.**
 - **Vermeiden Sie im Rahmen der Elektrochirurgie Verbrennungen an den Überwachungsstellen, indem Sie den ordnungsgemäßen Anschluss der indifferenten Elektrode sicherstellen. Somit kann kein Strom durch die Überwachungselektroden oder Sonden fließen.**
 - **Kontrollieren Sie regelmäßig den Betrieb und die Unversehrtheit des X Series Geräts sowie des EKG-Kabels, was am besten mit der täglichen Betriebsnachweisprüfung gelingt.**
 - **Herzstillstand und andere Arrhythmien können bei Patienten mit implantiertem Herzschrittmacher dazu führen, dass die Herzfrequenzmessung des Geräts nicht die Eigenfrequenz des Herzens, sondern die Schrittmacherfrequenz misst. Daher müssen Schrittmacherpatienten genauestens beobachtet werden. Prüfen Sie den Puls des Patienten, und verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf die Herzfrequenzanzeige. Selbst die spezielle Geräteelektronik zur Erkennung eines Herzschrittmachers erkennt möglicherweise nicht alle Impulse des implantierten Schrittmachers. Anamnese und körperliche Untersuchung liefern wichtige Hinweise, ob ein Herzschrittmacher implantiert ist.**
-

Einrichten der EKG-Überwachung

Die korrekte Anlage und Platzierung der Elektroden ist für eine qualitativ hochwertige EKG-Überwachung von entscheidender Bedeutung. Ein guter Kontakt zwischen Elektrode und Haut minimiert Bewegungsartefakte und Signalinterferenzen.

Das folgende Verfahren beschreibt die Überwachung eines Patienten mittels 3- bzw. 5-Kanal-EKG-Kabel. Weitere Informationen zur Anwendung und Verwendung von Multifunktions-Pads und externen Paddles, mit denen das EKG ebenfalls überwacht werden kann, finden Sie in Kapitel 14, *Manuelle Defibrillation*.

Gehen Sie zur Überwachung eines Patienten mittels 3- oder 5-Kanal-EKG-Kabel wie folgt vor:

1. Bereiten Sie die Haut des Patienten für das Anlegen der Elektroden vor.
2. Legen Sie die Elektroden-Pads am Patienten an.
3. Verbinden Sie jede Ableitung des EKG-Kabels mit der betreffenden Elektrode.
4. Stecken Sie den Stecker des Patientenkabels in den EKG-Eingang des X Series Geräts.
5. Wählen Sie die EKG-Kurven aus, die in der Kurvenanzeige erscheinen sollen.
6. Beobachten Sie das Elektrokardiogramm des Patienten im Display und ändern Sie ggf. die Größe der EKG-Kurve.

Vorbereiten des Patienten auf das Anlegen der Elektroden

Die korrekte Anlage der Elektroden ist für eine qualitativ hochwertige EKG-Überwachung von entscheidender Bedeutung. Ein guter Kontakt zwischen Elektrode und Haut minimiert Bewegungsartefakte und Signalinterferenzen.

Bereiten Sie vor dem Anlegen der Elektroden bei Bedarf die Haut des Patienten vor:

- Entfernen Sie übermäßige Behaarung an der für das Anlegen der Elektrode vorgesehenen Hautpartie (Rasieren oder Abschneiden).
- Reinigen Sie fettige Haut mit einem Alkoholtupfer.
- Reiben Sie die Haut gut trocken.

Anlegen der Elektroden am Patienten

Die folgenden Abschnitte veranschaulichen, wo die Kabelelektroden zur Überwachung mittels 3- bzw. 5-Kanal- EKG-Kabel platziert werden müssen. Platzieren Sie die Elektroden bei einem 3-Kanal-Kabel wie in Abbildung 4-1, *Elektrodenplatzierung bei einer 3-Kanal-Ableitung*, dargestellt. Platzieren Sie die Elektroden bei einem 5-Kanal-Kabel wie in Abbildung 4-2, *Elektrodenplatzierung bei einer 5-Kanal-Ableitung*, dargestellt.

Vermeiden Sie es, die Elektroden über Sehnen oder großen Muskelmassen zu platzieren.

Stellen Sie sicher, dass die EKG-Elektroden so platziert werden, dass erforderlichenfalls eine Defibrillation durchgeführt werden kann.

Elektrodenplatzierung bei einer 3-Kanal-Ableitung

Je nach lokalen Gegebenheiten sind EKG-Ableitungen mit RA, LA und LL oder mit R, L und F gekennzeichnet. Die folgende Tabelle enthält die Kennzeichnungen und Farbcodes für die verschiedenen Kabelsätze.

AHA-Farbcodierung	IEC-Farbcodierung	Platzierung der Elektroden
RA/Weiße Elektrode	R/Rote Elektrode	Platzierung nahe der rechten Medioklavikularlinie unmittelbar unterhalb des Schlüsselbeins
LA/Schwarze Elektrode	L/Gelbe Elektrode	Platzierung nahe der linken Medioklavikularlinie unmittelbar unterhalb des Schlüsselbeins
LL/Rote Elektrode	F/Grüne Elektrode	Platzierung zwischen dem 6. und 7. Interkostalraum auf der linken Medioklavikularlinie

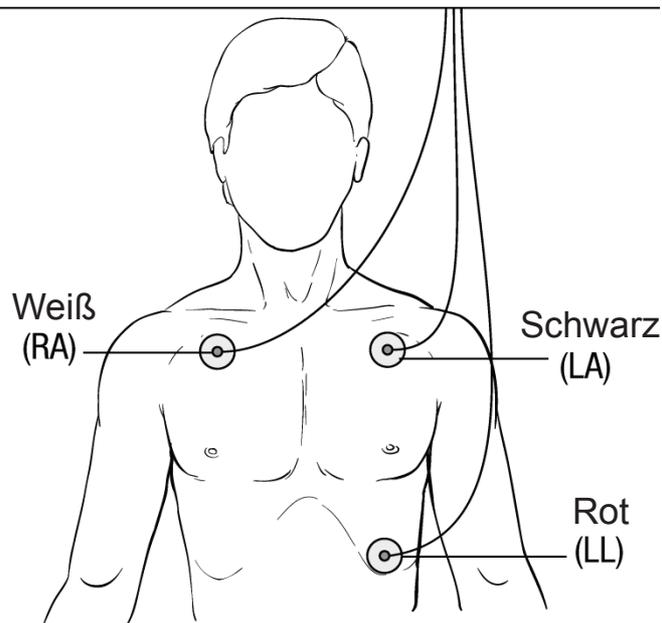


Abbildung 6-1 Elektrodenplatzierung bei einer 3-Kanal-Ableitung

Elektrodenplatzierung bei einer 5-Kanal-Ableitung

Je nach den lokalen Gegebenheiten sind die EKG-Ableitungen entweder mit RA, LA, LL, RL und V oder mit R, L, F, N und C gekennzeichnet. Die folgende Tabelle enthält die Kennzeichnungen und Farbcodes für die verschiedenen Kabelsätze.

AHA-Farbcodierung	IEC-Farbcodierung	Platzierung der Elektroden
RA/Weiße Elektrode	R/Rote Elektrode	Platzierung nahe der rechten Medioklavikularlinie unmittelbar unterhalb des Schlüsselbeins
LA/Schwarze Elektrode	L/Gelbe Elektrode	Platzierung nahe der linken Medioklavikularlinie unmittelbar unterhalb des Schlüsselbeins
LL/Rote Elektrode	F/Grüne Elektrode	Platzierung zwischen dem 6. und 7. Interkostalraum auf der linken Medioklavikularlinie
RL/Grüne* Elektrode	N/Schwarze* Elektrode	Platzierung zwischen dem 6. und 7. Interkostalraum auf der rechten Medioklavikularlinie

AHA-Farbcodierung	IEC-Farbcodierung	Platzierung der Elektroden
V/Braune* Elektrode	C/Weiße* Elektrode	<p>Einzelne bewegliche Brustkorbelektrode. Platzieren Sie diese Elektrode wie in der folgenden Abbildung dargestellt an einer der Positionen V1 bis V6.</p> <p>V1 – 4. Interkostalraum rechts parasternal</p> <p>V2 – 4. Interkostalraum links parasternal</p> <p>V3 – Mittig zwischen V2 und V4</p> <p>V4 – 5. Interkostalraum in der Medioklavikularlinie</p> <p>V5 – Auf gleicher Höhe wie V4 in der linken ventralen Axillarlinie</p> <p>V6 – Auf gleicher Höhe wie V4 in der mittleren Axillarlinie</p>

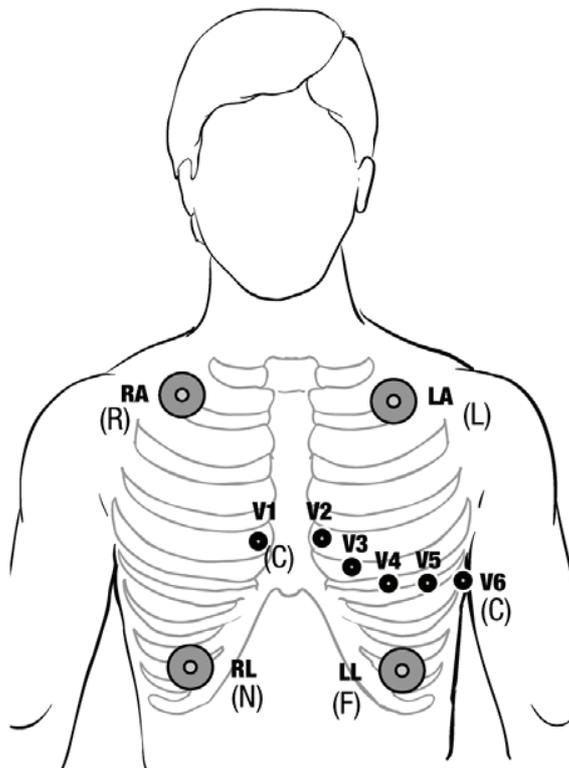


Abbildung 6-2 Elektrodenplatzierung bei einer 5-Kanal-Ableitung

Anschließen des EKG-Kabels an das X Series Gerät

Das X Series Gerät kann mit Welch Allyn Propaq® EKG-Kabeln sowie mit ZOLL X Series EKG-Kabeln eingesetzt werden. Schließen Sie das EKG-Kabel wie folgt an den EKG-Anschluss an der linken Seite des X Series Geräts an:


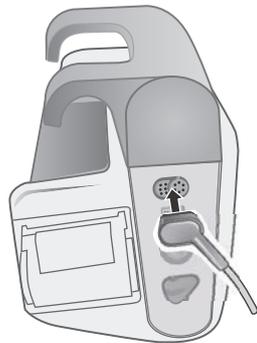


Abbildung 6-3 Anschließen des EKG-Kabels an das X Series Gerät


Auswählen der anzuzeigenden EKG-Kurven

Das X Series Display kann bis zu vier Kurven anzeigen. Die erste Kurve oben auf der Anzeige ist immer eine EKG-Kurve. Im folgenden Beispiel stammt die EKG-Kurve von Ableitung II (RA-LL):

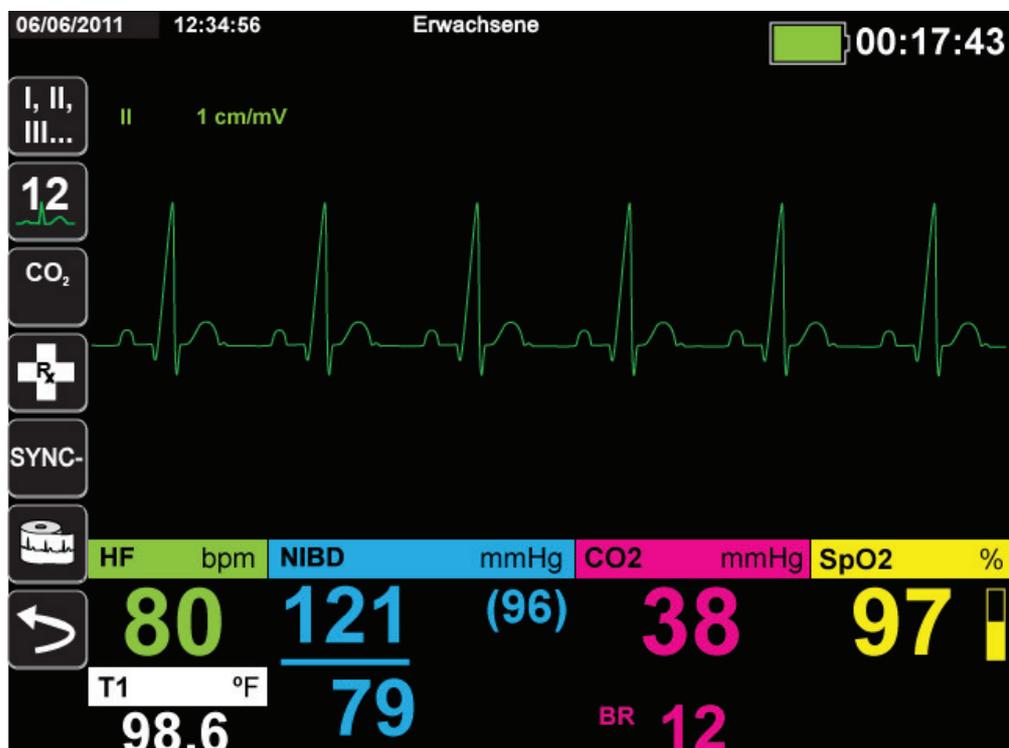

Die Festlegung, welche Ableitung die Quelle der primären EKG-Kurve ist, kann auf zweierlei Weise erfolgen. Eine Möglichkeit besteht darin, die Schnellzugriffstaste „EKG-Ableitungsauswahl“  zu drücken, um die verfügbaren EKG-Kurvenquellen anzuzeigen. Die verfügbaren Kurvenquellen werden durch den Typ des am Gerät angeschlossenen EKG-Kabels bestimmt.

Bei der anderen Vorgehensweise zum Festlegen der Quelle der primären Kurve wird die Bezeichnung der Quelle der primären EKG-Kurve (im folgenden Bildschirm Ableitung I) gewählt. Das X Series Gerät zeigt dann die verfügbaren EKG-Kurvenquellen an. Das folgende Beispiel veranschaulicht die Liste der Kurvenquellen, die das X Series Gerät bei angeschlossenem 5-Kanal-EKG-Kabel anzeigt. Die Liste der verfügbaren EKG-Kurvenquellen umfasst die Ableitungen I, II, III, aVR, aVL, aVF und V. Sie können Ableitung II (Standard) auswählen oder mithilfe der Navigationstasten eine andere angezeigte EKG-Elektrode als Quelle für die Kurven markieren und aufrufen.

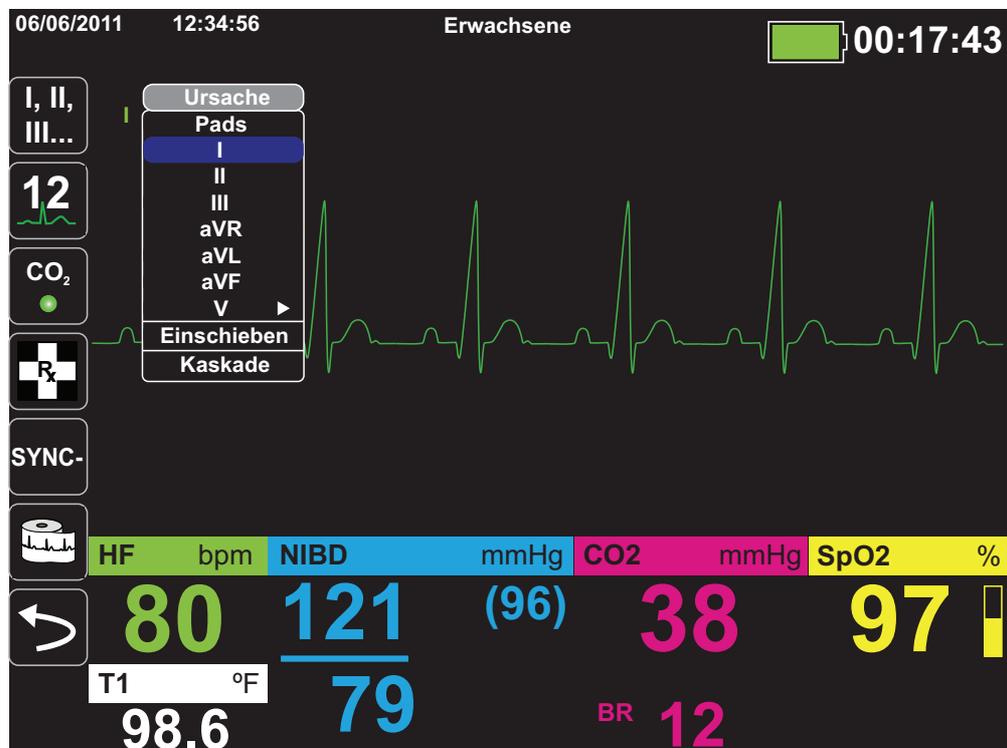


Sobald Sie eine aktuelle Kurvenquelle auswählen, wird die Kurve sofort auf dem Gerät angezeigt. Bei Auswahl einer derzeit nicht verfügbaren Kurvenquelle wird die Meldung *LEAD-FEHLER* angezeigt.

Weitere Informationen zur Konfiguration der Kurvenanzeige auf dem X Series-Gerät finden Sie in Kapitel 3, *Überwachung – Übersicht*.

Auswählen der Kurvengröße

Bei dem X Series Gerät ist es möglich, durch Auswahl der Kurvengröße die Größe der angezeigten EKG-Kurve anzupassen.

Markieren Sie mithilfe der Navigationstasten die gewünschte Kurvengröße rechts neben dem Ableitungsnamen und rufen Sie sie auf:

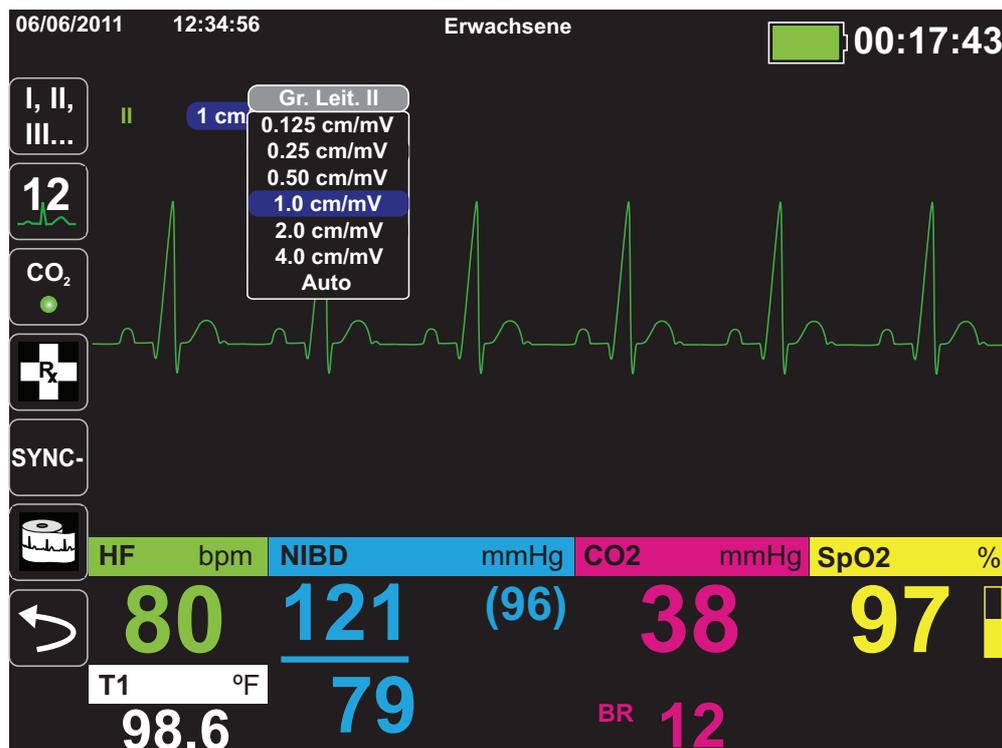

Die Standard-Kurvengröße beträgt **1 cm/mV**. Sie können auf Wunsch eine größere (**2,0, 4,0 cm/mV**) oder kleinere (**0,125, 0,25, 0,50 cm/mV**) Kurvengröße wählen. Sie können auch festlegen, dass das X Series Gerät selbstständig die bestmögliche Kurvengröße auswählt (**Auto**).

EKG-Überwachung und Schrittmacher

Bei der EKG-Überwachung eines Patienten mit implantiertem Schrittmacher kann die Schrittmacheranzeigefunktion des Geräts auf vorliegende Herzschrittmachersignale hinweisen.

Steht die Einstellung „Schrittmacheranzeige“ auf **EIN**, führt das X Series Gerät die folgenden Maßnahmen durch:

- Erkennung der Impulse implantierter Schrittmacher
- Ausblenden der störenden Schrittmacherimpulse aus der EKG-Kurve, so dass die QRS-Komplexe präzise erfasst werden
- Markieren erkannter Schrittmachersignale durch vertikale gestrichelte Linien im Display und im Ausdruck

Steht die Einstellung „Schrittmacheranzeige“ auf **AUS**, führt das X Series Gerät die folgenden Maßnahmen nicht durch:

- Erkennung der Impulse implantierter Schrittmacher
- Ausblenden der Schrittmacherimpulse in der Kurve
- Markieren erkannter Schrittmachersignale durch vertikale gestrichelte Linien im Display und im Ausdruck

Die Aktivierung bzw. Deaktivierung der Einstellung „Schrittmacheranzeige“ erfolgt im Menü „Einrichten“ > „EKG“.

In bestimmten Situationen könnte es vorkommen, dass EKG-Artefakte fälschlicherweise als Schrittmachersignale erkannt und ausgeblendet werden. Da diese Situationen zu ungenauer QRS-Erkennung führen könnten, ist es möglicherweise ratsam, die Einstellung „Schrittmacheranzeige“ auf **AUS** zu stellen. Umgekehrt kann es auch vorkommen, dass Signale eines implantierten Schrittmachers zu einer ungenauen QRS-Erkennung führen können, wenn die Einstellung „Schrittmacheranzeige“ auf **AUS** eingestellt ist. In diesem Fall ist es ratsam, die Einstellung „Schrittmacheranzeige“ zu aktivieren.

EKG-Systemmeldungen

Während der EKG-Überwachung zeigt das X Series Gerät möglicherweise die folgenden Meldungen an:


Systemmeldung	Ursache
<i>LEAD-FEHLER</i>	Das Kabel der aktuellen EKG-Quelle ist defekt (kontrollieren Sie das Kabel und tauschen Sie es ggf. aus). -- ODER -- Für die Kurvenanzeige wurde eine nicht verfügbare Kurvenquelle festgelegt (überprüfen Sie die angegebene Kurvenquelle und korrigieren Sie sie ggf.).
<i>PADDLE-FEHLER</i> oder <i>KABELFEHLER</i>	Überprüfen Sie das Pad, das Paddle oder das Kabel, und ersetzen Sie es bei Bedarf.

Kapitel 7

Überwachung von Atmung (Resp) und Herzfrequenz (HF)

Dieses Kapitel beschreibt die Verwendung des X Series Geräts für die Überwachung von Atmung (**Resp**) und Herzfrequenz (**HF**).

Das X Series Gerät besitzt Anzeigen für Atmung (**Resp**) und Herzfrequenz (**HF**). Die Anzeigen für Atemfrequenz und Herzfrequenz zeigen Werte an, die das X Series Gerät von den Messwerten anderer X Series Überwachungsfunktionen ableitet.

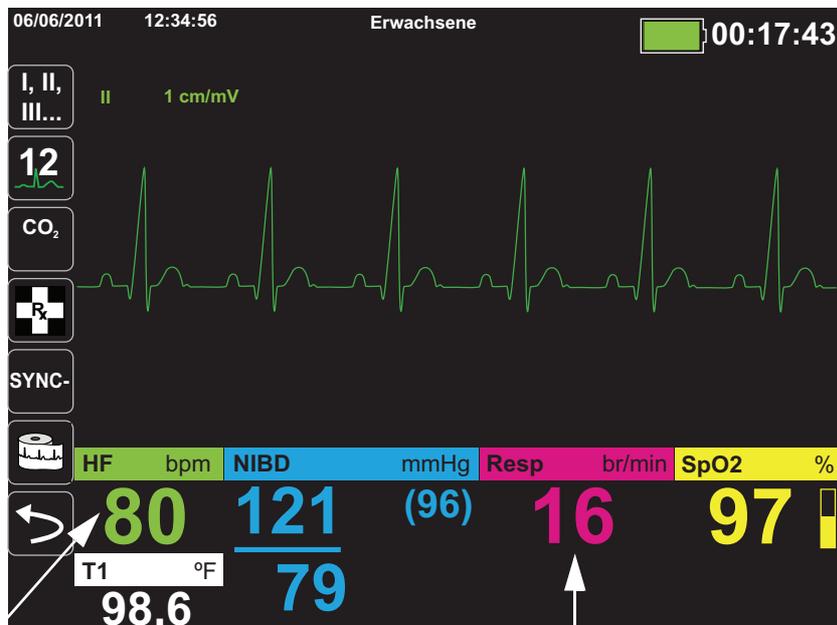

Herzfrequenz-anzeige

Atemfrequenzanzeige

Hinweis: Während einer Defibrillation erfolgt keine Bestimmung der Atemfrequenz. Im Snapshot wird die Atemfrequenz während einer Defibrillation als „???“ dargestellt.

Atemfrequenzanzeige

Bei aktivierter Atemfrequenzanzeige zeigt das X Series Gerät in der Atemfrequenzanzeige die Atmung des Patienten an.



Die Atemfrequenzanzeige zeigt die Atemfrequenz an, die standardmäßig aus der CO₂-Überwachungsfunktion des Geräts abgeleitet wurde. Wenn keine CO₂-Überwachung verfügbar ist, leitet das Gerät die Atemfrequenz mittels einer vorgegebenen EKG-Elektrodenkonfiguration über *Impedanzpneumografie* ab. Bei nicht funktionierender EKG-Überwachung zeigt die **Resp/BR**-Anzeige auch keine Atemfrequenz an.

Atemfrequenzmessung mittels Impedanzpneumografie

Bei der Atemfrequenzmessung mittels Impedanzpneumografie wird ein hochfrequentes Wechselstromsignal geringer Stromstärke an den Patienten angelegt und die Impedanzänderung in EKG-Ableitung I (RA-LA) oder II (RA-LL) gemessen. Beim Einatmen nimmt das Thoraxvolumen des Patienten zu und die Impedanz wird größer, beim Ausatmen nimmt die Impedanz ab.

-
- Warnung!**
- Die Impedanzpneumografie erkennt die Atembewegung durch die Änderungen im Thoraxvolumen. Episoden ohne Atemzüge werden bei fortgesetzter Atemanstrengung jedoch möglicherweise nicht erkannt. Daher ist es bei der Überwachung der Atemfrequenz mittels Impedanzpneumografie wichtig, immer auch die SpO₂-Überwachung und -Alarmer zu aktivieren.
 - Genauso wie bei anderen Monitoren, welche die Atemanstrengung mittels Impedanzpneumografie überwachen, können die durch Patientenbewegung, Beben der Apnoe-Matratze oder elektrochirurgische Anwendungen verursachten Artefakte dazu führen, dass Apnoe-Episoden unbemerkt bleiben. Daher ist es bei der Überwachung der Atemfrequenz mittels Impedanzpneumografie wichtig, immer auch die SpO₂-Überwachung und -Alarmer zu aktivieren.
 - Bei der Impedanzpneumografie darf das X Series Gerät keinesfalls mit einem anderen Atemmonitor am gleichen Patienten verwendet werden. Die Monitor signale könnten sich gegenseitig stören.
 - Die Impedanzpneumografie kann bei Patienten mit Schrittmachern *nicht* empfohlen werden, da die Schrittmacherimpulse fälschlicherweise als Atemzüge gezählt werden könnten.
 - Es wird nicht empfohlen, die Impedanzpneumografie bei hochfrequenter Beatmung einzusetzen.
 - Da die Impedanzpneumografie dieselben Elektroden wie der EKG-Kanal verwendet, bestimmt das X Series Gerät, bei welchen Signalen es sich um kardiovaskuläre Artefakte handelt und welche Signale das Ergebnis der Atemanstrengung sind. Weicht die Atemfrequenz nicht mehr als fünf Prozent von der Herzfrequenz ab, ignoriert der Monitor möglicherweise Atemzüge und löst einen Atemalarm aus.
-

Konfigurieren der Alarme und Einstellungen für die Atemüberwachung (RR/BR)

Das X Series Gerät ermöglicht es, den Alarm für die Atemfrequenz (**RR/BR**) zu aktivieren und zu deaktivieren, Alarmgrenzwerte einzustellen und die EKG-Überwachungsquelle für die Atemfrequenz festzulegen.

Aktivieren/Deaktivieren des RR/BR-Alarmes und Einstellen der Alarmgrenzwerte

Sofern aktiviert, gibt das X Series Gerät immer dann einen akustische Alarm aus, wenn die Atemfrequenz des Patienten die hierfür eingestellten Alarmgrenzwerte über- bzw. unterschreitet.

Über die Schnellzugriffstaste „Alarme“ () oder das Parameterbedienfeld **Resp** können Sie Atemalarme aktivieren (oder deaktivieren) sowie den oberen und den unteren Alarmgrenzwert festlegen.

So konfigurieren Sie **RR/BR**-Alarme über die Schnellzugriffstaste **Alarme**:

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie .
3. Drücken Sie die Schnellzugriffstaste **Grenz.** (). Markieren Sie mithilfe der Navigationstasten die Menüoption **RR/BR-Alarm** und rufen Sie sie auf.
4. Wählen Sie mithilfe der Navigationstasten im Menü der Alarm-Einstellungen für **RR/BR** die Felder aus, die Sie ändern möchten:
 - **Obergrenze aktivieren**
 - **Untergr. aktivieren**
 - **Obergrenze**
 - **Untergrenze**
5. Nach Änderung der Werte im Alarmmenü navigieren Sie zum Zurück-Pfeil, um die Einstellungen zu bestätigen und das Menü zu verlassen.

Atemfrequenz-Alarmgrenzwerte

Im Menü **Resp-Alarm-Einstellungen** wird initial festgelegt, ob der Atemfrequenz-Alarm aktiviert (**EIN**) oder deaktiviert (**AUS**) ist; außerdem werden hier die Standardeinstellungen für den oberen und den unteren Alarmgrenzwert angezeigt. Der obere und der untere Grenzwert können auf **EIN** oder auf **AUS** eingestellt werden (die Standardeinstellung ist **AUS**). In der folgenden Tabelle werden die Standardgrenzwerte für den Atemfrequenz-Alarm für Erwachsene, Kinder und Neugeborene aufgelistet. Auch wird der Bereich angegeben, in dem diese Grenzwerte festgelegt werden können:

Patiententyp	Standardgrenzwerte für den Atemfrequenz-Alarm	Einstellbereich für die Grenzwerte für den Atemfrequenz-Alarm
Erwachsene	Unterer Grenzwert: 3 AZ/min Oberer Grenzwert: 50 AZ/min	Unterer Grenzwert: 0 bis 145 AZ/min Oberer Grenzwert: 5 bis 150 AZ/min
Kinder	Unterer Grenzwert: 38 AZ/min Oberer Grenzwert: 50 AZ/min	Unterer Grenzwert: 0 bis 145 AZ/min Oberer Grenzwert: 5 bis 150 AZ/min
Neugeborene	Unterer Grenzwert: 12 AZ/min Oberer Grenzwert: 80 AZ/min	Unterer Grenzwert: 0 bis 145 AZ/min Oberer Grenzwert: 5 bis 150 AZ/min

Verwendung des Parameterbedienfelds „Resp“

Zur Alarmkonfiguration im Parameterbedienfeld **Resp** wählen Sie mithilfe der Navigationstasten die Atemfrequenzanzeige und rufen so das Parameterbedienfeld **Resp** auf:

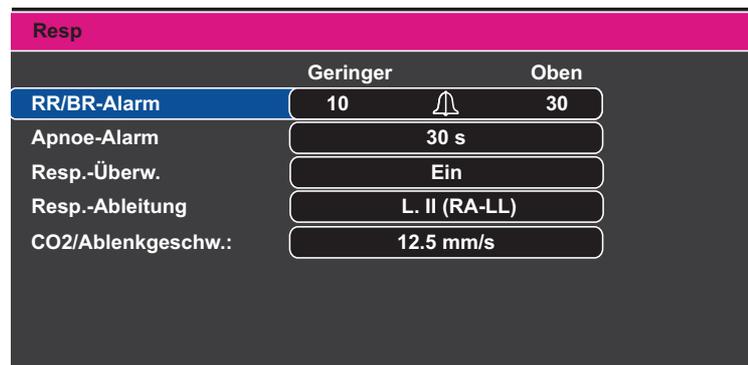


Abbildung 7-1 Parameterbedienfeld „Resp“

Im Parameterbedienfeld **Resp** können die folgenden Parameter festgelegt werden:

- **RR/BR-Alarm** – Aktivieren/Deaktivieren des Atemfrequenzalarms und Einstellen des oberen und des unteren Alarmgrenzwerts.
- **Apnoe-Alarm** – Festlegen der Dauer des Apnoe-Alarms.
- **Resp.-Überw.** – Aktivieren/Deaktivieren der Atmungsüberwachung.
- **Resp.-Ableitung** – Auswahl der Ableitung (I (RA-LA) oder II (RA-LL)), über die das X Series Gerät die Atemfrequenz berechnet. Die Ableitung für die Atmungsüberwachung kann unabhängig von der EKG-Ableitung festgelegt werden.
- **CO2/Ablenkgeschw.** – Festlegen der respiratorischen Laufgeschwindigkeit im Display.


Aktivieren/Deaktivieren der Atmungsüberwachung

Zum Aktivieren oder Deaktivieren der Atmungsüberwachung wählen Sie den Parameter **Resp.-Überw.** Wenn „Resp.-Überw.“ auf „Ein“ (Standardeinstellung) eingestellt ist, zeigt das X Series Gerät die Atemfrequenz an. Steht die Einstellung auf „Aus“, blendet das X Series die Atemfrequenzanzeige aus.

Warnung! Bei Anwendung der Impedanzpneumografie unterdrückt das X Series Gerät automatisch kardiovaskuläre Artefakte. Diese Funktion setzt die genaue Erkennung der R-Zacken im EKG voraus. Wird die Atmung mittels Impedanzpneumografie überwacht, müssen Sie daher immer die EKG-Ableitung wählen, bei der die QRS-Komplexe am stärksten ausgeprägt sind.

Herzfrequenzanzeige

Die Herzfrequenzanzeige zeigt die Herzfrequenz an, die aus der EKG-Überwachungsfunktion (standardmäßig) oder aus einer von Ihnen festgelegten Überwachungsfunktion abgeleitet wird. Stehen keine EKG-Messwerte bzw. keine Messwerte einer anwenderdefinierten Überwachungsfunktion zur Verfügung, wird die Herzfrequenz aus den nachstehenden Überwachungsfunktionen (in dieser Reihenfolge) abgeleitet: anwenderdefinierte Standardquelle, EKG, IBD-Kanal 1, SpO₂, IBD-Kanal 2, IBD-Kanal 3 und NIBD. Wenn als Quelle das EKG verwendet wird, trägt die Herzfrequenzanzeige die Bezeichnung **HF** (wie nachstehend dargestellt). Wird eine andere Quelle verwendet, trägt sie die Bezeichnung **PF**.

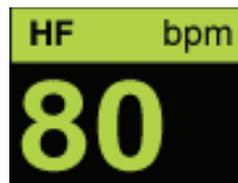

Konfigurieren der Alarme der Herzfrequenzanzeige (HF)

Das X Series Gerät ermöglicht es, den Herzfrequenzalarm (HF-Alarm) zu aktivieren und zu deaktivieren, Alarmgrenzwerte einzustellen und einen Herzfrequenzton auszuwählen.

Aktivieren/Deaktivieren von Herzfrequenzalarmen und Einstellen der Alarmgrenzwerte

Sofern aktiviert, gibt das X Series Gerät immer dann akustische Alarme aus, wenn die Herzfrequenz des Patienten die für die Herzfrequenz eingestellten Alarmgrenzwerte über- bzw. unterschreitet.

Über die Schnellzugriffstaste „Alarme“ () oder das **Parameterbedienfeld HF/PF** können Sie Herzfrequenzalarme aktivieren (oder deaktivieren) sowie den oberen und den unteren Alarmgrenzwert festlegen.

So konfigurieren Sie HF-Alarme über die Schnellzugriffstaste **Alarme**:

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie .
3. Drücken Sie .
4. Rufen Sie mithilfe der Navigationstasten die Menüoption **HF/PF-Alarm** auf.
5. Wählen Sie mithilfe der Navigationstasten im Menü „HF/PF-Alarm-Einstellungen“ die Felder aus, die Sie ändern möchten:
 - **Obergrenze aktivieren**
 - **Untergr. aktivieren**
 - **Obergrenze**
 - **Untergrenze**

 Nach Änderung der Werte im Alarmmenü navigieren Sie zum Zurück-Pfeil, um die Einstellungen zu bestätigen und das Menü zu verlassen.

Herzfrequenz-(HF/PF)-Alarmgrenzwerte

Im Menü „HF/PF-Alarm-Einstellungen“ wird initial festgelegt, ob der HF/PF-Alarm aktiviert (**EIN**) oder deaktiviert (**AUS**) ist; außerdem werden hier die Standardeinstellungen für den oberen und den unteren Alarmgrenzwert angezeigt. Der obere und der untere Grenzwert können auf **EIN** oder auf **AUS** eingestellt werden (die Standardeinstellung ist **AUS**). In der folgenden Tabelle werden die Standardgrenzwerte für den Herzfrequenz-Alarm für Erwachsene, Kinder und Neugeborene aufgelistet. Auch wird der Bereich angegeben, in dem diese Grenzwerte festgelegt werden können:

Patiententyp	Standardgrenzwerte für den Herzfrequenz-Alarm	Einstellbereich für die Grenzwerte für den Herzfrequenz-Alarm
Erwachsene	Unterer Grenzwert: 50 bpm Oberer Grenzwert: 120 bpm	Unterer Grenzwert: 20 bis 298 bpm Oberer Grenzwert: 22 bis 300 bpm
Kinder	Unterer Grenzwert: 50 bpm Oberer Grenzwert: 150 bpm	Unterer Grenzwert: 20 bis 298 bpm Oberer Grenzwert: 22 bis 300 bpm
Neugeborene	Unterer Grenzwert: 100 bpm Oberer Grenzwert: 200 bpm	Unterer Grenzwert: 20 bis 298 bpm Oberer Grenzwert: 22 bis 300 bpm

Verwendung des Parameterbedienfelds „HF/PF“

Zur Alarmkonfiguration im Parameterbedienfeld „HF/PF“ wählen Sie mithilfe der Navigationstasten die Herzfrequenzanzeige und rufen so das Parameterbedienfeld „HF/PF“ auf.

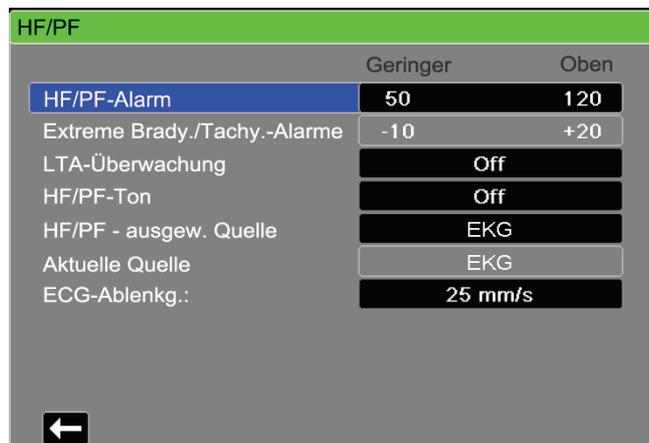


Abbildung 7-2 Parameterbedienfeld „HF/PF“

Nach Aufrufen der Option **HF/PF-Alarm** erscheint das Menü **HF/PF-Alarm-Einstellungen**, wo Sie die Herzfrequenzalarmer aktivieren/deaktivieren und die Alarmgrenzwerte festlegen können.

Kapitel 8

Nichtinvasive Blutdruck-Überwachung (NIBD)

Bei dem X Series NIBD-Eingang handelt es sich um eine defibrillatorsichere Patientenverbindung Typ CF.

Dieses Kapitel beschreibt die Verwendung des X Series Geräts für die nichtinvasive Messung des arteriellen Blutdrucks mittels einer aufblasbaren Manschette.

Das X Series Gerät verwendet die erweiterten NIBD-Funktionen sowie die bewegungstolerante SureBP- und die patentierte Smartcuf-Technologie von Welch Allyn.

Zur Anwendung des Smartcuf-Filters muss das X Series Gerät eine EKG-Überwachung durchführen.

Mit der SureBP-Überwachungssoftware kann das X Series Gerät NIBD-Messungen durchführen, während die Manschette aufgeblasen wird, was Zeit spart – die Messung dauert nur ca. 15 Sekunden – und für den Patienten angenehmer ist.

Durch Synchronisation der NIBD-Messungen mit der R-Zacke des Patienten-EKGs kann das X Series Gerät mit der Smartcuf-Überwachungssoftware auch bei extremen Artefakten, schwachem Puls und bestimmten Dysrhythmien präzise NIBD-Messungen vornehmen.

Hinweis: Da das X Series Gerät für die Erkennung von Artefakten das EKG nutzt, müssen Sie EKG-Aufzeichnung und NIBD-Überwachung simultan einsetzen.

-
- Warnung!**
- **Kontrollieren Sie die Extremität des Patienten regelmäßig, ob etwa die Durchblutung über längere Zeiträume hinweg beeinträchtigt ist.**
 - **Mit dem X Series darf keinesfalls ein Patient NIBD-überwacht und gleichzeitig das EKG eines anderen Patienten überwacht werden.**
 - **Wenn das Ergebnis einer nichtinvasiven Blutdruckmessung fragwürdig erscheint, wiederholen Sie die Messung. Wenn Sie das Ergebnis nach wiederholter Messung weiterhin nicht überzeugt, sollten Sie auf ein anderes Verfahren umsteigen.**

- **Verwenden Sie die NIBD-Option nicht ohne entsprechende Schulung. Vergewissern Sie sich, dass der korrekte Patientenmodus ausgewählt wurde, damit der anfängliche Manschettenfülldruck korrekt eingestellt wird. Patientenbewegungen, sehr geringes Pulsvolumen oder Schwingungen aufgrund externer Ursachen können die Genauigkeit von Blutdruckmessungen beeinflussen.**
 - **Bei Einsatz einer Herzlungenmaschine dürfen keine NIBD-Messungen durchgeführt werden.**
 - **Beim Durchführen des NIBD-Tests im Service-Menü sind einige oder alle NIBD-Sicherheitsfunktionen deaktiviert. Führen Sie keine NIBD-Tests durch, während die Manschette am Patienten angelegt ist.**
-

Funktionsweise der NIBD-Option

Blutdruckmanschette und -schlauch werden am NIBD-Anschluss an der Seite des Geräts an das X Series Gerät angeschlossen. Die NIBD-Taste an der Gerätefront startet und beendet Blutdruckmessungen. Die Werte werden im NIBD-Bereich des Monitors angezeigt.

Das NIBD-Modul des X Series Geräts misst oszillometrisch die Blutdruckimpulse, die über Blutdruckmanschette und -schlauch übertragen werden, und berechnet daraus die Blutdruckmesswerte. Die Druckmessung läuft folgendermaßen ab:

1. Die Manschette wird bis zum konfigurierbaren vorgegebenen Druck (je nach Patiententyp) oberhalb des systolischen Blutdrucks des Patienten gefüllt. Während die Manschette gefüllt wird, misst das X Series Gerät die oszillometrischen Impulse, die von der Manschette über den Schlauch übertragen werden. Die SureBP-Überwachungssoftware berechnet daraus den entsprechenden systolischen, diastolischen und mittleren Blutdruck des Patienten. Nachdem diese Messungen durchgeführt wurden, wird der Druck in der Manschette abgelassen. Das X Series Gerät benötigt ca. 15 Sekunden für diese Messungen.

Für die SureBP-Funktion werden eine Manschette und ein Doppellumen-Schlauch benötigt.


2. Falls starke Artefakte eine genaue Messung beim Füllen der Manschette verhindern oder eine Manschette mit einlumigem Schlauch verwendet wird, wird die Manschette bis zu ihrem Zieldruck gefüllt, um den Blutstrom in den Arterien der überwachten Extremität zu blockieren. Der Druck in der Manschette wird schrittweise reduziert, damit das Blut durch die Manschette in die überwachte Extremität strömen kann. Wenn das Blut durch die arteriellen Gefäße der überwachten Extremität strömt, werden Druckschwankungen erzeugt, die über den Schlauch an das X Series Gerät übertragen werden. Das X Series Gerät misst die oszillometrischen Impulse und berechnet daraus den entsprechenden systolischen, diastolischen und mittleren Blutdruck. Diese Messung wird in ca. 30 Sekunden durchgeführt.

3. Die NIBD-Option passt die Blutdruckmessung automatisch an bestimmte Fehlerzustände an:

Zustand	Anpassung/Reaktion
Das Gerät kann keinen systolischen Druck feststellen.	Das Gerät erhöht automatisch den Manschettenfülldruck und führt die Blutdruckmessung durch.
Das Gerät kann nach 180 Sekunden keinen systolischen, diastolischen oder mittleren Druck feststellen.	Das Gerät bricht die Blutdruckmessung ab und lässt den Manschettendruck ab.
Das Gerät stellt einen Fehler fest.	Das Gerät zeigt eine entsprechende Fehlermeldung am Monitor an und bricht die Messung ab.

Die numerische NIBD-Anzeige

Nachdem die NIBD-Überwachung eingerichtet wurde und das X Series Gerät mit dem Durchführen von NIBD-Messungen begonnen hat, erscheinen die systolischen, diastolischen und mittleren Blutdruckmesswerte folgendermaßen in der numerischen NIBD-Anzeige:

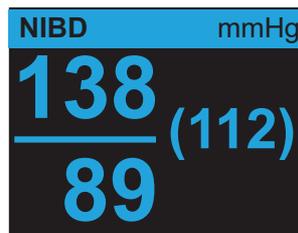

In den folgenden Abschnitten wird die Einrichtung der NIBD-Überwachung beschrieben.

NIBD – Einrichtung und Verwendung

Um mit dem X Series Gerät sichere und genaue NIBD-Messungen vorzunehmen, müssen Sie die folgenden Schritte durchführen, die jeweils einem Abschnitt in diesem Kapitel entsprechen. Lesen Sie jeden Abschnitt sorgfältig durch, bevor Sie NIBD-Messungen durchführen.

1. Wahl der richtigen Manschettengröße
2. Anlegen der Manschette am Patienten
3. Anschließen des Füllschlauchs am X Series Gerät und an der Manschette
4. Konfiguration der NIBD-Alarme und -Einstellungen (sofern die derzeitigen NIBD-Alarme und -Einstellungen ungeeignet sind)
5. Drücken der NIBD-Taste an der Front des X Series Geräts zur Durchführung der Blutdruckmessung

Wahl der NIBD-Manschette

Für genaue Messungen müssen Sie die richtige Manschettengröße verwenden: die Blasenlänge sollte mindestens 80 Prozent vom Umfang der Extremität betragen, und die Manschettenbreite sollte 40 Prozent vom Umfang der Extremität betragen.

Vorsicht Verwenden Sie ausschließlich von der ZOLL Medical Corporation freigegebene Schläuche und Manschetten. Eine Liste freigegebener Schläuche und Manschetten finden Sie in Anhang B, *Zubehör*. Halten Sie sich bei der Auswahl der richtigen Schlauch- und Manschettengröße an die folgenden Richtlinien:

	Erwachsenenmodus	Kindermodus	Neugeborenenmodus
Manschetten (typische Klassifizierung)	Erwachsener, Großer Erwachsener, Kleiner Erwachsener, Kind, Oberschenkel	Kind, Kleines Kind, Kleiner Erwachsener, Säugling, Neugeborenes	Neugeborene Nr. 1 bis Nr. 5 – Einmalartikel Neugeborenes (Nr. 6), Säugling (Nr. 7) – wiederverwendbar
Empfohlener Umfang der Extremität	15 cm oder mehr	7,7 bis 25 cm	15 cm oder weniger
Schläuche	Erwachsene	Erwachsene	Neugeborenes/Säugling (nur Einmalmanschette) * Für wiederverwendbare Manschetten für Neugeborene (Nr. 6) und Säuglinge (Nr. 7) wird der Schlauch für Erwachsene verwendet.

Vorsicht Die Auswahl der korrekten Manschette ist für die Genauigkeit von NIBD-Messungen ausschlaggebend. Zu kleine Manschetten liefern Blutdruckwerte, die höher liegen als der tatsächliche Blutdruck des Patienten. Zu große Manschetten liefern Blutdruckwerte, die niedriger liegen als der tatsächliche Blutdruck des Patienten.

Das X Series Gerät verwendet für Neugeborene, Kinder und Erwachsene die Definitionen der Norm AAMI SP10:2002:

Neugeborenes	Säuglinge im Alter von maximal 28 Tagen bei termingerechter Geburt (Gestationsalter mindestens 37 Wochen); ansonsten bis zu einem Gestationsalter von 44 Wochen
Kind (ausgenommen Neugeborenes)	Personen im Alter zwischen 29 Tagen und 12 Jahren
Erwachsene	Personen älter als 12 Jahre

Anschließen der NIBD-Manschette

Zum Anschließen der NIBD-Manschette muss der Füllschlauch zwischen dem X Series Gerät und der NIBD-Manschette angeschlossen werden. Für die SureBP-Funktion, mit der das X Series Gerät den Blutdruck während der Manschettenfüllung messen kann, werden die FlexiPort-Manschette sowie ein Adapter und ein Schlauch mit Doppellumen (zwei Leitungen) benötigt. Das X Series Gerät arbeitet auch mit einem einlumigen (nur eine Leitung) Schlauch und Adapter. In diesem Fall misst das Gerät den Blutdruck jedoch nur, während der Druck in der Manschette abgelassen wird.

So schließen Sie die NIBD-Manschette an das X Series Gerät an:

1. Schrauben Sie das Metallgewinde des Füllschlauchs in den NIBD-Anschluss an der Seite des X Series Geräts. Die Gewindegänge müssen präzise ineinandergreifen, damit sich der Anschluss ohne Widerstand drehen lässt. Ziehen Sie den Anschluss dann im Uhrzeigersinn an. Den Doppellumenschlauch bringen Sie folgendermaßen an:





Abbildung 8-1 Anbringen eines Doppellumenschlauchs am X Series Gerät

Einlumige Schläuche bringen Sie wie folgt an:



Abbildung 8-2 Anbringen eines einlumigen Schlauchs am X Series Gerät

2. Stecken Sie die Kunststoffsteckverbinder des NIBD-Schlauchs in den Manschettenschlauchanschluss, und drehen Sie die Anschlüsse, bis sie arretieren. Die beiden Kunststoffsteckverbinder des NIBD-Schlauchs sind identisch, Sie können also jeden der beiden Kunststoffsteckverbinder in jeden der beiden Manschettenschlauchanschlüsse stecken.

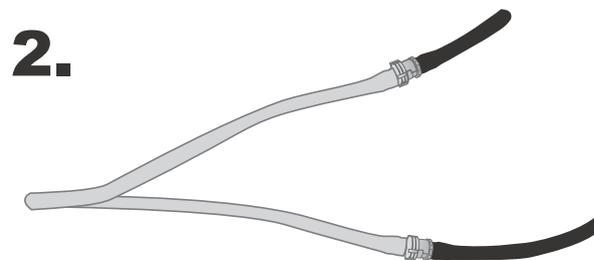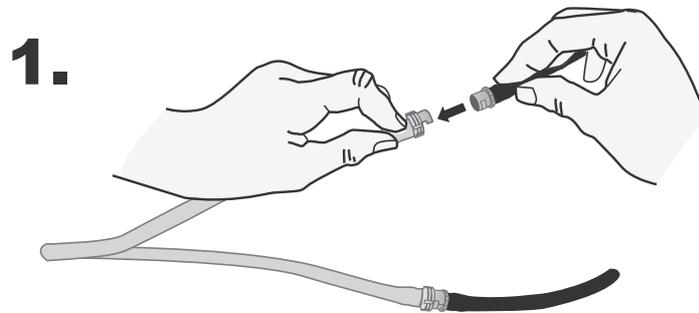

Anlegen der Manschette am Patienten

So legen Sie die Manschette am Patienten an:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Patient mit entspannter, ausgestreckter Extremität auf einer weichen Unterlage sitzt oder liegt.
2. Drücken Sie so viel Luft wie möglich aus der Manschette, bevor Sie sie am Patienten anlegen.
3. Legen Sie die Manschette 2 bis 5 cm oberhalb des Ellbogengelenks bzw. 5 bis 10 cm oberhalb des Kniegelenks an.

Warnung! Legen Sie die NIBD-Manschette nicht an einem Arm oder Bein mit SpO₂-Sensor an. Das Füllen der Manschette führt zu falschen SpO₂-Messwerten. Legen Sie die Manschette auch nicht an einer Extremität mit einer i.v.-Infusion an. Das Aufpumpen der Manschette kann die Infusion blockieren und den Patienten gefährden.

4. Justieren Sie die Manschette so, dass die Arterienmarkierung der Manschette über der Arterie liegt und zur Hand bzw. zum Fuß weist.
5. Prüfen Sie, ob die Manschette zwischen den Bereichslinien auf der Manschette endet.
6. Liegt das Manschettenende außerhalb der Markierung, müssen Sie eine andere Manschettengröße verwenden.
7. Legen Sie die nicht aufgepumpte Manschette fest um die Extremität, ohne den Blutstrom zu behindern.
8. Kontrollieren Sie, dass der Schlauch so liegt, dass er nicht abknicken oder zusammengedrückt werden kann.

-
- Vorsicht**
- Zu kleine oder locker angelegte Manschetten liefern Messwerte, die über dem tatsächlichen Blutdruck des Patienten liegen.
 - Bei Verwendung einer Manschette, die zu groß ist, werden Druckmesswerte erhalten, die niedriger liegen als der tatsächliche Blutdruck des Patienten.
 - Idealerweise sollte sich die Manschette auf Höhe des Herzens befinden. Wenn sich die Manschette ober- oder unterhalb des Herzens des Patienten befindet, werden die Blutdruckmesswerte nach unten bzw. oben verfälscht.
-

Nachstehend wird eine mögliche Manschettenplatzierung für Erwachsene/Kinder und rechts davon für Neugeborene dargestellt:

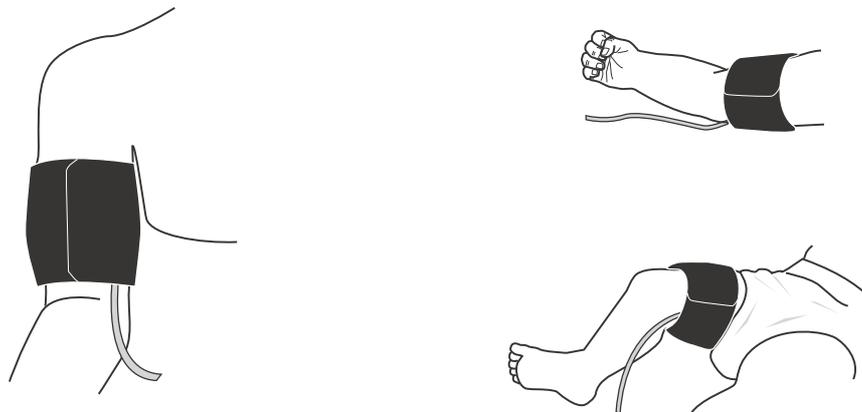


Abbildung 8-3 Anlegen der Manschette am Patienten

Sicherstellen korrekter Manschettendruckeinstellungen

Prüfen Sie vor dem Durchführen einer NIBD-Messung bei einem neuen Patienten, dass die Manschettenfülldruckeinstellungen für den Patienten geeignet sind.

Vergewissern Sie sich, dass der korrekte Patientenmodus ausgewählt ist. Der initiale Sollwert des Manschettenfülldrucks richtet sich nach dem betreffenden Patiententyp und der Sollwert-Voreinstellung. Die folgende Tabelle enthält die standardmäßigen und konfigurierbaren Voreinstellungen für den Fülldruck-Sollwert nach Patiententyp (Standardwerte sind fettgedruckt).

Hinweis: Sie können den Fülldruck-Sollwert für die Manschette über das Menü „Einrichten“ > „NIBD“ konfigurieren.

Erwachsene	Kinder	Neugeborene
120 mmHg	80 mmHg	60 mmHg
140 mmHg	90 mmHg	70 mmHg
160 mmHg	100 mmHg	80 mmHg
180 mmHg	110 mmHg	90 mmHg
200 mmHg	120 mmHg	100 mmHg
220 mmHg	130 mmHg	110 mmHg
240 mmHg	140 mmHg	120 mmHg
260 mmHg	150 mmHg	130 mmHg

Für eine genaue Messung des systolischen Drucks muss der Fülldruck-Sollwert die unterhalb der Manschette liegende Arterie abdrücken können. Bei zu hoch eingestelltem Fülldruck-Sollwert verlängert sich die erforderliche Messdauer und der Patient wird unnötig belastet.

Nach jeder NIBD-Messung korrigiert das X Series Gerät den Manschettenfülldruck, um die nächste NIBD-Messung zu optimieren.

Hinweis: Der maximale Manschettenfülldruck für Neugeborene beträgt 153 mmHg.

Warnung! **Bevor Sie mit dem X Series Gerät einen neuen Patienten überwachen, schalten Sie das Gerät für *mindestens 2 Minuten* aus, damit alle Patientenparameter zurückgesetzt und alle für den vorherigen Patienten vorgenommenen Korrekturen eliminiert werden.**

Konfigurieren der NIBD-Alarme und -Einstellungen

Als letzter Vorbereitungsschritt vor den NIBD-Messungen muss sichergestellt werden, dass die erforderlichen Alarmer aktiviert (bzw. deaktiviert) sind, dass geeignete Alarmgrenzwerte eingestellt sind und dass die NIBD-Einstellungen stimmen.

Aktivieren/Deaktivieren der NIBD-Alarme und Einstellen der Alarmgrenzwerte

Sofern aktiviert, gibt das X Series Gerät immer dann akustische Alarmer aus, wenn die Messwerte die folgenden Parametergrenzwerte über- bzw. unterschreiten:

- Systolische Ober- und Untergrenze
- Diasystolische Ober- und Untergrenze
- Ober- und Untergrenze des mittleren arteriellen Blutdrucks (MAP)

Über die Schnellzugriffstaste „Alarmer“ () oder das Parameterbedienfeld **NIBD** können Sie NIBD-Alarmer aktivieren (oder deaktivieren) und die oberen und unteren Alarmgrenzwerte festlegen.

So konfigurieren Sie NIBD-Alarmgrenzwerte über die Schnellzugriffstaste „Alarmer“:

1. Drücken Sie die Schnellzugriffstaste „Weiter/Zurück“ ()
2. Drücken Sie die Schnellzugriffstaste „Alarmer“ ()
3. Drücken Sie die Schnellzugriffstaste **Grenz.** ()
4. Rufen Sie mithilfe der Navigationstasten die entsprechende Alarm-Menüoption auf.
Für NIBD lauten die Alarm-Menüoptionen **NIBP – Syst. Alarm**, **NIBP – Diastol. Al.** und **NIBP MAP-Alarm**.
5. Wählen Sie mithilfe der Navigationstasten in dem ausgewählten Menü der NIBD-Alarmeinstellungen die Felder aus, die Sie ändern möchten. Folgende Felder stehen zur Auswahl:
 - **Obergrenze aktivieren**
 - **Untergrenze aktivieren**
 - **Obergrenze**
 - **Untergrenze**
6. Nach Änderung der Werte im Alarmmenü navigieren Sie zum Zurück-Pfeil, um das Menü zu verlassen.



Einstellen des oberen und des unteren systolischen (SYS) Alarmgrenzwerts

Im Menü **NIBP – Sys.-Alarmeinstellungen** wird initial festgelegt, ob der systolische NIBD-Alarm aktiviert (**EIN**) oder deaktiviert (**AUS**) ist; außerdem wird hier die Standardeinstellung für den oberen und den unteren systolischen Alarmgrenzwert angezeigt. Der obere und der untere Grenzwert können auf **EIN** oder auf **AUS** eingestellt werden (die Standardeinstellung ist **AUS**). In der folgenden Tabelle werden die systolischen Standard-NIBD-Alarmgrenzwerte für Erwachsene, Kinder und Neugeborene aufgelistet. Auch wird der Bereich angegeben, in dem diese Grenzwerte festgelegt werden können:

Patiententyp	Systolische Standard-NIBD-Grenzwerte	Einstellbereich für die systolischen NIBD-Grenzwerte
Erwachsene	Unterer Grenzwert: 75 mmHg Oberer Grenzwert: 220 mmHg	Unterer Grenzwert: 30 bis 258 mmHg Oberer Grenzwert: 32 bis 260 mmHg
Kinder	Unterer Grenzwert: 75 mmHg Oberer Grenzwert: 145 mmHg	Unterer Grenzwert: 30 bis 158 mmHg Oberer Grenzwert: 32 bis 160 mmHg
Neugeborene	Unterer Grenzwert: 50 mmHg Oberer Grenzwert: 100 mmHg	Unterer Grenzwert: 20 bis 118 mmHg Oberer Grenzwert: 22 bis 120 mmHg

Einstellen des oberen und des unteren diastolischen (DIA) Alarmgrenzwerts

Im Menü **NIBP – Dia.-Alarmeinstellungen** wird initial festgelegt, ob der diastolische NIBD-Alarm aktiviert (**EIN**) oder deaktiviert (**AUS**) ist; außerdem wird hier die Standardeinstellung für den oberen und den unteren systolischen Alarmgrenzwert angezeigt. Der obere und der untere Grenzwert können auf **EIN** oder auf **AUS** eingestellt werden (die Standardeinstellung ist **AUS**). In der folgenden Tabelle werden die diastolischen Standard-NIBD-Alarmgrenzwerte für Erwachsene, Kinder und Neugeborene aufgelistet. Auch wird der Bereich angegeben, in dem diese Grenzwerte festgelegt werden können:

Patiententyp	Diastolische Standard-NIBD-Grenzwerte	Einstellbereich für die diastolischen NIBD-Grenzwerte
Erwachsene	Unterer Grenzwert: 35 mmHg Oberer Grenzwert: 110 mmHg	Unterer Grenzwert: 20 bis 218 mmHg Oberer Grenzwert: 22 bis 220 mmHg
Kinder	Unterer Grenzwert: 35 mmHg Oberer Grenzwert: 100 mmHg	Unterer Grenzwert: 20 bis 128 mmHg Oberer Grenzwert: 22 bis 130 mmHg
Neugeborene	Unterer Grenzwert: 30 mmHg Oberer Grenzwert: 70 mmHg	Unterer Grenzwert: 10 bis 108 mmHg Oberer Grenzwert: 12 bis 110 mmHg

Einstellen des oberen und des unteren Alarmgrenzwerts für den NIBP MAP-Alarm

Im Menü **NIBP MAP-Alarmeinstellungen** wird initial festgelegt, ob der NIBP-MAP-Alarm aktiviert (**EIN**) oder deaktiviert (**AUS**) ist; außerdem wird hier die Standardeinstellung für den oberen und den unteren NIBP-MAP-Alarmgrenzwert angezeigt. Der obere und der untere Grenzwert können auf **EIN** oder auf **AUS** eingestellt werden (die Standardeinstellung ist **AUS**). In der folgenden Tabelle werden die Standard-NIBP-MAP-Alarmgrenzwerte für Erwachsene, Kinder und Neugeborene aufgelistet. Auch wird der Bereich angegeben, in dem diese Grenzwerte festgelegt werden können:

Patiententyp	Standard-NIBP-MAP-Grenzwerte	Einstellbereich für die NIBP-MAP-Grenzwerte
Erwachsene	Unterer Grenzwert: 50 mmHg Oberer Grenzwert: 120 mmHg	Unterer Grenzwert: 25 bis 230 mmHg Oberer Grenzwert: 23 bis 228 mmHg
Kinder	Unterer Grenzwert: 50 mmHg Oberer Grenzwert: 110 mmHg	Unterer Grenzwert: 25 bis 140 mmHg Oberer Grenzwert: 23 bis 138 mmHg
Neugeborene	Unterer Grenzwert: 35 mmHg Oberer Grenzwert: 80 mmHg	Unterer Grenzwert: 15 bis 110 mmHg Oberer Grenzwert: 13 bis 108 mmHg

Verwendung des Parameterbedienfelds „NIBP“

Wählen Sie mithilfe der Navigationstasten die numerische NIBD-Anzeige und rufen Sie so das Parameterbedienfeld **NIBD** auf.

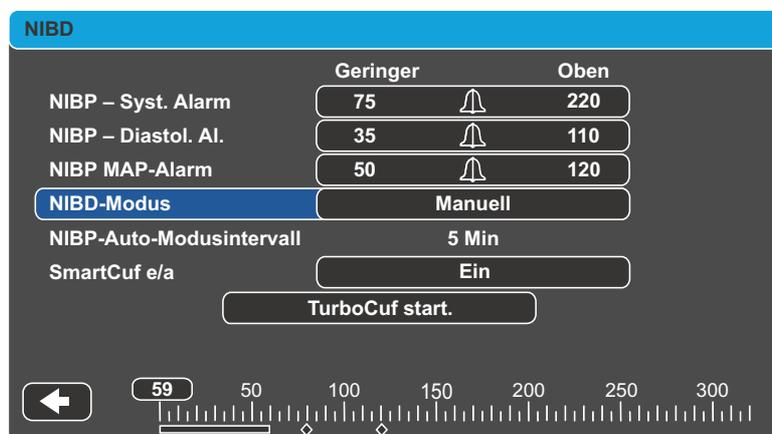


Abbildung 8-4 Parameterbedienfeld „NIBD“

Im Parameter-Bedienfeld „NIBD“ können Sie eine Alarm-Konfigurationsoption (**SYS**, **DIA** oder **MAP**) auswählen, um Alarme zu aktivieren bzw. zu deaktivieren und – wie zuvor beschrieben – obere und untere Alarmgrenzwerte festzulegen.

Zudem können folgende NIBD-Optionen konfiguriert werden:

- NIBD-Modus (**Modus**)
- Automatisches NIBD-Messintervall (**Auto-Intervall**)
- Aktivieren/Deaktivieren des Smartcuf-Bewegungsartefaktfilters (**Smartcuf**)
- Starten/Stoppen von Turbocuf-Messungen (**TurboCuf**)

Festlegen des NIBD-Modus

Sie können festlegen, in welchem NIBD-Modus sich das X Series Gerät beim Einschalten befindet: *Manuell* oder *Automatisch*.

Im Modus „Manuell“ führt das X Series Gerät eine einzelne NIBD-Messung durch, wenn Sie die NIBD-Taste an der Gerätefront (☞) drücken. Um die NIBD-Messung zu wiederholen, muss die NIBD-Taste erneut gedrückt werden (wählen Sie **Manuell**).

Im Modus „Automatisch“ führt das X Series Gerät die erste einer Reihe von NIBD-Messungen durch, wenn der Timer **Auto Interval** (Autom. Intervall) abläuft. Die NIBD-Messungen werden dann in diesem festgelegten Intervall wiederholt.

Hinweis: Sie können im Modus „Automatisch“ jederzeit die NIBD-Taste drücken und manuell eine NIBD-Messung starten. Manuell gestartete NIBD-Messungen wirken sich nicht auf die zeitliche Abfolge anschließender NIBD-Messungen im Modus „Automatisch“ aus.

Festlegen des automatischen NIBD-Messintervalls

Im Modus „Automatisch“ kann das Zeitintervall zwischen den NIBD-Messungen festgelegt werden. Das Standardintervall zwischen Messungen beträgt 5 Minuten.

Als Intervalle zwischen den NIBD-Messungen stehen **1, 2, 3, 5, 10, 15, 30** und **60** Minuten zur Auswahl.

Aktivieren/Deaktivieren des Smartcuf-Bewegungsartefaktfilters


Wird der Smartcuf-Bewegungsartefaktfilter aktiviert, erhöht sich die Genauigkeit der NIBD-Messungen bei Bewegungsartefakten und schwachem Puls.

NIBD-Messungen können durch viele Faktoren beeinträchtigt werden, darunter Arrhythmien, Blutdruckschwankungen, Körperbewegungen wie Zittern oder Krämpfe, Anstoßen an die Manschette, Vibration, Fahrzeugbewegung oder schwacher Puls. Der Smartcuf-Filter synchronisiert die NIBD-Messung mit der R-Zacke des Patienten-EKG, um die durch Patientenbewegung oder Vibration verursachten Störsignale zu eliminieren.

Hinweis: Zum Einsatz des Smartcuf-Filters muss das X Series Gerät eine EKG-Überwachung durchführen.

Bei starken Artefakten erscheint im Display und auf Ausdrucken ein besonderes Symbol:

Abbildung 8-5 Symbol für starke Artefakte

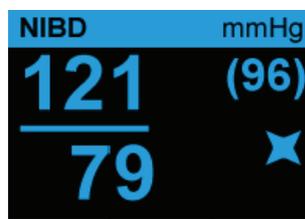

Smartcuf ist standardmäßig **aktiviert**.

In bestimmten Situationen ist es ratsam, Smartcuf zu deaktivieren. Dazu gehören:

- Extreme Bewegungsartefakte
- Bestimmte Arten von Arrhythmien
- Situationen, in denen kein EKG-Signal wahrgenommen wird

NIBD-Messungen können auch bei deaktiviertem Smartcuf-Filter durchgeführt werden.

Starten/Stoppen von Turbocuf-Messungen

Durch Auswahl von **TurboCuf start**, werden kurzfristige automatische NIBD-Messungen (STAT-Messungen) gestartet. Nachdem das X Series Gerät die erste NIBD-Messung durchgeführt hat, versucht es über einen Zeitraum von 5 Minuten, so viele NIBD-Messungen wie möglich durchzuführen.

Wählen Sie **Stop TurboCuf**, um die STAT-Messungen sofort abzubrechen.

WARNUNG! Wiederholte STAT-Messungen über einen kurzen Zeitraum können die Blutdruckmesswerte beeinflussen, die Blutzufuhr zur betroffenen Extremität einschränken und eine Verletzung des Patienten zur Folge haben.

Einstellen des NIBD-Anzeigeformats

Sie können das Format für die numerische NIBD-Anzeige im Display festlegen. Beim Anzeigeformat haben Sie die Wahl, den MAP-Messwert (**M**) gemeinsam mit dem systolischen (**S**) und dem diastolischen (**D**) Messwert in einem der folgenden Formate anzuzeigen oder nicht:

- **S/D**
- **S/D (M)** (Standardformat)
- **(M) S/D**

Hinweis: Ist bei Auswahl des **S/D**-Formats ein MAP-Alarm aktiv, wird das Anzeigeformat **S/D (M)** verwendet, bis der MAP-Alarm gelöscht wurde.

NIBD-Systemmeldungen

Während der NIBD-Überwachung zeigt das X Series Gerät möglicherweise die folgenden Meldungen an:

Systemmeldung	Ursache
<i>MESSUNG LÄUFT</i>	Das Gerät führt gerade eine NIBD-Messung durch und funktioniert normal.
<i>MESSUNG GESTOPPT</i>	Das Gerät hat eine NIBD-Messung gestoppt, da der Anwender die NIBD-Taste gedrückt und die Messung abgebrochen hat.
<i>MESSUNG FEHLER</i>	Der Puls des Patienten ist für die NIBD-Messung zu schwach oder der Manschettensitz muss korrigiert werden.
<i>ARTEFAKTE</i>	Übermäßige Artefakte verhindern die NIBD-Messung.
<i>NEONAT.-AL.</i>	Das Gerät hat im Erwachsenenmodus eine Manschette für Neugeborene ermittelt. Tauschen Sie die Manschette aus bzw. korrigieren Sie den Patientenmodus.
<i>LUFTLECK</i>	Ein relevantes Luftleck verhindert die Manschettenfüllung. Überprüfen Sie die Schlauch- und Manschettenverbindungen. Tauschen Sie einen defekten Schlauch oder eine defekte Manschette ggf. aus. Wiederholen Sie die NIBD-Messung.
<i>GEKN. SCHLAUCH</i>	Eine Luftblockade verhindert den korrekten Betrieb des Geräts. Überprüfen Sie den Schlauch auf Knickstellen. Eliminieren Sie die Knicke oder ersetzen Sie ggf. den Schlauch.
<i>NIBP INAKTIV</i>	Es ist ein Systemfehler aufgetreten und das X Series Gerät sollte gewartet werden.
<i>NIBP-KALIBRIERUNGSPRÜFUNG FÄLLIG</i>	Der jährliche Kalibrierungstest ist fällig. Sie können das Gerät weiterhin verwenden. Es wird jedoch empfohlen, dass Sie sich sobald als möglich mit Ihrem geschulten Experten oder dem technischen Kundendienst von ZOLL oder einem autorisierten Vertreter von ZOLL in Verbindung setzen, um den jährlichen NIBD-Kalibrierungstest durchzuführen.
<i>BITTE WARTEN</i>	Nach Abschluss einer angeforderten NIBD-Messung im automatischen oder im STAT-(TurboCuf)-Modus muss das Gerät bis zu 30 Sekunden warten, bevor eine erneute angeforderte NIBD-Messung initiiert werden kann.
<i>DRUCKGRENZE ÜBERSCHRITTEN</i>	Der Manschettendruck hat den zulässigen Grenzwert überschritten. Beschränken Sie die Bewegungen des Patienten und untersuchen Sie den Schlauch auf Knicke. Beseitigen Sie Knicke oder ersetzen Sie erforderlichenfalls den Schlauch.

Systemmeldung	Ursache
<i>TEMP. NICHT IM BEREICH</i>	Die Temperatur des NIBD-Moduls liegt außerhalb des für den Betrieb zulässigen Bereichs. Bringen Sie das Gerät auf die zulässige Betriebstemperatur und wiederholen Sie den Versuch der NIBD-Messung.
<i>SCHWACHER PULS</i>	Der Puls des Patienten ist für eine NIBD-Messung zu schwach oder der Manschettensitz muss korrigiert werden.

Kapitel 9

CO₂-Überwachung

In diesem Kapitel wird die Verwendung des X Series Geräts für die Überwachung der endexpiratorischen Kohlendioxidfraktion (EtCO₂), der Atemfrequenz und der inspiratorischen Kohlendioxidfraktion (FiCO₂) beschrieben. Diese Optionen verwenden denselben Anschluss am X Series Gerät; sie können abwechselnd genutzt werden.

Überblick

Das X Series Gerät verwendet für die CO₂-Überwachung die Oridion Microstream FilterLine[®] und Smart CapnoLine[®] Sidestream-(Nebenstrom)-Systeme.

Die FilterLine und Smart CapnoLine Sidestream-Systeme entnehmen über eine Nasal-/Oralkanüle oder einen Atemwegadapter geringvolumige Gasproben aus den Atemwegen des Patienten. Diese Gase strömen durch einen Infrarot-Halbleitersensor (befindet sich nicht in der Nähe der Atemwege des Patienten), der die CO₂-Konzentration misst. Das Microstream-System kann für CO₂-Messungen bei intubierten und nicht intubierten Säuglingen, Kindern und Erwachsenen eingesetzt werden.

Das vom Microstream CO₂-Sensor erzeugte Infrarotlicht durchleuchtet die abgezwigten Atemgase und bestimmt durch Messung der Menge des von den Gasen absorbierten Lichts die CO₂-Konzentration.

Das X Series Gerät zeigt den EtCO₂-Wert (die am Ende jeder Expiration gemessene Kohlendioxidkonzentration) und den FiCO-Wert als numerischen Wert in mmHg an. Außerdem kann das Gerät ein Kapnogramm anzeigen. Das Kapnogramm ist eine wertvolle klinische Hilfe bei der Bestimmung der Integrität der Atemwege und der richtigen Platzierung des Endotrachealtubus (ET). Das Gerät berechnet durch Messung des zeitlichen Abstands zwischen den erfassten Spitzen der CO₂-Kurve die Atemfrequenz. Die Technologie unterscheidet zwischen den durch die Atmung erzeugten Kurven und den von kardiogenen Schwingungen und Artefakten erzeugten Kurven.

Das X Series Gerät zeichnet sich durch automatische Kompensation des Luftdrucks aus.

- Warnung!**
- Bei Einsatz einer Messleitung für intubierte Patienten mit einem geschlossenen Absaugsystem darf der Atemwegadapter nicht zwischen dem Saugkatheter und dem Endotrachealtubus angebracht werden. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass der Atemwegadapter die Funktionsweise des Absaugkatheters nicht stört.
 - Die Messleitung darf nicht verkürzt werden. Das Verkürzen der Messleitung könnte zu fehlerhaften Messwerten führen.
 - Gelangt zuviel Feuchtigkeit in die Messleitung (d. h. Feuchtigkeit aus der Umgebung oder Einatmen ungewöhnlich feuchter Luft), erscheint im Meldungsbereich die Meldung „FilterLine wird geleert“. Falls die Messleitung nicht geleert werden kann, erscheint im Meldungsbereich die Meldung *FilterLine-Blockade*. Tauschen Sie die Messleitung aus, sobald die Meldung *FilterLine-Blockade* angezeigt wird.
 - Das Microstream Sidestream CO₂-Zubehör darf in Gegenwart leicht entzündlicher Narkosemittel oder anderer leicht entflammbarer Gase NICHT verwendet werden.
 - Lockere oder beschädigte Verbindungen können die Beatmung beeinträchtigen oder zu einer ungenauen Messung der Atemgase führen. Schließen Sie alle Komponenten sicher an und überprüfen Sie die Verbindungen gemäß klinischer Standardverfahren auf Lecks.
 - Sie müssen sich stets vergewissern, dass die Atemkreislaufintegrität nach Setzung des Atemwegadapters aufrechterhalten bleibt. Dazu prüfen Sie den CO₂-Kurvenverlauf (Kapnogramm) im Display auf Richtigkeit.
-

Vorsicht EtCO₂-Messleitungen von Microstream® sind zur Verwendung bei nur einem Patienten vorgesehen und dürfen nicht wiederaufbereitet werden. Versuchen Sie nicht, die Messleitung zu reinigen, zu desinfizieren, zu sterilisieren oder zu spülen, da dies zu einer Beschädigung des Monitors führen könnte.

Entsorgen Sie die Messleitungen gemäß Standardbetriebsverfahren oder lokalen Vorschriften für die Entsorgung von kontaminierten medizinischen Abfallprodukten.

Lesen Sie vor der Verwendung sorgfältig die *Gebrauchsanweisung* für die Microstream EtCO₂-Messleitungen.

Einrichtung und Verwendung der CO₂-Überwachung

Verfahren Sie zum Einrichten der CO₂-Überwachung wie folgt:

1. Wählen Sie die passende CO₂-Messleitung für den Patienten aus.
2. Schließen Sie die Messleitung an den CO₂-Eingang des Geräts an.
3. Legen Sie den Filterline-Atemwegsadapter oder die Smart CapnoLine-Nasen-/Oralkanüle am Patienten an.
4. Überprüfen Sie, dass das X Series Gerät auf den korrekten Patiententyp eingerichtet ist – Erwachsene, Kinder oder Neugeborene.
5. Konfigurieren Sie die Alarme (sofern die derzeitigen Alarmeinstellungen nicht angemessen sind) sowie die anderen CO₂-Funktionen.
6. Drücken Sie die Schnellzugriffstaste „CO₂“ () , um die CO₂-Überwachung zu starten.

Auswählen der CO₂-Messleitung

Um die passende CO₂-Messleitung auswählen zu können, müssen Sie Folgendes bestimmen:

- Handelt es sich bei dem Patienten um einen Erwachsenen, ein Kind oder ein Neugeborenes?
- Ist der Patient intubiert (beatmet) oder nicht intubiert (nicht beatmet)?

Für die Sidestream-CO₂-Überwachung mit dem X Series Gerät können Sie das folgende Oridion Microstream Zubehör verwenden:

Tabelle 9-1. Oridion Microstream CO₂-Messleitungen für die Verwendung mit X Series Geräten

Zubehör	Typ	Teilenummer
FilterLine-Set (Erwachsene/Kinder), 25er Packung	Messleitung mit Atemwegadapter zur kurzfristigen Überwachung bei Intubation	8300-0520-01
FilterLine H-Set (Erwachsene/Kinder), 25er Packung	Messleitung und Atemwegadapter für feuchte Umgebungen bei Intubation	8300-0521-01
FilterLine H-Set (Säuglinge/Neugeborene), 25er Packung	Messleitung und Atemwegadapter für feuchte Umgebungen bei Intubation	8300-0522-01
VitaLine H-Set (Erwachsene/Kinder), 25er Packung	Messleitung und Atemwegadapter für sehr feuchte Umgebungen bei Intubation	8300-0523-01
Smart Capnoline Plus mit O ₂ (Erwachsene), 25er Packung	Orale/nasale Probenentnahme mit O ₂ -Gabe für nicht intubierte Patienten	8300-0524-01
Smart Capnoline Plus mit O ₂ (Kinder), 25er Packung	Nicht intubiert Mehrzweck	8300-0525-01

Warnung! Verwenden Sie ausschließlich von ZOLL Medical Corporation freigegebenes CO₂-Microstream-Zubehör. ZOLL Medical Corporation haftet nicht für den Einsatz von nicht freigegebenem Zubehör.

Anschließen von CO₂-Messleitungen

So schließen Sie die FilterLine oder Smart CapnoLine an:

1. Schieben Sie die Abdeckung über dem CO₂-Eingang des X Series Geräts zurück.
2. Setzen Sie das Anschlussstück am Ende des Sidestream-Schlauchs auf den Anschluss am CO₂-Eingang auf.
3. Drehen Sie das Anschlussstück im Uhrzeigersinn fest.



Abbildung 9-1 Anschließen des Messleitungsanschlusses am CO₂-Einlass

- WARNUNG!**
- Der Ausgang der Microstream Sidestream CO₂-Einheit ist nur für die vom Patienten ausgeatmeten Gase oder ein angeschlossenes Atemgerät gedacht. Der Ausgang ist ausschließlich für den Anschluss von Gasabsaugsystemen vorgesehen – andere Geräte sollten nicht an den Ausgang angeschlossen werden.
 - Beim Anschluss des Microstream Sidestream-CO₂-Zubehörs an Patienten, denen aktuell oder kürzlich Anästhetika verabreicht werden oder wurden, muss der CO₂-Ausgang an ein Gasabsaugsystem, an ein Narkosesystem oder an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden, damit das medizinische Personal keinen Narkosemitteln ausgesetzt wird.
 - Heben Sie den Monitor nicht an der FilterLine hoch, da sie sich vom Monitor lösen und der Monitor auf den Patienten fallen könnte.
 - Die FilterLine kann bei hoher O₂-Konzentration in Brand geraten, wenn sie direkt mit Laserstrahlen oder Elektrochirurgie-Geräten in Kontakt kommt. Lassen Sie beim Durchführen dieser Verfahren entsprechende Vorsicht walten.
-

Hinweis: Stellen Sie bei Verwendung eines Gasabsaugsystems sicher, dass es gemäß den Anweisungen des Herstellers installiert wurde. Das Gasabsaugsystem sollte ISO 8835-3:1997 (E) genügen.

Hinweis: Um zu verhindern, dass sich während der Vernebelung oder der Absaugung bei intubierten Patienten Feuchtigkeit ansammelt und die Messleitung blockiert wird, stecken Sie den Luer-Anschlussstecker der Messleitung am Monitor solange aus.


Anschließen eines FilterLine-Sets

Das FilterLine-Set ist für die CO₂-Überwachung bei intubierten Patienten vorgesehen.

Stellen Sie sicher, dass der Atemwegadapter sauber, trocken und unbeschädigt ist, bevor Sie ihn an den Beatmungskreislauf anschließen. Tauschen Sie ihn gegebenenfalls aus.

Vorsicht Das Einmal-FilterLine-Set darf jeweils nur bei einem Patienten verwendet werden. KEIN Bestandteil des FilterLine-Sets darf wiederverwendet oder sterilisiert werden, da der Monitor durch Reinigung oder Wiederverwendung beschädigt werden könnte.

1. Bringen Sie den Atemwegadapter am proximalen Ende des Beatmungskreislaufs zwischen dem L-Stück und dem Y-Stück an. Der Atemwegadapter darf NICHT zwischen dem Endotrachealtubus und dem L-Stück eingesetzt werden, da der Adapter sonst durch Sekretionen des Patienten blockiert werden könnte.
2. Sollten sich Sekretionen ansammeln, kann der Atemwegadapter aus dem Kreislauf entfernt, mit Wasser gespült und wieder in den Kreislauf eingesetzt werden. Damit keine angesammelte Flüssigkeit in die Messleitung läuft, darf sie nur an der Oberseite des Atemwegadapters angeschlossen werden, nicht an der Unterseite oder seitlich (siehe nachstehende Abbildung).

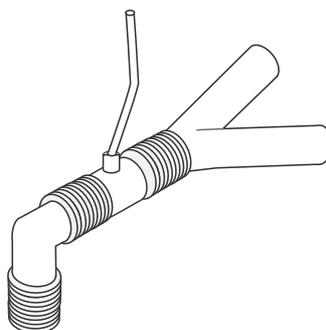

Anlegen einer Smart CapnoLine Nasal- oder Nasal-/Oralkanüle

Die Nasal- und Nasal-/Oralkanülen sind für die Überwachung der CO₂-Werte bei nicht intubierten Patienten vorgesehen.

Oral-/Nasalkanülen eignen sich insbesondere für Patienten, die zur Mundatmung neigen, da der Hauptanteil (wenn nicht das gesamte) CO₂ über den Mund ausgeatmet wird. Wenn bei solchen Patienten eine Standard-Nasalkanüle für die CO₂-Probenentnahme verwendet wird, liegen die angezeigten EtCO₂-Werte und die Kapnogramm-Kurve weit unter den tatsächlichen CO₂-Konzentrationen in der Ausatemluft des Patienten.

-
- WARNUNG!**
- **Die Smart CapnoLine Nasal- und Nasal-/Oralkanülen-Einmalsets sind für jeweils einen Patienten vorgesehen. KEIN Bestandteil dieses Produkts darf wiederverwendet oder sterilisiert werden, da der Monitor durch die Wiederverwendung der Messleitung beschädigt werden könnte.**
 - **Wird gleichzeitig mit der CO₂-Sidestream-Entnahme Sauerstoff zugeführt, muss eine CO₂-Messleitung mit der Möglichkeit der O₂-Zufuhr verwendet werden. Bei Verwendung anderer Kanülenarten ist keine Sauerstoffzufuhr möglich.**
-

Entnehmen Sie die Kanüle aus der Packung. Vergewissern Sie sich, dass die Kanüle sauber, trocken und unbeschädigt ist. Tauschen Sie sie gegebenenfalls aus.

Anlegen der Kanüle am Patienten

Legen Sie die Oral-/Nasalkanüle folgendermaßen am Patienten an:




Vorsicht Entsorgen Sie das Microstream EtCO₂-Verbrauchsmaterial gemäß Standardbetriebsverfahren oder lokalen Vorschriften zur Entsorgung von kontaminiertem medizinischen Abfall.

CO₂-Messung

Nachdem die Einrichtung abgeschlossen ist, drücken Sie , um die CO₂-Überwachung zu starten. Die numerische CO₂-Anzeige erscheint im Display und zeigt die Meldung *INITIALISIEREN* an. Die CO₂-Anzeige gibt den aktuellen EtCO₂-Wert und nach einer Verzögerung von ca. 1 Minute die Atemfrequenz des Patienten (in Atemzüge/Minute) aus, die als **BR** ausgewiesen wird:



Den korrekten Anschluss kontrollieren Sie über das angezeigte Kapnogramm (die Kurve wird automatisch im Kurvenanzeigefenster eingefügt).

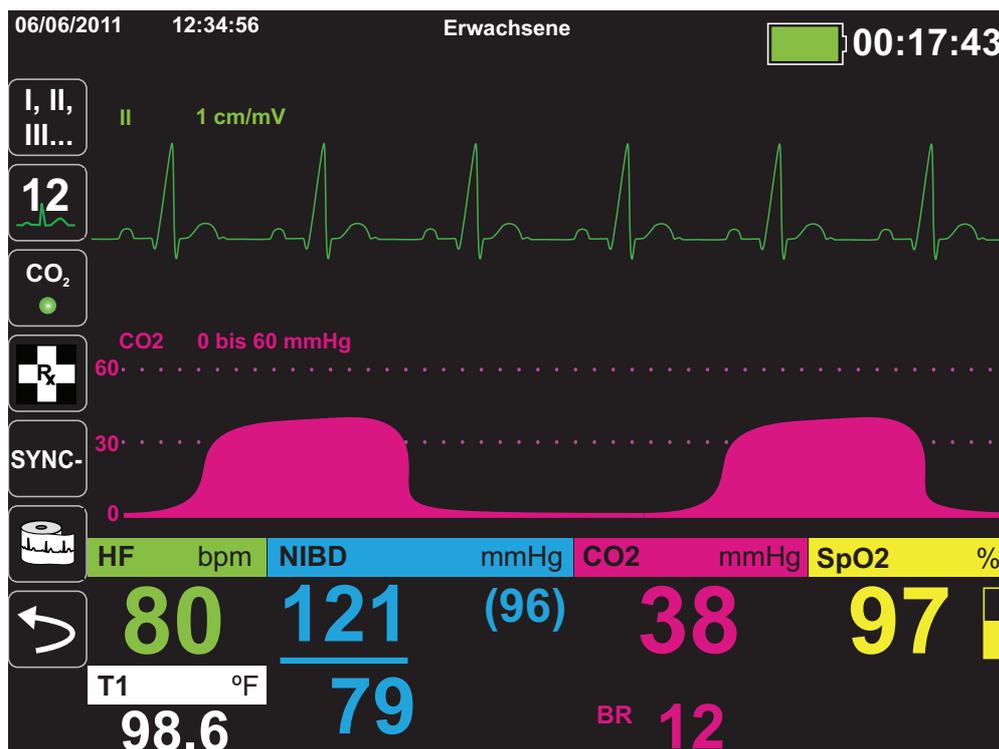

Einstellen der CO₂- und Atemfrequenz-Alarme

Das X Series Gerät gibt immer dann akustische Alarme aus, wenn die Messwerte die folgenden Parametergrenzwerte über- bzw. unterschreiten:

- Oberer und unterer EtCO₂-Grenzwert
- Oberer und unterer Atemfrequenz-Grenzwert (in Atemzügen/Minute)
- Oberer FiCO₂-Grenzwert
- Apnoe-Alarm

Aktivieren/Deaktivieren von Alarmen und Einstellen der CO₂-Alarmgrenzwerte

Über die Schnellzugriffstaste „Alarme“ () oder das Parameterbedienfeld „CO₂“ können Sie CO₂-Alarme aktivieren (oder deaktivieren) sowie den oberen und den unteren Alarmgrenzwert festlegen.

So konfigurieren Sie CO₂-Alarme über die Schnellzugriffstaste „Alarme“:

1. Drücken Sie die Schnellzugriffstaste „Weiter/Zurück“ ()
2. Drücken Sie .
3. Drücken Sie die Schnellzugriffstaste **Grenz.** ()
4. Wählen Sie mithilfe der Navigationstasten das betreffende Alarmmenü aus. Für CO₂ sind die folgenden Alarmmenüs verfügbar: „EtCO₂-Alarm“, „FiCO₂.Alarm“ und „RR/BR-Alarm“.
5. Wählen Sie mithilfe der Navigationstasten im Menü der Alarmeinstellungen die Felder aus, die Sie ändern möchten. Folgende Felder stehen zur Auswahl:
 - **Obergrenze aktivieren**
 - **Untegr. Aktivieren (nur EtCO₂- und RR/BR-Alarm)**
 - **Obergrenze**
 - **Untergrenze (nur EtCO₂- und RR/BR-Alarm)**
6.  Nach Änderung der Werte im Alarmmenü navigieren Sie zum Zurück-Pfeil, um das Menü zu verlassen.

Einstellen des oberen und des unteren EtCO₂-Grenzwerts

Im Menü „EtCO₂-Alarm“ wird initial festgelegt, ob der EtCO₂-Alarm aktiviert (**EIN**) oder deaktiviert (**AUS**) ist; außerdem werden hier die Standardeinstellungen für den oberen und den unteren EtCO₂-Alarmgrenzwert angezeigt. Der obere und der untere Grenzwert können auf **EIN** oder auf **AUS** eingestellt werden (die Standardeinstellung ist **AUS**). In der folgenden Tabelle werden die Standardgrenzwerte für den EtCO₂-Alarm für Erwachsene, Kinder und Neugeborene aufgelistet. Auch wird der Bereich angegeben, in dem diese Grenzwerte festgelegt werden können:

Patiententyp	Standardgrenzwerte für den EtCO ₂ -Alarm	Einstellbereich für die Grenzwerte für den EtCO ₂ -Alarm
Erwachsene	Unterer Grenzwert: 8 mmHg Oberer Grenzwert: 60 mmHg	Unterer Grenzwert: 0 bis 145 mmHg Oberer Grenzwert: 5 bis 150 mmHg
Kinder	Unterer Grenzwert: 8 mmHg Oberer Grenzwert: 60 mmHg	Unterer Grenzwert: 0 bis 145 mmHg Oberer Grenzwert: 5 bis 150 mmHg
Neugeborene	Unterer Grenzwert: 8 mmHg Oberer Grenzwert: 60 mmHg	Unterer Grenzwert: 0 bis 145 mmHg Oberer Grenzwert: 5 bis 150 mmHg

Vorsicht

Nach dem Daltonschen Gesetz der Partialdrücke können die EtCO₂-Werte in großen Höhenlagen möglicherweise niedriger als die auf Normalnull zu beobachtenden Werte ausfallen. Wird das X Series Gerät in großen Höhenlagen verwendet, ist es daher ratsam, die EtCO₂-Alarmeinstellungen entsprechend anzupassen.

Einstellen des oberen Grenzwerts für den FiCO₂-Alarm

Im Menü „FiCO₂-Alarm“ wird initial festgelegt, ob der FiCO₂-Alarm aktiviert (**EIN**) oder deaktiviert (**AUS**) ist; außerdem wird hier die Standardeinstellung für den oberen FiCO₂-Alarmgrenzwert angezeigt. Der obere Grenzwert kann auf **EIN** oder auf **AUS** eingestellt werden (die Standardeinstellung ist **AUS**). In der folgenden Tabelle wird die Standardeinstellung für den oberen FiCO₂-Alarmgrenzwert für Erwachsene, Kinder und Neugeborene aufgelistet. Auch wird der Bereich angegeben, in dem dieser Grenzwert festgelegt werden kann:

Patiententyp	Oberer FiCO ₂ -Standardgrenzwert	Einstellbereich für den oberen FiCO ₂ -Grenzwert
Erwachsene	8 mmHg	2 bis 98 mmHg
Kinder	8 mmHg	2 bis 98 mmHg
Neugeborene	8 mmHg	2 bis 98 mmHg

Einstellen des oberen und des unteren Atemfrequenz-(RR/BR)-Grenzwerts

Im Menü „RR/BR-Alarm“ wird initial festgelegt, ob der RR/BR-Alarm aktiviert (**EIN**) oder deaktiviert (**AUS**) ist; außerdem werden hier die Standardeinstellungen für den oberen und den unteren Atemfrequenz-Alarmgrenzwert angezeigt. Der obere und der untere Grenzwert können auf **EIN** oder auf **AUS** eingestellt werden (die Standardeinstellung ist **AUS**). In der folgenden Tabelle werden die Standardgrenzwerte (in Atemzügen/Minute) für den Atemfrequenz-Alarm für Erwachsene, Kinder und Neugeborene aufgelistet. Auch wird der Bereich angegeben, in dem diese Grenzwerte festgelegt werden können:

Patiententyp	Standardgrenzwerte für den Atemfrequenz-Alarm	Einstellbereich für die Grenzwerte für den Atemfrequenz-Alarm
Erwachsene	Unterer Grenzwert: 3 AZ/min Oberer Grenzwert: 50 AZ/min	Unterer Grenzwert: 0 bis 145 AZ/min Oberer Grenzwert: 5 bis 150 AZ/min
Kinder	Unterer Grenzwert: 3 AZ/min Oberer Grenzwert: 50 AZ/min	Unterer Grenzwert: 0 bis 145 AZ/min Oberer Grenzwert: 5 bis 150 AZ/min
Neugeborene	Unterer Grenzwert: 12 AZ/min Oberer Grenzwert: 80 AZ/min	Unterer Grenzwert: 0 bis 145 AZ/min Oberer Grenzwert: 5 bis 150 AZ/min

Verwendung des Parameterbedienfelds „CO₂“

Wählen Sie mithilfe der Navigationstasten die numerische **CO₂**-Anzeige und rufen Sie so das Parameterbedienfeld „CO₂“ auf.

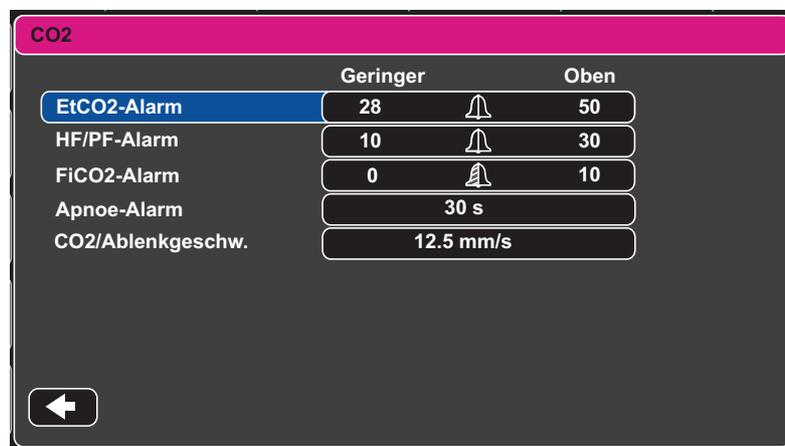


Abbildung 9-2 Parameterbedienfeld „CO₂“

Im Parameterbedienfeld „CO₂“ können Sie einen CO₂-Alarm (EtCO₂, Atemfrequenz oder FiCO₂) auswählen. Im Einstellmenü des ausgewählten Alarms können Sie den Alarm aktivieren/deaktivieren und die Alarmgrenzwerte (wie zuvor beschrieben) festlegen. Weiterhin können Sie die CO₂-Laufgeschwindigkeit festlegen.

Einstellen der CO₂-Laufgeschwindigkeit

Die EtCO₂-Laufgeschwindigkeit bestimmt die X-Achsen-Skalierung des Kapnogramms. Bei Patienten mit geringerer Atemfrequenz ist das Kapnogramm bei langsamerer Laufgeschwindigkeit leichter zu lesen. Als Laufgeschwindigkeit stehen 3.13, 6.25 und 12.5 mm/s zur Auswahl. Die Standard-Laufgeschwindigkeit beträgt 6.25 mm/s.

Systemmeldungen

Während der CO₂-Überwachung zeigt das X Series Gerät möglicherweise die folgenden Meldungen an:

Systemmeldung	Ursache
<i>INITIALISIEREN</i>	Das Gerät initialisiert die CO ₂ -Überwachungsfunktion, funktioniert normal und zeigt nach einer kurzen Verzögerung die CO ₂ -Messwerte an.
<i>PRÜF. FILTERL.</i>	Die Messleitung ist nicht angeschlossen. Überprüfen Sie den Anschluss der Messleitung. Ersetzen Sie Atemwegadapter oder Kanüle, sofern defekt.
<i>FILTERLEITUNG VERSCHLOSSEN</i>	Die Mess- oder Abgasleitung ist blockiert. Überprüfen Sie die Mess- bzw. Abgasleitung. Stellen Sie sicher, dass die Messleitung und die Eingänge zum Beatmungsgerät des Patienten nicht mit dem Abgasanschluss verbunden sind. Wenn die derzeitige FilterLine korrekt angeschlossen ist, ersetzen Sie sie.
<i>AUT. NULL.</i>	Das X Series Gerät zeigt <i>AUT. NULL</i> an, wenn das CO ₂ -Modul die regelmäßige Eigenwartung durchführt. Während der Eigenwartung führt das CO ₂ -Modul einen oder mehrere der folgenden Tests durch: Umgebungsdruckmessung, automatischer Nullabgleich und eine Durchflussprüfung. Das CO ₂ -Modul benötigt ca. 10 Sekunden für die Durchführung des Eigenwartungstests.
<i>DURCHBLASEN</i>	Wann immer ein Verschluss der Leitung oder des Atemwegadapters erkannt wird, bläst das CO ₂ -Modul die Leitung bzw. den Adapter durch und zeigt <i>DURCHBLASEN</i> an, während es versucht, die Leitung zu räumen. Kann das CO ₂ -Modul den Verschluss nicht innerhalb von 30 Sekunden beheben, gibt das X Series Gerät einen Gerätealarm aus und zeigt die Meldung <i>FILTERLEITUNG VERSCHLOSSEN</i> an. Wenn die derzeitige FilterLine korrekt angeschlossen ist, ersetzen Sie sie an dieser Stelle.
<i>VALUE OVER RANGE (BEREICHSÜBERSCHREITUNG)</i>	Der CO ₂ -Wert überschreitet den zulässigen Bereich.
<i>CO2 DEAKTIVIERT</i>	Im CO ₂ -Modul ist ein Fehler aufgetreten, und das X Series Gerät deaktiviert das Modul so lange, bis das Gerät aus- und wieder eingeschaltet wird. Wenn das Problem weiterhin besteht, muss das Gerät möglicherweise repariert werden.

Patente

Die Kapnografie-Komponente des X Series Geräts fällt unter eines oder mehrere der folgenden US-Patente: 6,428,483, 6,997,880; 5,3000,859; 6,437,316; 7,488,229 und deren internationalen Äquivalente. Weitere Patentanmeldungen liegen vor.

KEINE STILLSCHWEIGENDE LIZENZGABE

Der Besitz oder Kauf dieses Geräts führt zu keiner ausdrücklichen oder stillschweigenden Lizenz zur Verwendung dieses Geräts mit nicht genehmigten Verbrauchsmaterialien für die CO₂-Messung, die, allein oder in Verbindung mit diesem Gerät, in den Geltungsbereich eines oder mehrerer mit diesem Gerät und/oder mit diesen Verbrauchsmaterialien für die CO₂-Messungen verbundenen Patente fallen würden.

Kapitel 10

Puls-CO-Oxymetrie (SpO₂, SpCO und SpMet)

Bei dem X Series SpO₂-Eingang handelt es sich um eine defibrillatorsichere Patientenverbindung Typ CF.

In diesem Kapitel wird die Verwendung des X Series Geräts zur Überwachung der Puls-CO-Oxymetrie (SpO₂) sowie der optionalen Funktionen SpCO und SpMet beschrieben.

Das X Series Puls-CO-Oxymeter misst kontinuierlich und nichtinvasiv die Sauerstoffsättigung des arteriellen Hämoglobins (SpO₂) sowie die Carboxyhämoglobinsättigung (SpCO) und die Methämoglobinsättigung (SpMet) an einer peripheren Messstelle (z. B. Fuß, Zeh oder Finger). Diese Überwachung liefert Informationen zum Herz und zum Atmungssystem sowie den Details des Sauerstofftransports im Körper. Sie wird häufig eingesetzt, weil sie nicht invasiv, kontinuierlich, einfach in der Anwendung und schmerzfrei durchzuführen ist.

Die X Series Puls-CO-Oxymetrie-Option ist nur für die Verwendung mit ZOLL / Masimo Rainbow™ Sensoren vorgesehen. Der CO-Oxymetrie-Sensor enthält Leuchtdioden (LEDs), die sichtbares und Infrarotlicht verschiedener Wellenlängen durch die Körperextremitäten senden. Das gesendete Licht wird dann von einem Fotodetektor empfangen, der es in ein elektronisches Signal umwandelt. Anschließend wird das Signal zur Verarbeitung an das X Series Gerät übermittelt.

Sauerstoffgesättigtes Blut absorbiert Licht anders als ungesättigtes Blut. Daher kann die Menge von sichtbarem Licht und Infrarotlicht, die vom Blut an einer geeigneten Körperstelle – üblicherweise der Finger bei Erwachsenen und der Fuß bei Neugeborenen – absorbiert wird, genutzt werden, um das Verhältnis von mit Sauerstoff gesättigtem Hämoglobin zum Gesamthämoglobin im arteriellen Blut zu berechnen. Der Monitor zeigt dieses Verhältnis abwechselnd mit dem SpCO-Wert und dem SpMet als „Prozent SpO₂“ an. Bei Normalnull liegt der SpO₂-Wert typischerweise zwischen 95 % und 100 %. Die SpCO- und SpMet-Messungen stützen sich auf Mehrwellenlängen-Kalibrierungsgleichungen für die schätzungsweise Bestimmung des Prozentsatzes an Carboxyhämoglobin und Methämoglobin im arteriellen Blut.

Die Qualität der Messungen hängt von der richtigen Größe und Applikation des Sensors, vom richtigen Blutfluss an der Sensorstelle und vom Umgebungslicht, dem der Sensor ausgesetzt ist, ab. Hinweise zur richtigen Anbringung und Lage der Sensoren finden Sie in der in allen Rainbow-Oxymetriesensorkapseln enthaltenen *Gebrauchsanweisung*.

Warnungen – SpO₂, Allgemeines

- Die Genauigkeit der SpO₂-Pulsoxymetriemessungen kann durch zahlreiche Faktoren beeinträchtigt werden, so beispielsweise durch helles Licht, falsch angelegte Sensoren, Verwendung von Sensoren anderer Hersteller als ZOLL oder Zustand/Bewegungen des Patienten. Der Arzt sollte bei der Interpretation der SpO₂-Messungen seinen medizinischen Sachverstand walten lassen. Sollte dem Arzt eine SpO₂-Messung fragwürdig erscheinen, sollte eine arterielle Blutgasanalyse durchgeführt werden.
- Störende Substanzen: Carboxyhämoglobin und Methämoglobin können die SpO₂-Messwerte verfälschen. Der Grad der Beeinflussung ist in etwa proportional zur vorliegenden Menge an Carboxyhämoglobin bzw. Methämoglobin. Farbstoffe bzw. farbstoffhaltige Substanzen, die die arterielle Pigmentierung verändern, können die Messwerte verfälschen.
- Während der Patient einer Magnetresonanztomografie unterzogen wird, ist die Verwendung der X Series Pulsoxymetrie und der Oxymetrie-Sensoren nicht zulässig. Induzierte Ströme können zu Verbrennungen führen. Das Pulsoxymeter kann das MR-Bild beeinflussen, und umgekehrt kann der MR-Scanner die Genauigkeit der Oxymetriemessungen beeinflussen.
- Ordnen Sie die Patientenverkabelung gewissenhaft so an, dass sich der Patient nicht darin verfängt.
- Venenpulsationen können die Messungen verfälschen.
- Das Pulsoxymeter kann während einer Defibrillation eingesetzt werden, die Messungen sind möglicherweise jedoch kurzzeitig ungenau.
- Die Pulsfrequenzmessung basiert auf der optischen Erkennung eines Pulses im peripheren Fluss und kann daher möglicherweise bestimmte Arrhythmien nicht erkennen. Die Pulsoxymetrie sollte nicht als Ersatz für eine EKG-basierte Arrhythmie-Analyse genutzt werden.
- Starke Anämie kann die SpO₂-Messwerte verfälschen.
- Wenn Sie die Puls-CO-Oxymetrie während einer Ganzkörperbestrahlung verwenden, muss sich der Sensor außerhalb des Bestrahlungsfelds befinden. Wenn der Sensor der Bestrahlung ausgesetzt wird, könnten die Messwerte verfälscht werden oder während der aktiven Bestrahlung den Wert Null anzeigen.
- Erhöhte Gesamtbilirubinwerte können zu ungenauen SpO₂-, SpMet- und SpCO-Messungen führen.
- Sehr niedrige arterielle Sauerstoffsättigungs-(SpO₂)-Werte können zu ungenauen SpCO- und SpMet-Messungen führen.
- Das Pulssignal kann in den folgenden Fällen verloren gehen:
 - Zu stramm angelegter Sensor
 - Hypotonie, schwere Vasokonstriktion, schwere Anämie oder Hypothermie
 - Arterielle Okklusion proximal des Sensors
 - Herzstillstand oder Schock
- Die Pulsationen einer intraaortalen Ballonpumpe können sich additiv auf die angezeigte Oxymetrie-Pulsfrequenz auswirken. Vergleichen Sie die Pulsfrequenz des Patienten mit der aus dem EKG ermittelten Herzfrequenz.

Warnungen –SpO₂, Oxymetrie-Sensor

- Verwenden Sie ausschließlich von ZOLL freigegebene Masimo Oxymetrie-Sensoren. Sensoren anderer Hersteller funktionieren am X Series Oxymeter möglicherweise nicht einwandfrei.
- Falsches Anbringen oder Verwenden eines Sensors (z. B. zu strammes Befestigen des Sensors, Anbringen von zusätzlichem Klebeband, keine regelmäßige Prüfung der Sensorstelle) kann zu Gewebeschäden führen. Damit die Haut unversehrt bleibt und der Sensor korrekt sitzt und auf der Haut haftet, müssen Sie die Messstelle entsprechend der *Gebrauchsanleitung* des Sensors kontrollieren.
- Verwenden Sie keine beschädigten Sensoren oder Kabel.
- Verwenden Sie keinen Sensor, an dem optische Bauteile freiliegen.
- Sensoren dürfen nicht durch Bestrahlung, Dampf oder Ethylenoxid sterilisiert werden. Beachten Sie die Reinigungshinweise in der Gebrauchsanleitung für wiederverwendbare Masimo Sensoren.
- Lassen Sie den Sensor nicht für einen längeren Zeitraum an derselben Stelle, vor allem nicht bei der Überwachung von Neugeborenen. Kontrollieren Sie die Messstelle regelmäßig (mindestens alle 2 Stunden) und wechseln Sie zu einer anderen Stelle, falls die Haut in Mitleidenschaft gezogen wird.
- Legen Sie den Oxymetriesensor nicht an einer Extremität an, die bereits eine Blutdruckmanschette aufweist oder nur eingeschränkt durchblutet ist.
- Ein schlecht angebrachter Sensor kann zu falschen Sättigungswerten führen. Ein schwaches Pulssignal im Display deutet möglicherweise auf einen schlecht sitzenden Sensor oder eine ungünstig gewählte Messstelle hin.
- Wählen Sie eine ausreichend durchblutete Stelle, um genaue Oxymetriewerte zu gewährleisten.
- Bestimmte Nagelanomalien, Nagellacke, Pilze usw. können zu ungenauen Oxymetriewerten führen. Entfernen Sie den Nagellack oder setzen Sie den Sensor auf einen unlackierten Fingernagel um.
- Starke Lichtquellen wie OP-Lampen (vor allem mit Xenon-Lichtquelle), Bilirubin-Lampen, Leuchtstoffröhren, Infrarot-Wärmelampen oder direktes Sonnenlicht können die Genauigkeit der Oxymetriemessungen beeinträchtigen. Bringen Sie den Sensor so an, dass Störungen durch Umgebungslicht vermieden werden. Decken Sie den Sensor bei Bedarf mit einem lichtundurchlässigen Material ab.
- Nehmen Sie den Sensor stets vom Patienten ab und trennen Sie den Patienten vollständig vom Puls-CO-Oxymeter, bevor Sie den Patienten baden.
- Versuchen Sie keinesfalls, Masimo Sensor oder Patientenkabel aufzuarbeiten, wiederaufzubereiten oder wiederzuverwerten, da diese Prozesse die elektronischen Komponenten beschädigen können, was zu Verletzungen führen kann. Sensoren dürfen in keinsten Weise modifiziert oder verändert werden. Veränderungen und Modifizierungen können die Leistung und/oder die Genauigkeit beeinträchtigen.
- Um Kreuzkontaminationen zu vermeiden, dürfen Masimo Einmalsensoren nur für einen Patienten verwendet werden.

SpO₂ – Einrichtung und Verwendung

Für genaue SpO₂-Messungen mit dem X Series Gerät müssen Sie die folgenden Schritte durchführen, die jeweils einem Abschnitt in diesem Kapitel entsprechen.

1. Wahl des passenden SpO₂-Sensors
2. Anlegen des SpO₂-Sensors am Patienten
3. Anschließen des Sensors an das X Series Gerät
4. Konfigurieren der SpO₂-Alarmer und -Einstellungen (sofern die derzeitigen SpO₂-Alarmer und -Einstellungen nicht geeignet sind).

Die Pulsoxymetriemessungen beginnen, sobald der Sensor am Patienten angelegt und am X Series Gerät angeschlossen ist.

Wahl des SpO₂-Sensors

Berücksichtigen Sie bei der Wahl eines SpO₂-Sensors das Gewicht des Patienten, die ausreichende Durchblutung, die verfügbaren Messstellen und die voraussichtliche Dauer der Überwachung. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Zubehör* in diesem Kapitel, in dem die von ZOLL freigegebenen wiederverwendbaren und Einmal-SpO₂-Sensoren für Erwachsene, Kinder und Neugeborene aufgeführt sind. Machen Sie sich vor dem Anlegen des Sensors immer zuerst mit der *Gebrauchsanweisung* vertraut, die der Hersteller dem Sensor beilegt.

Anlegen des SpO₂-Sensors

Wählen Sie eine gut durchblutete Stelle, an der die Beweglichkeit des Patienten am wenigsten eingeschränkt ist. Bevorzugt ist der Ring- oder Mittelfinger der nicht dominanten Hand zu verwenden.

Alternativ können Sie auch die anderen Finger der nicht dominanten Hand verwenden. Prüfen Sie, ob der Sensordetektor ganz mit Gewebe abgedeckt ist. Sie können bei fixierten Patienten bzw. bei Patienten, deren Hände nicht zur Verfügung stehen, den großen oder den zweiten Zeh (neben dem großen Zeh) verwenden.

Um eine Beeinträchtigung durch Umgebungslicht zu vermeiden, muss der Sensor richtig angebracht und die Sensorstelle ggf. mit lichtundurchlässigem Material abgedeckt werden. Wenn diese Vorsichtsmaßnahme bei starkem Umgebungslicht unterbleibt, können die Messergebnisse verfälscht werden.

Platzieren Sie den SpO₂-Sensor nicht an einem Arm/Bein, an dem bereits eine NIBD-Manschette angelegt ist. Das Aufpumpen der Manschette führt zu fehlerhaften SpO₂-Messwerten.


Anlegen eines zweiteiligen Einmalsensors/-kabels

Ziehen Sie beim Anlegen eines SpO₂-Einmalsensors das Klebeband nicht zu stramm an, da dies zu venösen Pulsationen führen und die Sättigungsmessungen verfälschen kann.


1. Ziehen Sie die Schutzfolie vom Sensor ab und bestimmen Sie die Lage der lichtdurchlässigen Fenster auf der Klebeseite. Die lichtdurchlässigen Fenster decken die optischen Teile ab. Die bevorzugte Messstelle für den Sensor ist der Zeigefinger. Alternativ können Sie den Sensor auch an einem kleinen Daumen, einem kleineren Finger oder dem großen Zeh anlegen.

Hinweis: Bei der Wahl einer Sensormessstelle ist eine Extremität ohne arteriellen Katheter, Blutdruckmanschette und Venenverweilkanüle zu bevorzugen.

2. Richten Sie den Sensor so aus, dass die gestrichelte Linie in der Mitte des Sensors auf die Fingerspitze zentriert ist. Wickeln Sie die Klebelaschen am kabellosen Ende um den Finger. Dabei ist zu beachten, dass das Kabel auf dem Handrücken positioniert werden muss.

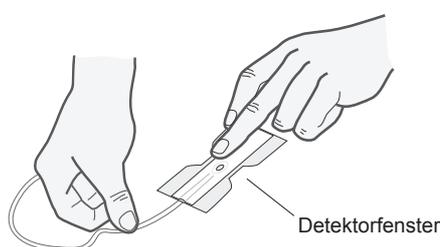

3. Falten Sie das Kabelende so über den Fingerrücken, dass die Fenster einander direkt gegenüberliegen. Wickeln Sie den Klebestreifen fest um die Seiten des Fingers.

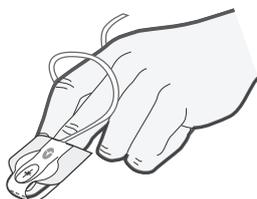

Hinweis: Wenn der Sensor den Puls nicht zuverlässig erfasst, ist er möglicherweise falsch positioniert oder die Messstelle ist zu dick, zu dünn, zu stark pigmentiert oder anderweitig zu stark koloriert (z. B. durch extern aufgetragene Farbe wie Nagellack, Farbstoffe oder pigmentierte Creme), um eine ausreichende Lichtübertragung zu ermöglichen. Bringen Sie den Sensor in diesen Fällen an einer anderen Stelle an oder wählen Sie einen alternativen Sensor zur Verwendung an einer anderen Messstelle.

4. Klappen Sie die durchsichtige Schutzabdeckung an der Buchse des Verlängerungskabels nach oben und schieben Sie den Sensorkabelstecker auf ganzer Länge in die Buchse des Verlängerungskabels:

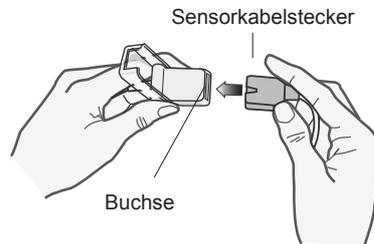


Abbildung 10-1 Einstecken des Sensorkabelsteckers in die Buchse

5. Klappen Sie die durchsichtige Schutzabdeckung über die Verbindung, um sie zu sichern:

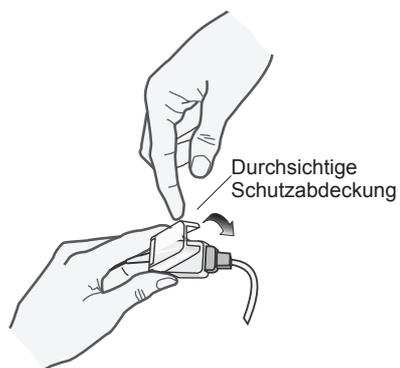


Abbildung 10-2 Herunterklappen der Schutzabdeckung über die Kabelverbindung

6. Anweisungen zum Anschließen des Kabels an das Gerät siehe „Anschließen des SpO₂-Sensors“ auf Seite 10-8.


Anbringen eines zweiteiligen wiederverwendbaren SpO₂-Sensors/-Kabels

Die folgenden Schritte beschreiben, wie ein wiederverwendbarer Rainbow Sensor angelegt wird. Richten Sie sich hinsichtlich der Anbringung aller anderen wiederverwendbaren Sensoren nach den Anweisungen auf der Verpackung des Sensors und der *Gebrauchsanweisung* des Herstellers.

Hinweis: Ein wiederverwendbarer Sensor eignet sich nicht für den Daumen oder die Hand bzw. den Fuß eines Kindes.

Bringen Sie den wiederverwendbaren Sensor nach Auswahl der Überwachungsstelle folgendermaßen an:

1. Setzen Sie den gewählten Finger auf das Sensorfenster. Das Sensorkabel muss über dem Handrücken des Patienten verlaufen.
2. Bei Messungen am Finger muss die Fingerspitze den vorspringenden Anschlag im Sensor berühren. Lange Fingernägel können über den Fingeranschlag hinausragen.

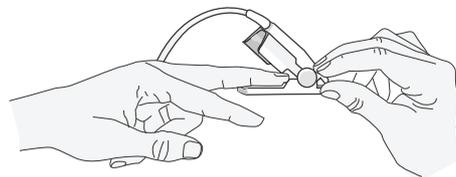

3. Prüfen Sie die Sensorposition, um sicherzustellen, dass die obere und untere Hälfte des Sensors parallel verlaufen. Um genaue Daten zu gewährleisten, muss das Detektorfenster vollständig abgedeckt sein.



Hinweis: Zur vollständigen Abdeckung des Detektorfensters bei kleineren Fingern muss der Finger möglicherweise nicht bis zum Anschlag hineingeschoben werden.

4. Je nach Art des verwendeten Patientenkabels gehen Sie nun wie folgt vor:
 - Bei Verwendung eines direkten einteiligen Patientenkabels siehe „Anschließen des SpO₂-Sensors“ auf Seite 10-8.
 - Bei Verwendung des zweiteiligen Patientenkabels klappen Sie die durchsichtige Schutzabdeckung an der Buchse des Verlängerungskabels nach oben und schieben den Sensorkabelstecker auf ganzer Länge in die Buchse des Verlängerungskabels (siehe Abbildung 10-1).
5. Klappen Sie die durchsichtige Schutzabdeckung über die Verbindung, um sie zu sichern (siehe Abbildung 10-2).
6. Anweisungen zum Anschließen des Kabels an das Gerät siehe „Anschließen des SpO₂-Sensors“ auf Seite 10-8.

Reinigen und Wiederverwenden von Sensoren

Wiederverwendbare Sensoren können wie folgt gereinigt werden:

Trennen Sie den Sensor ggf. vom Patientenkabel. Wischen Sie den gesamten Sensor mit einem mit 70-prozentigem Isopropylalkohol getränkten Tuch ab. Lassen Sie den Sensor an der Luft trocknen, bevor Sie ihn wieder verwenden.

Anschließen des SpO₂-Sensors

So schließen Sie den SpO₂-Sensor an das X Series-Gerät an:


1. Wenn Sie ein Sensor-Verlängerungskabel verwenden, untersuchen Sie das Kabel vor Verwendung. Ersetzen Sie das Kabel, wenn es Anzeichen von Verschleiß, Bruch oder Abrieb aufweist. Schließen Sie das Sensor-Verlängerungskabel an den SpO₂-Eingang an der Seite des X Series Geräts an:



Abbildung 10-3 Anschließen des SpO₂-Sensors an das X Series Gerät

Anzeige der SpO₂-, SpCO- und SpMet-Messwerte

Wenn die Verbindung zwischen dem SpO₂-Sensor und dem Gerät hergestellt wird, erscheint im SpO₂-Anzeigebereich die Meldung *INITIALISIEREN*. Nach einer kurzen Verzögerung zeigt das Gerät die SpO₂-Messwerte an. Sind die Optionen SpCO und SpMet installiert, werden diese SpCO- und SpMet-Messwerte abwechselnd alle zwei Sekunden unterhalb des SpO₂-Anzeigebereichs angezeigt.

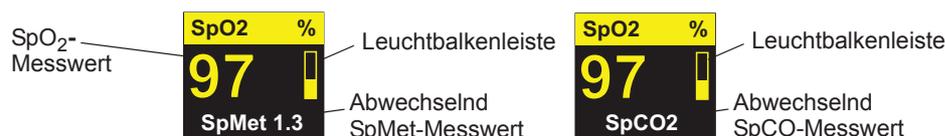

Wenn die Meldung *S. FEHL.* angezeigt wird, ist der Sensor entweder nicht mit dem X Series Gerät kompatibel oder funktioniert nicht und muss ersetzt werden.

Rechts neben dem numerischen SpO₂-Anzeigefenster erscheint eine Leuchtbalkenleiste. Die Leuchtbalkenleiste veranschaulicht die relative Stärke des pulsierenden Signals und die Qualität der SpO₂-Daten.

Aktivieren/Deaktivieren der SpO₂-Alarmer und Einstellen der Alarmgrenzwerte

Sofern aktiviert, gibt das X Series Gerät immer dann akustische Alarmer aus, wenn die Messwerte die festgelegten oberen und unteren SpO₂-Grenzwerte überschreiten. Sofern diese Optionen installiert sind, gilt dies analog auch für die SpCO- und SpMet-Messwerte.

Über die Schnellzugriffstaste „Alarmer“ () oder das Parameterbedienfeld „SpO₂“ können Sie SpO₂-, SpCO- und SpMet-Alarmer aktivieren (oder deaktivieren) sowie die oberen und die unteren Alarmgrenzwerte festlegen.

So konfigurieren Sie SpO₂-, SpCO- und SpMet-Alarmer über die Schnellzugriffstaste „Alarmer“:

1. Drücken Sie die Schnellzugriffstaste **Weiter/Zurück** ()
2. Drücken Sie .
3. Drücken Sie die Schnellzugriffstaste **Grenz.** ()
4. Rufen Sie mithilfe der Navigationstasten die entsprechende Alarm-Menüoption (SpO₂, SpCO oder SpMet) auf.
5. Wählen Sie mithilfe der Navigationstasten in dem ausgewählten Menü der Alarmeinstellungen die Felder aus, die Sie ändern möchten. Folgende Felder stehen zur Auswahl:
 - **Obergrenze aktivieren**
 - **Untergr. aktivieren**
 - **Obergrenze**
 - **Untergrenze**
6. Nach Änderung der Werte im Alarmmenü navigieren Sie zum Zurück-Pfeil, um das Menü zu verlassen.



Einstellen des oberen und des unteren Alarmgrenzwerts für den SpO₂-Alarm

Im Menü „SpO₂-Alarmeinstellungen“ wird initial festgelegt, ob der SpO₂-Alarm initial aktiviert (**EIN**) oder deaktiviert (**AUS**) ist; außerdem werden hier die Standardeinstellungen für den oberen und den unteren Alarmgrenzwert angezeigt. Der obere und der untere Grenzwert können auf **EIN** oder auf **AUS** eingestellt werden (die Standardeinstellung ist **AUS**). In der folgenden Tabelle werden die Standardgrenzwerte für den SpO₂-Alarm für Erwachsene, Kinder und Neugeborene aufgelistet. Auch wird der Bereich angegeben, in dem diese Grenzwerte festgelegt werden können:

Patiententyp	Standardgrenzwerte für den SpO ₂ -Alarm	Einstellbereich für die Grenzwerte für den SpO ₂ -Alarm
Erwachsene	Unterer Grenzwert: 85 % Oberer Grenzwert: 100 %	Unterer Grenzwert: 50 bis 98 % Oberer Grenzwert: 52 bis 100 %
Kinder	Unterer Grenzwert: 85 % Oberer Grenzwert: 100 %	Unterer Grenzwert: 50 bis 98 % Oberer Grenzwert: 52 bis 100 %
Neugeborene	Unterer Grenzwert: 85 % Oberer Grenzwert: 95 %	Unterer Grenzwert: 50 bis 98 % Oberer Grenzwert: 52 bis 100 %

Einstellen des oberen und des unteren SpCO- und SpMet-Alarmgrenzwerts

In der folgenden Tabelle werden die Standardgrenzwerte für den SpCO- und den SpMet-Alarm für Erwachsene, Kinder und Neugeborene aufgelistet. Auch wird der Bereich angegeben, in dem diese Grenzwerte festgelegt werden können:

Patiententyp	Standardgrenzwerte für den SpCO-Alarm	Einstellbereich für die Grenzwerte für den SpCO-Alarm	Standardgrenzwerte für den SpMet-Alarm	Einstellbereich für die Grenzwerte für den SpMet-Alarm
Erwachsene	Unterer Grenzwert: 0 % Oberer Grenzwert: 10 %	Unterer Grenzwert: 0 bis 98 % Oberer Grenzwert: 2 bis 100 %	Unterer Grenzwert: 0 % Oberer Grenzwert: 3 %	Unterer Grenzwert: 0 bis 98 % Oberer Grenzwert: 2 bis 100 %
Kinder	Unterer Grenzwert: 0 % Oberer Grenzwert: 10 %	Unterer Grenzwert: 0 bis 98 % Oberer Grenzwert: 2 bis 100 %	Unterer Grenzwert: 0 % Oberer Grenzwert: 3 %	Unterer Grenzwert: 0 bis 98 % Oberer Grenzwert: 2 bis 100 %
Neugeborene	Unterer Grenzwert: 0 % Oberer Grenzwert: 10 %	Unterer Grenzwert: 0 bis 98 % Oberer Grenzwert: 2 bis 100 %	Unterer Grenzwert: 0 % Oberer Grenzwert: 3 %	Unterer Grenzwert: 0 bis 98 % Oberer Grenzwert: 2 bis 100 %

Verwendung des Parameterbedienfelds „SpO₂“

Wählen Sie mithilfe der Navigationstasten die numerische SpO₂-Anzeige und rufen Sie so das Parameter-Bedienfeld „SpO₂“ auf. Die Optionen dieses Parameter-Bedienfelds ermöglichen es Ihnen, die Verwendung der SpO₂-Funktion für den jeweiligen Patienten zu optimieren:

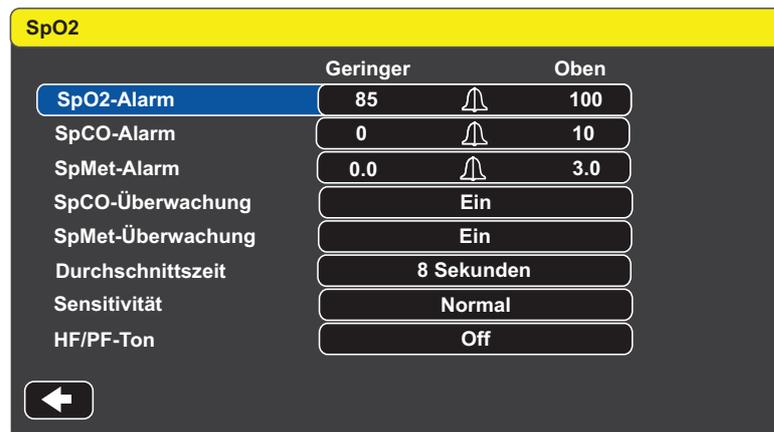


Abbildung 10-4 Parameterbedienfeld „SPO2“

Aktivieren/Deaktivieren der SpCO- und SpMet-Überwachung

Sind die Optionen SpCO und SpMet installiert, ermöglicht Ihnen das X Series Gerät das Aktivieren und Deaktivieren der SpCO- und der SpMet-Überwachung.

Festlegen der SpO₂-Mittelungszeit

Das Masimo SpO₂-Modul des X Series Geräts bietet drei verschiedene Zeitspannen, über die die SpO₂ gemittelt werden: 4 Sekunden, 8 Sekunden (Standard) und 16 Sekunden. In der Regel gibt es keinen Grund, von der Standardeinstellung (8 Sekunden) abzuweichen. Verwenden Sie für Hochrisikopatienten mit sich schnell ändernden SpO₂-Zuständen die 4-Sekunden-Einstellung. Verwenden Sie die 16-Sekunden-Einstellung nur, wenn die 8-Sekunden-Einstellung (Standard) aufgrund extremer Artefakte inadäquat ist.

Auswahl der SpO₂-Empfindlichkeit

Für die SpO₂-Überwachung stehen die beiden Empfindlichkeitseinstellungen „Normal“ und „Hoch“ zur Auswahl. Die Empfindlichkeitseinstellung „Normal“ ist die für die meisten Patienten zu empfehlende Einstellung. Die Empfindlichkeitseinstellung „Hoch“ ermöglicht eine SpO₂-Überwachung auch bei sehr geringer Perfusion, also beispielsweise bei schwerer Hypotonie oder Schock. Bei der Empfindlichkeitseinstellung „Hoch“ können die SpO₂-Ergebnisse jedoch leicht durch Artefakte verfälscht werden. Um bei Verwendung der Empfindlichkeitseinstellung „Hoch“ genaue SpO₂-Messwerte zu gewährleisten, müssen Sie den Patienten sorgfältig und kontinuierlich überwachen.

Auswählen des Herzfrequenz-/Pulsfrequenz-(HF/PF)-Tons

Das Gerät ermöglicht Ihnen, den Ton zu aktivieren oder zu deaktivieren, über den der Monitor den Puls des Patienten zu erkennen gibt: **Ein** oder **Aus** (keine Tonausgabe). Standardmäßig ist der Ton auf **Aus** konfiguriert.

SpO₂-Systemmeldungen

Während der SpO₂-Überwachung zeigt das X Series Gerät möglicherweise die folgenden Meldungen an:

Systemmeldung	Ursache
<i>INITIALISIEREN</i>	Das SpO ₂ -Pulsoxymeter wird initialisiert.
<i>SUCHE LÄUFT</i>	Das Gerät sucht nach einem Puls.
<i>SENSOR PRÜFEN</i>	Der SpO ₂ -Sensor ist vom Gerät diskonnektiert oder hat sich vom Patienten gelöst. Überprüfen Sie den Sensor und konnectieren Sie ihn wieder mit dem Gerät bzw. legen Sie ihn wieder am Patienten an.
<i>S. FEHL.</i>	Der SpO ₂ -Sensor ist defekt. Tauschen Sie den Sensor aus.
<i>GERINGE PERFUSION</i>	Die Durchblutung ist unter 20 % abgefallen.
<i>SPO2 INAKTIV</i>	Es ist ein Systemfehler aufgetreten. Das X Series Gerät kann keine SpO ₂ -Messungen durchführen und sollte gewartet werden.

Funktionsprüfgeräte und Patientensimulatoren

Mit manchen Modellen kommerziell erhältlicher Benchtop-Prüfgeräte und Patientensimulatoren lässt sich die einwandfreie Funktion von Masimo Pulsoxymeter-Sensoren, -Kabeln und -Monitoren überprüfen. Der Bedienungsanleitung des betreffenden Prüfgeräts können Sie die spezifische Vorgehensweise für das verwendete Prüfgerätemodell entnehmen.

Mit diesen Geräten lässt sich zwar die einwandfreie Funktion von Pulsoxymeter-Sensor, -Kabel und -Monitor überprüfen, sie können aber nicht die erforderlichen Daten für eine korrekte Beurteilung der SpO₂-Messgenauigkeit bereitstellen.

Für eine korrekte Beurteilung der SpO₂-Messgenauigkeit muss zumindest den Wellenlängenmerkmalen des Sensors Rechnung getragen und die komplexe optische Wechselwirkung zwischen Sensor und Gewebe des Patienten reproduziert werden. Diese Ansprüche übersteigen den Rahmen bekannter Benchtop-Prüfgeräte, darunter auch bekannte Geräte, welche angeblich die LED-Wellenlänge des Sensors messen.

Die SpO₂-Messgenauigkeit kann nur in vivo durch einen Vergleich der Pulsoxymetriemessungen mit SpO₂-Messwerten, die zeitgleich mit einem Labor-CO-Oxymeter aus arteriellen Blutproben gewonnen wurden, beurteilt werden.

Viele Prüfgeräte und Patientensimulatoren können auf die erwarteten Kalibrierungskurven des Oxymeters zugreifen und eignen sich möglicherweise zum Einsatz bei Masimo Monitoren und/oder Sensoren. Nicht alle dieser Geräte wurden jedoch auf die Verwendung mit dem digitalen Masimo Kalibrierungssystem abgestimmt. Dies wirkt sich zwar nicht auf den Einsatz des Simulators zur Überprüfung der Systemfunktionalität aus, die angezeigten SpO₂-Messwerte können jedoch von der Einstellung des Prüfgeräts abweichen.

Bei einem ordnungsgemäß funktionierenden Monitor ist diese Abweichung im zeitlichen Verlauf und von Monitor zu Monitor innerhalb der Leistungsspezifikationen des Testgeräts reproduzierbar.

Kapitel 11

Invasive Drucküberwachung (IBD)

Bei den X Series IBD-Eingängen handelt es sich um defibrillatorsichere Patientenverbindungen Typ CF.

In diesem Kapitel wird die Verwendung des X Series Geräts für die Überwachung invasiver Drücke (IBD) beschrieben.

Das X Series Gerät verfügt über drei Kanäle für die invasive Druckmessung: P1, P2 und P3. Sie können mit diesen drei Kanälen den arteriellen, den venösen sowie den Hirndruck messen, was mit Hilfe von invasiven Wandlern erfolgt, die eine Empfindlichkeit von $5 \mu\text{V/V/mmHg}$ aufweisen. Jeder Kanal benötigt einen eigenen Anschluss, ein Kabel und einen Druckwandler.

Invasive Druckwandler

Das X Series Gerät ist mit vielen Arten von invasiven Druckwandlern kompatibel, darunter wiederverwendbare Wandler, Wandler mit Einmaldom und Einmalwandler. Eine Liste kompatibler Wandler finden Sie in Anhang B, *Zubehör*. Verwenden Sie keine lichtempfindlichen Einmalwandler.

Verwenden Sie invasive Druckwandler gemäß Ihren krankenhausinternen Vorschriften und halten Sie sich an die Empfehlungen des Herstellers. Machen Sie sich vor dem Einsatz eines Wandlers immer zuerst mit der *Gebrauchsanleitung* des Herstellers vertraut.

- Warnung!**
- **Bei Einsatz von elektrochirurgischen Instrumenten dürfen keine Wandler mit leitendem Gehäuse (aus Metall), das mit seinem Schutzleiter verbunden ist, verwendet werden. Bei Einsatz eines Wandlers mit leitendem Gehäuse, das mit seiner Kabelabschirmung verbunden ist, besteht die Gefahr von Hochfrequenz-Verbrennungen an den EKG-Elektroden, falls das Wandlergehäuse geerdet wird.**
 - **Normale Alarmfunktionen können vollständig diskonnektierte invasive Druckwandler erkennen; lockere Verbindungen oder die Verwendung inkompatibler Wandler werden von den Alarmfunktionen jedoch nicht erkannt. Verwenden Sie ausschließlich freigegebene Wandler und stellen Sie sicher, dass die Wandler korrekt angeschlossen sind.**
 - **Das X Series Gerät sollte vor der Verwendung bei einem neuen Patienten mindestens 2 Minuten lang ausgeschaltet sein. Dies löscht die Trendwerte, die eingestellten Alarmgrenzwerte und den NIBD-Manschettendruck des vorherigen Patienten.**
 - **Verwenden Sie *ausschließlich* von ZOLL freigegebene IBD-Sensoren. Der Einsatz nicht freigegebener Sensoren kann zu IBD-Messfehlern führen.**
-

IBD-Einrichtung

Um mit dem X Series Gerät sichere und genaue IBD-Messungen vorzunehmen, müssen Sie die folgenden Schritte durchführen, die jeweils einem Abschnitt in diesem Kapitel entsprechen. Lesen Sie jeden Abschnitt sorgfältig durch, bevor Sie IBD-Messungen durchführen.

1. Anschließen des invasiven Druckwandlers an das X Series Gerät
2. Nullabgleich des Messwandlers
3. Einstellen der Alarme für die invasive Druckmessung (gemäß den Vorgaben Ihrer Einrichtung)
4. Auswahl einer Bezeichnung für den invasiven Druckkanal

Anschließen des invasiven Druckwandlers

Verfahren Sie beim Anlegen des invasiven Druckwandlers wie folgt:

1. Untersuchen Sie das Wandlerkabel. Ersetzen Sie das Kabel, wenn es Anzeichen von Verschleiß, Bruch oder Abrieb aufweist. Ersetzen Sie bei Bedarf den Dom des Wandlers.
2. Schließen Sie den Wandler gemäß der Vorgehensweise Ihrer Einrichtung an. Machen Sie sich vor dem Einsatz eines Wandlers immer zuerst mit der Gebrauchsanleitung des Herstellers vertraut.
3. Wenn es sich bei dem Wandler um ein Einmalprodukt mit einem separaten Kabel handelt, schließen Sie den Wandler an das Wandlerkabel an.
4. Stecken Sie das Wandlerkabel in einen der drei sechspoligen IBD-Kabelanschlüsse an der Seite des X Series Geräts ein.



Abbildung 11-1 Anschließen des Messwandlers an das X Series Gerät

Wenn Sie das Wandlerkabel an das Gerät anschließen, erscheint im numerischen Anzeigefenster des betreffenden IBD-Kanals die Meldung *SENSOR NULLEN*.

Nullabgleich des Messwandlers

Um sicherzustellen, dass das X Series Gerät den Druck genau misst, müssen Sie vor jeder Verwendung einen Nullabgleich des Wandlers durchführen. Wenn Sie einen Wandler austauschen oder entfernen, müssen Sie den neuen Wandler vor der Verwendung nullen. Wenn Sie einen Wandler an einen anderen Monitor anschließen, müssen Sie ihn erneut nullen, auch wenn dies bereits auf einem anderen Gerät geschehen ist. Halten Sie sich neben der folgenden Vorgehensweise auch an die *Gebrauchsanleitung* des Wandlerherstellers sowie das etablierte klinische Protokoll Ihrer Einrichtung.

Führen Sie den Nullabgleich des Wandlers folgendermaßen durch:

1. Platzieren Sie den Wandler auf Höhe des linken Atriums des Patienten.
2. Schließen Sie den Absperrhahn des Wandlers zum Patienten.
3. Öffnen Sie den Entlüftungshahn des Wandlers zur Umgebungsluft.
4. Lassen Sie den Wandler einige Sekunden zur Ruhe kommen.
5. Rufen Sie mithilfe der Navigationstasten den IBD-Kanal des Wandlers auf, um das Parameterbedienfeld des IBD-Kanals anzuzeigen:

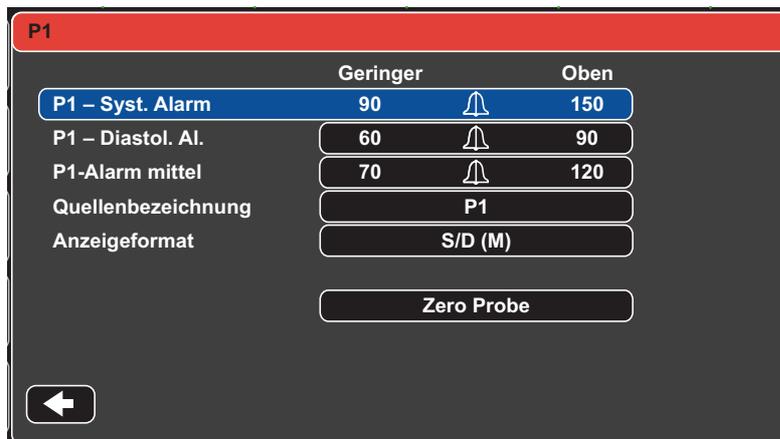


Abbildung 11-2 Parameterbedienfeld des IBD-Kanals

6. Wählen Sie **Sensor nullen**. Das Gerät zeigt in der numerischen Anzeige des betreffenden IBD-Kanals die Meldung *NULLUNG* an.
7. In der numerischen Anzeige des IBD-Kanals erscheint die Meldung *GENULLT*.
8. Schließen Sie den Absperrhahn des Wandlers.
9. Wenn das Gerät den Wandler nicht nullen konnte, wird in der numerischen Anzeige des IBD-Kanals die Meldung *GENULLT ZURÜCK* angezeigt. Das Gerät zeigt erst dann Druckwerte für den IBD-Kanal an, nachdem der Wandler erfolgreich genullt und ein akzeptabler Nullwert ermittelt wurde.

Stellen Sie sicher, dass der Wandler zur Umgebungsluft offen und ordnungsgemäß am Gerät angeschlossen ist. Führen Sie den Nullabgleich des Wandlers dann noch einmal durch. Das X Series Gerät nullt den Wandler nicht, falls es Pulsationen im Druckkanal entdeckt, das Signal zu stark verrauscht ist oder der Versatz des Wandlers zu groß ist.

Wenn sich der Wandler in mehreren Anläufen nicht nullen lässt, ersetzen Sie ihn oder das Wandlerkabel.

Erneutes Nullen eines Wandlers

Sie können einen Wandler jederzeit erneut nullen, indem Sie den Entlüftungshahn des Wandlers zur Umgebungsluft öffnen.

Wenn das Gerät den neuen Nullwert akzeptiert, zeigt es Druckwerte an, die auf dem betreffenden Wert basieren, und passt die Kurve an die neue Skala an.

Warnung! Wenn Sie versuchen, einen bereits erfolgreich genullten IBD-Kanal zu nullen, mit dem derzeit eine Druckkurve überwacht wird, zeigt das Gerät im numerischen Fenster des betreffenden IBD-Kanals die Meldung *GENULLT ZURÜCK* an. Diese Meldung blockiert die Anzeige gültiger numerischer invasiver Druckwerte.

Anzeigen von IBD-Messwerten

Nach dem Anschließen und Nullen eines Wandlers zeigt das X Series Gerät die systolischen, diastolischen und mittleren Werte des invasiven Drucks in der numerischen Anzeige des IBD-Kanals und optional (sofern über das Kurvenauswahl-Menü des Geräts aktiviert) die Kurve für den betreffenden IBD-Kanal an:



Das X Series Gerät bietet Ihnen die Möglichkeit, dem IBD-Messkanal eine Bezeichnung zu geben und ein Anzeigeformat für die numerische Anzeige festzulegen.

Das Gerät zeigt die Kurvenskalen an, nachdem der Wandler genullt wurde. Wenn das Gerät den Nullwert akzeptiert, bestimmt es die Kurvenskalen und zeigt sie an.

Bedingungen, die IBD-Messungen beeinträchtigen

Beim Ablesen der Blutdruckwerte in der numerischen IBD-Anzeige sollten Sie daran denken, dass die folgenden Bedingungen die Genauigkeit der IBD-Messwerte beeinträchtigen können:

- Katheterlage in den Blutgefäßen. Artefakte wie Kathetervibration sollten nach Ihren krankenhausinternen Vorschriften behandelt werden.
- Position des Wandler-Absperrhahns, des Katheters und des Spülanschlusses.
- Leitungsspülung mit Kochsalzlösung, was zur vorübergehenden Unterbrechung der genauen Druckmessung führt.
- Position des Wandlers zur phlebostatischen Achse des Patienten oder zur Katheterspitze.
- Patientenbewegung.
- Katheterverstopfung.
- Luftblasen im Katheter oder im Wandler.

Vorsicht Spülen Sie den Katheter regelmäßig während der IBD-Messung. Betrachten Sie immer die IBD-Kurve, um sicherzustellen, dass die Druckmesswerte auf einer physiologischen Kurvenform basieren.

Aktivieren/Deaktivieren von IBD-Alarmen und Einstellen der Alarmgrenzwerte

Sofern aktiviert, gibt das X Series Gerät immer dann akustische Alarme aus, wenn die IBD-Messwerte die folgenden Parametergrenzwerte über- bzw. unterschreiten:

- Systolische Ober- und Untergrenze
- Diasystolische Ober- und Untergrenze
- Ober- und Untergrenze für den mittleren arteriellen Blutdruck (MITTEL)

Zur Aktivierung (oder Deaktivierung) der IBD-Alarme, Festlegung der oberen und unteren Alarmgrenzwerte und des IBD-Kanals können Sie entweder mithilfe der Navigationstasten die IBD-Kanalanzeige aufrufen oder wie folgt vorgehen:

1. Drücken Sie die Schnellzugriffstaste „Weiter/Zurück“ ()
2. Drücken Sie .
3. Drücken Sie die Schnellzugriffstaste **Grenz.** ()
4. Rufen Sie mithilfe der Navigationstasten die entsprechende Alarm-Menüoption auf. Für jeden IBD-Kanal sind Alarmmenüs mit Alarmeinstellungen für den systolischen („Systol. Alarm“), den diastolischen („Diast. Alarm“) und den mittleren arteriellen Druck („Alarm mittel“) vorhanden. Wählen Sie mithilfe der Navigationstasten in dem ausgewählten Menü der Alarmeinstellungen die Felder aus, die Sie ändern möchten. Folgende Felder stehen zur Auswahl:
 - **Obergrenze aktivieren**
 - **Untergr. aktivieren**
 - **Obergrenze**
 - **Untergrenze**
5. Nach Änderung der Werte im Alarmmenü navigieren Sie zum Zurück-Pfeil, um das Menü zu verlassen. 

Einstellen des oberen und des unteren systolischen (SYS) Alarmgrenzwerts

Im Menü „IBP – Sys.-Alarmeinstellungen“ wird initial festgelegt, ob der systolische IBD-Alarm aktiviert (**EIN**) oder deaktiviert (**AUS**) ist; außerdem wird hier die Standardeinstellung für den oberen und den unteren systolischen Alarmgrenzwert angezeigt. Der obere und der untere Grenzwert können auf **EIN** oder auf **AUS** eingestellt werden (die Standardeinstellung ist **AUS**). In der folgenden Tabelle werden die systolischen Standard-IBD-Alarmgrenzwerte für Erwachsene, Kinder und Neugeborene aufgelistet. Auch wird der Bereich angegeben, in dem diese Grenzwerte festgelegt werden können:

Patiententyp	Systolische Standard-IBD-Grenzwerte	Einstellbereich für die systolischen IBD-Grenzwerte
Erwachsene	Unterer Grenzwert: 75 mmHg Oberer Grenzwert: 220 mmHg	Unterer Grenzwert: –30 bis 298 mmHg Oberer Grenzwert: –28 bis 300 mmHg
Kinder	Unterer Grenzwert: 75 mmHg Oberer Grenzwert: 145 mmHg	Unterer Grenzwert: –30 bis 298 mmHg Oberer Grenzwert: –28 bis 300 mmHg
Neugeborene	Unterer Grenzwert: 50 mmHg Oberer Grenzwert: 100 mmHg	Unterer Grenzwert: –30 bis 298 mmHg Oberer Grenzwert: –28 bis 300 mmHg

Einstellen des oberen und des unteren diastolischen (DIA) Alarmgrenzwerts

Im Menü „IBP – Dia.-Alarmeinstellungen“ wird initial festgelegt, ob der diastolische IBD-Alarm aktiviert (**EIN**) oder deaktiviert (**AUS**) ist; außerdem wird hier die Standardeinstellung für den oberen und den unteren diastolischen Alarmgrenzwert angezeigt. Der obere und der untere Grenzwert können auf **EIN** oder auf **AUS** eingestellt werden (die Standardeinstellung ist **AUS**). In der folgenden Tabelle werden die diastolischen Standard-IBD-Alarmgrenzwerte für Erwachsene, Kinder und Neugeborene aufgelistet. Auch wird der Bereich angegeben, in dem diese Grenzwerte festgelegt werden können:

Patiententyp	Diastolische Standard-IBD-Grenzwerte	Einstellbereich für die diastolischen IBD-Grenzwerte
Erwachsene	Unterer Grenzwert: 35 mmHg Oberer Grenzwert: 110 mmHg	Unterer Grenzwert: –30 bis 298 mmHg Oberer Grenzwert: –28 bis 300 mmHg
Kinder	Unterer Grenzwert: 35 mmHg Oberer Grenzwert: 100 mmHg	Unterer Grenzwert: –30 bis 298 mmHg Oberer Grenzwert: –28 bis 300 mmHg
Neugeborene	Unterer Grenzwert: 30 mmHg Oberer Grenzwert: 70 mmHg	Unterer Grenzwert: –30 bis 298 mmHg Oberer Grenzwert: –28 bis 300 mmHg

Einstellen des oberen und des unteren Alarmgrenzwerts für den mittleren arteriellen Druck (MITTEL)

Im Menü „IBP – Alarmeinstell. mittel“ wird initial festgelegt, ob der IBD-Mittelwert-Alarm aktiviert (**EIN**) oder deaktiviert (**AUS**) ist; außerdem wird hier die Standardeinstellung für den oberen und den unteren Mittelwert-Alarmgrenzwert angezeigt. Der obere und der untere Grenzwert können auf **EIN** oder auf **AUS** eingestellt werden (die Standardeinstellung ist **AUS**). In der folgenden Tabelle werden die Standard-Mittelwert-Alarmgrenzwerte für Erwachsene, Kinder und Neugeborene aufgelistet. Auch wird der Bereich angegeben, in dem diese Grenzwerte festgelegt werden können:

Patiententyp	Standard-IBD-Grenzwerte für den mittleren Druck	Einstellbereich für die IBD-Grenzwerte für den mittleren Druck
Erwachsene	Unterer Grenzwert: 50 mmHg Oberer Grenzwert: 120 mmHg	Unterer Grenzwert: –30 bis 298 mmHg Oberer Grenzwert: –28 bis 300 mmHg
Kinder	Unterer Grenzwert: 50 mmHg Oberer Grenzwert: 110 mmHg	Unterer Grenzwert: –30 bis 298 mmHg Oberer Grenzwert: –28 bis 300 mmHg
Neugeborene	Unterer Grenzwert: 35 mmHg Oberer Grenzwert: 80 mmHg	Unterer Grenzwert: –30 bis 298 mmHg Oberer Grenzwert: –28 bis 300 mmHg

Einstellen der IBD-Quellenbezeichnung

Im IBD-Kanal-Menü können Sie eine Bezeichnung auswählen, mit der die Quelle des IBD-Messkanals ausgewiesen wird. Die Kanäle sind standardmäßig mit P1, P2 und P3 bezeichnet.

Über die Eingabeaufforderung „Quellenbez.“ können Sie festlegen, dass das Gerät zur Identifizierung des IBD-Kanals eine der folgenden Bezeichnungen anzeigt:

Quellenbezeichnung	Beschreibung	Quellenbezeichnung	Beschreibung
ABP	Abdominaler Aortendruck	AO	Aorta
ART	Arterieller Druck	BAP	Brachialisdruck
CVP	Zentraler Venendruck	FAP	Femoralisdruck
ICP	Intrakranieller Druck	LAP	Labialisdruck
PAP	Pulmonalisdruck	RAP	Radialisdruck
UAP	Umbilikalisdruk	UVP	Nabelvenendruck

In dem folgenden Beispiel sind für alle drei IBD-Kanäle Quellenbezeichnungen angegeben:



IBD-Systemmeldungen

Während der IBD-Überwachung zeigt das X Series Gerät möglicherweise die folgenden Meldungen an:

Systemmeldung	Ursache
<i>WANDLERFEHLER</i>	Der IBD-Sensor ist beschädigt und muss ersetzt werden.
<i>INKOMPATIBLER WANDLER</i>	Der IBD-Sensor ist nicht kompatibel. Eine Liste der von ZOLL freigegebenen IBD-Sensoren finden Sie in Anhang B, <i>Zubehör</i> .
<i>SONDE PRÜFEN</i>	Der IBD-Sensor hat sich gelöst.
<i>SENSOR NULLEN</i>	Der IBD-Sensor ist angeschlossen und muss genullt werden.
<i>NULLUNG</i>	Der IBD-Sensor wird genullt.
<i>IBD DEAKTIVIERT</i>	Es ist ein Systemfehler aufgetreten und das X Series Gerät sollte gewartet werden.
<i>GENULLT ZURÜCK</i>	Der IBD-Sensor wurde aufgrund eines pulsierenden Drucksignals, übermäßiger IBD-Artefakte oder eines übermäßigen Wandlerersatzes nicht entfernt.

Kapitel 12

Temperaturüberwachung

Bei den X Series Temperatureingängen handelt es sich um defibrillatorsichere Patientenverbindungen Typ CF.

In diesem Kapitel wird die Verwendung des X Series Geräts für die Temperaturüberwachung beschrieben.

Das X Series Gerät verfügt über zwei Temperaturkanäle. Wenn beide Kanäle verwendet werden, zeigt das Gerät abwechselnd die beiden Temperaturwerte und die mit ΔT gekennzeichnete Differenz der beiden Temperaturwerte an.

Einrichtung der Temperaturüberwachung

Verfahren Sie zur Temperaturüberwachung mit dem X Series Gerät wie folgt:

1. Wählen Sie die Temperatursonde aus und legen Sie diese an den Patienten an.
2. Schließen Sie die Temperatursonde an das X Series Gerät an.
3. Konfigurieren Sie die Temperaturalarmlage und -einstellungen (sofern die derzeitigen Temperaturalarmlage und -Einstellungen nicht geeignet sind).

Auswählen und Anlegen von Temperatursonden

Sie sollten nur Temperatursonden verwenden, die für die Verwendung mit dem X Series Gerät freigegeben sind. Eine Liste der von ZOLL freigegebenen Temperatursonden finden Sie in Anhang B, *Zubehör*. Die Verwendung anderer Sonden, die nicht den Leistungsspezifikationen der von ZOLL freigegebenen Sonden entsprechen, kann zu fehlerhaften Temperaturmessungen führen.

Beachten Sie beim Anlegen der Sonde am Patienten Ihre krankenhausinternen Vorschriften. Machen Sie sich vor dem Einsatz einer Sonde immer zuerst mit der Gebrauchsanweisung des Herstellers vertraut.

- Warnung!**
- **Das Anlegen und die Verwendung von Temperatursonden mit Metallhülsen, die während elektrochirurgischer Maßnahmen mit leitenden Gegenständen oder klinischem Personal in Kontakt kommen, kann zu Verbrennungen an der Kontaktstelle der Temperatursonde mit dem Patienten führen.**
 - **Verwenden Sie *nur* von ZOLL freigegebene Temperatursonden. Die Verwendung nicht freigegebener Sonden kann zu fehlerhaften Temperaturmessungen führen.**
-

Anschließen der Temperatursonde

Zum Anschließen der Temperatursonde stecken Sie den 1/4-Zoll-Stecker der Sonde in eine der beiden Anschlussbuchsen an der Seite des X Series Geräts.



Abbildung 12-1 Anschließen der Temperatursonde an das X Series Gerät

Anzeigen der Temperatur

Wenn Sie die Sonde anschließen, zeigt das Gerät nach einer kurzen Pause die Temperatur an. Das X Series Gerät zeigt die Temperatur als numerischen Wert im Fenster „Temperatur“ an. Sie können bestimmen, ob das Gerät die Temperatur in °C oder in °F anzeigt.

Aktivieren/Deaktivieren von Temperaturalarmen und Einstellen der Alarmgrenzwerte

Sofern aktiviert, gibt das X Series Gerät immer dann akustische Alarme aus, wenn der Temperaturwert die eingestellten Alarmgrenzwerte über- bzw. unterschreitet.

Über die Schnellzugriffstaste „Alarme“ oder das Parameterbedienfeld „Temp“ können Sie Temperaturalarme aktivieren (oder deaktivieren) sowie den oberen und den unteren Alarmgrenzwert festlegen.

So konfigurieren Sie Temperaturalarme über die Schnellzugriffstaste **Alarme**:

1. Drücken Sie die Schnellzugriffstaste „Weiter/Zurück“ (.
2. Drücken Sie .
3. Drücken Sie die Schnellzugriffstaste **Grenz.** (.
4. Markieren Sie mithilfe der Navigationstasten eine der Menüoptionen **T1-Alarm**, **T2-Alarm** oder **ΔT-Alarm** und rufen Sie sie auf. Wählen Sie mithilfe der Navigationstasten im Menü der Alarmeinstellungen die Felder aus, die Sie ändern möchten. Folgende Felder stehen zur Auswahl:

- **Obergrenze aktivieren**
- **Untergr. aktivieren**
- **Obergrenze**
- **Untergrenze**

5. Nach Änderung der Werte im Alarmmenü navigieren Sie zum Zurück-Pfeil, um das Menü zu verlassen.

Einstellen des oberen und des unteren Temperatur-Alarmgrenzwerts

Im Menü „Temperatur-Alarmeinstellungen“ wird initial festgelegt, ob der Temperaturalarm aktiviert oder deaktiviert ist; außerdem wird hier die Standardeinstellung für den oberen und den unteren Alarmgrenzwert angezeigt. Der obere und der untere Grenzwert können auf **EIN** oder auf **AUS** eingestellt werden (die Standardeinstellung ist **AUS**). In der folgenden Tabelle werden die Temperatur-Standardgrenzwerte für Erwachsene, Kinder und Neugeborene aufgelistet. Auch wird der Bereich angegeben, in dem diese Grenzwerte festgelegt werden können:

Patiententyp	Standard-Temperaturgrenzwerte	Einstellbereich für die Temperaturgrenzwerte
Erwachsene	Unterer Grenzwert: 35 °C (95.0 °F) Oberer Grenzwert: 37.8 °C (100 °F)	Unterer Grenzwert: 0.0 bis 48.0 °C (32.0 bis 120.0 °F) Oberer Grenzwert: 2.0 bis 50.0 °C (34.0 bis 122.0 °F)
Kinder	Unterer Grenzwert: 35 °C (95.0 °F) Oberer Grenzwert: 37.8 °C (100 °F)	Unterer Grenzwert: 0.0 bis 48.0 °C (32.0 bis 120.0 °F) Oberer Grenzwert: 2.0 bis 50.0 °C (34.0 bis 122.0 °F)
Neugeborene	Unterer Grenzwert: 35 °C (95.0 °F) Oberer Grenzwert: 37.8 °C (100 °F)	Unterer Grenzwert: 0.0 bis 48.0 °C (32.0 bis 120.0 °F) Oberer Grenzwert: 2.0 bis 50.0 °C (34.0 bis 122.0 °F)

Einstellen des oberen und des unteren Δ Temperatur-Alarmgrenzwerts

Im Menü „ Δ Temperatur-Alarmeinstellungen“ wird initial festgelegt, dass der Δ Temperaturalarm aktiviert (**EIN**) ist; außerdem wird hier die Standardeinstellung für den oberen und den unteren Alarmgrenzwert angezeigt. Der obere und der untere Grenzwert können auf **EIN** oder auf **AUS** eingestellt werden (die Standardeinstellung ist **AUS**). In der folgenden Tabelle werden die Δ Temperatur-Standardgrenzwerte für Erwachsene, Kinder und Neugeborene aufgelistet. Auch wird der Bereich angegeben, in dem diese Grenzwerte festgelegt werden können:

Patiententyp	Standard- Δ Temperaturgrenzwerte	Einstellbereich für die Δ Temperaturgrenzwerte
Erwachsene	Unterer Grenzwert: 0.0 °C (0.0 °F) Oberer Grenzwert: -15 °C (5.0 °F)	Unterer Grenzwert: 0.0 bis 32.1 °C (0.0 bis 89.8 °F) Oberer Grenzwert: -17.2 bis 32.2 °C (0.2 bis 90.0 °F)
Kinder	Unterer Grenzwert: 0.0 °C (0.0 °F) Oberer Grenzwert: -15 °C (5.0 °F)	Unterer Grenzwert: 0.0 bis 32.1 °C (0.0 bis 89.8 °F) Oberer Grenzwert: -17.2 bis 32.2 °C (0.2 bis 90.0 °F)
Neugeborene	Unterer Grenzwert: 0.0 °C (0.0 °F) Oberer Grenzwert: -15 °C (5.0 °F)	Unterer Grenzwert: 0.0 bis 32.1 °C (0.0 bis 89.8 °F) Oberer Grenzwert: -17.2 bis 32.2 °C (0.2 bis 90.0 °F)

Auswahl der Temperaturbezeichnung

Über das Parameterbedienfeld „Temp“ können Sie (wie zuvor beschrieben) Alarmer konfigurieren und beschreibende Temperatur-Kanalbezeichnungen festlegen, die in der numerischen Anzeige und im Trendbericht erscheinen:

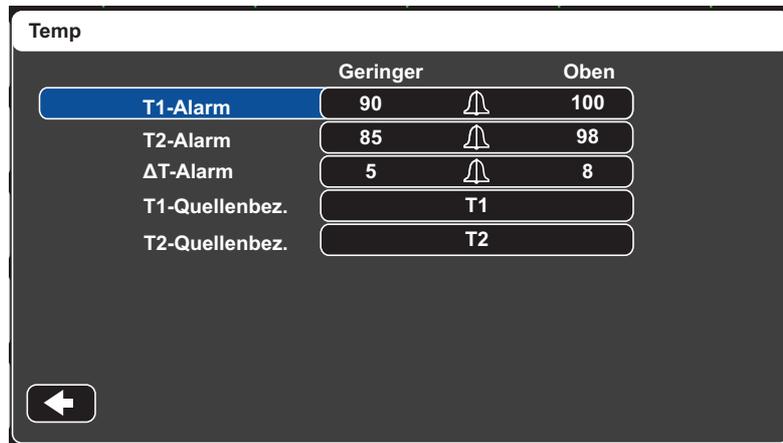


Abbildung 12-2 Parameterbedienfeld „Temp“

Für jeden Temperaturkanal kann eine der folgenden Bezeichnungen ausgewählt werden:

Quellenbezeichnung	Beschreibung
ART	Arterielle Temperatursonde
CORE (KERN)	Sonde für Temperatur im Körperkern oder am Trommelfell
ESOPH	Ösophagustemperatursonde
REKT	Rektumtemperatursonde
HAUT	Hauttemperatursonde (Oberflächentemperatur)
VEN	Atemwegtemperatursonde für Beatmungsgeräte
NASO	Nasopharyngeale oder nasale/orale Temperatursonde

Wird keine Bezeichnung gewählt, werden die Temperaturkanäle mit den Standardbezeichnungen T1 und T2 angezeigt.

Temperatur-Systemmeldungen

Während der Temperaturüberwachung zeigt das X Series Gerät möglicherweise die folgenden Meldungen an.

Hinweis: Die Temperaturfunktion führt beim erstmaligen Einschalten einen Selbsttest durch. Solange diese Funktion aktiv ist, werden zudem automatisch alle 10 Sekunden Systemtests durchgeführt.

Systemmeldung	Ursache
<i>SONDE PRÜFEN</i>	Die Temperatursonde ist diskonnektiert. Kontrollieren Sie die Sonde und konnektieren Sie diese wieder.
<i>SONDENFEHLER</i>	Die Temperatursonde ist defekt. Ersetzen Sie die Temperatursonde.
<i>TEMP. INAKTIV</i>	Es ist ein Systemfehler aufgetreten. Das X Series Gerät kann keine Temperaturmessungen durchführen und sollte gewartet werden.

Kapitel 13

Automatische externe Defibrillation (AED)



Bei ZOLL Freihand-Therapieelektroden handelt es sich um defibrillationsgeschützte Patientenanschlüsse Typ BF.

WARNUNG! Für die Defibrillation von Patienten unter 8 Jahren dürfen im AED-Modus nur pädiatrische Elektroden verwendet werden. Achten Sie zudem darauf, dass der Patientenmodus auf „Kind“ eingestellt ist. Bei Verwendung von Elektroden für Erwachsene oder des Patientenmodus „Erwachsen“ besteht die Gefahr, dass der Patient eine zu hohe Energiedosis erhält.

In diesem Kapitel wird die empfohlene Vorgehensweise für den Betrieb des Geräts im AED-Modus beschrieben. Das X Series Gerät ist für den Betrieb gemäß der „American Heart Association and European Resuscitation Council Guidelines for Adult Basic Life Support and Use of Automated External Defibrillators“ (AHA- und ERC-Richtlinien für die Basismaßnahmen der HLW und der Verwendung automatischer externer Defibrillatoren) konfiguriert.^{1,2,3,4} Wenn Ihr lokales Protokoll eine andere Vorgehensweise vorsieht, dann richten Sie sich nach diesem Protokoll.

Dieses Kapitel beschreibt auch das Umschalten des Geräts aus dem AED-Modus in den manuellen Modus (siehe „Wechsel in den manuellen Modus“ auf Seite 13-10).

-
1. *Circulation*, 2005; 112; IU-19-IU-34
 2. *Resuscitation*, 2005; 671S, S7-S23
 3. *Circulation*, 2010; 122; S640-S656
 4. *Resuscitation*, 2010; 1219-76

Der X Series Defibrillator kann den EKG-Rhythmus eines Patienten auf zweierlei Art analysieren. Bei der ersten handelt es sich um eine automatisch durchgeführte Analyse, bei der zweiten um eine durch den Bediener durch Drücken der Taste **ANALYSE** angeforderte Analyse.

Die automatische und die vom Bediener angeforderte Analyse des Patienten-EKGs können nur durchgeführt werden, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Freihand-Therapieelektroden sind angeschlossen und haben guten Kontakt mit dem Patienten.
- Der Defibrillator ist eingeschaltet.

Diese Analyse umfasst normalerweise bis zu drei aufeinanderfolgende Analysen eines EKG-Rhythmus von 3 Sekunden Dauer. Wenn mindestens zwei der drei Analysen ergeben, dass ein schockbarer Rhythmus vorliegt, fordert das Gerät den Bediener automatisch auf, dem Patienten einen Schock mit der vorkonfigurierten Energiestufe zu verabreichen. Wenn mindestens zwei der drei Analysen des 3-Sekunden-EKG-Rhythmus keinen schockbaren Rhythmus feststellen, gibt das Gerät die Warnung aus, dass kein Schock verabreicht werden sollte.

Wenn die ersten beiden Analysen zu demselben Ergebnis gekommen sind, wird die endgültige Entscheidung (schockbar/nicht schockbar) getroffen und keine dritte Analyse durchgeführt.

Wird die **SCHOCK**-Taste gedrückt und erfolgt daraufhin die erfolgreiche Abgabe eines Schocks, wird der Schockzähler um 1 erhöht und im Display angezeigt.

AED-Betrieb

Bestimmen des Patientenzustands gemäß den medizinischen Protokollen

Überprüfen Sie, ob folgende Symptome vorliegen:

- Bewusstlosigkeit
- Atemstillstand
- Kein tastbarer Puls

Aufnahme der HLW gemäß den medizinischen Protokollen

Fordern Sie zusätzliche Unterstützung an.

Vorbereitung des Patienten

Entfernen Sie die Kleidung im Brustbereich des Patienten. Trocknen Sie den Brustbereich erforderlichenfalls ab. Wenn die Brust des Patienten übermäßig behaart ist, kürzen oder entfernen Sie die Behaarung, damit die Elektroden richtig anliegen.

Legen Sie die Freihand-Therapieelektroden wie auf der Verpackung der Elektroden beschrieben an.

Vergewissern Sie sich, dass die Elektroden richtig an der Haut des Patienten anliegen und keine Teile der EKG-Elektroden verdecken.

Schließen Sie die Freihand-Therapieelektroden an das Multifunktionskabel (MFC) an (sofern nicht bereits geschehen).


Wenn die Therapieelektroden keinen guten Kontakt zur Haut des Patienten haben, gibt das Gerät die Meldung *PADS AUFKLL.* oder *PADS PRÜFEN* aus. Eine Energieabgabe ist in diesem Fall nicht möglich. Wenn ein Kurzschluss zwischen den Therapieelektroden vorliegt, wird die Meldung *PAD-KURZSCHLUSS ERMITTELT* angezeigt.

Hinweis: Da die Analyse nur unter Verwendung der von den Pads abgeleiteten Signale erfolgt – selbst wenn ein EKG-Kabel angeschlossen und Ableitung II verfügbar ist –, zeigt das Gerät weiterhin die Meldung *PADS PRÜFEN* an.

Anlegen der Therapieelektroden

WARNUNG! Schlechte Haftung und/oder Luft unter den Therapieelektroden kann zu Lichtbogenbildung und Hautverbrennungen führen.

1. Legen Sie eine Kante der Elektrode fest am Patienten an.
2. Rollen Sie die Elektrode ausgehend von dieser Kante in einer durchgehenden Bewegung auf die Haut. Achten Sie darauf, dass sich zwischen dem Gel und der Haut keine Luftpneinschlüsse bilden.

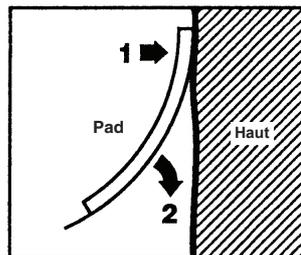


Hinweis: Wenn die mit „BACK“ bezeichnete Elektrode nicht am Rücken des Patienten angelegt werden kann, sind die Elektroden in der Standard-Apex-Sternum-Konfiguration anzulegen. Diese ermöglicht eine wirksame Defibrillation, eine Stimulation zeigt jedoch üblicherweise weniger Wirkung.

1 – Einschalten des Geräts

Drücken Sie die grüne EIN/AUS-Taste oben am Gerät. Die grünen, gelben und roten LEDs an der Geräteoberseite blinken, anschließend meldet das Gerät *SELBSTTEST BESTANDEN*.

Wenn keine Freihand-Therapieelektroden am Patienten angelegt und an das X Series Gerät angeschlossen sind, wird die Text- und Audio-Aufforderung *PADS AUFKL.* ausgegeben.

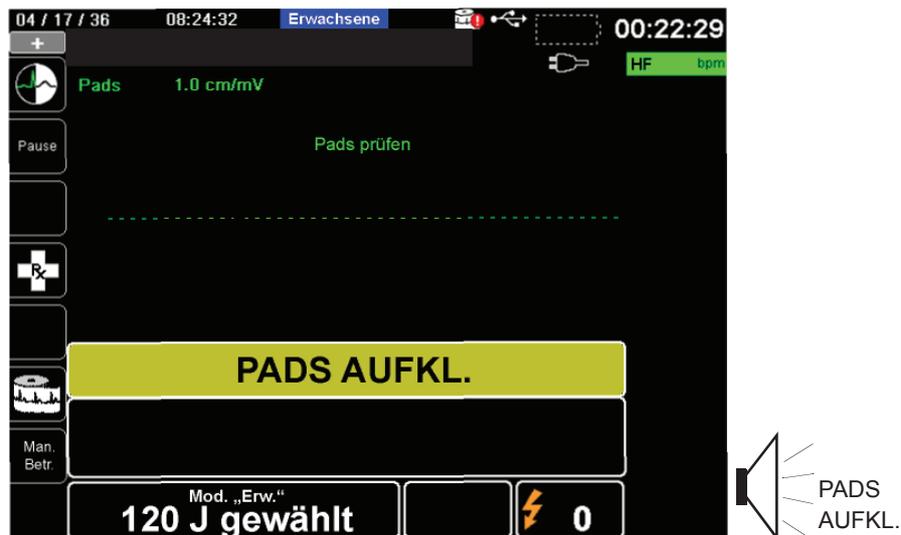

Energiewahl

Für erwachsene Patienten gelten die folgenden Standard-Energieeinstellungen:

- Schock 1: 120 Joule
- Schock 2: 150 Joule
- Schock 3: 200 Joule

Für pädiatrische Patienten gelten die folgenden Standard-Energieeinstellungen:

- Schock 1: 50 Joule
- Schock 2: 70 Joule
- Schock 3: 85 Joule

Hinweis: Die Defibrillator-Energiestufen für Kinder sollten gemäß den lokal geltenden Protokollen festgelegt werden.

Hinweis: Ist das X Series Gerät so konfiguriert, dass es beim Einschalten mit einer Herzlungenwiederbelebung beginnt, beginnt es automatisch mit dem CPR-Intervall.

2 – Analyse

WARNUNG! Führen Sie keine Analyse des Patienten-EKGs durch, während sich der Patient in Bewegung befindet. Der Patient muss während der EKG-Analyse bewegungslos sein. Berühren Sie den Patienten während der Analyse nicht. Unterbinden Sie vor der EKG-Analyse alle Bewegungen durch die Krankentrage oder das Krankenfahrzeug.

Das X Series Gerät beginnt automatisch damit, den EKG-Rhythmus des Patienten zu analysieren, zeigt für 5 Sekunden die Meldung EKG-ANALYSE LÄUFT an und gibt dann eine Text- und Audio-Aufforderung *HÄNDE WEG* aus. Wenn die Therapieelektroden nicht richtig am Patienten angebracht sind, wird die Meldung *PADS AUFKFL.* oder *PADS PRÜFEN* ausgegeben und die Analyse unterbunden.

Hinweis: Können Sie durch Drücken der Taste **Pause** den Reanimationszyklus anhalten. Um den Analyseprozess wieder aufzunehmen, drücken Sie die Taste **ANALYSE**.


Hinweis: Ist das X Series Gerät für die Durchführung einer zusätzlichen Herzlungenwiederbelebung konfiguriert, wird für 10 Sekunden die Text- und Audio-Aufforderung *PULS PRÜFEN* ausgegeben. Anschließend gibt das Gerät für die konfigurierte Zeit die Text- und Audio-Aufforderung *CPR DURCHF.* aus, bevor die Analyse beginnt. Durch Drücken der Taste **ANALYSE** können Sie während des CPR-Intervalls eine EKG-Analyse starten.



Während das EKG des Patienten analysiert wird, wird die Meldung EKG-ANALYSE LÄUFT angezeigt. Sobald die Analyse abgeschlossen ist, zeigt das Gerät an, ob die Abgabe eines Schocks empfohlen wird oder nicht.

WARNUNG! Die EKG-Rhythmusanalyse warnt nicht bei Asystolien, da diese keinen schockbaren Rhythmus darstellen.

Wenn ein nicht schockbarer Rhythmus erkannt wird, zeigt das Gerät die Meldung *KEIN SCHOCK EMPFOHLEN* an. Beginnen Sie sofort mit Thoraxkompressionen und setzen Sie die sonstige Notfallbehandlung gemäß Protokoll fort.

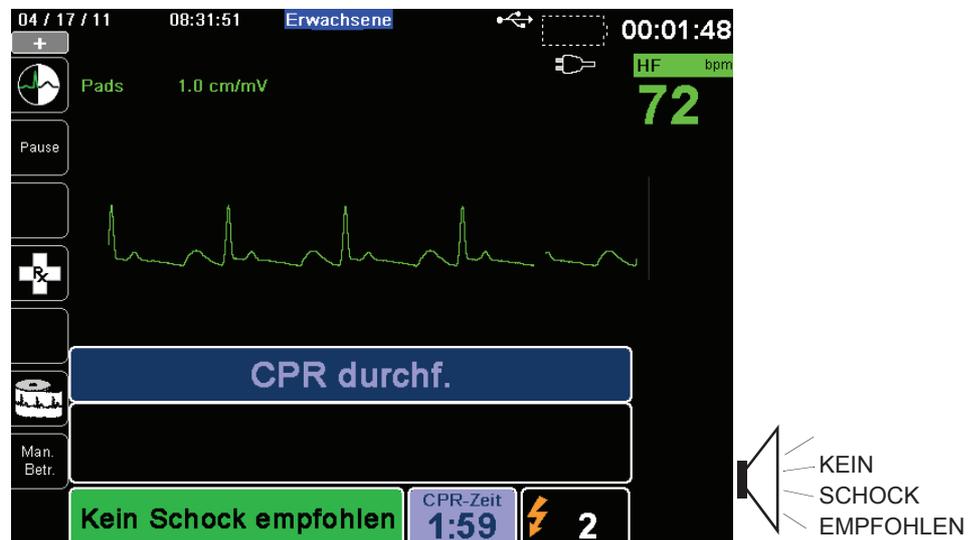

Wenn der Rhythmus des Patienten schockbar ist, zeigt das Gerät die Meldungen *SCHOCK EMPFOHLEN* und *SCHOCK DRÜCKEN* an. Der Defibrillator fordert den Bediener automatisch auf, dem Patienten einen Schock mit der vorkonfigurierten Energiestufe zu verabreichen, und die Taste **SCHOCK** leuchtet auf.

20 Sekunden lang ist ein Dauerton zu hören. Dann folgt 10 Sekunden lang ein intermittierender Ton. Sie müssen den Schock innerhalb dieses 30-Sekunden-Intervalls abgeben, sonst entlädt sich der Defibrillator selbsttätig.



3 – Drücken der Taste **SCHOCK**

WARNUNG! Fordern Sie alle Personen in der Nähe des Patienten auf, vor dem Entladen des Defibrillators **ZURÜCKZUTRETEN**.

Berühren Sie während der Defibrillation weder das Bett noch den Patienten noch Geräte, die an den Patienten angeschlossen sind. Es besteht Elektroschockgefahr! Entblößte Körperteile des Patienten dürfen nicht mit Metallteilen wie dem Bettrahmen in Berührung stehen, um unerwünschte Pfade für den Defibrillationsstrom auszuschließen.

Halten Sie die beleuchtete Taste **SCHOCK** an der Gerätefront gedrückt, bis die Energie an den Patienten abgegeben wird.

Beobachten Sie den Patienten oder die EKG-Reaktion, um zu verifizieren, dass der Schock abgegeben wurde.

Im Bedienfeld unten im Display werden die abgegebene Energiestufe und die Nummer des Schocks (1) angezeigt.



Herzlungenwiederbelebung

Beginnen Sie auf Aufforderung durch das Gerät mit den Thoraxkompressionen und der Beatmung gemäß dem lokalen Protokoll.

Hinweis: Sind ZOLL OneStep CPR-, OneStep Complete- oder CPR-D-padz-Elektroden angeschlossen, überwacht das Gerät die Frequenz und die Tiefe der Thoraxkompressionen und kann die Text- und Audio-Aufforderungen *FESTER DRÜCKEN* und *DRUCKMASSAGE GUT* ausgeben.

Wiederholen der Analyse

Nach Durchführung der Herzlungenwiederbelebung für das konfigurierte CPR-Intervall startet das Gerät die EKG-Analyse automatisch neu.

Hinweis: In den ersten 3 Sekunden nach einer Schockabgabe ist keine erneute Analyse des EKG-Rhythmus möglich.

Herzlungenwiederbelebung unterbrechen

Nach Durchführung der Herzlungenwiederbelebung für das konfigurierte CPR-Intervall gibt das Gerät die Aufforderung *RE. UNTER.* aus, während es die EKG-Analyse neu startet.

Fortführung der Patientenversorgung

Führen Sie die Patientenversorgung gemäß den medizinischen Protokollen fort.

Betriebsmeldungen

Das Gerät versorgt den Bediener optisch und akustisch mit wichtigen Informationen. Die folgenden Beschreibungen beziehen sich auf die Standardkonfiguration des Geräts. Wenn die Konfiguration des Geräts angepasst wurde, können einige Informationen abweichen.

Im AED-Modus werden 10 Audio-Aufforderungen verwendet. Die meisten dieser Aufforderungen werden außerdem als Meldung im Display angezeigt. Die Audio-Aufforderungen werden nur einmal ausgegeben. Die Meldung im Display wird jedoch so lange angezeigt, bis der Bediener eine neue Maßnahme ergreift oder der Gerätestatus sich ändert.

Wenn zwei Bedingungen gleichzeitig festgestellt werden, zeigt das Gerät abwechselnd zwei verschiedene Meldungen im selben Feld des Displays an. Ein Beispiel: Die Meldung *BATTERIE SCHWACH* kann abwechselnd in derselben Zeile des Displays angezeigt werden wie die Aufforderung *PADS PRÜFEN*.

Audio- und Textmeldungen

Im Folgenden werden die Audio-Aufforderungen und Textmeldungen beschrieben, die während des AED-Betriebs ausgegeben werden können.

PADS AUFKL.

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, ohne dass Therapieelektroden am Patienten angelegt sind, wird optisch und akustisch die Meldung *PADS AUFKL.* ausgegeben.

EKG-ANALYSE LÄUFT / HÄNDE WEG

Beim automatischen oder durch Drücken der Taste **ANALYSE** initiierten Start der EKG-Analyse zeigt das Gerät die Meldung *EKG-ANALYSE LÄUFT* an und gibt die Text- und Audio-Aufforderung *HÄNDE WEG* aus. Diese Meldungen weisen darauf hin, dass gerade eine EKG-Analyse durchgeführt wird.

SCHOCK EMPFOHLEN

Ein schockbarer Rhythmus wurde erkannt, Defibrillation wird empfohlen. Die ausgewählte Energiestufe wird angezeigt.

SCHOCK DRÜCKEN

Diese Meldung wird optisch und akustisch ausgegeben, wenn die EKG-Analyse festgestellt hat, dass ein Schock anzuraten ist und die ausgewählte Energie verabreicht werden kann.

SCHOCKS: XX

Diese Meldung zeigt die Zahl der Schocks an, die seit dem Einschalten durch das Gerät verabreicht wurden. Dieser Wert wird auf 0 zurückgesetzt, wenn das Gerät für mehr als zwei Minuten ausgeschaltet wird.

KEIN SCHOCK EMPFOHLEN

Wenn die EKG-Analyse einen nicht schockbaren Rhythmus feststellt, wird diese Meldung akustisch ausgegeben und für 10 Sekunden angezeigt.

PULS PRÜFEN

Bei entsprechender Konfiguration wird diese Meldung in den folgenden Situationen optisch und akustisch ausgegeben:

- Nach dem Abschluss einer EKG-Analyse mit dem Ergebnis „Kein Schock empfohlen“
- Während des CPR-Intervalls nach dem Abschluss einer EKG-Analyse mit dem Ergebnis „Kein Schock empfohlen“
- Nach Abgabe des letzten Schocks

FALLS KEIN PULS, REANIMATION DURCHFÜHREN

Bei entsprechender Konfiguration wird diese Meldung in den folgenden Situationen optisch und akustisch ausgegeben:

- Während des CPR-Intervalls nach dem Abschluss einer EKG-Analyse mit dem Ergebnis „Kein Schock empfohlen“
- Während des Starts eines zusätzlichen CPR-Intervalls

REANIMATION DURCHFÜHREN

Bei entsprechender Konfiguration wird diese Meldung während des CPR-Intervalls nach dem Abschluss einer EKG-Analyse mit dem Ergebnis „Kein Schock empfohlen“ optisch und akustisch ausgegeben.

RE. UNTER.

Nach Durchführung der Herzlungenwiederbelebung für das konfigurierte CPR-Intervall gibt das Gerät die Aufforderung *RE. UNTER.* aus, während es die EKG-Analyse neu startet.

FESTER DRÜCKEN

Diese Meldung wird akustisch ausgegeben, wenn die im Rahmen der Herzlungenwiederbelebung durchgeführten Thoraxkompressionen nicht tief genug sind.

DRUCKMASSAGE GUT

Diese Meldung wird akustisch ausgegeben, wenn die im Rahmen der Herzlungenwiederbelebung durchgeführten Thoraxkompressionen tief genug sind.

PADS PRÜFEN

Diese Meldung wird optisch und akustisch ausgegeben, wenn die Therapieelektroden vom Patienten gelöst wurden.

Wechsel in den manuellen Modus

Drücken Sie die Schnellzugriffstaste **Man. Betr.** an der Gerätefront, um das Gerät in den manuellen Modus zu versetzen.

Geben Sie mithilfe der Navigationstasten die vier Ziffern des Passcodes für den manuellen Modus ein. Drücken Sie **SPEICHERN**, sobald Sie die Eingabe abgeschlossen haben. Nach Eingabe Ihres Passcodes können Sie in den manuellen Modus wechseln.

Hinweis: Wenn das Gerät nicht für die Eingabe eines Passcodes konfiguriert wurde, wird die Meldung *Wechsel in man. Modus* angezeigt. Wählen Sie mithilfe der Navigationstasten die Option **Ja**, um in den manuellen Modus zu wechseln. Wenn Sie nicht innerhalb von 10 Sekunden **Ja** drücken, kehrt das Gerät zum AED-Modus zurück.

Beim Wechsel vom AED-Modus in den manuellen Modus wird die aktuelle Einstellung der Energiestufe beibehalten.

Hinweis: Um aus dem manuellen Modus wieder in den AED-Modus zurückzuwechseln, schalten Sie das Gerät für mehr als 30 Sekunden, aber weniger als zwei Minuten, aus und anschließend wieder ein. Wenn Sie mit dem Wiedereinschalten länger als zwei Minuten warten, setzt das Gerät die Einstellung auf die Standardwerte zurück und behandelt den Patienten als einen neuen Fall.

Kapitel 14

12-Kanal-EKG- Interpretationsanalyse

Der X Series Eingang für das 12-Kanal-EKG ist als defibrillatorsichere Patientenverbindung Typ CF ausgelegt.

Dieses Kapitel beschreibt die Verwendung des X Series Geräts für die Überwachung des 12-Kanal-EKGs bei erwachsenen und pädiatrischen Patienten sowie die Anzeige der Informationen der 12-Kanal-EKG-Interpretationsanalyse bei erwachsenen Patienten.

Die 12-Kanal-EKG-Überwachung des X Series Geräts ermöglicht die simultane Erfassung und Aufzeichnung eines 12-Kanal-EKGs bei erwachsenen und pädiatrischen Patienten sowie die anschließende Interpretationsanalyse bei erwachsenen Patienten.

- Warnung!**
- **Die 12-Kanal-EKG-Überwachung ist zur Erfassung und Aufzeichnung von 12-Kanal-EKG-Signalen bei erwachsenen und pädiatrischen Patienten in Rückenlage bestimmt. Während der Signalerfassung und -aufzeichnung ist stets darauf zu achten, dass sich der Patient nicht bewegt. Das Gerät sollte nicht für die Erfassung von EKG-Signalen bei Patienten verwendet werden, die sich bewegen oder zittern, da dies veräuschte Signale zur Folge haben kann, die nur schwer auswertbar sind.**
 - **Die 12-Kanal-EKG-Interpretationsanalyse darf *ausschließlich* bei erwachsenen Patienten eingesetzt werden.**
 - **Übermäßige Körperbehaarung oder nasse, verschwitzte Haut kann die Elektrodenhaftung beeinträchtigen. Rasieren und trocknen Sie gegebenenfalls die Hautpartie, in der die Elektrode angebracht werden soll.**
 - **Nehmen Sie die EKG-Elektroden erst unmittelbar vor dem Gebrauch aus der versiegelten Verpackung. Bereits verwendete bzw. abgelaufene Elektroden könnten die Qualität des EKG-Signals beeinträchtigen.**

- **Überwachungselektroden können bei einer Defibrillatorentladung polarisiert werden, wodurch die EKG-Kurve kurzzeitig vom Bildschirm verschwindet. Um diesen Effekt zu minimieren, empfiehlt ZOLL Medical Corporation die Verwendung hochwertiger Silber/Silberchlorid-(Ag/AgCl)-Elektroden. Die Elektronik des Geräts sorgt dafür, dass die EKG-Kurve innerhalb weniger Sekunden wieder erscheint.**
 - **Warten Sie nach einer Defibrillatorentladung 15 Sekunden, bevor Sie eine 12-Kanal-Signalerfassung versuchen. Die Elektrodenpolarisierung nach der Defibrillatorentladung kann übermäßiges Rauschen in Ausdrucken des 12-Kanal-EKGs verursachen.**
 - **Setzen Sie die mitgelieferte Kunststoffkappe auf die V-Ableitungen-Buchse, wenn diese nicht verwendet wird. Andernfalls besteht bei Defibrillationsversuchen die Gefahr eines elektrischen Schlags.**
 - **Verwenden Sie ausschließlich die von ZOLL Medical Corporation gelieferten 12-Kanal-EKG-Kabel, um die Gefahr eines Stromschlags bei der Defibrillatorentladung zu vermeiden.**
 - **Prüfen Sie das X Series Gerät sowie das 12-Kanal-EKG-Kabel regelmäßig, indem Sie die tägliche Funktionsnachweisprüfung durchführen.**
 - **Geringfügige EKG-Veränderungen (z. B. ST-Strecken) sollten nur mit dem diagnostischen Frequenzgang abgeklärt werden. Ein anderer Frequenzgang könnte zu einer Fehlinterpretation des Patienten-EKG führen.**
 - **Nur bei Verwendung des von ZOLL freigegebenen Zubehörs ist sichergestellt, dass der Eingang für das 12-Kanal-EKG eine defibrillatorsichere Patientenverbindung Typ CF ist.**
 - **Herzstillstand und andere Arrhythmien können bei Patienten mit implantiertem Herzschrittmacher dazu führen, dass die Herzfrequenzmessung des Geräts nicht die Eigenfrequenz des Herzens, sondern die Schrittmacherfrequenz misst. Daher müssen Schrittmacherpatienten genauestens beobachtet werden. Prüfen Sie den Puls des Patienten, und verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf die Herzfrequenzanzeige. Selbst die spezielle Geräteelektronik zur Erkennung eines Herzschrittmachers erkennt möglicherweise nicht alle Impulse des implantierten Schrittmachers. Anamnese und körperliche Untersuchung liefern wichtige Hinweise, ob ein Herzschrittmacher implantiert ist.**
-

Eingeben der Patientendaten

Zur Eingabe der Patientendaten drücken Sie Schnellzugriffstaste „12-Kanal-EKG“ (12) und dann die Schnellzugriffstaste „Patientendaten“ (Patientendaten). Nun wird das Parameterfeld „Patientendaten“ angezeigt, in dem Sie Namen, Alter, Geschlecht und Identifizierungsnummer des Patienten eingeben können:

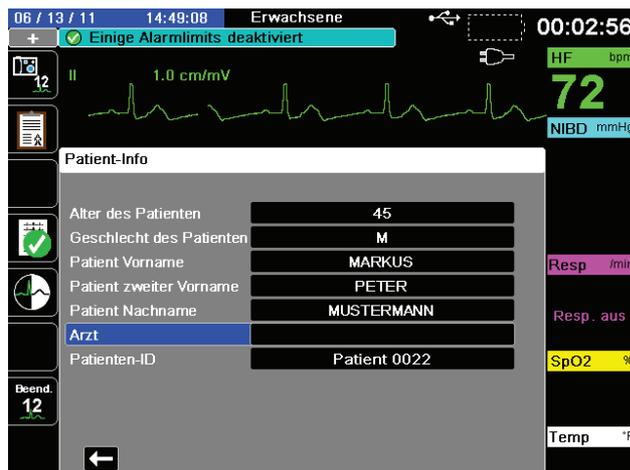


Abbildung 14-1 Parameterfeld „Patientendaten“

Das X Series Gerät nutzt den in das Parameterfeld „Patientendaten“ eingegebenen Namen als Bezeichnung für die gespeicherten 12-Kanal-EKG-Überwachungs-Snapshots.

Zur Eingabe der Patientendaten markieren Sie mithilfe der Navigationstasten einen Parameter im Parameterfeld „Patientendaten“ und drücken dann die Auswahlstaste.

Eingeben des Patientennamens und der Patienten-ID

Bei Auswahl des Felds **Patient Nachname** (oder eines der Felder Patient Vorname, Patient zweiter Vorname, Patienten-ID oder Arzt) wird ein Dateneingabefeld angezeigt:



Zur Eingabe eines Zeichens markieren Sie das betreffende Zeichen und drücken die Auswahl taste. Das ausgewählte Zeichen wird in den Bereich unterhalb des Parameternamens angefügt.

Mit den folgenden Tasten können Sie innerhalb des Dateneingabefelds navigieren:

- Mit der Schnellzugriffstaste „Zeile nach oben“ () können Sie zur jeweils vorherigen Zeile im Dateneingabefeld wechseln.
- Mit der Schnellzugriffstaste „Zeile nach unten“ () können Sie zur jeweils nächsten Zeile im Dateneingabefeld wechseln.

Mithilfe der Navigationstasten an der Gerätefront wechseln Sie zum jeweils nächsten bzw. vorherigen Zeichen im Dateneingabefeld.

Außerdem stehen im Dateneingabefeld die folgenden Funktionstasten zur Verfügung:

- **Rücktaste** Löscht das zuletzt eingegebene Zeichen.
- **Löschen** Löscht alle eingegebenen Zeichen.
- **SPEICHERN** Speichert die für den jeweiligen Parameter eingegebenen Zeichen und kehrt zum Parameterfeld „Patientendaten“ zurück.
- **Löschen** Kehrt zum Parameterfeld „Patientendaten“ zurück, ohne die eingegebenen Zeichen zu speichern.

Eingeben von Alter und Geschlecht des Patienten

Das Parameterfeld „Patientendaten“ gibt Standardwerte für die Parameter „Alter des Patienten“ und „Geschlecht des Patienten“ vor. Zum Ändern eines Standardwerts rufen Sie den betreffenden Parameter auf und geben wie folgt den neuen Wert ein:

Um das Alter des Patienten zu ändern, erhöhen oder verringern Sie den Standardwert (45) mithilfe der Navigationstasten an der Gerätefront. Drücken Sie dann die Auswahl taste.

Um das Geschlecht des Patienten zu ändern, wechseln Sie mithilfe der Navigationstasten an der Gerätefront zwischen dem Standardwert „M“ (männlich) und „F“ (weiblich). Drücken Sie dann die Auswahl taste.

Einrichten der 12-Kanal-EKG-Überwachung

Die korrekte Anlage und Platzierung der Elektroden ist für eine qualitativ hochwertige 12-Kanal-EKG-Überwachung von entscheidender Bedeutung. Ein guter Kontakt zwischen Elektrode und Haut minimiert Bewegungsartefakte und Signalinterferenzen.

Vorgehensweise zum Einrichten der 12-Kanal-EKG-Überwachung:

1. Bereiten Sie die Haut des Patienten für das Anlegen der Elektroden vor.
2. Legen Sie die Elektroden am Patienten an.
3. Verbinden Sie jede Ableitung des EKG-Kabels mit der betreffenden Elektrode.
4. Schließen Sie das 12-Kanal-EKG-Kabel an das X Series Gerät an.
5. Betrachten Sie das Elektrokardiogramm des Patienten in der Anzeige und ändern Sie erforderlichenfalls die Größe der 12-Kanal-EKG-Kurven.

Vorbereiten des Patienten auf das Anlegen der Elektroden

Die korrekte Anlage der Elektroden ist für eine qualitativ hochwertige EKG-Überwachung von entscheidender Bedeutung. Ein guter Kontakt zwischen Elektrode und Haut minimiert Bewegungsartefakte und Signalinterferenzen.

Bereiten Sie vor dem Anlegen der Elektroden bei Bedarf die Haut des Patienten vor:

- Entfernen Sie übermäßige Behaarung an der für das Anlegen der Elektrode vorgesehenen Hautpartie (Rasieren oder Abschneiden).
- Reinigen Sie fettige Haut mit einem Alkoholtupfer.
- Reiben Sie die Haut gut trocken.

Anlegen der Elektroden am Patienten

Je nach örtlichen Gepflogenheiten sind die einzelnen Ableitungskabel mit bestimmten Kennzeichnungen versehen. Die folgende Tabelle listet die Kennzeichnungen und Farbcodes für die unterschiedlichen Kabelsätze auf.


Lokalisation	AHA ¹ -Kennzeichnung	IEC ² -Kennzeichnung
Rechter Arm	RA (weiß)	R (rot)
Linker Arm	LA (schwarz)	L (gelb)
Rechtes Bein	RL (grün)	N (schwarz)
Linkes Bein	LL (rot)	F (grün)
Thorax	V1	C1
Thorax	V2	C2
Thorax	V3	C3
Thorax	V4	C4
Thorax	V5	C5
Thorax	V6	C6

¹ American Heart Association

² International Electrotechnical Commission

Bei einer 12-Kanal-EKG-Überwachung sollte der Patient auf dem Rücken liegen. ZOLL Medical Corporation empfiehlt, die Extremitätenelektroden an einer beliebigen Stelle an den Fuß- und Handgelenken anzubringen.

Kann der Patient bedingt durch Zittern oder Tremor bzw. Bewegungen des Krankenwagens nur mit Mühe stillhalten, werden bessere Ergebnisse erzielt, wenn die Extremitätenelektroden am Thorax des Patienten angebracht werden. (Zur Platzierung von Extremitätenelektroden siehe die beiden nachstehenden Abbildungen.)

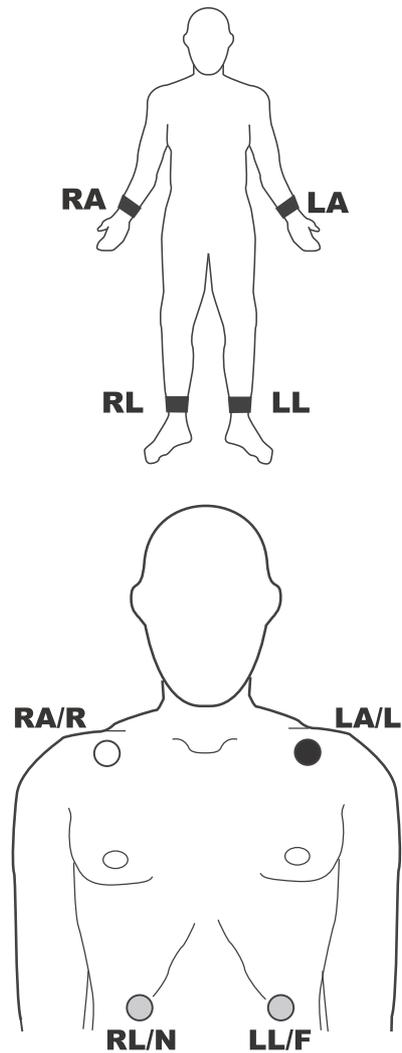

Vermeiden Sie es, die Elektroden über Sehnen oder großen Muskelmassen zu platzieren.


Stellen Sie sicher, dass die EKG-Elektroden so platziert werden, dass erforderlichenfalls eine Defibrillation durchgeführt werden kann.

Platzieren Sie die präkardialen Elektroden wie folgt am Thorax:

Elektrode	Platzierung
V1/C1	Vierter Interkostalraum am rechten Brustbeinrand
V2/C2	Vierter Interkostalraum am linken Brustbeinrand
V3/C3	Mittig zwischen V2/C2 und V4/C4
V4/C4	Fünfter Interkostalraum an der Medioklavikularlinie
V5/C5	Linke ventrale Achsellinie auf Höhe von V4
V6/C6	Linke Midaxillarlinie auf gleicher Höhe wie V4 und V5

Die Lage von V1/C1 (vierter Interkostalraum) ist absolut kritisch, weil dies den Bezugspunkt für die Platzierung der übrigen V-Ableitungen darstellt. So bestimmen Sie die Position von V1/C1:

1. Legen Sie den Finger in die Fossa jugularis (siehe nachstehende Abbildung).
2. Lassen Sie den Finger langsam etwa 4 cm nach kaudal gleiten, bis Sie eine kleine horizontale Kante bzw. Erhebung fühlen. Das ist der Angulus Ludovici, wo das Manubrium mit dem Brustbeinkörper verbunden ist.

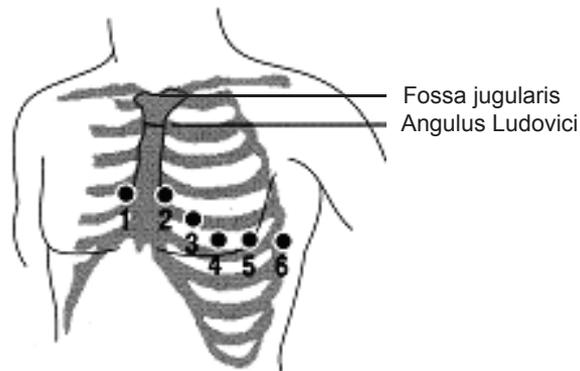

3. Bestimmen Sie den zweiten Interkostalraum auf der rechten Seite, lateral zum und unmittelbar unterhalb des Angulus Ludovici.
4. Lassen Sie den Finger zwei weitere Interkostalräume nach kaudal bis zum vierten Interkostalraum gleiten, welcher der Position für V1 entspricht.

Hinweis: Beim Anlegen der Elektroden an weiblichen Patienten werden die Ableitungen V3 bis V6 immer unterhalb der Brust und nicht auf der Brust platziert.

Anschließen des 12-Kanal-EKG-Kabels


Schließen Sie das 12-Kanal-EKG-Kabel wie folgt an den EKG-Anschluss an der linken Seite des Geräts an:



Abbildung 14-2 Anschließen des 12-Kanal-EKG-Kabels

Anzeigen der 12-Kanal-EKG-Kurven

Um die 12-Kanal-EKG-Kurven anzuzeigen, drücken Sie **12**. Es werden alle zwölf Kurven angezeigt, wobei die jeweilige Kurvengröße oberhalb der Kurve erscheint:

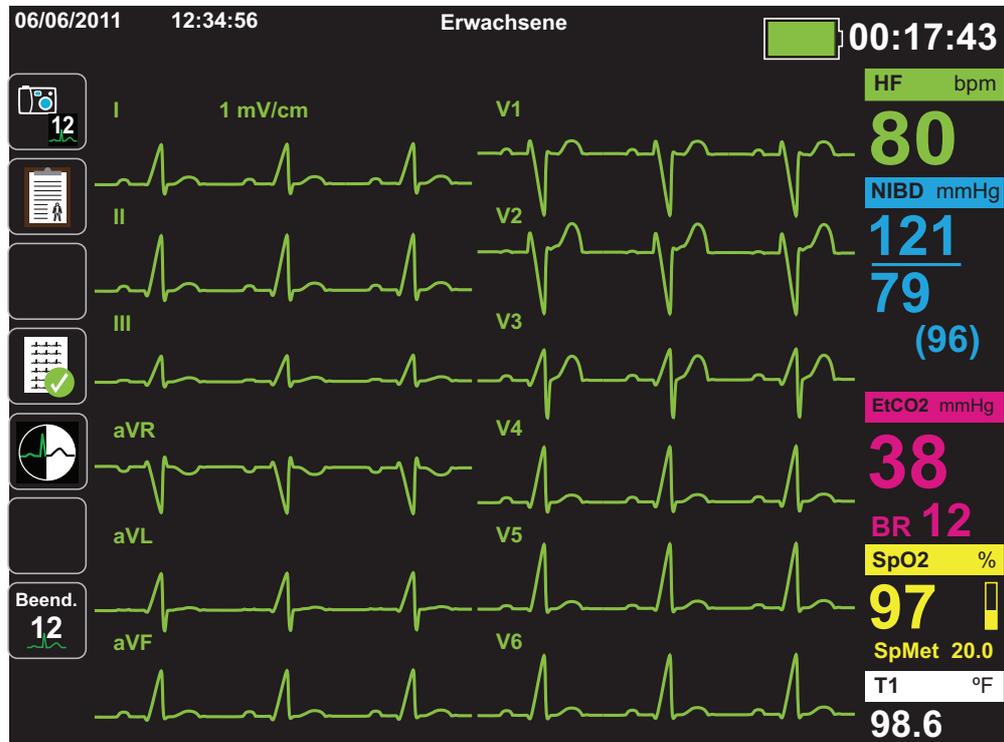

12-Kanal-EKG-Interpretationsanalyse

Nachdem Sie durch Betrachtung des Patienten-EKGs festgestellt haben, dass alle Kurven des 12-Kanal-EKGs korrekt dargestellt werden, können Sie die 12-Kanal-EKG-Interpretationsanalyse einleiten.

Hinweis: Die 12-Kanal-EKG-Interpretationsanalyse funktioniert *ausschließlich* bei erwachsenen Patienten.

Zum Einleiten der 12-Kanal-EKG-Interpretationsanalyse drücken Sie die Schnellzugriffstaste


Erfassen (**12**). Das X Series Gerät zeigt den Statusfortschrittsbalken *Erfassen 12 Ableit.* an, während es für einen Zeitraum von 10 Sekunden 12-Kanal-EKG-Daten erfasst.



Nach Erfassung der EKG-Daten speichert das Gerät die Daten und zeigt dabei den Statusfortschrittsbalken *12-Kanal-EKG-Snapshot speichern* an:



Nach dem Speichern der Daten führt das Gerät die Nach-Erfassungs-Interpretationsanalyse durch und zeigt die erste Seite der 12-Kanal-Interpretationsanalyse an:

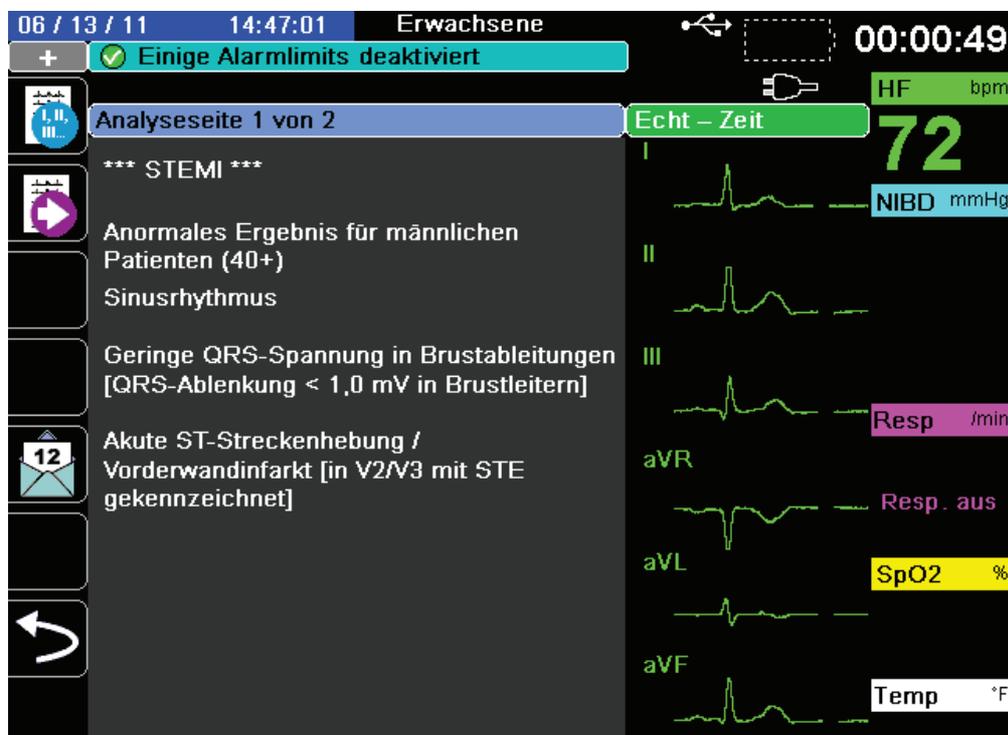


Im obigen Beispiel weist die Auswertungsmeldung *****STEMI***** auf das Vorliegen eines ST-Hebungs-Myokardinfarkts hin. Die vom X Series Gerät angezeigten Auswertungsmeldungen werden von der Audicor Software (Inovise Medical, Inc) generiert. Weitergehende Informationen zu diesen Auswertungsmeldungen sind dem *Audicor 200 Physician's Guide, Software Version 1.00* zu entnehmen.


Zum Anzeigen von *Analysesseite 2* drücken Sie die Schnellzugriffstaste „Überpr. 12 Abl.“

Nächst.“ ().

Analysesseite 2 enthält die Patientendaten sowie zusätzliche Analyseergebnisse.

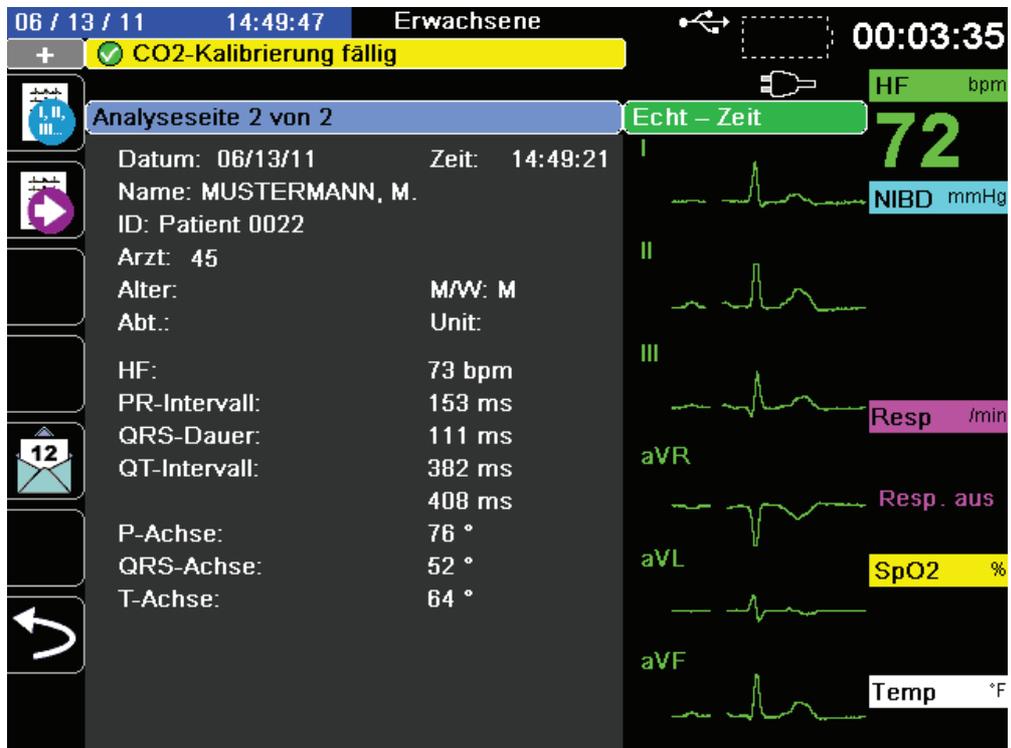

Anschließend können Sie mit der Taste  durch vier 12-Kanal-Snapshot-Seiten blättern. Nach *Analyseseite 2* zeigt das Gerät beispielsweise den folgenden 12-Kanal-Snapshot:

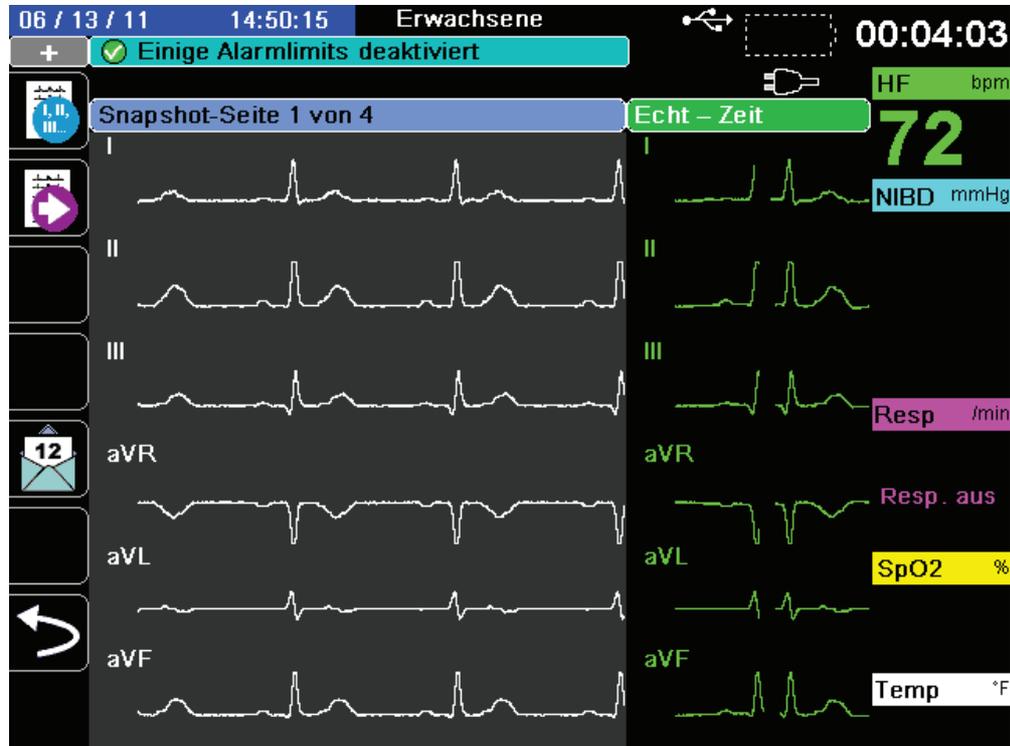

Fehlerzustände mit Auswirkungen auf die 12-Kanal-EKG-Interpretationsanalyse

Stellt das X Series Gerät bei der Erfassung der 12-Kanal-EKG-Daten fest, dass einer der folgenden Fehlerzustände vorliegt, führt es keine 12-Kanal-EKG-Interpretationsanalyse durch:

- Es liegt ein Schrittmachersignal vor.
- Es liegt ein Ableitungsfehler im EKG-Kabel vor.
- Ein unzulässiges Kabel wird verwendet.

Wenn das X Series Gerät einen dieser Fehlerzustände feststellt, wird auf *Analyseseite 1* vermerkt, dass für die Interpretationsanalyse *Keine Daten verfügbar* sind, und der Fehlerzustand aufgeführt. Alle Messwerte auf der *Analyseseite 2* werden als --- angegeben.


Nachdem Sie den Fehlerzustand behoben haben, drücken Sie die Taste , um die Fehlerbehebung zu bestätigen und die 12-Kanal-EKG-Interpretationsanalyse durchzuführen.

Drucken des 12-Kanal-EKGs


Nachdem feststeht, dass das X Series Gerät für die 12-Kanal- EKG-Überwachung korrekt eingerichtet wurde, können Sie die 12-Kanal-EKG-Kurven zur Überprüfung und Auswertung drucken.

Drücken Sie die Taste , um für 10 Sekunden 12-Kanal-EKG-Daten für den Ausdruck zu erfassen.

Drücken Sie die Schnellzugriffstaste „Drucken“ () , um einen 12-Kanal-EKG-Snapshot auszudrucken. An die Kopfzeile des Ausdrucks mit Datum, Uhrzeit und Patientendaten schließt sich ein 3,3 Sekunden langer Auszug aller zwölf Kurven an. Die Kurven werden im Format 3 x 4 (Standardeinstellung) ausgedruckt:

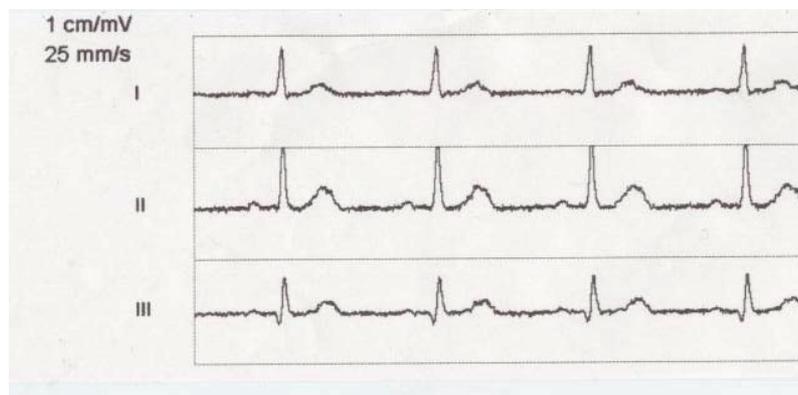

Alternativ kann auch das Format 2 x 6 gewählt werden:

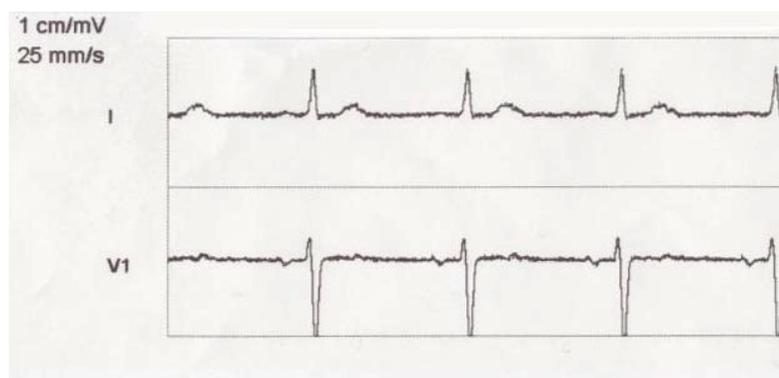

Das X Series Gerät speichert mindestens 32 12-Kanal-EKG-Snapshots in einem separaten Protokoll. Nachdem 32 12-Kanal-EKG-Snapshots gespeichert wurden, wird der jeweils älteste Snapshot im Protokoll durch nachfolgende Snapshots überschrieben. Bei vollem Patientendaten-Protokoll können keine 12-Kanal-EKG-Snapshots gespeichert werden. 12-Kanal-EKG-Snapshots werden zusammen mit dem Protokoll gelöscht.


Wenn Sie mit der Betrachtung und dem Drucken der 12-Kanal-EKG-Kurven fertig sind, drücken Sie die Schnellzugriffstaste „Beend.“ (), um zur Anzeige der anderen Überwachungsfunktionen zurückzukehren.

Druck- und Anzeigeeoptionen für 12-Kanal-EKGs

Das X Series Gerät verfügt über zusätzliche Druck- und Anzeigeeoptionen für 12-Kanal-EKGs, die über die Parameterbedienfelder der Supervisor-Funktion festgelegt werden. (Der Supervisor-Zugriff ist durch einen Passcode gesichert.)

Drücken Sie die Schnellzugriffstaste „Einrichten“ () und wählen Sie dann „Supervisor“. Wählen Sie mithilfe der Navigationstasten die vier Ziffern des Supervisor-Passcodes aus. Drücken Sie **SPEICHERN**, sobald Sie die Eingabe abgeschlossen haben. Nach Eingabe Ihres Supervisor-Passcodes haben Sie Zugriff auf die konfigurierbaren Optionen im Supervisor-Menü.

Wählen Sie die Option „Supervisor“ > „EKG“ > „12 Abl.“, um das Parameterbedienfeld für das 12-Kanal-EKG aufzurufen:

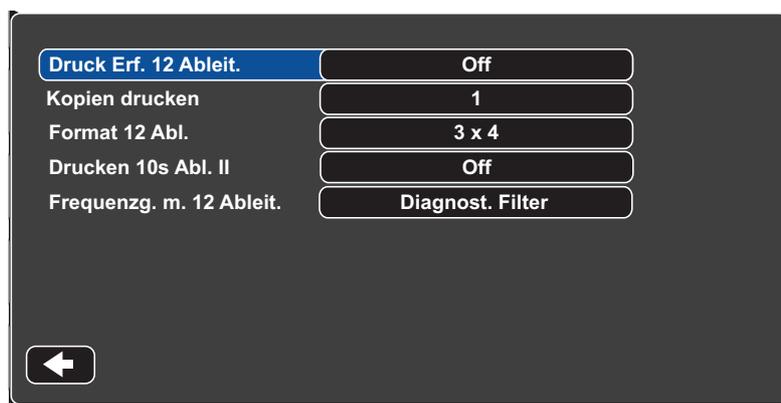

Aktivieren der Signalerfassung für das 12-Kanal-EKG

Wenn diese Funktion aktiviert ist, druckt das Gerät automatisch den 12-Kanal-EKG-Bericht, sobald Sie die Taste  drücken. Diese Funktion ist standardmäßig nicht aktiviert.

Festlegen der Anzahl der Exemplare des 12-Kanal-EKG-Berichts

Mit dieser Option können Sie festlegen, dass das X Series Gerät nach Drücken der Taste  bis zu fünf Exemplare des 12-Kanal-EKGs druckt. Standardmäßig druckt das Gerät nur ein Exemplar des 12-Kanal-EKG-Snapshots.

Festlegen des Druckformats für das 12-Kanal-EKG

Mit dieser Option können Sie das Druckformat für das 12-Kanal-EKG festlegen: 3 x 4 (Standard) oder 2 x 6.

Drucken einer 10-sekündigen Kurve von Ableitung II

Mit dieser Option können Sie festlegen, dass das Gerät zuerst einen 12-Kanal-EKG-Snapshot und anschließend 10 Sekunden der Kurve von Ableitung II druckt.

Festlegen des Frequenzgangs für das 12-Kanal-EKG

Mit dieser Option können Sie den Frequenzgang für die Anzeige des 12-Kanal-EKGs festlegen.

Hierfür wird zwischen den folgenden Anzeigetypen unterschieden:

Anzeigetyp	Frequenzgang
Diagnose	0,05 bis 150 Hz
Gefilterte Diagnose	0,25 bis 40 Hz

Hinweis: Die Anzeige und die Aufzeichnung entsprechen dem gefilterten Kurvenverlauf („Diagnose“ oder „Gefilterte Diagnose“), die 12-Kanal-EKG-Interpretationsanalyse erfolgt jedoch stets unter Ausnutzung der gesamten diagnostischen Bandbreite, wobei ein 50/60-Hz-Kerbfilter zur Anwendung gelangt.

Kapitel 15

Manuelle Defibrillation



Bei Paddles handelt es sich um defibrillationsgeschützte Patientenanschlüsse Typ BF.



Bei EKG-Ableitungen handelt es sich um defibrillationsgeschützte Patientenanschlüsse Typ CF.

Notfalldefibrillation mit Paddles

Warnung! Um das Risiko eines elektrischen Schocks auszuschließen, vermeiden Sie überschüssiges Elektrolytgel an Händen oder Paddlegriffen.

Betätigen Sie bei der Defibrillation mit Paddles die **SCHOCK-Tasten** mit den Daumen, damit Sie sich nicht versehentlich selbst einen Schock verabreichen. Es sollte sich kein Teil der Hand in Nähe der Paddle-Elektrodenplatten befinden.

Achten Sie darauf, die für die Größe der Patienten passenden Paddles/Elektroden verwenden (Erwachsene – groß, Kinder – klein).

Bestimmen des Patientenzustands gemäß den lokalen medizinischen Protokollen

Überprüfen Sie, ob folgende Symptome vorliegen:

- Bewusstlosigkeit
- Atemstillstand
- Kein tastbarer Puls

Aufnahme der HLW gemäß den medizinischen Protokollen

Fordern Sie zusätzliche Unterstützung an.

Einschalten des Geräts

Drücken Sie die grüne EIN/AUS-Taste oben am Gerät. Die grünen, gelben und roten LEDs an der Geräteoberseite blinken und das Gerät meldet *SELBSTTEST BESTANDEN*.

1 – Auswählen der Energiestufe


Stellen Sie mithilfe der Pfeiltasten **ENERGIEWAHL** die gewünschte Energiestufe ein. Diese Tasten befinden sich an der Gerätefront oder am STERNUM-Paddle.

Hinweis: Die initiale Energiestufe für Defibrillator-Pads bzw. externe Paddles kann unter den Standardeinstellungen für „Defib./Stim.“ im Menü „Einrichten“ > „Supervisor“ festgelegt werden.


Folgende Energiestufen sind standardmäßig eingestellt:

- Erwachsene – 120 Joule
- Kinder – 50 Joule
- Neugeborene – 50 Joule

Hinweis: Die Defibrillator-Energiestufen für Neugeborene und Kinder sollten gemäß den lokal geltenden Protokollen festgelegt werden.

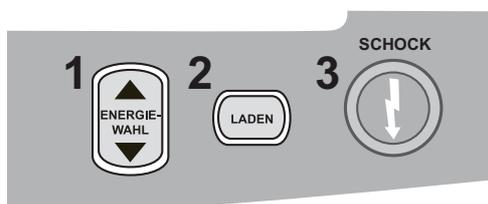

oder

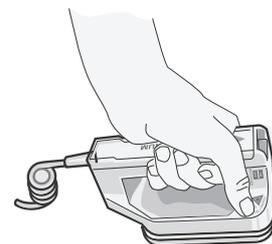

Die eingestellte Energiestufe erscheint unten im Display.


Vorbereitung der Paddles

Stellen Sie sicher, dass die Paddles mit dem Multifunktionskabel verbunden sind und dass dieses an das X Series Gerät angeschlossen ist. Tragen Sie eine großzügige Menge Elektrolytgel auf die Elektrodenfläche der beiden Paddles auf und reiben Sie die Elektrodenflächen gegeneinander, damit das Gel gleichmäßig verteilt wird. (Statt Gel können auch Gel-Pads verwendet werden.)

Anlegen der Paddles am Brustkorb

Drücken Sie die Paddles fest gegen die ventrale Brustkorbwand. Platzieren Sie das STERNUM-Paddle untermittelbar unterhalb des Schlüsselbeins rechts neben das Brustbein des Patienten.

Platzieren Sie das APEX-Paddle unmittelbar links und unterhalb der linken Mamille entlang der vorderen Axillarlinie auf der Brustwand.

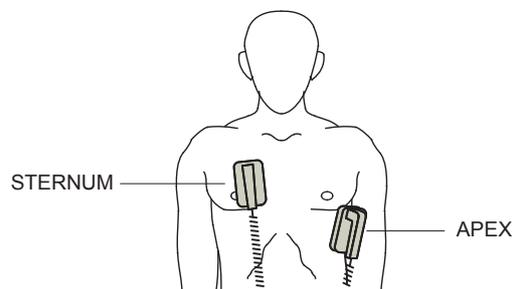

Durch Reiben der Paddles auf der Haut maximieren Sie den Kontakt zwischen Paddle und Patient.


Warnung! Achten Sie darauf, dass sich das Gel nicht zwischen den Paddle-Elektroden auf der Brustwand sammelt (Gelbrücke). Dies könnte zu Verbrennungen führen und die an das Herz abgegebene Energie verringern.

Wenn Defibrillator-Gel-Pads verwendet werden, stellen Sie sicher, dass die Pads groß genug sind, um die gesamte Paddle-Elektrodenfläche abzudecken.


Die Paddles können für die notfallmäßige EKG-Überwachung verwendet werden, wenn für den Anschluss von Standardelektroden für die EKG-Überwachung keine Zeit ist.

2 – Laden des Defibrillators

Drücken Sie die Taste **LADEN** am APEX-Griff oder an der Gerätefront.

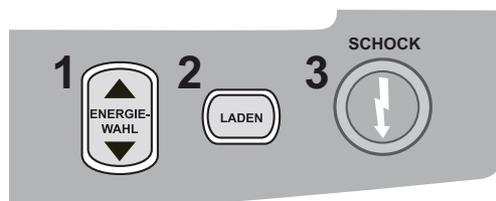


oder

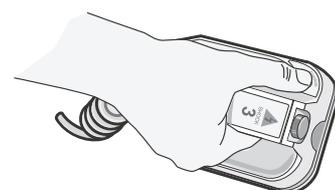

Um die gewählte Energieeinstellung nach Drücken der Taste **LADEN** zu erhöhen oder zu verringern, verwenden Sie die **ENERGIEWAHL**-Tasten am Sternum-Paddle oder an der Gerätefront des Defibrillators.

Vorsicht Das Ändern der gewählten Energiestufe bei geladenem Gerät oder während des Aufladens führt dazu, dass sich der Defibrillator selbstständig entlädt. Drücken Sie die Taste **LADEN** erneut, um das Gerät auf die neu eingestellte Energiestufe zu laden.

Drücken Sie die Taste **LADEN** erneut, um das Laden zur bestätigen.

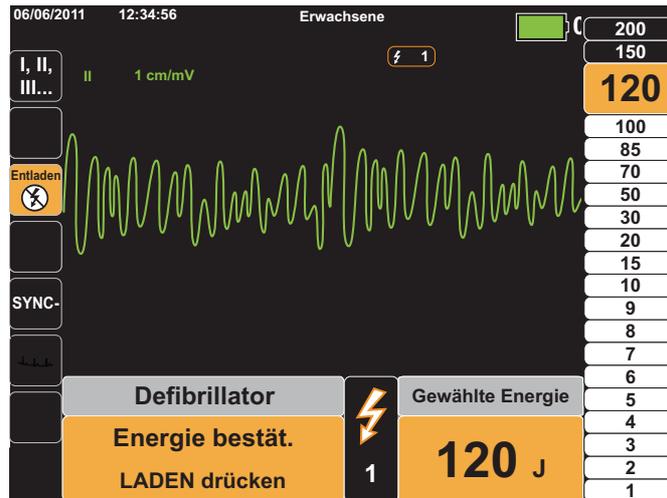

Eine Meldung unten im Display weist darauf hin, dass der Ladevorgang läuft. Gleichzeitig zeigt ein charakteristischer Ton an, dass das Gerät geladen wird. Die Energieleiste rechts im Display hebt zur Veranschaulichung die Ladestufe hervor, bis die ausgewählte Energiestufe erreicht wird. Sobald das Gerät voll aufgeladen und bereit ist, ändert sich das akustische Signal und der Dauerton meldet die Ladebereitschaft, wobei der hervorgehobene Energiebalken die ausgewählte Energiestufe anzeigt. Die Ladeanzeige am APEX-Paddle leuchtet auf.



3 – Abgabe des Schocks


Warnung! Fordern Sie alle Personen in der Nähe des Patienten auf, vor dem Entladen des Defibrillators **ZURÜCKZUTRETEN**.

Berühren Sie während der Defibrillation weder das Bett noch den Patienten noch Geräte, die an den Patienten angeschlossen sind. Es besteht Elektroschockgefahr! Entblößte Körperteile des Patienten dürfen nicht mit Metallteilen (z. B. dem Bettrahmen) in Berührung kommen, um unerwünschte Pfade für den Defibrillationsstrom zu verhindern.

Drücken Sie die Paddles mit einer Kraft von etwa 10 bis 12 kg auf den Brustkorb, um die Impedanz des Patienten zu minimieren und bestmögliche Resultate zu erzielen.

Halten Sie mit den Daumen gleichzeitig beide **SCHOCK**-Tasten (eine an jedem Paddle) gedrückt, bis die Energie an den Patienten abgegeben wurde.

Hinweis: Bei Verwendung externer Paddles ist die Taste **SCHOCK** (ⓘ) an der Gerätefront inaktiv. Wird anstelle der **SCHOCK**-Tasten an den Paddles diese Taste gedrückt, weist ein akustisches Signal auf die unzulässige Operation hin.

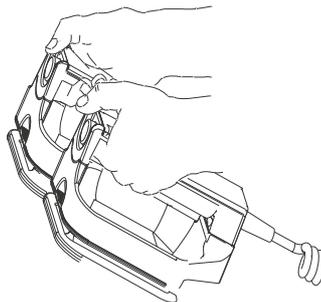

Unten im Display wird die abgegebene Energiestufe angezeigt, oben im Display sowie unten im Bedienfeld „Defib“ die Nummer des Schocks (1).



Hinweis: Um die Defibrillation zu irgendeinem Zeitpunkt abubrechen, drücken Sie die Schnellzugriffstaste **Entladen**.


Falls der Defibrillator nicht innerhalb von 60 Sekunden nach Erreichen der eingestellten Energiestufe entladen wird, entlädt er sich automatisch selbst.

Falls weitere Schockabgaben erforderlich sind, gehen Sie entsprechend der Schritte 1 bis 3 dieser auf Seite 15-2 beginnenden Vorgehensweise vor, um die Energieeinstellungen anzupassen, das Gerät zu laden und den Schock abzugeben.

Notfalldefibrillation mit Freihand-Therapieelektroden



Bei ZOLL Freihand-Therapieelektroden handelt es sich um defibrillationsgeschützte Patientenanschlüsse Typ BF.

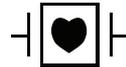

Bei EKG-Ableitungen handelt es sich um defibrillationsgeschützte Patientenanschlüsse Typ CF.

Bestimmen des Patientenzustands gemäß den lokalen medizinischen Protokollen

Überprüfen Sie, ob folgende Symptome vorliegen:

- Bewusstlosigkeit
- Atemstillstand
- Kein tastbarer Puls

Aufnahme der HLW gemäß den medizinischen Protokollen

Fordern Sie zusätzliche Unterstützung an.

Vorbereitung des Patienten

Entfernen Sie die Kleidung im Brustbereich des Patienten. Trocknen Sie den Brustbereich erforderlichenfalls ab. Wenn die Brust des Patienten übermäßig behaart ist, kürzen oder entfernen Sie die Behaarung, damit die Elektroden richtig anliegen.


Legen Sie die Freihand-Therapieelektroden wie auf der Verpackung der Elektroden beschrieben an.

Vergewissern Sie sich, dass die Therapieelektroden richtig an der Haut des Patienten anliegen und keine Teile der EKG-Elektroden verdecken.

Anlegen der Therapieelektroden

Warnung! Schlechte Haftung und/oder Luft unter den Therapieelektroden kann zu Lichtbogenbildung und Hautverbrennungen führen.

1. Legen Sie eine Kante der Elektrode fest am Patienten an.
2. Rollen Sie die Elektrode ausgehend von dieser Kante in einer durchgehenden Bewegung auf die Haut. Achten Sie darauf, dass sich zwischen dem Gel und der Haut keine Luftpneumien bilden.

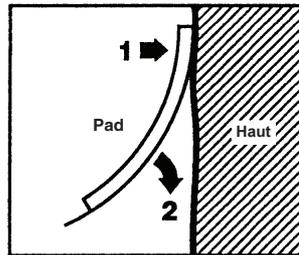

Hinweis: Wenn die mit „BACK“ bezeichnete Elektrode nicht am Rücken des Patienten angelegt werden kann, sind die Elektroden in der Standard-Apex-Sternum-Konfiguration anzulegen. Diese ermöglicht eine wirksame Defibrillation, eine Stimulation zeigt jedoch üblicherweise weniger Wirkung.

Einschalten des Geräts

Drücken Sie die grüne EIN/AUS-Taste oben am Gerät. Die grünen, gelben und roten LEDs an der Geräteoberseite blinken und das Gerät meldet *SELBSTTEST BESTANDEN*.

Wenn der Kontakt zwischen den Defibrillationselektroden und der Haut des Patienten nicht ausreicht und die Elektrodenauswahl „EKG-Ableitung“ lautet, gibt das Gerät die Meldung *THERAPIE-ELEKTRODEN PR.* aus. Eine Energieabgabe ist in diesem Fall nicht möglich.


1 – Auswählen der Energiestufe

Stellen Sie mithilfe der Pfeiltasten **ENERGIEWAHL** die gewünschte Energiestufe ein. Diese Tasten befinden sich an der Gerätefront.

Folgende Energiestufen sind standardmäßig eingestellt:

- Erwachsene – 120 Joule
- Kinder – 50 Joule
- Neugeborene – 50 Joule


Hinweis: Die Defibrillator-Energiestufen für Neugeborene und Kinder sollten gemäß den lokal geltenden Protokollen festgelegt werden.

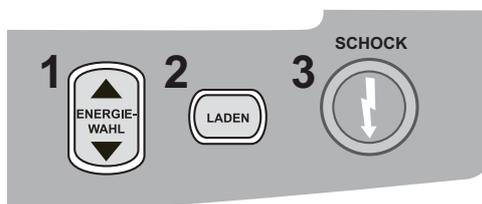

Die eingestellte Energiestufe wird im Display angezeigt.

2 – Laden des Defibrillators

Drücken Sie die Taste **LADEN** an der Gerätefront.

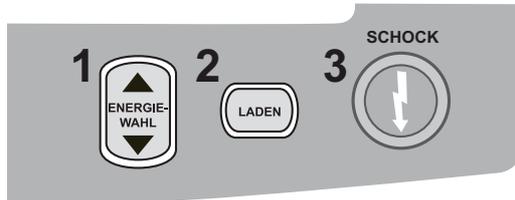


Um die gewählte Energieeinstellung nach Drücken der Taste **LADEN** zu erhöhen oder zu verringern, verwenden Sie die **ENERGIEWAHL**-Tasten an der Gerätefront des Defibrillators.

Vorsicht

Das Ändern der gewählten Energiestufe bei geladenem Gerät oder während des Aufladens führt dazu, dass sich der Defibrillator selbstständig entlädt. Drücken Sie die Taste **LADEN** erneut, um das Gerät auf die neu eingestellte Energiestufe zu laden.

Eine Meldung unten im Display weist darauf hin, dass der Ladevorgang läuft. Gleichzeitig zeigt ein charakteristischer Ton an, dass das Gerät geladen wird. Die Energieleiste rechts im Display hebt zur Veranschaulichung die Ladestufe hervor, bis die ausgewählte Energiestufe erreicht wird. Sobald das Gerät voll aufgeladen und bereit ist, ändert sich das akustische Signal und der Dauerton meldet die Ladebereitschaft, wobei der hervorgehobene Energiebalken die ausgewählte Energiestufe anzeigt. Die Taste **SCHOCK** leuchtet auf.

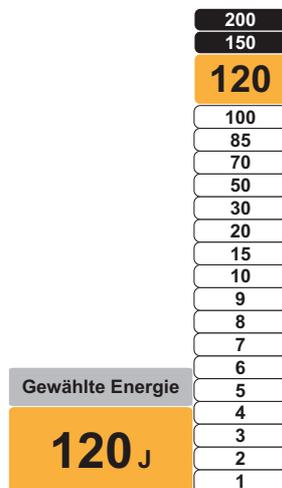


3 – Abgabe des Schocks


Warnung! Fordern Sie alle Personen in der Nähe des Patienten auf, vor dem Entladen des Defibrillators **ZURÜCKZUTRETEN**.

Berühren Sie während der Defibrillation weder das Bett noch den Patienten noch Geräte, die an den Patienten angeschlossen sind. Es besteht Elektroschockgefahr! Entblößte Körperteile des Patienten dürfen nicht mit Metallteilen (z. B. dem Bettrahmen) in Berührung kommen, um unerwünschte Pfade für den Defibrillationsstrom zu verhindern.

Halten Sie die Taste  an der Gerätefront so lange gedrückt, bis die Energie an den Patienten abgegeben wird.

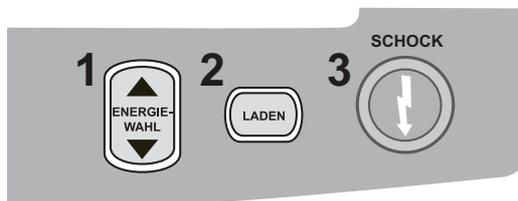

Unten im Display wird die abgegebene Energiestufe angezeigt, oben im Display sowie unten im Bedienfeld „Defib“ die Nummer des Schocks (1).

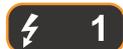

Hinweis: Um die Defibrillation zu irgendeinem Zeitpunkt abubrechen, drücken Sie die Schnellzugriffstaste **Entladen**.

Falls der Defibrillator nicht innerhalb von 60 Sekunden nach Erreichen der eingestellten Energiestufe entladen wird, entlädt er sich automatisch selbst.

Falls weitere Schockabgaben erforderlich sind, gehen Sie entsprechend der Schritte 1 bis 3 dieser auf Seite 15-7 beginnenden Vorgehensweise vor, um die Energieeinstellungen anzupassen, das Gerät zu laden und den Schock abzugeben.

Interne Paddles

Interne ZOLL Paddles sind für die Verwendung mit dem ZOLL X Series Defibrillator für die Defibrillation am offenen Herzen bestimmt. Autoklavierbare interne Griffe sind in zwei Ausführungen erhältlich:

- Geformte autoklavierbare interne Griffe mit integrierten Elektroden
- Autoklavierbare interne Griffe mit abnehmbaren internen Defibrillationselektroden

Wenn ein Satz interner Griffe an das X Series Gerät angeschlossen wird, wird die abgegebene Defibrillationsenergie automatisch auf 50 Joule begrenzt.

In der Zur Sterilisation im Autoklaven geeignete interne Griffe und Elektroden Bedienerhandbuch (*Autoclavable Internal Handle and Electrode Operator's Guide*) finden Sie schrittweise Anleitungen für die Defibrillation am offenen Herzen sowie wichtige Hinweise zu Reinigung und Sterilisation.

Überprüfung vor der Verwendung

Überprüfen Sie mit dem folgenden Verfahren vor jeder Verwendung den ordnungsgemäßen Betrieb der internen ZOLL Paddles mit dem X Series Gerät. Für dieses Verfahren wird eine zweite Person benötigt, wenn interne Griffe ohne Entladungstaste verwendet werden.

Warnung! Während interne Paddles überprüft werden, müssen die Hände beim Drücken der **SCHOCK-Taste von den Elektrodenplatten ferngehalten werden.**

1. Untersuchen Sie die Kontaktbuchsen des Anschlusses auf Schäden oder Korrosion. Falls die Kontaktbuchsen des Anschlusses beschädigt oder korrodiert sind, dürfen die Griffe nicht mehr verwendet werden.
2. Schließen Sie die autoklavierbaren internen Griffe an das X Series Gerät an. Vergewissern Sie sich mithilfe der Schnellzugriffstaste „Ableitungen“ , dass das X Series Gerät den internen Griff- und Elektrodensatz korrekt identifiziert. Dies ist an der Anzeige **Int. Pdl** zu erkennen.
3. Bevor Sie den Defibrillator laden, drücken Sie die Taste **Entladen** an den Griffen (sofern vorhanden). Es muss ein deutliches Klicken zu hören sein und die Taste muss zurückschnellen, wenn sie losgelassen wird. Vergewissern Sie sich, dass der Defibrillator die Meldung *ELEKTR. AM PATIENT. ANBR.* anzeigt. Diese Meldung bestätigt, dass die Taste **Entladen** am rechten Griff ordnungsgemäß funktioniert.
4. Stellen Sie mithilfe der ENERGIEWAHL-Pfeiltasten an der Gerätefront des X Series Geräts die Energiestufe auf 30 Joule ein.
5. Drücken Sie die Taste **LADEN** an der Gerätefront des Defibrillators, um das Gerät auf die gewählte Energiestufe zu laden. Warten Sie auf den Ton, der den Bereitschaftszustand des Geräts signalisiert.
6. Drücken Sie die Oberflächen der Elektrodenplatten fest gegeneinander. Achten Sie darauf, dass sie nicht mit Personen oder Gegenständen in Berührung kommen.
7. Gehen Sie zur Abgabe der Energie wie im Folgenden beschrieben vor.
 - Bei internen Griffen mit einer Entladetaste:
Halten Sie die Taste **Entladen** am Apex-Griff gedrückt, um die Testenergie an die Elektroden abzugeben.
 - Bei internen Griffen ohne Entladetaste:
Fordern Sie eine zweite Person auf, die Taste  auf der Gerätefront des Defibrillators gedrückt zu halten, um die Testenergie an die Elektroden abzugeben.

Das X Series Gerät entlädt und zeigt die Meldung *DEFIB. KURZTEST BESTANDEN* an.


Synchronisierte Kardioversion

Warnung! Nur in den erweiterten Maßnahmen der Herzlungenwiederbelebung geschulte Personen, die mit der Bedienung des Geräts vertraut sind, sollten eine synchronisierte Kardioversion durchführen. Vor der Defibrillation oder Kardioversion muss die genaue Art der kardialen Arrhythmie bestimmt werden.

Achten Sie vor einer synchronisierten Kardioversion darauf, dass die EKG-Signalqualität ausreicht, um die Gefahr einer Synchronisation mit Artefakten zu reduzieren.

Bestimmte Arrhythmien wie ventrikuläre Tachykardie, Vorhofflimmern und Vorhofflattern erfordern eine Synchronisation der Defibrillatorentladung mit der R-Zacke des EKGs, um ein Kammerflimmern zu vermeiden. In diesem Fall erkennt eine Synchronisationselektronik (SYNC) im Defibrillator die R-Zacken des Patienten. Wenn die Taste **SCHOCK** am Gerät bzw. die beiden **SCHOCK**-Tasten an den Paddles gedrückt und gehalten werden, entlädt das Gerät bei der nächsten erkannten R-Zacke. Der vulnerable T-Wellenabschnitt des Herzzyklus wird dadurch vermieden.

Im SYNC-Modus setzt das Gerät Markierungen (S) oberhalb der EKG-Kurve und kennzeichnet damit die Punkte im Herzzyklus (R-Zacken), an denen eine Entladung erfolgen kann.

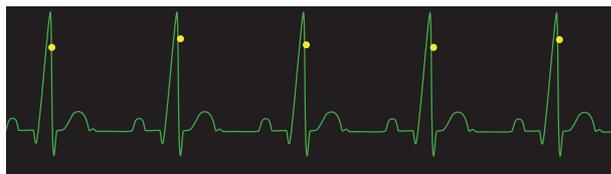

Markierungen kennzeichnen jede während der Synchronisation erkannte R-Zacke

Prüfen Sie, ob die Markierungen im Display deutlich erkennbar sind, ihre Position stimmt und sie sich nicht von Herzschlag zu Herzschlag verschieben.

Die Vorgehensweise bei der synchronisierten Kardioversion mit ZOLL Freihand-Therapieelektroden ist identisch mit der bei Anwendung von Paddles. Nur die Lage der Taste **SCHOCK** ist unterschiedlich.

Verfahrensanleitung für die synchronisierte Kardioversion

Bestimmen des Patientenzustands und Versorgung gemäß den lokalen medizinischen Protokollen

Vorbereitung des Patienten

Entfernen Sie die Kleidung im Brustbereich des Patienten. Trocknen Sie den Brustbereich erforderlichenfalls ab. Wenn die Brust des Patienten übermäßig behaart ist, kürzen oder entfernen Sie die Behaarung, damit die Elektroden richtig anliegen.

Legen Sie die EKG-Elektroden am Patienten an (Anweisungen hierzu finden Sie in Kapitel 6).

Für die Kardioversion sind ein Standard-EKG-Kabel und Standard-EKG-Elektroden empfehlenswert. Als EKG-Signalquellen können Freihand-Therapieelektroden verwendet werden. Die Signalqualität entspricht der von Standardableitungen. Nur unmittelbar nach einer Entladung kann es zu Störsignalen durch Muskelzittern kommen, vor allem wenn eine Elektrode keinen vollständigen Hautkontakt hat.

Legen Sie die Freihand-Therapieelektroden wie in der beiliegenden Anleitung und in Abschnitt „Anlegen der Therapieelektroden“ auf Seite 15-6 beschrieben an.

Vergewissern Sie sich, dass die Therapieelektroden richtig an der Haut des Patienten anliegen und keine Teile der EKG-Elektroden verdecken.

Wenn Sie für die synchronisierte Kardioversion Paddles verwenden, beachten Sie die Hinweise in Abschnitt „Notfalldefibrillation mit Paddles“ auf Seite 15-1. Dort wird beschrieben, wie Sie die Paddles vorbereiten, die Paddles anbringen, den Defibrillator laden und einen Schock abgeben. Beachten Sie jedoch, dass bei einer synchronisierten Entladung von der Verwendung der Paddles als EKG-Quelle abzuraten ist, da die durch Paddle-Bewegungen erzeugten Artefakte einer R-Zacke ähneln und eine Defibrillatorentladung zum falschen Zeitpunkt auslösen können.

Einschalten des Geräts

Drücken Sie die grüne EIN/AUS-Taste oben am Gerät. Die grünen, gelben und roten LEDs an der Geräteoberseite blinken und das Gerät meldet *SELBSTTEST BESTANDEN*.

Drücken der Taste „Sync“

Drücken Sie die Schnellzugriffstaste **Sync** an der Gerätefront. Das System befindet sich nun im SYNC-Modus. Über den erkannten R-Zacken werden Synchronisationsmarkierungen (**S**) platziert, um anzuzeigen, an welchen Punkten eine Entladung erfolgen wird. Oben im Display erscheint eine Synchronisationsanzeige, und mit jeder Synchronisationsmarkierung blinkt rechts daneben ein grüne Leuchtanzeige.



Hinweis: Erscheint über der R-Zacke keine Markierung, dann wählen Sie eine andere EKG-Ableitung aus. Wird die Synchronisationsmarkierung nicht angezeigt, entlädt der Defibrillator nicht.


Sofern keine andere Konfiguration gewählt wurde, beendet das Gerät nach jeder Schockabgabe automatisch den SYNC-Modus. Um den SYNC-Modus wieder zu aktivieren, drücken Sie erneut die Schnellzugriffstaste **Sync** an der Gerätefront. Bei einer Änderung der ausgewählten Energiestufe wird der SYNC-Modus nicht beendet.

Hinweis: Über die Standardeinstellungen „Defib./Stim.“ im Menü „Einrichten“ > „Supervisor“ kann das Gerät so konfiguriert werden, dass es nach einer Defibrillation im SYNC-Modus verbleibt.

1 – Auswählen der Energiestufe


Stellen Sie mithilfe der Pfeiltasten **ENERGIEWAHL** die gewünschte Energiestufe ein. Diese Tasten befinden sich an der Gerätefront oder am STERNUM-Paddle.

Warnung! Bei Verwendung von pedi-padz-Elektroden muss die Defibrillatorenergie unter Berücksichtigung der in der jeweiligen Einrichtung gültigen Protokolle für die Defibrillation von Kindern manuell eingestellt werden.

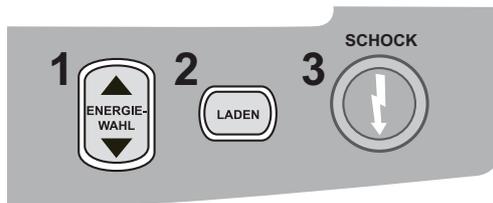

2 – Laden des Defibrillators

Drücken Sie die Taste **LADEN** an der Gerätefront bzw. am Griff des APEX-Paddles.

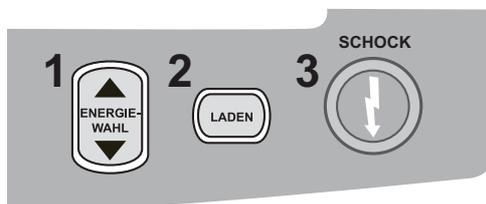

oder



Um die gewählte Energieeinstellung nach Drücken der Taste **LADEN** zu erhöhen oder zu verringern, verwenden Sie die **ENERGIEWAHL**-Tasten am Sternum-Paddle oder an der Gerätefront des Defibrillators.

Vorsicht Das Ändern der gewählten Energiestufe bei geladenem Gerät oder während des Aufladens führt dazu, dass sich der Defibrillator selbstständig entlädt. Drücken Sie die Taste **LADEN** erneut, um das Gerät auf die neu eingestellte Energiestufe zu laden.

Eine Meldung unten im Display weist darauf hin, dass der Ladevorgang läuft. Gleichzeitig zeigt ein charakteristischer Ton an, dass das Gerät geladen wird. Die Energieleiste rechts im Display hebt zur Veranschaulichung die Ladestufe hervor, bis die ausgewählte Energiestufe erreicht wird. Sobald das Gerät voll aufgeladen und bereit ist, ändert sich das akustische Signal und der Dauerton meldet die Ladebereitschaft, wobei der hervorgehobene Energiebalken die ausgewählte Energiestufe anzeigt. Die Taste **SCHOCK** leuchtet auf.

3 – Abgabe des Schocks

Warnung! **Fordern Sie alle Personen in der Nähe des Patienten auf, vor dem Entladen des Defibrillators *ZURÜCKZUTRETEN*.**

Stellen Sie sicher, dass keine Person in Kontakt mit dem Patienten, dem Überwachungskabel oder Ableitungen, dem Bettgestell oder anderen möglichen Strompfaden ist.

Prüfen Sie, ob die EKG-Kurve stabil ist und über jeder R-Zacke eine Synchronisationsmarkierung angezeigt wird.

Drücken Sie die leuchtende Taste **SCHOCK** an der Gerätefront und halten Sie sie gedrückt bzw. drücken Sie bei Verwendung von Paddles gleichzeitig beide Tasten **SCHOCK** und halten Sie sie gedrückt, bis die Energie an den Patienten abgegeben wird. Der Defibrillator entlädt bei der nächsten erkannten R-Zacke.

Unten im Display wird die abgegebene Energiestufe angezeigt, oben im Display die Nummer des Schocks (1)

Hinweis: Um die Defibrillation zu irgendeinem Zeitpunkt abubrechen, drücken Sie die Schnellzugriffstaste **Entladen**.

Falls der Defibrillator nicht innerhalb von 60 Sekunden nach Erreichen der eingestellten Energiestufe entladen wird, entlädt er sich automatisch selbst.

Falls weitere Schockabgaben erforderlich sind (und die Einstellung **Sync nach Kardioversion** deaktiviert ist), drücken Sie erneut die Schnellzugriffstaste **Sync** und gehen Sie entsprechend der Schritte 1 bis 3 dieser auf Seite 15-13 beginnenden Vorgehensweise vor, um die Energieeinstellungen anzupassen, das Gerät zu laden und den Schock abzugeben.

Sie können die Einstellung **Sync nach Kardioversion** über das Menü „Einrichten“ > „Supervisor“ > „Defib/Schrittm.“ > „Standardeinstellungen“ konfigurieren.

Kapitel 16

Defibrillation im beratenden Modus



Bei ZOLL Freihand-Therapieelektroden handelt es sich um defibrillationsgeschützte Patientenanschlüsse Typ BF.

Im beratenden Defibrillationsmodus kann das X Series Gerät mithilfe seiner integrierten EKG-Analysefunktion schockbare Rhythmen identifizieren. Ihre Aufgaben als Bediener bestehen darin, die Beratungsmeldungen zu lesen, den Defibrillator auf die vordefinierte oder von Ihnen eingestellte Energiestufe zu laden (falls das automatische Laden deaktiviert ist) und die Behandlung des Patienten durchzuführen, wenn das Protokoll und der Zustand des Patienten dies erfordern.

Die Beratungsfunktion kann nur aktiviert werden, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Das Gerät ist eingeschaltet und befindet sich im manuellen Modus.
- Die Freihand-Therapieelektroden sind richtig am Patienten angelegt.
- Die ermittelte Impedanz liegt innerhalb des zulässigen Bereichs und die Schrittmacherfunktion ist deaktiviert.
- Der Patientenmodus ist nicht auf „neonatal“ eingestellt.

WARNUNG! Für die Defibrillation von Patienten unter 8 Jahren dürfen im beratenden Modus nur pädiatrische Elektroden verwendet werden. Achten Sie zudem darauf, dass der Patientenmodus auf "Kind" eingestellt ist. Bei Verwendung von Elektroden für Erwachsene oder des Patientenmodus "Erwachsen" besteht die Gefahr, dass der Patient eine zu hohe Energiedosis erhält.

Defibrillation im beratenden Modus – Vorgehensweise

Bestimmen des Patientenzustands gemäß den lokalen medizinischen Protokollen

Überprüfen Sie, ob folgende Symptome vorliegen:

- Bewusstlosigkeit
- Atemstillstand
- Kein tastbarer Puls

Aufnahme der HLW gemäß den medizinischen Protokollen

Fordern Sie zusätzliche Unterstützung an.

Vorbereitung des Patienten

Entfernen Sie die Kleidung im Brustbereich des Patienten. Trocknen Sie den Brustbereich erforderlichenfalls ab. Wenn die Brust des Patienten übermäßig behaart ist, kürzen oder entfernen Sie die Behaarung, damit die Elektroden richtig anliegen.

Legen Sie die Freihand-Therapieelektroden wie in der beiliegenden Anleitung und in Abschnitt „Anlegen der Therapieelektroden“ auf Seite 15-6 beschrieben an.

Vergewissern Sie sich, dass die Elektroden richtig an der Haut des Patienten anliegen und keine Teile der EKG-Elektroden verdecken.

Wenn die Therapieelektroden keinen guten Kontakt zu Haut des Patienten haben, gibt das Gerät die Meldung *PADS PRÜFEN* aus. Eine Energieabgabe ist in diesem Fall nicht möglich.

Hinweis: Da die Analyse nur unter Verwendung der von den Pads abgeleiteten Signale erfolgt – selbst wenn ein EKG-Kabel angeschlossen und Ableitung II verfügbar ist –, zeigt das Gerät weiterhin die Meldung *PADS PRÜFEN* an.

1 – Einschalten des Geräts

Drücken Sie die grüne EIN/AUS-Taste oben am Gerät. Die grünen, gelben und roten LEDs an der Geräteoberseite blinken und das Gerät meldet SELBSTTEST BESTANDEN.

Wenn sich das Gerät im AED-Modus befindet, dann drücken Sie die Schnellzugriffstaste **Man. Betr.** an der Gerätefront, um das Gerät in den manuellen Modus zu versetzen.

Geben Sie mithilfe der Navigationstasten die vier Ziffern des Passcodes für den manuellen Modus ein. Drücken Sie **SPEICHERN**, sobald Sie die Eingabe abgeschlossen haben. Nach Eingabe Ihres Passcodes können Sie in den manuellen Modus wechseln.

Hinweis: Wenn das Gerät nicht für die Eingabe eines Passcodes konfiguriert wurde, wird die Meldung *Wechsel in man. Modus* angezeigt. Wählen Sie mithilfe der Navigationstasten die Option **Ja**, um in den manuellen Modus zu wechseln. Wenn Sie nicht innerhalb von 10 Sekunden **Ja** drücken, kehrt das Gerät zum AED-Modus zurück.

Wenn keine Freihand-Therapieelektroden am Patienten angelegt und an das X Series Gerät angeschlossen sind, wird die Text- und Audio-Aufforderung *PADS AUFKL.* ausgegeben.

Energiewahl

Für erwachsene Patienten gelten die folgenden Standard-Energieeinstellungen:

Schock 1: 120 Joule

Schock 2: 150 Joule

Schock 3: 200 Joule

Für pädiatrische Patienten gelten die folgenden Standard-Energieeinstellungen:

Schock 1: 50 Joule

Schock 2: 70 Joule

Schock 3: 85 Joule

Hinweis: Die Defibrillator-Energiestufen für Kinder sollten gemäß den lokal geltenden Protokollen festgelegt werden.

WARNUNG! Für die Defibrillation von Patienten unter 8 Jahren dürfen im beratenden Modus nur pädiatrische Elektroden verwendet werden. Achten Sie zudem darauf, dass der Patientenmodus auf „Kind“ eingestellt ist. Bei Verwendung von Elektroden für Erwachsene oder des Patientenmodus „Erwachsen“ besteht die Gefahr, dass der Patient eine zu hohe Energiedosis erhält.


Sofern es die medizinischen Protokolle zulassen, können Sie mit den Pfeiltasten ENERGIEWAHL an der Gerätefront auch eine andere Energiestufe einstellen. Die neue Energieeinstellung wird im Display angezeigt.

2 – Drücken der Taste ANALYSE

WARNUNG! Sorgen Sie dafür, dass sich der Patient während der EKG-Analyse nicht bewegt bzw. bewegt wird. Berühren Sie den Patienten während der Analyse nicht. Unterbinden Sie vor der EKG-Analyse alle Bewegungen durch die Krankentrage oder das Krankenfahrzeug.

Drücken Sie die Taste ANALYSE, um mit der Analyse des EKG-Rhythmus des Patienten zu beginnen und zu ermitteln, ob ein defibrillierbarer Rhythmus vorliegt.

Während das EKG des Patienten analysiert wird, erscheint für 6 bis 12 Sekunden oben im Display die Meldung *ANALYSE LÄUFT*. Sobald die Analyse abgeschlossen ist, zeigt das Gerät an, ob die Abgabe eines Schocks empfohlen wird oder nicht.

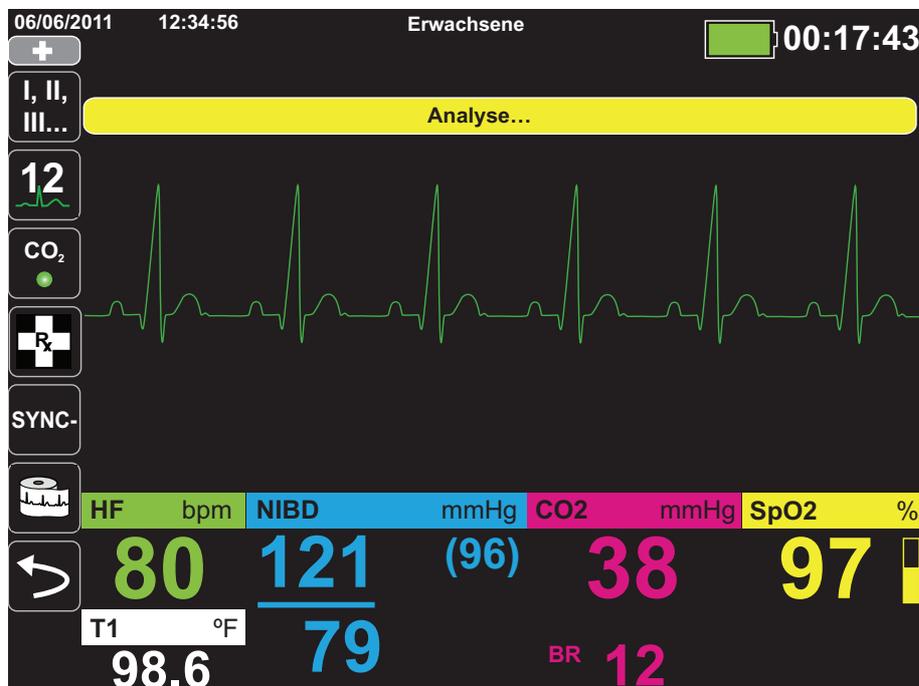

Diese Analyse umfasst normalerweise bis zu drei aufeinanderfolgende Analysen eines EKG-Rhythmus von 3 Sekunden Dauer. Wenn mindestens zwei der drei Analysen ergeben, dass ein schockbarer Rhythmus vorliegt, fordert das Gerät den Bediener automatisch auf, dem Patienten einen Schock mit der vorkonfigurierten Energiestufe zu verabreichen. Wenn mindestens zwei der drei Analysen des 3-Sekunden-EKG-Rhythmus keinen schockbaren Rhythmus feststellen, gibt das Gerät die Warnung aus, dass kein Schock verabreicht werden sollte.

Wenn die ersten beiden Analysen zu demselben Ergebnis gekommen sind, wird die endgültige Entscheidung (schockbar/nicht schockbar) getroffen und keine dritte Analyse durchgeführt.

WARNUNG! Die EKG-Rhythmusanalyse warnt nicht bei Asystolien, da diese keinen schockbaren Rhythmus darstellen.

Wenn ein nicht schockbarer Rhythmus erkannt wird, zeigt das Gerät die Meldung *KEIN SCHOCK EMPFOHLEN* an. Setzen Sie in diesem Fall die HLW oder andere Reanimationsmaßnahmen gemäß den lokal geltenden Protokollen fort und führen Sie in angemessenen Intervallen eine erneute Analyse des EKGs durch.

Hinweis: Wenn ein nicht defibrillierbarer Rhythmus erkannt wird, hindert das X Series Gerät den Bediener nicht daran, den Patienten manuell zu defibrillieren.

Wenn ein schockbarer Rhythmus festgestellt wird (Kammerflimmern oder Breitkomplex-Tachykardie mit einer Herzfrequenz > 150 bpm), zeigt das Gerät die Meldung **SCHOCK EMPFOHLEN** an. Drücken Sie die Taste **LADEN**, und stellen Sie erforderlichenfalls mithilfe der Pfeiltasten **ENERGIEWAHL** die gewünschte Energiestufe ein. Drücken Sie anschließend erneut **LADEN**, um die Einstellung zu bestätigen.

Unabhängig vom Analyseergebnis kann der Bediener den Defibrillator manuell steuern. So kann der Patient beispielsweise selbst dann defibrilliert werden, wenn die Beratungsfunktion die Meldung **KEIN SCHOCK EMPFOHLEN** ausgegeben hat.

3 – Drücken der Taste **SCHOCK**

WARNUNG! Fordern Sie alle Personen in der Nähe des Patienten auf, vor dem Entladen des Defibrillators **ZURÜCKZUTRETEN**.

Berühren Sie während der Defibrillation weder das Bett noch den Patienten noch Geräte, die an den Patienten angeschlossen sind. Es besteht Elektroschockgefahr! Entblößte Körperteile des Patienten dürfen nicht mit Metallteilen wie dem Bettrahmen in Berührung stehen, um unerwünschte Pfade für den Defibrillationsstrom auszuschließen.

Halten Sie die Taste **SCHOCK**  an der Gerätefront so lange gedrückt, bis die Energie an den Patienten abgegeben wird.

Unten im Display wird die abgegebene Energiestufe angezeigt, oben im Display sowie unten im Bedienfeld „Defib“ die Nummer des Schocks (1).



Hinweis: Um die Defibrillation zu irgendeinem Zeitpunkt abubrechen, drücken Sie die Schnellzugriffstaste **Entladen**.

Falls der Defibrillator nicht innerhalb von 60 Sekunden nach Erreichen der eingestellten Energiestufe entladen wird, entlädt er sich automatisch selbst.

Falls weitere Schockabgaben erforderlich sind, gehen Sie entsprechend der Schritte 1 bis 3 dieser auf Seite 16-2 beginnenden Vorgehensweise vor, um die Energieeinstellungen anzupassen, das Gerät zu laden und den Schock abzugeben.

Herzlungenwiederbelebung

Beginnen Sie mit den Thoraxkompressionen und der Beatmung gemäß dem lokalen Protokoll.

Wiederholen der Analyse

Drücken Sie die Taste **ANALYSE**, um eine neue EKG-Analyse zu starten und festzustellen, ob zusätzliche Schocks erforderlich sind.

Hinweis: In den ersten 3 Sekunden nach einem Schock ist keine erneute Analyse des EKG-Rhythmus möglich.

Fortführung der Patientenversorgung

Führen Sie die Patientenversorgung gemäß den medizinischen Protokollen fort.

Kapitel 17

Defibrillation im Beratungs-/CPR- Protokoll-Modus



Bei ZOLL Freihand-Therapieelektroden handelt es sich um defibrillationsgeschützte Patientenanschlüsse Typ BF.

Wenn das X Series Gerät für die Defibrillation im Beratungs-/CPR-Protokoll-Modus konfiguriert ist, leitet das Gerät Sie durch die einzelnen Schritte der Behandlung des kardialen Notfalls: Durchführung der EKG-Analyse, Vorbereitung des Geräts für einen Schock (sofern erforderlich) und Ausgabe von Anweisungen während des CPR-Intervalls. Dieser Zyklus wird wiederholt, solange der Beratungs-/CPR-Protokoll-Modus aktiviert ist und Pads am Patienten angebracht sind. Sollten sich die Pads vom Patienten lösen oder während der Durchführung der Wiederbelebensmaßnahmen kurzgeschlossen werden, wird das Protokoll angehalten, bis die Pads wieder angebracht sind (ein aktuell durchlaufenes CPR-Intervall wird zuvor abgeschlossen).

Wenn Sie im Beratungs-/CPR-Protokoll-Modus eine der Energiewahltasten oder die Taste **LADEN** drücken, wechselt das Gerät in den manuellen Modus. Wenn sich das Gerät gerade auflädt, wenn Sie vom Beratungs-/CPR-Protokoll-Modus in den manuellen Modus wechseln, entlädt sich das Gerät und stoppt jede momentan laufende Analyse.

Der Beratungs-/CPR-Protokoll-Modus kann nur aktiviert werden, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Das Gerät ist für den Beratungs-/CPR-Protokoll-Modus konfiguriert.
- Das Gerät ist eingeschaltet und befindet sich im manuellen Modus.

- Die Freihand-Therapieelektroden sind korrekt am Patienten angelegt.
- Die ermittelte Impedanz liegt innerhalb des zulässigen Bereichs und die Schrittmacherfunktion ist deaktiviert.
- Der Patientenmodus ist nicht auf „Neugeborenes“ eingestellt.

WARNUNG! Für die Defibrillation von Patienten unter 8 Jahren dürfen im Beratungs-/CPR-Protokoll-Modus nur pädiatrische Elektroden verwendet werden. Achten Sie zudem darauf, dass der Patientenmodus auf „Kind“ eingestellt ist. Bei Verwendung von Elektroden für Erwachsene oder des Patientenmodus „Erwachsen“ besteht die Gefahr, dass der Patient eine zu hohe Energiedosis erhält.

Defibrillation im Beratungs-/CPR-Protokoll-Modus – Vorgehensweise

Bestimmen des Patientenzustands gemäß den lokalen medizinischen Protokollen

Überprüfen Sie, ob folgende Symptome vorliegen:

- Bewusstlosigkeit
- Atemstillstand
- Kein tastbarer Puls

Aufnahme der HLW gemäß den medizinischen Protokollen

Fordern Sie zusätzliche Unterstützung an.

Vorbereitung des Patienten

Entfernen Sie die Kleidung im Brustbereich des Patienten. Trocknen Sie den Brustbereich erforderlichenfalls ab. Wenn die Brust des Patienten übermäßig behaart ist, kürzen oder entfernen Sie die Behaarung, damit die Elektroden richtig anliegen.

Legen Sie die Freihand-Therapieelektroden wie in der beiliegenden Anleitung und in Abschnitt “Therapy Electrode Application” on page 15-6 beschrieben an.

Vergewissern Sie sich, dass die Elektroden richtig an der Haut des Patienten anliegen und keine Teile der EKG-Elektroden verdecken.

Wenn die Therapieelektroden keinen guten Kontakt zur Haut des Patienten haben, gibt das Gerät die Meldung *PADS PRÜFEN* aus. Eine Energieabgabe ist in diesem Fall nicht möglich.

1 – Einschalten des Geräts

Drücken Sie die grüne EIN/AUS-Taste oben am Gerät. Die grünen, gelben und roten LEDs an der Geräteoberseite blinken und das Gerät meldet *SELBSTTEST BESTANDEN*.

Wenn sich das Gerät im AED-Modus befindet, dann drücken Sie die Schnellzugriffstaste **Man. Betr.** an der Gerätefront, um das Gerät in den manuellen Modus zu versetzen.

Geben Sie mithilfe der Navigationstasten die vier Ziffern des Passcodes für den manuellen Modus ein. Drücken Sie **SPEICHERN**, sobald Sie die Eingabe abgeschlossen haben. Nach Eingabe Ihres Passcodes können Sie in den manuellen Modus wechseln.

Hinweis: Wenn das Gerät nicht für die Eingabe eines Passcodes konfiguriert wurde, wird die Meldung *Wechsel in man. Modus* angezeigt. Wählen Sie mithilfe der Navigationstasten die Option **Ja**, um in den manuellen Modus zu wechseln. Wenn Sie nicht innerhalb von 10 Sekunden **Ja** drücken, kehrt das Gerät in den AED-Modus zurück.

Wenn keine Freihand-Therapieelektroden am Patienten angelegt und an das X Series Gerät angeschlossen sind, wird die Text- und Audio-Aufforderung *PADS AUFKL.* ausgegeben.

Energiewahl

Für erwachsene Patienten gelten die folgenden Standard-Energieeinstellungen:

Schock 1: 120 Joule
Schock 2: 150 Joule
Schock 3: 200 Joule

Für pädiatrische Patienten gelten die folgenden Standard-Energieeinstellungen:

Schock 1: 50 Joule
Schock 2: 70 Joule
Schock 3: 85 Joule

Hinweis: Die Defibrillator-Energiestufen für Kinder sollten gemäß den lokal geltenden Protokollen festgelegt werden.

WARNUNG! Für die Defibrillation von Patienten unter 8 Jahren dürfen im Beratungs-/CPR-Protokoll-Modus nur pädiatrische Elektroden verwendet werden. Achten Sie zudem darauf, dass der Patientenmodus auf „Kind“ eingestellt ist. Bei Verwendung von Elektroden für Erwachsene oder des Patientenmodus „Erwachsen“ besteht die Gefahr, dass der Patient eine zu hohe Energiedosis erhält.

2 – Drücken der Taste ANALYSE

WARNUNG! Sorgen Sie dafür, dass sich der Patient während der EKG-Analyse nicht bewegt bzw. bewegt wird. Berühren Sie den Patienten während der Analyse nicht. Unterbinden Sie vor der EKG-Analyse alle Bewegungen durch die Krankentrage oder das Krankenfahrzeug.

Drücken Sie die Taste **ANALYSE**, um mit der Analyse des EKG-Rhythmus des Patienten zu beginnen und zu ermitteln, ob ein defibrillierbarer Rhythmus vorliegt.

Während das EKG des Patienten analysiert wird, erscheinen unten im Display abwechselnd die Meldungen *EKG-ANALYSE LÄUFT* und *HÄNDE WEG*. Sobald die Analyse abgeschlossen ist, zeigt das Gerät an, ob die Abgabe eines Schocks empfohlen wird oder nicht.

Hinweis: Durch Drücken der Schnellzugriffstaste **Beend.** können Sie jederzeit den Beratungs-/CPR-Protokoll-Modus beenden und in den manuellen Modus zurück wechseln.



Diese Analyse umfasst normalerweise bis zu drei aufeinanderfolgende Analysen eines EKG-Rhythmus von 3 Sekunden Dauer. Wenn mindestens zwei der drei Analysen ergeben, dass ein defibrillierbarer Rhythmus vorliegt, fordert das Gerät den Bediener automatisch auf, dem Patienten einen Schock mit der vorkonfigurierten Energiestufe zu verabreichen. Wenn mindestens zwei der drei Analysen des 3-Sekunden-EKG-Rhythmus keinen defibrillierbaren Rhythmus feststellen, gibt das Gerät die Warnung aus, dass kein Schock verabreicht werden sollte.

Wenn die ersten beiden Analysen zu demselben Ergebnis gekommen sind, wird die endgültige Entscheidung (defibrillierbar/nicht defibrillierbar) getroffen und keine dritte Analyse durchgeführt.

WARNUNG! Die EKG-Rhythmusanalyse warnt nicht bei Asystolien, da diese keinen defibrillierbaren Rhythmus darstellen.

Wenn Sie im Beratungs-/CPR-Protokoll-Modus eine der Energiewahltasten oder die Taste **LADEN** drücken, wechselt das Gerät in den manuellen Modus. Wenn sich das Gerät gerade auflädt, wenn Sie vom Beratungs-/CPR-Protokoll-Modus in den manuellen Modus wechseln, entlädt sich das Gerät und stoppt jede momentan laufende Analyse.

Nicht defibrillierbarer Rhythmus

Wenn ein nicht defibrillierbarer Rhythmus erkannt wird, zeigt das Gerät die Meldung *KEIN SCHOCK EMPFOHLEN* an. Anschließend leitet das Gerät Sie durch ein CPR-Intervall und startet die EKG-Analyse automatisch neu. Diese Analyse- und CPR-Intervalle werden wiederholt, solange der Beratungs-/CPR-Protokoll-Modus aktiviert ist. Durch Drücken der Schnellzugriffstaste **Beend.** können Sie jederzeit in den manuellen Modus zurück wechseln.

Hinweis: Wenn ein nicht defibrillierbarer Rhythmus erkannt wird, hindert das X Series Gerät den Bediener nicht daran, den Patienten manuell zu defibrillieren.

Defibrillierbarer Rhythmus

Wenn der Rhythmus des Patienten defibrillierbar ist, zeigt das Gerät die Meldungen *SCHOCK EMPFOHLEN* und *SCHOCK DRÜCKEN* an. Der Defibrillator fordert den Bediener automatisch auf, dem Patienten einen Schock mit der vorkonfigurierten Energiestufe zu verabreichen, und die Taste **SCHOCK** leuchtet auf.

Für 20 oder 50 Sekunden (je nach Konfiguration) ertönt ein Dauerton, gefolgt von einem höheren, 10 Sekunden anhaltenden Ton. Sie müssen den Schock innerhalb dieses 30- bzw. 60-Sekunden-Intervalls (je nach Konfiguration) abgeben, sonst entlädt sich der Defibrillator selbsttätig.

3 – Drücken der Taste SCHOCK

WARNUNG! Fordern Sie alle Personen in der Nähe des Patienten auf, vor dem Entladen des Defibrillators **ZURÜCKZUTRETEN**.

Berühren Sie während der Defibrillation weder das Bett noch den Patienten noch Geräte, die an den Patienten angeschlossen sind. Es besteht Elektroschockgefahr! Entblößte Körperteile des Patienten dürfen nicht mit Metallteilen wie dem Bettrahmen in Berührung stehen, um unerwünschte Pfade für den Defibrillationsstrom auszuschließen.

Halten Sie die beleuchtete Taste **SCHOCK**  an der Gerätefront gedrückt, bis die Energie an den Patienten abgegeben wird.

Unten im Display wird die abgegebene Energiestufe angezeigt, oben im Display sowie unten im Bedienfeld „Defib“ die Nummer des Schocks (1).



Anschließend leitet das Gerät Sie durch ein CPR-Intervall und startet die EKG-Analyse automatisch neu. Diese Analyse- und CPR-Intervalle werden wiederholt, solange der Beratungs-/CPR-Protokoll-Modus aktiviert ist. Durch Drücken der Schnellzugriffstaste **Beend.** können Sie jederzeit in den manuellen Modus zurück wechseln.

Kapitel 18

Externe Stimulation



Bei Verwendung der ZOLL Freihand-Therapieelektroden wird davon ausgegangen, dass es sich um einen defibrillationsgeschützten Patientenanschluss Typ BF handelt.



Bei EKG-Ableitungen handelt es sich um defibrillationsgeschützte Patientenanschlüsse Typ CF.

WARNUNG! Die Schrittmacherfunktion kann bei Erwachsenen, Jugendlichen, Kindern und Säuglingen eingesetzt werden.

Um das Risiko eines elektrischen Schocks zu vermeiden, sollten Sie während der Stimulation den mit Gel bedeckten Bereich der Freihand-Therapieelektroden nicht berühren.

Die Therapieelektroden sollten regelmäßig ersetzt werden. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung für die Elektroden.

Eine verlängerte Stimulation (über 30 Minuten) kann besonders bei Jugendlichen, Kindern und Säuglingen oder bei Erwachsenen mit stark eingeschränkter Durchblutung zu Verbrennungen führen. Die betroffenen Hautflächen sollten in regelmäßigen Abständen überprüft werden.

Bei einer Stimulation im Bedarfsmodus kann der Schrittmacher durch EMI-, RFI- oder ESU-Interferenzen (ESU = Electrosurgical Unit, elektrochirurgisches Gerät) beeinträchtigt werden. Entfernen Sie den Patienten aus dem Einflussbereich potenzieller Störquellen.

Externe Stimulation

X Series Defibrillatoren besitzen einen Schrittmacher für die Notfallbehandlung von hämodynamisch wirksamer Bradykardie, auf medikamentöse Behandlung nicht ansprechende Bradykardie mit Ersatzrhythmus, refraktärer Tachykardie (supraventrikulär oder ventrikulär) und bradyastolischem Herzstillstand.

Eine korrekte Bedarfs-Stimulation erfordert ein zuverlässiges Oberflächen-EKG-Signal hoher Qualität. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, legen Sie sowohl Standard-EKG-Überwachungselektroden als auch Freihand-Stimulationstherapie-Elektroden am Patienten an.

Schrittmachermodi

Das X Series Gerät verfügt über zwei Schrittmachermodi: Bedarfs-Modus und Festfrequenz-Modus. Als werkseitiger Standardmodus ist der Bedarfs-Modus eingestellt.

Im Bedarfs-Modus bewirken QRS-Komplexe des Patienten, die in einem von der Einstellung der Frequenzsteuerung abhängigen Intervall auftreten, dass Stimulationsimpulse unterdrückt werden. Werden in diesem Intervall keine QRS-Komplexe ermittelt, wird ein Stimulationsimpuls an den Patienten abgegeben. Im Bedarfs-Modus gibt der Schrittmacher die Anzahl von Stimulationsimpulsen ab, die benötigt wird, um die Herzfrequenz des Patienten ungefähr mit der im Stimulationsfrequenzfenster ausgewählten Frequenz aufrechtzuerhalten. Weitere Informationen finden Sie im nachstehenden Verfahren, „Stimulation im Bedarfs-Modus“.

Im Modus Festfrequenz-Modus hängen die Stimulationsimpulse nicht von der Herzaktivität des Patienten ab. Diese Form der Stimulation mit fester Frequenz sollte nur in Notfällen gewählt werden, wenn es keine Alternativen gibt. Der Schrittmacher gibt Stimulationsimpulse mit der ausgewählten Stimulationsfrequenz ab. Weitere Informationen finden Sie unter „Stimulation im Festfrequenzmodus“ auf Seite 18-6.

Stimulation im Bedarfs-Modus

Bestimmen des Patientenzustands und Versorgung gemäß den lokalen medizinischen Protokollen

Vorbereitung des Patienten

Entfernen Sie die Kleidung im Brustbereich des Patienten. Trocknen Sie den Brustbereich erforderlichenfalls ab. Wenn die Brust des Patienten übermäßig behaart ist, kürzen oder entfernen Sie die Behaarung, damit die Elektroden richtig anliegen.

1 – Einschalten des Geräts

Drücken Sie die grüne EIN/AUS-Taste oben am Gerät. Die grünen, gelben und roten LEDs an der Geräteoberseite blinken und das Gerät meldet „SELBSTTEST BESTANDEN“.


2 – Anlegen der EKG-Elektroden/Freihand-Therapieelektroden

Legen Sie die EKG-Elektroden an, schließen Sie die Ableitungen an, und schließen Sie das EKG-Kabel an der Seite des X Series Geräts an. (Auf Kapitel 6, „EKG-Überwachung“ wird beschrieben, wie Sie die EKG-Elektroden am Patienten anlegen). Legen Sie die Freihand-Therapieelektroden wie auf der Verpackung der Elektroden beschrieben an. Schließen Sie diese Therapieelektroden an das Multifunktionskabel an.

Anlegen der Therapieelektroden

WARNUNG! Schlechte Haftung und/oder Luft unter den Therapieelektroden kann zu Lichtbogenbildung und Hautverbrennungen führen.

1. Legen Sie eine Kante der Elektrode fest am Patienten an.
2. Rollen Sie die Elektrode ausgehend von dieser Kante in einer durchgehenden Bewegung auf die Haut. Achten Sie darauf, dass sich zwischen dem Gel und der Haut keine Luftpneinschlüsse bilden.

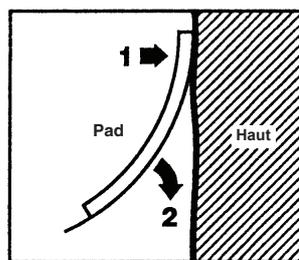

3. Vergewissern Sie sich, dass die Elektroden richtig an der Haut des Patienten anliegen und keine Teile anderer EKG-Elektroden verdecken.
4. Drücken Sie die Schnellzugriffstaste „Ableitungen“ und wählen Sie „I“, „II“ oder „III“, um den QRS-Komplex mit der größten Amplitude bereitzustellen.

Hinweis: Wenn der Schrittmacher eingeschaltet ist, stehen nur die Ableitungen I, II oder III zur Auswahl.

5. Vergewissern Sie sich, dass die R-Zacken korrekt ermittelt werden. Hierzu muss bei jeder angezeigten R-Zacke ein QRS-Ton zu hören sein bzw. die Herzfrequenzanzeige des X Series Geräts muss die Pulsfrequenz des Patienten präzise widerspiegeln.

3 – Drücken der Taste „SCHRITTM.“

Drücken Sie die Taste **SCHRITTM.** an der Gerätefront. Das Fenster „Stim.Einst.“ erscheint.



4 – Einstellen des Modus

Navigieren Sie mithilfe der Pfeiltasten zu „Modus“, drücken Sie die Auswahl taste und legen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten und der Auswahl taste als Schrittmachermodus „Bedarf“ fest.

Hinweis: Der initiale Schrittmachermodus kann unter den Standardeinstellungen für „Defib./Stim.“ im Menü „Einrichten“ > „Supervisor“ festgelegt werden.

5 – Einstellen der Stimulationsfrequenz

Navigieren Sie mithilfe der Pfeiltasten zu „Freq.“, drücken Sie die Auswahl taste und legen Sie mithilfe der Pfeiltasten und der Auswahl taste als Stimulationsfrequenz einen Wert fest, der um 10 bis 20 ppm höher ist als die Eigenfrequenz des Patienten. Liegt keine Eigenfrequenz vor, so verwenden Sie 100 ppm. Sie können die Stimulationsfrequenz bei Frequenzen unter 100 ppm um 5 ppm und bei Frequenzen über 100 ppm um 10 ppm erhöhen bzw. verringern.

Hinweis: Die initiale Stimulationsfrequenz kann unter den Standardeinstellungen für „Defib./Stim.“ im Menü „Einrichten“ > „Supervisor“ festgelegt werden.

6 – Einschalten des Schrittmachers

Navigieren Sie mithilfe der Pfeiltasten zu „Stimul. Start.“. Drücken Sie dann die Auswahl taste, um die Option auszuwählen. Hinter dem Fenster „Stim.Einst.“ wird das Fenster „Pacing“ angezeigt.

● STIMULAT.		
Freq.	Ausgang	bestät.
80 ppm	95 mA	Bedarf

7 – Einstellen der Schrittmacher-Stromstärke

Stellen Sie im Fenster „Stim.Einst.“ mithilfe der Pfeiltasten und der Auswahl taste die Schrittmacher-Stromstärke ein. Die Stromstärke kann in 10-mA-Schritten erhöht bzw. in 5-mA-Schritten verringert werden. Untersuchen Sie das EKG auf Anzeichen elektrischer Erregungsauslösung (Capture). Wählen Sie die niedrigste Stromstärke aus, mit der sich sowohl elektrische als auch mechanische Erregungsauslösung (Capture) erzielen lässt.

Hinweis: Wird das Fenster „Stim.Einst.“ ausgeblendet, bevor Sie die Stromstärke festlegen konnten, können Sie es durch erneutes Drücken der Taste **SCHRITTM.** wieder aufrufen.

8 – Bestimmen der Erregungsauslösung (Capture)

Es ist wichtig zu erkennen, wann die Schrittmacherstimulation eine ventrikuläre Erregung (Capture) ausgelöst hat. Die Bestimmung der Erregungsauslösung muss elektrisch und mechanisch erfolgen, um die wirkungsvolle Kreislaufunterstützung des Patienten sicherzustellen.

Die Erregungsauslösung (Capture) wird durch die Anwesenheit eines verbreiterten QRS-Komplexes, den Verlust der grundlegenden Eigenfrequenz und das Auftreten einer verlängerten und zuweilen auch vergrößerten T-Welle bestimmt.

Die ventrikuläre Antwort ist normalerweise charakterisiert durch die Unterdrückung des intrinsischen QRS-Komplexes.

WARNUNG! Die Bestimmung der Erregungsauslösung sollte allein durch Beobachtung der EKG-Kurve im Display des X Series Geräts erfolgen, während eine direkte EKG-Verbindung zum Patienten besteht. Der Einsatz von anderen EKG-Überwachungsgeräten kann zu falschen Informationen durch Schrittmacher-Artefakte führen.

Die mechanische Erregungsauslösung wird durch Palpation des peripheren Pulses bestimmt.

Um Muskelreaktionen auf Schrittmacherimpulse nicht mit dem Arterienpuls zu verwechseln, dürfen Sie den Puls während der Stimulation NUR an folgenden Stellen tasten:

- A. femoralis
- A. brachialis dextra oder A. radialis dextra

Wirksame Stimulation

Das Ändern von EKG-Ableitungen und -Amplituden kann beim Bestimmen der Erregungsauslösung manchmal hilfreich sein.

Hinweis: Form und Amplituden der stimulierten EKG-Kurven können je nach gewählter EKG-Ableitungskonfiguration und je nach Patient erheblich variieren.

9 – Bestimmen der optimalen Reizschwelle

Der ideale Schrittmacherstrom ist der niedrigste Wert, der eine kontinuierliche Erregungsauslösung gewährleistet; er liegt normalerweise ca. 10 % über dem Schwellenwert. Typische Reizschwellenströme liegen zwischen 40 und 80 mA. Die Lage der Freihand-Therapieelektroden und der Therapieelektroden beeinflusst den Strom, der für die ventrikuläre Erregungsauslösung erforderlich ist. Der niedrigste Schwellenwert wird normalerweise dann erreicht, wenn sich durch die Elektrodenpositionierung ein möglichst direkter Strompfad durch das Herz ergibt und große Brustmuskeln umgangen werden. Geringere Stimulationsströme erzeugen weniger Kontraktionen der Skelettmuskulatur und werden besser vertragen.

Stimulation im Festfrequenzmodus

Wenn keine EKG-Elektroden zur Verfügung stehen oder wenn Bedingungen herrschen, die ein Oberflächen-EKG verhindern oder beeinträchtigen, gibt das X Series Gerät Schrittmacherimpulse mit fester Frequenz aus.

Diese Form der Stimulation mit fester Frequenz sollte nur in Notfällen gewählt werden, wenn es keine Alternativen gibt.

1 – Einschalten des Geräts

Drücken Sie die grüne EIN/AUS-Taste oben am Gerät. Die grünen, gelben und roten LEDs an der Geräteoberseite blinken und das Gerät meldet „SELBSTTEST BESTANDEN“.


2 – Anlegen der EKG-Elektroden/Freihand-Therapieelektroden

Legen Sie die EKG-Elektroden an, schließen Sie die Ableitungen an, und schließen Sie das EKG-Kabel an der Seite des X Series Geräts an. (In Kapitel 6 wird beschrieben, wie Sie die EKG-Elektroden am Patienten anlegen). Legen Sie die Freihand-Therapieelektroden wie auf der Verpackung der Elektroden beschrieben an. Schließen Sie diese Therapieelektroden an das Multifunktionskabel an.

Anlegen der Therapieelektroden

WARNUNG! Schlechte Haftung und/oder Luft unter den Therapieelektroden kann zu Lichtbogenbildung und Hautverbrennungen führen.

1. Legen Sie eine Kante der Elektrode fest am Patienten an.
2. Rollen Sie die Elektrode ausgehend von dieser Kante in einer durchgehenden Bewegung auf die Haut. Achten Sie darauf, dass sich zwischen dem Gel und der Haut keine Luftpneinschlüsse bilden.

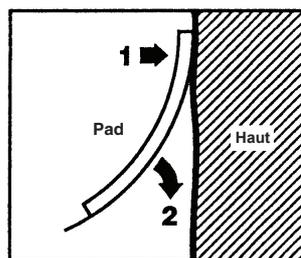

3. Vergewissern Sie sich, dass die Elektroden richtig an der Haut des Patienten anliegen und keine Teile anderer EKG-Elektroden verdecken.
4. Drücken Sie die Schnellzugriffstaste „Ableitungen“ und wählen Sie „I“, „II“ oder „III“, um den QRS-Komplex mit der größten Amplitude bereitzustellen.

Hinweis: Wenn der Schrittmacher eingeschaltet ist, stehen nur die Ableitungen I, II oder III zur Auswahl.

- Vergewissern Sie sich, dass die R-Zacken korrekt ermittelt werden. Hierzu muss bei jeder angezeigten R-Zacke ein QRS-Ton zu hören sein bzw. die Herzfrequenzanzeige des X Series Geräts muss die Pulsfrequenz des Patienten präzise widerspiegeln.

3 – Drücken der Taste „SCHRITTM.“

Drücken Sie die Taste **SCHRITTM.** an der Gerätefront. Das Fenster „Stim.Einst.“ erscheint.



4 – Einstellen des Modus

Navigieren Sie mithilfe der Pfeiltasten zu „Modus“, drücken Sie die Auswahltaste und legen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten und der Auswahltaste als Schrittmachermodus „Fest“ fest. Der ausgewählte Modus wird im Fenster „Pacing“ angezeigt.

Hinweis: Der initiale Schrittmachermodus kann unter den Standardeinstellungen für „Defib./Stim.“ im Menü „Einrichten“ > „Supervisor“ festgelegt werden.

5 – Einstellen der Stimulationsfrequenz

Navigieren Sie mithilfe der Pfeiltasten zu „Freq.“, drücken Sie die Auswahltaste und legen Sie mithilfe der Pfeiltasten und der Auswahltaste als Stimulationsfrequenz einen Wert fest, der um 10 bis 20 ppm höher ist als die Eigenfrequenz des Patienten. Liegt keine Eigenfrequenz vor, so verwenden Sie 100 ppm. Sie können die Stimulationsfrequenz bei Frequenzen unter 100 ppm um 5 ppm und bei Frequenzen über 100 ppm um 10 ppm erhöhen bzw. verringern.

Hinweis: Die initiale Stimulationsfrequenz kann unter den Standardeinstellungen für „Defib./Stim.“ im Menü „Einrichten“ > „Supervisor“ festgelegt werden.

6 – Einschalten des Schrittmachers

Navigieren Sie mithilfe der Pfeiltasten zu „Stimul. Start.“. Drücken Sie dann die Auswahltaste, um die Option auszuwählen. Hinter dem Fenster „Stim.Einst.“ wird das Fenster „Pacing“ angezeigt.



7 – Einstellen der Schrittmacher-Stromstärke

Stellen Sie im Fenster „Stim.Einst.“ mithilfe der Pfeiltasten und der Auswahltaste die Schrittmacher-Stromstärke ein. Die Stromstärke kann in 10-mA-Schritten erhöht bzw. in 5-mA-Schritten verringert werden. Untersuchen Sie das EKG auf Anzeichen elektrischer Erregungsauslösung (Capture). Wählen Sie die niedrigste Stromstärke aus, mit der sich sowohl elektrische als auch mechanische Erregungsauslösung (Capture) erzielen lässt.

Hinweis: Wird das Fenster „Stim.Einst.“ ausgeblendet, bevor Sie die Stromstärke festlegen konnten, können Sie es durch erneutes Drücken der Taste **SCHRITTM.** wieder aufrufen.

8 – Bestimmen der Erregungsauslösung (Capture)

Es ist wichtig zu erkennen, wann die Schrittmacherstimulation eine ventrikuläre Erregung (Capture) ausgelöst hat. Die Bestimmung der Erregungsauslösung muss elektrisch und mechanisch erfolgen, um die wirkungsvolle Kreislaufunterstützung des Patienten sicherzustellen.

Die Erregungsauslösung (Capture) wird durch die Anwesenheit eines verbreiterten QRS-Komplexes, den Verlust der grundlegenden Eigenfrequenz und das Auftreten einer verlängerten und zuweilen auch vergrößerten T-Welle bestimmt.

Die ventrikuläre Antwort ist normalerweise charakterisiert durch die Unterdrückung des intrinsischen QRS-Komplexes.

WARNUNG! Die Bestimmung der Erregungsauslösung sollte allein durch Beobachtung der EKG-Kurve im Display des X Series Geräts erfolgen, während eine direkte EKG-Verbindung zum Patienten besteht. Der Einsatz von anderen EKG-Überwachungsgeräten kann zu falschen Informationen durch Schrittmacher-Artefakte führen.

Die mechanische Erregungsauslösung wird durch Palpation des peripheren Pulses bestimmt.

Um Muskelreaktionen auf Schrittmacherimpulse nicht mit dem Arterienpuls zu verwechseln, dürfen Sie den Puls während der Stimulation NUR an folgenden Stellen tasten:

- A. femoralis
- A. brachialis dextra oder A. radialis dextra

Wirksame Stimulation

Das Ändern von EKG-Ableitungen und -Amplituden kann beim Bestimmen der Erregungsauslösung manchmal hilfreich sein.

Hinweis: Form und Amplituden der stimulierten EKG-Kurven können je nach gewählter EKG-Ableitungskonfiguration und je nach Patient erheblich variieren.

9 – Bestimmen der optimalen Reizschwelle

Der ideale Schrittmacherstrom ist der niedrigste Wert, der eine kontinuierliche Erregungsauslösung gewährleistet; er liegt normalerweise ca. 10 % über dem Schwellenwert. Typische Reizschwellenströme liegen zwischen 40 und 80 mA. Die Lage der Freihand-Therapieelektroden und der Therapieelektroden beeinflusst den Strom, der für die ventrikuläre Erregungsauslösung erforderlich ist. Der niedrigste Schwellenwert wird normalerweise dann erreicht, wenn sich durch die Elektrodenpositionierung ein möglichst direkter Strompfad durch das Herz ergibt und große Brustmuskeln umgangen werden. Geringere Stimulationsströme erzeugen weniger Kontraktionen der Skelettmuskulatur und werden besser vertragen.

Stimulation bei Kindern

Die nichtinvasive Stimulation bei Kindern erfolgt genauso wie bei Erwachsenen. Für Patienten mit einem Gewicht unter 15 kg stehen kleinere Therapieelektroden für Kinder zur Verfügung. Wenn länger als 30 Minuten stimuliert werden muss, ist eine regelmäßige Prüfung der darunterliegenden Haut unbedingt anzuraten. Beachten Sie alle Hinweise auf der Elektrodenverpackung gewissenhaft.

Schrittmacherstörung

Während der Stimulation zeigt das X Series Gerät möglicherweise die folgenden Meldungen an.

Systemmeldung	Beschreibung
<i>ANGEHALTEN</i>	Der Schrittmacher hat die Stimulation des Patienten unterbrochen.
<i>STIMULAT.</i>	Der Schrittmacher führt derzeit eine Stimulation des Patienten durch.
<i>STIMULAT.: THERAPIE-ELEKTRODEN PR.</i>	Die Therapieelektroden sind nicht angeschlossen oder haben keinen guten Kontakt mit dem Patienten. Applizieren Sie die Therapieelektroden am Patienten.
<i>ECG-FEHLER: STIMULATION „FIXED“</i>	Der Schrittmacher führt die Stimulation im Festfrequenz-Modus durch, da die in der primären Kurve dargestellte EKG-Ableitung fehlerhaft ist.
<i>STIMULAT.: KURZSCHLUSS ERM.</i>	Aufgrund einer Testverbindung oder eines Geräte-/ Multifunktionskabel-Fehlers liegt ein Kurzschluss im Schrittmacher-Ausgang vor.

Kapitel 19

Real CPR Help



Real CPR Help ist eine defibrillatorsichere Ausrüstung Typ BF.

WARNUNG! Die Funktion Real CPR Help ist nicht für die Verwendung bei Patienten unter 8 Jahren vorgesehen.

Bei Verwendung mit CPR-D-padz- oder OneStep CPR-Elektroden kann das X Series Gerät den Hilfeleistenden wertvolle Informationen über die Qualität der am Patienten durchgeführten Herzlungenwiederbelebung liefern. Welche Art von Informationen dabei verfügbar ist, richtet sich nach dem Betriebsmodus und nach der Anwenderkonfiguration. Die Informationen werden jedoch immer aus der Messung von Kompressionstiefe und -frequenz abgeleitet.


Wenn die ZOLL CPR-D-padz- oder OneStep CPR-Elektroden entsprechend den Packungsanweisungen angelegt werden, bilden sie zwischen der Hand des Hilfeleistenden und dem unteren Brustbeinbereich des Patienten einen Sensor für die Thoraxkompressionen. Dieser Sensor überwacht die Frequenz und Tiefe der Thoraxkompressionen und sendet diese Informationen an das X Series Gerät, wo sie verarbeitet und angezeigt werden.

Der X Series Defibrillator zeigt die Informationen zu Frequenz und Tiefe der Thoraxkompressionen im CPR-Dashboard an und gibt dem Hilfeleistenden auf eine oder mehrere der folgenden Arten Feedback:

- Thoraxkompressionsanzeige
- CPR-Entlastungsanzeige
- Frequenz- und Tiefenmesswerte
- CPR-Frequenztaktvorgabe
- Aufforderung GANZ ENTLAST.
- CPR-Audio-Aufforderungen
- CPR-Pausendaueranzeige

CPR-Dashboard

Wenn CPR-D-padz- oder OneStep CPR-Elektroden an den X Series Defibrillator angeschlossen sind und das Gerät Thoraxkompressionen erkennt, leuchtet in der Mitte der unteren Displayhälfte das CPR-Dashboard auf. Dieses Feld enthält die in den nächsten Abschnitten beschriebenen CPR-Feedback-Anzeigen.

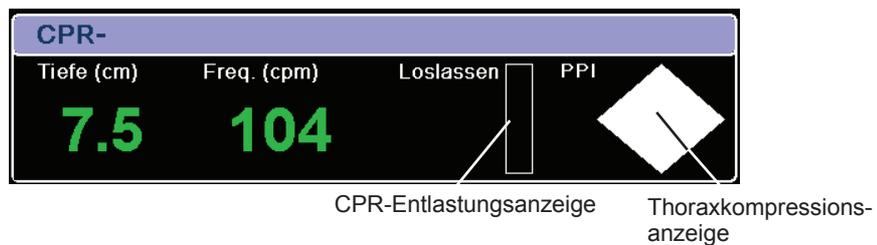

Frequenz- und Tiefenmesswerte

Solange der Bediener die Zielvorgaben für Frequenz und Tiefe der Thoraxkompressionen erreicht oder sogar überschreitet, werden die Frequenz- und Tiefenmesswerte grün (gut) angezeigt. Lässt die CPR-Leistung nach und fällt die Frequenz der Thoraxkompressionen unter die Zielvorgabe, wird der Frequenzmesswert gelb (muss besser werden) angezeigt. Analog wird der Tiefenmesswert gelb angezeigt, wenn die Tiefe der Thoraxkompressionen unter die Zielvorgabe fällt. Diese Farbcodierung soll den Hilfeleistenden bei der Entscheidung unterstützen, ob die Frequenz oder Tiefe der Thoraxkompressionen gesteigert oder beibehalten werden sollte. Wird wieder eine angemessene Frequenz und Tiefe erreicht, werden die Messwerte wieder grün angezeigt.

CPR-Entlastungsanzeige

Die CPR-Entlastungsanzeige soll Feedback zu dem Vermögen des Hilfeleistenden geben, seine Hände während der Aufwärtsbewegung vollständig der Thoraxkompression vom Sternum abzuheben. Die Entlastungsanzeige füllt sich um so mehr, je schneller der Hilfeleistende den Thorax entlastet, wohingegen er sich bei einer langsamen Entlastung des Thorax nur zum Teil füllt. Zusätzlich wird während der Durchführung der Thoraxkompressionen in regelmäßigen Abständen die Textaufforderung *GANZ ENTLAST.* angezeigt.

Thoraxkompressionsanzeige

Dieses rautenförmige Anzeigeelement bietet einen schnellen Gesamtüberblick darüber, wie gut die vom Hilfeleistenden erbrachte Kombination aus Tiefe und Frequenz der Thoraxkompressionen den AHA/ERC-Empfehlungen für die Herzlungenwiederbelebung Erwachsener entspricht.

Die Thoraxkompressionsanzeige wird zunächst als leere Raute angezeigt. Mit Beginn der Thoraxkompressionen beginnt sich das Anzeigeelement (von innen nach außen) zu füllen. Er ist vollständig gefüllt, wenn dauerhaft eine Kompressionstiefe von mindestens 4,5 cm (AHA/ERC 2005) bzw. 5,0 cm (AHA/ERC 2010) bei einer gleichzeitigen Frequenz von mindestens 90 Kompressionen pro Minute erreicht wird. Sollte die Kompressionsfrequenz oder die Kompressionstiefe unter die konfigurierten Zielvorgaben absinken, wird das Anzeigeelement nur teilweise gefüllt dargestellt, um darauf hinzuweisen, dass intensivere Anstrengungen unternommen werden müssen. Wird die Herzdruckmassage eingestellt, leert sich das Anzeigeelement allmählich, bis nach kurzer Zeit nur noch der Umriss zu sehen ist.

CPR-Taktvorgabe

Das X Series Gerät bietet eine CPR-Taktvorgabefunktion, die dem Hilfeleistenden den Rhythmus bei der Herzdruckmassage vorgibt. Der Takt entspricht der von der AHA und vom ERC empfohlenen Frequenz von 100 Thoraxkompressionen pro Minute. Diese Taktvorgabe kann so konfiguriert werden, dass sie sowohl im AED-Modus wie auch im manuellen Modus oder nur im AED-Modus arbeitet. Sie kann auch für alle Modi deaktiviert werden.

Nach der Aktivierung piept die Taktvorgabe in der von der AHA und vom ERC empfohlenen Frequenz. Die Hilfeleistenden können dann die Thoraxkompressionen entsprechend dieser Frequenz leisten. Die Taktvorgabe verstummt, wenn die Freihand-Therapieelektroden mit CPR-Funktion keine Thoraxkompressionen erkennen.

Ist die CPR-Taktvorgabe im manuellen Modus aktiv, piept sie nur, wenn Thoraxkompressionen erkannt werden und deren Frequenz unter die von der AHA und ERC empfohlenen Werte abfällt. Wenn die Herzdruckmassage mit mindestens 80 Thoraxkompressionen pro Minute geleistet wird, ertönt kein Piepton für die Taktvorgabe. Sollte die erkannte Kompressionsfrequenz unter diesen Wert sinken, beginnt die Taktvorgabe wieder zu piepen, bis dauerhaft und über mehrere Kompressionszyklen hinweg wieder die empfohlenen Kompressionsfrequenzen erreicht werden. Die Taktvorgabe hört ungefähr 2 Sekunden nach Erkennung der letzten Thoraxkompression auf zu piepen.

Im AED-Modus ist die Taktvorgabe während aller Phasen der Herzlungenwiederbelebung aktiviert. Sie beginnt während des CPR-Intervalls zu piepen und setzt das Piepen bis zum Ende des CPR-Intervalls fort. Falls während eines CPR-Intervalls die Thoraxkompressionen wieder aufgenommen werden, fängt die Taktvorgabe nach den ersten paar Kompressionen wieder an zu piepen. Werden jedoch keine CPR-Elektroden erkannt, bleibt die Taktvorgabe im AED-Modus während des gesamten CPR-Intervalls aktiv.

Aufforderung GANZ ENTLAST.

Das X Series Gerät kann so konfiguriert werden, dass es die Textaufforderung *GANZ ENTLAST.* ausgibt und den Hilfeleistenden damit anweist, nach jeder Kompression die Hände vom Brustkorb des Patienten zu nehmen, damit sich dieser vollständig heben kann. Diese Aufforderung wird während der ersten 45 Sekunden des CPR-Intervalls angezeigt.

Standardmäßig ist die Testaufforderung *GANZ ENTLAST.* nicht aktiviert.

CPR-Sprachaufforderungen (optional)

Das X Series Gerät kann so konfiguriert werden, dass es Audio-Aufforderungen zur Tiefe der Thoraxkompressionen ausgibt, die den Hilfeleistenden bei der Herzlungenwiederbelebung unterstützen. Für diesen Zweck gibt es zwei Audio-Aufforderungen:

- Fester drücken
- Herzdruckmassage gut

Wenn Thoraxkompressionen erkannt werden, die Kompressionstiefe jedoch dauerhaft weniger als die Zielvorgabe von 4,5 cm (AHA/ERC 2005) bzw. 5 cm (AHA/ERC 2010) beträgt, gibt das Gerät in regelmäßigen Abständen die Audio-Aufforderung „Fester drücken“ aus. Wenn der Hilfeleistende daraufhin die Kompressionstiefe dauerhaft auf die Zielvorgabe erhöht, gibt das Gerät die Meldung „Herzdruckmassage gut“ aus.

CPR-Pausendaueranzeige

Diese Anzeige gibt an, wie viel Zeit (in Minuten und Sekunden) seit der letzten erkannten Thoraxkompression vergangen ist. Zehn Sekunden nach Einstellung der Thoraxkompressionen beginnt das Gerät mit der Anzeige der Pausendauer. Sobald eine neue Thoraxkompression erkannt wird, wird die Pausendaueranzeige aus dem Display ausgeblendet. Wenn länger als 20 Minuten keine Thoraxkompressionen erkannt wurden, werden in diesem Feld Striche (- - - -) angezeigt.



CPR-Countdown-Timer

Mit einem CPR-Countdown-Timer zeigt das X Series Gerät die restliche Dauer (in Minuten und Sekunden) des aktuellen CPR-Intervalls an. Diese Zeitspanne wird bis auf Null heruntergezählt. Werden die CPR-Elektroden getrennt, verschwindet das CPR-Dashboard.



CPR-Countdown-Timer

CPR-Kompressionen-Balkendiagramm

Das X Series Gerät kann ein Balkendiagramm für die Thoraxkompressionen anzeigen, das aus den Signalen des CPR-Sensors berechnet wird. Dieses Balkendiagramm stellt die Kompressionstiefe dar. Seine Skala reicht von 0 bis 5,3 cm (AHA/ERC 2005) bzw. von 0 bis 6,4 cm (AHA/ERC 2010) mit Referenzmarkierungen bei 3,8 und 5,0 cm (AHA/ERC 2005) bzw. bei 5,0 und 6,1 cm (AHA/ERC 2010). Das Gerät zeigt die Kompressionsdaten für einen Zeitraum von mindestens 12 Sekunden an.



Kapitel 20

See-Thru CPR (optional)

See-Thru CPR ist ein optionales Funktionsmerkmal der X Series Geräte.

WARNUNG! Der See-Thru CPR-Filter funktioniert nur, wenn sich der X Series Defibrillator im manuellen CPR-Überwachungsmodus befindet.

Der See-Thru CPR-Filter wird in folgenden Fällen angehalten:

- Das Gerät befindet sich im Schrittmachermodus.
- Der Impedanzwert des Patienten ist ungültig.
- Es werden keine ZOLL OneStep CPR -, OneStep Complete- oder CPR-D-padz-Elektroden mehr erkannt.

Der See-Thru CPR-Filter beseitigt nicht alle CPR-Artefakte. Sie sollten die Herzlungenwiederbelebung daher immer unterbrechen und zuerst den EKG-Rhythmus bestimmen, bevor Sie Behandlungsentscheidungen treffen.

Der See-Thru CPR-Filter ist während der Analyse des EKG-Rhythmus nicht aktiv. Unterbrechen Sie während der Analyse EKG-Rhythmus immer die Thoraxkompressionen, um falsche Ergebnisse aufgrund von CPR-Artefakten zu vermeiden.

Die diagnostische Bandbreite wird niemals auf die See-Thru CPR-Kurve angewandt.

See-Thru CPR liefert dem Hilfeleistenden bei der Wiederbelebung einen guten Annäherungswert für den zugrundeliegenden EKG-Rhythmus des Patienten. See-Thru CPR ist verfügbar, wenn sich das X Series Gerät im CPR-Überwachungsmodus befindet.

Thoraxkompressionen führen zu *CPR-Artefakten* im EKG-Signal. See-Thru CPR wendet einen Filter an, der die von ZOLL Onestep-, OneStep Complete- oder CPR-D-padz-Elektroden erkannten Herzkompressionen mit dem CPR-Artefakt korreliert, um das Artefakt im EKG-Signal auf ein Minimum zu reduzieren. Unter bestimmten Umständen kann der EKG-Rhythmus durch das nach der Filterung verbleibende Restrauschen nicht genau festgestellt werden. In diesem Fall muss der Hilfeleistende die Wiederbelebung unterbrechen, um den EKG-Rhythmus zu bestimmen. Bei Auftreten von Asystolie oder pulsloser elektrischer Aktivität (PEA) mit geringer Amplitude kann das nach der Filterung verbleibende Artefakt beispielsweise fälschlicherweise als feines Kammerflimmern interpretiert werden.

Da das gefilterte EKG-Signal Rest-Artefakte der Thoraxkompressionen und/oder der Filterung enthalten kann, *sollten Hilfeleistende stets das Standardverfahren einhalten und die Herzlungenwiederbelebung unterbrechen, um den EKG-Rhythmus zu bestimmen, bevor sie die weitere Behandlung festlegen.*

Verwendung von See-Thru CPR

So verwenden Sie See-Thru CPR

- Das X Series Gerät muss sich im CPR-Überwachungsmodus befinden.
- An das Gerät müssen ZOLL OneStep CPR-, OneStep Complete- oder CPR-D-padz-Elektroden angeschlossen sein.

Nach Aufnahme der Thoraxkompressionen beginnt das X Series Gerät *automatisch* mit dem Ausfiltern der CPR-Artefakte, nachdem es die ersten 3 bis 6 Kompressionen erkannt hat. Das gefilterte, mit „FIL“ bezeichnete EKG kann als zweite oder dritte Kurve angezeigt werden. Dazu ist im entsprechenden Auswahlmenü die Option **Filt. EKG** zu wählen.

Die See-Thru CPR-Filterung wird fortgesetzt, solange die OneStep CPR-, OneStep Complete- oder CPR-D-padz-Elektroden Thoraxkompressionen erkennen und die Impedanz des Patienten innerhalb des gültigen Bereichs liegt. Werden keine Thoraxkompressionen erkannt oder liegt einer der oben aufgeführten Umstände vor, wird die See-Thru CPR-Filterung eingestellt und es wird das ungefilterte EKG angezeigt. Sobald die Thoraxkompressionen wieder aufgenommen werden, startet die Filterung automatisch nach 3 bis 6 Thoraxkompressionen.

Hinweis: Die See-Thru CPR-Kurve und die primäre EKG-Kurve sind um etwa 1/16 Sekunde gegeneinander versetzt.

Beispiele

Die folgenden Beispiele zeigen die Auswirkungen der See-Thru CPR-Filterung auf EKG-Signale, die CPR-Artefakte enthalten.


Jedes dieser Beispiele enthält:

- EKG-Signal mit CPR-Artefakt
- EKG-Signal nach Beseitigung des CPR-Artefakts durch den See-Thru CPR-Filter
- Kennzeichnung der Zeitspanne, während derer See-Thru CPR aktiv ist
- CPR-Signal zur Anzeige des Zeitpunkts der Aufnahme der Herzlungenwiederbelebung


Die folgende Abbildung zeigt einen Patienten im feinen Kammerflimmern. Für Hilfeleistende ist es schwierig, diesen Rhythmus während der Thoraxkompressionen zu erkennen. Wenn sich der CPR-Filter einschaltet, wird das feine Kammerflimmern deutlicher erkennbar.



Die folgende Abbildung zeigt einen Patienten im Kammerflimmern, was während Thoraxkompressionen etwas schwieriger zu erkennen ist. Bei diesem EKG ist der zugrunde liegende Rhythmus gut zu erkennen, da der Filter das CPR-Artefakt vollständig ausfiltern kann.

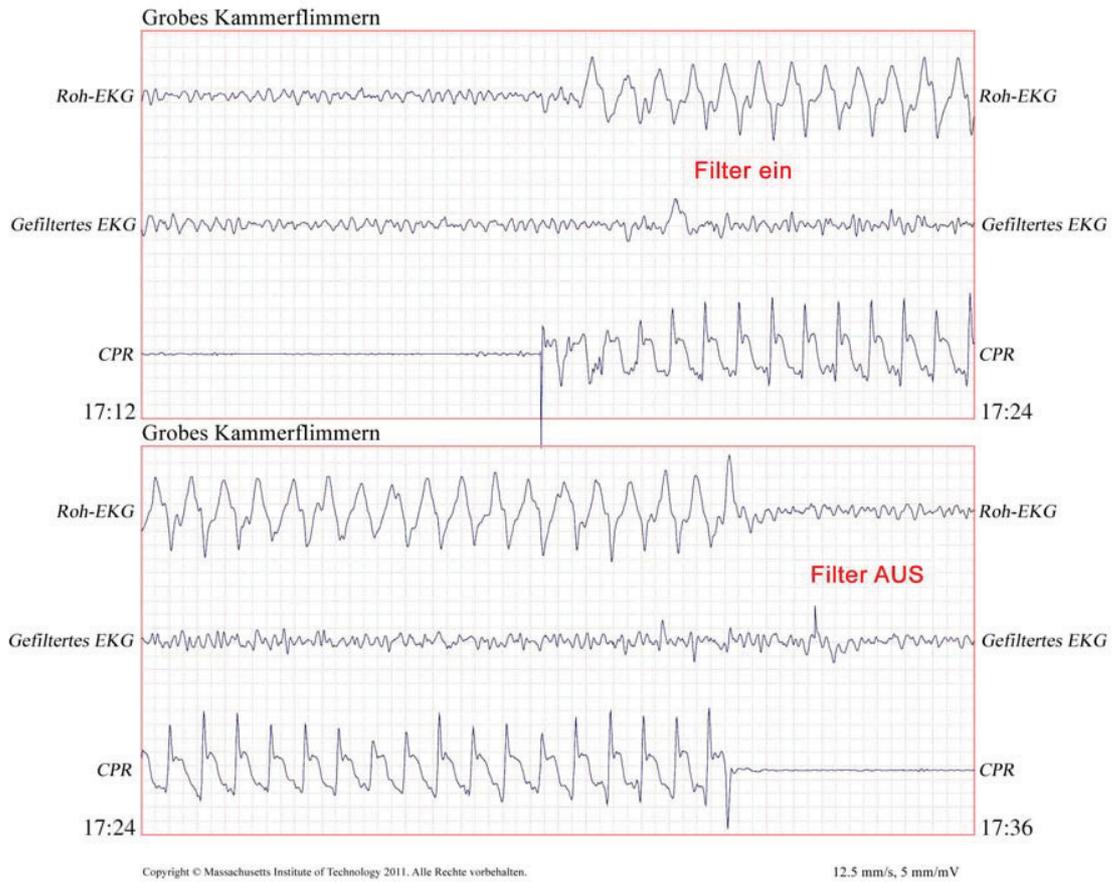


Die folgende Abbildung zeigt einen Patienten mit pulsloser elektrischer Aktivität (PEA). Diese könnte leicht als feines Kammerflimmern fehlinterpretiert werden, da das Signal durch Kompressionsartefakte gestört wird. Selbst nach Aktivierung des CPR-Filters ist die PEA aufgrund der verbleibenden Störungen durch das CPR-Signal immer noch nicht eindeutig erkennbar. Nach etwa 14 Sekunden ändert sich der Rhythmus auf dem Registrierstreifen in Asystolie, was leicht als grobes Kammerflimmern fehlinterpretiert werden könnte. Selbst nach Aktivierung des CPR-Filters sind die Störungen durch die Herzdruckmassage immer noch deutlich sichtbar und lassen den Rhythmus wie ein feines Kammerflimmern aussehen.

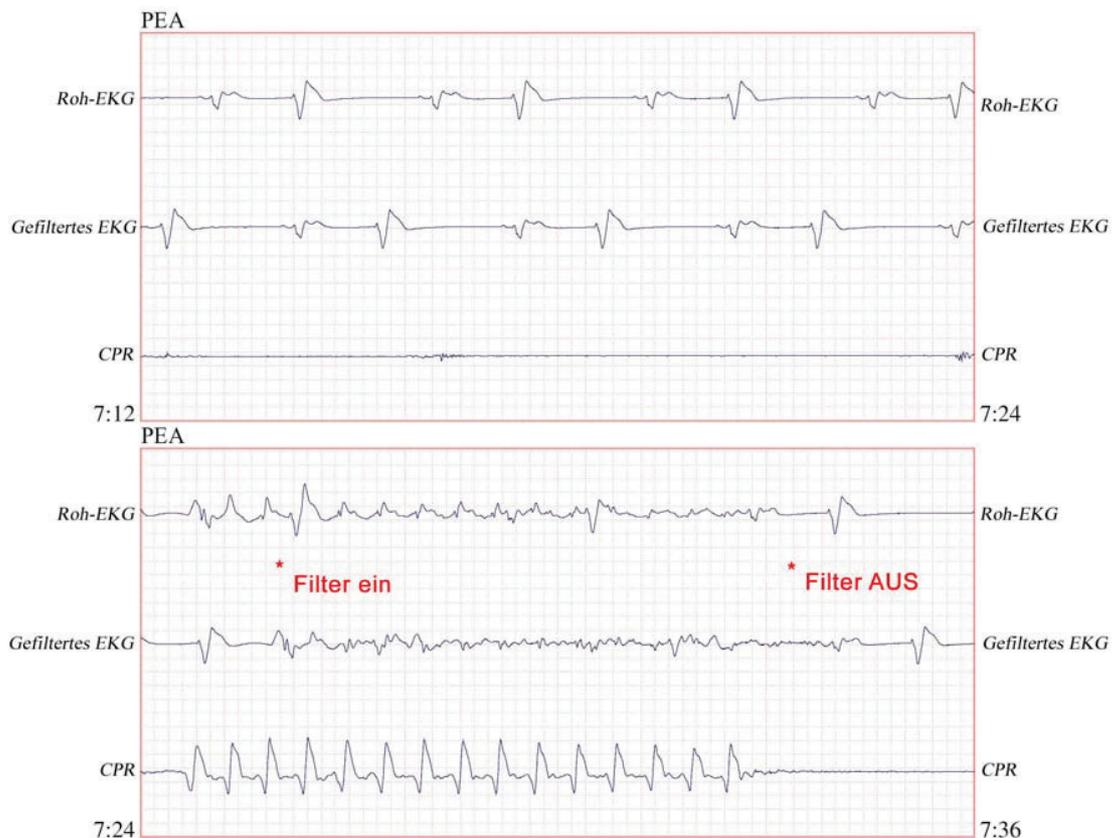

Copyright © Massachusetts Institute of Technology 2011. Alle Rechte vorbehalten.

12.5 mm/s, 5 mm/mV

Die folgende Abbildung zeigt einen Patienten mit einem organisierten Rhythmus, bei dem der See-Thru CPR-Filter die CPR-Artefakte wirksam herausfiltert.

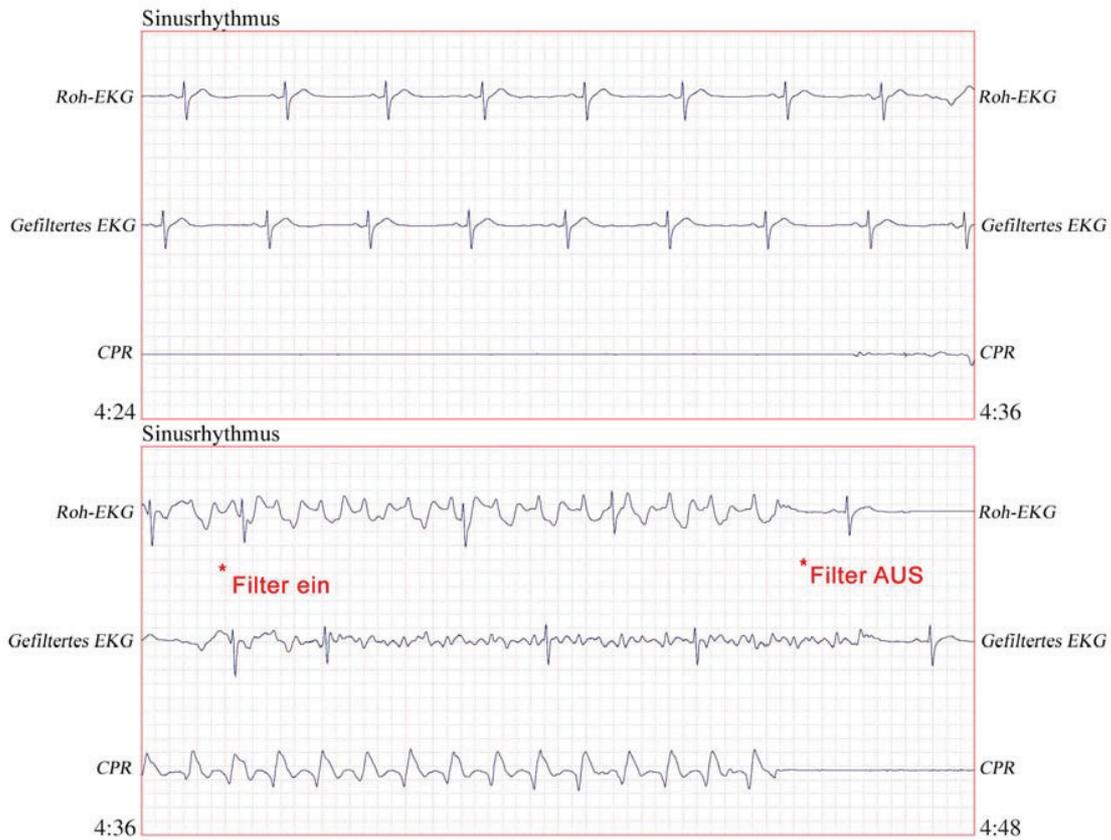

Copyright © Massachusetts Institute of Technology 2011. Alle Rechte vorbehalten.

12.5 mm/s, 5 mm/mV

Kapitel 21

Patientendaten

Dieses Kapitel enthält Verfahrensanleitungen zum Speichern, Anzeigen und Übertragen von Patientendaten vom X Series Gerät auf ein externes System, wie etwa einen PC oder ein Mobilgerät.

Hinweis: Sehen Sie Protokolldateien zuerst auf einem PC ein, um sicherzustellen, dass sie erfolgreich übertragen wurden, bevor Sie sie vom X Series Gerät löschen.

Hinweis: Datenübertragungen sind nicht erfolgreich, wenn das USB-Flash-Speichergerät voll ist oder auf ihm nicht genug Speicherplatz verfügbar ist. Verwenden Sie immer ein USB-Flash-Speichergerät, auf dem mindestens 128 MB verfügbar sind.

WARNUNG! Schließen Sie während der Überwachung eines Patienten nur galvanisch getrennte Geräte am USB-Anschluss an.

Speichern von Daten

Das X Series Gerät speichert für den derzeit überwachten Patienten eine Kombination aus 24 Stunden an Patienten-Trenddaten (in Einminuten-Intervallen), 1000 mit einem Zeitstempel versehenen Ereignisse und 32 Snapshots (mit einer Dauer von jeweils 24 Sekunden). Die tatsächlich gespeicherte Anzahl an Trenddaten, Ereignissen und Snapshots kann je nach Nutzungsprofil größer oder kleiner sein. Wenn die Kapazität des Datenspeichers erschöpft ist, läuft das Protokoll voll. Bevor das X Series Gerät weitere Patientendaten speichern kann, müssen Patientendaten gelöscht oder übertragen werden. Die Daten gehen nicht verloren, wenn das X Series Gerät ausgeschaltet wird oder der Akku bzw. das externe Netzteil entfernt wird.

Erfassen eines Daten-Snapshots

Drücken Sie die Snapshot-Taste () an der Gerätefront, um 24 Sekunden an Patientendaten in numerischer und Kurvenform zu erfassen. Das Gerät erfasst 12 Sekunden vor und 12 Sekunden nach dem Tastendruck.

Das X Series Gerät kann mindestens 32 Snapshots speichern, darunter:

- Monitor-Snapshots
- Defibrillator-Snapshots
- Behandlungs-Snapshots
- Schrittmacher-Snapshots
- Alarm-Snapshots

Überprüfen und Drucken von Snapshots

Sie können dieses Verfahren von jeder beliebigen Hauptanzeige aus durchführen.

1. Drücken Sie wiederholt die Anzeige-/Startseite-Taste () , bis das Fenster „Trends“ angezeigt wird.
2. Rufen Sie mithilfe der Navigationstasten das Fenster „Trends“ auf.
3. Drücken Sie die Auswahltaste, um die Liste der Trends zu durchblättern.

Hinweis: Snapshots sind an einem Snapshot-Symbol neben dem Zeitstempel zu erkennen.

4. Wählen Sie den gewünschten Snapshot aus der Liste „Trends“ aus und drücken Sie die Auswahltaste. Die numerischen Snapshot-Daten werden angezeigt.
5. Um die Daten und die Snapshot-Kurven zu drucken, markieren Sie **Diesen Snapshot drucken** und drücken Sie die Auswahltaste.

Behandlungsübersichtsbericht

Der Behandlungsübersichtsbericht führt alle auf einen Patienten bezogenen Behandlungsereignisse auf, wie etwa Defibrillations-/Stimulationsereignisse, Alarmereignisse und Behandlungs-Snapshots. Es ist hilfreich, diesen Bericht nach Abschluss eines Falls auszudrucken.

BEHANDL. ÜBERSICHTSBERICHT			
Name: Phillip Davies		06:06:14	New Case ID
ID: Patient 0015	Patientenmodus: Erwachsen	06:06:14	System ein
Startzeit: 06/06/11	06:06:14	06:06:14	Patientenmodus Erwachsene
Letztes Ereign.: 06/06/11	09:43:40	06:06:14	Einige Alarmlimits deaktiviert
Betriebszeit: 00:29:48	Anz. Ereign.:	06:06:20	Selbsttest bestanden
Schocks gesamt: 1		06:06:43	Behandlungs-Snapshot: ASA
Stimulatorzeit gesamt: 00:00:00			
Ges. 12 Ableit.: 0			
Abt.: ICU			
Unit:			
S. Nr. 0 SW: 00.00.00.00			

Drucken eines Behandlungsübersichtsberichts

Verfahren Sie zum Ausdruck eines Behandlungsübersichtsberichts wie folgt:

1. Drücken Sie die Schnellzugriffstaste „Weiter/Zurück“ (↩).
2. Drücken Sie die Schnellzugriffstaste „Prot.“ (PROT.).
3. Drücken Sie die Schnellzugriffstaste „Behandlungsübersicht“ (📄). Das Fenster „Behandlungsübersicht“ wird angezeigt.
4. Markieren Sie mithilfe der Navigationstasten den zu druckenden Behandlungsübersichtsbericht und rufen Sie ihn auf.

Hinweis: Neben dem von Ihnen ausgewählten Behandlungsübersichtsbericht erscheint ein Häkchen.

5. Markieren Sie mithilfe der Navigationstasten die Option **Behandl.übersicht drucken** und rufen Sie sie auf.

Übertragen von Daten auf ein USB-Gerät

Mit einem USB-Übertragungsgerät können Sie Patientendaten vom Gerät übertragen.

Schließen Sie zuerst ein USB-Gerät an den USB-Geräteanschluss des X Series Geräts an.

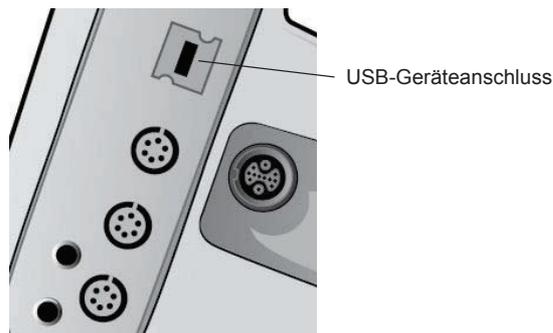


Abbildung 21-1. USB-Anschluss

So übertragen Sie Daten über den USB-Anschluss:

1. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um das Gerät einzuschalten.
2. Drücken Sie (↩).
3. Drücken Sie (PROT.).
4. Drücken Sie die Schnellzugriffstaste „Protokoll übertragen“ (📄) (vergewissern Sie sich, dass das USB-Laufwerk an das Gerät angeschlossen ist).

Hinweis: Entfernen Sie das USB-Datenlaufwerk während der Datenübertragung nicht aus dem X Series Gerät.

5. Wählen Sie mithilfe der Navigationstasten im Menü „Protokoll übertragen“ die Option **Daten** aus.
6. Während der Datenübertragung zum USB-Gerät leuchtet die grüne LED oben auf dem Gerät.

Hinweis: Warten Sie, bis die Übertragung abgeschlossen ist und die grüne LED oben auf dem X Series Gerät nicht mehr leuchtet, bevor Sie das USB-Laufwerk entfernen.

Hinweis: Während der Protokollübertragung ist das Drucken und Protokollieren von Snapshots deaktiviert.

Nachdem die Daten übertragen wurden, müssen Sie das USB-Laufwerk entfernen und für eine weitere Übertragung erneut anschließen. Wenn das USB-Gerät keine Datenverbindung mit dem X Series Gerät aufbaut, schalten Sie das Gerät aus und dann wieder ein, um die Kommunikation herzustellen.

Warnung! Um eine mögliche Schockgefahr auszuschließen, stellen Sie **KEINE elektrischen Verbindungen mit dem USB-Anschluss her (außer mit einem USB-Flash-Laufwerk), solange sich das Gerät in Patientennähe befindet.**

Löschen des Protokolls

Sie sollten das Patientendatenprotokoll löschen, nachdem die Daten zum USB-Gerät übertragen wurden oder wenn das Protokoll voll ist.

Hinweis: Wird das Protokoll während der Patientenbehandlung gelöscht, gehen alle Patientendaten und Ereignisse verloren, die vor dem Löschen des Protokolls aufgezeichnet wurden. Beim Löschen des Protokolls wird ein neuer Patientendatensatz erstellt, und alle patientenspezifischen Parameter (Alarmgrenzwerte, Defibrillatorenergie usw.) werden auf die jeweiligen Standardwerte eingestellt.

So löschen Sie das Protokoll:

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie .
3. Drücken Sie die Schnellzugriffstaste „Protokoll löschen“ ().
4. Wählen Sie mithilfe der Navigationstasten **Ja** aus.

Hinweis: Die Meldung *KANN PROTOKOLL NICHT LESEN* besagt, dass das Protokoll keine Informationen enthält. Diese Meldung kann auftreten, wenn Sie das Protokoll löschen und anschließend sofort die Anzeige „Behandlung“ oder die Anzeige „Trendübersicht“ aufrufen.

Kapitel 22

Drahtlose Kommunikation

Das X Series Gerät verfügt über ein Modul für die drahtlose Übertragung von Daten. Über einen ZOLL Server kann das X Series Gerät 12-Kanal-EKG-Snapshotberichte (einschließlich Trenddaten) an einen Empfänger versenden. Mithilfe von ZOLL RescueNet oder der ePCR Software können auch die ausführlichen Fallinformationen (einschließlich Trenddaten) automatisch vom X Series Gerät abgerufen werden.

Ist ein entsprechendes Modul installiert, kann das Gerät Daten über einen WiFi-Zugriffspunkt, ein Bluetooth-taugliches Gerät oder ein USB-Mobilmodem versenden.

Mithilfe des im Display angezeigten Wireless-Symbols können Sie eine temporäre Bluetooth-Verbindung oder einen temporären Wireless-Zugriffspunkt für das X Series Gerät einrichten. Supervisor können im kennwortgeschützten Menü „Supervisor/Kommunikation“ bis zu 255 permanente WiFi-, Bluetooth- oder Mobilmodem-Profile einrichten.

Nachdem Sie eine Wireless-Verbindung eingerichtet haben, können Sie 12-Kanal-EKG-Berichte an E-Mail- und Fax-Empfänger versenden. Mithilfe von ZOLL RescueNet oder der ePCR Software kann auch ein automatischer Datenabruf erfolgen.

Dieses Kapitel beschreibt die Auswahl der verschiedenen Empfänger und das Einrichten der drahtlosen Kommunikation auf dem X Series Gerät für die verschiedenen Arten von Empfängern.

Wichtig: Testen Sie alle Wireless-Verbindungen nach dem erstmaligen Einrichten, bevor Sie diese verwenden.

Wireless-Verbindungs-Symbol


Das Wireless-Verbindungs-Symbol findet sich im Display rechts neben dem Patientenmodus. Es kann drei mögliche Zustände annehmen (siehe nachstehende Tabelle).

Hinweis: Ist die Wireless-Option deaktiviert, wird kein Symbol angezeigt.

Zustand	Beschreibung
Verbunden 	Wireless-Verbindung (WiFi, Bluetooth oder USB-Mobilmodem) ist verfügbar.
Nicht verbunden 	Wireless-Verbindungen sind nicht verfügbar, weil die Konfiguration fehlerhaft ist, das Wireless-Signal nicht stark genug ist oder kein Wireless-Signal empfangen wird.
Fehler 	Es liegt ein Fehler in der Hardware für die drahtlose Kommunikation vor.


Durch Auswahl dieses Symbols können Sie das Menü "Wireless" aufrufen, in dem Sie die vorkonfigurierten WiFi-Zugriffspunkte, gekoppelten Geräte oder Verteilerlisten durchsehen oder temporäre WiFi-Zugangspunkte oder eine temporäre Bluetooth-Verbindung einrichten können. Die Auswahl des Wireless-Verbindungs-Symbol erfolgt mithilfe der Navigationstasten.

Wireless-Verbindungs-Symbol

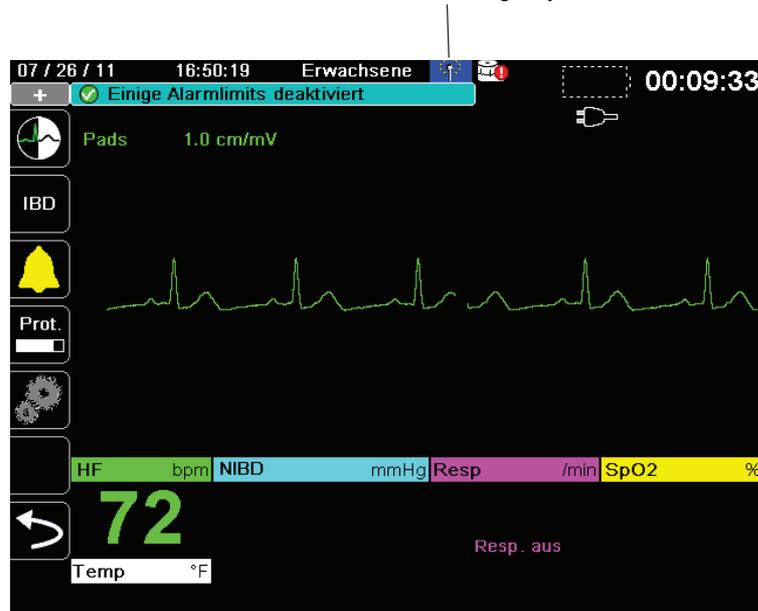


Das Menü „Wireless“

Das Menü „Wireless“ besitzt die folgenden Optionen: „WiFi-Zugriffspunkt“, „Gekoppelte Geräte anzeigen/konfigurieren“, „Verteilerliste anzeigen“ und „Verteilerliste aktualisieren“. Das Menü „Wireless“ besitzt drei Optionen: WiFi-Zugriffspunkt, Verteilerliste anzeigen und Verteilerliste aktualisieren. Mithilfe der Navigationstasten wechseln Sie zwischen den einzelnen Menüoptionen. Zum Verlassen des Menüs „Wireless“ wählen Sie den Zurück-Pfeil (←).

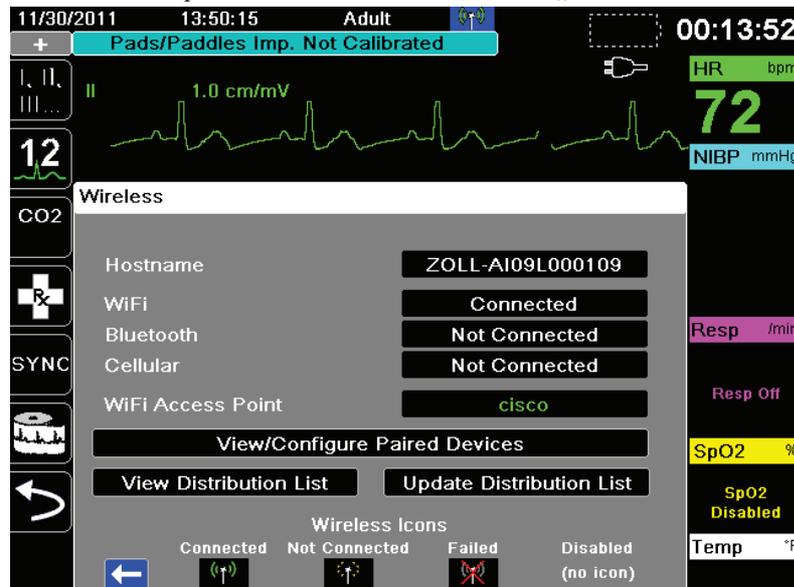


Auswählen und Erstellen eines temporären Zugriffspunktprofils

Wählen Sie im Menü „Wireless“ mithilfe der Navigationstasten die Menüoption **WiFi-Zugriffspunkt** aus. Sie können nun vorkonfigurierte Zugriffspunktprofile durchsehen.

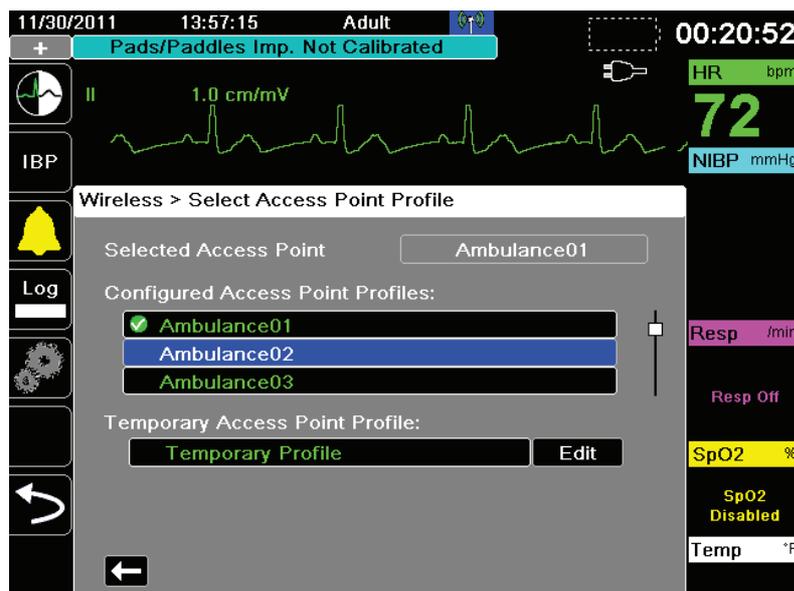

Wählen Sie mithilfe der Navigationstasten das **Temporäre Profil** aus. Ein nun angezeigtes grünes Häkchen besagt, dass das Profil ausgewählt wurde.

Um das Profil zu bearbeiten, wählen Sie mithilfe der Navigationstasten die Option **Bearbeiten** aus. Das Gerät zeigt nun das Menü „AP-Profil bearbeiten“.

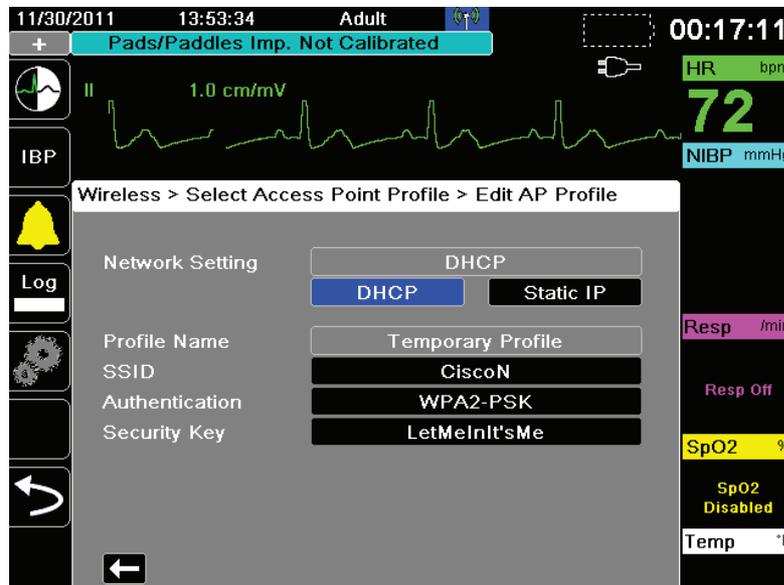

Netzwerkeinstellung

Wählen Sie mithilfe der Navigationstasten eine der Optionen „DHCP“ oder „Static IP“ aus. Wenn Sie „Static IP“ auswählen, geben Sie mithilfe des numerischen Tastenfelds die Werte für die Einstellungen „IP-Adresse“, „Subnetzmaske“, „Standard-Gateway“, „Bevorz. DNS-Server“ und „Alternat. DNS-Server“ ein.




Profilname

Der Profilname lautet „Temporäres Profil“ und kann nicht geändert werden.

SSID

Geben Sie mithilfe des alphanumerischen Tastenfelds den Wert für die Einstellung „SSID-Name“ ein. Drücken Sie **SPEICHERN**, um die Änderungen zu speichern und zum Menü „Temporäres Profil“ zurückzukehren. Drücken Sie alternativ **Abbr.**, um zum Menü „Temporäres Profil“ zurückzukehren, ohne die Änderungen zu speichern.

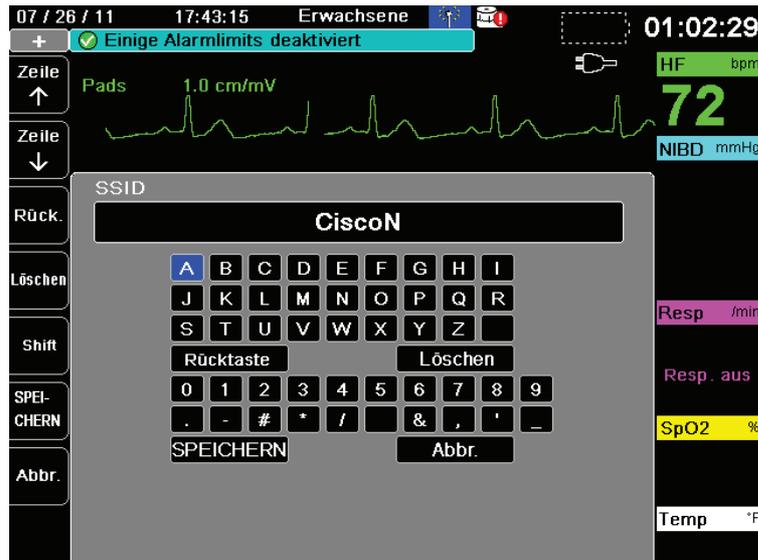

Authentifizierung


Wählen Sie mithilfe der Navigationstasten den Authentifizierungstyp aus.

Verschlüsselungstyp

Wählen Sie mithilfe der Navigationstasten den Verschlüsselungstyp aus.

Sicherheitsschlüssel

Geben Sie mithilfe des alphanumerischen Tastenfelds den Sicherheitsschlüssel ein. Drücken Sie **SPEICHERN**, um die Änderungen zu speichern und zum Menü „Temporäres Profil“ zurückzukehren. Drücken Sie alternativ **Abbr.**, um zum Menü „Temporäres Profil“ zurückzukehren, ohne die Änderungen zu speichern.

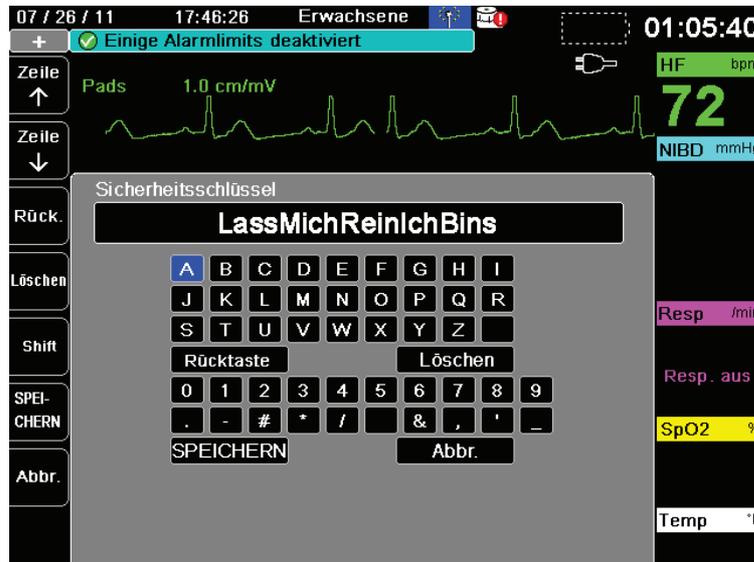


Wenn Sie mit den Änderungen im Menü „Temporäres Profil“ fertig sind, drücken Sie den Zurück-Pfeil (←), um das Menü „Wireless“ zu verlassen.


Hinweis: Das ausgewählte temporäre Profil bleibt das Standardprofil, bis eine Änderung der Konfiguration erfolgt.

Einrichten und Anzeigen gekoppelter Geräte

Wählen Sie im Menü "Wireless" mithilfe der Navigationstasten die Menüoption **"Gekoppelte Geräte anzeigen/konfigurieren"** aus. Nun können Sie die gekoppelten Bluetooth-Geräte sehen. Um ein neues Gerät zu koppeln, wählen Sie mithilfe der Navigationstasten die Schaltfläche **"Neu"**.

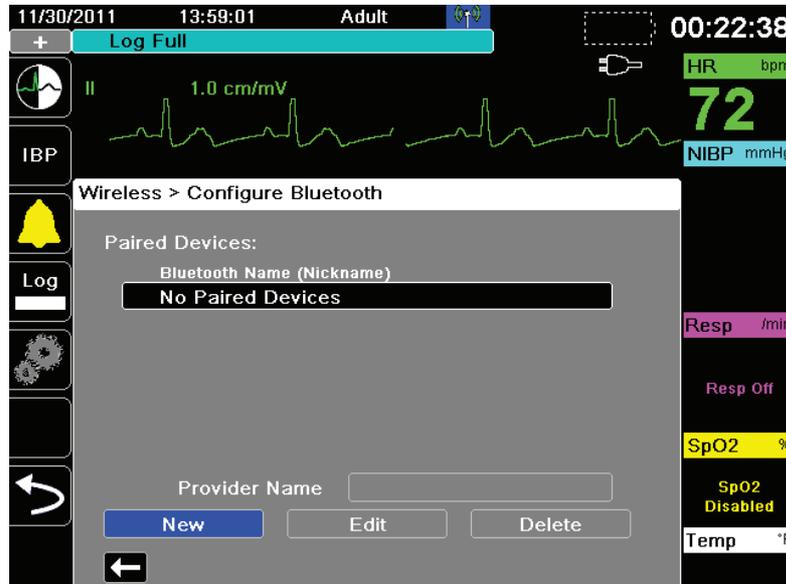


Das Gerät scannt nun die Umgebung nach Bluetooth-Geräten, die sich im erkennbaren Modus befinden. Wählen Sie mithilfe der Navigationstasten das gewünschte Gerät aus. Ein grünes Häkchen kennzeichnet das ausgewählte Gerät.

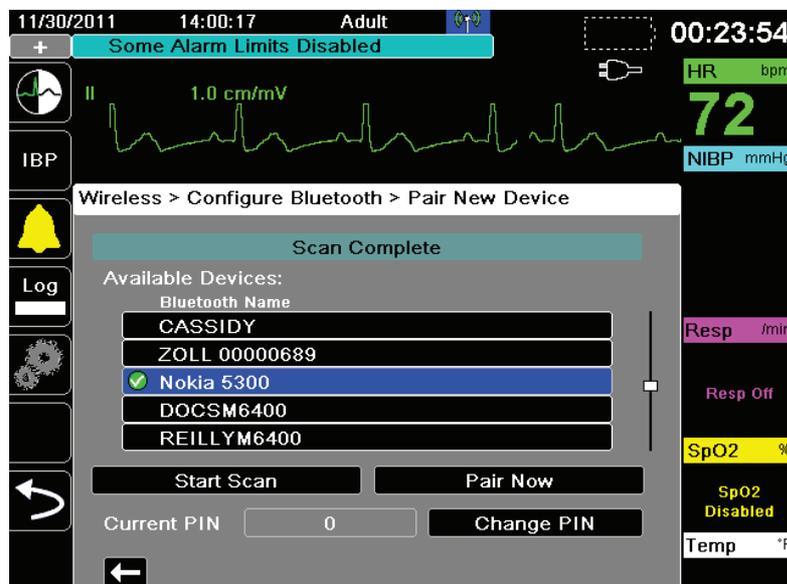

Wählen Sie **"Jetzt koppeln"**, um das Gerät zu koppeln. Anschließend kehrt das Gerät zur Liste der gekoppelten Geräte zurück.


Anschließend können Sie die Einstellungen des gekoppelten Geräts bearbeiten, dem Gerät eine optionale Kurzbezeichnung zuweisen und den Provider festlegen. Um zur Liste der gekoppelten Geräte zurückzukehren, drücken Sie den Zurück-Pfeil (←).

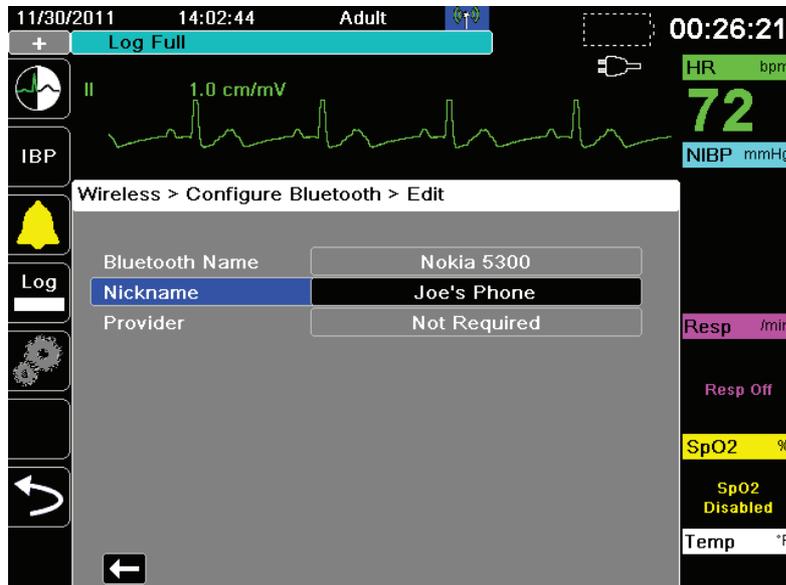

Hinweis: Verwenden Sie ausschließlich Bluetooth-Geräte mit DUN- oder PAN-NAP-Profilen. Nicht alle Mobiltelefone sind für eine zuverlässige Datenübertragung einsetzbar. Eine Liste der freigegebenen Geräte erhalten Sie bei Ihrem Vertreter der ZOLL Medical Corporation vor Ort.

Ändern der PIN

Möglicherweise müssen Sie die PIN im X Series Gerät ändern. Konsultieren Sie diesbezüglich die Dokumentation Ihres Geräts. Zum Ändern der PIN wählen Sie im Menü "Bluetooth" die Option "PIN ändern". Geben Sie dann mithilfe des numerischen Tastenfelds die gewünschte PIN ein.

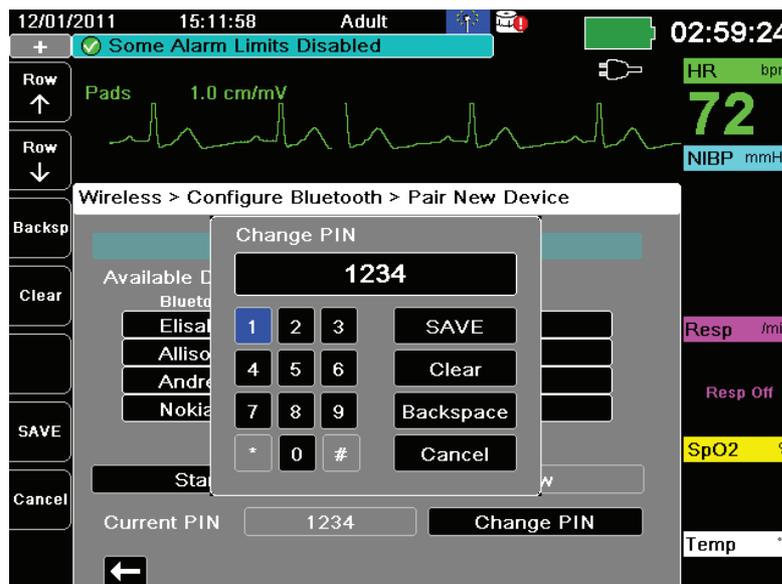

Wenn Sie mit dem Koppeln aller Bluetooth-Geräte fertig sind, drücken Sie den Zurück-Pfeil (←) um zum Menü "Wireless" zurückzukehren. Drücken Sie den Pfeil erneut, um dieses zu verlassen und zur Hauptanzeige zurückzukehren.

Einrichten der Kommunikation im Supervisor-Menü


Im Einrichtungsmenü "Kommunikation" können Sie Wireless-Profile einrichten. Hierbei handelt es sich um ein Untermenü des kennwortgeschützten Menüs „Einrichten“ > „Supervisor“. In diesem Menü können Sie die folgenden Arten von Kommunikationsverbindungen einrichten:

- WiFi-Verbindungen (WiFi-Zugriffspunkte)
- Bluetooth-Verbindungen (nur DUN- oder PAN-NAP-Profile)
- USB-Mobilmodems

Hinweis: Die Einrichtung der Kommunikationsverbindungen ist im AED-Modus nicht möglich.

So rufen Sie das Menü „Kommunikation“ auf:

1. Drücken Sie die Schnellzugriffstaste „Weiter/Zurück“ (↩).
2. Drücken Sie die Schnellzugriffstaste „Einrichten“ (⚙). Blättern Sie mithilfe der Navigationstasten zu **Supervisor**. Drücken Sie (⊙).
3. Geben Sie das Kennwort ein. Nun erscheint das Supervisor-Menü.
4. Wählen Sie mithilfe der Navigationstasten die Option **Kommunikation** aus. Nun werden die verfügbaren Optionen für Kommunikationsverbindungen angezeigt.

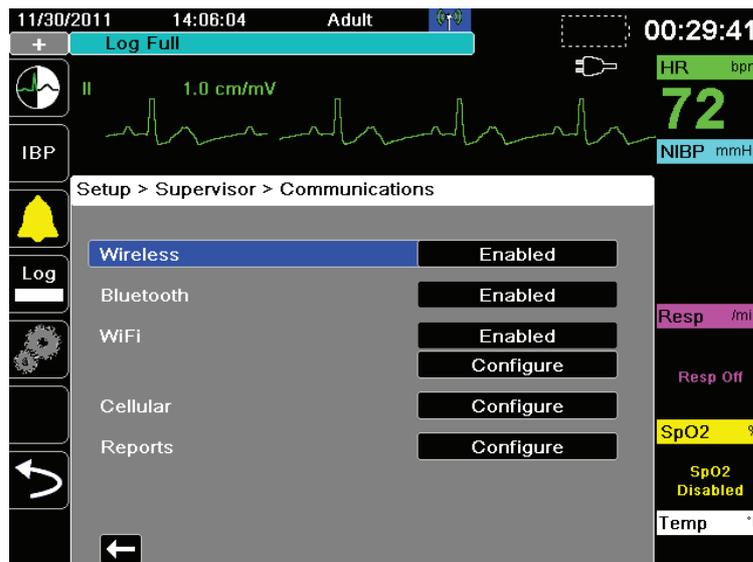

Wireless

Verwenden Sie die Navigationstasten, um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Ist die Funktion deaktiviert, sind alle drahtlosen Kommunikationsmöglichkeiten des X Series Geräts deaktiviert.

Bluetooth

Verwenden Sie die Navigationstasten, um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Ist die Funktion deaktiviert, sind alle Bluetooth-Kommunikationsmöglichkeiten des X Series Geräts deaktiviert.

WiFi

Verwenden Sie die Navigationstasten, um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren und die Zugriffspunktprofile zu konfigurieren (siehe „WiFi-Zugriffspunktprofile“ auf Seite 22-10). Ist diese Funktion deaktiviert, sind alle WiFi-Zugriffspunkte im X Series Gerät deaktiviert.

Mobilmodem

Verwenden Sie zum Konfigurieren des USB-Mobilmodems oder der Bluetooth-Geräte die Navigationstasten (siehe "Einrichten der Mobilfunkkommunikation" auf Seite 22-14).


Berichte

Die Speicherung und Verwaltung von 12-Kanal-EKG-Berichten und Dateien mit ausführlichen Fallinformationen auf dem X Series Gerät kann durch Fremdanbieter-Software wie ZOLL RescueNet gehandhabt werden. In diesem Menü können Sie den ZOLL Server konfigurieren und Verteilerlisten einsehen oder aktualisieren (siehe "Konfigurieren der Berichtübertragung" auf Seite 22-17).

Zum Verlassen des Menüs "Kommunikation" drücken Sie den Zurück-Pfeil (←).

WiFi-Zugriffspunktprofile

Zum Auswählen und Bearbeiten von WiFi-Zugriffspunktprofilen wählen Sie mithilfe der Navigationstasten die Menüoption **WiFi konfigurieren** aus.

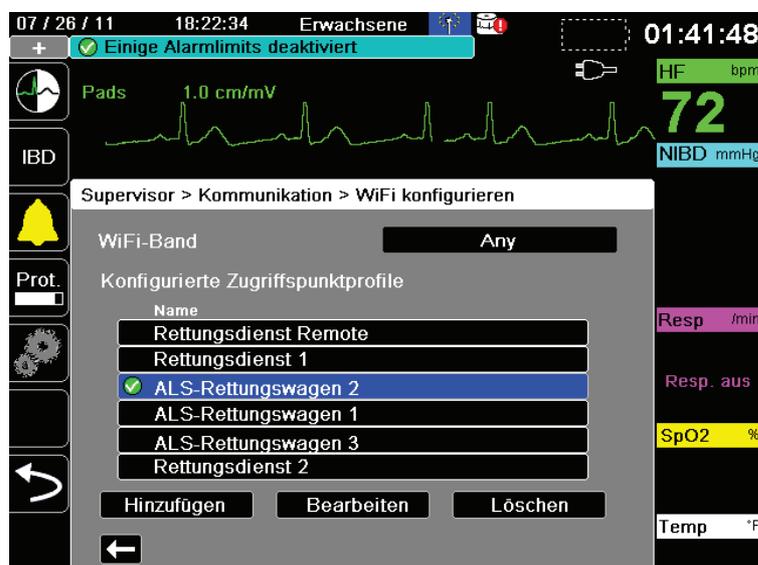


Ein grünes Häkchen kennzeichnet den aktiven Zugriffspunkt. Verwenden Sie zur Auswahl eines anderen Profils oder zum Hinzufügen, Bearbeiten oder Löschen anderer Profile die Navigationstasten.

Wählen Sie mithilfe der Navigationstasten das WiFi-Band aus. Zur Auswahl stehen die Optionen **Beliebig**, **5.0 GHz (A/N)** und **2.4 GHz (B/G/N)**.


So fügen Sie ein neues Zugriffspunktprofil hinzu:

Wählen Sie mithilfe der Navigationstasten die Option **Hinzufügen** aus. Sie können die Art der Netzwerkeinstellung, den Profilnamen, die SSID, den Authentifizierungs- und den Verschlüsselungstyp sowie den Sicherheitsschlüssel eingeben.

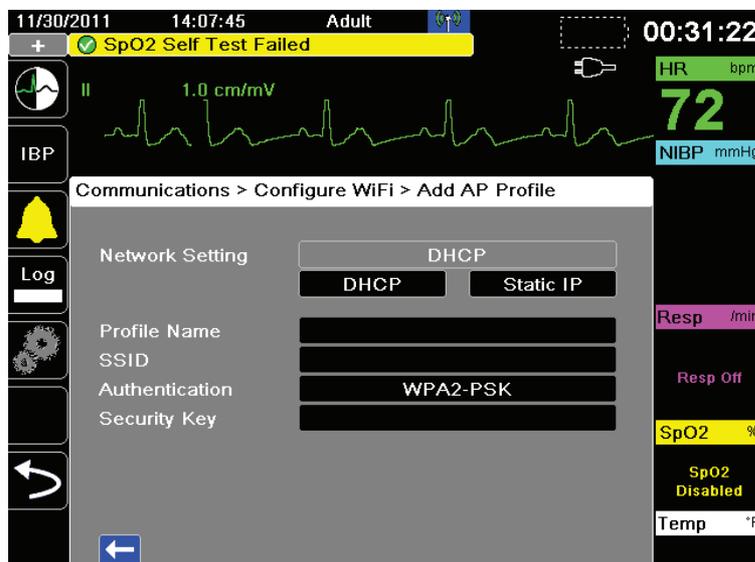


Netzwerkeinstellung

Wählen Sie mithilfe der Navigationstasten eine der Optionen „DHCP“ oder „Static IP“ aus. Wenn Sie „Static IP“ auswählen, geben Sie mithilfe des numerischen Tastenfelds die Werte für die Einstellungen „IP-Adresse“, „Subnetzmaske“, „Standard-Gateway“, „Bevorz. DNS-Server“ und „Alternat. DNS-Server“ ein.

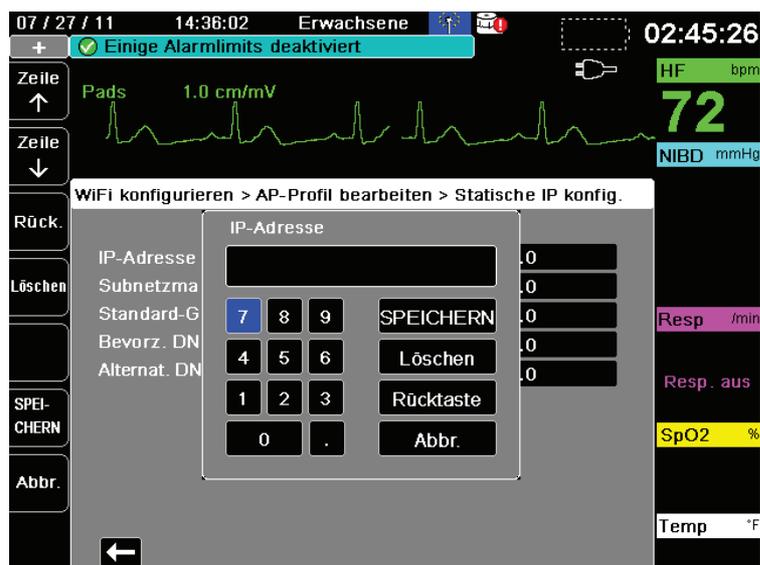


Profilname

Geben Sie mithilfe des alphanumerischen Tastenfelds den Wert für den Profilnamen ein. Drücken Sie **SPEICHERN**, um die Änderungen zu speichern und zum Menü „WiFi-Konfiguration“ zurückzukehren. Drücken Sie alternativ **Abbr.**, um zum Menü „WiFi-Konfiguration“ zurückzukehren, ohne die Änderungen zu speichern.

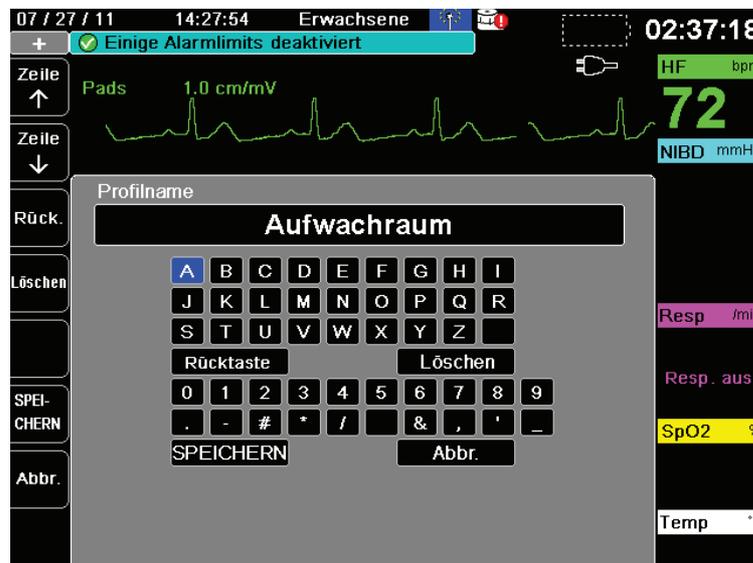

SSID

Geben Sie mithilfe des alphanumerischen Tastenfelds den Wert für die Einstellung „SSID-Name“ ein. Drücken Sie **SPEICHERN**, um die Änderungen zu speichern und zum Menü „WiFi-Konfiguration“ zurückzukehren. Drücken Sie alternativ **Abbr.**, um zum Menü „WiFi-Konfiguration“ zurückzukehren, ohne die Änderungen zu speichern.

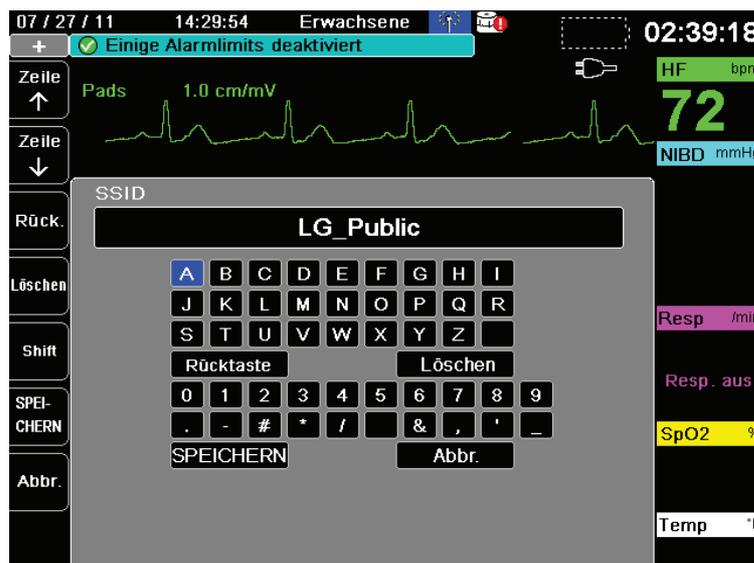

Authentifizierung

Wählen Sie mithilfe der Navigationstasten den Authentifizierungstyp aus.

Sicherheitsschlüssel

Geben Sie mithilfe des alphanumerischen Tastenfelds den Sicherheitsschlüssel ein. Drücken Sie **SPEICHERN**, um die Änderungen zu speichern und zum Menü „WiFi-Konfiguration“ zurückzukehren. Drücken Sie alternativ **Abbr.**, um zum Menü „WiFi-Konfiguration“ zurückzukehren, ohne die Änderungen zu speichern.




Wenn Sie mit der Bearbeitung Ihres WiFi-Profiles fertig sind, drücken Sie den Zurück-Pfeil (←), um zur Liste der konfigurierten Zugriffspunktprofile zurückzukehren. Von diesem Menü aus können Sie auch bereits bestehende Profile bearbeiten oder löschen.

Drücken Sie ⏪, um zum Menü „Kommunikation“ zurückzukehren.

Einrichten der Mobilfunkkommunikation


Sie können Ihr USB-Mobilmodem oder Bluetooth-Gerät für die Zusammenarbeit mit dem X Series Gerät konfigurieren. Wählen Sie im Menü "Kommunikation" die Option "**Mobilfunkkommunikation konfigurieren**". Nun erscheint das Menü "Mobilfunkkommunikation".

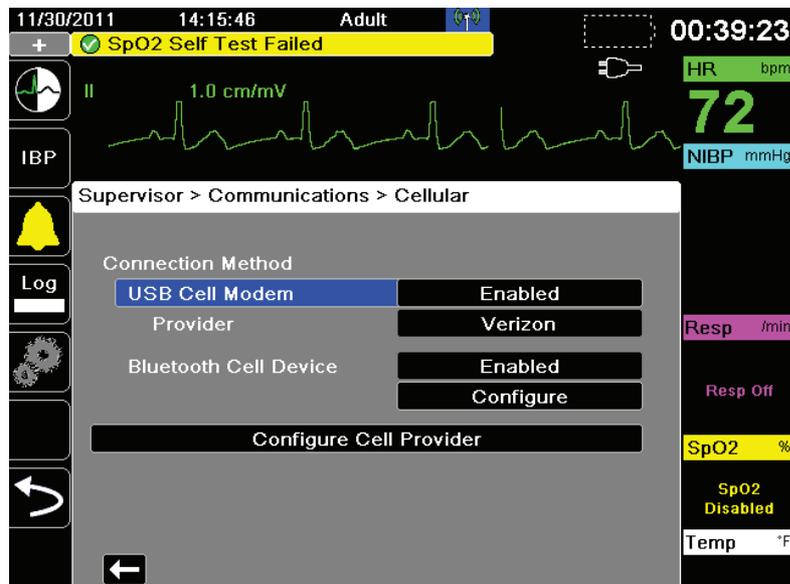

Mithilfe der Pfeiltasten können Sie alle Mobilfunkfunktionen aktivieren oder deaktivieren und die Providerinformationen Ihres Mobiltelefons konfigurieren.

Konfigurieren der Providerinformationen des Mobiltelefons

Geben Sie mithilfe der Pfeiltasten die Informationen zu Ihrem Mobilfunkprovider ein: Providername, Rufnummer, Kontoname und Kennwort. Sie können bis zu drei Mobilfunkprovider einrichten.

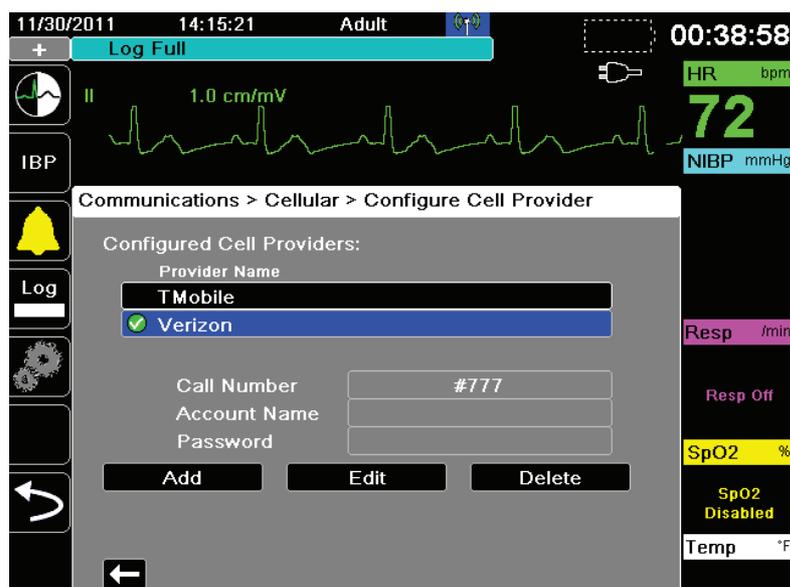


Konfigurieren und Koppeln von Bluetooth-Geräten

Das Koppeln von Bluetooth-Geräten kann auch im allgemeinen Menü "Wireless", für dessen Aufruf kein Kennwort erforderlich ist, erfolgen (siehe "Einrichten und Anzeigen gekoppelter Geräte" auf Seite 22-7).

Zum Koppeln von Bluetooth-Geräten wählen Sie im Menü "Mobilfunkkommunikation" die Option **"Bluetooth-Mobilfunkgerät konfigurieren"**.


Um ein neues Gerät zu koppeln, wählen Sie mithilfe der Navigationstasten die Schaltfläche **"Neu"**.

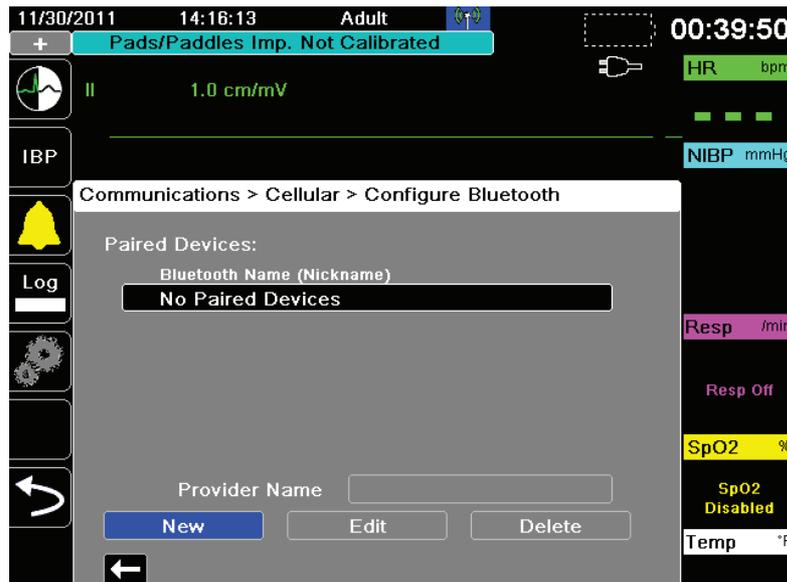


Das Gerät scannt nun die Umgebung nach Bluetooth-Geräten, die sich im erkennbaren Modus befinden. Wählen Sie mithilfe der Navigationstasten das gewünschte Gerät aus. Ein grünes Häkchen kennzeichnet das ausgewählte Gerät.



Wählen Sie "**Jetzt koppeln**", um das Gerät zu koppeln. Anschließend kehrt das Gerät zur Liste der gekoppelten Geräte zurück.

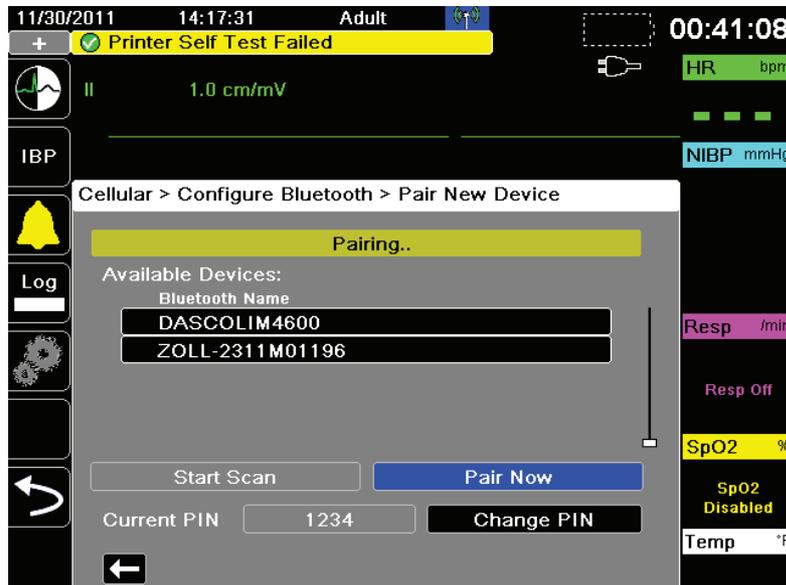


Anschließend können Sie die Einstellungen des gekoppelten Geräts bearbeiten, dem Gerät eine optionale Kurzbezeichnung zuweisen und den Provider festlegen. Um zur Liste der gekoppelten Geräte zurückzukehren, drücken Sie den Zurück-Pfeil (←).

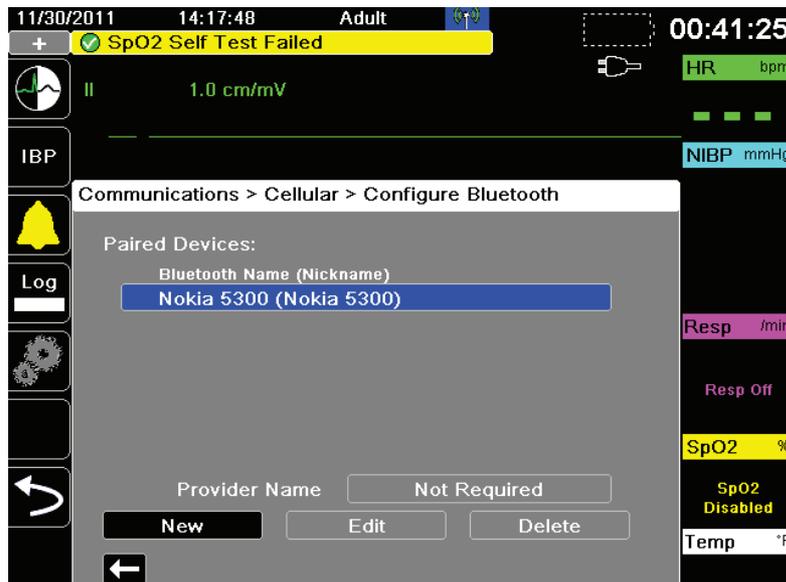

Hinweis: Verwenden Sie ausschließlich Bluetooth-Geräte mit DUN- oder PAN-NAP-Profilen. Nicht alle Mobiltelefone sind für eine zuverlässige Datenübertragung einsetzbar. Eine Liste der freigegebenen Geräte erhalten Sie bei Ihrem Vertreter der ZOLL Medical Corporation vor Ort.


Ändern der PIN: Möglicherweise müssen Sie die PIN im X Series Gerät ändern. Konsultieren Sie diesbezüglich die Dokumentation Ihres Geräts. Zum Ändern der PIN wählen Sie im Menü "Neues Gerät verbinden" die Option "PIN ändern". Geben Sie dann mithilfe des numerischen Tastenfelds die gewünschte PIN ein.

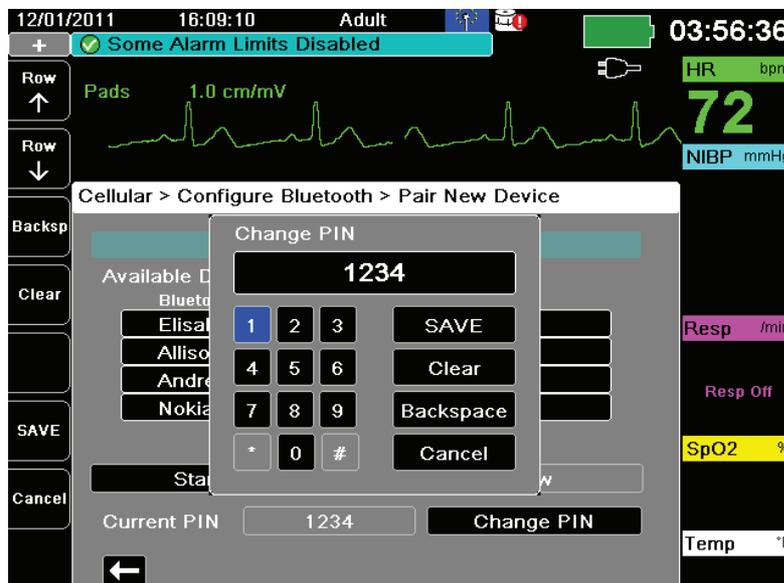

Konfigurieren der Berichtübertragung

Das X Series Gerät kann 12-Kanal-EKG-Berichte über ein Bluetooth-Mobiltelefon oder ein USB-Mobilmodem per E-Mail oder Fax versenden. Sie können das X Series Gerät dahingehend konfigurieren, dass es ein bestimmtes Gerät auswählt, und die durch Fremdanbieter-Software wie ZOLL RescueNet oder CodeNet erstellten Verteilerlisten aktualisieren oder einsehen.

Wählen Sie im Menü "Kommunikation" die Option "**Berichte konfigurieren**".

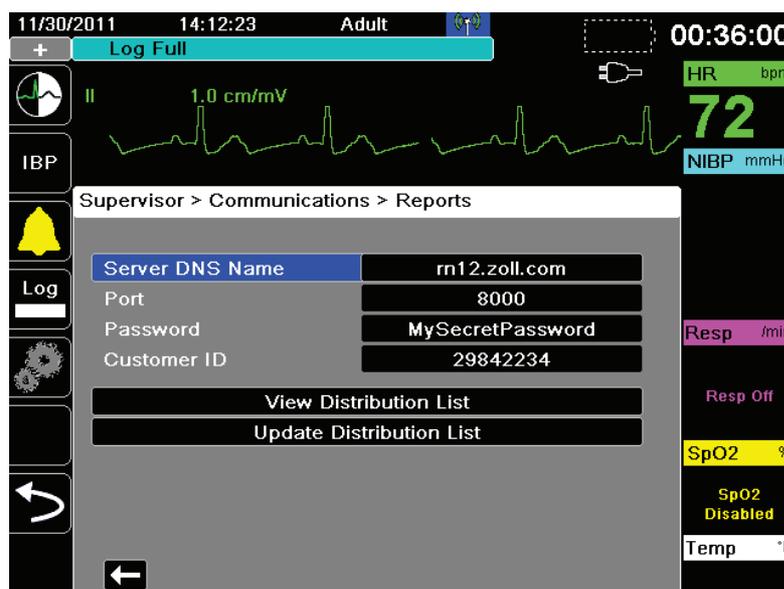

12-Kanal-Berichte werden an die Empfänger über eine ZOLL-Server gesendet. Verwenden Sie die alphanumerischen Tastaturen an den richtigen Server eingeben.

Versenden eines 12-Kanal-EKG-Berichts

Das Wireless-Verbindungs-Symbol „Verbunden“ () am oberen Rand des Displays besagt, dass eine Wireless-Verbindung verfügbar ist.

Sobald ein 12-Kanal-EKG-Bericht erfasst wurde (oder ein zuvor erfasster 12-Kanal-EKG-Bericht zur Überprüfung ausgewählt wurde), erscheint die Schnellzugriffstaste „Senden“ ()

So senden Sie einen 12-Kanal-EKG-Bericht an eine vorkonfigurierte Verteilerliste:

1. Drücken Sie die Schnellzugriffstaste „12-Kanal“ ()
2. Sofern erwünscht drücken Sie die Taste „Snapshot“ () , um einen 12-Kanal-EKG-Snapshot zu erfassen (weitere Informationen zur Erfassung von 12-Kanal-EKG-Daten siehe Kapitel 14, „12-Kanal-EKG-Interpretationsanalyse“).
3. Drücken Sie die Schnellzugriffstaste „Überpr. 12 Abl. Nächst.“ () . Nun erscheint eine Liste mit Snapshots. Wählen Sie den gewünschten Snapshot aus.
4. Drücken Sie  . Nun erscheint eine Liste vorkonfigurierter Verteilerlisten.



Wählen Sie mithilfe der Navigationstasten die gewünschte Verteilerliste aus. Ein grünes Häkchen kennzeichnet die ausgewählte Liste. Nach Auswahl eines Ziels wird die Taste **Senden** aktiviert.

5. Drücken Sie **Senden**, um die Übertragung des 12-Kanal-EKG-Berichts einzuleiten.

Während die Übertragung läuft, leuchtet die grüne LED an der Oberseite des Geräts.

Meldungen des Kommunikationssystems

Während der Übertragung zeigt das X Series Gerät möglicherweise eine der folgenden Statusmeldungen an:

Systemmeldung	Bedeutung
<i>NETZWERKVERBINDUNG HERSTELLEN</i>	Das Gerät stellt eine Verbindung mit dem Netzwerk her.
<i>SERVERVERBINDUNG HERSTELLEN</i>	Das Gerät stellt eine Verbindung mit dem ZOLL Server her.
<i>ÜBERTRAGUNG LÄUFT</i>	Die Datenübertragung ist im Gang.
<i>ÜBERTRAGUNG ABGESCHLOSSEN</i>	Die Datenübertragung ist abgeschlossen.
<i>ÜBERTRAGUNGSFEHLER</i>	<p>Fehler bei der Datenübertragung.</p> <p>Gehen Sie zur Behebung des Problems wie folgt vor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vergewissern Sie sich, dass die Wireless-Kommunikation auf Ihrem X Series Gerät aktiviert ist. • Vergewissern Sie sich, dass die WiFi-Einstellungen im Einrichtungsmenü „Kommunikation“ stimmen. • Vergewissern Sie sich, dass der ZOLL Server korrekt konfiguriert ist. • Vergewissern Sie sich, dass Ihr Mobilgerät korrekt konfiguriert ist. • Stellen Sie sicher, dass sich das X Series Gerät innerhalb der Reichweite des Wireless-Servers befindet.

Kapitel 23

Drucken

Dieses Kapitel enthält Verfahrensanleitungen zum Ausdrucken permanenter Aufzeichnungen von relevanten Daten zur Patientenversorgung und von Ereignissen.

WARNUNG! Um das Risiko eines elektrischen Schocks auszuschließen, berühren Sie bei geöffneter Druckerklappe weder den Patienten noch Innenteile des Druckers.

Drucken von Patientendaten

Mit der Druckoption können Sie die folgenden Patientendaten drucken:

- Kurven
- Berichte
- Trends

Hinweis: Eine Datumsangabe mit Fragezeichen (??/??/??) bedeutet, dass das X Series Gerät Datum und Uhrzeit beim Einschalten nicht bestimmen konnte. Durch Aus- und erneutes Einschalten des Geräts lässt sich das Problem möglicherweise beheben. Sollte das Problem fortbestehen, markieren Sie zum Einstellen von Datum und Uhrzeit das Feld **Datum und Uhrzeit** im Display, und drücken Sie die Auswahl Taste.

Hinweis: Während der Drucker druckt, wird die Schnellzugriffstaste „Drucken“ () hervorgehoben mit blauem Hintergrund dargestellt. Durch Betätigen der hervorgehobenen Taste  wird die aktuelle Druckeraktivität gestoppt.

Druckereinrichtung

Drücken Sie zum Konfigurieren der Druckerfunktionen die Schnellzugriffstaste „Weiter/Zurück“ (➡), drücken Sie die Schnellzugriffstaste „Einrichten“ (🔧), markieren Sie **Drucker** und drücken Sie die Auswahlstaste. Wählen Sie mithilfe der Navigationstasten die gewünschte Druckkonfiguration aus. Das Fenster „Einrichten“ > „Drucker“ enthält die folgenden Druckkonfigurationsoptionen:

Druckkonfiguration	Optionen
Druckgeschw.	25 mm/s oder 50 mm/s
Anzahl gedruckter Kurven	1, 2 oder 3
Druckraster	Ein oder Aus
Bei Snapshot drucken	Ein oder Aus
Bei Patientenal. drucken	Ein oder Aus
Bei NIBD drucken	Ein oder Aus
Bei Trend drucken	Ein oder Aus

Automatische Ausdrücke

Sie können den Monitor im Fenster „Einrichten“ > „Supervisor“ > „Drucker“ so einstellen, dass die folgenden Ereignisse automatisch ausgedruckt werden. Hierzu drücken Sie (➡) und anschließend (🔧). Wählen Sie mithilfe der Navigationstasten **Supervisor** und anschließend **Drucker**.

- Defibrillator-/Schrittmacher-Ereignisse
- Ereignis
- Behandlungs-Snapshot
- Behandlungsübersichts-Snapshots

Drucken von Kurven

Mithilfe der Schnellzugriffstaste (🖨️) können Sie Kurven drucken. Das X Series Gerät druckt die angezeigten Kurven entsprechend der Einstellung „Anzahl der Kurven“. Für die Option „Anzahl gedruckter Kurven“ kann **1**, **2** oder **3** eingestellt werden. Oberhalb der Kurven werden die numerischen Messwerte der Vitalfunktionen des Patienten ausgedruckt.

Hinweis: Kurven mit ungültigen Daten werden als gestrichelte Linie gedruckt.

EKG-Kurven

EKG-Kurven werden auf einem Raster mit großen Unterteilungen (gepunktete Linien) alle 5 mm und kleinen Unterteilungen (einzelne Punkte) alle 1 mm gedruckt. Wenn das EKG überwacht wird, wird die EKG-Kurve immer gedruckt.

Kurven invasiver Druckmessungen

Druckkurven werden auf einem Raster mit großen Unterteilungen (vertikale gepunktete Linien) alle 5 mm gedruckt. Die Raster der Druckskala werden horizontal gedruckt.

Plethysmografische SpO₂-Kurven

Plethysmografische SpO₂-Kurven werden mit großen Unterteilungen (vertikale gepunktete Linien) alle 5 mm gedruckt.

CO₂-Kurven

CO₂-Kurven werden auf einem Raster mit großen Unterteilungen (vertikale gepunktete Linien) alle 5 mm gedruckt. Die Raster der Druckskala werden horizontal gedruckt.

RESP-Kurven

Respirationskurven werden mit großen Unterteilungen (vertikale gepunktete Linien) alle 5 mm gedruckt.

Drucken von Berichten

Bei Snapshot drucken

Druckt jedes Mal, wenn ein Snapshot erfasst wird, den Snapshot einschließlich numerischen Werten und Kurven.

Bei Patientenal. drucken

Sie können festlegen, dass bei jedem Alarm ein Bericht gedruckt wird. Dieser Bericht wird als „Druckbericht bei Patientenalarm“ bezeichnet. Die Einstellung **Bei Patientenal. drucken** muss im Fenster „Einrichten“ > „Drucken“ eingeschaltet werden.

Bei NIBD drucken

Sie können festlegen, dass bei jeder NIBD-Messung der Messwert gedruckt wird. Dieser Bericht wird als „NIBD-Ticket-Bericht“ bezeichnet. Die Einstellung **Bei NIBD drucken** muss im Fenster „Einrichten“ > „Drucken“ eingeschaltet werden.

Bei Trend drucken

Druckt jedes Mal, wenn ein Trenddaten-Snapshot erfasst wird, numerische Trendwerte aus.

Drucken eines Behandlungsübersichtsberichts

Verfahren Sie zum Ausdruck eines Behandlungsübersichtsberichts wie folgt:

1. Drücken Sie die Schnellzugriffstaste „Weiter/Zurück“ ()
2. Drücken Sie die Schnellzugriffstaste „Prot.“ ()
3. Drücken Sie die Schnellzugriffstaste „Behandlungsübersicht“ ()
4. Markieren Sie mithilfe der Navigationstasten den zu druckenden Behandlungsübersichtsbericht und rufen Sie ihn auf.

Hinweis: Neben dem von Ihnen ausgewählten Behandlungsübersichtsbericht erscheint ein Häkchen.

5. Markieren Sie mithilfe der Navigationstasten die Option **Behandl.übersicht drucken** und rufen Sie sie auf.

Drucken von Trends

Der Ausdruck von Trends kann hilfreich sein, um die Vitalfunktionen des Patienten während der letzten Minuten bis hin zu den letzten fünf Stunden zu überprüfen. Mit dem X Series Gerät können Sie die Messwerte der Vitalfunktionen zu einem ausgewählten Zeitpunkt oder eine Trendübersicht der Messwerte der Vitalfunktionen ausdrucken, die während des aktuellen Falls (bis zu den letzten 24 Stunden) erfasst wurden.

Drucken einer Trendübersicht

Führen Sie die folgenden Schritte durch:

1. Markieren mithilfe der Navigationstasten **Trends** und drücken Sie die Auswahl Taste.
2. Markieren Sie **Trendübersicht drucken** und drücken Sie die Auswahl Taste. Der Trendübersichts-Bericht wird ausgedruckt, und das Feld „Trendübersicht drucken“ ändert sich in „Bericht abbr.“.
3. Um den Bericht abbrechen, markieren Sie **Bericht abbr.** und drücken Sie die Auswahl Taste.

Drucken einzelner Trend-Snapshots

Führen Sie die folgenden Schritte durch:

1. Markieren Sie „Auswahl Taste drücken, um Blättern zu beginnen“ unten im Fenster „Trends“. Drücken Sie dann die Auswahl Taste.
2. Wählen Sie mithilfe der Navigationstasten den Trend-Snapshot, der gedruckt werden soll, und drücken Sie die Auswahl Taste.
3. Markieren Sie **Diesen Trend drucken** und drücken Sie die Auswahl Taste. Der Trend-Snapshot wird ausgedruckt.

Drucken von Trenddaten für aktuelle oder ältere Fälle

Folgendermaßen können Sie eine Trendübersicht für einen oder mehrere Fälle ausdrucken:

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie mithilfe der Navigationstasten den bzw. die zu druckenden Fälle aus.
3. Drücken Sie die Auswahl Taste. Der Fall bzw. die Fälle werden mit einem Häkchen gekennzeichnet.
4. Markieren Sie das Feld **Trendübersicht drucken** und drücken Sie die Auswahl Taste. Die Trenddaten aller ausgewählten Fälle werden gedruckt.

Kapitel 24

Wartung

Die Reanimationsausrüstung muss gewartet werden, damit sie jederzeit einsetzbar ist. Um die Betriebsbereitschaft und den optimalen Betriebszustand des X Series Geräts zu gewährleisten, sollten Sie täglich bzw. bei jedem Schichtwechsel die folgenden Inspektionen und Tests durchführen.

Zusätzlich zur täglichen Prüfung sollte autorisiertes Personal in regelmäßigen geplanten Zeitabständen, die ein Jahr nicht überschreiten sollten, Leistungs- und Kalibrierungstests durchführen.

Wichtiger Aspekt eines erfolgreichen Wartungsprogramms ist das Wartungsprotokoll, in dem Sie regelmäßig Informationen aufzeichnen. Anhand dieses Protokolls lassen sich erforderliche Wartungsmaßnahmen überprüfen und regelmäßig abzuarbeitende Aufgaben wie Kalibrierung und Zertifizierung planen.

In diesem Kapitel ist gemäß den Empfehlungen der Defibrillator Working Group (Defibrillator-Arbeitsgruppe) der Food and Drug Administration (US-Behörde für Arznei- und Nahrungsmittel, FDA) eine bei Schichtwechsel auszufüllende Bediener-Checkliste enthalten, die Sie nach Bedarf kopieren können.

Täglich/bei jedem Schichtwechsel durchzuführendes Prüfverfahren

Inspektion

Gerät und Zubehör

- Vergewissern Sie sich, dass das X Series Gerät sauber ist (keine Flüssigkeitsrückstände vorhanden sind) und keine sichtbaren Beschädigungen zu erkennen sind.
- Inspizieren Sie alle Kabel, Leitungen und Anschlüsse auf Anzeichen einer Beschädigung oder übermäßigen Abnutzung (Risse oder Schnitte in der Ummantelung, durchgescheuerte Stellen, Drahtbrüche, verschmutzte oder verbogene Anschlussstifte).
- Inspizieren Sie Akku, EKG-Patientenkabel, Multifunktionskabel (MFC), Pulsoxymetrie-Sensor, Blutdruckmanschette samt Schlauch und die Temperatursensoren auf Anzeichen von Beschädigung oder übermäßiger Abnutzung. Defekte Komponenten müssen ausgetauscht werden.
- Inspizieren Sie die Defibrillator-Paddles auf Beschädigungen oder übermäßige Abnutzung. Prüfen Sie, ob die Oberflächen der Paddles sauber und frei von Elektrolytgel und sonstigen Verunreinigungen ist. Vergewissern Sie sich, dass alle Paddle-Bedienelemente beim Drücken und Loslassen frei beweglich sind.
- Inspizieren Sie das externe Netzteil und seine Netzkabel auf Beschädigungen. Defekte Komponenten müssen ausgetauscht werden.

Verbrauchsmaterial

- Vergewissern Sie sich, dass sämtliches Verbrauchsmaterial für den Einmalgebrauch in gutem Zustand und in ausreichender Menge vorhanden ist (Freihand-Therapieelektroden, EKG-Überwachungselektroden, Defibrillatortgel, Druckerpapier, Alkoholtupfer, Rasierer/Schere usw.).
- Überprüfen Sie, ob zwei Sets Freihand-Therapieelektroden vorhanden sind.
- Vergewissern Sie sich, dass die Verpackungen der Therapie- und Überwachungselektroden versiegelt sind und das auf den Verpackungen aufgedruckte Verfallsdatum nicht überschritten wurde.
- Öffnen Sie die Druckerklappe auf der linken Seite des X Series Geräts und vergewissern Sie sich, dass das Gerät eine ausreichende Menge Papier enthält.

Akkus

- Stellen Sie sicher, dass ein aufgeladener Akku vollständig im Akkufach des X Series Geräts eingesetzt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass ein vollständig aufgeladener Ersatzakku zur Hand ist.

Betriebsbereitschaftsanzeige

- Kontrollieren Sie die Betriebsbereitschaftsanzeige an der Gerätefront des X Series Geräts. Prüfen Sie, ob das Betriebsbereitschaftssymbol angezeigt wird.

Falls die Betriebsbereitschaftsanzeige blinkt oder das Symbol „Nicht verwenden“ anzeigt, wurde entweder ein Gerätefehler festgestellt oder der Akku des Geräts ist fast leer bzw. nicht richtig eingesetzt. Setzen Sie einen vollständig geladenen Akku in das Gerät ein. Überprüfen Sie die Betriebsbereitschaftsanzeige erneut. Blinkt die Betriebsbereitschaftsanzeige weiterhin oder zeigt sie weiterhin das Symbol „Nicht verwenden“ an, nehmen Sie das Gerät außer Betrieb und wenden sich an das zuständige technische Personal oder an den Technischen Kundendienst von ZOLL.

Defibrillator-/Schrittmachertest mit Freihand-Therapieelektroden

Hinweis: Wenn während des Tests die Meldung „Batterie schwach“ angezeigt wird, ist der eingesetzte Akku nahezu vollständig erschöpft und sollte ersetzt oder geladen werden.

Warnung! Halten Sie während der Stimulation bzw. Defibrillatorentladung Hände, Finger und andere leitfähige Materialien von den Paddle-Elektrodenplatten fern.

	Funktion	Maßnahme
1	Schließen Sie das externe Netzteil an eine funktionierende Netzsteckdose einerseits und an der Rückseite des X Series Geräts andererseits an.	Vergewissern Sie sich, dass an der Gerätefront des X Series Geräts die grüne LED für das externe Netzteil leuchtet.
2	Setzen Sie einen Akku in das Gerät ein (sofern sich noch kein Akku im Fach befindet).	Vergewissern Sie sich, dass an der Gerätefront des X Series Geräts die Akkuladestand-LED gelb leuchtet. Bei vollständig aufgeladenem Akku leuchtet die Akkuladestand-LED grün.
3	Drücken Sie die EIN/AUS-Taste des Geräts.	Kontrollieren Sie, dass das Gerät zweimal piept und die rote, die gelbe und die grüne Alarmanzeige für 2 bis 3 Sekunden aufleuchten. Hinweis: Die gelbe LED leuchtet nach dem Einschalten des Geräts möglicherweise weiterhin. Das X Series Gerät führt beim Einschalten eine Reihe von Selbsttests durch. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät die Meldung <i>SELBSTTEST BESTANDEN</i> anzeigt. Wenn die Meldung <i>SELBSTTEST FEHLER</i> angezeigt wird, wenden Sie sich an das zuständige technische Personal oder an den technischen Kundendienst von ZOLL.

	Funktion	Maßnahme
4	Ziehen Sie den Stecker des externen Netzteils von der Rückseite des X Series Geräts ab.	Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ohne Unterbrechung weiter mit Akkustrom betrieben wird und dass das angezeigte Batteriesymbol meldet, dass ein vollständig geladener Akku eingesetzt ist. Vergewissern Sie sich, dass keine Fehlermeldungen angezeigt werden.
5	Wählen Sie als Quelle für die Kurvenanzeige Ableitung I, II oder III aus, während keine EKG-Kabel an das Gerät angeschlossen sind.	Vergewissern Sie sich, dass im Kurvenfenster die Meldung <i>LEAD-FEHLER</i> angezeigt wird.
6	Wählen Sie als Quelle für die Kurvenanzeige Pads aus und schließen Sie das Multifunktionskabel an das Gerät an. (Verbinden Sie das Multifunktionskabel nicht mit dem Testanschluss.)	Vergewissern Sie sich, dass im Kurvenfenster die Meldung <i>THERAPIE-ELEKTRODEN PR.</i> angezeigt wird.
7	Schließen Sie das Multifunktionskabel (MFC) an den Testanschluss an.	Vergewissern Sie sich, dass die Meldung <i>THERAPIE-ELEKTRODEN PR.</i> durch die Meldung <i>KURZSCHLUSS ERM.</i> ersetzt wird.
8	Drücken Sie eine der Energiewahltafeln.	Vergewissern Sie sich, dass das Defibrillationsfenster angezeigt wird und folgende Meldung erscheint: <i>PADDLES-KURZSCHLUSS</i> <i>30 J FÜR TEST WÄHLEN</i>
9	Stellen Sie mit den Energiewahltafeln die Energiestufe des X Series Geräts auf 30 Joule ein.	Vergewissern Sie sich, dass im Defibrillatorfenster als ausgewählte Energie 30 J angezeigt wird.
10	Drücken Sie die Taste LADEN an der Gerätefront.	Vergewissern Sie sich, dass in regelmäßigen Abständen ein Signalton zu hören ist, während sich der Defibrillator auflädt. Der Abschluss des Ladezyklus wird durch einen Dauerton gemeldet. Die Ladezeit sollte weniger als 7 Sekunden betragen. Vergewissern Sie sich, dass die Taste SCHOCK () an der Gerätefront aufleuchtet, sobald der Defibrillator aufgeladen ist.
11	Drücken Sie die Taste  an der Gerätefront und halten Sie sie gedrückt, bis sich das Gerät entlädt.	Vergewissern Sie sich, dass sich der Defibrillator entlädt und dass die Meldung <i>DEFIB. KURZTEST BESTANDEN</i> angezeigt wird. Sollte stattdessen die Meldung <i>DEFIB. KURZTEST FEHLGESCHLAGEN</i> angezeigt werden, wenden Sie sich an das zuständige technische Personal oder an den technischen Kundendienst von ZOLL.

Defibrillator-/Schrittmachertest mit Freihand-Therapieelektroden

	Funktion	Maßnahme
12	Nachdem die Defibrillatoreinstellungen aus der Anzeige gelöscht wurden, drücken Sie die Taste SCHRITTM. an der Gerätefront, um das Dialogfeld „Stim.Einst.“ anzuzeigen.	Vergewissern Sie sich, dass hinter dem Dialogfeld „Stim.Einst.“ die Schrittmacher-Statusleiste angezeigt wird.
13	Führen Sie die folgenden Schritte durch: <ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie als Schrittmachermodus „Fest“ ein. • Stellen Sie als Schrittmacherfrequenz 60 bpm ein. • Stellen Sie den Ausgangsstrom auf 100 mA ein. • Wählen Sie Taste „Stimul. Start.“. 	Vergewissern Sie sich, dass die grüne Stimulationsanzeige in der Schrittmacher-Statusleiste einmal pro Sekunde aufleuchtet. Vergewissern Sie sich, dass auf dem Registriererausdruck alle 25 mm Stimulationsmarkierungen gedruckt werden. Hinweis: Sollte der Ausdruck nach Starten der Stimulation nicht automatisch beginnen, so wählen Sie die Schnellzugriffstaste „Drucken“, um einen kontinuierlichen Ausdruck zu starten. Zum Stoppen des Ausdrucks drücken Sie die Schnellzugriffstaste „Drucken“ erneut.
14	Drücken Sie erneut die Taste SCHRITTM. an der Gerätefront, um das Dialogfeld „Stim.Einst.“ zu schließen.	Vergewissern Sie sich, dass in der Schrittmacher-Statusleiste <i>STIMULAT.: KURZSCHLUSS ERM.</i> angezeigt wird. Vergewissern Sie sich, dass die grüne Stimulationsanzeige weiterhin einmal pro Sekunde aufleuchtet. Vergewissern Sie sich, dass keine schrittmacherbezogenen Fehlermeldungen angezeigt werden.
15	Trennen Sie den Testanschluss vom Multifunktionskabel.	Vergewissern Sie sich, dass die Schrittmacher-Statusleiste Folgendes anzeigt: <i>STIMULAT.: THERAPIE-ELEKTRODEN PR.</i>
16	Drücken Sie die Taste SCHRITTM. an der Gerätefront, um das Dialogfeld „Stim.Einst.“ anzuzeigen. Wählen Sie Stimulator aus , um den Schrittmacher ausschalten.	Vergewissern Sie sich, dass das Dialogfeld „Stim.Einst.“ geschlossen und die Schrittmacher-Statusleiste vom Display entfernt wird.
17	Schließen Sie das externe Netzteil wieder an der Rückseite des X Series Geräts an.	Vergewissern Sie sich, dass die grüne LED für das externe Netzteil an der Gerätefront des X Series Geräts leuchtet.

Defibrillatortest mit externen Paddles

Bevor Sie externe Defibrillator-Paddles mit dem X Series Gerät testen, führen Sie das unter „Defibrillator-/Schrittmachertest mit Freihand-Therapieelektroden“ auf Seite 24-3 beschriebene Testverfahren durch.

Hinweis: Wenn während des Tests die Meldung „Batterie schwach“ angezeigt wird, ist der eingesetzte Akku nahezu vollständig erschöpft und sollte ersetzt oder geladen werden.

Warnung! Halten Sie während der Stimulation bzw. Defibrillatorentladung Hände, Finger und andere leitfähige Materialien von den Paddle-Elektrodenplatten fern.

	Funktion	Maßnahme
1	Drücken Sie die EIN/AUS-Taste des X Series Geräts, um das Gerät einzuschalten.	Vergewissern Sie sich, dass das Gerät die Meldung <i>SELBSTTEST BESTANDEN</i> anzeigt.
2	Schließen Sie das Multifunktionskabel an den Defibrillator an. Trennen Sie das zum Patienten führende Ende des Multifunktionskabels vom angeschlossenen Zubehör (Paddles oder Testanschluss). Wählen Sie als Anzeigequelle für die Kurve Pads .	Vergewissern Sie sich, dass im Kurvenfenster die Meldung <i>THERAPIE-ELEKTRODEN PR.</i> angezeigt wird.
3	Verbinden Sie das Paddle-Set mit dem X Series Multifunktionskabel. Lassen Sie die Paddle-Elektroden nicht miteinander in Kontakt kommen.	Vergewissern Sie sich, dass die Meldung <i>THERAPIE-ELEKTRODEN PR.</i> durch die Meldung <i>ELEKTR. AM PATIENT. ANBR.</i> ersetzt wird.
4	Drücken Sie die DRUCKER -Taste am Sternum-Paddle.	Vergewissern Sie sich, dass der Drucker den Druckvorgang startet.
5	Drücken Sie erneut die DRUCKER -Taste.	Vergewissern Sie sich, dass der Drucker den Druckvorgang beendet.
6	Drücken Sie die Apex- und die Sternum-Paddle-Elektrode mit der Stirnseite zusammen, um die Kontaktfläche zwischen den Elektroden zu maximieren.	Vergewissern Sie sich, dass die Meldung <i>ELEKTR. AM PATIENT. ANBR.</i> durch die Meldung <i>KURZSCHLUSS ERM.</i> ersetzt wird.
7	Drücken Sie die ENERGIEWAHL (+) -Taste am Sternum-Paddle.	Vergewissern Sie sich, dass das Defibrillationsfenster angezeigt wird und folgende Meldung erscheint: <i>PADDLE-KURZSCHLUSS</i> <i>30 J FÜR TEST WÄHLEN</i>
8	Drücken Sie erneut die ENERGIEWAHL (+) -Taste.	Vergewissern Sie sich, dass die ausgewählte Energie auf die nächsthöhere Stufe erhöht wird.
9	Drücken Sie wiederholt die ENERGIEWAHL (→) -Taste am Sternum-Paddle, bis die Einstellung 30 Joule ausgewählt ist.	Vergewissern Sie sich, dass im Defibrillatorfenster als ausgewählte Energie 30 J angezeigt wird.

	Funktion	Maßnahme
10	Drücken Sie die LADEN -Taste am Apex-Paddle. (Drücken Sie die LADEN -Taste zweimal, wenn das Defibrillator-Fenster verschwunden sein sollte.)	Vergewissern Sie sich, dass in regelmäßigen Abständen ein Signalton zu hören ist, während sich der Defibrillator auflädt. Der Abschluss des Ladezyklus wird durch einen Dauerton gemeldet. Die Ladezeit sollte weniger als 7 Sekunden betragen. Vergewissern Sie sich, dass die LADE -LED am Apex-Griff leuchtet, wenn der Defibrillator aufgeladen und zur Energieabgabe bereit ist.
11	Während der Defibrillator geladen ist, drücken Sie die Paddle-Elektroden zusammen und halten Sie (nur) die SCHOCK -Taste am Apex-Paddle gedrückt.	Vergewissern Sie sich, dass sich der Defibrillator nicht entlädt.
12	Während der Defibrillator weiterhin geladen ist, drücken Sie die Paddle-Elektroden zusammen und halten Sie (nur) die SCHOCK -Taste am Sternum-Paddle gedrückt.	Vergewissern Sie sich, dass sich der Defibrillator nicht entlädt.
13	Während der Defibrillator geladen ist, drücken Sie die Paddle-Elektroden zusammen und halten Sie gleichzeitig die SCHOCK -Taste am Apex- und die SCHOCK -Taste am Sternum-Paddle gedrückt.	Vergewissern Sie sich, dass sich der Defibrillator entlädt und dass die Meldung DEFIB. KURZTEST BESTANDEN angezeigt wird. Sollte stattdessen die Meldung DEFIB. KURZTEST FEHLGESCHLAGEN angezeigt werden, wenden Sie sich an das zuständige technische Personal oder an den technischen Kundendienst von ZOLL.

Empfohlener präventiver Mindestwartungsplan

In regelmäßigen Zeitabständen sollten Funktionstests durchgeführt werden. Die Funktionstests dienen als Ergänzung der automatisierten Selbsttests, die das X Series Gerät durchführt, um die Betriebsbereitschaft zu gewährleisten. Weitere Informationen zu Funktionstests finden Sie im *X Series Service Manual (Wartungshandbuch)*.

Jährlich

Zusätzlich zu dem täglich/bei jedem Schichtwechsel durchzuführenden Verfahren und den Funktionstests wird Folgendes empfohlen:

- Führen Sie die NIBD-Kalibrierungsprüfung durch.
- Führen Sie die CO₂-Kalibrierungsprüfung durch.
- Die NIBD- und CO₂-Kalibrierungsprüfungen sollten jährlich oder gemäß lokaler Vorgaben (von einem qualifizierten Medizintechniker) wie im *X Series Service Manual (Wartungshandbuch)* beschrieben durchgeführt werden.

Richtlinien zur Unterstützung der optimalen Akkuleistung

- Jeder Akku sollte eine Kennziffer oder einen Kennbuchstaben tragen. Durch diese Kennung lässt sich die Akkuleistung besser nachhalten.
- Bewahren Sie zusätzliche Akkus in der *SurePower*-Ladestation auf, in der ihr Status leicht feststellbar ist. An einer leuchtenden Bereitschafts-LED ist ein aufgeladener Akku am sichersten zu erkennen.
- Führen Sie immer mindestens einen vollständig aufgeladenen Ersatzakku mit. Ist keine andere Reservestromquelle verfügbar, wird zu zwei Ersatzakkus geraten.
- Wechseln Sie Ersatzakkus regelmäßig aus. Auch wenn Akkus nicht verwendet werden, verlieren sie nach und nach an Ladung, wenn sie nicht in das Ladegerät eingesetzt sind. Durch regelmäßiges Auswechseln der Akkus lassen sich Fälle vermeiden, in denen die Akkuladung zu schwach ist, weil der Akku mehr als 30 bis 90 Tage nicht aufgeladen oder verwendet wurde.
- Laden Sie einen teilweise entladenen Akku nach Möglichkeit wieder auf. Dies sollte nach jeder Patientenüberwachung erfolgen. Auf diese Weise ist bei jedem Einsatz eine maximale Betriebsdauer gewährleistet, ohne auf Ersatzakkus zurückgreifen zu müssen. Wird unter diesen Umständen ein Ersatzakku benötigt, kann dies als Hinweis auf einen abgenutzten Akku gewertet werden, der nicht mehr die normale Betriebsdauer gewährleisten kann.
- Bewahren Sie leere Akkus getrennt von geladenen Ersatzakkus auf. Bewahren Sie dem Monitor entnommene leere Akkus niemals an der Stelle auf, die zum Mitführen eines geladenen Ersatzakkus bestimmt ist.

Vorsicht

Belassen Sie X Series Akkus NICHT im entladenen Zustand. Die Akkus können Schaden nehmen, wenn Sie länger als 30 Tage im entladenen Zustand belassen werden.

Reinigungsanweisungen

Reinigen des X Series Geräts

Reinigen Sie das X Series Gerät mit einem nahezu trockenen Tuch, das mit einem der unten aufgeführten milden Reinigungsmittel benetzt wurde. Lassen Sie **UNTER KEINEN UMSTÄNDEN** Reinigungsmittel oder Wasser in Spalten oder Anschlussöffnungen eindringen. Wischen Sie überschüssige Reinigungslösung gründlich mit einem trockenen Tuch vom X Series Gerät ab.

Überprüfen Sie den Monitor und die Anschlüsse beim Reinigen immer auf ungewöhnliche Abnutzung, Beschädigung oder Feuchtigkeit.

Verwenden Sie nur die folgenden empfohlenen Reinigungsmittel:

- Warmes Wasser
- Wasserstoffperoxidlösung
- Flüssigseife
- Wex-cide[®]
- Windex[®]
- T.B.Q.[®]

Verwenden Sie **unter keinen Umständen** eines folgenden Reinigungsmittel:

- Butylalkohol
- Denaturierter Alkohol
- Freon
- Milde Chorbleichelösung
- Isopropylalkohol
- Trichlorethan, Trichlorethylen
- Aceton
- Vesphene II
- Enviroquat
- Staphene
- Misty
- Glutaraldehyd

Reinigen der NIBD-Blutdruckmanschette

Reinigen Sie die Manschette mit im Krankenhaus geläufigen Desinfektionsmitteln (z. B. Clorox[®] (Lösung 1:10), Isopropylalkohol, Lysol[®]-Lösung, PhisoHex[®], Quatricide[®], Virex[®] oder Vesphene[®]). Reinigen Sie die Manschette behutsam mit der Lösung und spülen Sie sie ab. Lassen Sie **KEINE** Lösung in die Manschettenschläuche eindringen. Lassen Sie die Manschette und den Schlauch vor dem Einsatz am Patienten vollständig trocknen.

Reinigen der SpO₂-Sensoren

Reinigen Sie die SpO₂-Sensoren mit einem Tuch, das leicht mit einem der vorstehend aufgelisteten Reinigungsmittel angefeuchtet wurde. Tauchen Sie den Sensor oder seinen Anschluss NICHT in Flüssigkeiten oder Reinigungsmittel. Wischen Sie überschüssige Reinigungslösung gründlich mit einem trockenen Tuch ab. Lassen Sie den Sensor vollständig trocknen, bevor Sie ihn am Patienten einsetzen.

Reinigen von Kabeln und Zubehör

Kabel, Manschettenschläuche, Paddles und anderes Zubehör können mit einem feuchten Tuch abgewischt werden, das mit einer milden Reinigungslösung angefeuchtet wurde.

Einlegen von Druckerpapier

Das Gerät zeigt die Meldung *PAPIERMANGEL* an, wenn der Drucker ohne Registrierstreifen aktiviert wird oder wenn der Papiervorrat während des Druckvorgangs zur Neige geht.

Verwenden Sie ZOLL Registrierstreifen-Papier (Artikelnummer 001739-U).

So legen Sie das Registrierstreifen-Papier in den Drucker ein:

1. Legen Sie die Finger in die Vertiefungen an beiden Seiten der Druckerklappe, ziehen Sie daran, um sie zu öffnen, und entnehmen Sie die leere oder fast leere Papierrolle.

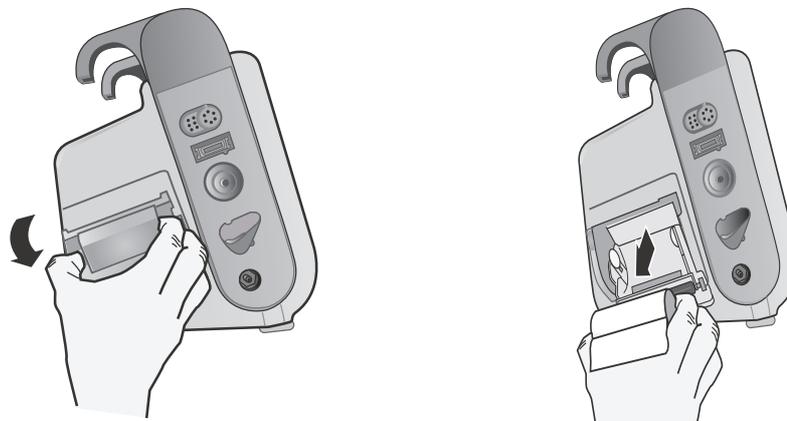


Abbildung 24-1. Öffnen der Druckerklappe und Entfernen des Papiers

2. Setzen Sie eine neue Streifenpapierrolle ein. Die Abbildung in der Innenseite des Fachs zeigt, wie das Papier ausgerichtet werden muss.
3. Ziehen Sie so viel Papier von der Rolle, dass das Streifenende bei geschlossener Druckerklappe aus dem Gerät herausragt.

4. Schließen Sie die Druckerklappe. Die Klappe muss bündig mit der Geräteseite abschließen.

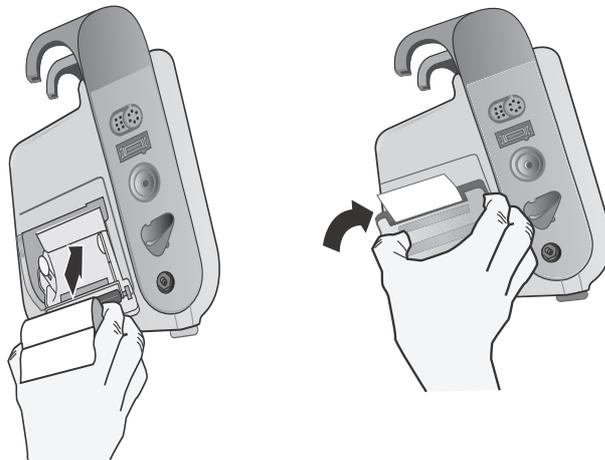


Abbildung 24-2. Einlegen des Papiers und Schließen der Druckerklappe

5. Drücken Sie nach dem Einlegen des Papiers die Schnellzugriffstaste „Drucken“ (), um den Druckvorgang wieder aufzunehmen.

Reinigen des Druckkopfs

So reinigen Sie den Druckkopf des Druckers:

1. Ziehen Sie an der Druckerklappe, um sie zu öffnen (siehe Abb. 24-1), und entnehmen Sie das Papier.
2. Machen Sie den Druckkopf ausfindig. Dieser befindet sich vorne am Boden des Druckerfachs.
3. Wischen Sie den Druckkopf vorsichtig mit einem mit Isopropylalkohol angefeuchteten Wattestäbchen ab. Trocknen Sie verbliebenen Alkohol mit einem frischen Wattestäbchen ab.



Abbildung 24-3. Reinigen des Druckkopfs

4. Legen Sie das Papier wieder in das Gerät ein und schließen Sie die Klappe (siehe Abb. 24-2).

X SERIES BEDIENER-CHECKLISTE BEI SCHICHTWECHSEL

Datum: _____ Schicht: _____ Standort: _____
 Hersteller/Modellnr.: _____ Seriennr. oder Einrichtungs-ID-Nr.: _____

Inspizieren Sie das Gerät zu Beginn jeder Schicht. Geben Sie an, ob alle Anforderungen erfüllt sind.
 Notieren Sie alle ergriffenen Abhilfemaßnahmen. Unterschreiben Sie das Formular.

	In gutem Zustand angetroffen	Abhilfemaßnahmen/ Anmerkungen
1. Defibrillatorgerät		
Sauber, keine Flüssigkeitsspritzer, Gehäuse unbeschädigt		
2. Kabel/Anschlüsse		
a. Inspizieren Sie auf beschädigte Ummantelung, ausgefranzte/gebrochene Drähte und verbogene Anschlussstifte b. Anschlüsse stellen eine sichere Verbindung her		
3. Sensoren (Pulsoxymetrie, NIBD-Manschette und -Schlauch, Temperatursensoren)		
a. Inspizieren Sie auf Anzeichen einer Beschädigung oder übermäßige Abnutzung b. Anschlüsse stellen eine sichere Verbindung her		
4. Paddles		
a. Sauber, glatte Oberfläche, nicht beschädigt b. Frei bewegliche Schalter c. Kabel und Anschlüsse sind nicht beschädigt und stellen eine sichere Verbindung her		
5. Verbrauchsmaterial und Zubehör		
a. Therapie-Pads befinden sich in versiegelten Packungen (2 Sets, nicht abgelaufen) b. Defibrillatorgel oder Gelelektroden c. EKG-Überwachungselektroden d. Desinfektionstücher e. Rasierer/Schere f. Registrierstreifen-Papier		
6. Akkus		
a. Vollständig geladener Akku in das Gerät eingesetzt b. Voll geladener Ersatzakku verfügbar		
7. Betriebsbereitschaftsanzeige zeigt Bereitschaft an – Blinkt nicht und auch kein „Nicht verwenden“-Symbol		
8. Funktionstests		
A. Einschaltsequenz		
a. Akkuladestand-LED und Netzteil-LED leuchten bei angeschlossener Netzversorgung b. Es werden Signaltöne ausgegeben und die optischen Alarmanzeigen leuchten kurz auf c. Selbsttest bestanden		
B. Freihand-Defibrillation (Test mit nur Akkustromversorgung)		
a. Die Meldungen <i>THERAPIE-ELEKTRODEN PR.</i> und <i>PADDLE-KURZSCHLUSS</i> werden angezeigt b. Ladezeit < 7 Sekunden c. <i>DEFIB. KURZTEST BESTANDEN</i> bei 30 Joule		
C. Schrittmacher-Test (Test mit nur Akkustromversorgung)		
a. Drucker druckt bei 60 ppm alle 25 mm Stimulationsmarkierungen b. Meldung <i>STIMULAT.: KURZSCHLUSS ERM.</i> wird angezeigt – keine Fehlermeldungen bei 100 mA c. Meldung <i>STIMULAT.: THERAPIE-ELEKTRODEN PR.</i> wird angezeigt		
D. Paddles		
a. Wenn Paddles an das Multifunktionskabel angeschlossen werden, erscheint die Meldung <i>ELEKTR. AM PATIENT. ANBR.</i> b. Paddle-Tasten funktionieren (Drucker, Energiewahl, Laden, Schock) c. <i>DEFIB. KURZTEST BESTANDEN</i> bei 30 Joule		
E. Schließen Sie das Gerät wieder an die Netzstromversorgung an		
_____ Größere(s) Problem(e) gefunden (AUSSER BETRIEB)		

Unterschrift _____

Anhang A

Technische Daten

Dieses Kapitel enthält Informationen zu den technischen Daten des X Series Monitors/Defibrillators.

- „Defibrillator“ auf Seite A-2.
- „Monitor/Display“ auf Seite A-14
- „Impedanzpneumographie“ auf Seite A-15
- „Alarmer“ auf Seite A-15
- „Registrierer“ auf Seite A-16
- „Akku“ auf Seite A-17
- „Allgemeines“ auf Seite A-17
- „Schrittmacher“ auf Seite A-18
- „CO₂“ auf Seite A-18
- „Pulsoxymetrie“ auf Seite A-19
- „Nichtinvasive Blutdruckmessung“ auf Seite A-22
- „Invasive Drücke“ auf Seite A-23
- „Temperatur“ auf Seite A-24
- „Informationen und Herstellererklärung zur elektromagnetischen Verträglichkeit“ auf Seite A-30

Defibrillator

Ladedauer:

- Unter 7 Sekunden mit neuem, voll aufgeladenem Akku (erste 15 Ladungen auf 200 J).
- Für die sechzehnte Entladung mit maximaler Energie beträgt die Ladezeit weniger als 10 Sekunden. Bei einem teilentladenen Akku ist die Ladedauer des Defibrillators länger.
- Weniger als 15 Sekunden bei Betrieb ohne Akku, bei alleiniger Verwendung von Netzstrom bei 90 % der Netzennspannung.
- Weniger als 25 Sekunden ab dem Einschalten mit einem neuen, vollständig geladenen Akku (belastet mit bis zu fünfzehn Entladungen von 200 J) oder bei Betrieb ohne Akku, bei alleiniger Verwendung von Netzstrom bei 90 % der Netzennspannung.

EKG-Analyse und Ladedauer im AED-Modus

- Weniger als 30 Sekunden mit neuem, voll aufgeladenem Akku (erste 15 Ladungen auf 200 J).
- Für die sechzehnte Entladung mit maximaler Energie beträgt die Analyse- und Ladezeit weniger als 30 Sekunden. Bei einem teilentladenen Akku ist die Ladedauer des Defibrillators länger.
- Weniger als 30 Sekunden bei Betrieb ohne Akku, bei alleiniger Verwendung von Netzstrom bei 90 % der Netzennspannung.
- Weniger als 40 Sekunden ab dem Einschalten mit einem neuen, vollständig geladenen Akku (belastet mit bis zu fünfzehn Entladungen von 200 J) oder bei Betrieb ohne Akku, bei alleiniger Verwendung von Netzstrom bei 90 % der Netzennspannung.

Patientenimpedanz: 10 bis 300 Ohm

Synchronisierter Modus: Die Defibrillatorentladung wird mit der R-Zacke des EKGs synchronisiert. Im Display wird SYNC angezeigt. Über der EKG-Kurve im Display und auf dem Registrierstreifen werden R-Zacken-Markierungen angebracht. Wenn das EKG durch das Gerät überwacht wird, werden die DF-80:2003-Anforderungen einer maximalen Zeitverzögerung von 60 ms zwischen der R-Zacken-Spitze und der Abgabe von Energie erfüllt.

Tabelle A-1 zeigt die Eigenschaften des biphasischen Rechteckimpulses (X Series Rectilinear Biphasic™) bei Entladung an einer Last von 25 Ohm, 50 Ohm, 100 Ohm, 125 Ohm, 150 Ohm und 175 Ohm bei der maximalen Energieeinstellung von 200 J.

Tabelle A-1. Eigenschaften des biphasischen Rechteckimpulses des X Series Geräts

	200 J entladen an					
	25Ω	50Ω	100Ω	125Ω	150Ω	175Ω
Erste Phase						
Maximale Anfangsstromstärke	31,4 A	30,4 A	19,7 A	19,4 A	16,7 A	15,6 A
Durchschnittliche Stromstärke	27,1 A	24,9 A	17,5 A	16,2 A	14,4 A	13,2 A
Dauer	6 ms	6 ms	6 ms	6 ms	6 ms	6 ms
Dauer der Interphase zwischen erster und zweiter Phase						
	200 μs	200 μs	200 μs	200 μs	200 μs	200 μs
Zweite Phase						
Anfangsstromstärke	29,2 A	18,8 A	15,1 A	13,2 A	12,1 A	11 A
Durchschnittliche Stromstärke	14,7 A	13 A	12,5 A	11,3 A	10,7 A	9,9 A
Dauer	4 ms	4 ms	4 ms	4 ms	4 ms	4 ms

Tabelle A-2. Abgegebene Energie bei den verschiedenen verfügbaren Defibrillatoreinstellungen und unterschiedlichen Lastimpedanzen

Ausgewählte Energie	Last							Genauigkeit*
	25Ω	50Ω	75Ω	100Ω	125Ω	150Ω	175Ω	
1 J	1 J	1 J	1 J	1 J	1 J	1 J	1 J	±15%
2 J	1 J	2 J	2 J	2 J	2 J	2 J	2 J	±15%
3 J	2 J	3 J	3 J	3 J	3 J	3 J	3 J	±15%
4 J	3 J	4 J	4 J	5 J	5 J	5 J	4 J	±15%
5 J	3 J	5 J	6 J	6 J	6 J	6 J	6 J	±15%
6 J	4 J	6 J	7 J	7 J	7 J	7 J	7 J	±15%
7 J	5 J	7 J	8 J	8 J	8 J	8 J	8 J	±15%
8 J	5 J	8 J	9 J	9 J	10 J	9 J	9 J	±15%
9 J	6 J	9 J	10 J	11 J	11 J	11 J	10 J	±15%
10 J	7 J	10 J	12 J	±15%				
15 J	10 J	16 J	17 J	18 J	18 J	18 J	17 J	±15%
20 J	14 J	21 J	23 J	24 J	24 J	24 J	23 J	±15%
30 J	21 J	32 J	35 J	36 J	37 J	36 J	35 J	±15%
50 J	35 J	54 J	59 J	61 J	62 J	61 J	59 J	±15%
70 J	49 J	76 J	83 J	85 J	87 J	86 J	83 J	±15%
85 J	60 J	92 J	101 J	104 J	106 J	104 J	101 J	±15%
100 J	71 J	109 J	119 J	122 J	125 J	123 J	119 J	±15%
120 J	85 J	131 J	143 J	147 J	150 J	147 J	143 J	±15%
150 J	107 J	164 J	180 J	183 J	188 J	184 J	179 J	±15%
200 J	142 J	230 J	249 J	253 J	269 J	261 J	260 J	±15%

* Bei allen Energiestufen beträgt die Genauigkeit ±15 % oder 3 J, je nachdem, welcher Wert größer ist.

Der biphasische Rechteckimpuls des X Series Geräts verwendet die gleichen Zeiteinstellungen für die erste und zweite Phase, vergleichbare Ströme/Spannungen für die erste und zweite Phase sowie im Wesentlichen die gleichen Mechanismen für die Kontrolle der Defibrillationskurvenform wie der ZOLL R Series® Defibrillator. Daher werden die Defibrillationskurvenformen von R Series und X Series Geräten als im Wesentlichen gleichwertig angesehen.

Die Abbildungen A-1 bis A-20 zeigen die biphasischen Rechteckimpulse, die bei den einzelnen Energieeinstellungen beim Entladen des X Series Defibrillators in eine Last von 25, 50, 75, 100, 125, 150 bzw. 175 Ohm erzeugt werden.

Die vertikale Achse zeigt die Stromstärke in Ampere (A) und die horizontale Achse die Zeit in Millisekunden (ms).

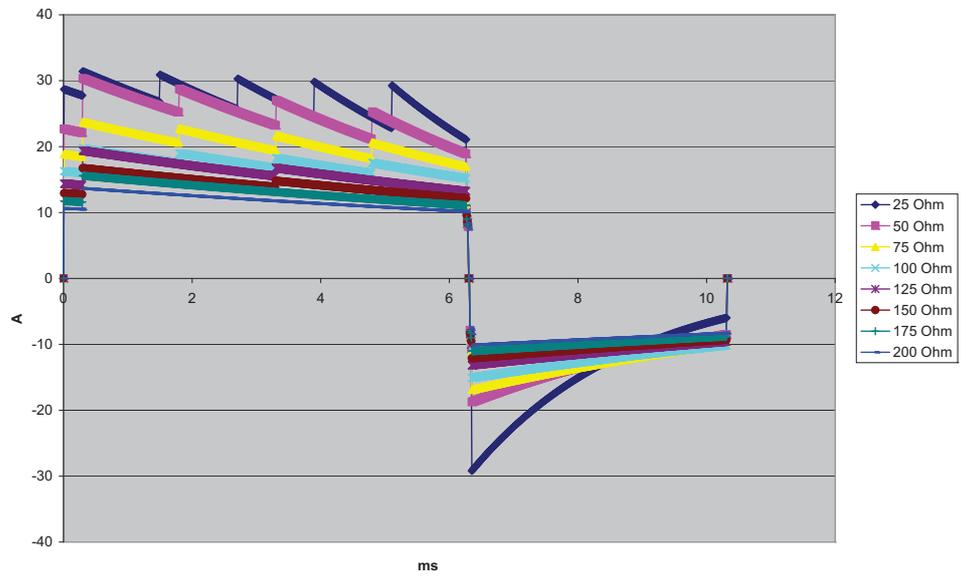


Abbildung A-1. Biphasischer Rechteckimpuls bei 200 J

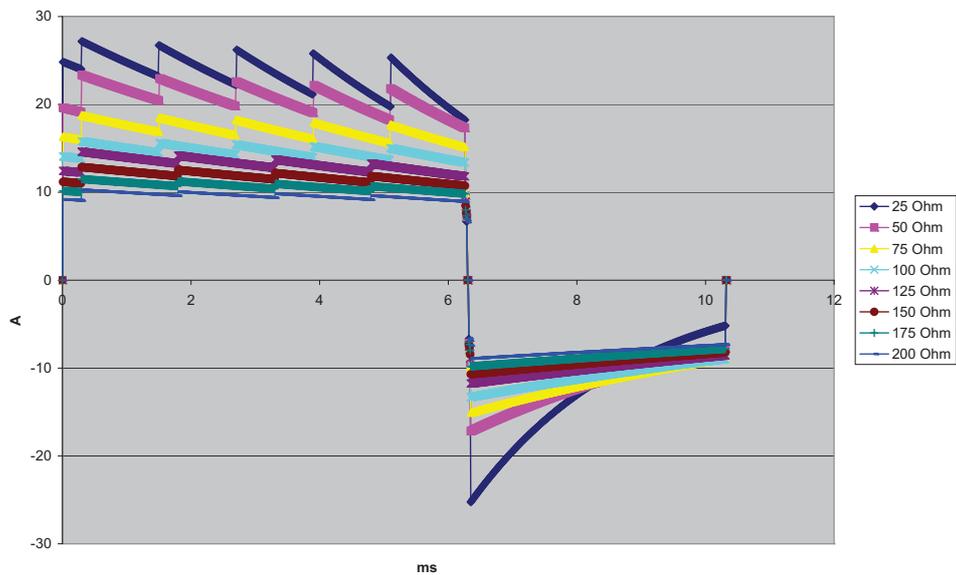


Abbildung A-2. Biphasischer Rechteckimpuls bei 150 J

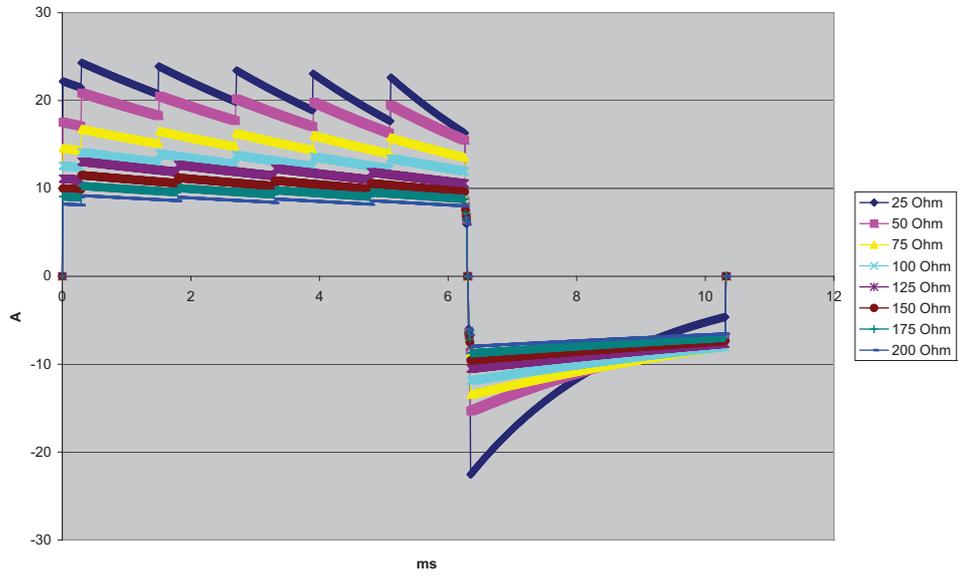


Abbildung A-3. Biphasischer Rechteckimpuls bei 120 J

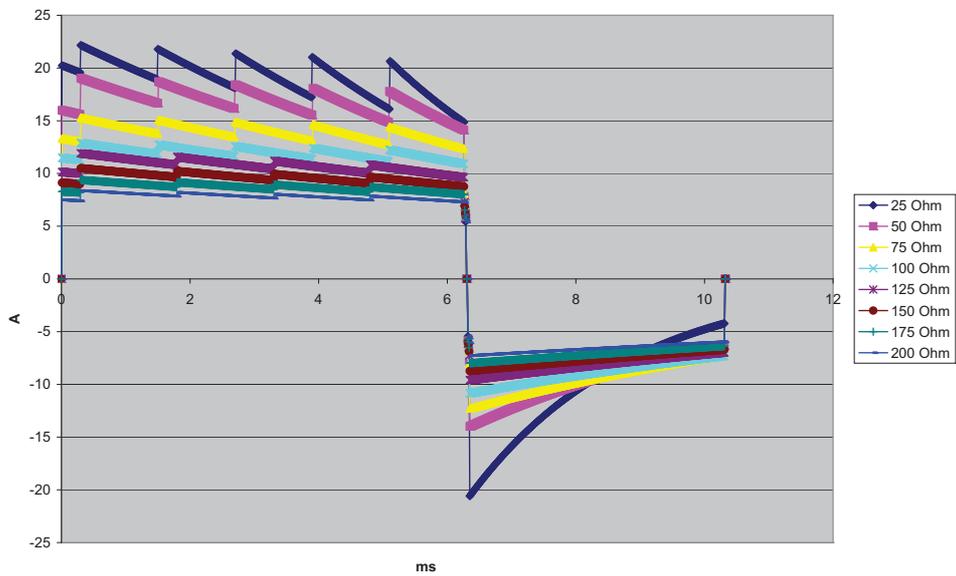


Abbildung A-4. Biphasischer Rechteckimpuls bei 100 J

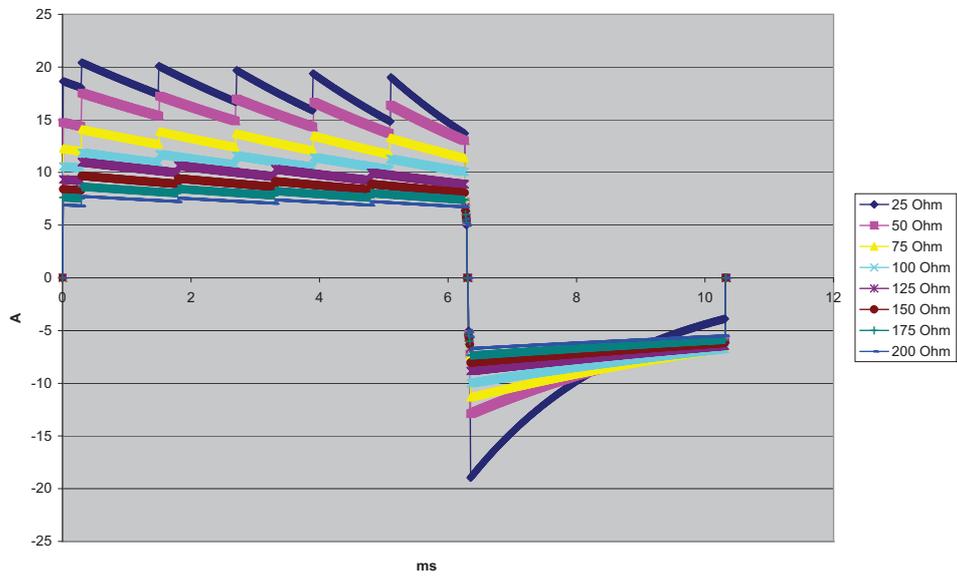


Abbildung A-5. Biphasischer Rechteckimpuls bei 85 J

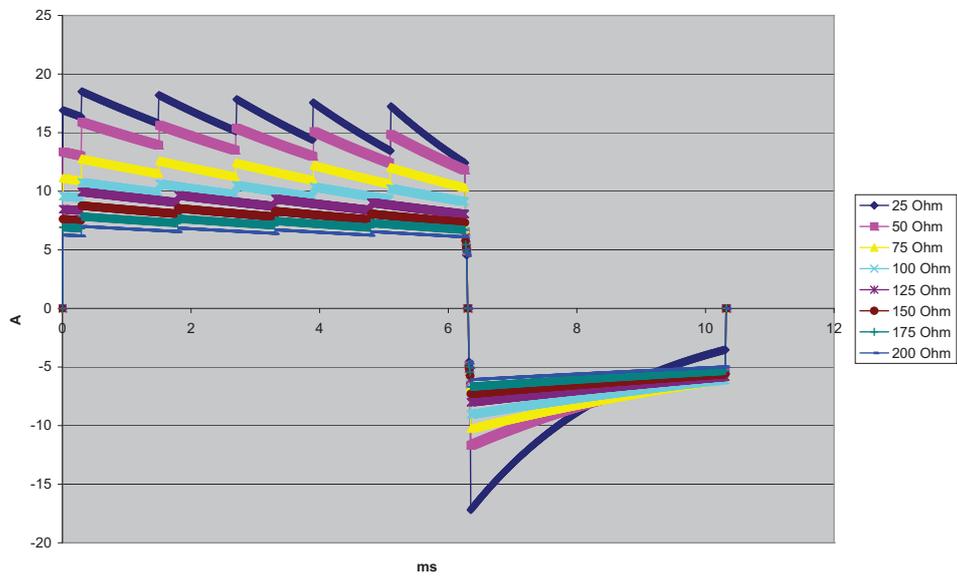


Abbildung A-6. Biphasischer Rechteckimpuls bei 70 J

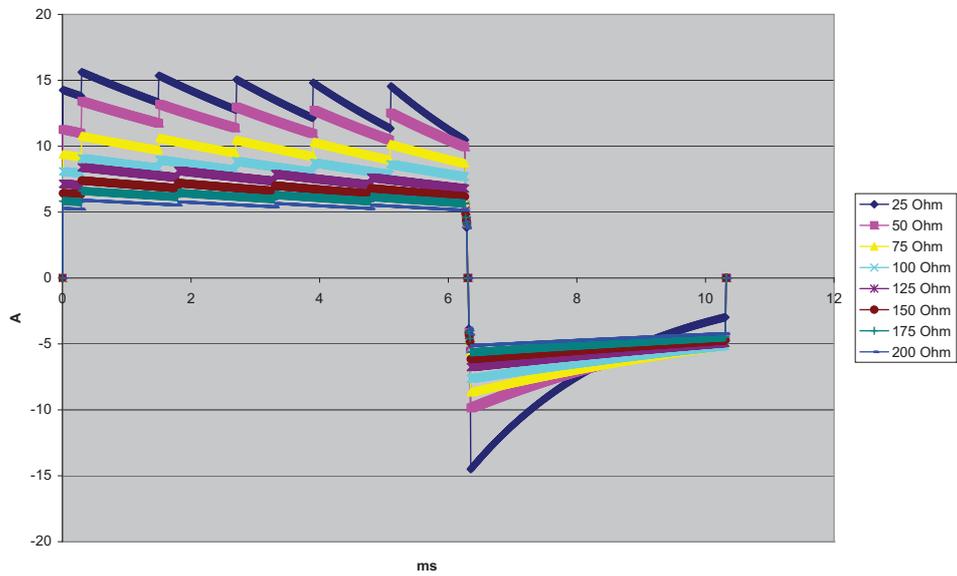


Abbildung A-7. Biphasischer Rechteckimpuls bei 50 J

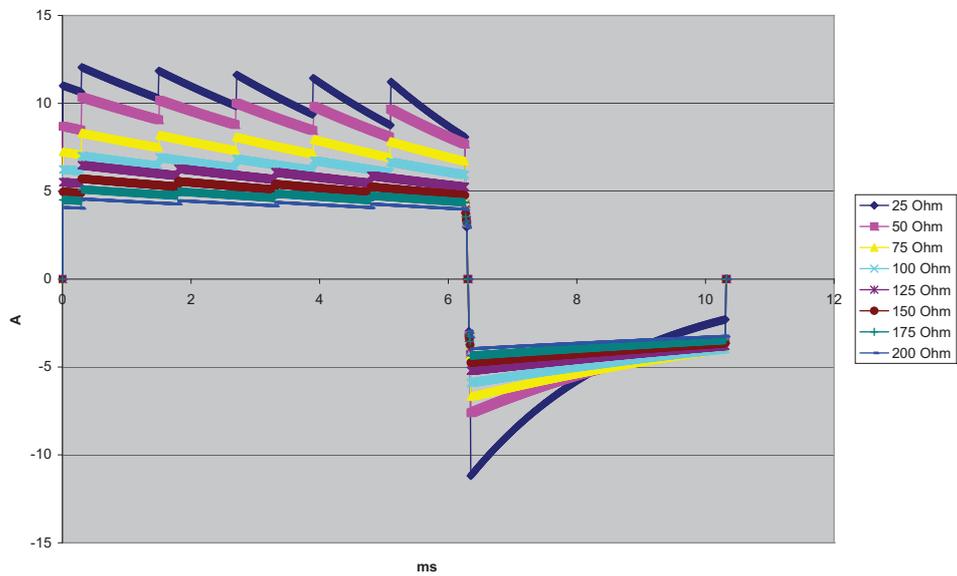


Abbildung A-8. Biphasischer Rechteckimpuls bei 30 J

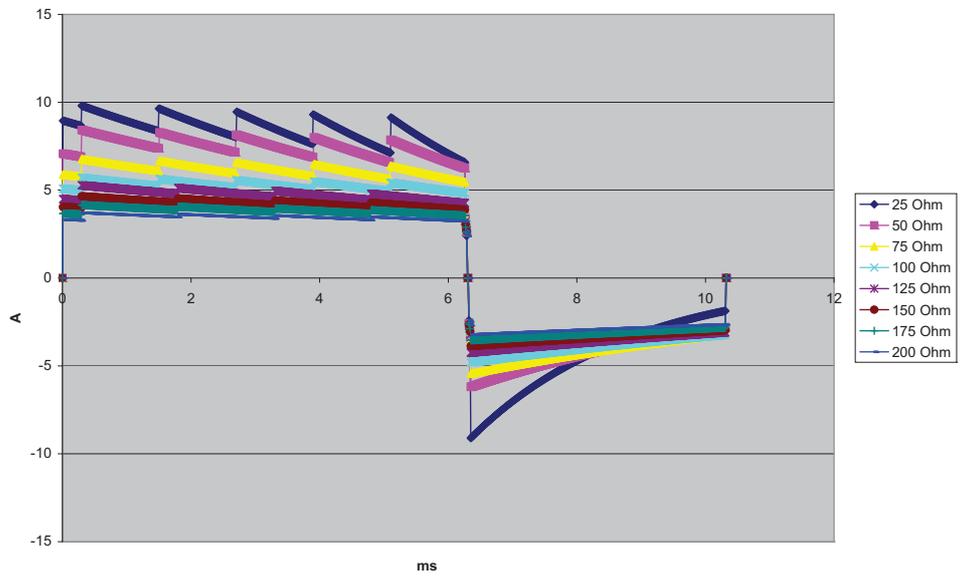


Abbildung A-9. Biphasischer Rechteckimpuls bei 20 J

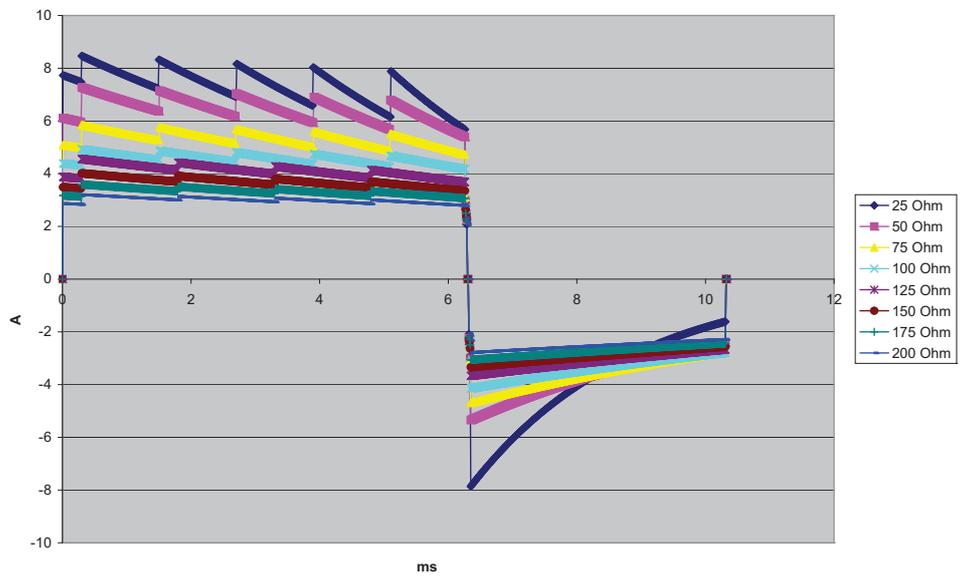


Abbildung A-10. Biphasischer Rechteckimpuls bei 15 J

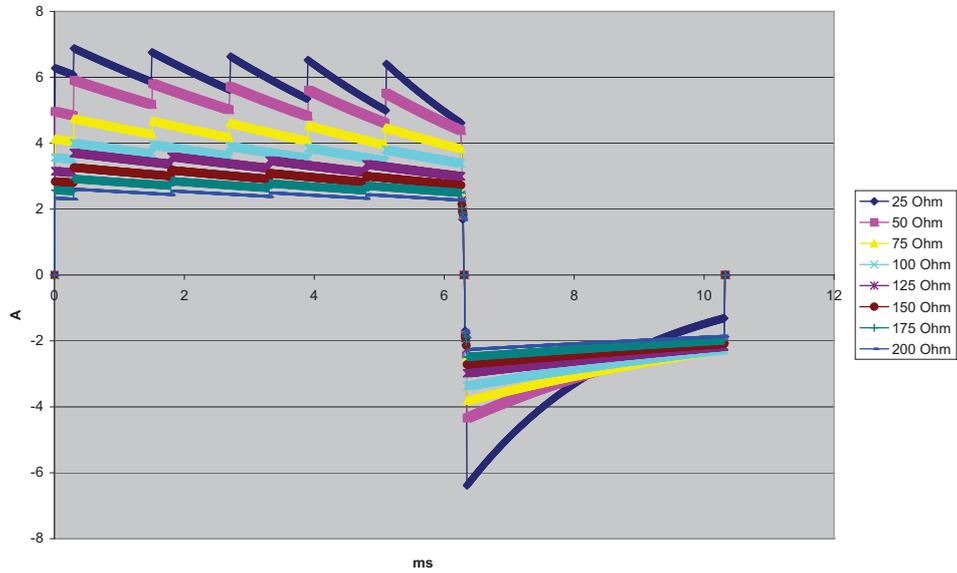


Abbildung A-11. Biphasischer Rechteckimpuls bei 10 J

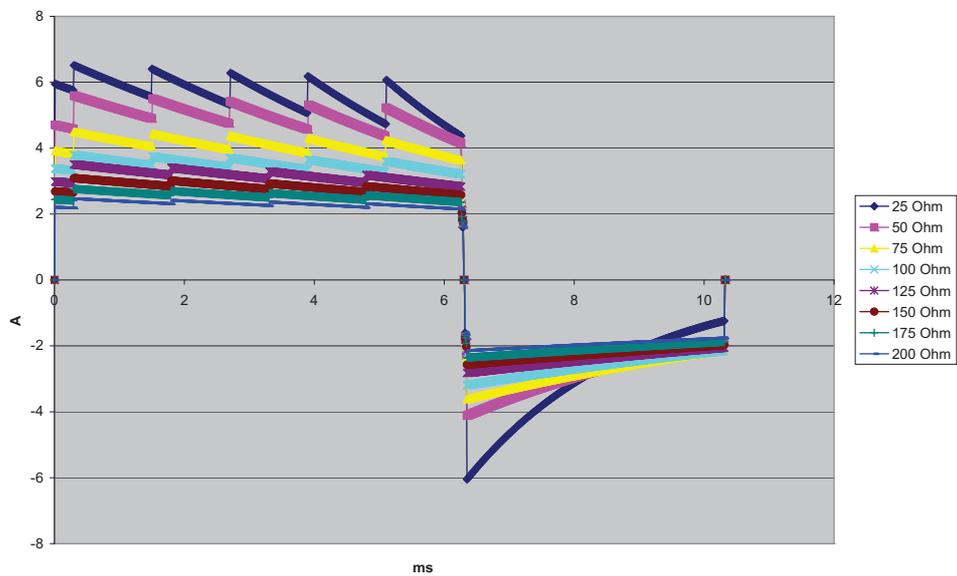


Abbildung A-12. Biphasischer Rechteckimpuls bei 9 J

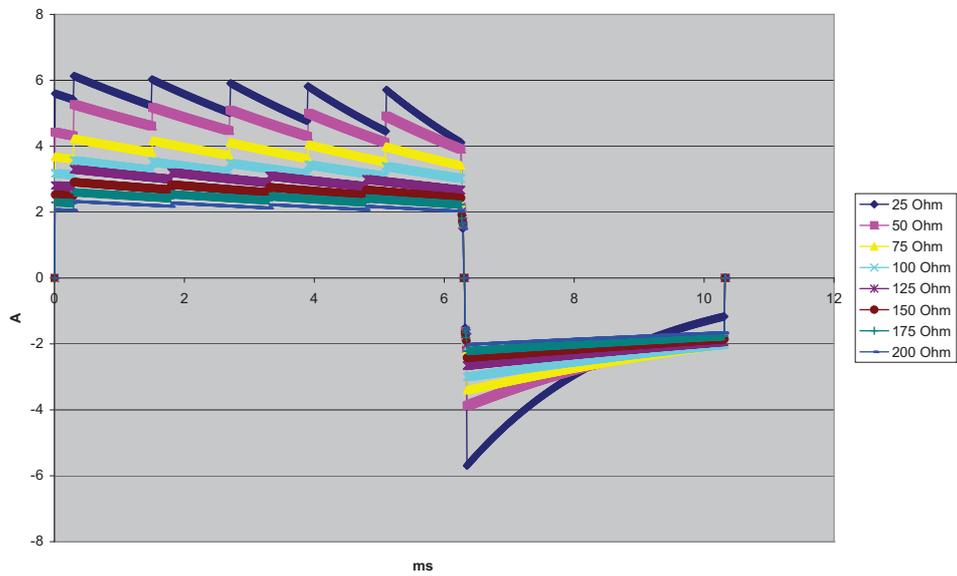


Abbildung A-13. Biphasischer Rechteckimpuls bei 8 J

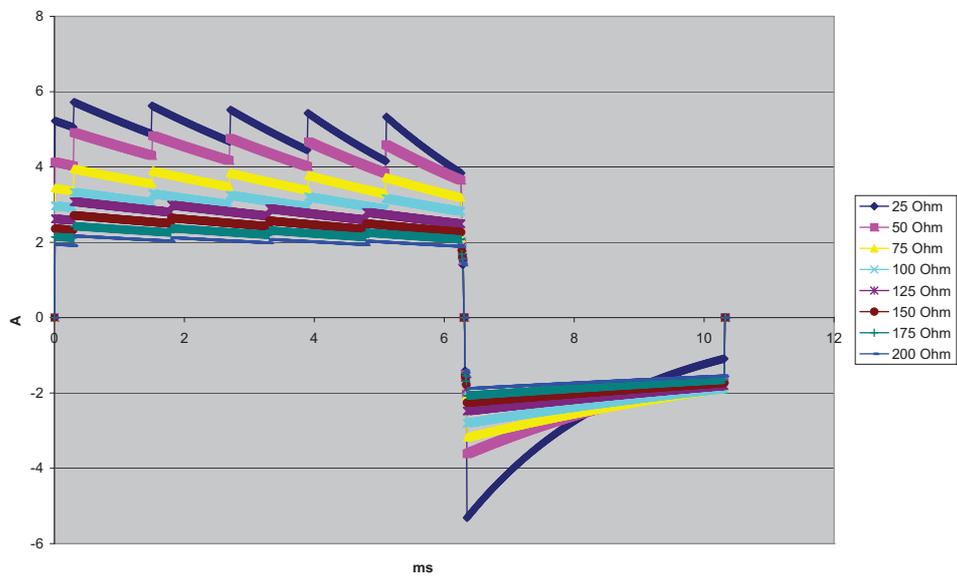


Abbildung A-14. Biphasischer Rechteckimpuls bei 7 J

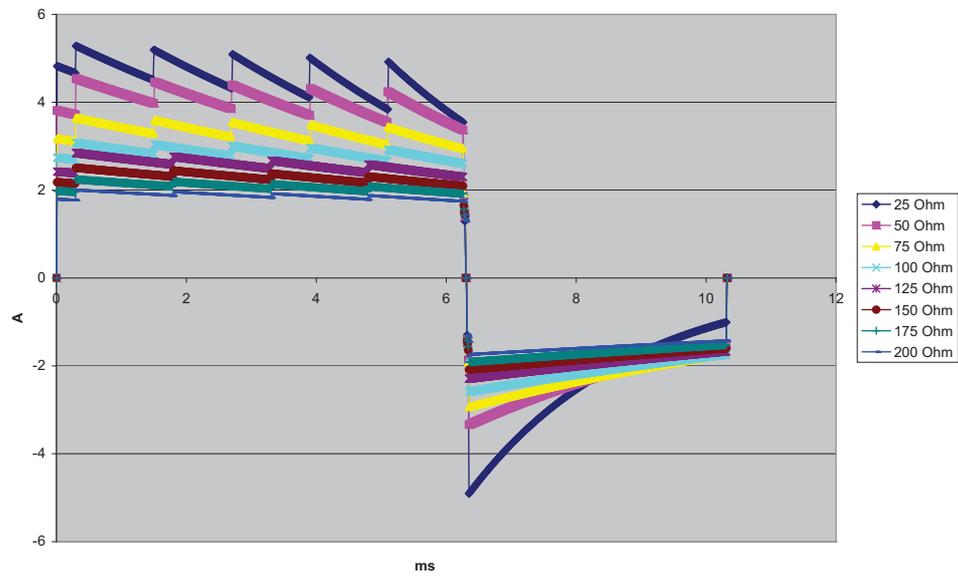


Abbildung A-15. Biphasischer Rechteckimpuls bei 6 J

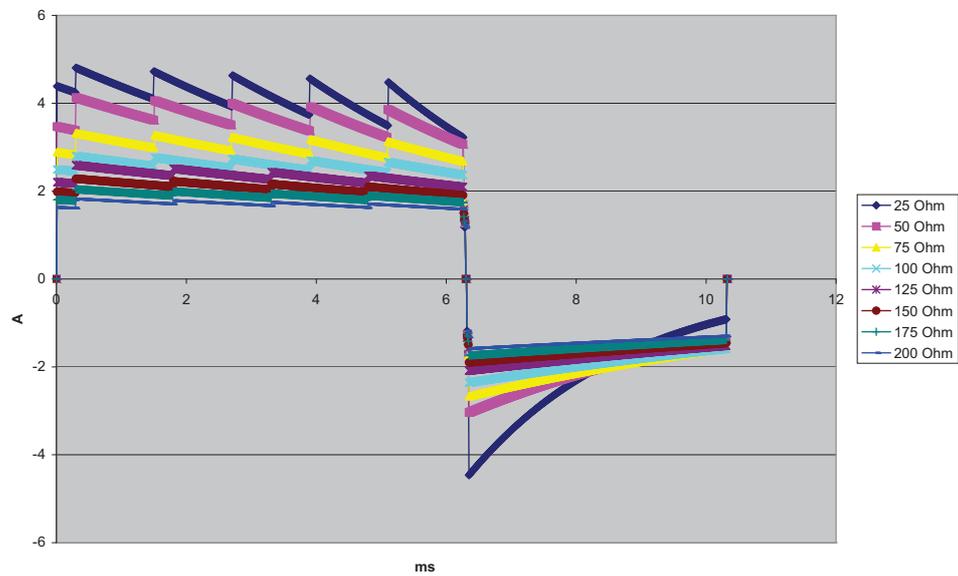


Abbildung A-16. Biphasischer Rechteckimpuls bei 5 J

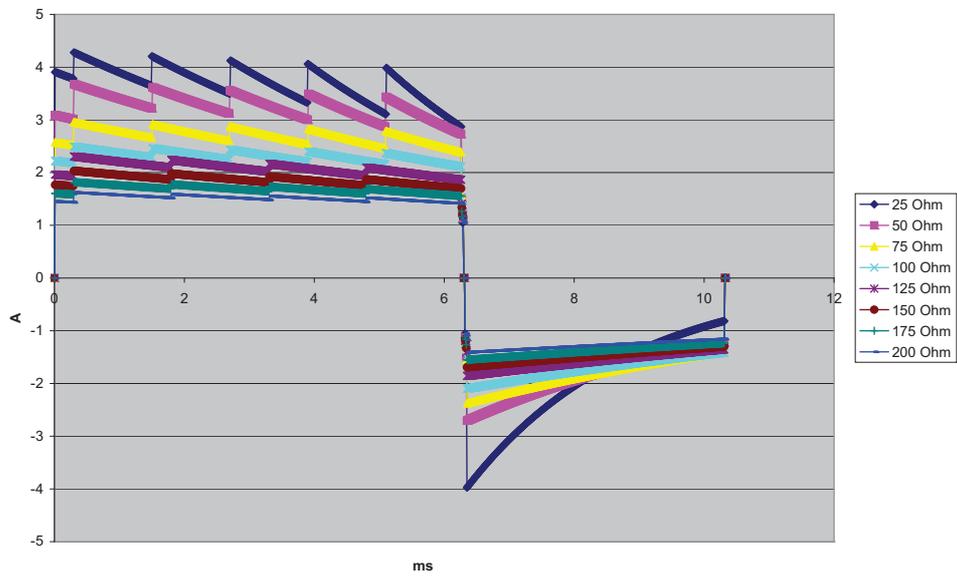


Abbildung A-17. Biphasischer Rechteckimpuls bei 4 J

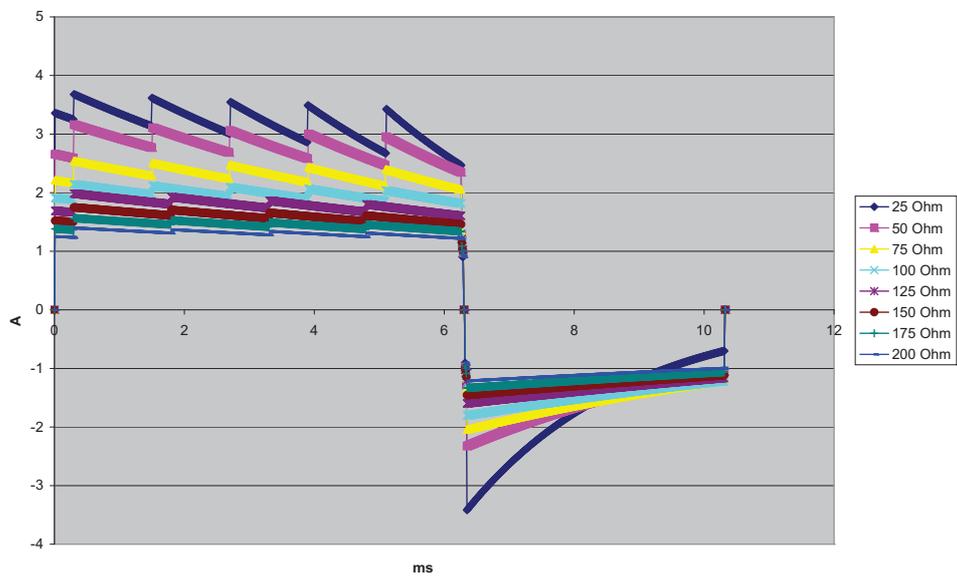


Abbildung A-18. Biphasischer Rechteckimpuls bei 3 J

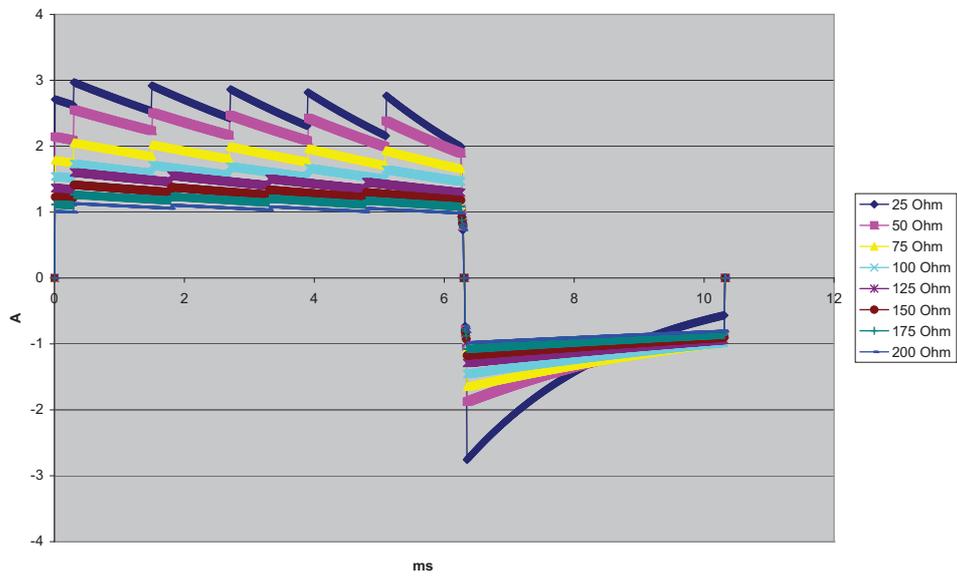


Abbildung A-19. Biphasischer Rechteckimpuls bei 2 J

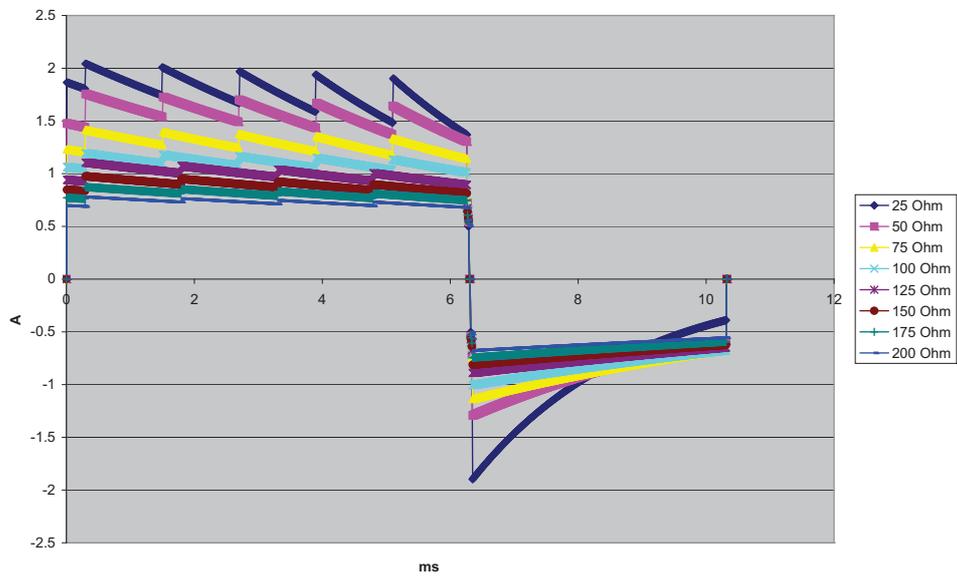


Abbildung A-20. Biphasischer Rechteckimpuls bei 1 J

Monitor/Display

Eingang: Patientenkabel mit 3, 5 oder 12 Ableitungen, Paddles oder Multifunktionselektroden

Typ: Farb-LCD, 640 x 480 Pixel, 800 mcd

Ablenkgeschwindigkeit: 25 mm/s oder 50 mm/s (vom Anwender wählbar)

Ableitungsoptionen: Paddles (Pads), I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1-6

Frequenzgang: (vom Anwender einstellbar)

0,67 bis 20 Hz im eingeschränkten Modus

0,67 bis 40 Hz im Überwachungsmodus

0,25 bis 40 Hz im gefilterten Diagnosemodus

0,05 bis 150 Hz im Diagnosemodus

Gemäß Methoden a, b und c von EC11 3.2.7.2.

(Legt automatisch den Bereich des Streifendruckers fest)

Unterdrückung des Gleichtaktmodus:

Entspricht AAMI EC13-2002, Abschnitt 4.2.9.10.

Unterdrückung von hohen, spitzen T-Wellen:

Entspricht AAMI EC13-2002, Abschnitt 4.1.2.1c für 0,9 mV

T-Welle (0,8 mV bei diagnostischem Bereich) und 1 mV QRS.

An Patientenverbindungen angelegte diagnostische Signale:

Vom Schaltkreis für die Erkennung fehlender Ableitungen und die aktive Rauschunterdrückung: $< 0,1 \mu\text{A}$ (=). Die Frequenz des Impedanz-/Atemfrequenz-Detektorsignals beträgt $72 \pm 7 \text{ kHz}$ bei $77 \mu\text{A}$ eff (Pseudo-Sinuskurve an 100Ω).

Herzfrequenzbereich: 30 bis 300 Schläge/min (bpm)

Angezeigte Herzfrequenz: Durchschnitt aus den letzten 5 Schlag-zu-Schlag-Intervallen

Herzfrequenzalarme: Vom Anwender wählbar

Größe: 0,125, 0,25, 0,5, 1, 2, 4 cm/mV und automatische Bereichsfestlegung

Reaktionszeit der Herzfrequenzmessung:

Reagiert auf eine schrittweise Erhöhung der Herzfrequenz um 40 Schläge/min innerhalb von 4,5 Sekunden gemäß AAMI EC-13-2002, Abschnitt 4.1.2.1.f. Reagiert auf eine schrittweise Verringerung um 40 Schläge/min innerhalb von 3,9 Sekunden gemäß AAMI EC-13-2002, Abschnitt 4.1.2.1.f. Reaktionszeit enthält ein Display-Aktualisierungsintervall von 1,0 s.

Herzfrequenzreaktion bei unregelmäßigem Rhythmus: (AAMI EC13-2002, Abschnitt 4.1.2.1.e.)

Ventrikulärer Bigeminus: 80 Schläge/min (Erwartungswert)

Langsam alternierender ventrikulärer Bigeminus: 60 Schläge/min (Erwartungswert)

Rasch alternierender ventrikulärer Bigeminus: 120 Schläge/min (Erwartungswert)

Bidirektionale Systole: 45 Schläge/min (Erwartungswert)

Tachykardie-Reaktionszeit:

Die Reaktionszeit auf den Tachykardie-Alarm beträgt durchschnittlich 3,4 Sekunden gemäß AAMI EC-13-2002, Abschnitt 4.1.2.1.g, und IEC 60601-2-27, Klausel 6.8.2.bb.7. Die Reaktionszeiten beinhalten ein Display-Aktualisierungsintervall von 1,0 s.

Schrittmacherimpulsunterdrückung:

(In Übereinstimmung mit AAMI EC13:2002, Abschnitt 4.1.4 und IEC 60601-2-27:2005, Unterabschnitt 50.103.13)

- Impulse ohne Overshoot: Unterdrückt alle Impulse mit einer Amplitude von +2 mV bis +700 mV und einer Dauer von 0,1 ms bis 2 ms, ohne Ausläufer.
- Impulse mit Overshoot: Unterdrückt alle Impulse mit einer Amplitude von +2 mV bis +700 mV und einer Dauer von 0,1 ms bis 2 ms, mit Overshoot bis zu 100 ms.
- Sequenzielle AV-Impulse: Sequenzielle AV-Schrittmacherimpulse können nicht unterdrückt werden.
- Schnelle EKG-Signale: Ungefähr 50 % der EKG-Eingangsimpulse mit einer Anstiegsflanke von 3 V/s RTI können den Schrittmacherimpuls-Detektor auslösen.

Schutz vor Elektrochirurgie: Das X Series Gerät ist für die Verwendung in der Elektrochirurgie geeignet. Schutz vor Verbrennungen über den in jedem EKG-Ableitungskabel enthaltenen stromstärkenbegrenzenden Widerstand von 1 kΩ.

Impedanzpneumographie

Angezeigte Daten: Atemfrequenz (numerisch), Impedanzkurve

Atemfrequenzbereich: Erwachsene, Kinder: 2 bis 150 Atemzüge/min
 Neugeborene: 3 bis 150 Atemzüge/min

Genauigkeit der Atemfrequenz: 2 %, mindestens aber ± 2 Atemzüge/min

Angezeigte Atemfrequenz: Durchschnitt aus den letzten 10 Atemzug-zu-Atemzug-Intervallen

Ableitungen: Ableitung I (RA – LA), Ableitung II (RA – LL)

Ablenkgeschwindigkeit: 3,13, 6,25, 12,5 mm/s

Alarmeinstellungen: Alarm bei hoher und niedriger Atemfrequenz sowie bei Apnoe

Alarme

Herzfrequenzalarme:

Akustisch: 5 Pulssignale, 900-Hz-Ton, mit einer Pulssignalbreite von 125 ms, einem Pulswiederholungsintervall von 250 ms und einem Wiederholungsintervall von 15 s

Optisch: Herzfrequenzalarme bewirken, dass die Herzfrequenz rot auf weißem Untergrund angezeigt wird.

Die rote Gerätestatus-LED blinkt mit einer Frequenz von 1,7 Hz.

Ableitungsfehler-Alarm:

Akustisch: 3 Pulssignale, 500-Hz-Triplet-Ton mit einer Pulssignalbreite von 200 ms und einem Pulswiederholungsintervall von 200 ms. Das Wiederholungsintervall für den Ableitungsfehler-Signalton beträgt 30 s.

Optisch: Bei einem Ableitungsfehlerzustand wird auf der Kurve die Meldung LEAD-FEHLER zusammen mit einer gestrichelten Linie über die gesamte Kurvenbreite angezeigt.

Physiologische Alarme (NIBD, SpO₂, Resp, CO₂, IP und Temp):

Akustisch: Entspricht dem Herzfrequenzalarm

Optisch: Bei physiologischen Alarmen wird der den Alarm auslösende Parameter rot auf weißem Untergrund angezeigt. Die rote Gerätestatus-LED blinkt mit einer Frequenz von 1,7 Hz.

Stummschaltungsdauer: 90 s

Alarmton bei unzulässiger Funktion:

Es ertönt ein kurzes Signal niedriger Tonhöhe, wenn eine gewählte Bedienungstaste nicht verfügbar ist oder eine ungültige Eingabe erkannt wird. Die Tonfrequenz beträgt 160 Hz. Die Dauer beträgt 250 ms.

Verzögerungen (Vorhaltezeit):

Herzfrequenz/Pulsfrequenz:

- Bei EKG als Quelle: 5 s
- Bei SpO₂ als Quelle: 10 s
- Bei IBD als Quelle: 5 s
- Bei NIBD als Quelle: keine Vorhaltezeit

SpO₂, SpCO und SpMet (Methämoglobinsättigung): 10 s

EtCO₂: 7 s

FiCO₂: 5 s

IBD (systolisch, diastolisch, Mittelwert): 2 s

Temperatur: 2 s

Registrierer

Typ: Hochauflösendes Thermo-Array

Information: Uhrzeit, Datum, EKG-Ableitung, EKG-Verstärkung, Herzfrequenz, Defibrillations- und Stimulationsparameter, Behandlungsübersichts-Ereignisse

Papierbreite: 80 mm.

Papiergeschwindigkeit: 25 mm/s, 50 mm/s

Verzögerung: 6 s

Frequenzgang: Automatisch auf den Frequenzgang des Monitors eingestellt

Behandlungsübersicht:

10 Tasten für die Aufzeichnung von ACLS-Schlüsselereignissen (IV, INTUB, EPI, LIDO, ATROP usw.).

Protokolliert im Speicher automatisch Art des Ereignisses, Uhrzeit und EKG-Auszug.

Patientendaten-Protokoll: Eine Kombination aus 24 Stunden an Trenddaten in 1-minütigen Intervallen, 1000 mit einem Zeitstempel versehenen Ereignissen und 32 Snapshots, darunter Überwachungs-, Defibrillator-, Schrittmacher- und Behandlungs-Snapshots. Die tatsächlich gespeicherte Anzahl an Trenddaten, Ereignissen und Snapshots kann je nach Nutzungsprofil größer oder kleiner sein.

Aufzeichnungsmodi: Manuell und automatisch (vom Anwender konfigurierbar)

Akku

Typ: Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku, 11,1 V (=), 6,6 Ah, 73 Wh

Kapazität:

Mit neuem, vollständig geladenem Akku bei Raumtemperatur:

- Mindestens 6 Stunden ununterbrochene Überwachung von EKG, SpO₂, CO₂, drei Kanälen für invasive Druckmessungen und 2 Temperaturkanälen, mit NIBD-Messungen alle 15 Minuten und 10 Schocks mit je 200 J (Display-Einstellung bei 30 %).
- Mindestens 100 Defibrillatorentladungen bei maximaler Schockenergieabgabe (200 J).
- Mindestens 3,5 Stunden Stimulation mit EKG, SPO₂, CO₂, drei invasiven Drücken, Temperatur, NIBD alle 15 Minuten sowie Stimulation mit 180 Impulsen pro Minute (ppm) und 140 mA.
- Mindestens 10 Defibrillatorentladungen bei maximaler Schockeinstellung (200 J) nach einer „Batterie schwach“-Anzeige.

Hinweis: Zur Erhaltung der maximal verfügbaren Kapazität ist eine ordnungsgemäße Akkupflege erforderlich.

Akkuanzeigen:

5 Akkukapazitäts-LEDs, Fehleranzeige, Rekalibrierungsanzeige

Wiederaufladungsrate: 100 % in 4 Stunden, wenn die Aufladung bei der „Batterie schwach“-Anzeige eingeleitet wird

Allgemeines

Gewicht:

4,81 kg ohne Akku und Papier

5,31 kg mit Akku und Papier

Abmessungen:

Ohne Griff: 22,6 cm x 22,2 cm x 20,1 cm

Mit Griff: 22,6 cm x 26,4 cm x 20,1 cm

Betrieb:

Temperatur: 0 °C bis 50 °C

Luftfeuchtigkeit: 15 % bis 95 %, nicht kondensierend

Schwingungen:

- EN ISO 9919 (über IEC 60068-2-64)
- RTCA/DO-160G (multiple Helikopterfrequenzen)
- EN 1789 für Krankenwagen

Stoß: IEC 60068-2-27, 100 g, 6ms Halbsinus

Fall: EN 1789, 30 Zoll funktioneller Fall

IEC 60601-1, getestet bei 2 Metern

Zulässige Einsatzhöhe: -170 m bis 4572 m (-557 Fuß bis 15.000 Fuß)

Transport und Lagerung:

Temperatur: -30 °C bis 70 °C

Note: Das X Series Gerät arbeitet möglicherweise nicht innerhalb seiner Spezifikationen, wenn es bei der zulässigen Höchst- bzw. Tiefsttemperatur gelagert wurde und dann sofort in Betrieb genommen wird.

Luftfeuchtigkeit: 15 % bis 95 %, nicht kondensierend

Luftdruck: 572 mbar bis 1034 mbar

Stoß/Schwingungen: MIL STD 810G, Methode 514.6, 4.4.2, Prozedur II

Sicherheitsklassifizierung: Klasse 1 und interne Stromversorgung gemäß IEC/EN 60601-1

Schutzgrad des Gehäuses:

Eindringen von Fremdkörpern: IEC 60529, IP5X

Eindringen von Wasser: IEC 60529, IPX5

Externe Stromversorgung:

Externes Netzteil, 8300-0004

Eingang: 100 V bis 240 V \curvearrowright 50 Hz bis 60 Hz, 2 A

100 V bis 115 V \curvearrowright 400 Hz, 2 A

Ausgang: 14,5 V --- 4,15 A

80 W (Spitze)

Schutzgrad: IP23

Schrittmacher

Typ: Externe transkutane Stimulation

Schrittmacherfrequenz: 30 bis 180 Impulse pro Minute (ppm) \pm 1,5 %

Ausgangsstrom: 0 bis 140 mA \pm 5 % oder 5 mA (es gilt der größere Wert)

Modi: Bedarfs-Modus und Festfrequenz-Modus

Statusanzeigen:

EKG-Ableitungsfehler, Schrittmachermarkierungen auf dem Monitor und dem Protokollstreifen, Start-/Stopp-Anzeige im Display.

Impulstyp: Rechteckimpuls, konstanter Strom

Impulsdauer: 40 ms \pm 2 ms

CO₂

Bereich: 0 bis 150 mmHg

CO₂-Genauigkeit:

CO ₂ -Partialdruck*	Genauigkeit **
0 bis 38 mmHg	\pm 2 mmHg
39 bis 99 mmHg	\pm (5 % des Messwerts + 0,08 % für jedes 1 mmHg über 38 mmHg)
100 bis 150 mmHg	\pm (5 % des Messwerts + 0,08 % für jedes 1 mmHg über 38 mmHg)

* Bei Normalnull

** Genauigkeit gilt für Atemfrequenzen bis zu 80 Atemzüge pro Minute. Bei Atemfrequenzen über 80 Atemzüge pro Minute beträgt die Genauigkeit für EtCO₂-Werte, die 18 mmHg überschreiten, 4 mmHg oder \pm 12 % des Messwerts. Dies wurde gemäß und in Übereinstimmung

mit ISO 21647 getestet. Um die angegebenen Genauigkeiten für Atemfrequenzen über 60 Atemzüge pro Minute zu erzielen, muss das Microstream FilterLine H Set für Säuglinge/Neugeborene verwendet werden. Über 40 °C muss zur Toleranz der angegebenen Genauigkeit ± 1 mmHg, mindestens aber $\pm 2,5$ % addiert werden.

Abweichung der Messgenauigkeit: Die voranstehend angeführten Genauigkeitsansprüche werden über einen beliebigen 24-stündigen Zeitraum beibehalten.

Die angegebene Genauigkeit wird für die folgenden Gasgemische (alle Werte in Volumenprozent) innerhalb von 4 % beibehalten.

CO ₂	N ₂	O ₂	N ₂ O	H ₂ O	Anästhetika
1,0 bis 13	0 bis 97,5	0 bis 100	0 bis 80	Trocken bis gesättigt	Gemäß EN 21647

Atemfrequenzbereich: 0 bis 149 Atemzüge pro Minute

Atemfrequenz-Genauigkeit:

0 bis 70 Atemzüge/min: ± 1 Atemzug/min

71 bis 120 Atemzüge/min: ± 2 Atemzüge/min

121 bis 149 Atemzüge/min: ± 3 Atemzüge/min

Flussrate: 50 ml/min $-7,5/+15$ ml/min (nach Volumen gemessener Fluss)

Systemgesamtreaktionszeit: Typisch: 2,9 Sekunden / Maximum: 3,9 Sekunden

Pulsoxymetrie

Bereich:	Sauerstoffsättigung (% SpO ₂)	1 % bis 100 %
	Carboxyhämoglobinsättigung (% SpCO)	0 % bis 99 %
	Methämoglobinsättigung (% SpMet)	0 % bis 99 %
	Pulsfrequenz (Schläge/min.)	25 bis 240 Schläge/min.

Genauigkeit: Sauerstoffsättigung (% SpO₂) – Messung in Ruhe

Erwachsene/Kinder ¹	70 % bis 100 %: ± 2 Stellen / 0 % bis 69 %: nicht spezifiziert
Neugeborene ²	70 % bis 100 %: ± 3 Stellen / 0 % bis 69 %: nicht spezifiziert

Sauerstoffsättigung (% SpO₂) – Messung in Bewegung³

Erwachsene/Kinder	70 % bis 100 %: ± 3 Stellen / 0 % bis 69 %: nicht spezifiziert
Neugeborene	70 % bis 100 %: ± 3 Stellen / 0 % bis 69 %: nicht spezifiziert

Sauerstoffsättigung (% SpO₂) – Bei geringer Perfusion⁴

Erwachsene/Kinder	70 % bis 100 %: ± 2 Stellen
Neugeborene	70 % bis 100 %: ± 3 Stellen

Carboxyhämoglobinsättigung (% SpCO) ⁵	1 % bis 40 %: ± 3 Stellen
Methämoglobinsättigung (% SpMet) ⁵	1 % bis 15 %: ± 1 Stelle

Pulsfrequenz (Schläge/min) – Messung in Ruhe¹

Erwachsene/Kinder/Neugeborene	25 bis 240 ± 3 Stellen
-------------------------------	----------------------------

Pulsfrequenz (Schläge/min) – Messung in Bewegung³

Erwachsene/Kinder/Neugeborene	25 bis 240 ± 5 Stellen
-------------------------------	----------------------------

Auflösung: SpO₂: 1%
SpCO: 1%
SpMet: 0,1 % (bis 9,9 %) bzw. 1 % (10 % bis 99 %)
Pulsfrequenz: 1 bpm (Schlag pro Minute)

Alarmgrenzwerte: Ein/Aus am Monitor angezeigt. Vom Anwender wählbar.
SpO₂: Oberer Grenzwert: 72 % bis 100 % Sättigung /
Unterer Grenzwert: 70 % bis 98 % Sättigung
SpCO: Oberer Grenzwert: 2 % bis 100 % Sättigung /
Unterer Grenzwert: 0 % bis 99 % Sättigung
SpMet: Oberer Grenzwert: 1 % bis 100 % Sättigung /
Unterer Grenzwert: 0 % bis 99 % Sättigung
Pulsfrequenz: Oberer Grenzwert: 60 bis 235 Schläge/min /
Unterer Grenzwert: 20 bis 100 Schläge/min

SpO₂ – Wellenlänge für LNCS-Sensoren:

Nennwellenlänge der Rotlicht-LED: 660 nm
Nennwellenlänge der Infrarotlicht-LED: 905 nm

**Energie (Strahlungsleistung) des vom
LNCS-Sensor ausgestrahlten Lichts bei 50 mA (gepulst):**
≤ 15 mW

SpO₂ – Wellenlänge für Rainbow-Sensoren:

**Die Rainbow-Sensoren verwenden 8 verschiedene LEDs mit Wellenlängen
zwischen 610 nm und 905 nm.**

**Energie (Strahlungsleistung) des vom
Rainbow-Sensor ausgestrahlten Lichts bei 100 mA (gepulst):**
≤ 25 mW

Biokompatibilität:

Material mit Patientenkontakt erfüllt die Anforderungen von ISO 10993-1,
Biologische Beurteilung von Medizinprodukten, Teil 1, für externe
Anwendung, intakte Oberflächen und kurzzeitige Exposition.

Umgebungsbedingungen:

Betriebstemperatur: 0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F)
Lagertemperatur: –40 °C bis 70 °C (–40 °F bis 158 °F)

Hinweis: Das X Series Gerät arbeitet möglicherweise nicht innerhalb seiner
Spezifikationen, wenn es bei der zulässigen Höchst- bzw. Tiefsttemperatur
gelagert wurde und dann sofort in Betrieb genommen wird.

Elektromagnetische Störfestigkeit (nur SpO₂-Option):

AAMI DF-80; EN61000-4-3:2002 bis 10 V/m

Hinweis: Die Pulsoxymetrieoption des X Series Geräts ist für funktionale Sättigung kalibriert.

1 Die Masimo SET-Technologie mit LNOP-Sensoren wurde hinsichtlich der Genauigkeit bei Messungen in Ruhe in Humanblut-Studien an gesunden erwachsenen Freiwilligen mittels induzierter Hypoxien von 70 % bis 100 % SpO₂ anhand eines Labor-CO-Oxymeters und eines EKG-Monitors validiert.

2 Die Masimo SET-Technologie mit LNOP-Sensoren wurde hinsichtlich der Genauigkeit bei Messungen in Ruhe in Humanblut-Studien an gesunden erwachsenen Freiwilligen mittels induzierter Hypoxien von 70 % bis 100 % SpO₂ anhand eines Labor-CO-Oxymeters und eines EKG-Monitors validiert. Zur Sättigungsgenauigkeit wurde 1 % hinzuaddiert, um die Effekte des fötalen Hämoglobins zu berücksichtigen. Diese Abweichung entspricht der einfachen Standardabweichung (plus oder minus), was 68 % der Bevölkerung abdeckt.

3 Die Masimo SET-Technologie mit LNOP-Sensoren wurde hinsichtlich der Genauigkeit bei Messungen in Bewegung in Humanblut-Studien an gesunden erwachsenen Freiwilligen mittels induzierter Hypoxien während der Ausführung von Reib- und Klopfbewegungen von 2 bis 4 Hz bei einer Amplitude von 1 bis 2 cm und einer einmaligen Bewegung von 1 bis 5 Hz bei einer Amplitude von 2 bis 3 cm in Untersuchungen mit induzierten Hypoxien von 70 % bis 100 % SpO₂ anhand eines Labor-CO-Oxymeters und eines EKG-Monitors validiert. Zur Sättigungsgenauigkeit wurde 1 % hinzuaddiert, um die Effekte des fötalen Hämoglobins zu berücksichtigen. Diese Abweichung entspricht der einfachen Standardabweichung (plus oder minus), was 68 % der Bevölkerung abdeckt.

4 Die Masimo SET-Technologie wurde hinsichtlich der Genauigkeit bei geringer Perfusion in Labortests anhand eines Biotek Index 2-Simulators und eines Masimo-Simulators mit Signalstärken von mehr als 0,02 % und einer prozentualen Übertragung 5 % für Sättigungen zwischen 70 % und 100 % validiert. Diese Abweichung entspricht der einfachen Standardabweichung (plus oder minus), was 68 % der Bevölkerung abdeckt.

5 Die Masimo SET Rainbow-Technologie mit Rainbow DC-dc-Sensoren wurden in Humanblut-Studien an gesunden erwachsenen Freiwilligen anhand eines Labor-CO-Oxymeters innerhalb eines Sättigungsbereichs von 1 % bis 40 % (SpCO) bzw. von 1 % bis 15 % (SpMet) validiert. Diese Abweichung entspricht der einfachen Standardabweichung (plus oder minus), was 68 % der Bevölkerung abdeckt.

Nichtinvasive Blutdruckmessung

Technik: Nichtinvasive oszillometrische Methode

Betriebsmodi: Automatisch und manuell

Automatische Intervalle: 1-, 2-, 3-, 5-, 10-, 15-, 30- und 60-Minuten-Intervalle

TurboCuf: Maximal zulässige Messungen in einem 5-minütigen Zeitraum

Druckmessbereich:

Systolisch: 20 bis 260 mmHg

Diastolisch: 10 bis 220 mmHg

Mittelwert: 13 bis 230 mmHg

Statische Druckgenauigkeit: ± 3 mmHg

Pulsfrequenzbereich:

Erwachsene: 30 bis 200 ± 5 Schläge/min

Kinder: 30 bis 200 ± 5 Schläge/min

Neugeborene: 35 bis 220 ± 5 Schläge/min

Standard-Manschettenfülldruck:

Erwachsene: 160 mmHg

Kinder: 120 mmHg

Neugeborene: 90 mmHg

Maximaler Manschettenfülldruck:

Erwachsene: 270 mmHg

Kinder: 170 mmHg

Neugeborene: 130 mmHg

Einzelfehler-Überdruckgrenzwert bei Stauungen:

Erwachsene: 308 mmHg

Kinder: 205 mmHg

Neugeborene: 154 mmHg

Typische Bestimmungszeit ohne Artefakte:

Messungen beim Ablassen: 30 bis 45 s

Messungen beim Füllen (SureBP)*: 15 bis 30 s

* mittels Doppellumen-Manschetten

Maximale Bestimmungszeit – Messung beim Füllen

Erwachsene: 150 s

Kinder: 120 s

Neugeborene: 80 s

Bestätigung des Blutdrucks:

Die mit diesem Gerät erzielten Blutdruckmessungen entsprechen innerhalb der vom American National Standards Instituts (ANSI-AAMI SP10) vorgegebenen Grenzwerte den Blutdruckmessungen, die von einem ausgebildeten Arzt mittels der auskultatorischen Methode mit Manschette und Stethoskop bei Erwachsenen und Kindern gemessen werden, sowie denen intraarterieller Blutdruckmessungen bei Neugeborenen. Der Bericht mit den AAMI SP10-Ergebnissen ist beim technischen Kundendienst von ZOLL erhältlich.

Invasive Drücke

Anzahl der Kanäle: 3

Druckbereich: -30 bis 300 mmHg

Druckgenauigkeit: ± 2 mmHg, mindestens aber 2 % des Messwerts (plus Wandlerfehler)

Pulsfrequenzbereich: 25 bis 250 Schläge/min

Pulsfrequenz-Genauigkeit: ± 3 Schläge/min, mindestens aber ± 3 % des Werts

Angezeigte Pulsfrequenz: Durchschnitt aus den letzten 4 Schlag-zu-Schlag-Intervallen

Nullabgleich: ± 200 mmHg

Wandler:

Empfindlichkeit: $5 \mu\text{V/V/mmHg}$

Versatz: ± 125 mmHg (einschließlich Wandlerersatz)

Anregungsimpedanzbereich: 150 bis 10.000 Ohm

Anregungsspannung: $4,75 \pm 0,25$ V (=)

Stecker: MS3100 Serie (6-polig, rund)

Steckerstift:	A	B	C	D	E
Belegung	Sig (-)	Exc (+)	Sig (+)	Exc (-)	Abschirmung

Temperatur

Anzahl der Kanäle: 2

Messbereich: 0 °C bis 50 °C

Genauigkeit:

± 0,1 °C (von 10 °C bis 50 °C)

± 0,2 °C (von 0 °C bis 10 °C)

Auflösung: 0,1 °C

Maßeinheit: Grad Fahrenheit oder Grad Celsius

Temperatur-Anzeigesignal: 20 Hz, keine Mittelwertbildung

Sonde: YSI 400 und 700 Serie

Anzeige: T1, T2, ΔT

Mindestmesszeit: Der Gebrauchsanleitung der Sonden können Sie die für genaue Ergebnisse einzuhaltenen Mindestmesszeiten entnehmen. Die Ermittlung genauer Messergebnisse wird durch das X Series Gerät nicht klinisch relevant verzögert.

Ergebnisse klinischer Studien zur biphasischen Kurvenform

Die Wirksamkeit des biphasischen Rechteckimpulses von ZOLL wurde im Rahmen einer Studie zur Defibrillation von Kammerflimmern (VF) und ventrikulärer Tachykardie (VT) klinisch geprüft. Eine Machbarkeitsstudie wurde zunächst für die Defibrillation von VF/VT (n = 20) an zwei unterschiedlichen Patientengruppen durchgeführt, um Kurvenform-Sicherheit und Energiewahl zu bestimmen. Anschließend wurde eine separate multizentrische randomisierte klinische Studie durchgeführt, um die Wirksamkeit der Kurvenform zu überprüfen. Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung dieser Studie. Die Studie wurde mit Hilfe der ZOLL Defibrillationssysteme, bestehend aus ZOLL Defibrillatoren, biphasischem Rechteckimpuls von ZOLL und den ZOLL Defibrillationselektroden durchgeführt.

Randomisierte multizentrische klinische Studie zur Defibrillation von Kammerflimmern (VF) und ventrikulärer Tachykardie (VT)

Überblick: Die Defibrillationseffizienz des biphasischen Rechteckimpulses von ZOLL im Vergleich zu einem MDS-Schock wurde im Rahmen einer prospektiven randomisierten multizentrischen Studie an Patienten verglichen, bei denen während elektrophysiologischer Studien, ICD-Implantationen und Tests aufgetretene VF/VT-Episoden mit ventrikulärer Defibrillation behandelt wurden. Insgesamt nahmen 194 Patienten an der Studie teil. Zehn Patienten, die die Protokollkriterien nicht erfüllten, wurden von der Analyse ausgeschlossen, so dass die Studienpopulation 184 Patienten umfasste.

Ziele: Das primäre Ziel dieser Studie war es, die Wirksamkeit des ersten Schocks des biphasischen 120-J-Rechteckimpulses mit einer monophasischen 200-J-Kurvenform zu vergleichen. Das sekundäre Ziel war der Vergleich der Wirksamkeit aller Schocks (drei aufeinanderfolgende Schocks von 120, 150 und 170 J) des biphasischen Rechteckimpulses mit der einer monophasischen Kurvenform (drei aufeinanderfolgende Schocks von 200, 300 und 360 J). Ein Signifikanzniveau von $p = 0,05$ oder weniger wurde für den Fisher-Yates-Test als statistisch signifikant angesehen. Die Unterschiede zwischen den beiden Kurvenformen wurden ebenfalls als statistisch signifikant angesehen, wenn das übliche 95-%-Konfidenzintervall oder das von der AHA empfohlene 90-%¹-Konfidenzintervall zwischen diesen beiden Kurvenformen größer als 0 % war.

Ergebnisse: Die Studienpopulation von 184 Patienten besaß ein Durchschnittsalter von 63 ± 14 Jahren. Von diesen Patienten waren 143 Patienten männlich. 98 Patienten waren der biphasischen Gruppe zugeordnet (Kammerflimmern/-flattern, n = 80, ventrikuläre Tachykardie, n = 18), 86 Patienten waren der monophasischen Gruppe zugeordnet (Kammerflimmern/-flattern, n = 76, ventrikuläre Tachykardie, n = 10). Es traten keine Nebenwirkungen oder Verletzungen im Zusammenhang mit der Studie auf.

1.Kerber RE, et al. Automated External Defibrillators for Public Access Defibrillation: Recommendations for Specifying and Reporting Arrhythmia Analysis Algorithm Performance, Incorporating New Waveforms, and Enhancing Safety. *Circ J Am Heart Assoc.* 1997;95:1677–82.

....the task force suggests that to demonstrate superiority of an alternative waveform over standard waveforms, the upper boundary of the 90% confidence interval of the difference between standard and alternative waveforms must be $< 0\%$ (i.e., alternative is greater than standard).“ [...] die Experten sind der Auffassung, dass zur Demonstration der Überlegenheit einer alternativen Kurvenform gegenüber einer Standardkurvenform die Obergrenze des 90-%-Konfidenzintervalls der Differenz zwischen Standard- und alternativer Kurvenform $< 0\%$ sein muss (d. h. alternativer Wert ist größer als Standardwert).“]

Die Wirksamkeit des ersten Schocks betrug bei biphasischem 120-J-Schock 99 % gegenüber 93 % bei monophasischem 200-J-Schock ($p = 0,0517$, 95%-Konfidenzintervall der Differenz: -2,7 % bis 16,5 %, 90%-Konfidenzintervall der Differenz: -1,01 % bis 15,3 %).

	Monophasisch	Biphasisch
Wirksamkeit des ersten Schocks	93%	99%
p-Wert	0.0517	
95%-Konfidenzintervall	-2,7 % bis +16,5 %	
90%-Konfidenzintervall	-1,01 % bis 15,3 %	

Für die erfolgreiche Defibrillation mit dem biphasischen Rechteckimpuls musste eine um 58 % niedrigere Stromstärke abgegeben werden als bei monophasischen Schocks (14 ± 1 A gegenüber 33 ± 7 A, $p = 0,0001$).

Die Differenz der Wirksamkeit zwischen biphasischen und monophasischen Schocks war bei Patienten mit hoher transthorakaler Impedanz (mehr als 90 Ohm) größer. Die Wirksamkeit des ersten Schocks betrug bei Patienten mit hoher Impedanz bei biphasischem Schock 100 % gegenüber 63 % bei monophasischem Schock ($p = 0,02$, 95%-Konfidenzintervall der Differenz: -0,021 % bis 0,759 %, 90%-Konfidenzintervall der Differenz: 0,037 % bis 0,706 %).

	Monophasisch	Biphasisch
Wirksamkeit des ersten Schocks (Patienten mit hoher Impedanz)	63%	100%
p-Wert	0.02	
95%-Konfidenzintervall	-0,021 % bis 0,759 %	
90%-Konfidenzintervall	0,037 % bis 0,706 %	

Ein einziger Patient benötigte einen zweiten biphasischen Schock von 150 J, um 100 % Wirksamkeit zu erreichen. Dagegen waren bei sechs Patienten monophasische Schocks von bis zu 360 J erforderlich, um 100 % Defibrillationswirksamkeit zu erzielen.

Schlussfolgerung: Die Daten belegen bei allen Patienten innerhalb des 95%-Konfidenzintervalls eine vergleichbare Wirksamkeit von biphasischen Schocks mit geringer Energie und standardmäßigen monophasischen Schocks mit hoher Energie für die transthorakale Defibrillation. Die Daten belegen außerdem bei Patienten mit hoher transthorakaler Impedanz innerhalb des 90%-Konfidenzintervalls die überlegene Wirksamkeit von biphasischen Schocks mit geringer Energie gegenüber standardmäßigen monophasischen Schocks mit hoher Energie. Es gab keine unsicheren Behandlungsergebnisse oder Nebenwirkungen aufgrund der Verwendung des biphasischen Rechteckimpulses.

Randomisierte multizentrische klinische Studie zur Kardioversion von Vorhofflimmern (AF)

Überblick: Die Defibrillationswirksamkeit des biphasischen Rechteckimpulses von ZOLL wurde mit einem MDS-Schock im Rahmen einer prospektiven randomisierten multizentrischen Studie an Patienten verglichen, bei denen eine Kardioversion des Vorhofflimmerns durchgeführt wurde. An der Studie haben insgesamt 173 Patienten teilgenommen. Sieben (7) Patienten, die die Protokollkriterien nicht erfüllten, wurden von der Analyse ausgeschlossen. Für diese Studie wurden ausschließlich die Einweg-Gelelektroden von ZOLL mit einer Oberfläche von 78 cm² (ventral) und 113 cm² (dorsal) verwendet.

Ziel: Das primäre Ziel dieser Studie war ein Vergleich der Wirksamkeit von vier aufeinanderfolgenden biphasischen Rechteckimpulsen (70 J, 120 J, 150 J und 170 J) mit vier aufeinanderfolgenden monophasischen Schocks (100 J, 200 J, 300 J und 360 J). Die statistische Auswertung der Signifikanz der Effizienz von mehreren Schocks erfolgte mittels zweier Verfahren: Mantel-Haenszel-Test und Log-Rank-Test; dabei wurde ein Signifikanzniveau von $p = 0,05$ oder weniger als statistisch signifikant angesehen. Die Daten entsprachen vollständig denen eines Vergleichs von zwei Überlebenskurven, die mit Hilfe der Life-Table-Methode erstellt wurden, wobei die Zahl der Schocks die Rolle der Zeit übernimmt.

Das sekundäre Studienziel bestand im Vergleich des ersten erfolgreichen Schocks mit biphasischen Rechteckimpulsen und monophasischen Impulsformen. Ein Signifikanzniveau von $p = 0,05$ oder weniger wurde für den Fisher-Yates-Test als statistisch signifikant angesehen. Die Unterschiede zwischen den beiden Kurvenformen wurden ebenfalls als statistisch signifikant angesehen, wenn das 95%-Konfidenzintervall für den Unterschied zwischen diesen beiden Kurvenformen größer als 0 % war.

Ergebnisse: Die Studienpopulation von 165 Patienten besaß ein Durchschnittsalter von 66 ± 12 Jahren, wobei 116 Patienten männlich waren.

Die Gesamtwirksamkeit von aufeinanderfolgenden biphasischen Rechteckimpulsen war signifikant größer als die von monophasischen Schocks. In der folgenden Tabelle werden die Kaplan-Meier-(Produktgrenzen)-Überlebenskurven für jede der beiden Impulsformen angezeigt. Da alle Patienten im Fehlermodus beginnen, beziehen sich die geschätzten Life-Table-Wahrscheinlichkeiten auf die Wahrscheinlichkeit, dass der Fehler auch nach dem k-ten Schock ($k = 1,2,3,4$) noch vorliegt:

Tabelle A-3. Kaplan-Meier-Schätzung für die Wahrscheinlichkeit eines Schockversagens

Schocknummer	Biphasisch	Monophasisch
0	1,000	1,000
1	0,318	0,792
2	0,147	0,558
3	0,091	0,324
4	0,057	0,208

Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, ist das biphasische Verfahren über den gesamten Verlauf der verabreichten Schocks überlegen. Der Chi-Quadrat-Wert (ein Freiheitsgrad) für den Mantel-Haenszel-Test beträgt 30,39 ($p < 0,0001$). Das Ergebnis des Log-Rank-Tests, ebenfalls ein Chi-Quadrat-Test mit einem Freiheitsgrad, ist ähnlich und beträgt 30,38 ($p < 0,0001$). Die verbleibende Zahl der Patienten, die nach vier Schocks nicht erfolgreich behandelt waren, liegt bei 5,7 % bei biphasischen im Vergleich zu 20,8 % bei monophasischen Schocks.

Es gab einen deutlichen Unterschied zwischen der Wirksamkeit des ersten Schocks bei biphasischen 70-J-Schocks (68 %) und bei monophasischen 100-J-Schocks (21 %) ($p = 0,0001$, 95-%-Konfidenzintervall des Unterschieds: 34,1 % bis 60,7 %).


Die erfolgreiche Kardioversion mit dem biphasischen Rechteckimpuls wurde mit einer um 48 % geringeren Stromstärke erreicht als mit monophasischen Schocks (11 ± 1 A gegenüber 21 ± 4 A, $p < 0,0001$).

Bei der Hälfte der Patienten, bei denen die Kardioversion nach vier aufeinanderfolgenden eskalierenden monophasischen Schocks fehlgeschlagen ist, wurde anschließend eine erfolgreiche Kardioversion mit einem biphasischen 170-J-Schock durchgeführt. Bei keinem Patienten wurde eine erfolgreiche Kardioversion mit einem monophasischen 360-J-Schock erreicht, nachdem eine Kardioversion mit biphasischen Schocks fehlgeschlagen war.

Schlussfolgerung: Die Daten belegen die überlegene Wirksamkeit von biphasischen Rechteckimpulsen mit geringer Energie im Vergleich zu monophasischen Schocks mit hoher Energie für die transthorakale Kardioversion von Vorhofflimmern. Es gab keine unsicheren Behandlungsergebnisse oder Nebenwirkungen aufgrund der Verwendung des biphasischen Rechteckimpulses.

Synchronisierte Kardioversion von Vorhofflimmern

Die Kardioversion bei Vorhofflimmern (AF) und die gesamte klinische Wirksamkeit wird durch die richtige Platzierung der Elektroden verbessert. Klinische Studien (siehe oben) zum biphasischen Rechteckimpuls des M Series Defibrillators haben gezeigt, dass hohe Konversionsraten erreicht werden, wenn die Defibrillationselektroden wie im folgenden Diagramm platziert werden.

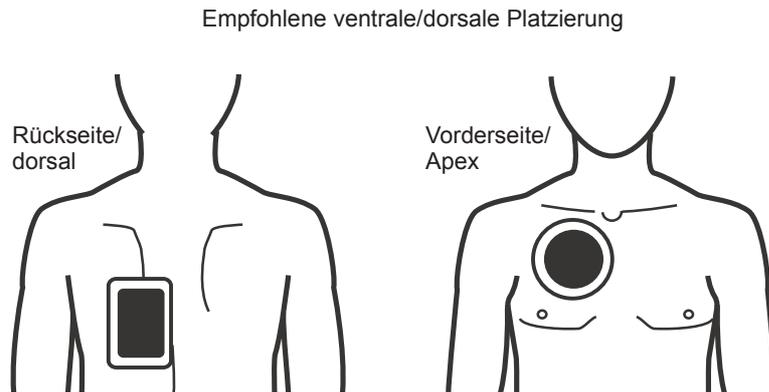

Platzieren Sie die ventrale Elektrode (Apex) im dritten Interkostalraum auf der rechten Medioklavikularlinie. Die dorsale Elektrode sollte wie abgebildet in der Standard-Ventral-Position auf der linken Seite des Patienten platziert werden.

Informationen und Herstellererklärung zur elektromagnetischen Verträglichkeit

Verwendung während des Flugs (RTCA/DO-160):

Das X Series Gerät entspricht RTCA/DO-160, Umgebungsbedingungen und Testverfahren für im Flug befindliche Geräte, unter Verwendung der Methoden in Abschnitt 21, Kategorie M für abgestrahlte und leitungsgeführte Hochfrequenzenergie.

Allgemeine Anwendungsumgebungen (IEC 60601-1-2):

Das X Series Gerät ist für den Einsatz in Bereichen mit den nachfolgend spezifizierten elektromagnetischen Umgebungsbedingungen vorgesehen. Der Kunde oder Bediener des X Series Geräts muss sicherstellen, dass das Gerät nur in einer solchen Umgebung eingesetzt wird.

Emissionstest	Konformität	Informationen zur elektromagnetischen Verträglichkeit
HF-Emissionen CISPR 11	Gruppe 1	Das X Series Gerät verwendet hochfrequente Energie ausschließlich für interne Funktionen. Aus diesem Grund ist die vom Gerät verursachte HF-Störstrahlung extrem gering, so dass Interferenzen mit in der Nähe befindlichen Geräten eher unwahrscheinlich sind.
HF-Emissionen CISPR 11	Klasse B	
Harmonische Emissionen IEC 6100-3-2	Klasse A	Das X Series Gerät ist für den Einsatz in allen Einrichtungen geeignet, einschließlich häuslicher Umgebungen und solcher, die an das öffentliche Niederspannungs-Versorgungsnetz angeschlossen sind, über das private Haushalte versorgt werden.
Spannungsschwankungen / Flicker-Emissionen IEC 61000-3-3	Entspricht den Anforderungen	
Medizinische elektrische Geräte erfordern besondere EMV-Vorsichtsmaßnahmen und müssen nach den in diesem Dokument enthaltenen EMV-Informationen installiert und in Betrieb genommen werden.		

Informationen und Herstellererklärung zur elektromagnetischen Störfestigkeit (IEC 60601-1-2 Tabelle 202)

Das X Series Gerät ist für den Einsatz in Bereichen mit den nachfolgend spezifizierten elektromagnetischen Umgebungsbedingungen vorgesehen. Der Kunde oder Bediener des X Series Geräts muss sicherstellen, dass das Gerät nur in einer solchen Umgebung eingesetzt wird.

Störfestigkeitstest	Testpegel nach IEC 60601	Konformitätspegel	Informationen zur elektromagnetischen Verträglichkeit
Entladung elektrostatischer Elektrizität (ESD) nach IEC 61000-4-2	±6 kV Kontakt ±8 kV Luft	±6 kV Kontakt ±8 kV Luft	Böden sollten aus Holz, Beton oder Keramikfliesen bestehen. Ist der Boden mit synthetischem Material bedeckt, sollte die relative Luftfeuchtigkeit mindestens 30 % betragen.
Schnelle transiente elektrische Störgrößen IEC 61000-4-4	±2 kV für Stromversorgungsleitungen ±1 kV für Eingangs-/Ausgangsleitungen	±2 kV für Stromversorgungsleitungen ±1 kV für Eingangs-/Ausgangsleitungen	Die Qualität der Netzstromversorgung sollte der für Krankenhäuser oder gewerbliche Umgebungen entsprechen.
Spannungsstoß IEC 61000-4-5	±1 kV Gegentakt ±2 kV Gleichtakt	±1 kV Gegentakt ±2 kV Gleichtakt	Die Qualität der Netzstromversorgung sollte der für Krankenhäuser oder gewerbliche Umgebungen entsprechen.
Spannungseinbrüche, kurze Unterbrechungen und Spannungsschwankungen der Stromversorgungsleitungen IEC 61000-4-11	<5 % U_T (>95 % Einbruch in U_T) für 0,5 Zyklen 40 % U_T (60 % Einbruch in U_T) für 5 Zyklen 70 % U_T (30 % Einbruch in U_T) für 25 Zyklen <5 % U_T (>95 % Einbruch in U_T) für 5 s	<5 % U_T (>95 % Einbruch in U_T) für 0,5 Zyklen 40 % U_T (60 % Einbruch in U_T) für 5 Zyklen 70 % U_T (30 % Einbruch in U_T) für 25 Zyklen <5 % U_T (>95 % Einbruch in U_T) für 5 s	Die Qualität der Netzstromversorgung sollte der für Krankenhäuser oder gewerbliche Umgebungen entsprechen. Wenn der Bediener des X Series Geräts selbst bei Unterbrechungen der Netzstromversorgung den ununterbrochenen Betrieb sicherstellen möchte, empfiehlt es sich, das X Series Gerät mit einer unterbrechungsfreien Stromversorgung oder einem Akku zu betreiben.
Magnetfelder mit Netzfrequenz (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Magnetfelder mit Netzfrequenz sollten auf Niveaus liegen, die für Krankenhäuser oder gewerbliche Umgebungen typisch sind.
Hinweis: U_T bezeichnet die Wechselspannung des Netzes vor Anwendung des Testniveaus.			

Informationen und Herstellererklärung zur elektromagnetischen Verträglichkeit (IEC 60601-1-2 Tabelle 203)

Das X Series Gerät ist für den Einsatz in Bereichen mit den nachfolgend spezifizierten elektromagnetischen Umgebungsbedingungen vorgesehen. Der Kunde oder Bediener des X Series Geräts muss sicherstellen, dass das Gerät nur in einer solchen Umgebung eingesetzt wird.

Störfestigkeitstest	Testpegel nach IEC 60601	Konformitätspegel	Informationen zur elektromagnetischen Verträglichkeit IEC 60601-1-2
			Für tragbare und mobile HF-Geräte zur Kommunikation (Mobiltelefone usw.) sollte der nachfolgend empfohlene Mindestabstand zu beliebigen Teilen des X Series Geräts (einschließlich seiner Kabel) eingehalten werden. Der empfohlene Mindestabstand kann anhand einer Formel berechnet werden, die auf der Senderfrequenz basiert.
			Empfohlener Mindestabstand
Leitungsgeführte HF IEC 61000-4-6	3 Veff 150 kHz bis 80 MHz außerhalb der ISM-Bänder ^a	3 Veff	$d = 1,17 \sqrt{P}$
	10 Veff 150 kHz bis 80 MHz innerhalb der ISM-Bänder ^a	10 Veff	$d = 1,2 \sqrt{P}$
Abgestrahlte HF IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz bis 2,5 GHz	10 V/m	$d = 1,20 \sqrt{P}$ 80 MHz bis 800 MHz
	3 V/m 80 MHz bis 2,5 GHz (IEC 60601-2-34)	3 V/m (nur IBD)	$d = 2,30 \sqrt{P}$ 800 MHz bis 2,5 GHz
			$d = 4 \sqrt{P}$ 80 MHz bis 800 MHz
			$d = 7,67 \sqrt{P}$ 800 MHz bis 2,5 GHz
<p><i>P</i> ist die maximale Ausgangsnennleistung des Senders in Watt gemäß den Spezifikationen des Senderherstellers; <i>d</i> steht für den empfohlenen Mindestabstand in Metern (m).^b Die Feldstärken stationärer HF-Sender (festgestellt durch eine elektromagnetische Standortaufnahme^c) sollten unterhalb des Konformitätspegels des jeweiligen Frequenzbereichs liegen.^d In der Nähe von Geräten, die mit dem folgenden Symbol gekennzeichnet sind, können Störungen auftreten:</p>			
			

Hinweis 1: Bei 80 MHz und 800 MHz wird der höhere Frequenzbereich angewendet.

Hinweis 2: Diese Richtlinien werden möglicherweise nicht allen Situationen gerecht. Die elektromagnetische Ausbreitung wird durch die Absorption und Reflexion der umgebenden Strukturen, Objekte und Personen beeinflusst.

a. Im Bereich von 150 KHz bis 80 MHz liegen die ISM-Bänder (Frequenzbänder für industrielle, wissenschaftliche und medizinische Anwendungen) 6,765 MHz bis 6,795 MHz / 13,553 MHz bis 13,567 MHz / 26,957 MHz bis 27,283 MHz / 40,66 MHz bis 40,70 MHz.

b. Die Konformitätspegel der ISM-Frequenzbänder zwischen 150 kHz und 80 MHz und im Frequenzbereich zwischen 80 MHz und 2,5 GHz dienen zur Verringerung von Störungen, die von tragbaren/mobilen Kommunikationsgeräten ausgehen, die versehentlich in den Patientenbereich gebracht werden. Aus diesem Grund muss für Sender in diesen Frequenzbereichen bei der Berechnung des empfohlenen Mindestabstandes ein zusätzlicher Faktor von 10/3 zur Anwendung gebracht werden.

c. Die Feldstärken stationärer Sender, z. B. Basisstationen für Funktelefone (Mobiltelefone oder schnurlose Telefone), Walkie-Talkies, CB-Funk, AM- und UKW-Radio- bzw. Fernsehübertragungen können nicht präzise vorhergesagt werden. Um die durch stationäre HF-Sender erzeugte elektromagnetische Strahlung zu bestimmen, sollte ein elektromagnetisches Standortgutachten in Erwägung gezogen werden. Überschreitet die gemessene Feldstärke an dem Ort, an dem das X Series Gerät von ZOLL eingesetzt werden soll, den oben aufgeführten Konformitätspegel, sollte das X Series Gerät auf normalen Betrieb hin beobachtet werden. Zeigt das Gerät anormale Leistungen, sind möglicherweise zusätzliche Maßnahmen erforderlich (z. B. Änderung der Ausrichtung oder Aufstellen an einem anderen Ort).

d. Im Frequenzbereich zwischen 150 kHz und 80 MHz sollten die Feldstärken weniger als $[V_{\text{r}}]$ V/m betragen.

Empfohlener Mindestabstand zwischen tragbaren/mobilen HF-Kommunikationsgeräten und dem X Series Gerät (IEC 60601-1-2 Tabelle 205)

Das X Series Gerät ist für die Verwendung in einer Umgebung gedacht, in der ausgestrahlte HF-Störungen kontrolliert werden. Der Kunde bzw. Anwender des X Series Geräts kann dazu beitragen, Störungen zu vermeiden, indem er den nachfolgend aufgeführten Mindestabstand zwischen tragbaren/mobilen HF-Kommunikationsgeräten (Sendern) und dem X Series Gerät einhält. Maßgeblich für den Mindestabstand ist die maximale Ausgangsnennleistung der Kommunikationsgeräte.

Empfohlener Mindestabstand nach Frequenz des Senders (in Meter)				
Maximale Nenn-ausgangsleistung des Senders	150 kHz bis 80 MHz außerhalb der ISM-Bänder	150 kHz bis 80 MHz innerhalb der ISM-Bänder	80 MHz bis 800 MHz	800 MHz bis 2,5 GHz
W	$d = [3,5/3]P$	$d = [12/3]P$	$d = [12/10]P$	$d = [23/10]P$
0.01	0.12	0.40	0.12	0.23
0.1	0.37	1.26	0.38	0.73
1	1.17	4.00	1.20	2.3
10	3.69	12.65	3.79	7.27
100	11.70	40.00	12.00	23.00

Bei Sendern, deren nominale maximale Ausgangsleistung nicht in der obigen Tabelle aufgeführt ist, kann der empfohlene Mindestabstand d in Metern anhand der Formel ermittelt werden, die zur Bestimmung der Senderfrequenz angewendet wird, wobei P die maximale Ausgangsnennleistung des Senders (Angaben des Senderherstellers) in Watt bezeichnet.

Hinweis 1: Bei 80 MHz und 800 MHz ist der Mindestabstand des jeweils höheren Frequenzbereichs zu verwenden.

Hinweis 2: Im Bereich von 150 KHz bis 80 MHz liegen die ISM-Bänder (Frequenzbänder für industrielle, wissenschaftliche und medizinische Anwendungen) 6,765 MHz bis 6,795 MHz / 13,553 MHz bis 13,567 MHz / 26,957 MHz bis 27,283 MHz / 40,66 MHz bis 40,70 MHz.

Hinweis 3: Für Sender in den ISM-Frequenzbändern zwischen 150 kHz und 80 MHz sowie im Frequenzbereich 80 MHz bis 2,5 GHz wird bei der Berechnung des empfohlenen Mindestabstands ein zusätzlicher Faktor von 10/3 zur Anwendung gebracht, um Störungen zu verringern, die von tragbaren/mobilen Kommunikationsgeräten ausgehen, die versehentlich in den Patientenbereich gebracht werden.

Hinweis 4: Diese Richtlinien werden möglicherweise nicht allen Situationen gerecht. Die elektromagnetische Ausbreitung wird durch die Absorption und Reflexion der umgebenden Strukturen, Objekte und Personen beeinflusst.

Genauigkeit des Algorithmus für die EKG-Analyse

Sensitivität und Spezifität sind Parameter der Leistungsfähigkeit des EKG-Analysealgorithmus, die von Klinikern oder Experten für den Vergleich des EKG-Analysealgorithmus mit der EKG-Interpretation herangezogen werden. Die Sensitivität gibt an, wie genau der Algorithmus defibrillierbare Rhythmen erkennt (als Prozentsatz der Gesamtanzahl defibrillierbarer Rhythmen). Die Spezifität gibt an, wie genau der Algorithmus nicht schockbare Rhythmen erkennt (als Prozentangabe der Gesamtanzahl nicht schockbarer Rhythmen). Die Daten in der folgenden Tabelle fassen die Genauigkeitswerte des EKG-Analysealgorithmus zusammen, die anhand von Tests mit der EKG-Rhythmus-Datenbank von ZOLL ermittelt wurden.

Der Ablauf des Algorithmus beansprucht etwa 9 s und läuft folgendermaßen ab:

- Unterteilung des EKG-Rhythmus in Drei-Sekunden-Abschnitte
- Filtern und Messung von Rauschen, Artefakte und Grundlinienwanderung
- Messung des Grundliniengehalts („Welligkeit“ bei den korrekten Frequenzen – Frequenzbereichanalyse) des Signals
- Messung der QRS-Frequenz, -Breite und -Variabilität
- Messung der Amplitude und temporalen Regelmäßigkeit („Autokorrelation“) der Peaks und Wellentäler
- Bestimmung, ob mehrere 3-Sekunden-Abschnitte schockbar sind, anschließend Anzeige der Meldung *SCHOCK EMPFOHLEN*.

Klinische Leistungsfähigkeitsergebnisse

Die Leistung des integrierten Analysealgorithmus in einer einzelnen Analysesequenz erfüllt die in ANSI/AAMI DF80 (Abschnitt 6.8.3) festgelegten einschlägigen Anforderungen und genügt den Empfehlungen von Kerber et al. (Circulation. 1997;95(6):1677).

Tabelle A-4. Klinische Leistungsfähigkeitsergebnisse

Rhythmen	Probenumfang	Leistungsziele	Beobachtete Leistung	Unterer Grenzwert des einseitigen 90%-Konfidenzintervalls
Schockbar		Sensitivität		
Grobes VF	536	>90 %	>99 %	>99 %
Schnelle VT	80	>75 %	>99 %	>96 %
Nicht schockbar		Spezifität		
NSR	2210	>99 %	>99 %	>99 %
AF, SB, SVT, Herzblock, idioventrikulär, VES-Salven	819	>95 %	>99 %	>99 %
Asystolie	115	>95 %	>99 %	>97 %
Fraglich		Sensitivität		
Feine VF	69	Nur berichten	>89 %	>81 %
Andere VT	28	Nur berichten	>96 %	>84 %

Quellenangaben:

Young KD, Lewis RJ. What is confidence? Part 2: Detailed definition and determination of confidence intervals. *Annals of Emergency Medicine*. September 1997;30:311-8.

William H. Beyer, PhD. *CRC Standard Mathematical Tables 28th Edition*. CRC Press, Inc, Boca Raton, FL. 1981, Percentage Points, F-Distribution Table, S. 573.

Informationen und Herstellererklärung zur Wireless-Verbindung

Ausgestrahlte HF-Emissionen (IEC 60601-1-2)

Das X Series Gerät entspricht IEC 60601-1-2 für medizinische elektrische Geräte und medizinische elektrische Systeme mit der nachstehenden Spezifikation entsprechenden HF-Sendern.

Standard	Frequenzbereich	Effektive Strahlungsleistung	Modulationstyp	Datenraten
802.11b	2412 bis 2472 MHz	100 mW	DSSS	1, 2, 5,5, 11 Mbps
802.11g	2412 bis 2472 MHz	32 mW	OFDM	6, 9, 12, 24, 36, 48, 54 Mbps
802.11n	2412 bis 2472 MHz	32 mW	OFDM	6,5, 13, 19,5, 26, 39, 52, 58,5, 65 Mbps
Bluetooth	2400 bis 2483,5 MHz	10 mW	FHSS; GFSK/ DQPSK/8DPSK	1, 3 Mbps
802.11a	5180 bis 5320 MHz 5500 bis 5700 MHz 5745 bis 5825 MHz	32 mW	OFDM	6, 9, 12, 24, 36, 48, 54 Mbps
802.11n	5180 bis 5320 MHz 5500 bis 5700 MHz 5745 bis 5825 MHz	32 mW	OFDM	6,5, 13, 19,5, 26, 39, 52, 58,5, 65 Mbps

FCC-Hinweis

ZOLL Medical Corporation gestattet dem Anwender keinerlei Veränderungen oder Modifizierungen dieses Geräts. Veränderungen oder Modifizierungen jeglicher Art können zum Erlöschen der Betriebslaubnis für dieses Gerät führen (siehe 47 CFR Abschnitt 15.21).

Dieses Gerät erfüllt Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die zu einem unerwünschten Betrieb führen können (siehe 47 CFR Abschnitt 15.19(a)(3)).

Der Anwender wird angewiesen, einen Abstand von 20 cm von dem Gerät zu halten, um die Einhaltung der FCC-Anforderungen sicherzustellen.

IC-(Industry Canada)-Hinweise

Dieses Gerät erfüllt die Industry Canada-Standards für genehmigungsfreie Geräte (RSS, Radio Standards Specification). Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die zu einem unerwünschten Betrieb des Geräts führen können.

Anhang B

Zubehör

Das folgende Zubehör ist für die Verwendung mit dem X Series Gerät geeignet. Ihre Bestellung richten Sie bitte an die nächstgelegene ZOLL Vertriebsniederlassung.

EKG-Zubehör
EKG, 3-adriges Kabel, AAMI
EKG, 3-adriges Kabel, IEC
EKG, 5-adriges Kabel, AAMI
EKG, 5-adriges Kabel, IEC
EKG, vollständiges 12-adriges „Breakaway“-Patientenkabel (Leitungskabel, 4-adriges Kabelset mit abnehmbarem 6-adrigem präkordialen „V“-Kabelset), AAMI
EKG, vollständiges 12-adriges „Breakaway“-Patientenkabel (Leitungskabel, 4-adriges Kabelset mit abnehmbarem 6-adrigem präkordialen „V“-Kabelset), IEC
EKG, 4-adriges „Breakaway“-Leitungskabel nur mit 4-adrigem Kabelset, AAMI
EKG, 4-adriges „Breakaway“-Leitungskabel nur mit 4-adrigem Kabelset, IEC
EKG, abnehmbares 6-adriges präkordiales Kabelset für 12-adriges „Breakaway“-Patientenkabel, AAMI
EKG, abnehmbares 6-adriges präkordiales Kabelset für 12-adriges „Breakaway“-Patientenkabel, IEC
CO2-Zubehör (Oridion Filterlines)
Smart CapnoLine Plus, nicht intubierte Filterline mit O2-Versorgung, Erwachsene, 25er Packung

Smart CapnoLine Plus, nicht intubierte Filterline mit O2-Versorgung, Kinder, 25er Packung
FilterLine H-Set, Erwachsene/Kinder, 25er Packung
FilterLine H-Set, Säuglinge/Neugeborene, 25er Packung
FilterLine-Set, Erwachsene/Kinder, 25er Packung
VitaLine H-Set, Erwachsene/Kinder, 25er Packung
NIBD-Zubehör
Schläuche
Schlauch, Kinder/Neugeborene, 24 m, mit weiblichem Manschetten-Luer-Anschluss, Einzellumen
Schlauch, Erwachsene/Kinder, 30 m, mit Manschetten-Drehverschluss-Anschluss, Doppellumen
Wiederverwendbare Manschetten (Welch Allyn Flexiport Blutdruckmanschetten)
Neugeborene Nr. 1, 3,3 bis 5,6 cm Einzelschlauch mit männlichem Luer-Anschluss, 10er Packung
Neugeborene Nr. 2, 4,2 bis 7,1 cm Einzelschlauch mit männlichem Luer-Anschluss, 10er Packung
Neugeborene Nr. 3, 5,4 bis 9,1 cm Einzelschlauch mit männlichem Luer-Anschluss, 10er Packung
Neugeborene Nr. 4, 6,9 bis 11,7 cm Einzelschlauch mit männlichem Luer-Anschluss, 10er Packung
Neugeborene Nr. 5, 8,9 bis 15,0 cm Einzelschlauch mit männlichem Luer-Anschluss, 10er Packung
Neugeborenen-Manschetten-Kit, jeweils ein Exemplar der Größen Nr. 1 bis Nr. 5, Einzelschlauch mit männlichem Luer-Anschluss, 5er Packung
Welch Allyn REUSE-07-2MQ Manschette, Säugling, 2 Schläuche, Drehverschluss-Anschluss
Welch Allyn REUSE-08-2MQ Manschette, Kleine Kinder, 2 Schläuche, Drehverschluss-Anschluss
Welch Allyn REUSE-09-2MQ Manschette, Kinder, 2 Schläuche, Drehverschluss-Anschluss
Welch Allyn REUSE-10-2MQ Manschette, Kleine Erwachsene, 2 Schläuche, Drehverschluss-Anschluss
Welch Allyn REUSE-11-2MQ Manschette, Erwachsene, 2 Schläuche, Drehverschluss-Anschluss
Welch Allyn REUSE-11L-2MQ Manschette, Erwachsene lang, 2 Schläuche, Drehverschluss-Anschluss
Welch Allyn REUSE-12-2MQ Manschette, Große Erwachsene, 2 Schläuche, Drehverschluss-Anschluss
Welch Allyn REUSE-12L-2MQ Manschette, Große Erwachsene lang, 2 Schläuche, Drehverschluss-Anschluss
Welch Allyn REUSE-13-2MQ Manschette, Oberschenkel, 2 Schläuche, Drehverschluss-Anschluss
SpO2-Zubehör
Rainbow R25 Einmalsensor für Patienten > 30 kg
Rainbow R25-L Einmalsensor für Patienten < 3 kg, > 30 kg
Rainbow R20 Einmalsensor für Kinder 10 kg bis 50 kg

Rainbow R20-L Einmalsensor für Säuglinge 3 kg bis 10 kg
Rainbow Patienten kabel RC-4 Wiederverwendbares Patienten kabel, 1,2 m
Rainbow Patienten kabel RC-12 Wiederverwendbares Patienten kabel, 3,6 m
Rainbow DCI-dc8 Wiederverwendbares Patienten kabel mit Sensor, 2,4 m
Rainbow DCI-dc12 Wiederverwendbares Patienten kabel mit Sensor, 3,6 m
Rainbow DCIP-dc8 Wiederverwendbares Patienten kabel mit Sensor für Kinder, 2,4 m
Rainbow DCIP-dc12 Wiederverwendbares Patienten kabel mit Sensor für Kinder, 3,6 m
Red DBI-dc8 Wiederverwendbarer Direktanschlusssensor, 2,4 m, Masimo Rainbow Set
Temperatur-Zubehör
YSI Wiederverwendbare Hauttemperatursonde für Erwachsene
YSI Wiederverwendbare Hauttemperatursonde für Kinder
YSI Wiederverwendbare Ösophageal/Rektal-Temperatursonde für Erwachsene
YSI Wiederverwendbare Ösophageal/Rektal-Temperatursonde für Kinder
Sensor-Adapterkabel für Einmal-Temperatursonden
YSI Ösophageal/Rektal-Einmal-Temperatursonde
YSI Einmal-Hauttemperatursonde
Defibrillationszubehör
X Series Multifunktionstherapie kabel – ermöglicht die Verwendung von Einmal-Multifunktionselektroden und externen und internen ZOLL M Series-CCT-Paddles (separat erhältlich)
Set externer M Series Paddles mit Bedienelementen und integrierten pädiatrischen Elektroden
ZOLL Sterilisierbarer interner Griff (schwarz) mit Schalter, 2,54-cm-Löffelektrode, 3-m-Kabel
ZOLL Sterilisierbarer interner Griff (schwarz) mit Schalter, 4,06-cm-Löffelektrode, 3-m-Kabel
ZOLL Sterilisierbarer interner Griff (schwarz) mit Schalter, 5,08-cm-Löffelektrode, 3-m-Kabel
ZOLL Sterilisierbarer interner Griff (schwarz) mit Schalter, 6,85-cm-Löffelektrode, 3-m-Kabel
ZOLL Sterilisierbarer interner Griff (schwarz) mit Schalter, 7,62-cm-Löffelektrode, 3-m-Kabel
ZOLL Sterilisierbarer interner Griff (schwarz) ohne Schalter, 2,54-cm-Löffelektrode, 3-m-Kabel
ZOLL Sterilisierbarer interner Griff (schwarz) ohne Schalter, 4,06-cm-Löffelektrode, 3-m-Kabel
ZOLL Sterilisierbarer interner Griff (schwarz) ohne Schalter, 5,08-cm-Löffelektrode, 3-m-Kabel
ZOLL Sterilisierbarer interner Griff (schwarz) ohne Schalter, 6,85-cm-Löffelektrode, 3-m-Kabel
ZOLL Sterilisierbarer interner Griff (schwarz) ohne Schalter, 7,62-cm-Löffelektrode, 3-m-Kabel
ZOLL Defibrillationsgel

ZOLL OneStep-Kabel
IBD-Zubehör
Wandler-Schnittstellenkabel – Abbott
Wandler-Schnittstellenkabel – Edwards
Wandler: 5 μ V/V/mmHg, IEC 60601-2-34- und AAMI BP-22-konform
CPR-Zubehör
CPR-D-padz-Elektroden
CPR-stat-padz-Elektroden
CPRD-MFC-Anschluss
stat-padz-Elektroden
pedi-padz II-Elektroden
OneStep-Elektroden
Stromversorgungszubehör
ZOLL SurePower 2 Wiederaufladbarer Akku
SurePower-Ladestation
SurePower-Akkuladegerät, X Series Akkuadapter
X Series Netzteil
Ersatznetz kabel – USA
Sonstiges Zubehör
Passgenaue X Series Tragetasche
72-mm-Papier für EKG-Streifenregistrierer
USB-Kommunikationskabel