


Hurtigveiledning

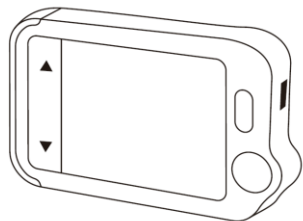

Pulsebit EX

Personlig EKG Tracker

www.welluehealth.com

Kontakt oss: service@viatomtech.com

©Kopirett 2018 Shenzhen Viatom (andre) Teknologi Co.,
Ltd.

Alle rettigheter reservert.

Ansvarsfraskrivelse

Det er ikke et medisinsk utstyr og bør ikke brukes til medisinsk formål eller noen medisinsk tilstand. Denne enheten er kun ment for generell velvære bruk.


Forsiktighet

- Dette produktet er ikke for mennesker med pacemaker.

Utpakking

Hovedenhet; Hurtigveiledning; Lade- / datakabel
EKG-kabel; Gjenbrukbare EKG-elektroder, 2 sett
Bæreveske

Om hovedenheten

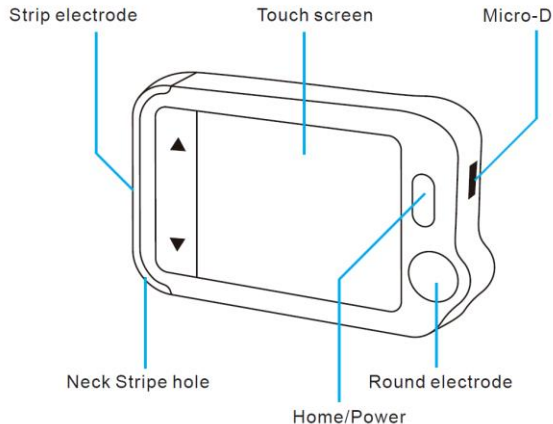

Lading

Med ladekabelen kobler du enheten til USB-porten på pc eller standard USB-ladeadapter.

Slå på/av

Hold inne knappen i 1 sekund for å slå PÅ, 3 sekunder for å slå av.

Den slås **av automatisk** hvis ingen måling eller drift.

Viktig innstilling


Brukermodus: Innstillinger-> Enkeltbruker / Dual User

EKG Lengde: Innstillinger-> EKG Lengde, for 30s/60s/5 minutter

Merk: Bare kabelmåling støttes i 5 minutter modus

Sjekk hjertet - Intern

- 1) Trykk på <Hjertesjekk> for å starte et mål, velg MODE
- 2) Hold enheten som MODE I eller MODE II, hold deg i ro og vent til prosesslinjen er avsluttet

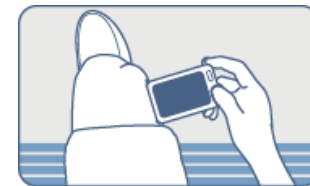

MODUS I (Avledning I) MODUS II (Avledning II)

Sjekk hjertet - ekstern (via kabel)

- 1) Trykk på <Hjertesjekk> Hvis du vil starte et mål, trykk på ikonet nederst for å bytte til *ekstern* modus.
- 2) Sett EKG-kabelen inn i Micro D-porten, bruk de gjenbrukbare elektrodene på kroppen din tilsvarende.



★Tips:

- Bruk Modus II hvis signalet er for lavt i Modus I
- Fukt huden (område som berører elektroder) hvis den er for tørr
- Hvil hendene på bord eller lår og team slappe av
- Bruk kabelen når du har problemer med å få stabil EKG med fingrene

Om gjenbrukbare elektroder

Dekk det hvite beskyttelsespapiret tilbake og forsegle elektrodeputene i plastposen etter hver bruk.

Det anbefales å skifte ut elektrodene etter **50** målinger.

Ytelsen til elektroden vil avta etter overdreven bruk.

For å kjøpe flere elektroder, se www.ninemi.no.


Forstå resultatet

Hjertefrekvens	Antall ganger hjertet slår per minutt beregnet fra EKG. Referanseområdet for voksne er 60-100 slag per minutt i hviletilstand og høyere under trening. Kontroller maksimal hjertefrekvens under kondisjon eller trening for å unngå overbelastning av hjertet.
Ekg	Et elektrokardiogram (EKG) er en test som registrerer hjertets elektriske aktivitet. Regular heartbeat - den registrerte EKG er i et vanlig mønster. Irregular heartbeat - det registrerte EKG er i et uregelmessig mønster. Det kan være forårsaket av overbelastning av hjerte eller andre forhold.

Se gjennom loggoppføringene

Du kan se gjennom loggresultatene og spille av de innspilte EKG-bølgeformene på nytt i **Logg-menyen**.

Trykk pilknappen til venstre for å bla nedover/opp i postlisten.

Trykk på ikonet  kan spille av EKG-bølgeformene på nytt, og trykk på pilknappen til venstre for å justere bølgeformens skala.

Bruk PC-programvaren "*Pulsebit Browser*"

Last ned den nyeste versjonen fra:

www.welluehealth.com/pc-programvare

Installer den på Windows PC. **Slik eksporterer du data:**

- 1) Koble enheten til PC-en med USB-kabelen
- 2) På enheten, Innstillinger-> Til PC
- 3) Åpne PC-programvaren, last ned data fra enheten
Med PC-programvaren kan du vise og skrive ut rapport, som også kan eksporteres som PDF-filer.

Bruk APP "*ViHealth*"

Installer den nyeste APP "*ViHealth*" på smarttelefonen (støtte BLE Bluetooth) fra App Store (iOS) eller Google Play (Android).


- 1) Slå på enheten Bluetooth i *Innstilling->Bluetooth*.
- 2) slå på Bluetooth-telefonen.
- 3) Kjør APPEN, legg til enheten iAPP. (ikkepar enheten i telefoninnstillingsmenyen, bare i APP)
- 4) Dataene lastes ned automatisk.

Spesifikasjoner

Størrelse	88×56×13 mm
Vekt	64 g (hovedenhet)
Display	2,4"-tommers berøringsskjerm, farge, bakgrunnsbelyst
Batteritype	Oppladbart litiumpolymerbatteri
Batteriets kjøretid	>500 sjekk
Ladetid	2 -3 timer
Hjertefrekvensområde	30 til 250 bpm
Lagring	30s x 100 stykker
Brukermodus	Enkel eller dobbel
EKG lengde	30s, 60s, 5 minutter

Versjon: A

Mo(PB-20

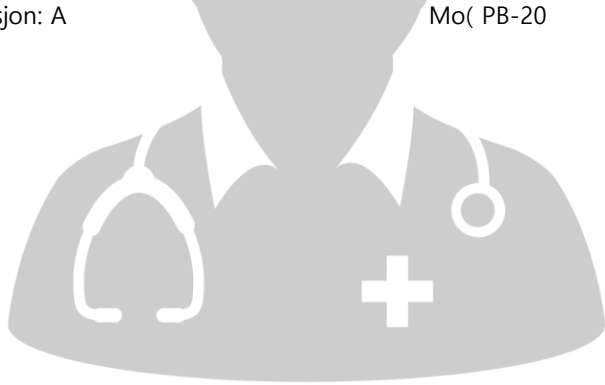

ninenemi
T A K E C A R E