



הוראות שימוש

אמ"ר מס: 11550401

SilverStream[®]
Chronic Wound Management 



SilverStream® היא תמיסת בופר היפרטונית, עם תכונות הידרוג'ל וריח נעים, לשמירת והוספת לחות וטיפול בפצעים. SilverStream® היא תמיסה צלולה, חסרת צבע, המוגנת מזיהום חיידקי על ידי ריכוז נמוך של יוני כסף. היא מסופקת בבקבוקים של 100 מ"ל, 250 מ"ל ו- 500 מ"ל.

שימוש יעודי והתוויות לשימוש:

SilverStream® מיועדת לשימוש תחת השגחה של מטפל רפואי מקצועי לטיפול ולחלוח של פצעים כמו פצעי לחץ בדרגות I-IV, כיבי עמדון (Stasis ulcers), כיבי סוכרת ברגלים, פצעים לאחר ניתוח, כוויות מדרגה ראשונה ושנייה, חתכים, שריטות וגירוי עור קלים.

הוראות שימוש כלליות:

SilverStream® מיועדת לטיפול ולחלוח על ידי מזיגה של תמיסת SilverStream® ישירות מהבקבוק - באמצעות מזרק פלסטי או במזרק נורה, שימוש על הפצע בעזרת בקבוק ספריי, השמה עם התקן המיועד לאפשר שטיפה או על ידי הרטבת הפד/ גזה / תחבושת או ספוג. שים / פעם אחת עד פעמיים מדי יום, לפי הוראת הרופא.

הערה: הפצע ניתן לניקוי אם SilverStream® יושם בעזרת מחט 19G (לחץ השמה של 10 psi ~).

אזהרות והתראות:

- לשימוש חיצוני בלבד. המנע ממגע עם העיניים.
- השתמש/י רק בבקבוק שלא ניזוק.
- אל תשתמש/י במטופלים עם היסטוריה של רגישות יתר לאחד מהמרכיבים.
- הפסק/י השימוש אם מתפתח גירוי.
- הימנע/י משימוש בתמיסה עכורה או בעלת צבע.
- הגן/י על הבקבוק ממגע ישיר עם הפצע. בקבוקים שבאו במגע ישיר עם הפצע יש להשמיד לאחר השימוש.
- לשימוש בחולה אחד בלבד.
- אם הבקבוק נסגר מיד לאחר השימוש והפתח שלו מוגן מזיהום, ניתן להשתמש שימוש חוזר בתמיסה תוך 28 ימים מפתחת הבקבוק לראשונה.
- אחסן את התמיסה בטמפ' של עד 30 מעלות צלזיוס.
- בקבוק ריק ניתן לזרוק לפח האשפה. בקבוק שמכיל תמיסה חייב להיות מסולק לאתר המתאים.
- אל תשים/י יותר מ 700 מ"ל של תמיסת SilverStream® בתוך 24 שעות.

מרכיבים:

מים מטהורים, גליצרול (גליצרין), סורביטן מונולאורט (טווין 20), טריס, מנתול וכסף ניטרטי 0.01% (w/v)

כל אריזה מכילה שניים עשר (12) בקבוקים של 250 מ"ל או 500 מ"ל או עשרים וארבעה (24) בקבוקים של 100 מ"ל ועלון הוראות שימוש המהווה חלק מתווית הבקבוק.

סמלים:

להלן תיאור הסמלים הגרפיים המופיעים על תווית SilverStream®:

זהירות	
היעזר/י בהוראות השימוש	
יצרן	
שמור/י את הבקבוקים הרחק מאור שמש ישיר	
מגבלת טמפרטורה	
השתמש/י לפני תאריך	
מעוקר על ידי שימוש בטכנולוגיית מילוי אספטי	
אין לעקר שנית	
קוד אצווה/ מס' סחורה	
להרחיק מהישג ידם של ילדים	
מחט G19 לחץ השמה של ~10 psi	

משרדי הנהלה ראשית

סילברסטרים מדיקל בע"מ

(שם חברה הקודם: אנזיסרג' בע"מ)

ח.פ. 513160986

חוף הזהב 11, קסריה

3089900, ישראל

טלפון: 03-919-4334

דואר אלקטרוני: info@silverstreammed.com

www.silverstreammed.com