

Gracias por comprar MoxyPatch™

Pronto se unirá a las muchas otras personas que ahora disfrutan de la renovada libertad y confianza que MoxyPatch ha aportado a sus vidas. Aquellas que antes sentían que no podían hacer ejercicio, correr, saltar o incluso jugar con sus hijos sin miedo a incontinencias urinarias, ahora disfrutan de una vida sin preocupaciones por las pérdidas y pueden seguir con su vida diaria!

Nuestra Vision

Nos dimos cuenta de que hoy en día hay muchos productos en las estanterías de las tiendas que ayudan a absorber las pérdidas una vez que ya se han producido, ¡pero hay muy pocos productos destinados a la prevención de estas embarazosas pérdidas en primer lugar! Nuestra visión al crear el MoxyPatch era desarrollar una solución más preventiva y respetuosa con el medio ambiente para las mujeres que realmente evitara las pérdidas debidas a la incontinencia urinaria de esfuerzo de leve a moderada, ¡y creemos que lo hemos conseguido!



El uso de MoxyPatch puede reducir los residuos plásticos que acaban en los vertederos en un 98% en comparación con otros productos desechables como las compresas y los forros para pérdidas de orina. ¡Eso sí que es ganar para las mujeres y para el mundo! (según un estudio de impacto medioambiental de terceros realizado por ImactableX, enero2023)

Su kit MoxyPatch incluye

1X dispositivo de silicona reutilizable MoxyPatch, 25 parches adhesivos de hidrogel suave reemplazables MoxyPatch, una guía de uso a todo color, además de una bolsa de algodón reutilizable para guardarlos y llevarlos de viaje.

El dispositivo MoxyPatch no debe utilizarse si padece infecciones recurrentes de las vías urinarias, urogenitales o por hongos. Si está embarazada, hable con su médico o profesional sanitario antes de utilizarlo.

Preguntas más frecuentes

P: ¿Puedo utilizar mi MoxyPatch cuando tengo la regla?

R: ¡Sí! El dispositivo MoxyPatch puede llevarse durante la menstruación. Como el MoxyPatch se coloca por encima de la vagina (y no dentro del orificio vaginal) se pueden llevar productos menstruales como tampones, compresas y copas menstruales al mismo tiempo que el dispositivo MoxyPatch.

P: ¿Cuánto tiempo puedo llevar mi MoxyPatch?

R: El MoxyPatch debe quitarse antes de orinar. Un adulto sano orina entre 6 y 7 veces al día en promedio y el adhesivo debe retirarse, desecharse y volver a colocarse antes de cada uso. Por lo tanto, se recomienda llevar el dispositivo MoxyPatch durante aproximadamente 4 horas como máximo cada uso.

El dispositivo MoxyPatch no debe llevarse puesto mientras se baña, nada, orina intencionadamente o durante las relaciones sexuales. Hable siempre con su médico o profesional sanitario si tiene alguna duda sobre si el MoxyPatch puede ser adecuado para usted.

Nos tomamos muy en serio los comentarios de los consumidores y siempre nos esforzamos por mejorar nuestros productos para que ofrezcan el mejor valor y la mejor experiencia a nuestros consumidores. ¡Nos encantaría recibir sus comentarios!

Si tiene alguna pregunta, duda o desea hacemos llegar sus comentarios sobre el MoxyPatch, envíenos un correo electrónico directamente a info@MoxyPatch.com.

Para obtener consejos adicionales sobre el MoxyPatch, ahorros especiales, educación sobre salud pélvica y mucho más, únase a nuestra creciente comunidad en



@MoxyPatch or visit us at www.MoxyPatch.com



Fabricado en EE.UU.

Manufactured by Remy - International Consumer Products Inc. | LBL IFU Ver.001 | GMDN : 34214

MOXYPATCH™

Ría sin miedo. Juegue sin presiones



Nuevo

Prevención de incontinencia urinaria

Guía del usuario



ECO FRIENDLY


Ahora, empecemos!

Puede que le sorprenda o no saber que la gran mayoría de las mujeres no conocen su anatomía tanto como podrían. No es la única. Pero no se sienta intimidada o avergonzada: estamos aquí para ayudarle a desmitificar este tema ahora mismo!

La zona por la que la orina sale del cuerpo se llama uretra. La uretra se encuentra por encima del orificio vaginal y por debajo del clitoris, entre los labios internos. Le recomendamos encarecidamente que utilice un espejo para familiarizarse con estas partes y que utilice este espejo las primeras veces que coloque el dispositivo MoxyPatch. Esto le ayudará a sentirse segura de que se ha colocado correctamente para evitar fugas. El dispositivo MoxyPatch NO se coloca internamente dentro de la vagina. Se coloca entre los labios internos por encima de la uretra para evitar las pérdidas de orina involuntarias de leves a moderadas. El dispositivo MoxyPatch no debe utilizarse sobre cortadas o piel irritada ni si se padecen infecciones recurrentes de las vías urinarias o por hongos. El dispositivo de silicona MoxyPatch puede lavarse y reutilizarse durante el año de uso recomendado.

1 Preparando su dispositivo MoxyPatch™

Hierva el dispositivo MoxyPatch de silicona magenta durante 5-10 minutos antes del primer uso. Después de abrir uno de los suaves parches adhesivos de hidrogel envueltos individualmente, retire la película protectora del lado marcado como "Lado del dispositivo" y coloque este adhesivo expuesto directamente sobre la base triangular del dispositivo, asegurándose de que está correctamente alineado con la base. Presione firmemente para asegurarse de que queda fijado a la base del dispositivo MoxyPatch.

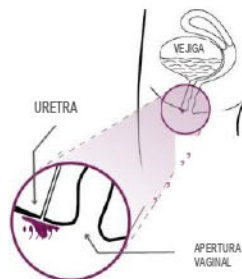


2 Aplicación de su MoxyPatch™

Cuando esté listo, retire la 2ª película protectora adhesiva del dispositivo. Utilice la guía de la aleta situada en la parte superior del dispositivo (frente a la base triangular) para ayudar a guiar el dispositivo hasta su correcta colocación, tal y como se muestra en el diagrama. Para conseguir un sellado adhesivo adecuado, lo mejor es asegurarse de que la uretra y la zona circundante estén lo más secas posible antes de la colocación. Con las manos separadas, separe los labios internos y externos y coloque la cara adhesiva expuesta directamente sobre el orificio uretral, asegurándose de que todos los bordes externos de la base triangular no se solapan con los pliegues labiales internos. Presione suavemente, pero con firmeza, para asegurarse de que el hidrogel adhesivo quede bien fijado. Una vez aplicado, la guía de la aleta del dispositivo debe colocarse entre los labios. Como el MoxyPatch está fabricado con una silicona reutilizable de grado médico, su MoxyPatch se calentará y se volverá más flexible con la temperatura de su cuerpo durante su uso, lo que lo hará aún más cómodo. Dado que el dispositivo MoxyPatch cubre el orificio uretral por donde debe salir la orina, debe retirarse antes de la micción prevista, lavarse y, a continuación, aplicarse una nueva tira adhesiva. Si olvida quitarse el dispositivo antes de orinar, es probable que se desplace. No se preocupe, ¡la tenemos protegida! Al darse cuenta de que el MoxyPatch es tan cómodo, muchas mujeres olvidan a menudo que lo llevan puesto y no se acuerdan de quitárselo antes de orinar. Por ello, hemos desarrollado una función de flotabilidad interna que ayuda al MoxyPatch a flotar cuando se sumerge en el agua, ¡para que no se hunda! ¿No es genial? Si esto ocurre, asegúrese de lavar y desinfectar adecuadamente su dispositivo MoxyPatch antes de volver a utilizarlo.

Si la colocación le resulta incómoda de algún modo, es posible que su dispositivo MoxyPatch no esté colocado correctamente. Retire suavemente el dispositivo (siguiendo el paso 3 a continuación), aplique un nuevo parche de hidrogel adhesivo y vuelva a colocarlo siguiendo las instrucciones de colocación anteriores.

- 1 CLITORIS
- 2 URETRA
- 3 ABERTURA VAGINAL
- 4 DISPOSITIVO MOXYPATCH

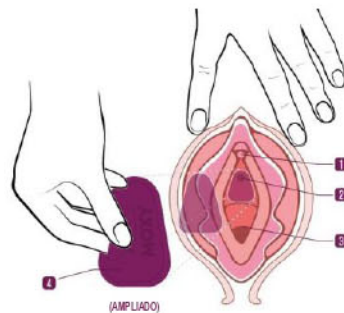

3 Extracción

Con las manos limpias, simplemente pellizque la aleta del dispositivo y despegue lentamente el dispositivo y la capa de hidrogel adhesivo de la zona uretral. El dispositivo MoxyPatch y la capa adhesiva deberían despegarse fácilmente utilizando este método. Si por alguna razón se produce algún tirón o molestia, o si el adhesivo parece estar excesivamente pegajoso, puede mojar esta zona con una pequeña cantidad de agua para ablandar aún más el adhesivo y que éste se afloje. Una vez despegado, remueva el adhesivo restante del dispositivo y deséchelo adecuadamente. Lave bien el dispositivo con agua tibia y jabón y asegúrese de que su MoxyPatch esté seco antes de guardarlo. Le recomendamos que utilice un jabón sin aceites ni perfumes para cuidar su dispositivo MoxyPatch.

Cómo guardar su dispositivo MoxyPatch™

MoxyPatch debe almacenarse en un lugar fresco o a temperatura ambiente y seco.

La bolsa de viaje y almacenamiento de algodón que la acompaña es el lugar perfecto e ideal para guardar su dispositivo

Asegúrese siempre de lavar bien el dispositivo antes de guardarlo.



¡Salga y disfrute de la nueva libertad y confianza que sentirá con el Moxypatch! Anímese y ría con sus amigos, corra alrededor de la manzana, baile en bodas, salte en trampolines y juegue con sus hijos.
¡La tenemos protegida!