

Utilizarea indicată

Spray-ul nazal produs de Nasus Pharma Ltd este un dispozitiv medical ce nu necesită prescripție medicală.

Indicații pentru utilizare

Spray-ul nazal (pulbere) Taffix™ este indicat pentru utilizarea ca barieră de protecție împotriva alergenilor și virusurilor din cavitatea nazală.

Ce este Taffix™?

Taffix™ este utilizat pentru blocarea virusurilor din cavitatea nazală, virusuri care ar putea pătrunde în sistemul respirator și provoca infecții.

Pentru a vă proteja împotriva virusurilor din aer, Taffix™ ar trebui folosit înainte de expunerea la medii cu risc ridicat, unde virusurile s-ar putea afla în aer (de ex. supermarket-uri, farmacii, la școală, cluburi sportive, avion etc.) sau la întâlniri cu persoane care nu fac parte din familie.

Taffix™ poate fi folosit de maximum 3 ori în decursul unei zile. Taffix™ este destinat utilizării intermitente: utilizați-l atunci când sunteți în zone aglomerate. Nu este nevoie să-l folosiți acasă sau acolo unde nu sunteți expus altor persoane care v-ar putea infecta.

Cum funcționează Taffix™?

Taffix™ este un spray cu pulbere nazală, pulberea se transformă într-un gel în interiorul nasului, care creează o barieră activă ce apără, protejează și dezactivează virusurile cu transmitere prin aer găsite adesea în spațiile deschise, avioane, trenuri, centre comerciale mari și mijloace de transport în comun.

Dacă este nevoie și de utilizarea unui alt spray nazal asemănător, Taffix™ ar trebui reaplicat ulterior pentru ca bariera creată să nu perturbe acțiunea celui alt spray nazal.

Taffix™ poate fi folosit pe lângă alte tratamente, ca parte din combinația de strategii terapeutice în lupta împotriva virusurilor. De exemplu, Taffix™ poate fi folosit pe lângă purtarea măștii și a mănușilor.

Taffix™ nu este un medicament și nu provoacă somnolență.

Cine poate folosi Taffix™?

Taffix™ este adecvat pentru adulți, sportivi și copiii cu vârsta peste 12 ani.

Contraindicații:

- Nu folosiți produsul dacă sunteți sensibili la celuloză, acid citric, clorură de benzoilconiu sau Mentol.
- Consultați un medic înainte de a utiliza Taffix™ la copiii mai mici de 12 ani sau la gravide și femeile care alăptează.

⚠️ Precauții:

- Aruncați flaconul de Taffix™ după data expirării imprimată pe flacon sau dacă au trecut 6 luni de la deschiderea flaconului – după caz.
- Pentru a evita contaminarea, acest produs nu trebuie folosit decât de către o singură persoană.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
- A se evita contactul cu rănilor deschise.
- A se evita contactul cu ochii. Dacă vă intră pulbere în ochi, clătiți-vă cu apă.
- Nu clătiți flaconul cu apă sau cu alt

lichid deoarece puteți bloca flaconul.

- A nu se utiliza dacă sigiliul de siguranță este rupt.
- Închideți, întotdeauna, capacul.
- S-au raportat foarte puține cazuri de reacții alergice la acest produs. Majoritatea au raportat că li s-a înfundat nasul, le curge nasul, strănut, au dureri în gât. Dacă experimentați reacții mai grave decât acestea – atunci utilizarea produsului ar trebui întreruptă imediat și dacă simptomele persistă, consultați un medic.
- Nu uitați să apăsați flaconul ușor pentru a evita pulverizarea în exces a pulberii.
- Modalități de depozitare a Taffix™?**
- Păstrați la temperatura camerei sau între 5°C ~ 30°C (41°F ~ 86°F).
- A nu se păstra în frigider sau congelator.

Cum se folosește Taffix™?

Pentru a vă proteja împotriva virusurilor cu transmitere prin aer și pentru a menține o barieră eficientă împotriva acestora, Taffix™ poate fi aplicat de maximum 3 ori pe zi.

Atenție – flaconul de Taffix™ nu poate fi împărțit cu alte persoane. Însemnați-vă flaconul și evitați să îl împărțiți cu alte persoane pentru a preveni posibila transmitere de virusuri sau germeni.

Flaconul de Taffix™ conține 1000 mg de pulbere (aproximativ 200 de pufuri). Odată aplicat, Taffix™ devine eficient după un minut și rămâne eficient aproximativ 5 ore.


Înainte de a începe să utilizați Taffix™ – puteți exersa apăsarea flaconului, ținând în aer și apoi urmând instrucțiunile de folosire:

Cum se pregătește un Taffix™ nou pentru utilizare?

- Scoateți spray-ul nazal Taffix™ din cutie și deschideți capacul
- Agitați flaconul de Taffix™
- Testați spray-ul în aer, de 2 ori
- Taffix™ este acum gata de utilizare

Cum se folosește Taffix™?

De fiecare dată când luați Taffix™ urmați instrucțiunile de mai jos

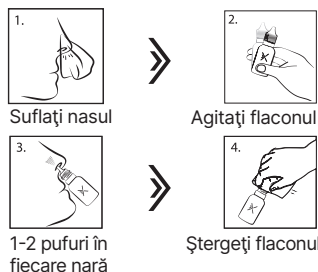

La prima utilizare, puteți simți furnicăături sau o senzație de arsură în nas, în special dacă mucoasa nazală este sensibilă sau inflamată.

Puteți simți și o formă de iritație, în special dacă mucoasa nazală este deja inflamată sau iritată. Acest lucru va dispărea imediat.

Unele persoane pot simți o senzație ușoară sau pot avea nasul înfundat, fiind normal, și este senzația barierei create de Taffix™. Dacă simțiți un disconfort prelungit, vă puteți spăla nasul cu apă

caldă, până vă reveniți. Dacă simțiți disconfort puternic după aplicarea spray-ului Taffix™, consultați medicul.

Flaconul Taffix™ ar trebui folosit doar de către o singură persoană; împărțirea unui flacon cu alte persoane vă poate expune infectării!!

Compoziția chimică: Hipromeloză (HPMC) (89,9%), Acid citric (6%), Citrat de sodiu (4%), Clorură de benzoilconiu (0,1%) și Mentol (<0,1%).

Puteți cumpăra Taffix™ sub mai multe forme:

- REF 1841600 Taffix™** – 1 flacon de 1g pulbere
- REF 1841602 Taffix™ Travel** - 1 flacon de 0,7g pulbere.
- REF 1841603 Taffix™ Family** – 4 flacoane de Taffix™ (REF 1841600)

Nasus Pharma Ltd.

Harakevet 29 Tel Aviv, 6618306, Israel

Tel: +44-208-798-0660

Fax: +9723-573-6664

E-mail: info@nasuspharma.com

Site web: www.taffixprotect.co.uk

Fabricat în Israel

Distribuitor autorizat în România:

Ro Distribution 2000 SRL
Str Depozitelor, Nr 17, Pitești, jud Argeș
Tel: +40727716100, office@taffix.ro
Site web: www.taffix.ro

CE Număr de înregistrare în Israel
MOH (AMAR): 33010001

EC REP Mdi Europa GmbH
Langenhagener Str. 71, D-30855
Langenhagen, Germania
Tel: +49 511 39089530
E-mail: info@mdi-europa.com
Site web: mdi-europa.com

Symbols Glossary:

	Producător legal
	Marcaj CE, indicând că dispozitivul respectă Directiva 93/42/CE (MDD) a Consiliului
	Atenție, consultați documentele însoțitoare
	Consultați instrucțiunile de utilizare
LOT	Numărul lotului
REF	Număr de catalog
EC REP	Reprezentantul autorizat în Comisia Europeană
	A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat
	Temperaturi minime și maxime de depozitare
	A se feri de soare
	Data expirării (în formatul AAAA-LL-ZZ)
	Păstrați flaconul uscat