

AERoresc® - EASY Splints

Modellierbare Universalschienen für die Immobilisation menschlicher Gliedmaßen.

- Weich gepolsterter Mantel aus Kunststoffschaum IXPE Kern aus Aluminiumgemisch
- Patientenseitig strukturierte Oberfläche sorgt für sicheren Halt und eine bessere Luftzirkulation
- Patientenseite blau und Außenseite gelb
- Röntgenstrahlendurchlässig
- Flüssigkeitsabweisend (Blut, Sekret, Schweiß) wiederverwendbar
- Leichtgewichtig | kompakt und platzsparend | zuschneidbar



Bessere Luftzirkulation | Sicherer Halt

Basisformen und Anwendungsbeispiele



C-Curve | Strong

Ziehen Sie für die Wölbung der C-Curve beide Seitenkanten nach innen. Durch diese Form wird der Splint stabil und unbiegsam.




Reverse C-Curve | Stronger

Formen Sie die EASY Splint C-Curve. Anschließend formen Sie die Seitenkanten in die entgegengesetzte Richtung.



T-Curve | Strongest

Legen Sie die Seitenkanten übereinander. Biegen Sie dann die Hälfte jeder Seite um, bis die Biegung einen 90° Winkel erreicht hat. Diese Form führt zu einer stark erhöhten Stabilität.

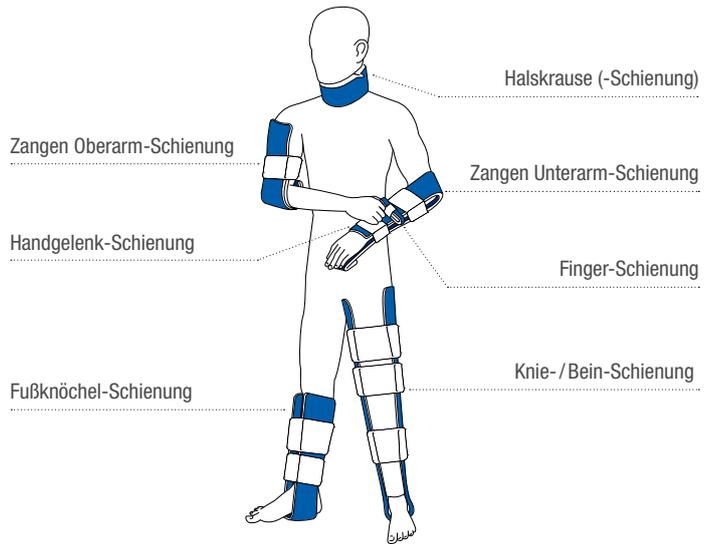

Einzelschienen



Alle Modelle auf Anfrage auch als Tactical Version erhältlich

Schienen-Set

Universalschienen-Set mit EASY Splints in den Größen XS, M und XL



Untergebracht in einer Einsatztasche aus Nylon

EASY Splint Einzelschienen

Größe	Maße (B x L)	Gewicht	Ausführung	Artikelnummer
XS	5 x 11 cm	5 g	flach	① HIMT02-SP-XS
M	50 x 11 cm	80 g	gerollt	② HIMT02-SP-M
XL	100 x 11 cm	160 g	gerollt	③ HIMT02-SP-XL

EASY Splint SET und Set-Ersatzschienen

Größe	Maße	Gewicht	Ausführung	Artikelnummer
2 x XS 1 x M 1 x XL	17,5 x 12 x 6 cm (B x H x T)	313 g	Set	⑥ HIMT02-SP-SET1
XS	5 x 11 cm (B x L)	5 g	gefaltet / flach	① HIMT02-SP-XS
M	50 x 11 cm (B x L)	80 g		④ HIMT02-SP-M-SET
XL	100 x 11 cm (B x L)	160 g		⑤ HIMT02-SP-XL-SET