

Montage- und Bedienungsanleitung

Vielen Dank für den Kauf des abschließbaren Edelstahlspenders RCS für 1l Euroflaschen.


**ACHTUNG: Desinfektionsmittel sind brennbar! Zündquellen fernhalten, Rauchen verboten!
Bitte beachten Sie auch die Sicherheitshinweise des Desinfektionsmittels!**

Montage

Edelstahl-Innenteil nach oben ziehen und danach nach vorne entnehmen.


Dosierer sowie Schlüssel aus dem Gehäuse entnehmen.

In der Rückseite des Wandhalter-Gehäuses sind 4 Bohrungen zur Wandbefestigung vorhanden. Je nach Wandbeschaffenheit passende Dübel / Schrauben wählen und das Wandhalter-Gehäuse an der Wand fest verschrauben.

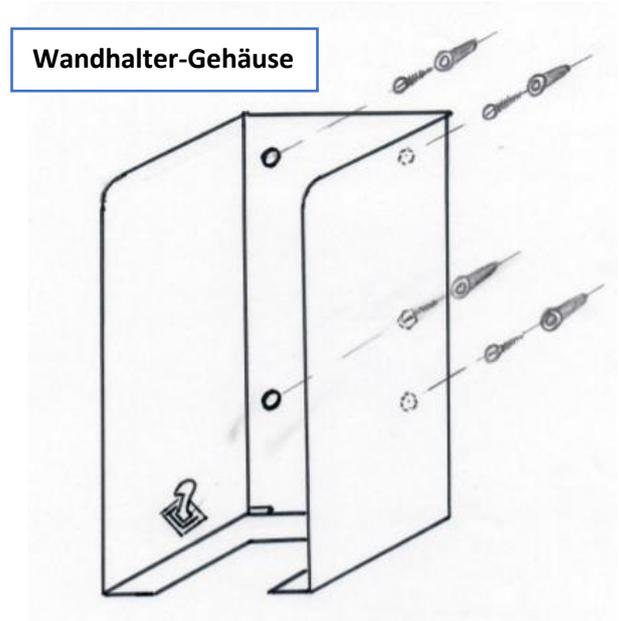


Wandspender öffnen

1. Schloss aufschließen
2. Wandhalter öffnen durch ca. 1cm Anheben des Edelstahl-Innenteils nach oben
3. Innenteil nach vorne abziehen

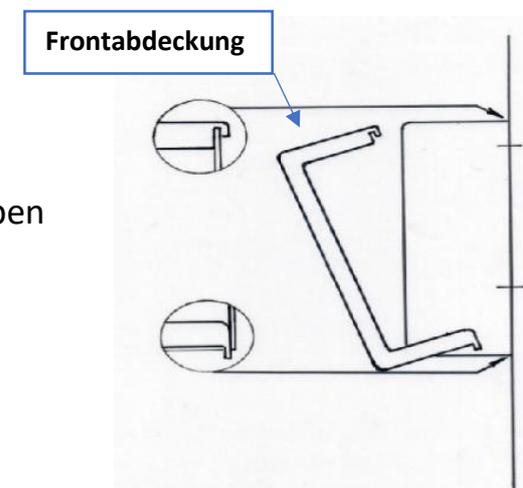

Desinfektionsmittel 1,0l einsetzen

4. Flasche mit dem Desinfektionsmittel aufrecht stellen
5. Deckel / Verschluss der Flasche abschrauben
6. Zulauf des Dosierers mit konischer Tülle auf die Flasche handfest aufstecken. Dabei darauf achten, dass sich Etikett der Flasche und Nase des Dosierers gegenüber befinden.

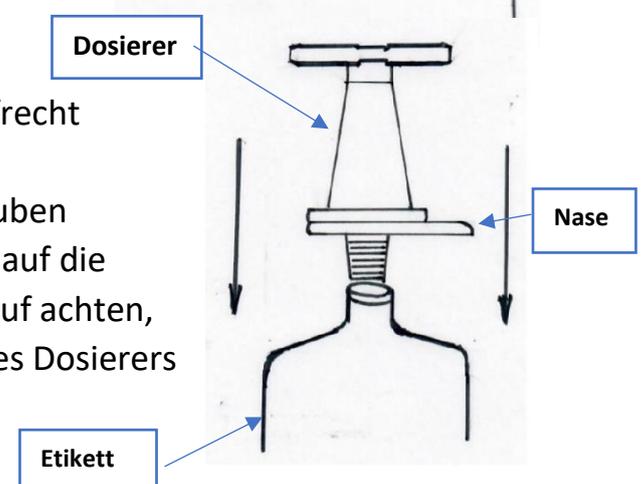

Flasche mit Dosierer einsetzen

7. Flasche mit Dosierer einsetzen:


- a. Flasche mit Dosierer umdrehen.
- b. An dem Dosierer befindet sich eine „Nase“. Diese Nase muss in die vorgesehene Aufnahme des Wandspenders eingeführt werden
- c. Flasche oben mit dem Metall-Niederhalter fixieren

8. Prüfung auf Dichtigkeit

9. Edelstahl-Frontabdeckung einsetzen


- a. Innenteil ca. 1cm über dem unteren Abschluss des Wandteils innen bis zum Anschlag vorsichtig einführen.
- b. Danach Innenteil nach unten bewegen, so dass die Laschen unten und oben einrasten.

10. Wandhalter abschließen – fertig

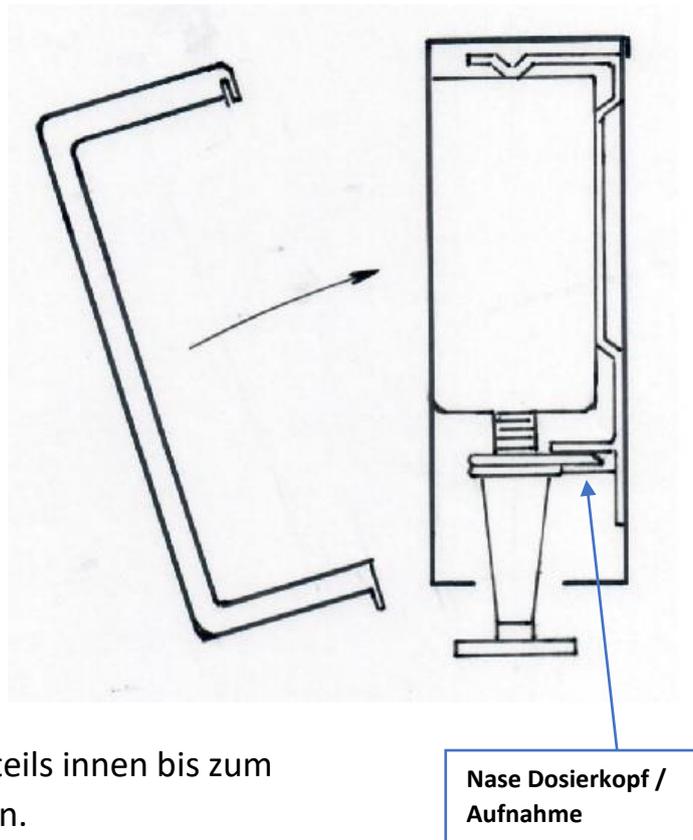

Bedienung

Die Bedienung erfolgt durch kurzes Hochdrücken des Dosierkopfes. Bei Bedarf wiederholen.

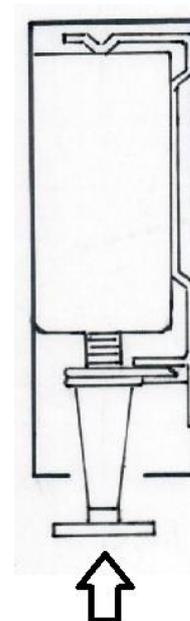

Ersatzteile und Desinfektionsmittel finden Sie unter: www.reicosept.com