



**Leer antes de usar**

Como precaución, deben utilizarse guantes y protección ocular al manipular sustancias y utilizar unidades de prueba. No perforo ninguna parte de la unidad. No retire la sonda una vez asegurada en la unidad. En el improbable caso de un derrame, enjuague completamente el área afectada con agua. Mantenga fuera del alcance de los niños. Todos los resultados son de presunción. Si es necesario, se pueden realizar pruebas de confirmación adicionales por un laboratorio competente.

Preparación de Prueba

**1** Retire la sonda Smart-Tip™ de la unidad de prueba.



**2** Muestree la sustancia sospechosa.

**Polvo**

Toque con la sonda Smart-Tip™ para muestrear.



**Tableta**


Presione firmemente la sonda Smart-Tip™ en la tableta mientras frota en un movimiento circular hasta que la punta esté completamente cubierta con sustancia.



Preparación de Prueba

**3** Asegure la sonda Smart-Tip™ en la unidad de prueba. Presione firmemente.


Las clavijas flexibles

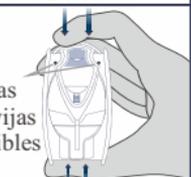

**PARE**  
**No continúe a menos que la sonda esté bloqueada debajo de las clavijas flexibles y no pueda ser retirada de la unidad de prueba.**

Identificación

**4** Con **pulgar e índice**, apriete la cámara 1 hasta que se rompa la cápsula.

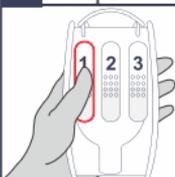


**5** Sacuda suavemente la unidad de prueba durante 2 o 3 segundos.



Identificación

**6** Con **pulgar e índice**, apriete la cámara 2 hasta que se rompa la cápsula.

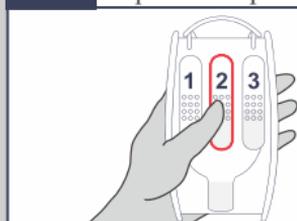


**7** Sacuda suavemente la unidad de prueba durante 2 o 3 segundos.



**Se desarrollará un color azul, azul-violeta o púrpura. Proceda al Paso 8.**

Identificación

**8** Con **pulgar e índice**, apriete la cámara 3 hasta que se rompa la cápsula.

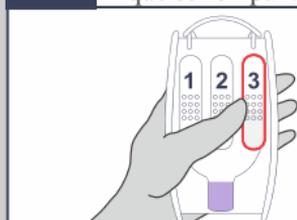

**9** Sacuda vigorosamente la unidad de prueba durante 20 segundos.



**Sostenga firmemente la unidad y mantenga en posición vertical, hasta que 2 capas estén visiblemente separadas. Esto puede tomar hasta 2 minutos. El proceso puede ocurrir más rápido.**

Resultados



La aparición de un color violeta en la capa superior de líquido dentro de dos minutos indica la presencia de **Efedrina** o **Pseudo-Efedrina**.



Si **no** se desarrolla color violeta en la capa superior de líquido dentro de dos minutos, **no** hay presente Efedrina.



Un color azul **no** indica un resultado positivo.



**Eliminación**

Es seguro eliminar el kit de prueba con la basura.

CPA 01-19

### INFORMACIÓN IMPORTANTE

Información importante

- Los kits discretos de prueba de drogas de IDenta Touch&Know™ se utilizan para determinar la presencia de ciertas drogas en sustancias como polvos, cristales, gránulos, escamas, píldoras, tabletas o líquidos.
- Todos los resultados son de presunción.** Si es necesario, se pueden realizar pruebas de confirmación adicionales por un laboratorio competente.
- Un alteración de color indica un resultado positivo para las drogas enumeradas **solo si ocurre dentro del primer minuto.**

Si **NO** hay alteración de color dentro del tiempo indicado, las drogas enumeradas **NO** están presentes en la muestra analizada. Después de un minuto, la sonda y el líquido pueden a alterar de color como un proceso normal de prueba y este alteración de color **NO** indica un resultado positivo.