




Leer antes de usar

Como precaución, deben utilizarse guantes y protección ocular al manipular sustancias y utilizar unidades de prueba. No perforo ninguna parte de la unidad. No retire la sonda una vez asegurada en la unidad. En el improbable caso de un derrame, enjuague completamente el área afectada con agua. Mantenga fuera del alcance de los niños. Todos los resultados son de presunción. Si es necesario, se pueden realizar pruebas de confirmación adicionales por un laboratorio competente.

Preparación de Prueba

1

Retire la sonda Smart-Tip[™] de la unidad de prueba.

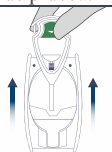

2

Muestree la sustancia sospechosa.

Materia Vegetal

Hachís

Toque con la sonda Smart-Tip[™] para muestrear. Asegúrese de que la punta esté completamente cubierta.



Presione firmemente la sonda Smart-Tip[™] en la ladrillo mientras frota en un movimiento circular hasta que la punta esté completamente cubierta con sustancia.



Preparación de Prueba

3

Asegure la sonda Smart-Tip[™] en la unidad de prueba. Presione firmemente.




Las clavijas flexibles

PARE
No continúe a menos que la sonda esté bloqueada debajo de las clavijas flexibles y no pueda ser retirada de la unidad de prueba.

Identificación

4

Con pulgar e índice, apriete la cámara 1 hasta que se rompa la cápsula.

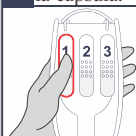

5


Sacuda suavemente la unidad de prueba durante 1 minuto.



Identificación

6

Con pulgar e índice, apriete la cámara 2 hasta que se rompa la cápsula.

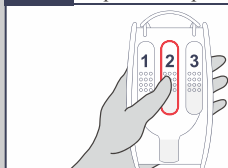

7

Sacuda suavemente la unidad de prueba durante 10 segundos.



Espera hasta 3 minutos a que se desarrolle totalmente el color. El color puede desarrollarse en menos tiempo.

Resultados



Si se desarrolla color azul-violeta o púrpura dentro de tres minutos, se sospecha de Marihuana/Hachís. Proceda al Paso 8 para confirmar los resultados.




Si no se desarrolla un color azul-violeta o púrpura, no hay presentes Marihuana ni Hachís. Proceda a la Eliminación.

Confirmación

8

Con pulgar e índice, apriete la cámara 3 hasta que se rompa la cápsula.

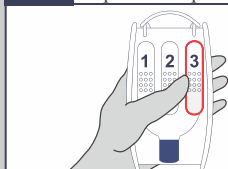

9

Sacuda vigorosamente la unidad de prueba durante 20 segundos.



Sostenga firmemente la unidad y mantenga en posición vertical, hasta que 2 capas estén visiblemente separadas. Esto puede tomar hasta 2 minutos. El proceso puede ocurrir más rápido.

Resultados de Confirmación



La aparición de un color azul-violeta o púrpura (incluso si es muy tenue) en la capa inferior de líquido dentro de dos minutos indica fuertemente la presencia de Marihuana o Hachís.

* El color puede oscurecerse con el tiempo.



Si la capa inferior de líquido no se vuelve de color azul-violeta o púrpura, no hay presentes Marihuana ni Hachís.



Eliminación

Es seguro eliminar el kit de prueba con la basura.

SPA 12-07-19

Información importante

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Los kits discretos de prueba de drogas de IDenta Touch&Know[™] se utilizan para determinar la presencia de ciertas drogas en sustancias como polvos, cristales, gránulos, escamas, píldoras, tabletas o líquidos.
- Todos los resultados son de presunción. Si es necesario, se pueden realizar pruebas de confirmación adicionales por un laboratorio competente.
- Un alteración de color indica un resultado positivo para las drogas enumeradas solo como se indica en las instrucciones. Si NO hay alteración de color dentro del tiempo indicado, las drogas enumeradas NO están presentes en la muestra analizada.