




Leer
antes
de usar

Como precaución, deben utilizarse guantes y protección ocular al manipular sustancias y utilizar unidades de prueba. No perforo ninguna parte de la unidad. No retire la sonda una vez asegurada en la unidad. En el improbable caso de un derrame, enjuague completamente el área afectada con agua. Mantenga fuera del alcance de los niños. Todos los resultados son de presunción. Si es necesario, se pueden realizar pruebas de confirmación adicionales por un laboratorio competente.

Preparación de Prueba


1 Retire la sonda Smart-Tip™ de la unidad de prueba.

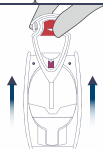

2 Muestree la sustancia o superficie sospechosa. (No se debe usar con materiales vegetales.)

Polvo y Material de Traza

Pase el papel de la sonda Smart-Tip™ por la sustancia o superficie sospechosa.

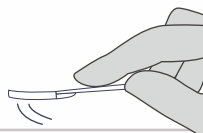

Preparación de Prueba

3 Asegure la sonda Smart-Tip™ en la unidad de prueba. Presione firmemente.



Las clavijas flexibles


PARE
No continúe a menos que la sonda esté bloqueada debajo de las clavijas flexibles y no pueda ser retirada de la unidad de prueba.

Identificación Cámara 1

4 Con pulgar e índice, apriete la cámara 1 hasta que se rompa la cápsula.



5 Sacuda suavemente la unidad de prueba durante 2 o 3 segundos.

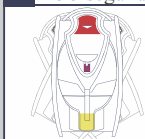

Resultados Cámara 1



La aparición de un color púrpura-violeta dentro de unos pocos segundos indica fuertemente la presencia de **Heroína Marrón**, si hay presente un polvo marrón,



La aparición de color verde o verde-azul dentro de unos pocos segundos indica la presencia de **Crack**.




Si se desarrolla cualquiera de los colores anteriores, proceda a la Eliminación.


Si no se desarrolla ninguno de los colores anteriores, proceda al Paso 6.

Identificación Cámara 2

6 Con pulgar e índice, apriete la cámara 2 hasta que se rompa la cápsula.

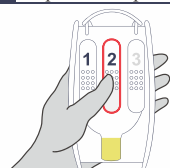

7 Sacuda suavemente la unidad de prueba durante 2 o 3 segundos.

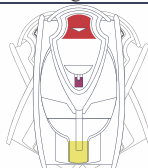

Resultados Cámara 2



La aparición de color púrpura-violeta dentro de unos pocos segundos indica la presencia de una de estas drogas sospechosas:

Heroína, Anfetamina, Metanfetamina, Extasis /MDMA, Bencedrona, Bufedrona, Carfentanilo, Catinona, DMT, EAPB, Fentanilo, Ketamina, LSD, mCPP, MDMAI, MDPBP, MDPV, Mefedrona, Metadona, Metcatinona, Metilona, Mexedrone, MPA, PCP, Pentedrona, Pentilona, PMA, PMMA, Psilocibina, 2-aminoindano (2-AI), otras drogas sintéticas/de diseño.



La aparición de color verde o verde-azul dentro de unos pocos segundos indica la presencia de **Cocaína**.



Si no se desarrolla ninguno de los colores anteriores dentro de un minuto, no hay presentes las drogas anteriores.

Eliminación

Es seguro eliminar el kit de prueba con la basura.

SP
01/19

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Los kits discretos de prueba de drogas de IDenta Touch&Know™ se utilizan para determinar la presencia de ciertas drogas en sustancias como polvos, cristales, gránulos, escamas, píldoras, tabletas o líquidos.
- Todos los resultados son de presunción. Si es necesario, se pueden realizar pruebas de confirmación adicionales por un laboratorio competente.
- Un alteración de color indica un resultado positivo para las drogas enumeradas solo si ocurre dentro del primer minuto. Si NO hay alteración de color dentro del tiempo indicado, las drogas enumeradas NO están presentes en la muestra analizada. Después de un minuto, la sonda y el líquido pueden alterar de color como un proceso normal de prueba y este alteración de color NO indica un resultado positivo.

Información importante