



UREM

## Käyttöohje

kaukosäädin ja hieronnat

**unikulma**

## Turvallisuusohjeet ja huomioita langattoman ohjausjärjestelmän käytöstä

Ohjausjärjestelmä käyttää 2,4 GHz taajuutta ja monikanavaista liikennöintiä, eikä ota häiriötä muista langattomista laitteista.

Ohjausjärjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vain sisätiloissa. Käsittele ohjausjärjestelmän osia varovasti.

Varmista ennen käyttöönottoa, että ohjausjärjestelmän osat ovat moitteettomassa kunnossa (johdot ja kuoret ovat ehjät). Jos havaitset vaurioita, palauta ohjausjärjestelmän osat Unikulmalle.

Ohjausjärjestelmä ei häiriinny matkapuhelinten bluetooth liikennöinnistä.

Älä avaa itse kaukosäädintä äläkä moottoria. Takuun voimassaolo päättyy, mikäli kuori avataan. Tarvittavat korjaustyöt saa tehdä ainoastaan Unikulman huolto. Paristokotelon saa avata paristojen vaihtoa varten.


Vältä kaiken nesteen pääsemistä kaukosäätimeen tai moottoriin, sillä se vaurioittaa laitteet.

Varmista, etteivät lapset käytä langatonta ohjausjärjestelmää ilman ohjeistusta tai valvontaa.

Radio signaali läpäisee seiniä ja kattoja. Käytä kaukosäädintä vain siinä huoneessa, missä säädettävä vuoteesi sijaitsee.

Henkilöitä, joilla on sydämentahdistin ei pidä käyttää hierontajärjestelmää, koska järjestelmä voi vaikuttaa tahdistimeen.


Aseta päädyt aina ala-asentoon, kun vuodetta ei käytetä. Älä kuormita päätyjä yläasennossa millään tavoin.

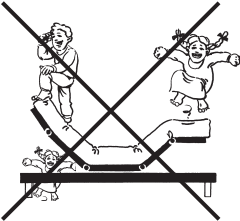

## Langattoman ohjausjärjestelmän asentaminen

- jos vuoteen nostomoottori on kytkettynä pistorasiaan, irroita se pistorasiasta
- asenna paristot kaukosäätimeen; varmista, että asennat paristot oikein päin
- kytke vuoteen nostomoottori pistorasiaan
- muodosta yhteys kaukosäätimen ja moottorin välille (s.4)

## Kaukosäätimen toiminnot

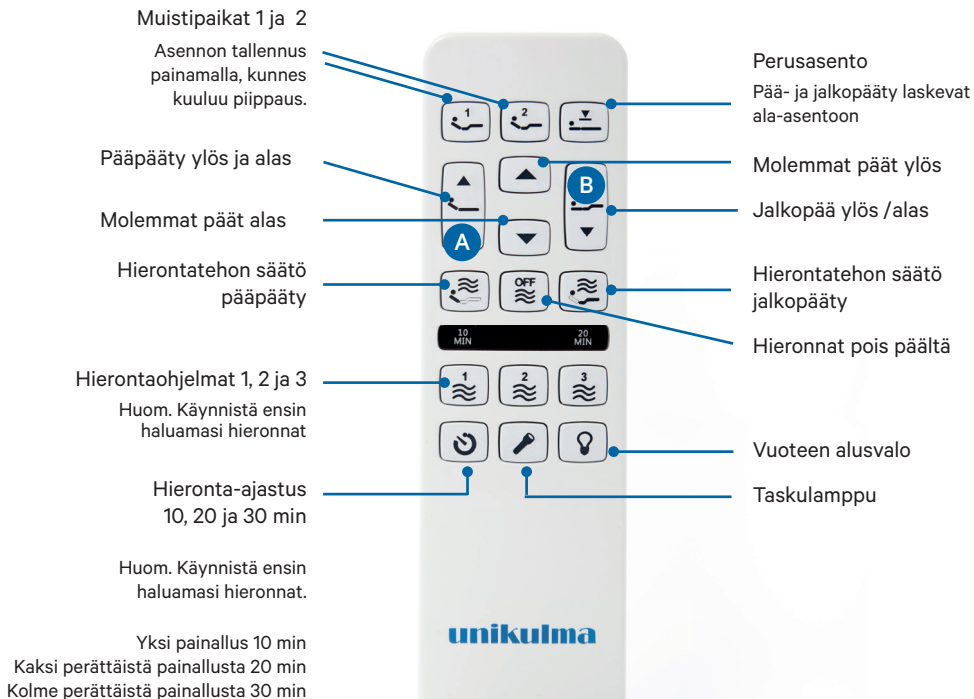

## Yhteyden muodostaminen kaukosäätimen ja vuoteen moottorin välille

Kaukosäätimen ja vuoteessa olevan moottorin välille on muodostettu yhteys Unikulman tehtaalla. Tämä yhteys voi joissakin tapauksissa hävitä. Jos kaukosäätimen ja vuoteen välinen yhteys on hävinnyt, se luodaan uudelleen painamalla ensin kaukosäätimen näppäimiä **A** ja **B** (katso kuva) ja pitämällä ne pohjaan painettuna, kun saman aikaisesti painetaan moottorin kyljessä olevaa ”reset/coding” näppäintä, jolloin moottorista kuuluu piippaus. Vuode on nyt käyttövalmis.

## Vuoteen päätyjen alaslaskenta, mikäli kaukosäädin ei toimi (Reset)

Mikäli järjestelmän kaukosäädin ei syystä tai toisesta toimi, saadaan vuode laskettua ala-asentoonsa kytkemällä vuoteesta virrat pois ja odottamalla hetken ja sen jälkeen kytkemällä virrat uudelleen päälle, mikäli kyseessä ei ole sähkökatko. Huomaa: Vuoteessa on muistipaikka toiminto. Tällöin virran katkaiseminen vuoteesta ja sen uudelleen kytkeminen resetoivat moottoreiden asennon (menevät ala-asentoon), mikäli jompikumpi päädyistä on ollut säädettyinä ylöspäin.

Mikäli sähkökatkon aikana vuode halutaan laskea ala-asentoon, on moottorin muuntajaan kytkettävä hätälaskentatoiminnon paristot paikoilleen ja painamalla muuntajan päällä olevaa ”power down” painiketta. Käytä tätä toimintoa vain silloin, kun kaukosäädin ei toimi. Mikäli moottorin muuntajaan kytketään paristot paikalleen hätälaskutoiminnon käyttämiseksi, on paristot irroitettava sen jälkeen, kun vuode on ala-asennossa.

## Vuoteen ääni

Säädettävälle vuoteelle on ominaista, että sen käytöstä muodostuu ääntä. Myös hierontatoiminnon käytölle äänet ovat ominaisia. Hierontamoottoreiden ääntä voidaan pienentää nostamalla jalko- ja pääpäätä hiukan ylöspäin sekä säätämällä hierontojen voimakkuutta.

## Paristojen vaihto

- Avaa paristokotelon kannen lukitus kevyesti painamalla paristokotelon kannen yläpinnasta ja samalla liu'uttamalla sitä alaspäin. Ota vanhat paristot ja kierrätä ne.
- Asenna uudet paristot paikoilleen huomioiden niiden oikea asennussuunta
- Sulje paristokotelon kansi liu'uttamalla sitä ylöspäin kunnes se lukittuu paikoilleen.

## Tekniset tiedot ja takuu

- Takuu: 24 kk
- Malli: UREM kaukosäädin, hieronnat
- Paristot: 1,5V AAA, 2kpl
- Käyttötaajuus: radiotaajuus 2,4 GHz
- Vuoteeseen saatavissa lisävarusteena USB laturi

**Unikulma Oy**

Petikontie 4,

01720 Vantaa

puh. 040 - 585 6179

[www.unikulma.fi](http://www.unikulma.fi)

**unikulma**