



Orthocollator

Les Orthocollators à chaleur humide...le premier choix pour les thérapeutes spécialisés en soins corporels (massothérapeutes, orthothérapeutes, physiothérapeutes, chiropraticiens, les entraîneurs sportifs, etc.).

La thérapie par la chaleur humide est indiquée pour toutes les douleurs et raideurs musculaires et articulaires. Très bénéfique pour les douleurs associées à l'arthrite.

Offre jusqu'à 30 minutes de chaleur pour un soulagement en profondeur.

Mode d'emploi pour la cuisinière ou le four à micro-ondes :

- ▶ Mettre l'Orthocollator dans un récipient approprié : en émail, acier inoxydable ou un récipient indiqué pour micro-ondes (à éviter : récipients en aluminium car ceci pourraient provoquer une décoloration du tissu).
- ▶ Toujours s'assurer qu'il soit complètement recouvert d'eau (première utilisation – tremper pendant 2 heures avant d'utiliser).
- ▶ Augmenter la température de l'eau à 71°C pendant 20 minutes.

Un dispositif chauffant à Orthocollator est aussi disponible. Ce bac est doté d'un réglage thermostatique afin de garantir une température thérapeutique idéale pour l'Orthocollator. Durée de vie du bac à Orthocollator : pratiquement illimitée!

Pour usage non-fréquent : Après l'utilisation, mettre l'Orthocollator humide dans un sac en plastique bien fermé et le conserver au congélateur.

Application :

- ▶ Sortir de l'eau avec prudence.
- ▶ Pour une utilisation intensive et sécuritaire, utiliser la housse d'Orthocollator adaptée au format de l'Orthocollator.

Précaution d'usage :

- ▶ Ne pas utiliser directement sur la peau
- ▶ Porter une attention particulière aux peaux sensibles
- ▶ Ne pas s'asseoir ni s'étendre dessus
- ▶ Surveiller régulièrement durant le traitement afin de s'assurer du confort de votre client (plus particulièrement dans les 5 premières minutes)
- ▶ Ne pas utiliser sur des plaies ouvertes
- ▶ Ne pas ajouter d'eau de Javel à l'eau

Laver l'Orthocollator à la main avec une brosse douce (savon doux - savon à vaisselles) Bien rincer. Changer l'eau de votre récipient aux 2 semaines.