



GUIDE DU PROFESSIONNEL

DOCTOR LIFE® V7 Luxury - Health care/Beauté Bien-être V7 Deluxe
Appareil de pressothérapie tout équipé

La pressothérapie

Cette technique de pressions existe déjà depuis plusieurs années et son efficacité n'est plus à démontrer. Elle est utilisée sur le plan médical et esthétique par les massothérapeutes, kinésithérapeutes, orthothérapeutes, et esthéticiennes dans les centres multidisciplinaires, les spa et les centres de thalassothérapie.

Bénéfices de la pressothérapie

- Aide à augmenter et à améliorer la circulation lymphatique et sanguine;
- Aide à soulager l'œdème;
- Réduit les tensions musculaires;
- Réduit le stress journalier;
- Aide à soulager les douleurs musculaires et articulaires;
- Soins du corps : Aide à améliorer la silhouette;
- Facilite la pénétration transcutanée de produits topiques.

La pressothérapie est conseillée pour :

- Troubles circulatoires (insuffisances veineuses, varices, jambes lourdes et fatiguées);
- Œdèmes post-traumatiques et postopératoires (comme les « gros bras » due à une mastectomie, une fracture, une entorse, une brûlure ou un hématome ;
- Douleurs et raideurs musculaires;
- Récupération musculaire après un sport;
- Troubles nerveux tel que le stress et l'insomnie;
- Douleurs arthritiques et rhumatismales;
- Éliminer les toxines;
- Cellulite;
- Remodelage corporel.

La pressothérapie est déconseillée pour :

- Thrombophlébite; phlébite;
- Cardiopathie sévère;
- Tension artérielle (hypertension avec systole au-dessus de 180);
- Fièvre;
- Infection;
- Maladies rénales sévères;
- Les abcès et les tumeurs.

CONSEILS D'ENTRETIEN ET ENTREPOSAGE :

- ▶ Utilisation à l'intérieur
- ▶ Ne pas utiliser dans une pièce trop humide
- ▶ Ne pas utiliser ou le ranger près d'une source importante de chaleur (chauffage ou au soleil)
- ▶ Tenir hors de la portée des enfants
- ▶ Prudence : ne pas plier les tuyaux
- ▶ Entretien avec un linge sec

L'utilisation du bas confort est fortement suggérée pour l'hygiène et pour protéger votre équipement de la sueur, des produits cosmétiques utilisés par vos clients, le sébum et produits topiques utilisés pour optimiser les soins.

Cet ensemble comprend :

- 1 compresseur durable et silencieux
- 1 paire de bottes à 4 compartiments grandeur : Large (74 X32 CM)
- 1 paire de bottes à 4 compartiments grandeur : X-Large (79 X 38 CM)
- 1 manchon à 4 compartiments pour le bras (86.5 X 25CM)
- Les tuyaux de raccordement (2 raccordements : une pour les bottes, l'autre pour le bras);
- Un guide d'utilisation.

Spécifications techniques:

Alimentation : 110V, 50/60 Hz

Consommation : 50 VA

Pression : 20-250mmHg

Poids : 2 kg (compresseur)

Protocole de soin : Pressothérapie

Matériel requis:

Produits :

Les appareils de pressothérapie facilitent la pénétration transcutanée de produits topiques. Nous recommandons certains produits qui permettront d'optimiser les effets drainants du soin.

- Huiles essentielles
 - Cyprès = Troubles circulatoires
 - Melaleuca = Troubles lymphatiques, œdèmes
 - Marjolaine = Douleurs ou raideurs musculaires
 - Sérum Dermo-Fitness en combinaison avec Crème modelage minceur = Soins du corps
 - Formule aromaceutique Détente ou Lavande = Relaxation
 - Pin = Douleurs articulaires

Accessoires essentiels :

- L'appareil de pressothérapie;
- Bas confort pour draineur lymphatique (pour le confort du client, l'hygiène et pour prolonger la vie de l'équipement); (100 % coton, lavable, extensible)
- Un ensemble de draps professionnel;
- 2 ou 3 coussin d'installation.

Outils complémentaires intéressants :

- Vibromasseur avec adaptateur approprié (pour optimiser le soin)

Un bien être se ressent dès la première séance. Plus la fréquence des séances sera élevée, plus vous obtiendrez des résultats sur votre santé et votre silhouette.

Méthode de préparation de la pressothérapie

Simplicité d'utilisation :

1. Installer l'appareil sur une surface stable. Brancher votre appareil dans la prise électrique.
2. Fixer le tuyau de raccordement d'air approprié à l'appareil [notez qu'il y a deux modèles (un pour les jambes (à 2 circuits et l'autre pour le bras (1 circuit))].
3. Il est important de bien brancher les tuyaux afin d'obtenir une pression du bas vers le haut.
Comment faire? Notez que les tubes ont 4 longueurs différentes et des embouts de couleurs différentes. Vous devez brancher le tube le plus court (avec embout gris foncé) sur la section du haut de la botte ou du manchon (avec l'insertion gris foncé), le 2^{ème} tube sur la deuxième section, le 3^{ème} tube sur la troisième section, le tube le plus long sur la dernière section (avec embouts et insertions gris pâles).

4. Votre client peut être confortablement assis ou allonger sur le dos (selon le soin). Si vous utiliser les bottes, surélever légèrement les jambes. D'abord enfiler le bas confort pour ensuite enfiler la section désirée (bottes ou manchon. [Enlever tous bijoux pouvant causer des blessures ou des bris d'équipements.] Attention lors que vous fermer la fermeture éclair (afin de ne pas coincer le bas confort et/ou la peau du client).
5. Facile d'utilisation :
- A) *Allumer l'appareil : Presser le bouton POWER (bouton à pression)*
 - B) *Choisir la durée : TIME : Temps de travail (touche digitale 10-20-30 minutes).*
 - C) *Choisir le mode : Mode massage ou Mode circulation (touche digitale) Voir schéma sous l'appareil. Mode massage (effet de vagues)/Mode circulation (effet de vagues mais les sections restent gonflés – compression).*
 - D) *Choisir le segment à traiter : Par défaut, tous les compartiments sont activés (1CH-2CH-3CH-4CH (on peut travailler une zone, plusieurs zones ou toutes les zones à la fois...presser vis-à-vis le segment pour désactiver).*
 - E) *PRESSURE : Pour choisir la force de la compression (bouton à tourner).*
6. *Mettre l'appareil en marche START/STOP (bouton à pression), ajuster la puissance de la pression avec la collaboration de votre client (en augmentant progressivement (bouton à tourner). Notez que la pression ne doit pas être désagréable ni trop forte). Commencer plus faible et ajuster graduellement. Voir graphique sur l'appareil. Commencer la pression dans la zone verte (plus faible et augmenter graduellement).L'appareil est muni d'un graphique lumineux de différentes couleurs pour doser la pression.*

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE :

La pressothérapie en complément d'un drainage lymphatique, d'un soin minceur ou d'un soin sportif peut augmentée et accélérée les effets recherchés.

GARANTIE UN AN PIÈCES ET MAIN D'ŒUVRE : Compresseur

GARANTIE DEUX MOIS : Bottes et manchon (bras)



1.800.329.1304 www.cliniquelafontaine.com