


商品说明

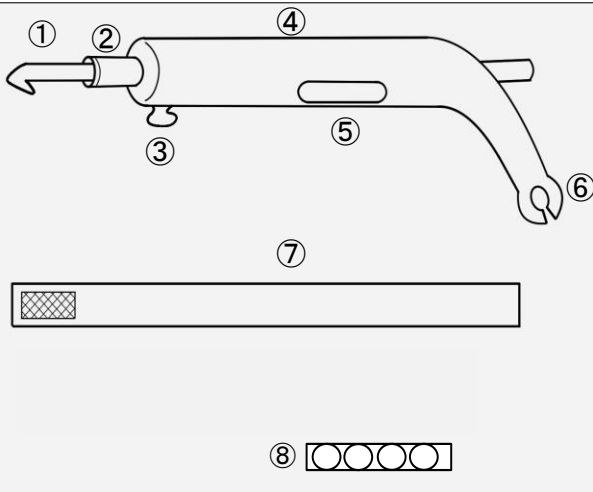

①钩针：7.5号

②适配器（用于钩针7.5号）：
用于将钩针连接到主体上。

③阻挡器：
作为临时线钩，还可以作为防止手滑落的
阻挡器使用。

④主体：将钩针安装后使用。

⑤带孔：安装辅助带时使用。

⑥狭缝孔：用来穿过线的导线器。

⑦辅助带：30cm

⑧记号贴纸：设置后为了记住位置，将其贴在适配器和主体上。

注意事项

- 请勿用于钩编以外的用途。
- 请将本品放在儿童触碰不到的地方保管。
- 请注意针尖很锋利。
- 请在避免阳光直射和高温多湿的地方使用和存放。
- 认知能力不足人士使用时，请务必在指导员的监督下使用。
- 有污渍时，请使用中性洗涤剂清洗并彻底晾干。
（不能使用汽油等挥发性清洁剂）
- 如果双手均活动不方便，可以用两根本钩针编织。
- 使用辅助带时，每隔10~15分钟取下辅助带，促进手部的血液循环。
- 在我们的网站上发布了关于使用方法的视频。
- 如需咨询，请通过我们网站上的咨询表格或通过电子邮件、电话与我们联系。

材料：

<主体> 握把部分-聚氨酯

<配件> 钩针-铝

辅助带-聚氨酯绒纱线（医用止血带材料）

- 产品发货时已经安装好了7.5号钩针。
- 在功能上，采用了当施加力量过大时钩针会从主体上脱落的安全设计。

通用钩针“Amiche” 的使用方法

通用钩针编织“Amiche”适用于多种握持方式。

请尝试轻松的握持方式，并选择最适合的握持方式享受钩编。


★ 推荐的握持方式是什么？

目前，如果不觉得手部活动不方便，可以选择以下三种握持方法。

- 无辅助带的“正常握持” 图A
- 无辅助带的“攥拳握持” 图B
- 无辅助带的“反向握持” 图C

如果觉得手部活动不方便，可以选择以下握持方式。

(* 关于如何安装辅助带，请参阅(1)如何取下钩针、(2)如何使用辅助带。)

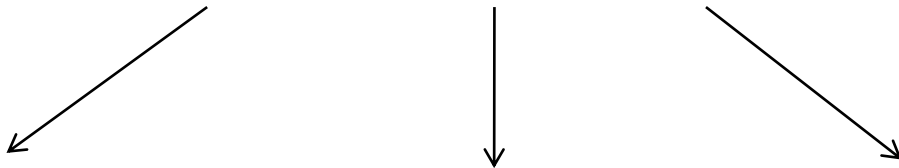

如果左手不方便

· 通过左手使用辅助带“双手握持”。
(右手的钩针可以使用正常的钩针。) 图D

· 通过左手使用辅助带使用阻挡器 图E

(* 在图E中钩针是固定在右手，使用时在左手固定钩针并用右手操作线。)


如果双手不方便

· 通过双手辅助带使用“双手握持”。图D

如果右手不方便


- 通过右手使用辅助带“正常握持” 图A
- 通过右手使用辅助带“攥拳握持” 图B
- 通过右手使用辅助带“反向握持” 图C
- 通过右手使用辅助带使用阻挡器 图E

图A：正常握持

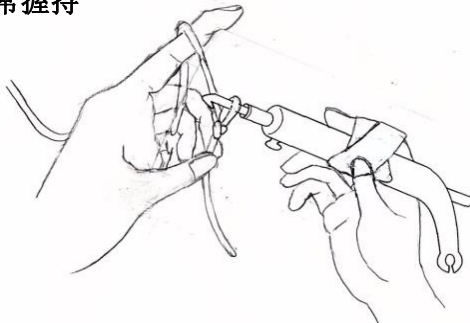


普通的钩针握持方法，用辅助带包住食指、中指、（或加上无名指）缠绕后使用。

图B：攥拳握持

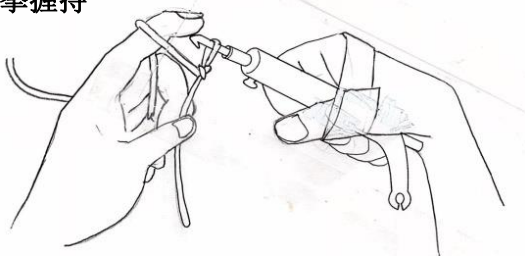


像攥拳一样握持主体，用辅助带包住大拇指、食指、中指缠绕后使用。

图 C: 反向握持

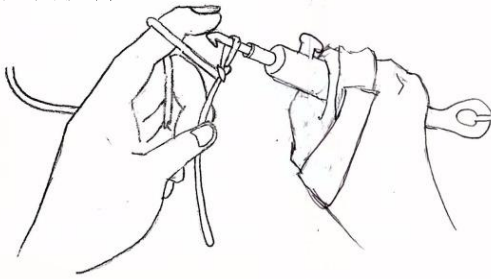

将钩针的阻挡器朝上，装好钩针，攥住握持。阻挡器和主体后部的曲线设计可防止手滑，可稳定握持。

图 D: 双手握持

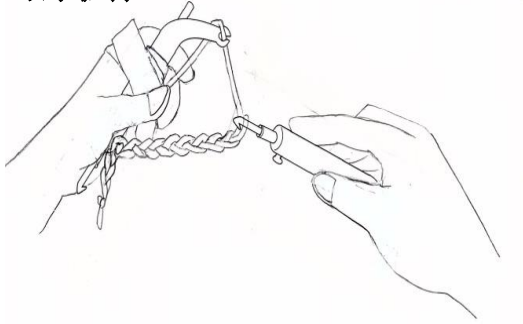


将主体的前后倒置，使用辅助带固定在左手。

通过狭缝孔将线通过，作为导线器（代替左手的食指）来使用。


通过将锁扣临时挂在阻挡器上，即使左手手指不灵活，因针织物被固定所以使编织变得容易。

图 E: 阻挡器的使用示例


用辅助带将主体固定在右手上。
用左手穿线每一针来进行编制。
即使右手活动不便，因钩针被固定住，所以编制变得容易。

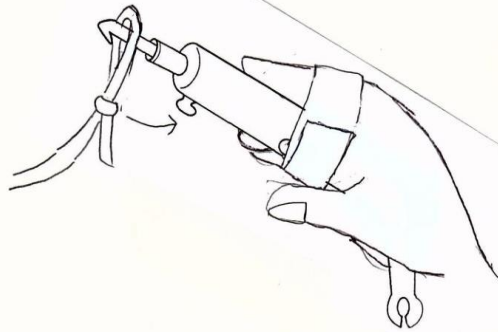


① 打第一个大结并把它挂在阻挡器上。

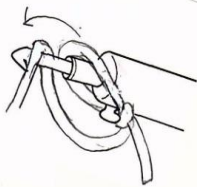

② 在钩针上挂线，并穿过第一个结。

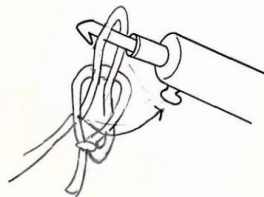


③ 成功完成了第一个锁扣。
再次将第一个结挂在阻挡器上。






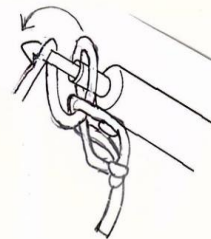


④ 在钩针上挂线，并穿过第二个结。这样第二个锁扣也完成。将第二个结挂在阻挡器上，并反复制作锁扣。

(1) 如何拔掉钩针

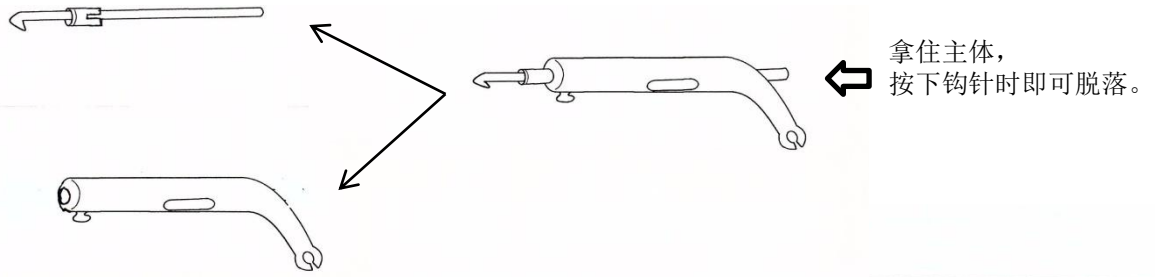

(2) 如何使用辅助带

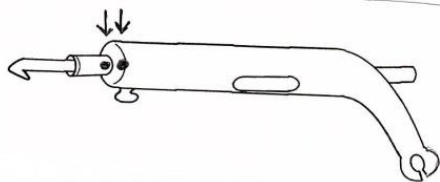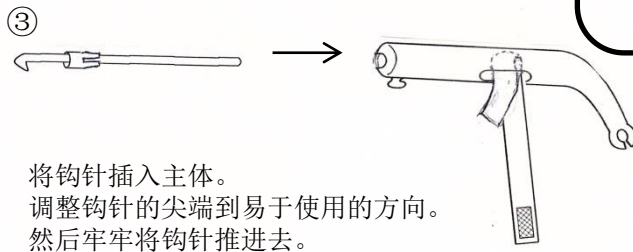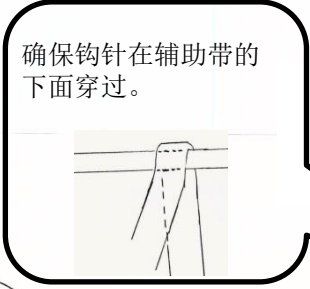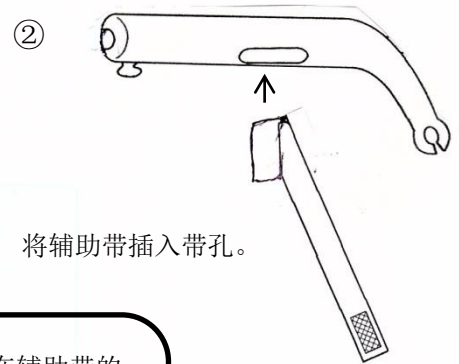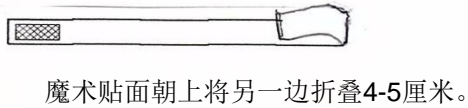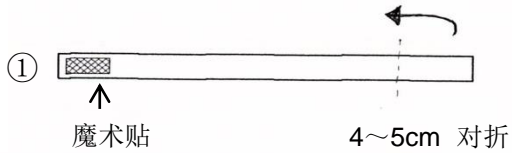

在钩针装好的状态下，将标记贴纸贴在适配器和主体上。作为下次使用时定位参考的标识。