

Beste meneer/mevrouw,

Bij deze brief ontvang je de nieuwe batterij voor je Philips HeartStart AED. Om te voorkomen dat de AED niet bruikbaar is op het moment dat iedere seconde telt, hebben wij het volgende (dringende) advies:

### **Vervang de batterij direct!**

#### **Batterij vervangen**

1. Aan de achterzijde van de AED verwijder je de oude batterij
2. Haal de nieuwe batterij uit de verpakking
3. Plaats deze in het batterijcompartiment
4. De AED gaat nu een zelftest uitvoeren (duurt ongeveer 1 minuut)
5. Druk niet op de groene knop
6. Druk op de oranje knop wanneer deze knippert
7. De AED meldt dat hij klaar is voor gebruik. In geval van nood kan je op de groene aan/uit knop drukken. Wacht even af, na enige tijd gaat het groene lampje (rechtsboven de aan/uit knop) knipperen
8. Doe de AED terug in de draagtas. Je AED is weer klaar voor gebruik!

#### **Oude batterij inleveren**

De oude batterij mag niet in de vuilnisbak worden gegooid. Je kan de batterij inleveren bij één van de verschillende inleverpunten bij jouw in de buurt zoals de supermarkt of een gemeentelijk depot.

#### **HartslagNu updaten**

Zodra de nieuwe batterij in de AED is geplaatst, is het belangrijk om de vervaldatum aan te passen in je HartslagNu account.

Wij vertrouwen erop je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen kan je altijd contact met ons opnemen via [info@procardio.nl](mailto:info@procardio.nl) of 035 – 33 33 515.

Met hartelijke groet,

Team AED360-ProCardio