


Beste meneer/mevrouw,

Bij deze brief ontvang je een nieuwe elektrodecassette. Om te voorkomen dat de AED niet bruikbaar is op het moment dat iedere seconde telt, hebben wij het volgende (dringende) advies:

Vervang de elektrodecassette direct!

Elektrodecassette vervangen

1. Plug de connector van de oude elektrodecassette los van de AED
2. De AED zal het volgende melden "Steek de connector van de elektrode in"
3. Plug de connector van de nieuwe elektrodecassette aan op de connectorpoort van de AED
4. De AED zal het volgende melden "Connector ingestoken"
5. De AED kan weer terug in de draagtas worden geplaatst.

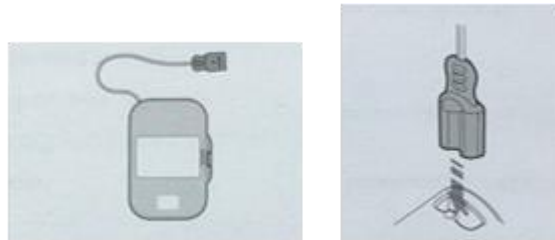

Belangrijk

Waarschuw medegebruikers dat zij nooit zonder geldige reden de gesealde verpakking van de elektrodecassette mogen openen. De elektroden verliezen hierdoor hun kleefkracht. Open de cassette alleen bij een inzet.

Oude elektrodecassette weggooien

De oude elektrodecassette mag alleen bij het Klein Chemisch Afval (KCA) worden weggegooid. Een inleverpunt vind je onder andere bij supermarkten of een gemeentelijk depot.

HartslagNu updaten

Is de AED aangemeld bij HartslagNu, dan is het belangrijk om de vervaldatum aan te passen in je account.

Wij vertrouwen erop je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen kan je altijd contact met ons opnemen via info@procardio.nl of 035 – 33 33 515.

Met hartelijke groet,

Team AED360-ProCardio