
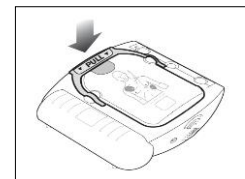
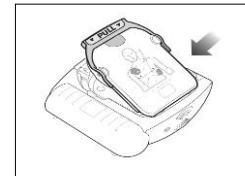
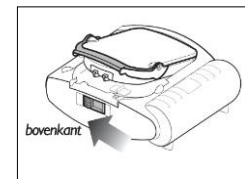


Beste meneer/ mevrouw,

Je ontvangt van ons een nieuwe elektrodecassette voor de Philips HeartStart HS1 AED. Om te voorkomen dat de AED niet bruikbaar is op het moment dat iedere seconde telt hebben wij het volgende (dringende) advies:

Vervang de elektrodecassette direct!

1. Haal de nieuwe elektrodecassette uit de wit/rode verpakking.
2. Plak de bijgeleverde sticker met de tekst 'TREKKEN' over de plek waar nu 'PULL' staat
3. Laat de batterij in de AED bij het vervangen van de elektrodecassette.
4. Schuif de vergrendeling aan de bovenzijde van de AED opzij. Neem de oude elektrodecassette uit het apparaat.
5. Na het verwijderen van de elektrodecassette zal de AED een piep geven en melden *'plaats een nieuwe elektrodecassette'*.
6. Plaats eerst de onderkant van de nieuwe cassette in het cassettecompartiment.
7. Druk de cassette stevig aan totdat deze op zijn plaats klikt.
8. Als de elektrodecassette is geplaatst geeft de AED een piep en meldt de AED *'elektroden voor volwassenen, in geval van nood druk op de groene aan/uit knop'*.
Wacht even, na enige tijd gaat het groene lampje (rechtsboven de aan/uit knop) knipperen.
9. Doe de AED terug in de draagtas. Jouw AED is weer klaar voor gebruik.
10. Informeer medegebruikers dat zij nooit zomaar de gesealde verpakking van de elektrode mogen openen. De elektroden zullen hierdoor hun kleefkracht verliezen.

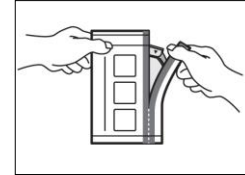

Oude elektrodecassette weggooien

De oude elektrodecassette mag alleen bij het Klein Chemisch Afval (KCA) worden weggegooid. Een inleverpunt vind je onder andere bij supermarkten of een gemeentelijk depot.

HartslagNu updaten

Zodra de nieuwe elektrodecassette in de AED is geplaatst, is het belangrijk om de vervaldatum aan te passen in je HartslagNu account.

Wij vertrouwen erop je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen kan je altijd contact met ons opnemen via info@procardio.nl of 035 – 33 33 515.

Met hartelijke groet,

Team AED360-ProCardio