

LET OP!

Belangrijke instructies bij jouw Philips HeartStart HS1 AED.

Activeer je AED direct.

1. Trek de groene plastic strook uit de AED
2. De AED voert nu een zelftest uit
3. Druk niet op de groene knop
4. Druk op de oranje knop wanneer deze knippert
5. De zelftest van de AED duurt ongeveer 1 minuut (tijdens de zelftest zegt de AED regelmatig 'testen')
6. Zegt de AED 'klaar voor gebruik', dan is de zelftest afgerond
7. Controleer of het groene lampje (rechtsboven) knippert. Dit lampje knippert elke 4 seconden groen, en laat hiermee zien dat de AED klaar is voor gebruik
8. Plaats de AED in de draagtas en sluit deze. Je ziet het groene lampje door het kijkvenster.
9. Indien aanwezig: bevestig de Snelle Interventiekits met bijgeleverde haak aan de tas.