

MANUAL TALLIMETRO HM 80P

MANUAL DEL USUARIO

1. Notas de Seguridad
 - A. Información General
2. Partes
 - A. Uso del dispositivo
 - B. Uso para zurdos
 - C. Uso para diestros
3. Especificaciones del Producto
4. Información del Dispositivo
5. Declaración de Conformidad



1. Notas de Seguridad
 - A. Información General

Gracias por elegir este dispositivo médico de Charder. Está diseñado para ser fácil y sencillo de operar, pero si encuentra algún problema que no se aborde en este manual, comuníquese con su socio de servicio local de Charder.

Antes de comenzar a utilizar el dispositivo, lea cuidadosamente este manual del usuario y guárdelo en un lugar seguro para consultas futuras. Contiene instrucciones importantes sobre la instalación, el uso adecuado y el mantenimiento.

Uso Previsto

Este dispositivo está diseñado para medir la altura de sujetos, con fines de diagnóstico de problemas relacionados con la altura por parte de profesionales.

Manipulación General

- A. El dispositivo debe colocarse en una superficie estable, plana, sólida y antideslizante.
- B. Asegúrese de que todas las piezas estén correctamente bloqueadas y apretadas antes de operar el dispositivo.

Instrucciones de Seguridad

- A. Vida útil esperada: 5 años.

Limpieza

- A. La superficie del dispositivo debe limpiarse con toallitas a base de alcohol. No se deben utilizar líquidos corrosivos para la limpieza. No se deben utilizar lavadoras a presión.

Garantía/Responsabilidad

- A. El período de garantía será de dieciocho (18) meses, a partir de la fecha de compra. Guarde su recibo como comprobante de compra.
- B. No se aceptará responsabilidad por daños causados por cualquiera de las siguientes razones: almacenamiento o uso inadecuado, instalación o puesta en marcha incorrecta por parte del propietario o terceros, desgaste natural, cambios o modificaciones, manejo incorrecto o negligente.

Reporte de Incidentes

Cualquier incidente grave relacionado con el dispositivo debe ser reportado al fabricante, al representante de la UE (si el dispositivo se utiliza en un estado miembro de la UE) y a la autoridad competente del estado miembro del usuario/sujeto

2. PARTES


- A. Pieza de cabeza izquierda
- B. Varilla Izquierda
- C. Varilla derecha
- D. Pieza de cabeza derecha

NOTA: Un lado muestra centímetros y el otro lado muestra pulgadas.




3. USO DEL DISPOSITIVO

USO PARA SURDOS

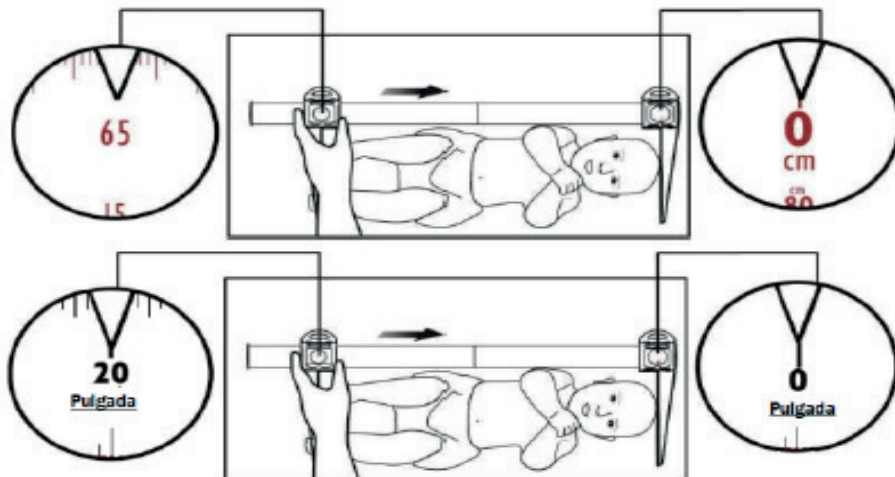

- A. Fije la pieza de cabeza derecha en 0 cm.
- B. Enderece los pies del bebé.
- C. Deslice la pieza de cabeza izquierda hasta que toque las plantas de los pies del bebé.
- D. La lectura en la pieza de cabeza izquierda es la longitud del bebé.

USO PARA DIESTROS

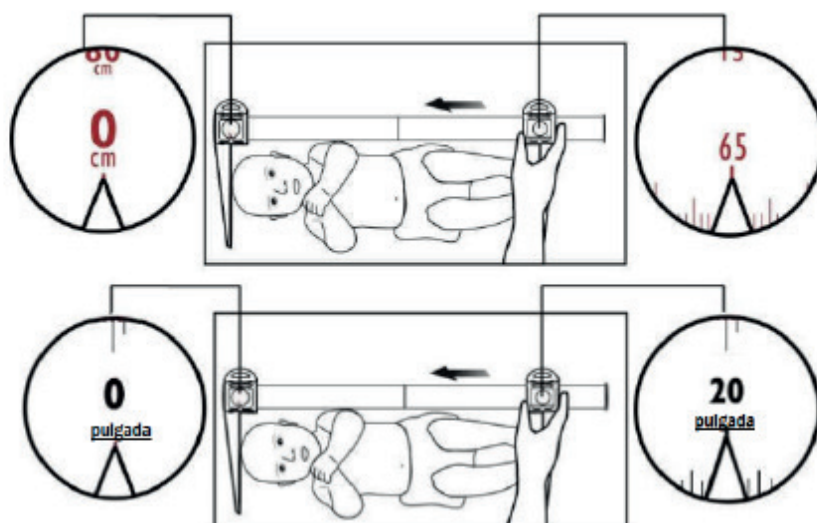

- Fije la pieza de cabeza izquierda en 0 cm.
- Enderece los pies del bebé.
- Deslice la pieza de cabeza derecha hasta que toque las plantas de los pies del bebé.
- La lectura en la pieza de cabeza derecha es la longitud del bebé.

4. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Referencia:	HM 80P
Rango:	10-80 cm/ 3 15/16-31 1/2 pulgadas
Graduación:	1mm/ 1/16 pulgadas
Precisión:	10 mm
Dimensiones:	890 mm (ancho) x 33mm (profundidad) x 100mm (alto)
Peso dispositivo:	0.7 kg
Temperatura :	5°C~35°C
Accesorios Estandar:	Manual del usuario x1



5. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Este producto ha sido fabricado de acuerdo con las normas europeas armonizadas, siguiendo las disposiciones de las siguientes directivas:

93/42/CEE modificada por 2007/47/CE

Directiva de Dispositivos Médicos