

TENICORE外反母趾・内反小趾用サポーター 薄型着圧タイプ（左右兼用二個セット） 取扱説明書


この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

品番：TL046AJ


商品特長

- 1) 中足関節を閉めると指が開く原理を応用し、弾力ベルト二枚で加圧し、外反母趾と内反小趾を同時にサポートします。
- 2) 5段階アジャスターフック付きなので、牽引の強度を足の状態に合わせて最も快適な位置に調整できます。
- 3) かかとベルトがついているため、牽引の強度を調整するだけでなく、使用時のズレも防ぎます。
- 4) 通気性と抗菌防臭機能を兼ね備えた素材を使用！靴や靴下を履いても蒸れにくく、通気性は抜群です。
- 5) 薄型なのでそのまま靴を履くことができ、毎日気軽に足のケアができます。

製品構造

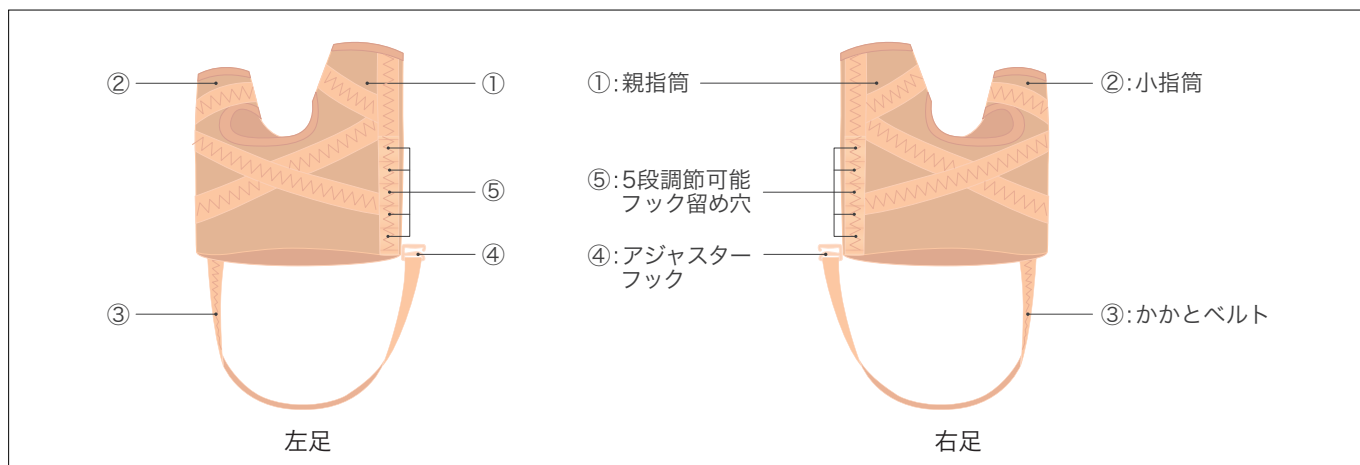

使用方法

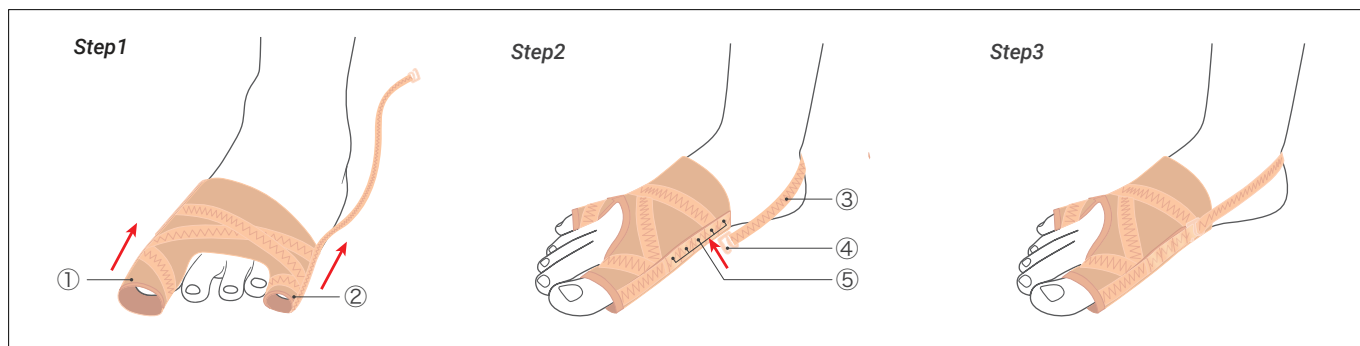

- Step1. ①親指筒と②小指筒の位置を間違わないように、本製品を足に装着します。親指を①親指筒に、小指を②小指筒に、真ん中の三本指を真ん中の開口部分に通してください。
- Step2. ③かかとベルトをかかとの方向に引っ張って、かかとに当たってから、後ろから前方へ引っ張り、先端の④アジャスターフックを⑤5段階調節可能フック留め穴に引っ掛けます。5段階調節可能なので、足の状態に合わせて最も快適な位置に調整できます。
- Step3. 完成

注意事項

- 1) アレルギー体質の方や皮膚に疾患のある方、使用して湿疹等の異常が生じた場合は使用を中止し、医師にご相談ください。
- 2) サイズをよくご確認の上ご使用ください。
- 3) 対応サイズの表記は平均的なサイズと考えてください。足指の長さや形状により装着しにくい場合がございます。
- 4) 伸縮性のある生地を使用していますが、着用感には個人差がございます。まずは短時間のご使用で様子を見てください。
- 5) 長時間ご使用になる場合は適度に脱着を行ってください。
- 6) 外反母趾、内反小趾の保護固定用以外の用途で使用しないで下さい。
- 7) お洗濯は手洗いをお願いしております。中性洗剤を用いて、ぬるま湯で押し洗いをしていただき、タオルなどで水気をふき取り陰干ししてください。洗濯機のご使用やもみ洗いは避けてください。

製品仕様

製品名	外反母趾・内反小趾用サポーター 薄型着圧タイプ（左右兼用二個セット）																																	
シリーズ名	TENICORE																																	
品番	TL046AJ																																	
セット内容	サポーターX2 取扱説明書X1																																	
材質	ナイロン、ポリエステル、メタル																																	
製品サイズ	 <table border="1"><thead><tr><th>測定点 サイズ</th><th>①</th><th>②</th><th>③</th><th>④</th><th>⑤</th><th>⑥</th></tr></thead><tbody><tr><th>S</th><td>2.5cm</td><td>3.5cm</td><td>8cm</td><td>9cm</td><td>9cm</td><td>18cm</td></tr><tr><th>M</th><td>2.65cm</td><td>3.65cm</td><td>8.5cm</td><td>9.5cm</td><td>9.75cm</td><td>19cm</td></tr><tr><th>L</th><td>2.8cm</td><td>3.8cm</td><td>9cm</td><td>10cm</td><td>10.5cm</td><td>20cm</td></tr></tbody></table> <p>(誤差：±10%)</p>						測定点 サイズ	①	②	③	④	⑤	⑥	S	2.5cm	3.5cm	8cm	9cm	9cm	18cm	M	2.65cm	3.65cm	8.5cm	9.5cm	9.75cm	19cm	L	2.8cm	3.8cm	9cm	10cm	10.5cm	20cm
測定点 サイズ	①	②	③	④	⑤	⑥																												
S	2.5cm	3.5cm	8cm	9cm	9cm	18cm																												
M	2.65cm	3.65cm	8.5cm	9.5cm	9.75cm	19cm																												
L	2.8cm	3.8cm	9cm	10cm	10.5cm	20cm																												
本体重量（1個）	S: 10.5g±10% M: 11.25g±10% L: 12g±10%																																	
バージョン番号	J-01																																	
ロット番号	詳細は化粧箱をご覧ください。																																	

※ サイズ、重量などの数値は参考値であり、実際の数値は実物に準じます。

製品に関するお問合せ

発売元：極楽鳥製薬株式会社
住所：〒422-8044
静岡県静岡市駿河区西脇913番地
Email：support@techlove.jp
お問合せ受付時間：10：00～17：00
(土・日・祝日を除く)



【お問い合わせする】