

TENICORE外反母趾サポーター

薄型調整可能タイプ (二足入)

取扱説明書


この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

品番：TL047AJ


商品特長

- 1) 中足関節を閉めると指が開く原理を応用し、素足のような感覚で足指を自然に開かせます。
- 2) 親指ベルトで親指を外側に引っ張り、自分に適した位置に固定できます。
- 3) シームレス下着に使われている素材を採用し、足の動きに合わせて柔軟に伸縮します。長時間の着用も快適です。
- 4) 薄手かつ目立たないデザインで、サポーターを装着したままでもソックスや靴を履けます。
- 5) かかとベルトには面ファスナーが使用し、サポーターのズレを防止します。

製品概要

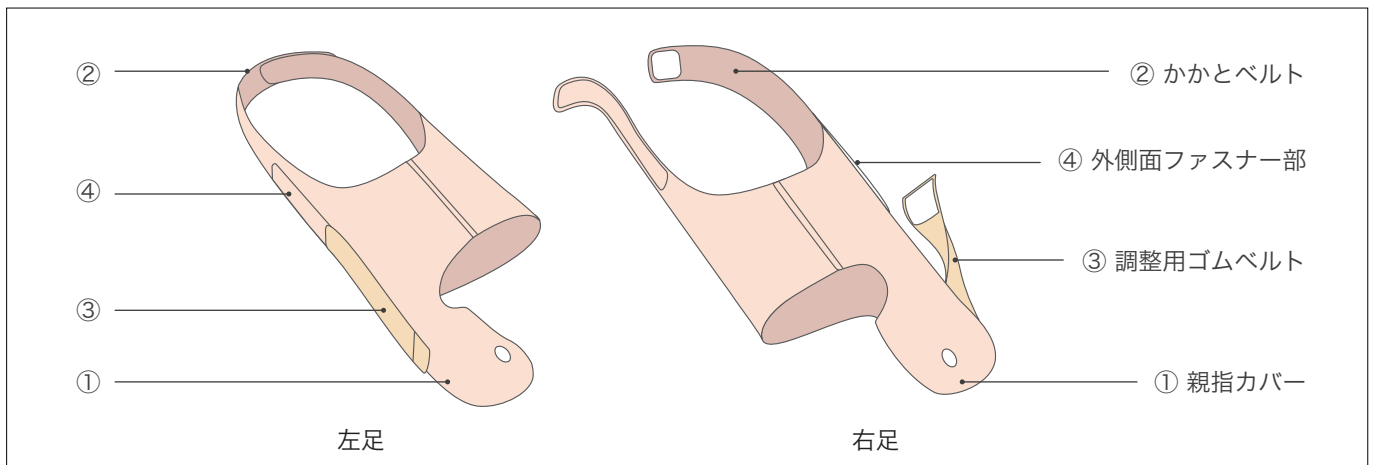

使用方法

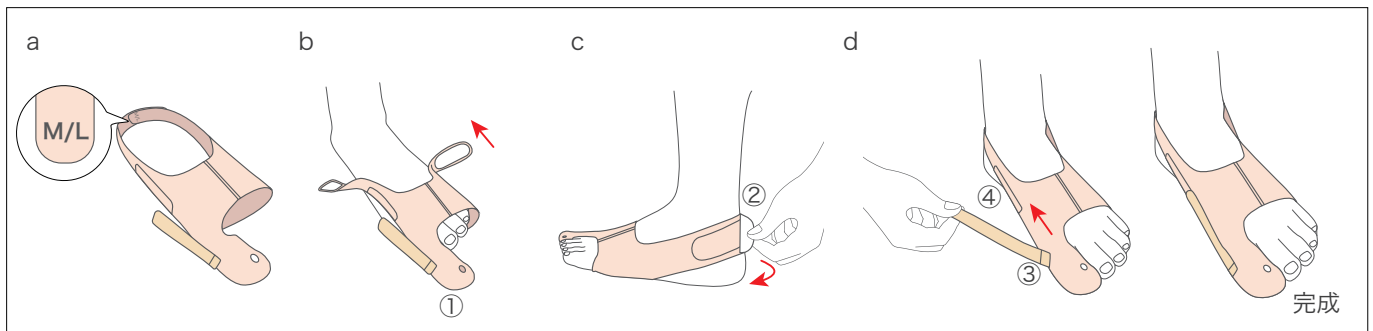

- a. かかとベルトの裏面に左右のサイズをご確認ください。例：M/L（Mサイズ 左足）、M/R（Mサイズ 右足）。
- b. 製品の足の甲面（縫い目のある面）を確認し、親指を①親指カバーに入れ、ゆっくりと装着します。
- c. ②かかとベルトでしっかりと止めて固定します。※緩みや締めすぎないようにご注意ください。
- d. ③調整用ゴムベルトを外側に引っ張り、④外側面ファスナー部に自分に適した位置に固定します。

注意事項

- 1) アレルギー体質の方や皮膚に疾患のある方、使用して湿疹等の異常が生じた場合は使用を中止し、医師にご相談ください。
- 2) サイズをよくご確認の上ご使用ください。
- 3) 対応サイズの表記は平均的なサイズと考えてください。足指の長さや形状により装着しにくい場合がございます。
- 4) 伸縮性のある生地を使用していますが、着用感には個人差がございます。まずは短時間のご使用で様子を見てください。
- 5) 長時間ご使用になる場合は適度に脱着を行ってください。
- 6) 本来の目的以外でのご使用はお避けください。
- 7) お洗濯は手洗いをお願いしております。中性洗剤を用いて、ぬるま湯で押し洗いをしていただき、タオルなどで水気をふき取り陰干ししてください。洗濯機のご使用やもみ洗いは避けてください。

製品仕様

製 品 名	外反母趾サポーター 薄型調整可能タイプ (二足入)
シ リ ー ズ 名	TENICORE
品 番	TL047AJ
セ ッ ト 内 容	外反母趾サポーターX2 取扱説明書X1
製品サイズ(一個)	S: 210 x 85mm ±10% M: 230 x 88mm ±10% L: 260 x 95mm ±10%
本体重量(一個)	S: 10g±10% M: 12g±10% L: 13g±10%
材 質	ナイロン67%、スパンデックス33%
ロ ッ ト 番 号	詳細は化粧箱をご覧ください
バージョン番号	J-01

※ サイズ、重量などの数値は参考値であり、実際の数値は実物に準じます。

製品に関するお問合せ

発売元：極楽鳥製薬株式会社
住所：〒422-8044
静岡県静岡市駿河区西脇913番地
Email：support@techlove.jp
お問合せ受付時間：10：00～17：00
(土・日・祝日を除く)



【お問い合わせする】