

TENICORE 足指セパレーター セット

(親指間の調整が可能)

商品説明


- 1) 足指間を調整できるセパレーターです。
- 2) 足指をしっかりと広げて、歩行時の衝撃を抑え、足指間の痛みや疲れを軽減します。
- 3) 足指をやさしく包み、靴ずれによる摩擦や痛みを防ぎます。
- 4) 靴下や靴を履いても快適に使用できます。つま先の広めの靴がお勧めです。
- 5) こんな症状でお悩みの方におすすめします。
 - a. 外反母趾、内反小趾、浮き指、寝指、足親指が変形されている方。
 - b. 長時間、立ち仕事をされている方。
 - c. 長時間、ハイヒールを履いている方。
 - d. 靴擦れで足指が痛い方。



ご使用方法

- 1) 製品の足裏面をご確認ください。
- 2) 靴下のように履いたら、足指をしっかりと固定します。
- 3) ご自身の状態に合わせて、適切な大きさのスペースを空洞に差し込んでください。

トレーニングベルトの使用方法 (同梱物)

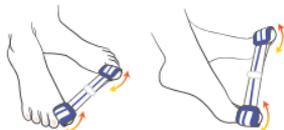

- 足を伸ばし、力を抜いた状態で両足を揃えます。踵を地面につけたままトレーニングベルトの両側にある空間に左右それぞれの親指をはめます。
 - 外側に同一の力を加え引っ張ります。ご自身の親指に無理がない程度に外側に引っ張り切った後は、ゆるくり力を抜いて元の場所に戻します。
 - 上記の動作を繰り返します。
- ※ 1回のストレッチは痛みを感じない状態まで引っ張り、5秒止めるストレッチを繰り返します。毎日のトレーニング時間は10分~20分までにてください。

商品特徴

- 1) 柔らかく伸縮性が良いシリコン製で、長時間使用しても痛みを感じにくいです。
- 2) 足指を広げるだけでなく、3つのサイズのスペースを使うことで、足指のストレッチも可能です。
- 3) 足の裏を柔らかいシリコンで包み、長時間の立ち仕事されている方の足の負担を軽減します。
- 4) トレーニングベルトが付属しており、毎日足の筋肉を鍛えることができます。
- 5) 変形しにくく、速乾素材を採用していますので、洗って簡単に繰り返し使うことができます。

⚠️ ご使用前に必ずお読みください。

- 1) 皮膚疾患又は装着する部分に傷がある場合、医師にご相談のうえご使用ください。
- 2) 装着する前に汚れ、破損、変形等がないかを確認してください。
- 3) はじめは1時間を目安に装着し、装着に慣れてきたら、徐々に装着時間を増やしてください。
- 4) 水洗いする際に、漂白剤、柔軟剤、ドライクリーニングを使用しないでください。洗濯後は、やわらかい布で軽く乾拭きしてください。
- 5) 品質には万全を期しておりますが、万が一品質に不都合がございましたら、下記QRコードを読み取り、カスタマーセンターまでご連絡ください。

製品仕様

- 製品名: TENICORE 足指セパレーター セット
(親指間の調整が可能)
- 品番: TL320A
- 規格: 左足用x2個; 右足用x2個
- サイズ: フリーサイズ
- 製品重量: 24g/個
- 材質: PE-SEBS&EVA

お問い合わせ先

- 極楽鳥製薬株式会社
- 〒120-0036
- 東京都足立区千住仲町2-3
- ハマノ第一ビル2F
- TEL: 03-5284-8296
- 受付時間: 10:00~17:00
(土・日・祝日を除く)



【お問い合わせフォーム】

表面の粉について: 開封時、セパレーター同士がくっつかないようベビーパウダーが付着していますが、汚れやカビなどではございませんのでご安心ください。