

TechLove ネックストレッチャー

この度は、「TechLoveネックストレッチャー」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず下記の内容をご確認の上、ご使用ください。


クイックスタートガイド



ご使用方法の手順


バックプレートクッション使用時

1

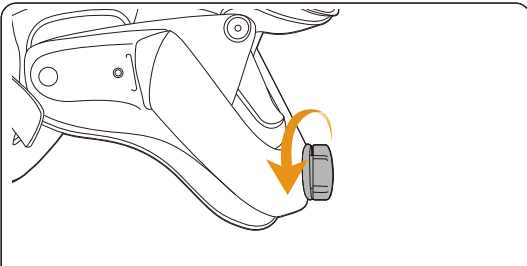


装着前にパレットの位置が一番低い位置まで下がっているかを確認します。

2

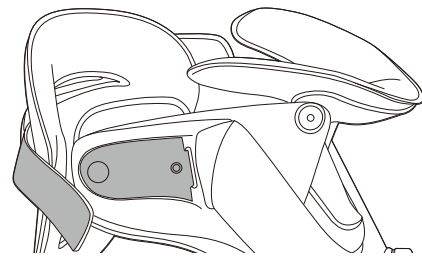


バックプレートの左右のうち、片側のマジックテープを外します。

3

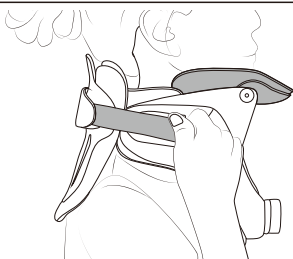

背筋をピンと伸ばし、前方に顔を向けた状態で、パレットを片手で抑えながら顎の下に装着します。その後、外した片側のマジックテープを止めます。
※締め付けすぎないように注意してください。

4

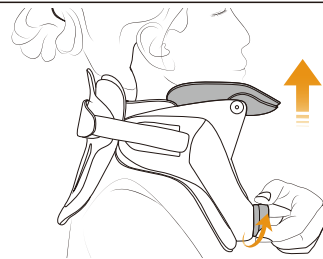

首の装着感を確かめた後、スクリューを図の矢印の方向に回して、パレットを固定したい高さまで調節します。
※パレットのあげすぎには注意してください。

ご使用方法の手順

空気供給モジュール使用時

1




2




3



4

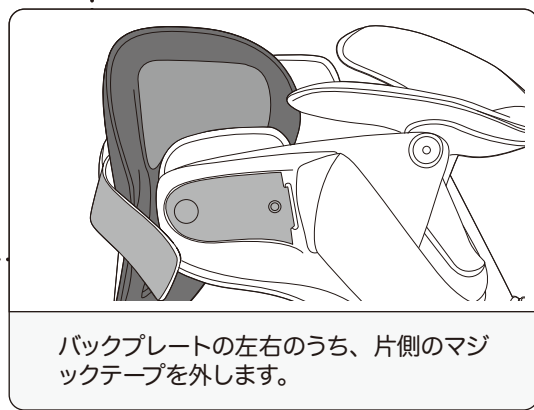

5

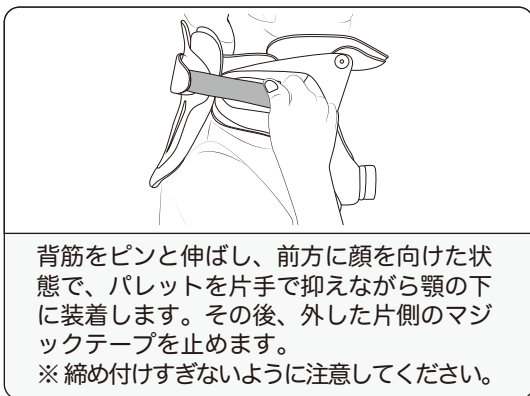

6



7

