

# 外反母趾サポーターダイヤル式 取扱説明書

この度は外反母趾サポーターダイヤル式をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。

- ・ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。
- ・お読みになった後は、ご使用時いつでも見られるよう、大切に保管してください。

## 注意事項

### 【安全上のご注意】

ご使用にあたり、この『安全上のご注意』を良くお読みになり正しくお使いください。

※ こちらに記載しております注意事項は製品を安全且つ適正に使用し、ご使用者様への危害・損害を未然に防止する為のものです。

### 【禁忌・禁止】

#### <適応対象>

1. 母趾の基部関節の角度を受動的に正しい角度（20度未満）に合わせるができない場合。[効果が得られないおそれがある。]
2. 皮膚疾患又は装着する部分に傷がある場合。[症状が悪化するおそれがある。]
3. アレルギー疾患がある場合。
4. 循環障害がある場合。[組織を損傷するおそれがある。][症状が悪化するおそれがある。]

#### <使用方法>

1. 成人以外に使用しない。（適切に装着する事ができず健康被害が生じるおそれがある。）
2. 他の人と共同で使用しない。


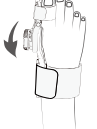
### 【使用上の注意】

1. 使用注意  
（次の該当する方は医師にご相談のうえご使用ください。）  
・痛風発作。  
・リウマチ性疾患。  
・圧力に対する過敏性。  
・基部関節の関節炎。  
・多発性神経障害又は軟部組織腫脹。
2. 重要な注意点  
使用中に痛み、腫れ、感覚の変化又は異常な反応が起こった場合は、使用を中止し、直ちに医師の診断を受ける。
3. 使用方法に関連する注意  
（1）動かせる範囲が制限されないよう、拇趾関節がヒンジ式スプリントのヒンジの位置と合っているかを確認する。  
（2）慣れるまでは装着時間を1時間程度にとどめる。使用に慣れてからは就寝中及び日中の装着が可能である。ただし、日中の装着は最大3時間にとどめる。
4. その他の注意  
装着する前に汚れ、破損、変形等がないかを確認する。異常があった場合は、装着しない。

## 製品概要と各部・付属品の名称・構造




## 使用方法

	1. ノブを反時計回り回転して、調整コードを解除する。 ★回しすぎないようにご注意ください。
	2. ヒンジ式スプリントに固定ベルトを通しておく。
	3. ヒンジ式スプリントのジェルクッションを親指の第一中足骨部に当て、固定ベルトを足裏を一周させ、マジックテープで固定する。 （★この時親指の第一中足骨部がジェルクッションに密着していることを確認する。）
	4. 親指固定ベルトをマジックテープで固定する。
	5. ご自身の状態に合わせてノブを時計回りに回して、角度を調整し、足指を真っ直ぐ正常な状態に調整する。

## 保管・お手入れ方法

1. ぬるま湯で手洗いし、陰干して乾燥させる。
2. 換気の良い場所に保管する。
3. 酸やアルカリ、油脂を避けて保管する。
4. 直射日光、高温多湿を避けて保管する。
5. 柔軟剤や漂白剤を使用しない。

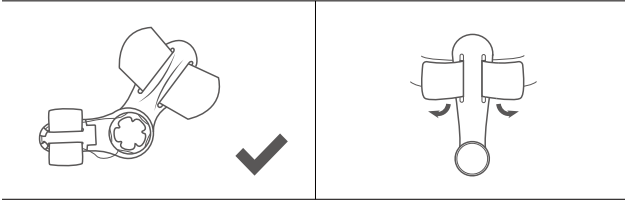

## 製品仕様

製品名称	外反母趾サポーターダイヤル式
品番	TL130A
規格	フリーサイズ
サイズ	約143x38x34mm
製品重量	50g
原材料	ヒンジ式スプリント：ポリカーボネイト ジェルクッション：スチレンブタジエンゴム 親指固定ベルト：ポリアミド 足首固定ベルト：ポリアミド トレーニングベルト：スチレンブタジエンゴム（附属品）
発売元	極楽鳥製薬株式会社 東京都足立区千住仲町2-3ハマノ第一ビル2F Tel：03-5284-8296
バージョン番号	J-02

※ サイズ、重量などの数値は参考値であり、実際の数値は実物に準じます。

## 保証書

製品名称	外反母趾サポーターダイヤル式
お客様	お名前：
	お電話番号：
	ご住所：
無料修理保証期間	お買い上げ日： 年 月 日 より6ヶ月間

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

本書は、再発行しませんので、大切に保管してください。

無料修理保証期間中に故障が発生した場合は、製品と本書をご用意のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

所定の記入欄が空白のままですと本書は有効にはなりません。記入のない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

正規代理店以外（転売業者等）から購入した場合は、使用状況、保管環境が不明瞭なため、保証対象外となります。

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無料修理若しくは交換いたします。
2. 本書は、日本国内においてのみ有効です。
3. 保証期間内であっても次のような場合は、有料修理となります。
  - ① 誤った使い方、または不当な修理・改造による故障や破損。
  - ② お買い上げ後の落下・衝突などによる故障や破損。
  - ③ 地震、火災、ガス害、風水害、その他天災による故障や破損。
  - ④ 外力による本体の変形や変色。
  - ⑤ 消耗品の消耗による交換。
4. 点検・修理等の依頼の際の送料は、お客様負担とする。

製品に対するお問合せ先

発売元：極楽鳥製薬株式会社

東京都足立区千住仲町2-3ハマノ第一ビル2F

TEL：03-5284-8296

お問合せ受付時間：10：00～17：00

（土・日・祝日を除く）

取扱販売店 住所・電話番号