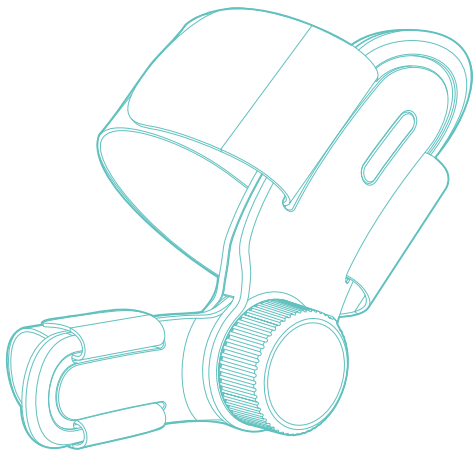


※本書は保証書も兼ねておりますので、お手元に大切に保管してください。



外反母趾サポーター *Premium* 取扱説明書



この製品はダイヤルと3種類の固定プレートが付いており、
外反母趾を二重に矯正することができるサポーターです。

品番：TE006A







商品特長

- 1) 「**革新的な二重調整技術**」:足の側面を締めると指が開く原理を応用し、ダイヤルで中足骨を押さえて装着し、親指がしっかりと開くようになります。中足関節を左右から押圧すると足指が開き、足裏の横アーチがサポートされ、それにより足指が使いやすくなります。
- 2) 「**程度別に補正**」:3種類(0°、7.5°、15°)の抜き差し式の固定プレートが付き、ご自身の外反母趾の段階に応じて、程度別に補正することを実現しました。
- 3) 「**強度・サイズ調整可**」:マジックテープ式の固定ベルトでご自身の足に合うサイズまで調節でき、最適なフィット感を実現し、男女性問わず幅広くご使用いただけます。
- 4) 「**快適な使用感&水洗い**」:柔らかいジェルクッションで、足指の不快感や痛みを軽減し、突き出した関節も保護します。また、ジェルクッションと固定用ベルトは取り外し&水洗いができ、足の汗やにおいが気になる季節も清潔に保ちやすい。
- 5) 「**左右兼用&トレーニングベルト付**」:回転式のスプリントを採用し、自由な動きが可能で、左右どちらの足にも対応可能です。また、トレーニングベルトで毎日10~20分トレーニングを行うことで、足指の筋肉・筋力を鍛えて強化し、足の健康維持に役立ちます。


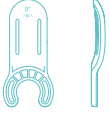
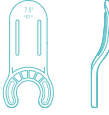

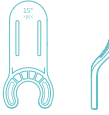
製品概要

全体

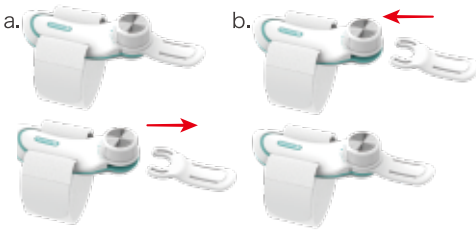


構 成 品	①  ヒンジ式スプリント	②  0°固定プレート 7.5°固定プレート 15°固定プレート	③  ジェルクッション
	④  親指固定ベルト& 足首固定ベルト	⑤  親指固定ベルト& 足首固定ベルト (付属品)	⑥  トレーニングベルト (付属品)

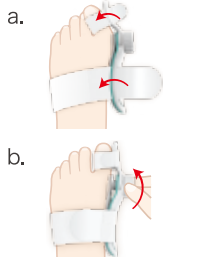
固定プレートの選び方

親指が変形の程度	おすすめの固定プレート
0°-15° 	0°固定プレート 
15°-25° 	7.5°固定プレート 
25°-40° 	15°固定プレート 

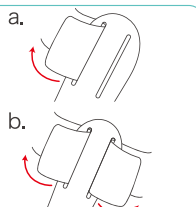
固定プレートの着脱方法

- 
- a. 矢印の方向に沿って、外側に向けて固定プレートを抜く。
- b. 矢印の方向に沿って、内側に向けて固定プレートを差し込む。

使用方法

- 
- a. ヒンジ式スプリントのジェルクッションを足の親指の付け根に当て、親指固定ベルトおよび足首固定ベルトをマジックテープで固定します。
- b. ダイヤルを回し、角度を調整します。親指の角度を調整する際には、ご自身の足の状態に合わせて少しずつダイヤルを回し、無理のない角度まで調整してください。

固定ベルトのご使用方法（取り換える際）

- 
- a. ベルトの端をヒンジ式スプリントの空いた隙間を通して、マジックテープの部分を固定します。
- b. ベルトの片方を同様に空いた隙間を通して、足のサイズに合わせて、マジックテープの部分を固定します。

注意事項

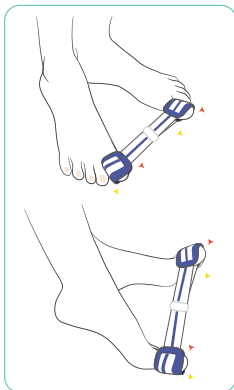
- 1) 皮膚疾患又は装着する部分に傷がある場合、医師にご相談のうえご使用ください。
- 2) 装着する前に汚れ、破損、変形等がないかを確認してください。
- 3) 慣れるまでは装着時間を1時間程度にとどめ、慣れて来たら徐々に就寝中や日中の装着時間を延ばしてください。尚、日中の装着時間は最大3時間にとどめてください。
- 4) 本体の水洗いはお控えください。ベルトを洗う際は漂白剤、柔軟剤を使用せず水洗いをしてください。また、ドライクリーニングもお控えください。水洗い後は直射日光を避け、陰干ししてください。
- 5) 初めて使用する際に、個人差により、足指の筋肉が硬くなっており、足指を広げにくい可能性があります。装着する前に、足指の筋肉をほぐしてからご使用ください。

製品仕様

製 品 名	外反母趾サポーター <i>Premium</i>
品 番	TE006A
シリーズ名	TENICORE
規 格	一個入り
製 品 重 量	約58g
材 質	スプリント&固定プレート：PC、POM ジェルクッション：シリコーン 固定ベルト：ナイロン、PU
適 応 サ イ ズ	約27cmまでの足の甲周りに対応可能
セ ッ ト 内 容	本体、固定プレート (0°固定プレート、7.5°固定プレート、15°固定プレート)、トレーニングベルト、予備品の固定ベルト、取扱説明書
ロ ッ ト 番 号	製品本体のタグをご覧ください
バージョン番号	J-02

※ サイズ、重量などの数値は参考値であり、実際の数値は実物に準じます。

トレーニングベルトの使用法



- 脚を伸ばし、力を抜いた状態で両足を揃えます。踵を地面につけたままトレーニングベルトの両側にある空間に左右それぞれの親指をはめます。
 - 外側に同一の力を加え引っ張ります。ご自身の親指に無理がない程度に外側に引っ張り切った後は、ゆっくり力を抜いて元の場所に戻します。
 - 上記の動作を繰り返します。
- ※ 1回のストレッチは痛みを感じない状態まで引っ張り、5秒止めるストレッチを繰り返します。毎日のトレーニング時間は10分~20分までにしてください。

製品に対するお問合せ先

住所：静岡県静岡市駿河区西脇913

〒422-8044

Email：support@techlove.jp

お問合せ受付時間：10：00～17：00

(土・日・祝日を除く)



【お問い合わせする】

お買い上げの販売店

Amazon 楽天 その他 _____

店舗名：

注文番号：

保証書

製品名	外反母趾サポーター <i>Premium</i>
品番	TE006A
お客様	お名前：
	お電話番号：
	ご住所：
無料修理保証期間	お買い上げ日： 年 月 日 より6ヶ月間

本書は、本書記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。
本書は、再発行しませんので、大切に保管してください。
無償修理保証期間中に故障が発生した場合は、製品と本書をご用意のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
所定の記入欄が空白のままですと本書は有効にはなりません。記入のない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。
正規代理店以外（転売業者等）から購入した場合は、使用状況、保管環境が不明瞭なため、保証対象外となります。

〈無償修理規定〉

- 1) 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無償修理若しくは交換いたします。
- 2) 本書は、日本国内においてのみ有効です。
- 3) 保証期間内であっても次のような場合は、有償対応となります。
 - ① 誤まった使い方、または不当な修理・改造による故障や破損。
 - ② お買い上げ後の落下・衝突などによる故障や破損。
 - ③ 地震、火災、ガス害、風水害、その他天災による故障や破損。
 - ④ 外力による本体の変形や変色。
 - ⑤ 消耗品の消耗による交換。
- 4) 点検・修理等、ご依頼の際の送料はお客様負担となります。

※製品品質の万全を期しておりますが、万が一初期不良などが発生した場合、又は商品について何かご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせくださいませ。

