




TENICORE 足用保護パッド

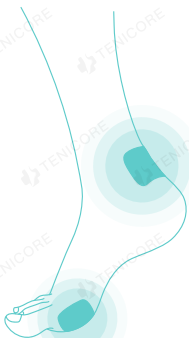

※ 写真はイメージです。

by TechLove



J-05

TECNICORE 足用保護パッド(10 枚入り)

▶ 使用方法



- 貼付部は清潔にし乾いた状態でご使用ください。
- パッドを台紙と透明フィルムからゆっくりはがしてください。
- トラブルのある部分にしっかり貼り付けます。特に周囲は丁寧に押さえてください。
- はがす時は、肌に平行に引っ張りながらゆっくりとはがしてください。

▶ ご使用前に必ずお読みください

- 使用前に、汚れや破損、変形などがなければ確認してください。
- 浴室や湿気の多い場所でのご使用はお避けください。
- 製品の貼付面に異物を入れないでください。
- 傷口、湿疹等がある部位には使用しないでください。またアレルギー症状や、粘着テープ等でかぶれる方のご使用はお控えください。
- 使用中に異常が生じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 使用時間は8時間を超えないようにしてください。
- 品質には万全を期しておりますが、万一品質に不都合がございましたら、下記QRコードを読み取って、お気軽にご連絡ください。
- 一度使用したものは再使用しないでください。

▶ 製品仕様

製 品 名	足用保護パッド		
品 番	TE302A	シリーズ名	TENICORE
本 体 重 量	約3g/枚	規 格	10枚入り
本体サイズ	約50*50*1.6mm		
材 質	PU、エチレンプロピレン、カルボキシメチルセルロース、アルジン酸ナトリウム		
用 途	外反母趾・内反小趾・タコ・ウオノメなど足のトラブルを保護するためのパッドです。また、靴擦れ防止に適用されます。		

▶ 製品に関するお問い合わせ先

住所：〒422-8044
静岡県静岡市駿河区西脇913番地
Email：support@techlove.jp
お問合せ受付時間：10：00～17：00
(土・日・祝日を除く)
MADE IN CHINA
LOT NDSCG-DD250411-02



【お問い合わせする】