

2 - Bénéfices et performances cliniques

Performances cliniques :

- Freination de la myopie
- Traitement des défauts visuels

Bénéfices cliniques :

- Ralentissement de la myopie progressive par modélisation cornéenne
- Réduction de l'anisométrie moyenne à forte.

3 - Généralités

La lentille TopK® est livrée dans une solution de trempage à base de Polyhexanide. La première utilisation doit se faire dans les 3 mois suivant la date de fabrication.

A réception

À réception et avant la première utilisation, réaliser un traitement de nettoyage avec votre solution d'entretien pour lentilles perméables à l'oxygène, conformément à la notice d'utilisation du produit recommandé par votre professionnel de santé.



Code couleur des lentilles TopK®

Manipulation

Casse/Bris

En cas de casse de votre lentille, merci de bien conserver les fragments et contacter votre adaptateur.

Le lavage des mains doit être minutieux pour la pose et le retrait de la lentille. Utiliser un savon neutre non gras. Bien sécher vos mains avec un linge propre.

4-Pose de la lentille (et reposes successives)

La lentille est placée sur le bout de l'index. Remplir la lentille avec 3 gouttes d'un visqueux à base d'acide hyaluronique sans conservateur.

La tête penchée et horizontale, menton contre la poitrine, d'une main tirer la paupière supérieure par la base des cils et de l'autre la paupière inférieure par la base des cils. Garder vos deux yeux ouverts, amener la lentille au contact de l'œil, refermer les paupières délicatement.

Centrage

Il peut arriver que la lentille se déplace et se retrouve sur le blanc de l'œil. Vous ne pouvez pas recentrer la lentille, il faut la retirer et recommencer la pose avec les 3 gouttes de visqueux.

5 - Retrait de la lentille

Prenez la ventouse entre le pouce et l'index et maintenez la paupière inférieure tirez vers le bas avec le majeur de la même main. Avec l'autre main, tirez la paupière supérieure vers le haut. Posez alors la ventouse en angle droit sur le bord de la lentille. L'opération est plus facile si la ventouse a été humidifiée. Gardez l'œil bien ouvert et tirez la ventouse avec la lentille.




En cas de succion au retrait, avertir votre adaptateur.

6 - Entretien

Tous les jours

La lentille retirée sera placée délicatement dans le creux de la paume de la main, déposer 2 gouttes de savon pour lentille de contact perméable à l'oxygène dans la

lentille et dans la paume, et masser délicatement quelques secondes la face interne de la lentille en vous servant du bulbe de votre petit doigt. Ensuite toujours au creux de la paume, rincer soigneusement la lentille avec le sérum physiologique, la replacer dans son étui puis la recouvrir de solution de trempage pour la journée.

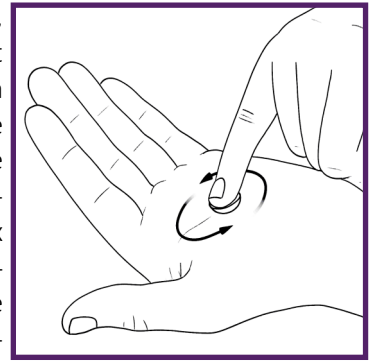

Un soir par semaine

Un traitement intensif de nettoyage/déprotéinisation est à effectuer. Laisser agir 30 minutes au maximum dans l'étui fourni avec la solution de déprotéinisation puis rincer avec un sérum physiologique sans conservateur avant le traditionnel trempage nocturne dans votre solution d'entretien pour lentilles rigides.

7 - Durée de vie

La lentille TopK® doit être renouvelée tous les ans.

8 - Précautions particulières, contre-indications, effets indésirables

Précautions particulières

- Port nocturne : la lentille TopK® est portée la nuit et retirée pour la journée.
- Ne jamais utiliser l'eau du robinet ou en bouteille.
- Ne pas changer de produit d'entretien sans consulter votre professionnel de santé.
- Rincer uniquement avec du sérum physiologique sans conservateur en une dose et à usage unique.
- Jeter les solutions d'entretien dont la date de péremption est dépassée (cf. voir notice d'utilisation du fabricant).

- Changer l'étui tous les mois.
- Un contrôle de la vision doit être effectué au minimum tous les 6 mois.
- En cas de non-utilisation pendant plusieurs jours, changer régulièrement la solution dans l'étui.
- Respecter les instructions de votre professionnel de santé..
- Retirer immédiatement les lentilles après contact avec des vapeurs nocives ou d'autres environnement dangereux ayant un impact oculaire.
- Pour l'utilisation de collyres, lisez la notice du produit en question.

Faites contrôler régulièrement votre vue et vos lentilles par votre professionnel de santé. en lentilles de contact. Nettoyez, désinfectez et conservez vos lentilles toujours avec soin et en respectant le mode d'emploi de vos produits.

Si des échéances sont prescrites par le fabricant, veillez à bien les respecter pour ne pas porter préjudice à votre vue. Retirez les lentilles de contact lors d'irritations de l'œil et consultez votre professionnel de santé. Ne portez pas des lentilles endommagées. Lisez la notice d'utilisation des emballages de vos produits d'entretien et les conseils de stockage.

Contre-indications

- Patients atteints de maladies oculaires virales et/ou infectieuses non maîtrisées.
- En cas de maladies générales, liées à l'immunodéficience, défauts des paupières, demander l'avis de l'adaptateur en lentilles de contact.
- Afin d'éviter des interactions indésirables, utiliser exclusivement les produits d'entretiens adaptés aux lentilles concernées et recommandées par votre adaptateur en lentilles de contact.
- La prise prolongée de médicaments peut entraîner une modification du film lacrymal et influencer la tolérance des lentilles de contact. Informez votre adaptateur.

- Patients n'ayant pas la capacité de se conformer ou de comprendre les avertissements, les restrictions, les précautions ou les conseils fournis par les cliniciens, en raison de leur âge ou de situations défavorables (conditions cliniques, mentales ou physique, ainsi qu'un environnement familial ou professionnel).

Effet indésirables

Ils sont rares, mais ils existent et nécessitent une consultation auprès de votre ophtalmologiste ou d'un service d'urgence le plus proche : la vision doit rester stable, l'œil ne doit pas devenir rouge ou irrité, le port doit être confortable.

9-Vigilance

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif médical TopK® doit faire l'objet d'une notification immédiate à votre ophtalmologiste et à la société LAO en précisant le numéro de série SN de la lentille .

Tel :+33450739477

email : contact@laboratoirelao.com

Ainsi qu'à l'autorité de santé compétente de votre pays

10 - Elimination du dispositif

La lentille peut être éliminée avec les déchets ménagers.

11 Description des symboles

Symbole	Définition	Symbole	Définition
	Date de fabrication		Symbole du marquage CE avec n° de l'organisme notifié
	Consulter les instructions d'utilisation		N° de série de la lentille
F'v	Dioptrie (Puissance de la lentille)		Référence de la lentille
	Dispositif médical		Fabricant
	Produit recyclable		Numéro de modèle

Date de publication : 20/12/2023



Tél : 04 50 73 94 77

Mail : contact@laboratoireLAO.com

ZI 465 Route de la Dranse

74500 Publier Fr

FABRIQUÉ EN FRANCE

Retrouver nos vidéos et tutoriels de manipulation et d'entretien sur :

www.laboratoireLAO.com



1 - Destination et indications

Les lentilles TopK® sont des lentilles de contact rigides d'orthokératologie destinées à être utilisées par les patients, enfants à partir de 6 ans et adultes en port nocturne.

Indications

- Freination de la myopie évolutive par modelage cornéen.
- Traitement de la myopie de : -0,75 D à -7.00 D.
- Correction de l'hypermétropie < +4.00 D.
- Correction de la presbytie
- Correction d'astigmatisme < - 4.00 D.