



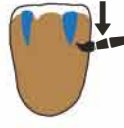
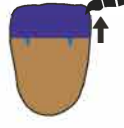

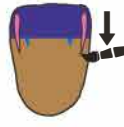



ジルカラークラシックの使い方

Zir Color **Classic**

ジルカラークラシックの基本的な着色方法です。無色のハイトランスディスクをA2シェードに着色します。

- 1  ボディA3.5で内面を一層塗ります。
- 2  ボディA3.5で歯頸部1/3をマージンに向かって塗ります。
- 3  ボディA2で歯冠の中間を塗ります。
- 4  ボディA2でボディ部分を上から下まで塗ります。
- 5  切端の深い透明感が欲しい箇所にブルーグレイを軽く塗ります。
- 6  歯冠の上1/3から切端に向かって、ライトまたはダークのインサイザルを塗ります。
- 7  シンナーを全面に多めに塗り、色を浸透させます。
- 8  隆線やや豊隆を目立たせたい箇所にスノーホワイトを3回塗ります。
- 9  焼結して完了です。

ジルカラスプリウムの使い方

Zir Color **Supreme**

ジルカラスプリウムの基本的な着色方法です。無色のスーパーハイトランスディスクをA2シェードに着色します。

- 1  ボディA3.5で内面を一層塗ります。
- 2  ボディA2でボディ部分を上から下まで3回塗り重ねます。
- 3  切端の深い透明感が欲しい箇所にブルーグレイを軽く塗ります。
- 4  歯冠の上1/3から切端に向かってライトインサイザルを塗ります。
- 5  チェリーピンクをボディ部分に上から下まで2回塗り、赤みを少し加えます。
- 6  隆線やや豊隆を目立たせたい箇所にスノーホワイトを3回程塗ります。
- 7  シンナーを全面に多めに塗り、色を浸透させます。
- 8  焼結して完了です。