

**HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN**

**13 november 2015**

**Actueel WGGA van het middel Incidin OxyWipe, 14949 N**

A.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik:

ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen), gisten, en schimmels op:

- harde oppervlakken in ruimten en transportmiddelen bestemd voor mensen;
- harde oppervlakken in ruimten bestemd voor humane gezondheidszorg en in dierenartsenpraktijken;
- harde oppervlakken welke in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor;
- harde oppervlakken in laboratoria.

ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen), mycobacteriën, gisten, en schimmels op:

- harde oppervlakken in TBC afdelingen.

De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

B.

GEBRUIKSAANWIJZING

Het middel bestaat uit gebruiksklare vochtige doekjes geïmpregneerd met een desinfecterende oplossing. Het middel kan gebruikt worden voor de desinfectie van harde oppervlakken in ruimten en transportmiddelen, inclusief externe harde oppervlakken van hulpmiddelen, apparatuur en machines.

Het te desinfecteren oppervlak grondig bevochtigen met Incidin OxyWipe. Gebruik voldoende doekjes om het oppervlak gedurende de gehele inwerktijd nat te houden. Laat het middel inwerken en opdrogen.

Minimale inwerktijd:

- Voor bacteriën (exclusief mycobacteriën en bacteriesporen), gisten en schimmels: 5 minuten
- Voor mycobacteriën (alleen op TBC-afdelingen): 15 minuten

Sluit de verpakking na gebruik. Alleen vochtige doekjes zijn werkzaam, doekjes na uitdroging niet gebruiken.

Het middel niet gebruiken op oxidatiegevoelige materialen zoals bijv. natuursteen, koper, brons, messing, nikkel en aluminium.