

VOOR EEN DOELTREFFENDE OPPERVLAKKENDESINFECTIE

Incidin® OxyWipe

Gebruiksklare reinigings-en desinfectiedoekjes met Hi-speed H₂O₂™

De innovatieve formule van Incidin OxyWipe is op basis van een gepatenteerde* waterstofperoxide-oplossing met een breed werkingsspectrum.

Werkzaam tegen een breed scala van bacteriën en virussen. Laat geen actieve residuen achter doordat het actieve ingrediënt uiteenvalt in water en zuurstof.


Incidin OxyWipe - kenmerken :

- ▲ Gemaks reinigings- & desinfectiedoekje
- ▲ Gebaseerd op Hi-speed H₂O₂™
- ▲ Voldoet aan EN16615 norm
- ▲ CE markering, klasse IIb
- ▲ Actief ingrediënt valt uiteen in water en zuurstof



Incidin® OxyWipe

Gebruiksklare reinigings-en desinfectiedoekjes met Hi-speed H₂O₂™

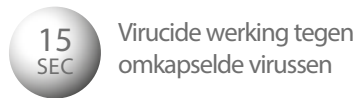

Kenmerken	Voordelen
EFFECTIEF	Breed werkingsspectrum Korte inwerktijden
VEILIG	Actief bestanddeel breekt af in water en zuurstof Uitstekende materiaalcompatibiliteit
GEMAKKELIJK	Reiniging & desinfectie in één stap Gebruiksklaar

MICROBIOLOGISCHE TESTRESULTATEN

WERKZAAMHEID ONVERDUND	OxyWipe INWERKTUJD
Oppervlakken desinfectie volgens VAH methode 2015 (incl. EN 16615), vuile condities	
Bactericide, gistdodend	15 min
Fungicide	15 min
Mycobactericide	60 min
Getest volgens RKI aanbeveling 01/2004* (vuile condities)	
Actief tegen omkapselde virussen volgens RKI aanbeveling 01/2004*	30 sec
Adeno*	15 min
Polyoma SV40*	30 sec
Rota*	30 sec
Europese normen (schone en vuile condities)	
EN 13727 (bactericide)	1 min
EN 13624 (gistdodend)	15 min
EN 13624 (fungicide)	15 min
EN 14348 (tuberculocide, mycobactericide)	30 min
EN 14476 Adeno	1 min
EN 14476 Noro	60 min (vuile condities)
Europese normen (vuile condities) - 4 vlakken-test	
EN 16615 (bactericide)	5 min
EN 16615 (gistdodend)	1 min
EN 16615 (fungicide)	5 min
EN 16615 (tuberculocide, mycobactericide)	60 min

* DW 2008

EFFECTIEF. VEILIG. GEMAKKELIJK.

TOEPASSINGSGBIED

Reinigings- en desinfectiedoekjes voor medische hulpmiddelen (inclusief bv. sondes).



GEBUIKSAANWIJZING

Neem één doekje. Bevochtig het oppervlak en zorg dat het oppervlak volledig bevochtigd wordt. Laten drogen en niet afspoelen. Sluit de verpakking na gebruik.

Niet geschikt voor einddesinfectie van invasieve medische hulpmiddelen.

Niet geschikt voor oppervlakken welke gevoelig zijn voor oxidatieve middelen zoals marmer, koper of messing.

SAMENSTELLING

1.0g waterstofperoxyde

VERPAKKING EN BESTEL-INFORMATIE

PRODUCT	VERPAKKING	REF
Incidin OxyWipe	6x100 doekjes	3082380

BEWAREN - OPSLAG

De wipen moeten worden bewaard in de originele verpakking beneden 25°C, op een koele, droge plaats buiten direct zonlicht.

Houdbaarheidsdatum tot einde vervaldatum en na opening verpakking : 3 maanden

ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

EUROPEAN HEADQUARTERS
ECOLAB EUROPE GMBH
Richtistrasse 7
8304 Wallisellen
Switzerland
tel : +41(0)44 877 2001

MICROTEK MEDICAL B.V.
A DIVISION OF ECOLAB
Hekkehorst 24
7207 BN Zutphen
Nederland
tel : +31 575 599 200

