

CryoMAX[®] COLD PACK

Reusable hasta **8 HOURS**
Points-of-Cold Technology



CryoMAX uso y mantenimiento e instrucciones.

- 1) Coloque la bolsa de hielo en el soporte ajustable envolver plana en el congelador. (El tiempo de congelamiento varía según el fabricante del congelador.) Cuando todos los módulos se hayan puesto de color azul claro, la compresa estará lista para usar.
- 2) Retirela de la bolsa de plástico e insértela en la funda protectora ajustable. **No utilice la compresa directamente sobre la piel.**
- 3) Ubique siempre el lado redondeado de los módulos contra la zona afectada.
- 4) Use ropa de tela fina (prendas de ropa interior, etc.). **Utilice siempre la funda protectora provista o una toalla.** Aplique la compresa fría sobre la zona afectada. Para una aplicación terapéutica tradicional, colóquela durante 20 minutos, retírela durante 20 minutos, vuelva a aplicarla sobre la zona afectada durante 20 minutos y repita el procedimiento. Durante los 20 minutos de descanso entre las aplicaciones, envuelva **CryoMAX** en una toalla de felpa gruesa para aislarla de la temperatura ambiente. Si no va a utilizar su **CryoMAX** por una hora o más durante el proceso de tratamiento, simplemente vuelva a colocarla en el congelador. (AVISO: si no se siguen estas instrucciones, es posible que **CryoMAX** no dure hasta 8 horas.)



- 5) Cuando no esté en uso, guarde Siempre su compresa fría CryoMAX en el congelador. NO deje caer CryoMAX sobre superficies duras mientras esté congelada. Manténgala alejada de objetos afilados.

Uso continuo: Muchos médicos, quiroprácticos y fisioterapeutas recomiendan la terapia de frío continua para ciertos tratamientos postoperatorios o enfermedades crónicas. Habitualmente se aconseja

aplicar por 20 minutos y retirar por otros 20 para evitar el riesgo de congelación. Este riesgo debe desaparecer si **CryoMAX** se emplea del modo adecuado. Dadas las pruebas de laboratorio y las respuestas de los consumidores, creemos que **CryoMAX** es tan segura para usar durante períodos ininterrumpidos como para realizar los ciclos de 20 minutos. Consulte a su médico primero. No emplee **CryoMAX** en forma ininterrumpida hasta que haya pasado media hora fuera del congelador. **Utilice siempre la funda protectora provista o una toalla.**

Uso continuo: Muchos médicos, quiroprácticos y fisioterapeutas recomiendan la terapia de frío continua para ciertos tratamientos postoperatorios o enfermedades crónicas. Consulte con su médico primero.

CryoMAX se puede usar para todo tipo de terapias de frío COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:

- A intervalos de 20 minutos durante varias horas mientras descansa.
- A intervalos de 20 minutos mientras está activo.
- Horas de terapia de frío continua mientras descansa.
- Horas de terapia de frío continua mientras está activo.

IMPORTANTE

- Si se usa en forma ininterrumpida sin volver a congelar, es poco probable que CryoMAX se mantenga fría por 8 horas.
- Algunos médicos recomiendan NO aplicar la terapia de frío durante más de 20 minutos por vez.
- No utilice la compresa sobre una herida abierta a menos que lo indique un médico.
- Las personas con problemas circulatorios no deben emplear la terapia de frío a menos que lo indique un médico.
- Este producto no es para niños.
- **No utilice la compresa directamente sobre la piel. Utilice siempre la funda protectora provista o una toalla.**
- Mantenga la compresa fría alejada de objetos afilados.
- Suspenda el uso si la compresa gotea.
- Este producto no es tóxico. Si el contenido entra en contacto con los ojos o la ropa, enjuague la zona afectada con agua tibia.
- **No intente utilizar el producto como compresa caliente. No lo caliente coloque en el microondas.**
- Suspenda su uso si tiene alguna molestia, si observa enrojecimiento o más inflamación y consulte a su médico.
- Mantenga fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Si el dolor persiste, consulte a su médico.
- No aplique la compresa en forma continua hasta media hora después de haberla retirado del congelador.
- No ajuste la correa elástica excesivamente, ya que esto puede cortar la circulación.
- No coloque la compresa directamente sobre los ojos. Deje que se descongele por una hora y **utilice siempre la funda protectora o una toalla.**



Recomendado para: • Espalda • Codo • Cadera • Pie • Cara • Mano • Cuello • Hombro • Muslos

- **Máximo confort**
- **El Máximo alivio contra el dolor**
- **La potencia Máxima continua en frío**
- **Satisfacción Máxima garantizada**



CryoMAX[®] Cold Packs están disponibles en 4 tamaños. Por favor, visite nuestro sitio web para compras en línea y tiendas minoristas.

www.cryomax.com

MODULAR THERMAL TECHNOLOGIES, LLC. 935 ROGER WILLIAMS WAY, NORTH KINGSTOWN, RI 02852

"CryoMAX technology is protected under US patents 6,497,116; 6,904,956; 7,055,575; 7,240,720; with 26 patents pending or issued worldwide. Made in the USA."