

ANLEITUNG GEBRAUCHS- LABORANALYSE PROBENNAHME-SET (STUHL) MIT



BEVOR SIE STARTEN:

- Bitte beachten und befolgen Sie vor der Verwendung des Heimtests
- jeden Schritt der Anleitung, damit Ihre Stuhlprobe vom Labor analysiert werden kann. Die folgende Anleitung richtet sich nach der **SENTIFIT® pierceTube** Gebrauchsanweisung für die eigenständige Abnahme einer Stuhlprobe und ist für eine Nutzung der Doctorbox App zugeschnitten.
 - Planen Sie ca. **10 bis 15 Minuten** für die Durchführung des Tests ein.

Links zu den Herstelleranleitungen



SENTIFIT® pierceTube

Für den Alkoholtupfer liegt vom Hersteller keine Gebrauchsanweisung vor.

A: (Warn-)hinweise

1. SENTIFIT® pierceTube

- Für in-vitro-Diagnosezwecke
- Bestandteile nach dem Haltbarkeitsdatum nicht mehr verwenden.
- Da das Hämoglobin in einigen Proben eine schnelle Denaturierung oder einen schnellen Abbau erfahren kann, sollten die Proben bei 2-8°C aufbewahrt und so schnell wie möglich untersucht werden.

2. Alkoholtupfer

- Entflammbar
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren
- Nicht in Augen, auf Schleimhäuten oder Hautreizungen verwenden



C: Welche Komponenten enthält dieser Heimtest?



SENTIFIT® pierceTube

A. 1 x SENTIFIT® pierceTube

Im Kuvert

- B.** 1 x DoctorBox Gebrauchsanleitung
- C.** 1 x Barcodekarte mit Test-ID
- D.** 2 x Alkoholtupfer
- E.** 1 x Sicherheitsbeutel mit Saugelinge (blau)
- F.** 1 x Versandbeutel (frankiert)

Zweckbestimmung Probennahmeset:

Stuhlprobenröhrchen: Das SENTIFIT® pierceTube wird nur zum Sammeln und Aufbewahren von menschlichen Stuhlproben verwendet.

Alkoholtupfer: Antiseptisches Hautreinigungsmittel zur Hautdesinfektion

B: Ebenso wichtig:

- Lagern Sie das Heimtestkit mit den Komponenten bei Temperaturen zwischen **2° und 30 °C** und verwenden Sie es nicht nach dem Verfallsdatum.
- Bitte geben Sie uns (DoctorBox) oder den Herstellern der Komponenten Bescheid, wenn es im Rahmen der Probeentnahmen zu schwerwiegenden Vorkommnissen mit einer Komponente kommt.

Kontakt

Tel.: +49 30 34045468
E-Mail: heimtests@doctorbox.de

DoctorBox Service GmbH
Lietzenburger Str. 107
10707 Berlin
www.doctorbox.de/heimtests

Hersteller	Komponente	CE
Sentinel Diagnostics Via Robert Koch, 2 20152 Milano MI, Italy	SENTIFIT® pierce-Tube	CE IVD
Vitrex Medical a/s Vasekaer 6-8 DK-2730 Herlev	Alkoholtupfer	CE

1

1. Erstellen eines DoctorBox Gesundheitskontos

Laden Sie sich die DoctorBox App im App Store (iPhone) oder Play Store (Android) herunter und erstellen Sie ein Benutzerkonto. Sie haben schon einen Account? Dann halten Sie einfach Ihr Smartphone bereit.



Android

<https://bit.ly/3qstF6z>



iPhone

<https://apple.co/39Xc4Nv>



2

2. Registrierung Ihrer Test-ID

Öffnen Sie die DoctorBox App. Gehen Sie auf „**Heimtests**“.

Scannen Sie dann Ihren Barcode, der sich auf der Barcodekarte im Kuvert befindet. Folgen Sie den Anweisungen in der App.



3

3. Durchführung der Probeabnahme

Bevor Sie mit der Probenahme beginnen:

Legen Sie alle Utensilien auf eine saubere Unterlage. Sollten Komponenten fehlen oder beschädigt sein, benutzen Sie das Set nicht und kontaktieren Sie uns (DoctorBox).

3.1



3.2

3.1 Stuhlprobe nehmen

1. Nutzen Sie für die Stuhlprobe die beiliegende Stuhlauffanghilfe. Folgen Sie dafür den Anweisungen auf der Verpackung.
2. Schrauben Sie die grüne Kappe mit dem Entnahmestäbchen ab.
3. Stechen Sie mit dem grünen Entnahmestäbchen an vier verschiedenen Stellen nicht zu tief in die Stuhlprobe.
4. Streichen Sie anschließend mit dem grünen Entnahmestäbchen kreuzweise über die Oberfläche der Stuhlprobe. Achten Sie darauf, dass alle Einkerbungen mit Stuhl gefüllt sind. Dies ist genau die richtige Menge.
5. Schrauben Sie die grüne Kappe wieder fest auf das Röhrchen und schwenken es vorsichtig mehrmals über Kopf. Jetzt darf es NICHT mehr geöffnet werden.

3.2 Vorbereitung Versand

1. Waschen Sie sich Ihre Hände mit Seife.
2. Nutzen Sie optional den Alkoholtupfer, um Ihre Hände nach der Probenahme zu desinfizieren.

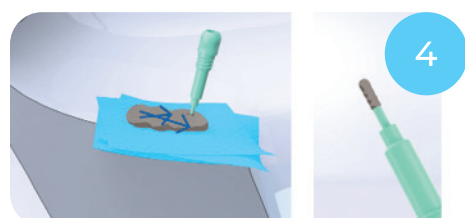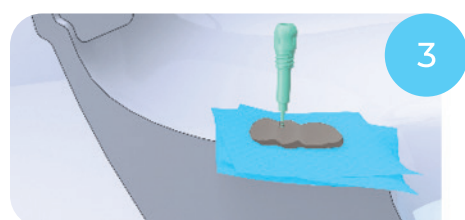


Mit freundlicher Unterstützung der Sysmex Deutschland GmbH

4

5

4. Versand

1. Ziehen Sie von Ihrer Barcodekarte den markierten Bereich mit dem Strichcode ab und kleben Sie diesen **längs** auf das Röhrchen.
- Nur wenn das Röhrchen mit Ihrem Barcode versehen ist, können Sie Ihre Ergebnisse erhalten.**
2. Legen Sie das Röhrchen in den Schutzbeutel mit Saugelinie (blau).
3. Falten Sie den Schutzbeutel mit Röhrchen zusammen und legen Sie diesen in den frankierten Versandbeutel für freigestellte medizinische Proben.
4. Schließen Sie den frankierten Versandbeutel und versenden Sie die Probe (Briefkasten) am **Tag der Durchführung**.

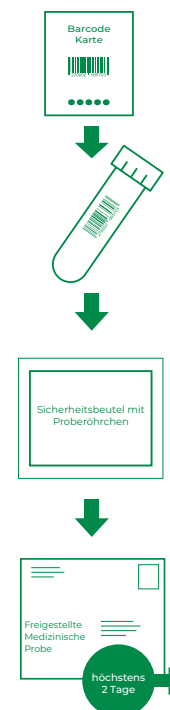

5. Ergebnisse erhalten

Sie erhalten Ihre Ergebnisse in Ihrer DoctorBox App. Bitte achten Sie auf die Benachrichtigungen.

