

Características del producto

- El extractor de leche eléctrico adopta el modo de estimulación de la lactancia y el modo de succión normal para simular la del bebé, que está diseñado para la lactancia materna



Lactancia profesional para aliviar el dolor de la hinchazón.



Succión suave, para evitar malestares.



Ahorro de energía de 5V, modo de suministro USB.




Equipado con una bolsa de succión directa para un cómodo almacenamiento de la leche.

01

Descripción de los componentes y características del producto

- Por favor, compruebe las partes del producto antes de usarlo. Si falta alguna pieza, póngase en contacto con el distribuidor. (Nota: las imágenes son sólo de referencia)

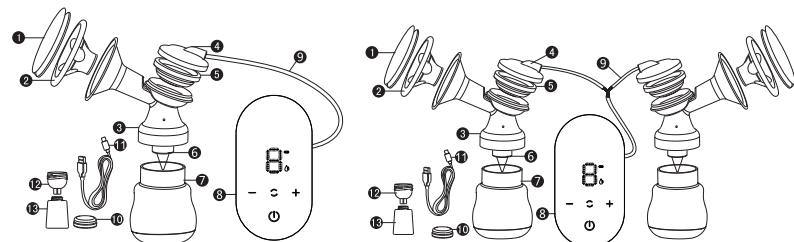


No.	Nombre de la pieza	Material	Resistencia al calor	Cantidad
1	Cubierta antipolvo	PP	-20~120°C	1
2	Pétalo de masaje	Silicona	-20~200°C	1
3	T de aspiración eléctrica	PP	-20~120°C	1
4	Tapa de la correa de succión	PP	-20~120°C	1
5	Correa de succión de silicona	Silicona	-20~200°C	1
6	Válvula de retención de gas	Silicona	-20~200°C	2
7	Botella de leche	PP	-20~120°C	1
8	Motor principal	ABS	-20~80°C	1
9	Tubo de aire	Silicona	-20~200°C	1
10	Tapa de la botella de leche	PP	-20~120°C	1
11	Cable de alimentación USB		-20~200°C	1
12	Tapa antipolvo botella de leche	PP	-20~120°C	1
Los siguientes son accesorios opcionales				
13	Adaptador de bolsa de almacenamiento	PP	-20~120°C	1
14	bolsa de almacenamiento	PET/PE	-20~120°C	1


02

método de montaje


(Nota: la imagen es sólo de referencia, por favor, consulte el producto real)

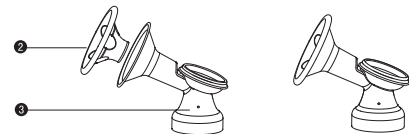


- Coloque el pétalo de masaje (2) en la T de succión (3), preste atención al cubrir el borde de la T de succión con la ranura del pétalo de masaje para asegurar un correcto cierre.

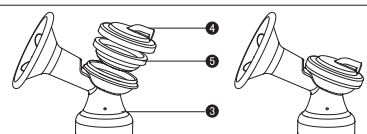


- En primer lugar, coloque el anillo de la correa de succión de gel (5) en la T de succión (3), preste atención a cubrir el borde de la T de succión con la ranura del anillo de la correa de succión de gel. Y luego presione la tapa de la correa de succión (4) en la T de succión. Como se muestra en la imagen.

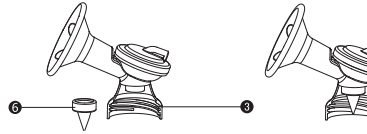

- Presione la válvula de retención (6) en la parte inferior de la T de succión (3) como se muestra. (Nota: Sujete con cuidado la válvula de retención para evitar daños. No utilice la válvula si está dañada. Por favor, sustitúyala por una nueva).

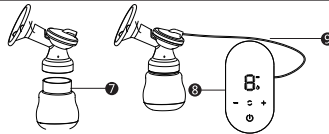

- Atornille la botella de leche de boca ancha (7) en la parte inferior de la T de succión (3), y finalmente conecte el tubo de aire (9) con el motor principal (8) como se muestra en la figura. Asegúrese de insertarlo firmemente para evitar fugas de aire.

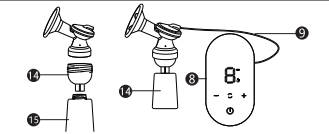


- Para facilitar el almacenamiento y succionar la leche directamente en la bolsa, enrosque el adaptador (14) en la bolsa de almacenamiento y luego enrosque el conjunto en la parte inferior de la T de succión (3). Finalmente conecte el tubo de aire (9) con el motor principal (8) como se muestra en la figura y entonces podrá utilizarlo.

03

Instrucciones de uso

- La máquina está equipada con seis botones: "botón de encendido", "Modo de lactancia", "Aumentar" y "Reducir" Como semuestra en la siguiente figura:

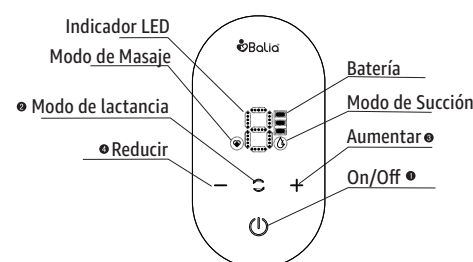

- Por favor, límpiese las manos antes de utilizarlo y asegúrese de que los componentes del extractor de leche están bien limpios y ensamblados.
- La usuaria deberá mantener una posición sentada normal y relajada. Coloque un reposapiés bajo el pie durante la succión del pecho para ayudar a mantener la posición sentada y evitar presionar la cintura. (para un mejor efecto, se puede utilizar una toalla caliente para comprimir y masajear el pecho antes de la succión).
- Apunte la boquilla de succión montada al pezón y sujete firmemente el pecho con la otra mano para asegurarse de que no entre aire.
- Presione la tecla "☺" en el motor principal para entrar automáticamente en el modo de extracción de leche, la luz indicadora se enciende "☺". La etapa de masaje tiene una pequeña succión para masajear el pecho y estimularlo. Pulse "+", "-" en el proceso de uso para ajustar la selección de la marcha adecuada, el modo de lactancia tiene 5 marchas de fuerza en total. Cada vez que se pulsa el botón "+" o "-", la posición de la marcha cambia y se muestra se muestra la correspondiente. (Nota: Después de 3 minutos de masaje, entrará automáticamente en la función de succión de leche).

- Cuando la luz indicadora "☺" se enciende, entra en el modo normal de succión de leche. En este modo hay 9 marchas de fuerza. Durante el uso, puede tocar "+" y "-" varias veces para ajustar y seleccionar la marcha y la fuerza de lactancia adecuadas.

¿Cómo encontrar la succión más adecuada para usted? Por favor, aumente gradualmente la succión hasta que se sienta ligeramente incómoda y luego reduzca ligeramente la succión. Se recomienda utilizar la función rutinaria de "succión" directamente después del modo de "lactancia".

El extractor de leche se apaga automáticamente después de un tiempo de trabajo predeterminado de 30 minutos.

04

Precaución

- Lea atentamente el manual antes de utilizar este producto. Con el fin de evitar la humedad y las fugas, por favor, no ponga la máquina en el agua para la limpieza.
- No coloque el producto en el lugar accesible a los bebés y niños.-Utilice este producto en la etapa de menor lactancia, por favor, siga la orientación de los médicos y enfermeras.
- Si el motor principal está dañado, para evitar riesgos, debe ser sustituido por el fabricante, servicio técnico o un profesional.
- Este producto pertenece a los artículos personales exclusivos. No lo deben utilizar muchas personas por razones de higiene y salud.Por favor, desmonte todos los accesorios que entren en contacto con sus pechos o mamas, como maderas, chupetes, T de succión, pétalos de masaje, anillos de succión, y luego limpie.

Solución de problemas

- Error: El aparato no enciende.**
Solución:
 - Compruebe si la alimentación de la batería está correctamente energizada. Si está defectuosa, sustitúyalo por uno en buen estado.
- Fenómeno de fallo: Succión insuficiente**
Solución:
 - Reemplace las partes de la válvula cerrada; compruebe si está correctamente.Ponga la válvula en agua hirviendo durante 3 minutos y vuelva a instalarla. De esta manera la succión será mayor.
 - Si la batería está baja, por favor cárguela a tiempo.
 - Compruebe si no hay fugas de aire entre el pecho y el dispositivo.
 - Si la temperatura ambiente es inferior a 15°C, por favor, mantenga la preparación durante 30 segundos adicionales antes de la comenzar con la succión de leche.

05

Almacenamiento/calentar la leche materna

- Después de la absorción, la leche recogida se sella en una bolsa de almacenamiento u otro recipiente y se almacena en un refrigerador.

	Temperatura ambiente	Compartimento refrigerado	Congelador
Leche materna fresca	No colocar a temperatura ambiente	Conservar durante 3-5 días a 4°C	Almacenar a -16°C durante 6 meses
Leche materna descongelada	No almacenar	10 horas	No volver a congelar

Nota:

Al congelar, con el fin de mantener el espacio para la expansión del líquido, no llene más de 3/4 de la capacidad total del recipiente.

- Para que no se pierdan los nutrientes, la leche materna debe descongelarse naturalmente en agua caliente a unos 37°C. Antes de consumirla, agitar suavemente para que la grasa de la leche se mezcle uniformemente.
- No calentar la leche congelada en el microondas o en agua hirviendo para evitar que se pierdan los nutrientes ni que el bebé sufra quemaduras.
- Agitar el recipiente de la leche antes de consumirla para que se mezcle uniformemente.

Especificaciones del producto

Nombre del producto	Extractor de leche	Modelo	EL-8100
Fuente de alimentación	AC 110-240V	Garantía	1 año

06

Garantía

¡Muchas gracias por elegirnos!. Por sus derechos e intereses, guarde la tarjeta de garantía correctamente. Si hay algún problema de calidad, póngase en contacto con el distribuidor.

Nombre _____ Nombre producto _____


Teléfono _____ Modelo _____

Tienda _____ Fecha _____

Dirección _____

- El usuario disfrutará de un año de servicio de mantenimiento gratuito a partir de la fecha de compra. Póngase en contacto directamente con el distribuidor.
- Los accesorios de suministro no están cubiertos por la garantía.
- Por favor, presente la tarjeta de garantía y el comprobante de compra o la factura al momento de la reparación.

Balia SpA
Rafael Cañas 192, piso 2, Providencia, Santiago, Chile.
www.balia.cl
contacto@balia.cl

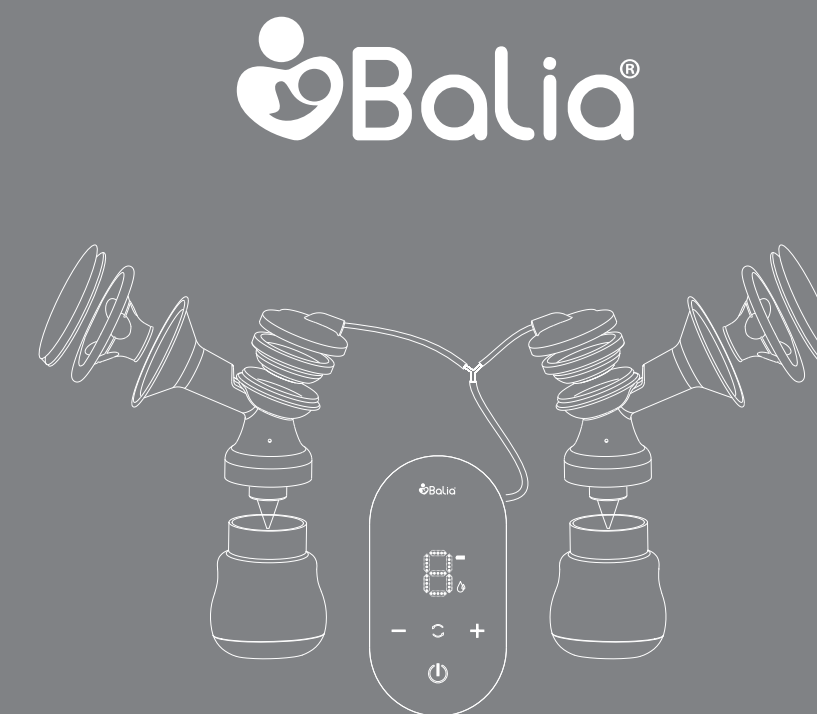

Extractor de Leche
Manual de Usuario
EL-8100