



# Extractor de Leche inalámbrico

Manual de Usuario

EL-D266

# Índice.

---

1 | Descripción  
del producto

3 | Uso  
previsto

4 | Seguridad

6 | Antes de  
comenzar a usar

14 | Uso del extractor  
de leche


20 | Especificaciones  
técnicas

21 | Solución de  
problemas

22 | Garantía

# 1. Descripción del producto.

## 1.1 Partes.

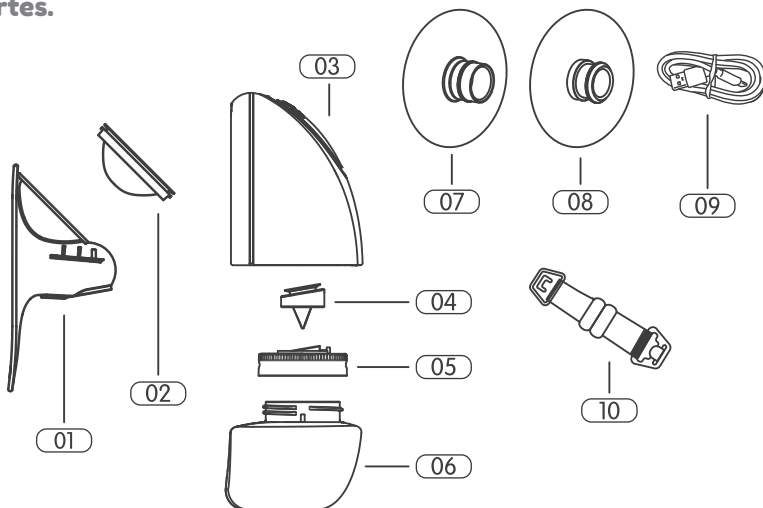

01 Protector de pecho

02 Diafragma

03 Motor de succión

04 Válvula

05 Tapa botella

06 Botella 180ml

07 Copa 22mm

08 Copa 18mm


09 Cable de carga tipo C

10 Regulador de sujetador

# 1. Descripción del producto.

## 1.2 Botones.

02

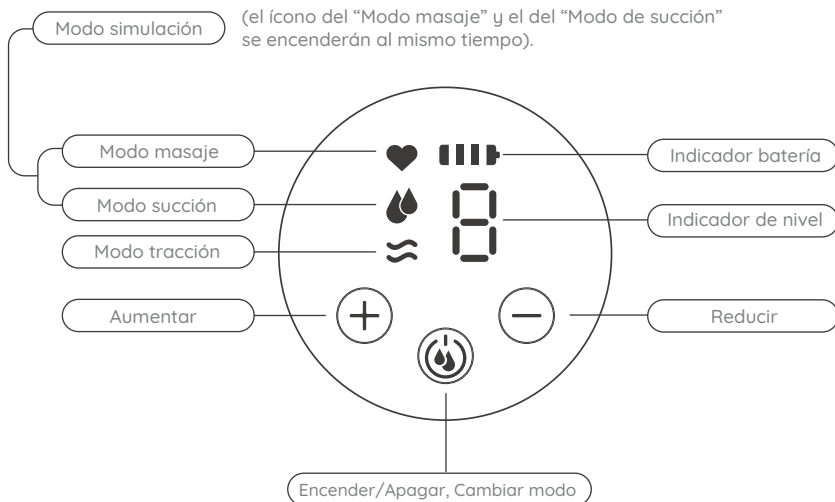

### NOTA:

- Este producto lleva incorporada una batería de litio. Cuando la luz del indicador de batería parpadea durante el proceso de trabajo, le recomendamos que utilice un adaptador de corriente certificado de 5V 1A para cargar el extractor inalámbrico.

## **2. Descripción del producto**

### **2.1 Indicaciones de uso.**

Extractor de leche inalámbrico, para extraer y recoger la leche de mujeres lactantes, con el fin de aliviar la congestión mamaria, mantener la capacidad de lactancia y proporcionar leche materna para futuras tomas cuando se produzca la separación de la madre y el bebé. El extractor está destinado a un solo usuario.

### **2.2 Vida útil.**

- La vida útil del dispositivo se define como no inferior a 500 horas.
- La vida útil prevista de los componentes lavables sustituibles es de tres a seis meses. También depende de la frecuencia de uso y lavado de las piezas.
- Se recomienda sustituir los componentes lavables después de un almacenamiento prolongado o antes de extraer leche para su próximo hijo.

## 3. Seguridad.

---

### 3.1 ADVERTENCIAS.

- Este es un producto para un solo usuario, el uso por más de una persona puede presentar un riesgo para la salud y anula la garantía.
- Se recomienda consultar a un profesional de salud antes de utilizar este extractor si tiene un dispositivo implantado activo que pueda verse afectado por un campo magnético (por ejemplo, un marcapasos o un desfibrilador cardiovascular implantable).
- Inspeccione si hay daños, limpie y esterilice los componentes lavables que entran en contacto con el pecho y la leche materna antes del primer uso.
- Limpie todas las piezas que entren en contacto con el pecho y la leche materna y compruebe que no estén dañadas después de cada uso.
- Durante el uso normal, la zona del extractor de leche inalámbrico puede calentarse. Si su entorno de extracción está al límite superior de temperatura de funcionamiento (+30°C / +86°F) durante el tiempo máximo de sesión (30 minutos), la temperatura de la almohadilla puede alcanzar hasta +45°C / +113°F.
- No almacene las piezas mojadas o húmedas, ya que podría formarse moho.
- No sumerja el motor del extractor en agua u otros líquidos. Límpielo con un paño limpio y húmedo.
- Este producto contiene piezas pequeñas y un cable que pueden suponer un peligro. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Utilice únicamente la pieza fabricada con este extractor, incluido el cable de carga, no la sustituya.
- Se recomienda utilizar un adaptador compatible con la norma IEC60601-1 y con la fuente de alimentación de su país.

## 3. Seguridad.

---

### 3.2 PRECAUCIONES.

- Inspeccione siempre todas las piezas antes de usarlas para comprobar si están dañadas o limpias.
- Asegúrese siempre de que todas las piezas estén completamente secas antes de montarlas.
- No coloque el motor del extractor en el refrigerador ni en el congelador.
- Este extractor y sus componentes no son resistentes al calor. Manténgala alejada de fuentes de calor.
- No utilice materiales inflamables mientras utilice este extractor portátil o la conecte a un cargador.
- No utilice este extractor mientras duerme o está demasiado somnolienta.
- El uso de un extractor de leche no debe causar dolor. No intente extraerse leche con una intensidad demasiado alta o incómoda. Si siente molestias o dolor excesivos durante la extracción, saque el protector alrededor del pezón e interrumpa la sesión.
- Póngase en contacto con su profesional sanitario si la extracción de leche es mínima o nula o si la extracción resulta dolorosa.
- Para obtener ayuda sobre el tamaño correcto y la comodidad del protector, consulte la sección 4.3 o hable con un especialista en lactancia.
- Tenga especial cuidado cuando utilice este extractor de leche cerca de niños.
- Este extractor de leche no debe utilizarse cuando se está tumbado, ni cuando se realizan ejercicios extenuantes o actividades con riesgo de lesiones.
- Saque siempre la almohadilla que rodea el pezón antes de quitarse el extractor de leche.
- No exponga este extractor de leche ni sus componentes a la luz solar directa.

## 4. Antes de comenzar a usar.

### 4.1 Limpieza y esterilización.

- Por primera vez y después de cada uso, debes desmontar, lavar y esterilizar todas las piezas del sacaleches que entren en contacto con la leche materna.
- Desmóntelo y limpie las piezas que entran en contacto con los pechos y la leche materna inmediatamente después de su uso para evitar que queden restos de leche materna que puedan provocar la proliferación de bacterias.
- Tenga cuidado al abrir el protector mamario, el diafragma y la válvula, ya que si se dañan, el sacaleches no funcionará correctamente.
- No lave ni esterilice nunca el motor del sacaleches, este componente no entra en contacto con la leche materna. Puede limpiar esta pieza con un paño suave.



¡No lavar!




- El motor del extractor contiene componentes electrónicos que deben mantenerse secos. Se puede utilizar un paño limpio y húmedo para limpiar el motor. Cualquier otra limpieza se considerará un uso indebido según la garantía.




## 4. Antes de comenzar a usar.

### Partes lavables.

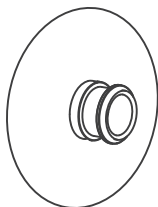

Copa 18mm

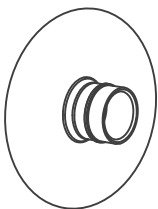

Copa 22mm



----- Diafragma


----- Protector de pecho



----- Válvula



----- Tapa Botella

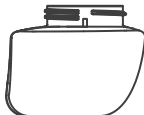

----- Botella 180ml

- La limpieza de los componentes lavables que entran en contacto con la leche evita la acumulación de residuos de esta, que pueden provocar la proliferación de bacterias perjudiciales para ti y para tu bebé.

## 4. Antes de comenzar a usar.

### Limpieza de componentes lavables

1. Enjuague en agua fría  
(aprox. +20°C / +68°F).

2. Lavar con agua tibia  
(aprox. +30°C / +86°F).

3. Enjuague con agua fría  
(aprox. +20°C / +68°F) durante  
10 a 15 segundos.

Colocar en el estante superior del  
lavavajillas

### Esterilización de componentes lavables

Hervir en agua durante un  
máximo de cinco minutos


Apto para métodos de  
esterilización por vapor  
o agua fría.

No se recomienda utilizar  
microondas para esterilizar.

## 4. Antes de comenzar a usar.

### 4.2 Carga del extractor

- 1 Cuando la batería esté baja, la luz indicadora de la batería parpadeará.
- 2 Cuando se esté cargando, el indicador se iluminará y el extractor no se encenderá. Utilice el cable de carga suministrado para conectar el motor del extractor a una fuente de alimentación usb (5V 1A).
- 3 Cuando esté completamente cargada, todos los indicadores de la batería se iluminarán. La batería tarda aproximadamente 2 horas en cargarse por completo, lo que proporciona un tiempo de uso de aproximadamente dos horas con la configuración inicial.

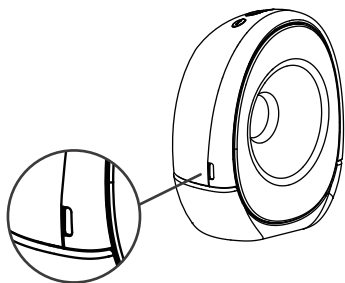

Entrada Tipo C

- Utilice únicamente el cable de carga suministrado con el extractor de leche inalámbrico. No utilice el extractor mientras se está cargando.

### TIP:

- Cargue inmediatamente después de terminar su sesión de extracción si se indica que la batería está baja.
- Después de encender si no está utilizando ninguna función, el extractor se apagará automáticamente después de 30 minutos, si usted necesita seguir utilizándolo, puede pulsar el botón de encender/apagar

## 4. Antes de comenzar a usar.

### 4.3 Tamaño del protector de pecho.


Este extractor de leche inalámbrico viene con un protector de pecho premontado de 25 mm y dos copas de silicona adicionales de 22mm y 18mm, para que pueda encontrar el que le resulte más cómodo.

Protector de pecho estándar.




25mm

Accesorios disponibles incluidos en la caja.

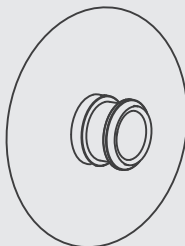

18mm

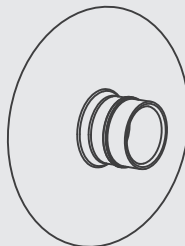


22mm

## 4. Antes de comenzar a usar.


### 4.4 Montaje del extractor.

- 1 Asegúrese de que todas las piezas estén secas antes de montarlas (después de limpiarlas y esterilizarlas).

Inserte el Diafragma (02) en la parte superior del protector de pecho (01), el borde del Diafragma coincide con el borde del protector de pecho, y el hueco del Diafragma corresponde al del protector.

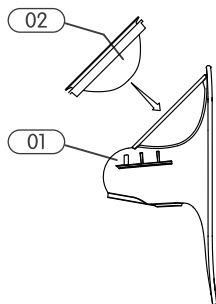


- 2 Instale la válvula (04) en el conector de la botella (05); el orificio de la válvula debe coincidir con el punto de apoyo del conector de la botella.

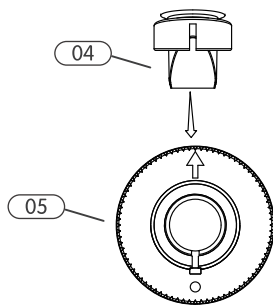


## 4. Antes de comenzar a usar.

- 3 A continuación, coloque la tapa de la botella (05) en la botella de leche (06) y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que la flecha quede alineada con la señal de la botella de leche.

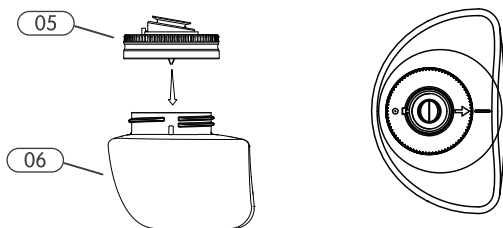


- 4 Introduzca primero el protector de pecho (01) instalado en el motor de succión del extractor (03) y, a continuación, introduzca la botella de 180ml (06) en la parte inferior del motor.

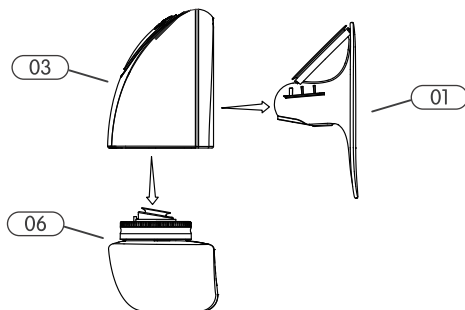


## 4. Antes de comenzar a usar.

- 5 En caso de que el protector del pecho en 25mm (01) fuera demasiado grande para usted, puede elegir la copa de silicona de 18mm (08) o 22mm (07), para ser colocado en el centro del protector de pecho (01).

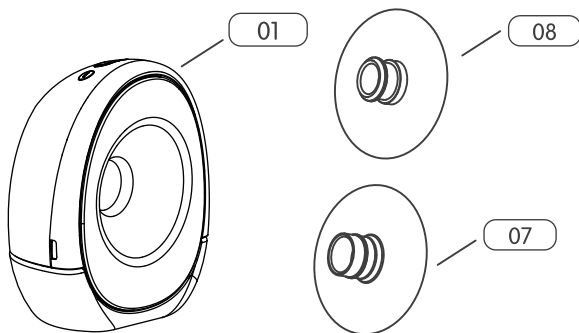


## 5. Uso del extractor de leche.

### 5.1 Alinear el pezón.

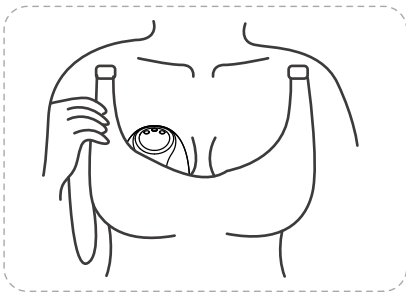

La correcta alineación del pezón en el protector de pecho es clave para la comodidad y el rendimiento. Para evitar molestias, el pezón debe estar correctamente colocado en el túnel del protector antes de la extracción.



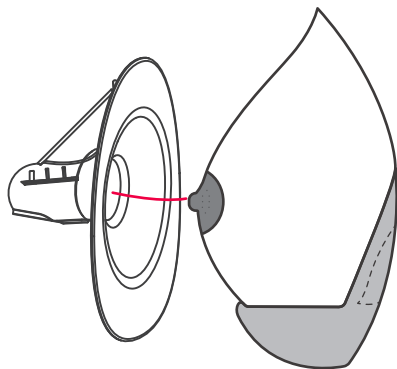




## 5. Uso del extractor de leche.

### 5.2 Encontrar la compresión adecuada.

- Este extractor de leche está diseñado para llevarlo con el sujetador de lactancia estándar y puede utilizarlo sentada o de pie.
- La compresión adecuada puede influir en el volumen de leche. Este extractor de leche inalámbrico debe estar firmemente presionado contra el pecho, no debe haber espacios entre el extractor y el pecho.
- Cada sujetador tiene un nivel de sujeción diferente, así que asegúrate de que la compresión es la adecuada antes de cada sesión. Si utiliza un sujetador especialmente rígido e inflexible, puede utilizar el ajustador incluido para crear más espacio.
- Una vez colgada la hebilla de cada extremo en el sujetador de lactancia, ajuste la longitud del ajustador del sujetador para que resulte más cómodo.

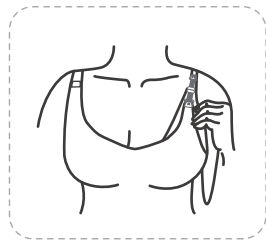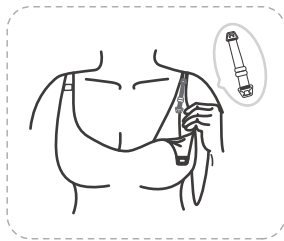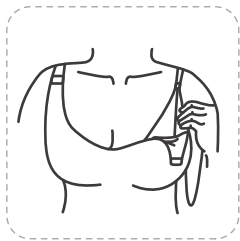

## 5. Uso del extractor de leche.

### 5.3 Comenzar la sesión.

16

Modo simulación


(el icono del “Modo masaje” y el del “Modo de succión” se encenderán al mismo tiempo).

Modo masaje

Modo succión

Modo tracción

Aumentar

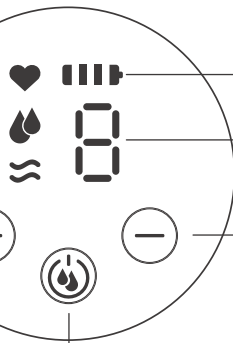

Indicador batería

Indicador de nivel

Reducir

Encender/Apagar, Cambiar modo

#### 1 Descripción de los modos.

##### • **Modo masaje.**

El modo de masaje imita el patrón de succión natural del bebé al inicio de la lactancia, que es rápida y ligera. Este patrón intenta estimular e iniciar el reflejo de salida de la leche. Hay 5 niveles en el modo de masaje, puede elegir diferentes niveles de acuerdo a sus necesidades.

## 5. Uso del extractor de leche.

### - **Modo succión.**

El modo de succión simula las características de succión de un bebé, con una fuerza de succión alta y suave para una succión eficaz y limpia.

Hay 10 niveles en el modo de succión, usted puede elegir diferentes niveles de acuerdo a sus necesidades.

### - **Modo simulación.**

Hay 10 niveles en el modo de simulación, y estimulará el pecho y succionará la leche suavemente, puede elegir el nivel según sus necesidades.





### - **Modo de tracción.**

Hay 3 niveles en el modo de tracción, en este modo el vacío se mantendrá durante 10 segundos y luego se liberará como un ciclo, que puede tirar continuamente de los pezones invertidos.

Seleccione el nivel adecuado para mejorar problemas como pezones cortos, pezones planos y pezones invertidos, para una mejor succión de la leche.

## 2 Instrucciones de funcionamiento.


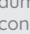
Lea atentamente el manual antes de utilizarlo para evitar inconvenientes causados por un uso incorrecto.

Botón	Instrucciones de funcionamiento	Pantalla
	Pulsación larga  para encender/apagar la máquina. Pulsación corta  para seleccionar el modo de trabajo. La función por defecto es masaje después del arranque, y recordará el último modo de uso.	


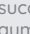


Pulse  $\oplus$ / $\ominus$  para aumentar o disminuir los niveles.  
-Modo de masaje ajustable con 5 niveles.  
-Modo de succión ajustable con 10 niveles.  
-Modo de simulación ajustable con 10 niveles.





Pulsando brevemente , el modo por defecto es masaje ; a continuación, ajuste  $\oplus$ / $\ominus$  para aumentar o disminuir los niveles según las condiciones personales para controlar la fuerza del vacío.  
Cambia automáticamente al modo de succión después de 2 minutos de masaje por defecto.





Pulse brevemente , para cambiar al modo de succión ; a continuación, ajuste  $\oplus$ / $\ominus$  para aumentar o disminuir los niveles según las condiciones personales para controlar la potencia de succión.



Pulse brevemente , para cambiar al modo de simulación ; a continuación, ajuste  $\oplus$ / $\ominus$  para aumentar o disminuir los niveles según las condiciones personales para controlar la fuerza del vacío.



Pulse brevemente , para cambiar al modo de tracción ; a continuación, ajuste  $\oplus$ / $\ominus$  para aumentar o reducir los niveles de acuerdo con sus condiciones personales para controlar la fuerza de aspiración.




Este producto viene con una función de memoria, que recuerda automáticamente los últimos niveles utilizados; los niveles de trabajo del modo de masaje y el modo de succión se pueden memorizar después de cada operación.

## 5. Uso del extractor de leche.

### 5.4 Conservar la leche.

Una vez finalizada la sesión de extracción, empuje hacia fuera el protector del pecho (01) y, a continuación, extraiga la botella (06) del motor del extractor (03). Puede guardar la leche extraída en un recipiente de su elección para almacenarla o alimentar al bebé.

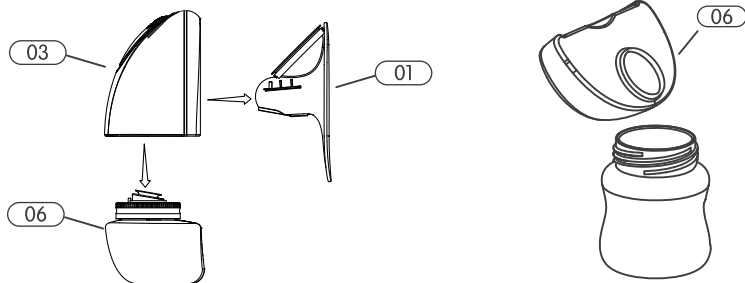

A la hora de almacenar la leche, siga siempre los consejos de un profesional de lactancia o un profesional médico.

### ADVERTENCIAS.

- Limpie todas las piezas que entren en contacto con el pecho y la leche materna, y compruebe que no estén dañadas después de cada uso.
- No guarde los componentes mojados o húmedos, ya que podría formarse moho.

## 6. Especificaciones técnicas.

20

Potencia	5V==1A
Tipo y capacidad de la batería	Batería de polímero de iones de litio Especificación: 1300mAh
Modo masaje	83~133 CPM (Ciclos por minuto)
Velocidad de succión	36~89 CPM (Ciclos por minuto)
Vacío de masaje	-0.007~0.018Mpa, 5 niveles ajustables
Vacío de succión	-0.011~0.038Mpa, 10 niveles ajustables
Vacío de simulación	-0.011~0.038Mpa, 10 niveles ajustables
Vacío de tracción	-0.011~0.025Mpa, 3 niveles ajustables
Ruido	≤ 50dB(A)

## 7. Solución de problemas.

### ● Problema 1: Succión débil o ausencia de succión.

CAUSA	SOLUCIÓN
Compruebe si el diafragma está instalado al revés o dañado.	Reinstale o sustituya el diafragma.
Compruebe si la conexión entre el diafragma y el motor de la bomba está apretada.	Apriete todas las conexiones.
Compruebe si protector se ajusta completamente al pecho.	Mantenga el protector de pecho ajustado al pecho en todo momento con el pezón en el centro del conducto del protector.

### ● Problema 2: No se enciende ni se carga.

CAUSA	SOLUCIÓN
Compruebe si la salida del cargador cumple los requisitos y si el cargador está bien enchufado.	Utiliza el cargador adecuado y asegúrate de que está bien enchufado.
La batería de litio se ha agotado.	Cargue el extractor una vez que la batería esté baja.

### ● Problema 3: Retorno de leche.

CAUSA	SOLUCIÓN
El diafragma no está instalado correctamente o está dañado.	Detenga inmediatamente la extracción y apague el extractor, límpielo. No lo utilice hasta que haya reajustado el diafragma o sustituido por uno nuevo.



# Garantía

¡Muchas gracias por elegirnos!. Por sus derechos e intereses, guarde la tarjeta de garantía correctamente. Si hay algún problema de calidad, póngase en contacto con el distribuidor.

22

Nombre \_\_\_\_\_ Nombre producto \_\_\_\_\_

Teléfono \_\_\_\_\_ Modelo \_\_\_\_\_

Tienda \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

Dirección \_\_\_\_\_

El usuario disfrutará de un año de servicio de mantenimiento gratuito a partir de la fecha de compra. Póngase en contacto directamente con el distribuidor.

Los accesorios de suministro no están cubiertos por la garantía.

Por favor, presente la tarjeta de garantía y el comprobante de compra o la factura al momento de la reparación.





**¡Muchas gracias por elegirnos!**

Para su correcto uso, asegúrese de leer atentamente el manual de usuario  
y de guardarlo correctamente.

**Balía SpA**

Rafael Cañas 192, piso 2, Providencia, Santiago, Chile.

[www.balía.cl](http://www.balía.cl)

[contacto@balía.cl](mailto:contacto@balía.cl)