

Gebrauchsanweisung CINDERELLA

2 In 1 Korrektur Bandage bei anfänglicher bis mäßiger Ausprägung von Hallux Valgus (Ballenzeh) und Digitus Quintus Varus (Schneiderballen, Bunionette)

Anwendungsdauer

Zu Beginn der Anwendung sollten Sie das Produkt für ca. 1 bis 2 Stunden tragen und auf Verträglichkeit überprüfen. Sobald Sie sich an die Bandage gewöhnt haben, können Sie diese einen halben bis einen ganzen Tag anwenden.

Produktbeschreibung

Durch die Anwendung von **Cinderella** werden der kleine und der Große Zeh aus Ihrer Fehlstellung heraus geöffnet und zugleich das Längsgewölbe und Fußquer- gewölbe unterstützt, so dass die Balance der Fußsohle regeneriert und somit das Gleichgewichtsverhalten des Körpers vom Fuß heraus positiv beeinflusst wird.

Weitere Informationen finden Sie unter: **Shop.N-Ippin.com**.

Vorsicht!

- Nutzen Sie dieses Produkt nicht zu einem anderen Zweck als zu der in der Beschreibung angegebenen Anwendung, da es sonst zu Verletzungen oder Beeinträchtigungen führen könnte.
- Zur Hautkontaktseite hin wird synthetisches Material verwendet. Sollten Hautirritationen auftreten, brechen Sie die Anwendung ab und konsultieren Sie ggf. Ihren Arzt.

Pflegehinweise

- Waschen Sie mit einem neutralen Waschmittel bei einer Wassertemp.max. 30 Grad Celsius mit der Hand.
- Bitte benutzen Sie kein Bleichmittel, Wäschetrockner oder Bügeleisen.
- Nach dem Waschen bitte sonnengeschützt trocknen.

Aufbewahrung

- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und zu hohe Temperaturen. Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und gut gelüfteten Platz.



Entsorgung

- Dieses Produkt ist aus Textil. Entsorgen Sie dies als brennbaren Abfall. (Je nach Region gibt es unterschiedliche Regelungen. Fragen Sie die örtlichen Stellen und bitte befolgen Sie diese)

Material

- Nylon, Polyurethan

Schuhgröße	Größe	Fußlänge	Umfang des Spanns
35,5 - 37,5	S	21 – 23 cm	20 cm – 22,5 cm
38 - 40,5	M	23 – 25 cm	22 cm – 24,5 cm
41 - 44	L	25 – 27 cm	24,5cm – 26,5cm

Vertrieb durch:



Rhabanusstraße 38
65375 Oestrich-Winkel
Tel: 0 67 23 – 8 08 11 10
Fax: 0 67 23 – 8 08 11 12
E-Mail: info@n-ippin.com
Homepage: www.n-ippin.com
Online-Shop: shop.n-ippin.com



Daiya Industry Co., Ltd.

1253, Ofuku, Minami-ku, Okayama, Japan 701-0204

Fertigungsnummer: 306372 | letzte Überarbeitung: Aug 2014



MDSS GmbH

Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germany



Anwendung (am Beispiel des linken Fußes)

1.



Zuerst an großem und kleinem Zeh die Kappen aufsetzen und die Bandage bis zum Spann ziehen.

2.



Anschließend am Fersenband über die Ferse ziehen.

Sollten nach dem Anziehen noch Falten oder Knicke am Innenfutter oder Außenstoff sein, bitte diese Stellen vorsichtig glatt ziehen.

Kappe am
kleinen Zeh

Kappe am
großen Zeh

Doppelte
Struktur
(Innenfutter)

Fersenband

