

Gebrauchsanleitung für bonbone Daumen- und Fingerbandage Open Thumb Flat (Mommy`s Thumb 3000+)

Indikation

Zur unterstützenden Immobilisierung von überbelasteten oder z.B. durch Stauchungen verletzten Finger oder Daumen, bei Sportverletzungen, bei sogenannten PC Daumen (Überbelastung bei Arbeiten an der PC Tastatur), bei sogenanntem Mami Daumen (Überbelastung bei häufigem Tragen von Kleinkindern), bei allgemein notwendiger Immobilisierung (Ruhigstellung des Daumen oder der Finger)

Beschreibung

- Dieses Produkt wurde speziell dafür entwickelt, um mit einer sehr dünnen Variante einer Fingerbandage einen möglichst hohen Grad an Effizienz zu erzielen. Die Besonderheit liegt vor allem darin, eine weniger Tätigkeit einschränkende Variante zu zumeist stärker aufragenden Produkten bieten zu können. Diese Bandage ist somit auch hervorragend zum Tragen unter Hygienehandschuhen geeignet.
- Durch einen neuartigen, patentierten Softhaftverschluss wird eine Beschädigung von Textilien, aber auch Hautreizungen, weitestgehend eingeschränkt. Mommy`s Thumb 3000+ kann bei Bedarf zugeschnitten werden, z.B. wenn eine Immobilisierung oberhalb des mittleren Gelenks von Daumen oder Fingern nicht gewünscht ist.
- Mommy`s Thumb 3000+ kann, je nach Immobilisierungspräferenz oder Lokalisierung, an Daumen oder Finger frei positioniert werden, d.h. eine Unterstützung kann hier beim Beugen (Positionierung der Haftaufsatzapplikation an der Daumenaußenseite) oder beim / zum Strecken (Positionierung der Haftaufsatzapplikation an der Daumeninnenseite) erfolgen.
- Mittels der Haftaufsatzapplikation kann die Stärke der Immobilisierung bestimmt werden. Ohne Applikation können Daumen oder Finger oberhalb des Mittelgelenks noch ein wenig gebeugt werden, mit Applikation beträgt der Immobilisierungsgrad, ohne Kraftaufwände nahezu 100%.

Anwendungsdauer

Bitte tragen Sie Mommy`s Thumb 3000+ anfangs solange für 1 – 2 Stunden täglich, bis sich Ihre Hand an die Bandage gewöhnt hat. Danach kann die Bandage während der Wachphase dauerhaft getragen werden. Bitte tragen Sie Mommy`s Thumb 3000+ nicht während des Schlafens, um unkontrollierbare Taubheit zu vermeiden bzw. die Tiefschlafphasen nicht zu gefährden.

Achtung

- Bitte verwenden Sie Mommy`s Thumb 3000+ ausschließlich gemäß den beschriebenen Zwecken
- Haftverschluss sowie Haftapplikationen sind speziell für dieses Produkt konstruiert worden und haften, soweit bekannt, nicht auf anderen Textilien. Bitte lassen beim Kontakt mit anderen Materialien trotzdem Vorsicht walten, um evtl. Beschädigungen zu vermeiden.
- Bei Hautirritationen, insbesondere bei Materialunverträglichkeit auf Nylon und Polyurethan, stoppen Sie bitte unverzüglich die Anwendung mit Mommy`s Thumb 3000+.
- Bitte vermeiden Sie den Einfluss von Reibungshitze auf das Produkt. Mommy`s Thumb 3000+ besteht Klebeverbundstoffen, welche empfindlich auf Temperaturen über 30°C reagieren können.

Waschhinweise

- Handwäsche bis 30°C
- Neutrales, nicht zu aggressives Waschmittel verwenden
- Nicht bleichen
- Kein Wäschetrockner
- Nicht bügeln
- Keine chemische Reinigung
- Trocknen ohne direkte Sonneneinstrahlung

Größentabelle		
Größe	Umfang Daumen	Umfang Handgelenk
S	5 - 6 cm	13 - 16 cm
M	5,5 - 7 cm	15 - 18 cm
L	6 - 7,5 cm	17 - 20 cm

Material:

Nylon, Polyurethan

Vertrieb durch:



N-IPPIN GmbH
Rhabanusstraße 38
65375 Oestrich-Winkel
Tel. 0 67 23 - 8 08 11 10
Fax: 0 67 23 - 8 08 11 12
E-Mail: info@n-ippin.com
Online-Shop: shop.n-ippin.com


Hersteller:

Daiya Industry Co., Ltd.
1253, Ofuku, Minami-ku, Okayama, Japan 701-0204

Letzte Überarbeitung: Feb 2017

*Entscheiden Sie vorher, wo Ihr Daumen oder Finger stabilisiert werden soll und platzieren Sie den Haftfilz dort, wo Sie die Stabilisierung oder Immobilisierung benötigen. (Zum Strecken zur Daumeninnenseite, zur Immobilisierung der Beugung an der Außenseite oder in frei wählbarer Position.)

Details von Mommy`s Thumb 3000+
Abbildungsbeispiel für die rechte Hand

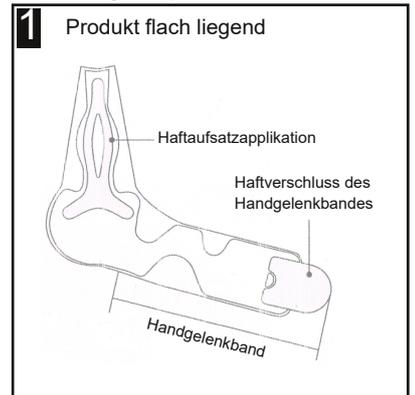

Mommy`s Thumb 3000+ anlegen

